


Instruções de montagem da interface

[Referências 194-600/194-700]

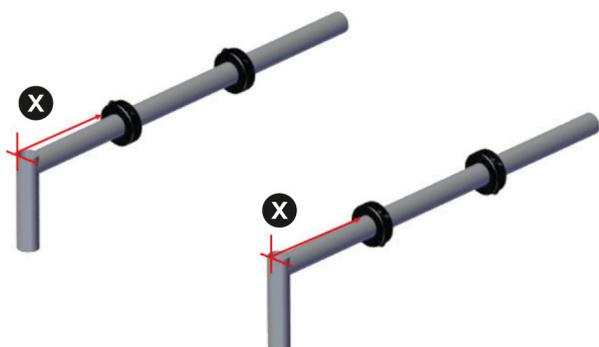


A distância (X) é a posição recomendada desde a frente do tubo suspenso até à frente do primeiro anel.



COLOCAÇÃO DA INTERFACE		INTERFACE 194-600 (J)	INTERFACE 194-700 (K)
SISTEMA DE SEDESTAÇÃO	CADEIRA	DISTÂNCIA (X)	
Squiggles	Zippie Iris	170mm	
Squiggles	Zippie TS	170mm	
MYGO	Zippie Iris		220mm
MYGO	Zippie TS		220mm


(Y) é a distância entre os dois anéis.

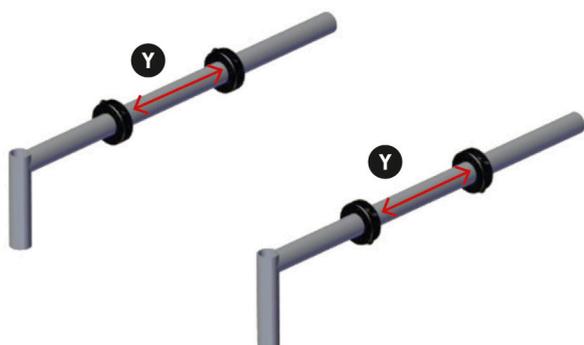

COLOCAÇÃO DA INTERFACE		INTERFACE 194-600 (J)	INTERFACE 194-700 (K)
SISTEMA DE SEDESTAÇÃO	CADEIRA	DISTÂNCIA (X)	
Squiggles	Zippie Iris	116mm	
Squiggles	Zippie TS	116mm	
MYGO	Zippie Iris		116mm
MYGO	Zippie TS		116mm


1º Passo - Definir a distância / colocar os anéis

- Remover os parafusos (x2) de cada anel (x4)
- Separar o anel
- Medir a distância de acordo com a tabela na página 1 (se necessário, marcar a posição na base)
- Colocar as duas metades do anel em cada lado do tubo
- Recolocar os parafusos sem os apertar

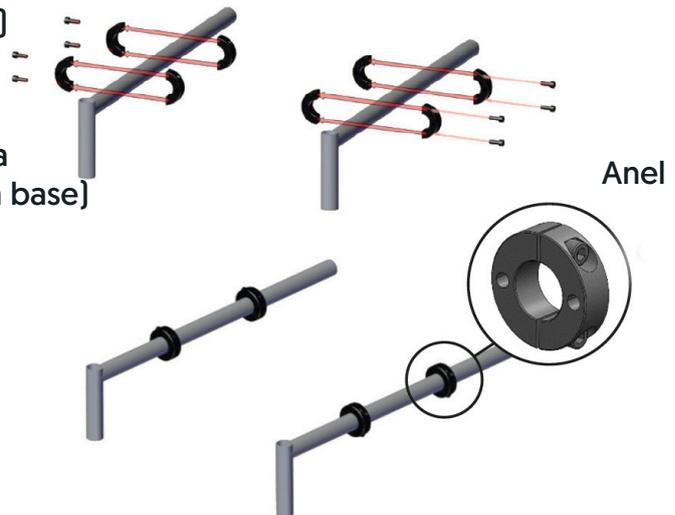

2º Passo - Posicionar a interface


- Desparafuse os parafusos dos reguladores de forma que estes possam ser deslocados livremente para dentro e fora da interface
- Puxar os reguladores para fora até estes estarem posicionados sobre os anéis
- Colocar a interface sobre os anéis

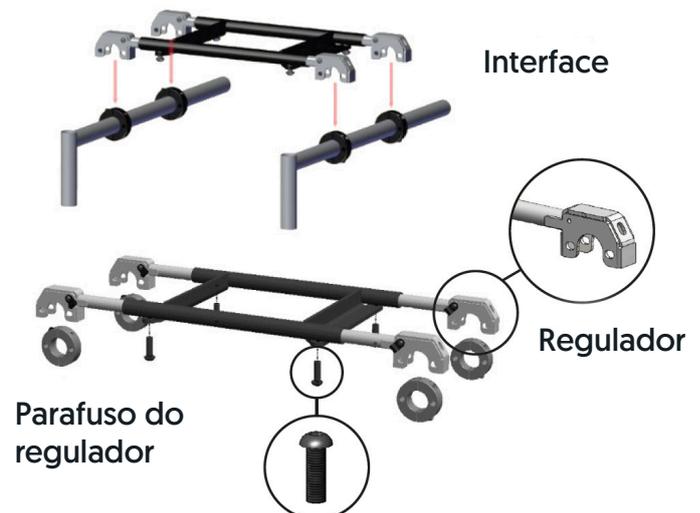

3º Passo - Fixar a interface

- Para fixar a interface, atravessar simultaneamente os orifícios dos reguladores e dos anéis com os pinos (x8).
- Os pinos devem ser introduzidos desde a parte dianteira da cadeira (ver imagen)

1. Assegure-se que os parafusos estão voltados para o exterior (ver imagem)
2. Apertar manualmente os parafusos superiores
3. Apertar manualmente os parafusos inferiores
4. Apertar com uma chave allen de 5 mm os parafusos superiores até estes estarem firmemente presos
5. Repetir o processo para os parafusos inferiores

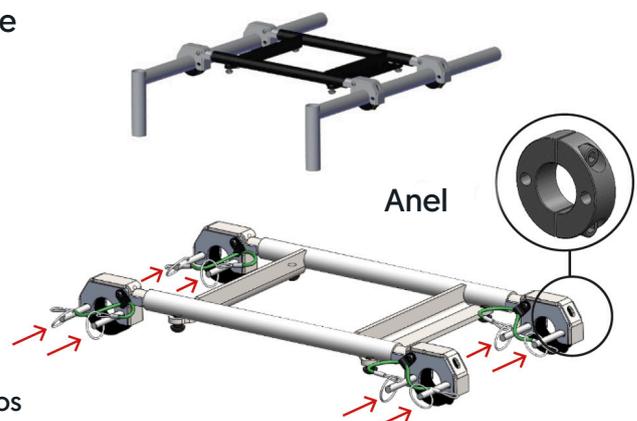

- Apertar os parafusos dos reguladores com uma chave allen de 5 mm até estes estarem firmemente presos