

Q300[®] M Mini Sedeo Lite

Imagine the Possibilities





KOMPAKT UTRYMME? MED SMAL BAS PÅ BARA 520 MM ÄR Q300 M MINI ETT SMART VAL!

Med Q300 M Mini kan du ta dig fram där andra elrullstolar inte får plats. Den smala basen gör det smidigare att manövrera i till exempel vardagsrum, kök, korridorer och hissar.

520 mm



VAD MENAR VI MED VERKLIG MITTHJULSDRIFT?

Det är när elrullstolens drivhjul är helt centrerade i förhållande till sin längd. Om de är positionerade lite längre fram eller lite längre bak, blir vändcirkeln större (mer av rullstolen svänger runt). Då finns det också mindre vikt på drivhjulet, vilket minskar väggreppet. Med Q300 M Mini får man den mest kompakta vändcirkeln samt ökat väggrepp och stabilitet tack vare VERKLIG mitthjulsdrift.



VÄNDRADIE PÅ OTROLIGA 560 MM

Tack vare tekniken från VERKLIG mitthjulsdrift vänder Q300 M Mini på stället och har en vändradie på fantastiska **560 mm**. Jämför man med framhjulsdrivna- och bakhjulsdrivna elrullstolar behöver dessa en större vändradie på grund av länkhjulens placering.



SMALA 12" DRIVHJUL

Letar du efter en rullstol som är smidig att manövrera inomhus? Med Q300 M Mini får du en kompakt bas på 520 mm.



UPPFÄLLBARA ARMSTÖD

Tycker du att det kan vara besvärligt vid överförflyttningar? På Q300 M Mini kan man enkelt fälla armstöden bakåt för att frigöra utrymme och för att underlätta överförflyttningar. Man kan också välja en armstödsmodell som följer med ryggen vid båkåtfällning eller som är helt avtagbar.



410 mm

LÅG SITTHÖJD

Q300 M Mini går utmärkt att köra in under bord eller in i din anpassade bil tack vare sin låga sitthöjd, från 410 mm med fast tilt och 430 mm med lyft/tilt i kombination.

KORT BAS PÅ BARA 1060 MM

Med en längd på bara **1060 mm** (med centermonterade benstöd) är Q300 M Mini smidig i hissar och i andra trånga utrymmen. Den har också tillräckligt låg vikt (från **103 kg**) för att vara kompatibel med de flesta andra typer av rullstolshissar.

1060 mm

Styrenheten kan enkelt svängas undan för att komma närmare.

KOM NÄRMARE MED CENTERMONTERAT BENSTÖD

Det manuella eller eldrivna (bilden) centermonterade benstödet eliminerar behovet av traditionella benstöd. Genom att sitta med knäna böjda i 90° kan du inte bara göra snävare svängar utan du kan också komma närmare föremål som t.ex. bord.



UTOMHUSPRESTANDA

Upplev en riktigt kompakt elrullstol med sensationell utomhusprestanda. Smal nog för att vara smidig inomhus samtidigt som man får samma utomhusprestanda som hos en fullstor elrullstol.

ANTI-PITCH TEKNOLOGI

Traditionellt när en elrullstol stannar i en sluttning kommer stolens stopprörelse att skjuta dig något framåt. Det problemet har vi eliminerat med anti-pitch-teknik så att du sitter **säkert** och stabilt.

OBEROENDE FJÄDRING PÅ ALLA HJUL

Med den **patenterade** oberoende fjädringen håller sig alla sex hjul på marken medan de tar dig över hinder. Eftersom varje hjul har sin egen fjädring absorberas stötar och ojämnheter av hjulets fjädrar, så att man upplever en mjuk och smidig körning.

RÄCKVIDD PÅ UPP TILL 36 KM

Med starka 56 Ah batterier, kan du ta dig upp till 36 km med din Q300 M Mini.

BRA VÄGGREPP MED 14" DRIVHJUL

Om du enbart är ute efter bra prestanda för utomhus bruk – då är det 14" drivhjul som passar dig bäst. Med dessa får du en bas på 570 mm men också bra väggrepp och stabilitet. Du kan också ta dig över hinder (som t.ex trottoarkanter) på upp till 75 mm.



BELYSNING PÅ STÄNKSKÄRMEN

Nu tillgänglig på Q300 M Mini-chassit: de subtila integrerade lamporna lyser upp vägen och ser också till att du syns bättre.



PRAKTISK ÖVER TROTTOARKANTER

Med **12" drivhjul** kan Q300 M Mini hantera trottoarkanter på upp till **50 mm**. Har du däremot **14" drivhjul** klarar de kanter på upp till **75 mm**.

A man and a woman are riding electric mobility scooters on a city street. The man, on the left, is wearing a dark jacket and a scarf, smiling at the camera. The woman, on the right, is wearing a yellow and white striped coat and a black beanie, looking towards the camera. They are both on modern-looking electric scooters. The background shows a paved street with other pedestrians in the distance.

QUICKIE 4-POLIGA MOTORER

Under våra 40+ års erfarenhet har vi utvecklat hållbara och högeffektiva motorer med prestanda, körbarhet och räckvidd som andra inte kan matcha.

HUSHÅLL MED KRAFTEN

Som en bil på motorvägen kontra i staden är våra motorer designade för optimal körprestanda så att du får den kraft du behöver när du behöver den (och bevarar den när du inte gör det).

ENERGIKICK

Knepig lutning? Vår styrenhet och motorer samarbetar för att ge dig ytterligare 10 sekunders kraftförstärkning när du behöver det som mest.

MINSKA VÄRMEÖKNING

De stora kylflänsarna hjälper till att leda bort värme från motorn och på så sätt kyla ner dem under konstant färd – även i backar och på ojämna underlag.

DESIGNAD FÖR ATT HÅLLA

Till skillnad från andra elrullstolar är våra växlar av polerad metall (ej plast). De ger lägre ljud och högre effektivitet och är framtagna för att klara tuffa förhållanden.

MED I TRAFIKEN

Åker du kollektivt? Q300 M Minis smala bas och snäva vändcirkel hjälper dig att klara även de mest trafikerade resor.

SMIDIG I BIL

Med en vikt från bara **103 kg** kan Q300 M Mini enkelt flyttas in och ut ur ditt fordon. Med tillval som det nedfällbara ryggstödet, sidosvängbara benstöden eller avtagbara armstöd ger ett ännu tätare, kompakt paket när utrymmet är litet.



BEHÅLLER GREPPET PÅ RAMPER

Eftersom de främre länkhjulen tvingar upp drivhjulet från marken kan man förlora dragkraften på ramper. Men tack vare att Q300 M Mini's främre länkarmar rör sig oberoende av basen så behåller drivhjulet sitt grepp.



RULLSTOLSANPASSADE FORDON

Med sin låga sitthöjd får Q300 M Mini lätt plats under ratten på ditt fordon med gott om utrymme över för huvudet.

ELDRIVNA TILLBEHÖR TILL Q300 M MINI

Q300 M Mini har samma prestanda och ett flertal andra funktioner som större elrullstolar har. Oavsett om det är eldriven tilt, lyft, rygg eller eldrivna benstöd, Q300 M Mini är laddad med alternativ för att möta både dina kliniska behov och passa din livsstil.



LÄNGDKOMPENSERANDE BENSTÖD

Genom att höja och sänka benen hjälper dessa benstöd till att minska svullnad och förbättra cirkulationen. Genom att justera längden hålls din sittande position konstant, vilket förhindrar oönskad rörelse av bäckenet. Det centermonterade benstödet (bilden) ger också större utrymme längst fram på stolen vid manövrering och överförflyttning.

TILT-IN-SPACE

Justera din sittposition under dagen med upp till **50°** eldriven tilt. Genom att omfördela din vikt från dynan till ryggstödet, får du tryckavlastning och behåller en bekväm sittställning utan ansträngning.

0° - 50°



300 mm

ELEKTRISK LYFT & TILT

Sitt högre och få mer tillgång till omgivningen med 300 mm lyft och sitt bekvämt och tryckavlastat med upp till 50° lutning.

ELEKTRISK RYGGVINKEL

I likhet med hur ett säte fälls i en bil, hjälper det eldrivna ryggstödet till att fördela din vikt över mer av ryggstödet samtidigt som den bibehåller en konstant sittvinkel.



C-Me


KÖR I UPPHÖJT LÄGE I 4,5 KM/H

C-Me handlar om att komma upp i höjd och att få mer tillgång till omgivningen. Du kan till och med röra dig framåt (**i 4,5 km/h**) samtidigt som du sitter i **300 mm** förhöjt läge. Du kan också byta läge med en knapptryckning utan att behöva stanna och får därmed en smidig och bekväm åktur.

VILKEN STIL VÄLJER DU?

Det finns 12 olika mönster på kåpan att välja mellan. Kombinera med någon av de 7 färginlägggen på hjul och länkhjul för att få en färgmix som tilltalar dig.

Färger som visas i den här broschyren kan skilja sig från de faktiska färgerna på grund av begränsningarna i utskriftsprocessen. Detta bör därför endast användas som en indikation.

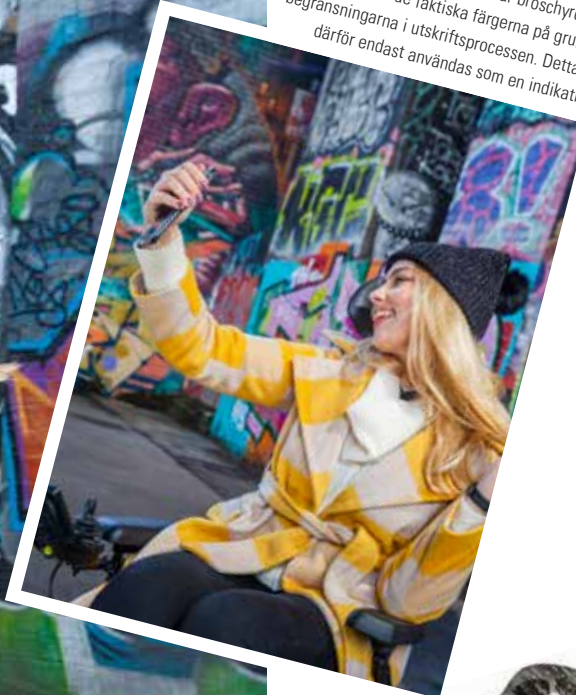

Floral
White

Carbon
Black

Flame
Asteroid
Grey

Flame
Sharp Blue

Flame
Hot Red

Flame
Pure White

Grey
Burst

Pink
Burst

Purple
Burst

Blue
Burst

Red
Burst

Pure
White Burst

ENFÄRGAD KÅPA:



FÄRGINLÄGG:



SEDEO LITE SITTSYSTEM

Genom att kombinera en justerbar och konfigurerbar ram med ett brett utbud av stöd och positioneringsalternativ, är SEDEO LITE idealisk för brukare med milda till måttliga positioneringsbehov.

UPPFÄLLBARA ARMSTÖD

Fäll bara upp armstöden för större utrymme när du gör överförflyttningar. Finns även som avtagbar eller i en version där de följer ryggen vid bakåtfällning.

ELDRIVA LÄNGDKOMPENSERANDE BENSTÖD

De eldrivna benstöden är justerbara i längd för att uppnå bästa möjliga passform. Finns även som swingaway och centermonterad version.

FÖR BRUKARE
MED MILDA TILL
MODERATA
POSTURALA
BEHOV

RYGG MED KOMFORTDYNA

Den höjdjusterbara ryggen ger ett luftgenomsläppligt, mjukt skydd med 4 spänningsjusterbara remmar för att tillgodose en mängd olika positioner. Uppgradera till SEDEO PRO eller JAY rygg och dyna för att öka komforten och positioneringen.



SÄTESSKENA

Den integrerade sätesskenan erbjuder många monteringsmöjligheter för positioneringselement som bålstöd, lår- och knästöd. Fäst och skjut på plats!



KONTROLL

R-NET

AVANCERAD JOYSTICK

Levereras som standard med R-net, med den avancerade panelen kan du njuta av en stor lättläst HD-display fullmatad med funktioner som kan styra både din elrullstol och omgivning.

KOPPLA UPP DIG

Genom att använda integrerad infraröd teknologi kan du med din joystick kontrollera saker i din närhet såsom TV, telefon och andra underhållningssystem. Har du ett sk "smart hem" kan du koppla upp dig även mot det.

BLUETOOTH OCH IDRIVE

Kontrollera din telefon, dator, surfplatta och andra Bluetooth-enheter med detta användbara tillval. Anslut och kontrollera upp till fyra enheter.

PATENTERADE PROGRAMBARA KNAPPAR

Tack vare QUICKIE's patenterade programmerbara knappar kan du ändra funktionen på en knapp på din joystick till det kommando du önskar. Du kan också programmera en extra funktion (långt tryck) till en knapp som ger dig snabbare, bekvämare och smidigare åtkomst till de funktioner du vanligen använder utan att behöva använda din joystick.



SWITCH-IT

ALTERNATIVA KONTROLLER

Om användning av en traditionell joystick inte är det bästa alternativet för dig, ger alternativa styrsätt dig möjlighet att fullt ut uppleva din rullstols körkapacitet och fördelar. Det finns ett urval av alternativ såsom huvudkontroller och hakstyrning.

Bekväm tillgång till dina 5 programmerbara lägen med Ctrl+5 – en perfekt kombination med minnessystem. Det gör att du kan gå direkt till den funktion som du behöver med ett knapptryck.





LINK-IT

MONTERINGSSYSTEM

Behöver du extra brytare eller specialkontroller? Inga problem, anslut enkelt genom att använda det universella monteringsystemet Link-It (tillval).

Genom att använda en kombination av tillgängliga moduler och delar, kan du skapa ett oändligt antal kombinationer för att underlätta dina behov. Det är inte bara enkelt att positionera, Link-It säkerställer också att den minimalistiska, rena designen hos din rullstol inte äventyras genom extra kontroller. Så oavsett om det är en extra handkontroll på armstödet, en tryckknapp på ryggstödet eller en switch på nackstödet du vill ha, bara länka ihop det



JAY & WHITMYER

POSITIONINGSALTERNATIV

För att klara varje brukares kliniska behov och säkerställa att vi erbjuder bästa möjliga sittsystem finns det ett stort urval av WHITMYER huvudstöd och JAY dynor tillgängliga .

WHITMYER HUVUDSTÖD

Skapat för att tillgodose en rad användarbehov med allt från behov av grundläggande stöd till mer avancerat sådant. WHITMYER nackstöd finns i en rad olika former och storlekar för överlägsen huvudpositionering och komfort.

JAY DYNOR & RYGGAR

Designad för bäckenstabilitet, hudskydd och komfort, JAY dynor och ryggar kräver mycket lite underhåll, är väldigt anpassningsbara och finns i ett stort urval för att klara dina behov.



TEKNISK SPECIFIKATION

Q300 M Mini Sedeo Lite

Sittsystem	SEDEO LITE	Underbenslängd	180 - 460 mm
Eldriven tilt	0° - 50° / 0° - 30° / -5° - 25°	Sitthöjd	430- 490 mm
Sittbredd	385 - 510 mm	Max. brukarvikt	136 kg
Sittdjup	410 - 560 mm	C-Me	Ja
Rygghöjd	460 - 510 mm	Max. räckvidd (ISO 7176-4)	Upp till 25 km (med 41 Ah batterier) Upp till 36 km (med 56 Ah batterier)
Total bredd bas	Från 520 mm	Produktens vikt (med batterier)	Från 103 kg
Total längd (m. center-monterat benstöd) bas	1060 mm	Drivhjul	12"/13"/14"
Vändradie	560 mm	Max. hastighet	6 km/h / 8 km/h
Max. säker lutning	8°	Batteri	41 Ah/56 Ah
Max. kantklättring	50 mm (med 12" drivhjul) 60 mm (med 13" drivhjul) 75 mm (med 14" drivhjul)	Transport utan brukare	Fäst rullstolen ordentligt i fordonet (t.ex en bil eller flygplan)
Elektronik	R-NET	Avsett bruk och miljö	För personer som inte kan gå eller som har begränsad rörlighet, för inomhus och utomhus bruk. Rullstolstyp klass B



Sunrise Medical

Neogatan 5
431 53 Mölndal
031-748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se



För ytterligare information kring den fulla specifikationen och alternativ och tillbehör, var god se beställningsunderlaget. All information kan ändras utan föregående meddelande. Var god kontakta Sunrise Medical om du har några frågor.

Om du är synskadad kan detta dokument visas i PDF-format via SunriseMedical.se.

