



Mygo Seat

Manual do utilizador



Apoio para crianças



O Assento Mygo foi concebido para oferecer um elevado nível de posicionamento postural ao mesmo tempo que permite a função e a mobilidade. Este manual mostra como pode utilizar de forma rápida, fácil e segura todas as funções. As instruções sobre segurança e manutenção garantem que irá desfrutar da utilização deste produto durante um longo período de tempo.

CONTEÚDO

1. Utilização prevista	p.04
2. Certificação	p.04
3. Avisos e Precauções	p.05
4. Termos da garantia	p.06
5. Registo histórico do produto	p.07
6. Registo formação produto	p.07
7. Informação de segurança	p.08
8. Precauções e Contraindicações	p.11
9. Como desembalar e montar o assento	p.12
10. Encaixar as almofadas	p.25
11. Configuração clínica para a gestão postural	p.33
12. Ajustes Frequentes para o uso diário	p.48
13. Informação sobre limpeza e cuidados	p.59
14. Inspeção diária do produto	p.61
15. Inspeção anual do produto	p.62
16. Relançamento de produtos Leckey	p.63
17. Manutenção de produtos	p.64
18. Informação técnica	p.65

SECÇÃO 01: UTILIZAÇÃO PREVISTA

Utilização prevista

Os sistemas de assento da Leckey destinam-se a apoiar crianças e jovens adultos com necessidades posturais leves a complexas que afetam a capacidade de se sentar sem apoio adicional.

Indicações para uso

O Assento Mygo é um sistema de assento modular desenhado para responder às necessidades de crianças com uma variedade de deficiências que afetam a sua capacidade de se sentar de forma independente sem suportes posturais externos. É indicado para uso principalmente em casa, ambiente escolar interior ou exterior, se usado sobre uma base de mobilidade. Está disponível em três tamanhos; para uma faixa etária aproximada de 3-10, 8--14 e 10--16 anos, cada um com um peso máximo do utilizador de 50kg (110lbs), 60kg (132lbs) e 70kg (154lbs) respetivamente. O suporte postural configurável disponibilizado pelo Assento Mygo é indicado para uso com crianças com necessidades posturais complexas (GMFCS IV-V).

SECÇÃO 02: CERTIFICAÇÃO

O Assento Mygo está classificado como Dispositivo Médico de Classe I ao abrigo dos regulamentos da UE e do Reino Unido. Como fabricante, a James Leckey Design Limited declara que este produto cumpre com os requisitos do Regulamento de Dispositivos Médicos (2017/745), Regulamentos de Dispositivos Médicos do Reino Unido 2002, Diretiva de Dispositivos Médicos (93/42 CEE) e EN12182 Ajudas técnicas para pessoas deficientes, requisitos gerais e métodos de ensaio.

Aviso ao utilizador e/ou paciente: Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser reportado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou paciente está estabelecido.

Nota:
Conselhos gerais para o utilizador. O não cumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos, danos para o produto ou para o meio ambiente!

SECÇÃO 03: AVISOS E PRECAUÇÕES

- 1. AVISO RISCO DE QUEDA**
 - Usar o assento nos limites da sua gama de posições reduzirá a sua estabilidade. Use o assento apenas na altura e/ou inclinação máximas quando em solo nivelado (inclinação inferior a 2 graus).
 - Ao usar o assento em declives/rampas (até 10 graus), certifique-se de que o encosto está na posição vertical e a altura do assento está abaixo da metade da altura.
- 2. RISCO DE ENTALAMENTO DE DEDOS**
 - Cuidado para que os dedos do operador ou das crianças no chão não fiquem presos no mecanismo de elevação e descida do assento.
- 3. AVISO DE SEGURANÇA DO OCUPANTE**
 - Certifique-se de que todos os arneses do ocupante e especialmente os cintos pélvicos estão apertados e ajustados para prender o ocupante em segurança antes de movimentar o assento ou sair das proximidades do assento estático.
- 4. RISCO DE ESMAGAMENTO DE DEDOS**
 - Cuidado ao montar ou ajustar a posição dos componentes do assento para que os seus dedos não fiquem esmagados ao posicionar os componentes do assento e ao apertar as fixações.
- 5. VERIFICAÇÕES DIÁRIAS DE PRECAUÇÃO**
 - O assento deve ser verificado diariamente antes da utilização para garantir que todos os arneses e os elementos do assento estão fixados de forma segura. Antes de usar, verifique ainda se o cabo de carregamento da bateria apresenta sinais de danos. Consulte a secção 'Inspeção diária do produto' para mais detalhes sobre as verificações diárias.
- 6. CUIDADO RISCO DE DISPARO DO CHASSIS MOTORIZADO**
 - Certifique-se de que a ligação de carregamento da bateria para o chassis motorizado é removida do assento antes de o movimentar.
- 7. CUIDADOS DE LIMPEZA**
 - Limpe o assento regularmente para evitar a acumulação de sujidade nos elementos do assento e no chassis. A sujidade acumulada pode desgastar prematuramente as almofadas do assento e estimular a corrosão do chassi. Use apenas produtos de limpeza domésticos não abrasivos e panos húmidos, não use água corrente nos estofos quando ainda estiverem presos ao assento. Consulte a secção 'Informação sobre limpeza e cuidados'.

8. LAVADORAS/MANGUEIRAS DE LIMPEZA

- Não use mangueiras ou lavadoras de pressão nos componentes da armação, já que o sistema de elevação elétrico do assento não é vedado contra água corrente e pode ficar danificado com a entrada de água. Consulte a secção 'Informação sobre limpeza e cuidados'.

9. CUIDADOS DE MANUTENÇÃO/ REPARAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÓNICOS

- Não existem componentes no conjunto de elevação do assento elétrico cuja manutenção possa ser realizada pelo utilizador. A manutenção e as reparações devem ser realizadas apenas por pessoal autorizado pela Leckey.

10. CUIDADOS DE ELIMINAÇÃO

- Elimine a cadeira apenas num local de reciclagem de lixo comunitário e certifique-se de que os componentes elétricos são removidos para eliminação separada.

11. CUIDADOS DE COLOCAÇÃO EM UTILIZAÇÃO

- Ao colocar o assento em utilização após o armazenamento, deixe-o adaptar-se à temperatura ambiente durante 2 horas. Limpe qualquer humidade que se tenha condensado no produto.

SECÇÃO 04: TERMOS DA GARANTIA

A garantia aplica-se apenas quando o produto é usado de acordo com as condições específicas e para os fins previstos, seguindo todas as recomendações dos fabricantes (consulte ainda os termos gerais de venda, entrega e pagamento). Todos os produtos e componentes fabricados pela Leckey têm uma garantia de três anos.

SECÇÃO 05: REGISTO HISTÓRICO PRODUTO

O seu produto Leckey está classificado como Dispositivo Médico de Classe 1 e, como tal, só deve ser prescrito, configurado ou reeditado da utilização por um técnico competente com formação na utilização deste produto. A Leckey recomenda que seja mantido um registo escrito com pormenores de todas as configurações, relançamentos e inspeções anuais realizadas a este produto.

SECÇÃO 06: REGISTO FORMAÇÃO PRODUTO

(PAIS, PROFESSORES E CUIDADORES)

O seu produto Leckey é prescrito como um Dispositivo Médico de Classe 1 e, como tal, a Leckey recomenda que pais, professores e cuidadores que utilizem o equipamento devem ser alertados para as seguintes secções deste manual de utilizador por uma pessoa tecnicamente competente.

***SECÇÃO 7**

Informação de segurança

***SECÇÃO 12**

Ajustes frequentes para uso diário

***SECÇÃO 13**

Informação sobre limpeza e cuidados

***SECÇÃO 14**

Inspeção diária do produto

A Leckey recomenda que seja mantido um registo escrito de todas as pessoas que receberam formação sobre a utilização correta deste produto.

SECÇÃO 07: INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

1. Leia sempre as instruções completas antes de utilizar o produto.
2. Para aumentar a segurança, recomendamos que os utilizadores não sejam deixados sozinhos durante a utilização do equipamento da Leckey.
3. Use apenas componentes aprovados pela Leckey com o seu produto. Não é permitido modificar o produto. O não cumprimento das instruções pode colocar o utilizador ou o cuidador em risco e invalidará a garantia do produto.
4. Em caso de dúvida sobre a utilização segura do seu produto Leckey ou se alguma peça estiver danificada, deixe de usar o produto e contacte a nossa equipa de Atendimento ao Cliente ou com o seu revendedor local, o mais rapidamente possível.
5. Realize todos os ajustes posturais relevantes e assegure-se de que estão bem presos antes de colocar o utilizador neste produto. Alguns ajustes podem exigir a utilização de uma ferramenta que é fornecida com cada produto. Mantenha todas as ferramentas fora do alcance das crianças.
6. Ao colocar o utilizador num sistema de assento, tanto por motivos de postura como de segurança, prenda sempre primeiro os arneses de apoio pélvico.
7. Quando o produto estiver parado, certifique-se de que todos os rodízios estão travados e voltados para o lado contrário da base, pois isto irá melhorar a estabilidade do produto. Isto é especialmente importante quando o recurso de espaço de inclinação ou reclinção das costas está a ser utilizada.
8. Quando o assento estiver a ser utilizado num chassi Hi-low, por favor, certifique-se de que o pedal de ajuste de altura e a alavanca do espaço de inclinação estão bloqueados e não podem ser ajustados acidentalmente por outras crianças.
9. Quando os assentos Leckey são utilizados no chassi Hi-Low, não recomendamos que os utilizadores sejam movidos sobre superfícies desniveladas quando se encontram no equipamento. Devem ser tomados os devidos cuidados e atenção ao colocar/retirar o utilizador do assento.

10. Nunca deixe o produto sobre uma superfície com mais de 5 graus de inclinação. Não se esqueça de bloquear os rodízios.
11. Utilize apenas a pega de empurrar para dirigir e mover o assento de uma área para outra. Nunca utilize a bandeja ou o encosto de cabeça para este fim.
12. O produto contém componentes que podem representar risco de asfixia para crianças pequenas. Verifique sempre se os manipuladores e parafusos de bloqueio que se encontram ao alcance da criança estão sempre bem apertados e seguros.
13. Os produtos Leckey cumprem com a regulamentação de segurança contra incêndios de acordo com a EN12182. No entanto, o produto contém componentes plásticos e, como tal, deve ser mantido afastado de todas as fontes diretas de calor, incluindo chamas, cigarros, aquecedores a gás.
14. Não coloque objetos quentes acima de 40°C na bandeja.
15. Limpe o produto regularmente. Não utilize produtos de limpeza abrasivos. Realize verificações de manutenção regularmente para garantir que o seu produto está em boas condições de funcionamento.
16. O produto foi concebido para ser utilizado em espaços interiores e, quando não estiver a ser utilizado, deve ser guardado em local seco e que não esteja sujeito a temperaturas extremas. O intervalo de temperatura de operação segura do produto é +5 e +40 graus Celsius.
17. Verifique sempre se os botões plásticos na pega de empurrar estão bem apertados antes de mover a unidade do assento.
18. Antes de utilizar o assento, verifique sempre se a pega da interface da unidade do assento está totalmente encaixada no chassi. Se a pega não estiver encaixada corretamente, a unidade do assento poderá soltar-se e provocar ferimentos graves na criança ou no cuidador.

Testado contra colisões

O Assento Mygo foi testado contra colisões e aprovado para utilização em veículos.

Foi testado na sua configuração completa numa base substituta com um suporte de cabeça Leckey acoplado.

Se o de Assento Mygo estiver a ser utilizando num veículo, os seguintes pontos devem ser seguidos:

O Assento Mygo deve ser posicionado para a frente e utilizado com um Sistema de Retenção Unwin e um suporte de cabeça que deve ser posicionado adequadamente em todos os momentos durante o transporte. O suporte de cabeça está disponível como acessório opcional com o Assento Mygo.

O Assento Mygo é testado contra colisões e cumpre os requisitos da ISO16840 parte 4. Para mais informações, entre em contacto com a nossa Equipa de Atendimento ao Cliente.

Combinações de Dispositivos Médicos

Pode ser possível combinar o Assento Mygo com um ou mais do que um outro Dispositivo Médico ou outro produto. Informações sobre quais as combinações que são possíveis podem ser encontradas em leckey.com. Todas as combinações listadas foram validadas para cumprir com os Requisitos Gerais de Segurança e Desempenho, secção 14.1 do Regulamento de Dispositivos Médicos 2017/745.

Orientações sobre a combinação, tal como montagem, podem ser encontradas em leckey.com



Importante

Estes pormenores do teste

contra colisões referem-se apenas ao de Assento Mygo e à placa de interface. Se estiver a utilizar o Assento Mygo numa base de cadeira de rodas, consulte o manual do fabricante da cadeira de rodas para obter informações sobre o teste contra colisões.

SECÇÃO 08: PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

Precauções

- Deformações espinhais corrigidas, como escoliose ou cifose
- Contraturas musculares graves
- Assimetria muscular ou esquelética grave, incluindo deslocação da anca
- Condições progressivas e de perda muscular
- Risco elevado ou histórico recente de fraturas ósseas
- Risco elevado de lesão relacionada com pressão ou feridas abertas
- Padrões de movimento fortes e descontrolados
- Atividade convulsiva mal controlada
- Crianças dependentes do uso de gastrostomia endoscópica percutânea
- Instabilidade médica incluindo função respiratória ou cardiovascular comprometida
- Dependentes de aparelhos de sustentação da vida de terceiros, como tanques de oxigénio
- Dificuldades de aprendizagem significativas e/ou problemas comportamentais

Contra-indicações

- Não existem contra-indicações associadas à família de produtos Leckey Seating.
- Todas as precauções e contra-indicações são consideradas a critério do clínico prescriptor. A Leckey recomenda que um médico habilitado e experiente esteja presente durante a avaliação inicial, ajustes e configurações e reedições, para minimizar o risco.

SECÇÃO 09: COMO DESEMBALAR E MONTAR

Verificar Peças

Parabéns pela aquisição do seu Assento Mygo. Todas as peças estão embaladas em sacos de polietileno, estando cada uma delas claramente identificadas. Retire-as com cuidado das caixas e verifique se tem todas as peças que encomendou.

Alguns dos acessórios terão de ser montados antes de fixar o assento à base que adquiriu. Se estiver a instalar o assento numa base de mobilidade, certifique-se de que instala primeiro a placa de interface na base da mobilidade. As instruções sobre como fixar a interface a

bases específicas serão fornecidas com a placa de interface. Depois de verificar todos os componentes, estará pronto para montar o Assento Mygo e fixá-lo à sua base.

Multi-ferramenta

Vários ajustes requerem a utilização da multi-ferramenta que é fornecida com cada assento.



A segurança em primeiro lugar

Mantenha os sacos de polietileno afastados das crianças.

Tama 1



Tama 2



9.1 CONFIGURAR O ENCOSTO

O encosto será rebatido para envio. Levante-o na posição vertical e, ao fazê-lo, deslize o tubo interior para dentro do tubo exterior de receção. Fixe o encosto na posição vertical e aperte o parafuso de cabeça cilíndrica. Verifique se está seguro e não se move quando se aplica pressão. Se o utilizador empurrar para a frente ou para trás, poderá causar ferimentos a si próprio ou aos seus cuidadores.



Certifique-se sempre de que o encosto está bem preso.

Tenha cuidado ao inserir o tubo interior, pois existe o risco de ferimentos.




9.2 FIXAR O APOIO PARA OS PÉS

(SE ENCOMENDADO)

Se utilizar os apoios para os pés Leckey, retire o assento do chassi e coloque o sistema de assento virado ao contrário numa superfície de trabalho.

Abra o ângulo dos apoios das pernas libertando as duas alavancas de bloqueio **A** mostradas, e regule a largura máxima.


Abra os parafusos de cabeça cilíndrica **B** e faça deslizar os suportes para os gémeos. Coloque na posição pretendida, com as platinas voltadas para a frente e volte a apertar os parafusos de cabeça cilíndrica com a multi-ferramenta.

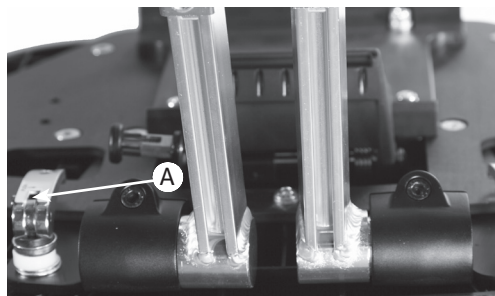

Certifique-se sempre de que a platina está bem presa.

9.3 FIXAR O ASSENTO AO CHASSI HI-LOW

Ajuste a altura do chassi ao máximo para reduzir o risco de tensão nas costas ao prender a unidade do assento. Consulte a Secção 12 sobre como ajustar a altura do chassi que adquiriu.

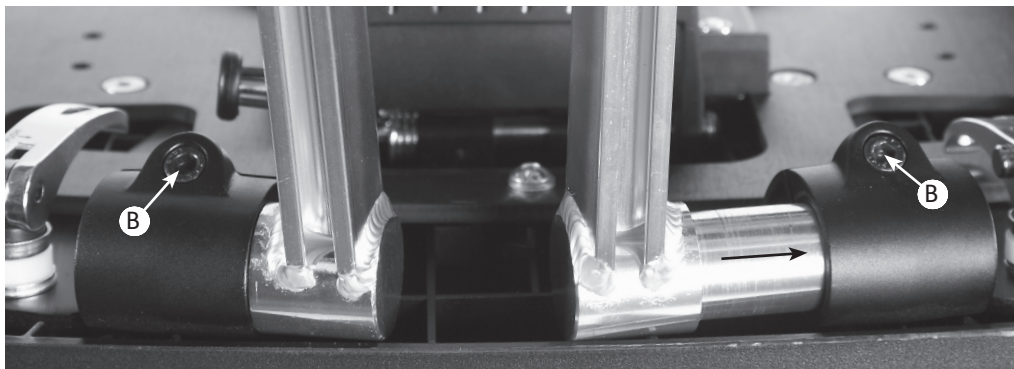

Primeiro, liberte o pino de bloqueio de segurança na parte da frente do assento. Para fazer isto, puxe o pino para fora e gire 90 graus.

Levante cuidadosamente o assento e coloque-o no chassi. Atrás por baixo do assento verá um canal de receção. Coloque-o bem preso sobre o tubo em direção à parte traseira do chassi. Puxe a pega na frente da unidade do assento para cima e, em seguida, gire o assento para a frente e para baixo. Quando a parte da frente do assento estiver totalmente em baixo, solte a pega e empurre-a para a frente para garantir

que está totalmente encaixada no tubo frontal. Gire o pino de bloqueio de segurança para que se encaixe na frente da pega. Se bater na pega, o assento não está inserido corretamente. Remova-o e repita o processo descrito acima.



Verifique sempre se a pega e o pino de bloqueio está totalmente encaixada antes


de colocar a criança no sistema de assento. Se a pega não estiver encaixada devidamente, a unidade do assento poderá soltar-se e provocar ferimentos graves à criança ou ao cuidador.



9.4 FIXAR A PEGA DE EMPURRAR


A pega de empurrar é fixada ao chassi Hi-low inserindo as duas hastes **A** inferiores nos tubos de receção, conforme ilustrado. A pega de empurrar dispõe de botões de segurança **A** que devem ser pressionados ao inserir as hastes inferiores.

Empurre as hastes até que os botões saiam pela outra extremidade dos tubos de receção. Fixe a pega no lugar apertando os botões de bloqueio **B**.

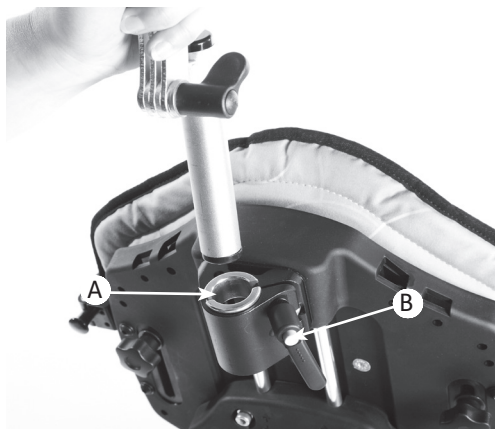

Verifique regularmente botões para se certificar de que estão apertados, particularmente



se estiver a mover a unidade por corredores que possam ter superfícies desniveladas ou inclinadas!!!

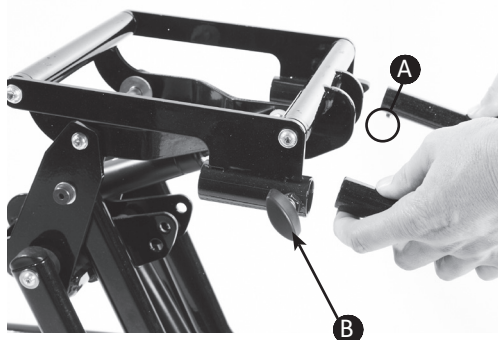

9.5 FIXAR O ENCOSTO DE CABEÇA

Para fixar o suporte de cabeça, deslize a haste na manga redutora **A** e suporte de receção. Certifique-se de que a ranhura na manga redutora está alinhada com a ranhura no suporte de receção. Regule para a posição pretendida e fixe utilizando a alavanca manua **B**. O Assento Mygo foi concebido para

fazer interface com os suportes de cabeça Whitmyer. O suporte de cabeça da Whitmyer Lynx **C** e fixado da mesma forma que o encosto de cabeça Leckey. Para fixar os suportes de cabeça Whitmyer Pro-Series, **D** remova o colar de do espaçamento suporte de receção e bloqueie a haste vertical em posição, utilizando a pega de trinquete.

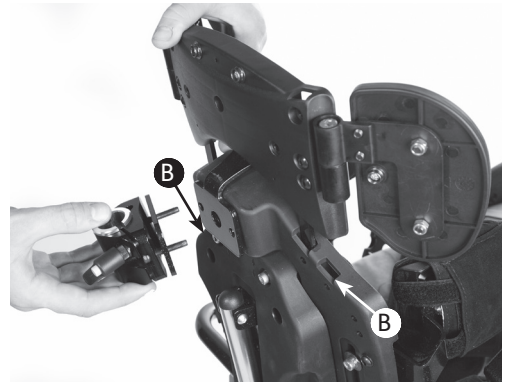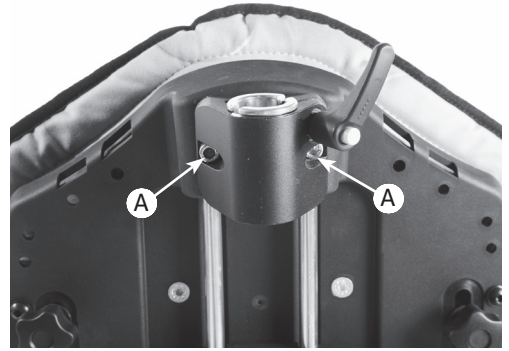

9.6 FIXAR A SECÇÃO DO OMBRO

Para fixar a secção do ombro a um assento Mygo Tamanho 1, remova o suporte de montagem do encosto de cabeça removendo os parafusos **A**. Insira o suporte da secção do ombro e a placa espaçadora fornecida entre o encosto e o suporte de montagem do encosto de cabeça. Volte a aparafusar. Prenda as duas abas metálicas com parafusos **B** adicionais fornecidos com a nova placa espaçadora.

Os parafusos são fixados pela frente. Verifique se está bem preso.

9.7 FIXAR OS SUPORTES LATERAIS

Ao mesmo tempo que mantém os componentes juntos, remova o botão de plástico e a anilha. Alinhe as molduras do ajustador de ângulo de plástico e o suporte lateral com a ranhura no encosto e volte a colocar a anilha e o botão de plástico.



9.8 FIXAR AS PROTEÇÕES PARA OS JOELHOS

Fixe as proteções para os joelhos com os fechos de pressão nas guias do joelho nas laterais dos suportes superiores das pernas.

9.9 INSERIR OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO NAS SANDÁLIAS




Insira o parafuso de fixação necessário

- A** Juntamente com a placa de retenção
- B** Coloque uma tampa de borracha na parte superior e inferior da sandália.

Aperte utilizando os quatro parafusos fornecidos. Para remover ou substituir o parafuso de fixação, inverta este processo.

9.10 FIXAR A SANDÁLIAS

Coloque a sandália para que o parafuso de fixação atravessa a ranhura na platina. Para prender, na parte inferior da platina coloque a anilha de borracha **A**, seguida da anilha de metal **B** e em seguida, o **C** na fixação botão parafuso. Para posicionar as sandálias, basta afrouxar o botão **C** por baixo da platina, seleccione a posição pretendida e aperte novamente o botão.

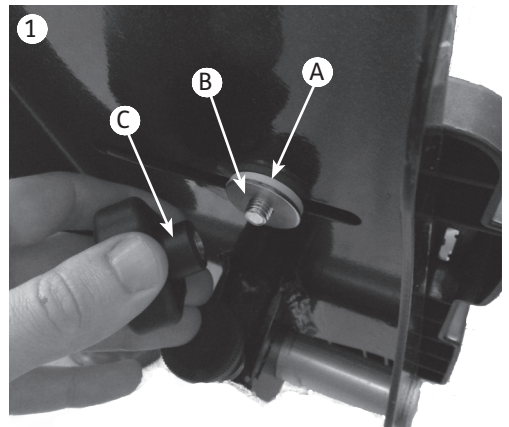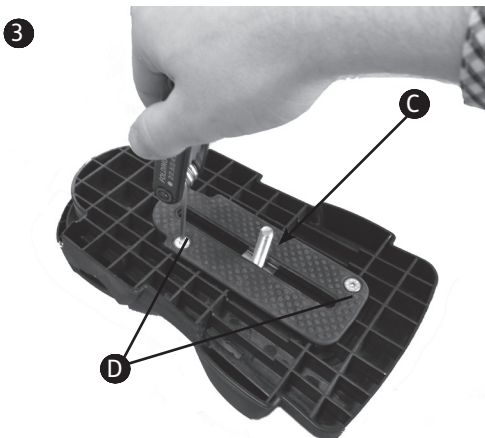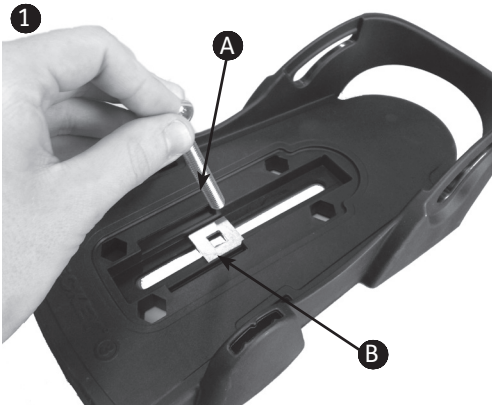

9.11 FIXAR OS ARNÊS DE TORNOZELO

Deslize a tela pela ranhura na sandália. Faça um laço em redor da parte inferior do triciclo. Em seguida, passe a correia pelo topo do triciclo. Finalmente, para prender a tela na posição, passe-a através da parte inferior do triciclo novamente. Apare a correia no comprimento necessário.




9.12 FIXAR OS APOIOS DE BRAÇO

Abra o suporte de receção afrouxando a pega de trinquete **A** e insira o apoio de braços. Certifique-se de que o botão **B** está bloqueado corretamente. Volte a apertar a pega de trinquete.

9.13 FIXAR A BANDEJA


A bandeja é fixada ao assento inserindo os tubos da bandeja através do centro do apoio de braço. Depois de a bandeja estar colocada na posição, os botões devem ser apertados com firmeza **A**.

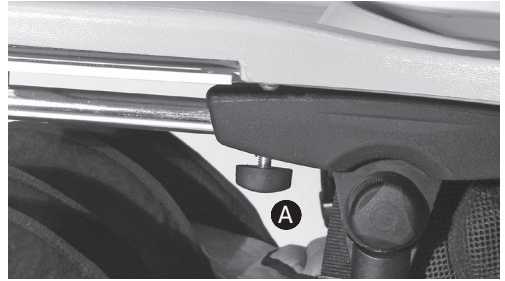

9.14 FIXAR A BARRA DE APOIO


Para fixar a barra de apoio, insira os suportes de receção **A** na ranhura da bandeja e prenda com o botão de plástico Repita **B** do outro lado e, em seguida, deslize os tubos para dentro dos suportes de receção **A** e aperte o botão plástico **C**.



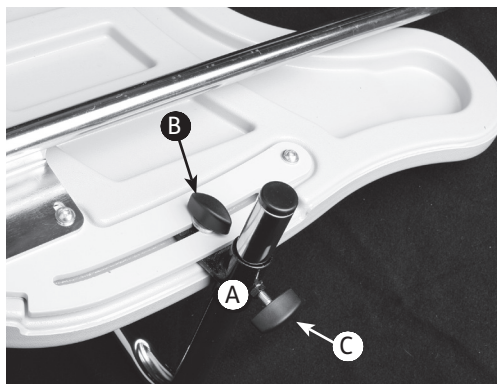

9.15 FIXAR OS SUPORTES LATERAIS DE QUADRIL



Os suportes laterais de quadril são utilizados com o Berço Pélvico. Em primeiro lugar, remova os suportes do Arnês Pélvico, se necessário, removendo o parafuso e a porca com flange **A**. Levante o pedaço de polipropileno na frente do suporte sacral. Coloque os suportes laterais de quadril nas ranhuras e fixe-os utilizando porca **B** e os **C** fornecidos. Ad as parafusos com flange porcas com flange devem ser colocadas no lado da frente do suporte sacral.

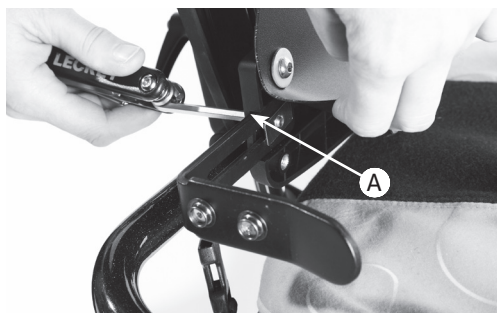



9.16 READAPTAR O ENCOSTO DINÂMICO

Para substituir o encosto estático padrão pelo encosto dinâmico, em primeiro lugar, terá de remover o parafuso **C** no topo do conjunto do encosto de cabeçção padrão. Para fazer isto, afrouxe a porca **A** usando a ferramenta Leckey e uma chave inglesa de 10mm e remova o parafuso e as arruelas **B**.

Usando novamente a ferramenta Leckey e a chave inglesa de 10mm, afrouxe a porca **A** parte inferior do conjunto de encosto padrão e remova o parafuso **C** sarruelas de **C** e arruelas padrão pressão **B**.

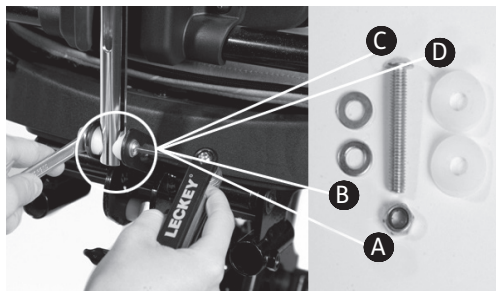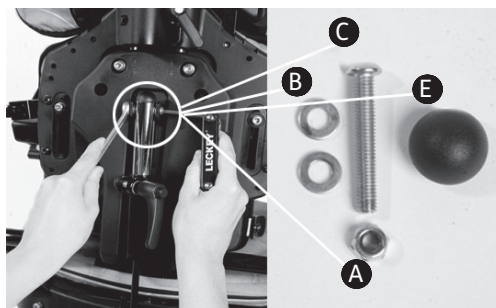

Para fixar o encosto dinâmico, insira a haste no suporte inferior, conforme ilustrado. Utilize o parafuso **C**, a porca **A**, as arruelas de pressão e as arruelas padrão para to fixar. Certifique-se de que a rosca do parafuso sai pela porca **A**.

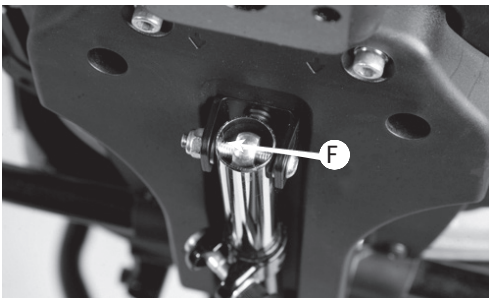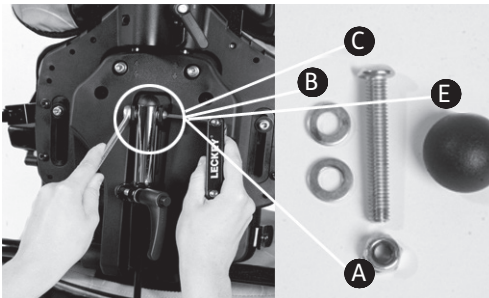

Agora, levante a haste dinâmica e insira-a no suporte superior, conforme ilustrado.


Usando o parafuso **C**, a porca e as arruelas **B**, prenda o novo encosto dinâmico, conforme ilustrado.

Certifique-se de que o parafuso passa pelo centro do conjunto, conforme ilustrado **F**.

Finalmente, fixe a capa abaulada **E**.



Tenha cuidado ao montar e fixar o encosto dinâmico, pois há um pequeno risco de entalar os dedos.

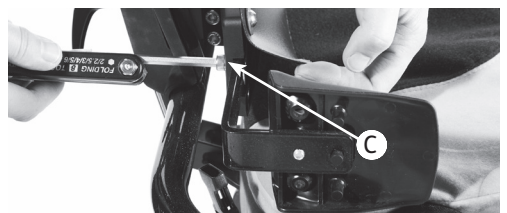

9.17 FIXAR AS PROTEÇÕES DE OBLIQUIDADE

Para fixar as proteções de obliquidade, primeiro, remova a almofada da base. Coloque o painel da proteção de obliquidade em posição com os orifícios na aba sobre o fecho de pressão. Insira a espuma conforme necessário e volte a colocar a almofada da base.



9.18 INTERFACES PARA CADEIRAS DE RODAS E BASES DE CARRINHO DE PASSEIO

A configuração e fixação do assento Mygo a qualquer base de mobilidade deve ser realizada por uma pessoa tecnicamente competente que esteja familiarizada com a configuração da base de mobilidade.

Ligação de interface “A” a uma base de mobilidade com a largura de 16”.

A interface universal foi concebida para permitir que o Assento Mygo seja ligado a qualquer base de mobilidade padrão de 16” (405 mm) que foi construída com tubos laterais de 1” (25,4 mm).

Por favor, consulte as instruções de montagem específicas fornecidas com a sua interface para o posicionamento correto na sua base.

A placa de interface deve ser instalada por um técnico qualificado que seja tecnicamente competente na configuração da base de mobilidade. Pode ser necessário ajustar a posição das pegas de empurrar, das alças para as pernas e dos apoios de braços na base de mobilidade dependendo do tamanho e do peso da criança para garantir a estabilidade do assento.



Consulte sempre as linhas de orientação do fabricante da base de mobilidade para

uma configuração correta, prestando especial atenção ao centro de gravidade e estabilidade do produto.

As crianças não devem ser deixadas nunca sozinhas/sem supervisão durante a utilização do equipamento da Leckey.



SECÇÃO 10: ENCAIXAR AS ALMOFADAS


Sugerimos que as almofadas sejam colocadas na seguinte ordem:

1. Almofadas femorais (se aplicável)
2. Almofada da base do assento
3. Almofada sacral
4. Cinto pélvico
5. Suportes laterais de quadril
6. Arnês de tronco
7. Encosto
8. Laterais
9. Suporte do ombro
10. Arnês para o peito
11. Proteções para os joelhos
12. Encosto de cabeça

10.1 ALMOFADAS FEMURAIS

(APENAS TAMANHO 1)


Deslize uma almofada femoral sobre cada um dos suportes femorais e fixe-as ao centro utilizando o Velcro. As almofadas devem ser colocadas antes da almofada da base do assento e aplicam-se apenas ao Tamanho 1.

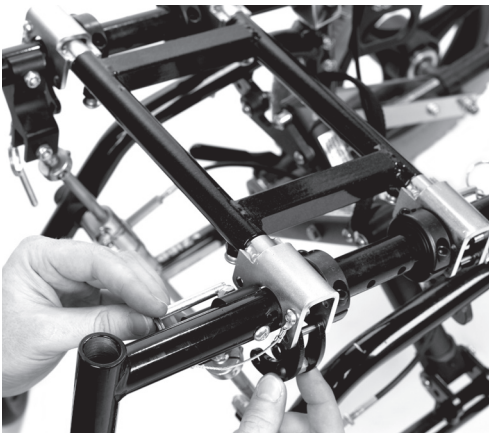




10.2 ALMOFADA DA BASE DO ASSENTO DE UMA PEÇA

A almofada da base do assento pode ser fixada, bastando para tal colocá-la no lugar e pressionar para baixo para **A**. Klocalizar o fecho de pressão traseiro . Para prender ainda melhor, fixe os dois fechos de pressão laterais **B**. Prenda as abas elásticas **C** à alavanca de bloqueio da guia **D** inferior da perna por baixo do assento.

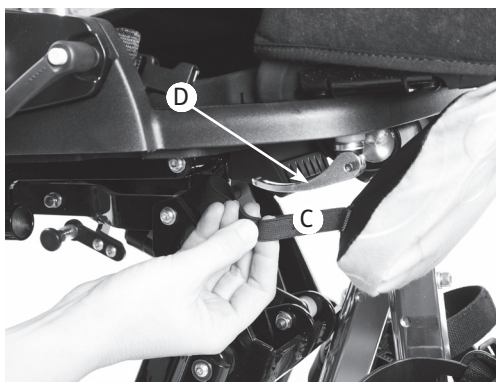


Verifique sempre se a almofada da base do assento está bem presa antes de colocar a criança no assento.

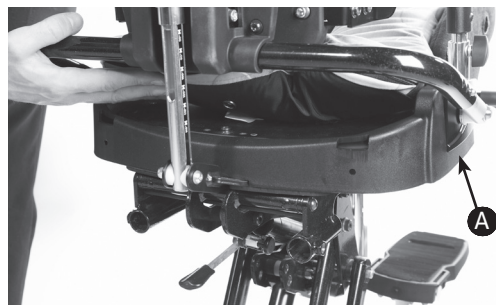

10.3 ALMOFADA SACRAL FLEXÍVEL

A almofada sacral flexível pode ser fixada fazendo-a deslizar sobre a lingueta de plástico, utilizando o fecho de pressão para a fixar na posição.

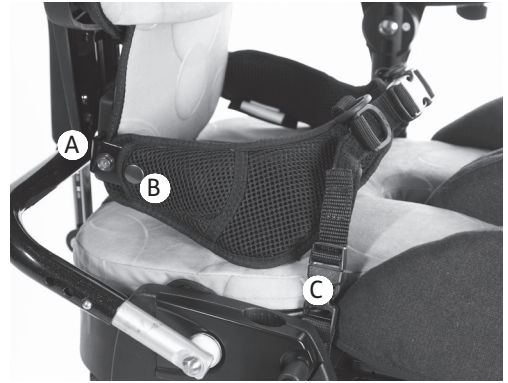

10.4 ARNÊS PÉLVICO

O arnês pélvico é fixado deslizando as guias de **A** para dentro dos bolsos quadril na face externa do arnês. É ajustado à posição pretendida fixando-o a um dos fechos de pressão **B** no suporte de guia de quadril ajustável. A fivela na correia de amarração é presa a **C** em ambos os lados da base do assento. fivela de receç **C** de cada lado da base do assento. Por fim, fixe o arnês pélvico prendendo a fivela de plástico central **D**.

10.5 BERÇO PÉLVICO

Fixe o Berço Pélvico e coloque-o na almofada da base do assento. Está rotulado para indicar a orientação correta. Pressione o Velcro na almofada da base do assento e fixe quatro fivelas **A** para prender. Existem duas fivelas na parte de trás do assento e uma de cada lado.




10.6 RAMPA GLÚTEA

Se for necessária **B** uma rampa glútea, fixe-a ao Berço Pélvico utilizando o lado de velcro.

10.7 SUPORTES LATERAIS DE QUADRIL

Estes suportes laterais de quadril são utilizados apenas com o Berço Pélvico. Deslize as capas de almofada sobre a estrutura dos suportes laterais de quadril com a aba de velcro para o lado de fora. Enrole as duas tiras de velcro **A** em volta do suporte e fixe na almofada de velcro **B**. Feche a aba.

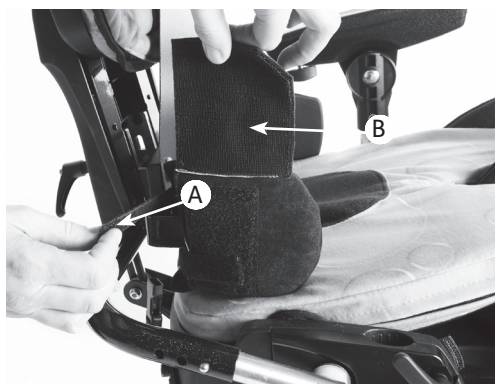

10.8 ARNÊS DE TRONCO

Com o arnês de tronco, receberá quatro correias laterais ajustáveis, duas correias e suportes de ombro, os parafusos, arruelas e porcas de bloqueio. Fixe as correias de ligação ao encosto antes de fixar o arnês de tronco. Para fixar as correias de ligação na área dos ombros **A** do Tamanho 1, deslize o suporte na ranhura **B** e regule à altura pretendida



usando os parafusos e arruelas fornecidos.


Para o Tamanho 2, as correias dos ombros devem ser fixadas na secção dos ombros e não no encosto.

As quatro correias laterais ajustáveis restantes são fixadas diretamente, sem a utilização de suportes, nos orifícios de receção em ambos os lados do encosto **C**. Basta fixar o arnês de tronco às correias de ligação. As correias laterais são ajustáveis em comprimento para acomodar roupas para atividades ao ar livre.



10.9 ALMOFADA DO ENCOSTO

Se tiver apoios laterais instalados na sua cadeira, ajuste-os à sua largura máxima antes de colocar a almofada do encosto. Deslize a almofada para baixo sobre a almofada sacral flexível e fixe-a utilizando os os quatro fechos de pressão na moldura do encosto. Alinhe os fechos inferiores primeiro e encaixe, depois prenda os fechos superiores.

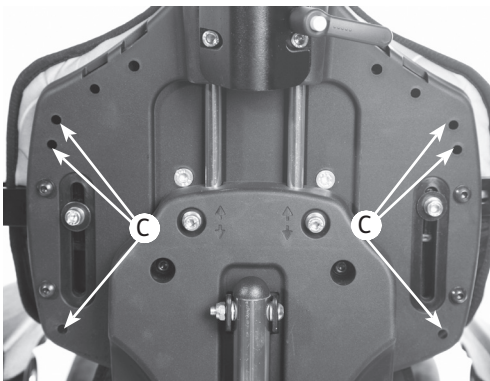



10.10 ALMOFADAS ACOLCHOADAS DO SUPORTE LATERAL



Para fixar as almofadas acolchoadas do suporte lateral, basta deslizar as almofadas com o lado acolchoado voltado para o interior do assento. Passe a fivela de plástico pela ranhura na capa, em seguida, coloque as duas tiras de fecho de Velcro em torno da parte inferior da moldura e e fixe-as ao painel de Velcro, conforme ilustrado. Feche a aba.



10.11 ALMOFADA DO SUPORTE DE OMBRO

(SE APLICÁVEL)

Em primeiro lugar, afrouxe as laterais do suporte de ombro (**consulte a secção 11**). Faça deslizar a almofada sobre o conjunto e prenda com fechos de pressão em quatro pontos. **A**

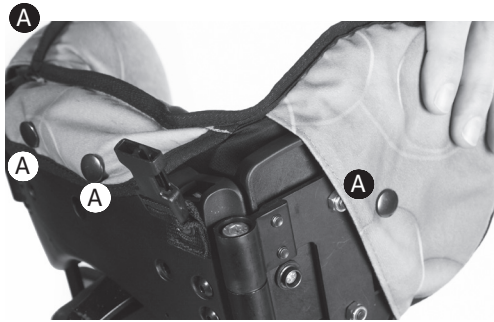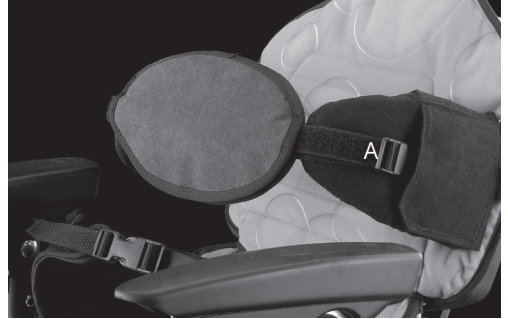


10.12 ARNÊS PARA O PEIT

O arnês torácico pode ser fixado encaixando a fivela mac **A** na fivela fêmea de cada lado dos suportes laterais.

10.13 PROTEÇÕES PARA OS JOELHOS

Fixe as proteções para os joelhos com os fechos de **A** pressão às guias dos joelhos nas partes laterais dos suportes superiores das pernas.

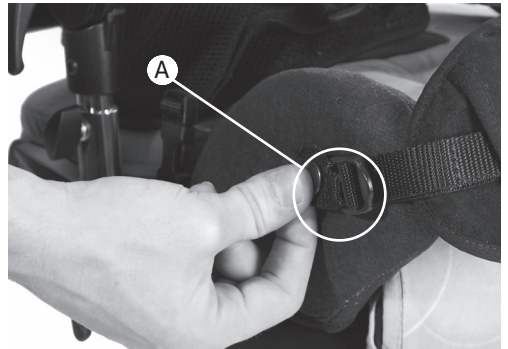

10.14 ALMOFADA DO ENCOSTO DE CABEÇA CONTORNADO

Para prender a almofada do encosto de cabeça, coloque primeiro o reforço de polipropileno entre a capa da almofada e o conjunto do encosto de cabeça. Não deve ser fechado dentro da capa

de almofada. Em seguida, coloque a almofada no suporte de cabeça. de cabeça. Encaixe o fecho central e os dois fechos laterais. Coloque a aba inferior por baixo do suporte de cabeça e fixe o velcro.



10.15 ALMOFADA DO ENCOSTO DE CABEÇA PLANO

Coloque a almofada no suporte de cabeça. Prenda o fecho central. Coloque a aba inferior por baixo do suporte de cabeça e prenda com os dois fechos restantes. As capas laterais do encosto de cabeça são fixadas da mesma forma que as capas acolchoadas dos apoios laterais.



SECÇÃO 11: CONFIGURAÇÃO CLÍNICA PARA A GESTÃO POSTURAL

A configuração clínica do produto deve ser realizada por uma pessoa técnica e clinicamente competente, com formação na utilização do produto. A Leckey recomenda que seja mantido um registo escrito de todas as configurações clínicas realizadas para este produto.

Regule a altura do encosto, a profundidade do assento e a altura da platina antes de colocar a criança no assento. Estas podem ser ajustadas quando a criança está no assento.



11.1 ARNÊS PÉLVICO


Para ajustar a profundidade do arnês, mova o fecho de pressão para qualquer posição **B** ou **C**. Ajuste as correias de suporte ao comprimento necessário. Certifique-se de que a fivela fica encaixada em segurança no meio **D**. Se usar o assento ao ar livre e o seu filho tiver um casaco vestido, coloque o arnês pélvico por baixo do casaco.

11.2 BERÇO PÉLVICO

O Berço Pélvico deve estar plano e aberto quando o utilizador é colocado no Assento Mygo. As quatro fivelas laterais e traseiras já devem estar presas ao assento. Primeiro, aperte a fivela **A** na frente do Berço Pélvico. Em seguida, aperte o **B** velcro nas laterais para encaixar o Berço Pélvico no utilizador. Em seguida, ajuste as tiras dianteiras e traseiras **C** e **D** para prender para posicionar a as pélvis do utilizador.



Fixe sempre a alça pélvica antes de fazer quaisquer outros ajustes.

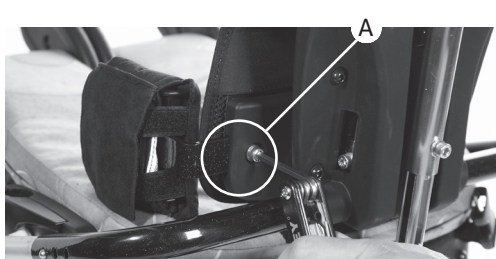

11.3 PROFUNDIDADE DO ENCOSTO

A profundidade do encosto é ajustada pressionando o botão e deslizando o tubo de suporte traseiro para a posição pretendida. Isto é muito importante

porque garante que o assento se ajusta à criança, tanto na posição vertical como reclinada.

Existem três configurações onde se pode localizar o botão.


Recomendamos que meça o comprimento da coxa da criança para definir a profundidade necessária do

assento (PA). Para fazer isto, meça da parte inferior das costas da criança até à parte de trás do joelho. Em seguida, regule o encosto para a posição **A**, **B** ou **C**, com base na tabela abaixo.



Esta profundidade do encosto não deve ser ajustada enquanto a criança estiver no assento.

Profundidade do encosto	Tamanho 1 (PA)	Tamanho 2 (PA)
Posição A	270-320 mm 10 .6-12.6 polegadas	350 – 390 mm 13 .8-15.4 polegadas
Posição B	320 – 370 mm 12 .6-14.6 polegadas	390 – 430 mm 15 .4-16.9 polegadas
Posição C	370 – 420 mm 14 .6-16.5 polegadas	430 – 470 mm 16 .9-18.5 polegadas

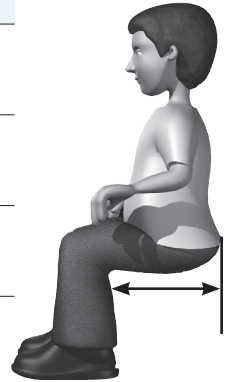

11.4 SUPORTES LATERAIS DE QUADRIL

(apenas com berço pélvico)

Para definir a largura das guias do quadril afrouxe os parafusos Allen **A**, ajuste à largura pretendida e volte a apertar.





Tenha cuidado ao ajustar a configuração mínima, pois

os dedos podem ficar presos entre peças que se movimentam e peças estáticas.

11.5 ALTURA DO ENCOSTO DE COSTAS


A altura total do encosto pode ser ajustada desapertando os dois parafusos de cabeça cilíndrica, em seguida, posicione-o na altura pretendida para o ombro do utilizador. Quando em posição, os parafusos de cabeça cilíndrica devem voltar a ser apertados firmemente. A altura pode ser ajustada com o utilizador no assento.

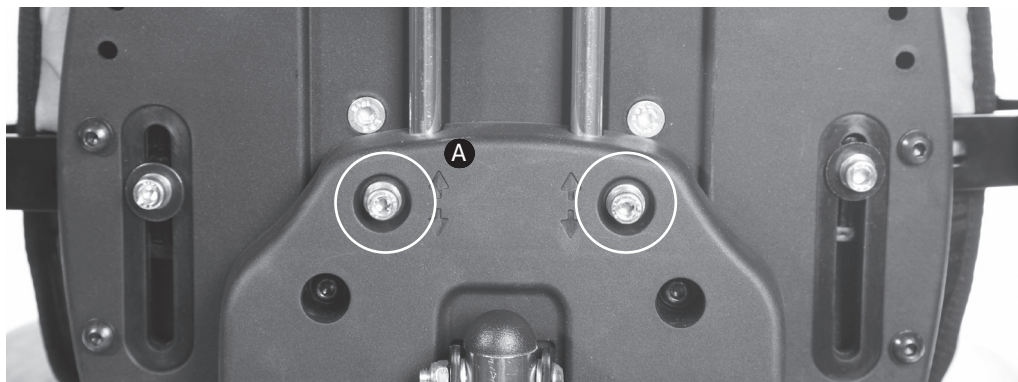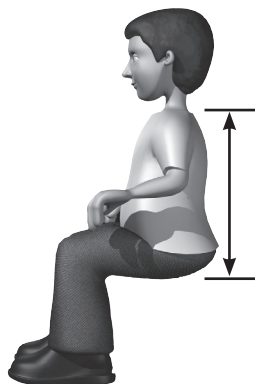



Existem duas faixas indicadoras de ângulo em cada lado do regulador traseiro. Fornecemos marcadores de localização de ângulos (mostrados abaixo) num cartão. Estes podem ser aplicados à faixa transparente no tubo regulador para indicar as posições pretendidas para várias atividades, como descanso, alimentação ou brincar.

A faixa indicadora de ângulo indica o ângulo da almofada do assento ao encosto.


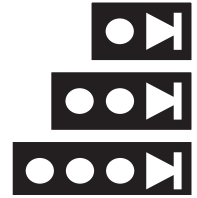


11.6 ÂNGULO DO ENCOSTO


O encosto pode ser inclinado afrouxando o parafuso **A**. Selecione a posição pretendida e volte a apertar o parafuso firmemente. Verifique sempre se o ângulo das costas está seguro para manter a postura pretendida para a criança. O ângulo do encosto pode ser ajustado com a criança no assento, mas segure sempre o encosto com uma mão.



A faixa de perigo preta e amarela no tubo interno indica a posição máxima para a frente ou de braços para a qual o encosto pode ser ajustado.

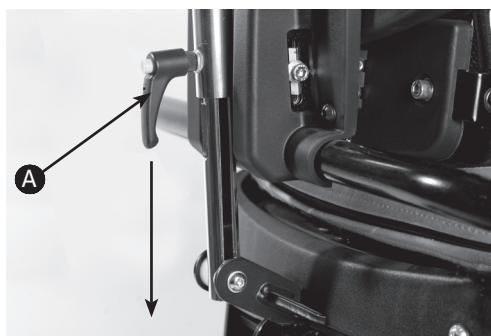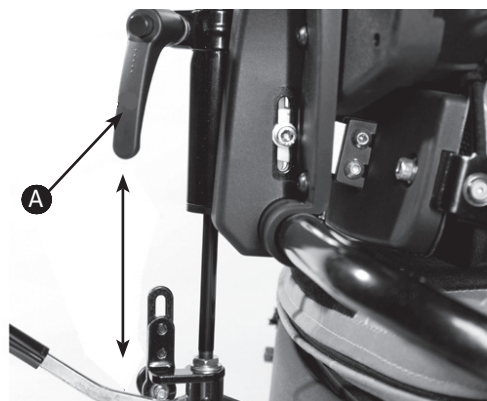

(B)

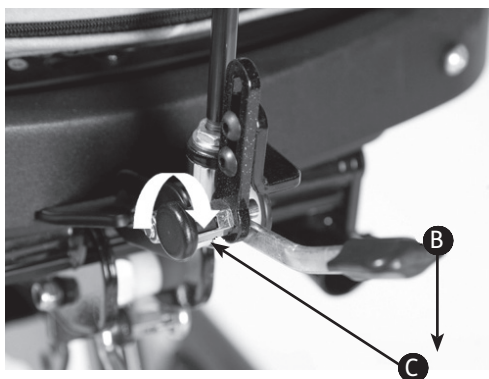

11.7 AJUSTAR O ENCOSTO DINÂMICO




Certifique-se sempre de que o parafuso está preso, pois isso pode causar ferimentos à criança ou ao cuidador. Certifique-se sempre de que o parafuso está preso, pois isso pode causar ferimentos à criança ou ao cuidador.

Para alcançar a quantidade necessária de movimento dinâmico, afrouxe a pega , deslize para a posição pretendida e volte a apertar firmemente. Para devolver o encosto a uma posição estática, afrouxe a pega (A), deslize o suporte do encosto para o fundo e volte a apertar a pega.

Para ajustar o ângulo do encosto quando se montou um encosto dinâmico, utilize a pega na base do encosto. Puxe o pino de bloqueio e torça e desbloqueie. Levante a pega e ajuste o encosto. Puxe o pino de bloqueio (C).

Certifique-se de que o pino de bloqueio esteja seguro. A amplitude do ângulo do encosto e a amplitude do movimento dinâmico são um máximo de 30 °, ou seja, se o encosto estiver na vertical, um total de 30 ° está disponível no sistema dinâmico. Se o ângulo do encosto for de 10 °, então está apenas disponível 20 ° de movimento com o encosto dinâmico e assim por diante.

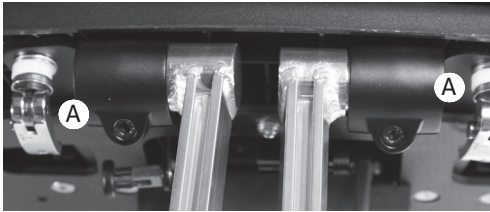

O encosto deve estar na posição vertical com a função

dinâmica bloqueada (isto é, a pega na posição mais baixa no encosto supinação) e certifique-se de que o pino de bloqueio C está engatado quando o sistema de assento é utilizado no transporte.

11.8 AJUSTAR OS SUPORTES DE PERNAS SUPERIORES



Os apoios superiores das pernas serão colocados na posição mínima à chegada. Regule a profundidade antes de colocar a criança no assento. O

ajuste fino posterior é possível, mas está condicionado ao peso do utilizador. Para atingir a posição correta, meça o comprimento da parte inferior das costas da criança até à parte de trás do joelho.

Para o Tamanho 1, ajuste os suportes à posição pretendida usando a alavanca **A** de bloqueio por baixo da base do assento. Para ajustar, pressione o botão de bloqueio e solte. Mantenha os suportes a apontarem para a frente neste momento, a menos que rotação na direção oposta ou adução, a abdução pode ser adaptada, caso em que deve regular o ângulo em conformidade utilizando novamente a alavanca de bloqueio


Os suportes podem ser reajustados quando a criança estiver colocada na cadeira.

Para o Tamanho 2, afrouxe as alavancas de bloqueio por baixo do assento e deslize o suporte para as pernas até à posição pretendida. Mantenha os suportes a apontarem para a frente neste momento, a menos que rotação na direção oposta ou adução, a abdução deve ser adaptada, caso em que deve regular o ângulo em conformidade. Volte a apertar o parafuso. Para aumentar ainda mais o ângulo, retire o parafuso e mova o ângulo da perna para uma **B** configuração mais ampla. Insira o parafuso na segunda ranhura aperte.

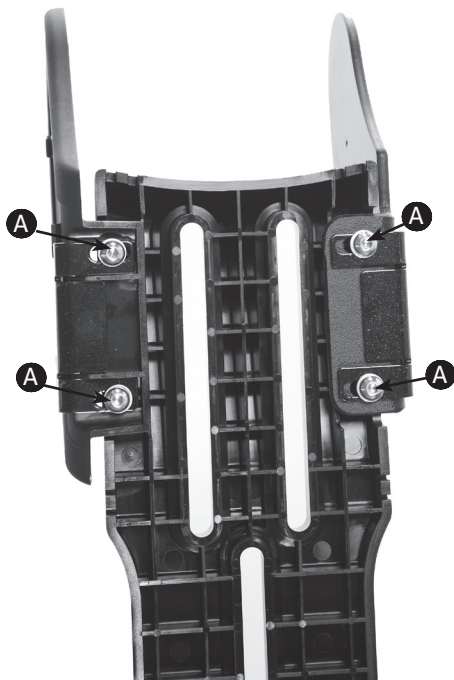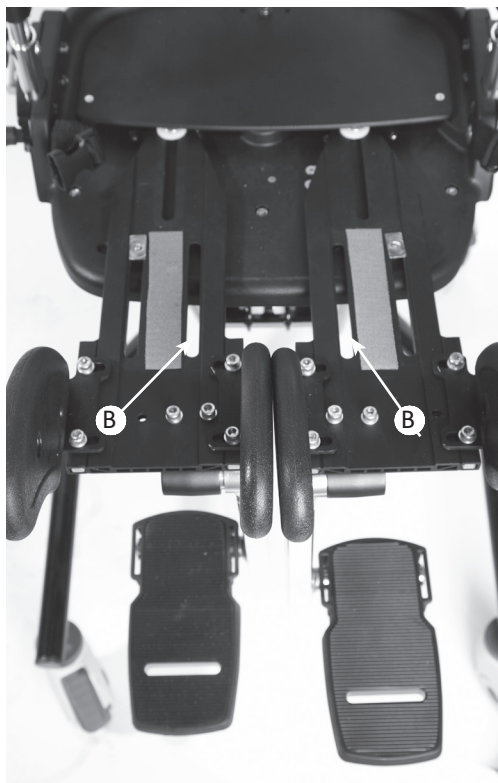

11.9 SUPORTES LATERAIS SUPERIORES DAS GUIAS DAS PERNAS

Para ajustar a largura dos apoios de joelho no Tamanho 1, afrouxe os parafusos **A** na parte inferior do suporte da perna. Regule para a largura pretendida e volte a apertar. Para ajustar a largura ou o ângulo dos suportes laterais no Tamanho 2, afrouxe os parafusos **B** por cima, mova as guias e volte a apertar os parafusos.

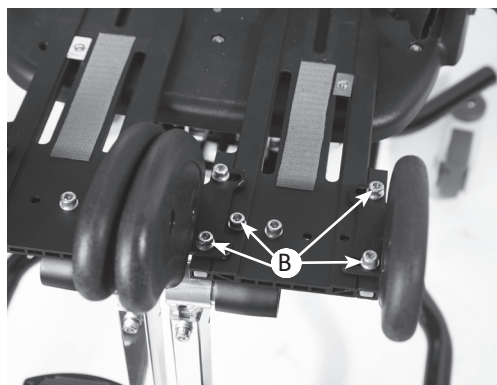


11.10 ALTURA DA PLATINA

Para definir a altura da placa de pé, afrouxe o parafuso **A** na frente do tubo de suportado gêmeo e deslize a platina até à altura pretendida e volte a apertar o parafuso.

Para definir a altura correta da platina, meça a distância da parte de trás do joelho da criança até à parte inferior do calcanhar.


Poderá ter de ajustar o ângulo para alcançar a posição pretendida do pé. Para ajustar o ângulo, afrouxe o parafuso **B** com a multi-ferramenta, regule para o ângulo pretendido e volte a apertar. Existe um botão de segurança para indicar a extensão máxima de segurança. Isto pode ser feito com a criança no assento.

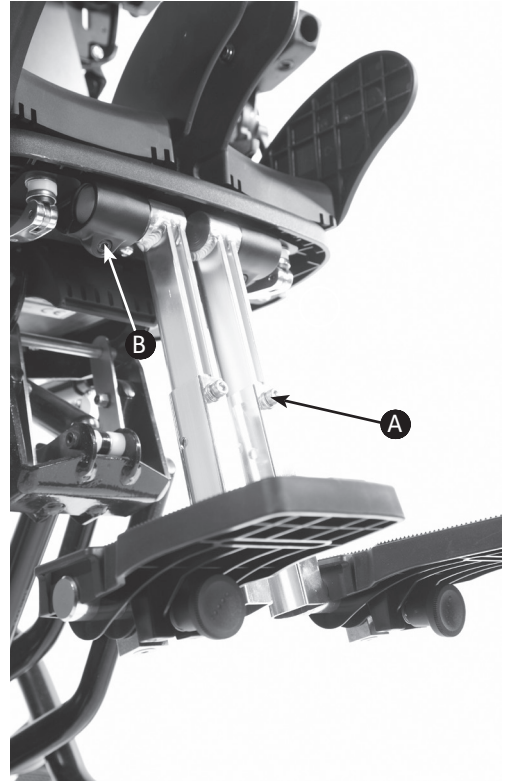

Verifique sempre se a platina está segura para evitar que o utilizador deslize para a frente e para baixo no assento, o que pode representar um risco de asfixia se um arnês de tórax ou de tronco estiver montado.

11.11 AJUSTE DO ÂNGULO DA PLATINA

Para configurar o ângulo para acomodar a plantarflexão ou a dorsiflexão, basta afrouxar ou apertar o botão manual **A** ; para seleccionar o ângulo desejado. As platinas podem simplesmente virar para cima para ajudar na transferência.

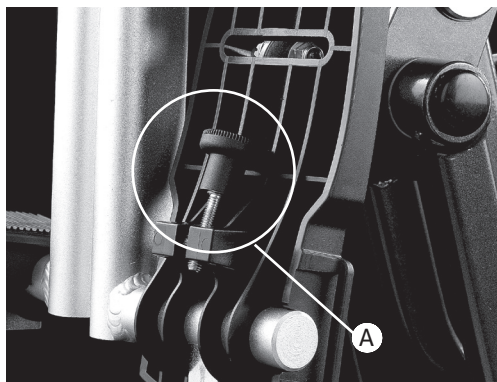

11.12 SUPORTE SACRAL FLEXÍVEL

O suporte sacral flexível é utilizado em conjunto com o arnês de posicionamento pélvico ou o berço pélvico. Para ajustar a altura, profundidade e ângulo, desaperte os parafusos de cada lado com a multiferramenta fornecida.

Ajuste o suporte para o ângulo correto e, em seguida, volte a apertar os parafusos. O suporte irá flexionar para trás e para a frente para auxiliar a criança na postura preferida.




Tenha sempre cuidado para garantir que os dedos não ficam presos ao ajustar o suporte sacral.



11.13 SUPORTES LATERAIS

Afrouxe o parafuso de **A** para ajustar a cabeça cilíndrica largura, altura e ângulo dos suportes laterais e volte a apertá-lo quando tiver atingido a posição pretendida. Para mover as abas laterais, use o botão **B**.

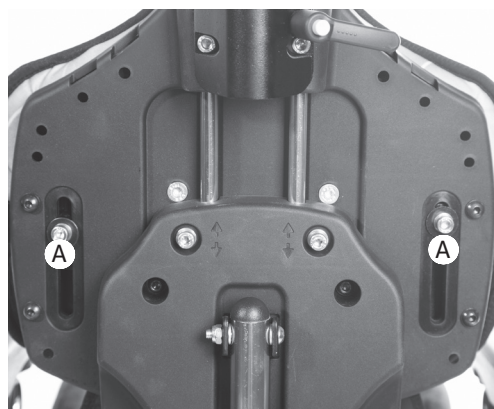



11.14 ARNÊS PARA O PEITO

Para alterar a largura do arnês para o peito. Levante a capa frontal, ajuste as tiras de Velcro à largura pretendida e volte a colocar a capa.



11.15 ARNÊS DE TRONCO

Quando a criança está fora do sistema de assento, o arnês do tronco estará aberto, mas permanecerá preso por duas presilhas laterais **A** de um lado e uma presilha **B** do arnês pélvico. Ao colocar a criança no sistema de assento, coloque o arnês de tronco pela frente e prenda-o

colocando as presilhas nas fivelas do outro lado **C**. Ligue as correias restantes ao arnês pélvico ou ao Berço Pélvico, passando-as pelo laço **D** e encaixando no lugar. Em seguida, ligue as correias dos ombros **E** nas presilhas na parte superior.

Se o seu filho estiver a usar roupas para atividades ao ar livre, as correias laterais podem ser abertas soltando os fechos de pressão. A correia de ligação do arnês pélvico pode ser libertada movendo a correia para a posição de fecho de pressão inferior. Todas as correias de ligação são ajustáveis levantando a tampa, ajustando no comprimento desejado e voltando a colocar a tampa



Verifique as laterais e os arneses regularmente para garantir que não se soltaram, pois sem o suporte de tronco apropriado, a criança pode correr o risco de escorregar para uma posição da qual não consegue sair. Isto pode representar risco de asfixia.





11.16 AJUSTAR AS PROTEÇÕES PARA OS JOELHOS

As proteções para os joelhos podem ser utilizadas como limitador para ajudar a evitar que a criança deslize para a frente no assento. Também pode ser utilizados acima do joelho para evitar que a criança levante o pé. Para ajustar as proteções para os joelhos, levante a capa frontal, ajuste as tiras de Velcro à largura pretendida e volte a colocar a capa. Para remover, solte o fecho de pressão de um lado.



11.17 SANDÁLIAS

Para posicionar os pés do utilizador nas sandálias, prenda as tiras de velcro fornecidas para que o pé fique seguro no lugar. As correias devem ser colocadas sobre o peito do pé e sobre os dedos. A correia frontal pode ser passada através de uma das duas ranhuras em cada lado das sandálias, de acordo com o tamanho dos pés do utilizador.

2.



Se a criança estiver a usar sandálias ou calçado leves, verifique as correias para garantir que a cinta não irrita a pele.

1



2




11.18 LATERAIS DO SUPORTE DE OMBRO

(APENAS TAMANHO 2)

Para ajustar o ângulo das laterais de proteção de ombro, afrouxe o parafuso

A, mova as laterais para o ângulo desejado e volte a apertar.

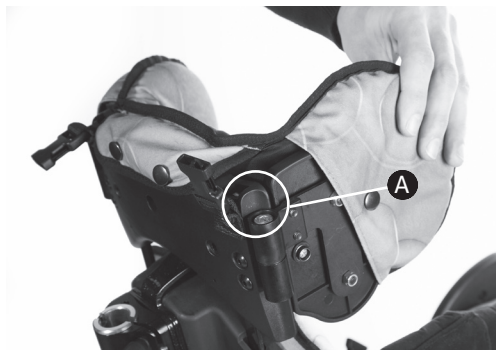

11.19 SUPORTE DE CABEÇA CONTORNADO


Para ajustar a altura, a profundidade e o ângulo do encosto de cabeça contornado, afrouxe os botões manuais

A e quando estiver regulado na posição pretendida, volte a apertar os botões. Não remova o encosto de cabeça quando o utilizador se encontrar no assento



Nunca utilize o encosto de cabeça para forçar a posição da cabeça do utilizador.

Tenha sempre cuidado para garantir que os dedos não ficam presos ao ajustar o encosto de cabeça.

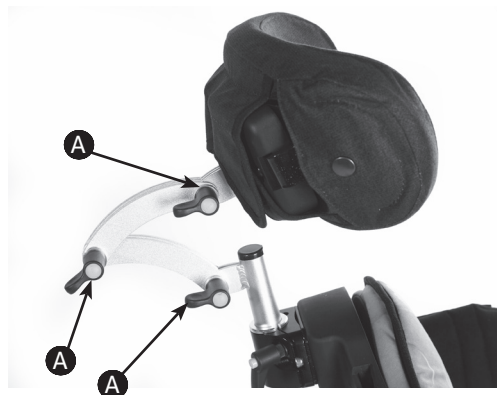

11.20 ENCOSTO DE CABEÇA PLANO COM SUPORTES LATERAIS

Para ajustar a altura, a profundidade e o ângulo do encosto de cabeça plano, ajuste utilizando as alavancas manuais

A conforme mostrado no suporte de cabeça contornado.


Para ajustar a largura das laterais, afrouxe o botão de plástico **B**, deslize para a posição pretendida e aperte firmemente.



11.21 AJUSTE DO APOIO DE BRAÇO DE BRAÇO

Para ajustar a altura do apoio de braço, desaperte o botão manual **B**, regule para a altura pretendida e volte a apertar. Para ajustar o ângulo, **A** gire a pega de trinquete até se atingir a posição pretendida.

Para remover o apoio de braços completamente, afrouxe pega de trinquete **C**, pressione **D** e o botão levantar o apoio de braço.

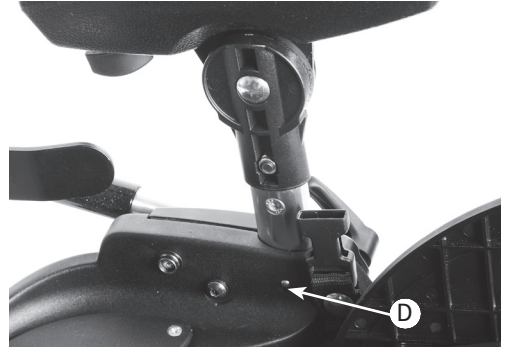


11.22 AJUSTE DA BANDEJA

A altura e o ângulo da bandeja são definidos ajustando os apoios de braço conforme detalhado acima. Para remover ou ajustar a profundidade da bandeja, afrouxe os botões **A** por baixo do apoio de braço, regule para a posição pretendida e volte a apertar firmemente.



Tenha sempre cuidado, pois os dedos podem ficar presos na ranhura ao ajustar a altura.

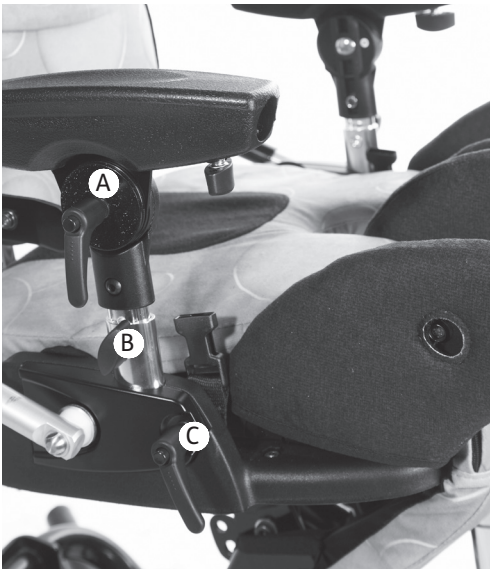

Tenha cuidado para garantir que as mãos ou os braços da

criança não ficam presos ao introduzir a bandeja.

Nunca use a bandeja para dirigir ou empurrar a cadeira.

Não coloque objetos quentes acima de 40°C na bandeja.

De notar que a bandeja é apenas para ser usada pelo utilizador. Não incline ou coloque objetos com mais de 8 kg (17,6 lbs) na bandeja.



11.23 AJUSTE DA BARRA DE APOIO

Para regular a profundidade da barra de apoio de acordo com o alcance da criança, afrouxe o botão **A**, ajuste para a profundidade pretendida e, em seguida, volte a apertar

Não ajuste as barras horizontais para além da moldura, exceto quando estiver a remover a bandeja.



SECÇÃO 12: AJUSTES FREQUENTES PARA O USO DIÁRIO

(TERAPEUTAS/CUIDADORES/PAIS)

Os pais e os cuidadores devem aprender a fazer ajustes frequentes e devem conhecer as verificações de segurança na secção 7 auxiliados por uma pessoa técnica e clinicamente competente com formação na utilização do produto. A Leckey recomenda que seja mantido um registo escrito de todos os pais e cuidados que receberam formação sobre o uso correto deste produto.

12.1 TRANSFERIR A CRIANÇA PARA O ASSENTO OU RETIRÁ-LA DO ASSENTO

Antes de transferir a criança para o assento, realize a inspeção diária do produto, conforme descrito na **secção 14** deste manual do utilizador. Ajuste o assento a uma altura confortável para facilitar a transferência. Bloqueie todos os rodízios, certificando-se de que estão voltados para fora para maximizar a estabilidade do produto. Certifique-se de que a fivela de segurança no arnês de peito está solta e fora do caminho para facilitar a transferência.

Se o assento dispuser de laterais torácicas desdobráveis, em primeiro lugar, afaste-as utilizando o botão A. Solte o arnês pélvico ou o Berço pélvico no meio, desfaça o velcro lateral do Berço Pélvico e abra o arnês para facilitar a transferência. Por último, se houver sandálias, abra as correias. Agora está pronto a transferir ou içar a criança para o assento.



O arnês pélvico e o Berço Pélvico são fixados com a fivela do meio e o velcro lateral (no caso do Berço Pélvico).

12.2 AJUSTAR O ARNÊS PÉLVICO OU O BERÇO PÉLVICO

O posicionamento e tensão corretos do arnês pélvico ou do berço pélvico é essencial para a gestão postural da criança, afetando o seu conforto e capacidade de desenvolver atividades. Consulte o seu terapeuta para se certificar de que o arnês está posicionado corretamente e que as correias estão devidamente tensionadas.

Para tensionar as correias do arnês pélvico e as almofadas em torno da criança, puxe a correia central **A**. Puxe as duas correias laterais para ajustar a posição pélvica e ajuste **B**. Para tensionar o Berço Pélvico, use as 4 correias laterais **C** e as abas de velcro **D**.

Se usar o assento ao ar livre e o seu filho tiver um casaco vestido, coloque o arnês pélvico ou o berço pélvico por baixo do casaco.

Arnês pélvico



Berço pélvico



Aperte sempre a fivela central do arnês pélvico ou do berço pélvico antes de fazer qualquer outro ajuste. Aperte sempre a fivela central do arnês pélvico ou do berço pélvico antes de fazer qualquer outro ajuste.

12.3 CHASSI

O assento Mygo foi concebido para ser montado numa variedade de chassis. Este manual do utilizador mostra o uso correto e seguro do sistema de assento com o chassi Hi-low Leckey. Para todos os outros chassis ou bases, consulte o manual do fabricante.

Para preparar o chassi Hi-low para o sistema de assento, recomendamos que eleve o chassi para uma altura de trabalho confortável pressionando a alavanca de pé na parte traseira do chassi ou pressionando o botão para cima no comando da opção motorizada.




12.4 AJUSTE DA ALTURA MOTORIZADO

O chassi motorizado pode ser facilmente ajustado com o comando de controlo com botão de pressão. O assento pode ser ajustado em altura com o cliente na cadeira.

Antes de o produto ser usado pela primeira vez, recomenda-se que a bateria seja totalmente carregada durante 12 horas. Para tal, ligue o adaptador à tomada de corrente e ligue o cabo à **A** bateria e ligue a energia. Quando carregado, desligue a alimentação, remova a ficha do adaptador e desligue o cabo da bateria. A carga da bateria deve ser completada todos os dias durante aproximadamente uma hora. A cadeira pode ser ajustada em altura enquanto estiver ligada à corrente.



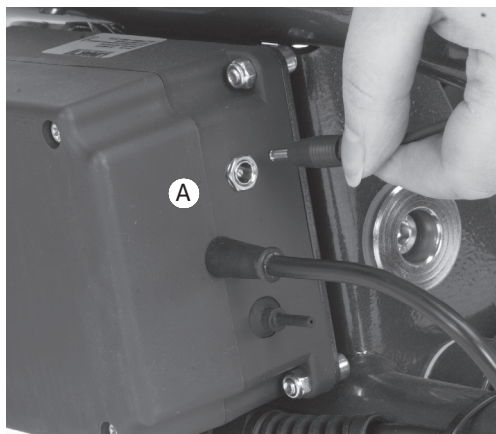

12.5 AJUSTE DA ALTURA – CHASSI HI-LOW

Pode fazer este ajuste com a criança na cadeira. Para ajustar a altura do chassi Hi-low, pressione a alavanca de pé na parte traseira do chassi ou pressione o botão **C** para cima no comando da opção motorizada enquanto segura a pega de empurrar. Depois de retirar o pé do pedal ou o dedo do comando, o assento ficará preso à altura escolhida.


Por motivos de segurança, o pedal de ajuste de altura no chassi pode ser bloqueado engatando o pino de tração no lado direito do pedal. Para desbloquear, puxe o pino para fora e gire 90 graus, o pedal pode então ser operada. O pino de bloqueio deve ser mantido na posição bloqueada quando não estiver a ajustar o chassi.



Mantenha sempre o pino de bloqueio engatado quando não estiver a ajustar o chassi. Isto evitará que o pedal seja operado acidentalmente.

Para crianças com peso superior a 27kg (60lbs), o levantamento do chassi manual é um levantamento para 2 pessoas (regulamentos de levantamento e manuseio do Reino Unido).

Tenha sempre cuidado, pois as mãos podem ficar presas ao ajustar a altura da base.

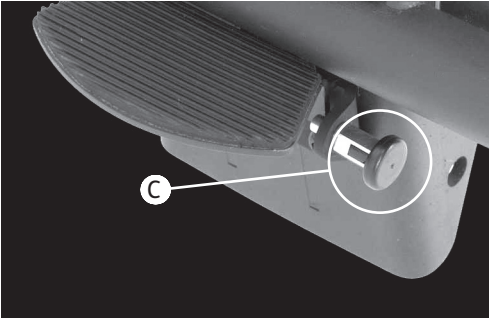

12.6 ESPAÇO DE INCLINAÇÃO

O espaço de inclinação pode ser angulado quando o utilizador se encontrar no assento. Antes de ajustar o ângulo do espaço de inclinação do assento, certifique-se sempre de que o arnês pélvico está preso, impedindo que o utilizador deslize para a frente no assento.

Para ajustar o ângulo de inclinação, pressione a alavanca por baixo da base do assento. Depois de selecionar o ângulo desejado, basta retirar a sua mão da alavanca, a cadeira ficará bloqueada nessa posição. O espaço de inclinação deve ser bloqueada quando o utilizador se encontrar no assento.


Para bloquear a alavanca, gire passador para o lado direito da alavanca e o passador irá encaixar na posição. Pode ter de levantar a alavanca ligeiramente para permitir que bloqueie. Para desbloquear, puxe o pino para fora e gire 90 graus, a alavanca pode então ser operada.



Mantenha sempre a alavanca do espaço de inclinação na posição bloqueada para evitar o acionamento acidental da alavanca que poderá fazer com que a unidade do assento faça um movimento brusco e possivelmente provoque ferimentos na criança.

Por favor, utilize o guiador ao operar o espaço de inclinação.

Verifique sempre com o seu terapeuta se a utilização do espaço de inclinação não provocará obstruções das vias aéreas da criança.

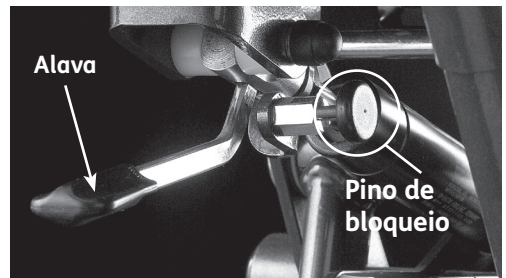



12.7 AJUSTAR O ENCOSTO DINÂMICO

O encosto deve estar na posição vertical com a função dinâmica bloqueada **A** (isto é, a pega na posição mais baixa no encosto supinação) e certifique-se de que o pino de bloqueio, está engatado

quando o sistema de assento é utilizado no transporte **C**.



O encosto deve estar na posição vertical com a função dinâmica bloqueada (isto é, a pega na posição mais baixa no encosto supinação) e certifique-se de que o pino de bloqueio C está engatado quando o sistema de assento é utilizado no transporte.

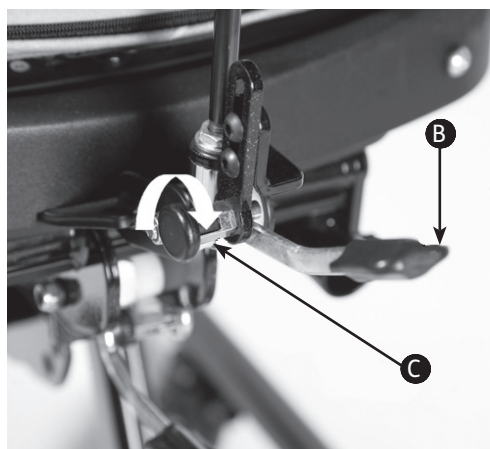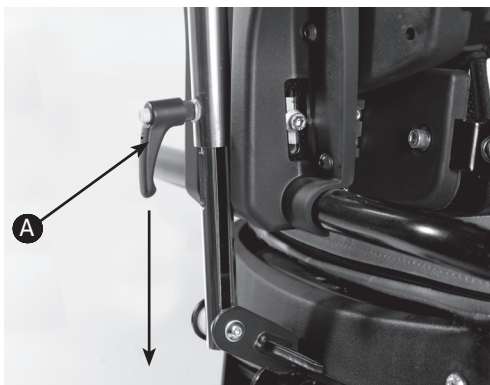

12.8 AJUSTE DO ARNÊS DE TRONCO E PEITO

Se a criança precisar de suporte torácico como parte do seu programa de suporte postural, o assento será equipado com laterais rígidas ou com uma combinação de laterais, arnês de peito e arnês de tronco. Pode ser necessário ajustá-los diariamente para os adaptar às diferenças nas roupas.



Verifique sempre com o seu terapeuta o posicionamento e tensão ideais das correias e elementos de suporte para a criança.

Para alterar a largura do arnês de peito, levante a capa frontal, ajuste as tiras de velcro e ajuste para a largura pretendida. Quando a largura correta for alcançada, volte a colocar a tampa.

Consulte a **secção 10** para obter orientações específicas sobre o ajuste do arnês de tronco.





Certifique-se sempre de que as fivelas de plástico estão totalmente encaixadas quando usar o arnês para o peito.

Verifique o arnês e as laterais regularmente para garantir que a criança está segura e não consegue deslizar para a frente no assento, pois isso pode restringir a sua respiração.



Se a criança estiver a usar sandálias ou calçado leves, verifique as correias para garantir que a cinta não irrita a pele.



através de uma das duas ranhuras em cada lado das sandálias, de acordo com o tamanho dos pés do utilizador.

1



2




12.9 SANDÁLIAS

Para posicionar os pés do utilizador nas sandálias, prenda as tiras de velcro fornecidas para que o pé fique seguro na posição. As correias devem ser colocadas sobre o peito do pé e sobre os dedos. A correia frontal pode ser passada

12.10 AJUSTE DA BANDEJA

A bandeja de atividades pode ser usada para uma variedade de funções e a sua posição pode ser ajustada para se adequar ao utilizador e à atividade, seja para diversão, educação ou alimentação. A bandeja é fixada ao assento inserindo os tubos da bandeja através do centro do apoio de braço. Quando a bandeja está na posição, o botão **A** deve ser apertado firmemente. Ajuste os apoios de braço para regular a altura e o ângulo da bandeja.

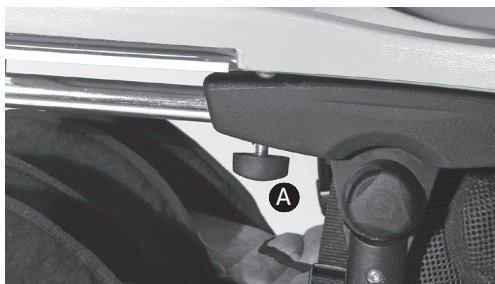

Para ajustar a altura do apoio de braço, afrouxe o botão regule para a altura pretendida e volte a apertar. Para ajustar o ângulo, gire o botão manual **B** até à posição pretendida.

Para remover o apoio de braço completamente para transferência lateral ou ajudar a criança a entrar ou sair do assento, afrouxe o botão manual **C**, pressione o botão **D** e levante o apoio de braço.

Tenha sempre cuidado, pois os dedos podem ficar presos na ranhura ao ajustar a altura.



Tenha cuidado para garantir que as mãos ou os braços da criança não ficam presos ao introduzir a bandeja. Nunca use a bandeja para dirigir ou empurrar a cadeira.

Não coloque objetos quentes com mais de 40 graus Celsius na bandeja

De notar que a bandeja é apenas para ser usada pelo utilizador. Não incline ou coloque objetos com peso superior a 8 kg (17.6 lbs) na bandeja.

12.11 AJUSTE DO APOIO DE BRAÇO DE BRAÇO

Para ajustar a altura do apoio de braço, afrouxe o botão manual **B**, regule para a altura pretendida e volte a apertar. Para ajustar o ângulo, gire o botão manual **A** até atingir a posição pretendida. Para remover o apoio de braço completamente para transferência lateral ou ajudar a criança a entrar ou sair do assento, afrouxe o botão manual **C**, pressione o **D** e levante o apoio botão de braço.

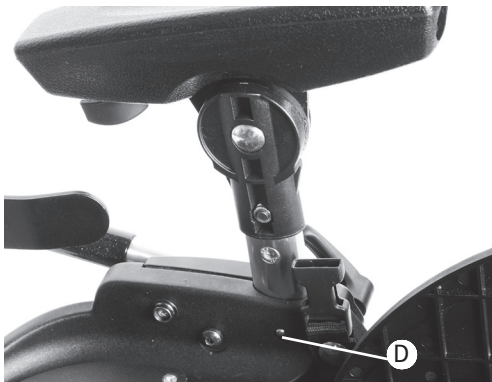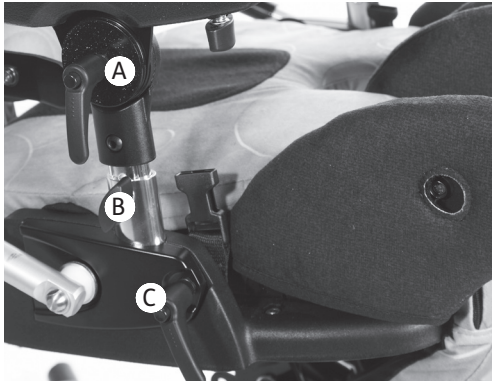


12.12 AJUSTE DA BARRA DE APOIO DE APOIO

Para regular a profundidade da barra de apoio de acordo com o alcance da criança, afrouxe o botão **B**, ajuste a profundidade pretendida e, em seguida, volte a apertar.

Não ajuste as barras horizontais para além das molduras, exceto quando estiver a remover a bandeja.

Para remover rapidamente, afrouxe o botão de cada lado e faça a barra deslizar verticalmente.

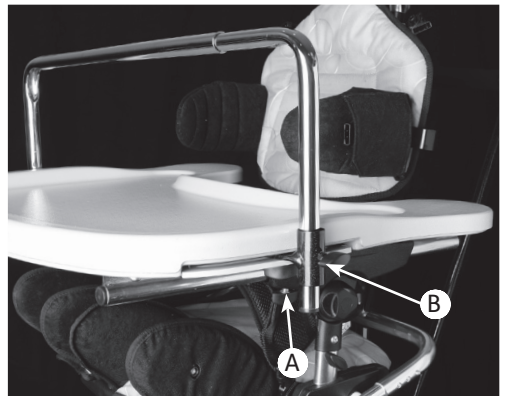

12.13 AJUSTES FREQUENTES

Para obter o movimento dinâmico necessário, afrouxe a pega **A**, deslize para a posição pretendida e volte a apertar firmemente.




Para devolver o encosto a uma posição estática, afrouxe a pega **A**, deslize o suporte do encosto para o fundo e volte a apertar a pega.

Para ajustar o ângulo do encosto quando se montou um encosto dinâmico, utilize a pega na base do encosto. Puxe o pino de bloqueio **B** e torça e desbloqueie. Levante a pega e ajuste o encosto. Puxe o pino de bloqueio **C**. Certifique-se de que o pino de bloqueio esteja seguro.

O alcance do ângulo do encosto e o alcance do movimento dinâmico são, no máximo, de 30 °, ou seja, se o encosto estiver na posição vertical, um ângulo de 30 ° completo estará disponível no sistema dinâmico. Se o ângulo do encosto for de 10 °, então está apenas disponível 20 de movimento com o encosto dinâmico e assim por diante.



O encosto deve estar na posição vertical com a função dinâmica bloqueada (isto é, a pega na posição mais baixa no encosto supinação) e certifique-se de que o pino.

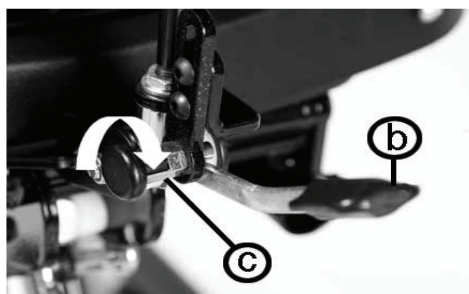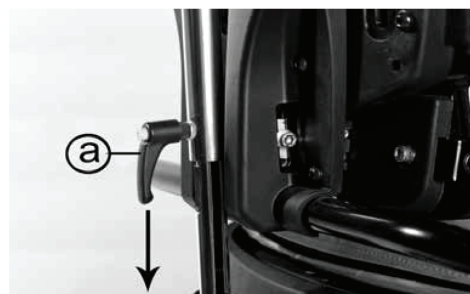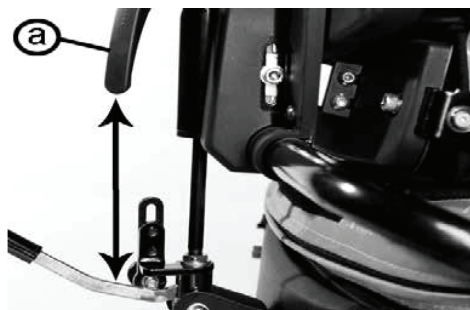

SECÇÃO 13: INFORMAÇÃO SOBRE LIMPEZA E CUIDADOS

Como manter

Quando limpar, recomendamos que use apenas água morna e um detergente não abrasivo. Nunca use solventes orgânicos ou fluidos de limpeza a seco.

Estofos e tecidos

1. As capas das almofadas podem ser removidas e lavadas na máquina a 40 ° C e secadas na máquina a uma temperatura baixa.

Remova a espuma das seguintes capas antes de lavar:

- Encosto de cabeça
- Suporte do ombro
- Almofada do encosto
- Almofada da base do assento.

Todos os outros estofos podem ser colocados na máquina de lavar inteiros, após a remoção de parafusos e fechos.

2. Os estofos e os tecidos podem ser limpos manualmente enquanto colocados. Quando limpar, recomendamos que use apenas água morna e um detergente não abrasivo.

3. A manchas devem ser removidas logo que possível, com um pano absorvente, toalha ou esponja. Sabão comum e uma esponja com água quente é eficaz para a sujidade normal e pequenas nódoas/derrames. Cuidado para não molhar o tecido já que poderá provocar o aumento da nódoa.
4. Podem ser usados agentes de limpeza antissépticos em manchas mais resistentes. Isto pode exigir um solvente seguro como o álcool isopropílico ou bebidas mineralizadas. Usar uma mistura de meia chávena de lixívia para 5 litros de água como desinfetante.
5. Os arneses pélvico e de tronco podem ser lavados na máquina a 40 ° C. Certifique-se de que todos os parafusos e fechos são removidos primeiro, pois podem causar danos na máquina de lavar. Guarde-os num local seguro e fora do alcance das crianças.
6. Certifique-se sempre de que o produto está seco antes de usar.





Componentes metálicos e em plástico

1. para a limpeza diária, pode usar sabão e água/spray antibacteriano.
2. O chassi deve ser limpo com um pano húmido - não use água corrente.
3. Não use solventes para limpar componentes de plástico ou metal.
4. Confirme sempre que o arnês está seco antes de usar.

SECÇÃO 14: INSPEÇÃO DIÁRIA DO PRODUTO

(Terapeutas, pais e cuidadores)

Recomendamos que as verificações visuais diárias do equipamento sejam realizadas pelos terapeutas, cuidadores ou pais para garantir que o produto está seguro para uso. As verificações diárias recomendadas são detalhadas abaixo.

1. Verifique se não há movimento lateral ou oscilação em nenhuma das partes móveis. Certifique-se de que todos os botões e parafusos de ajuste estão no lugar e fixos.
2. Verifique todos os sinais de desgaste e danos dos estofos e Velcro.
3. Verifique se todos os rodízios se movem livremente e ficam bloqueados em segurança.
4. Certifique-se de que a alavanca e o pino de bloqueio da placa de interface do assento estão completamente engatados e a unidade do assento está firmemente fixada no chassi.
5. Certifique-se de que o arnês pélvico está bem preso em torno do utilizador e que o mesmo não consegue deslizar ou inclinar-se para a frente no assento.
6. Certifique-se de que a platina está bem fixada.



Em caso de dúvida sobre a utilização segura do seu produto Leckey ou se alguma peça estiver danificada, deixe de usar o produto e contacte a nossa equipa de Atendimento ao Cliente ou com o seu revendedor local, o mais rapidamente possível.

SECÇÃO 15: INSPEÇÃO ANUAL DO PRODUTO

(Terapeuta, Técnico, Especialista de Produto Leckey, Revendedor)

A Leckey recomenda que cada produto seja submetido a uma inspeção detalhada, no mínimo, uma vez por ano e sempre que o produto é relançado para uso. Esta inspeção deve ser realizada por uma pessoa tecnicamente competente que tenha sido formada na utilização do produto e deve incluir, como requisito mínimo, as seguintes verificações.

1. Verifique se não há movimento lateral ou oscilação em nenhuma das partes móveis. Certifique-se de que todos os botões e parafusos de ajuste estão no lugar e fixos.
2. Verifique se todos as chaves de torniquete, botões, porcas, parafusos e fivelas de plástico estão no lugar, substituindo todos os itens em falta. Prestar atenção especial aos seguintes itens;
 - Parafusos de bloqueio do suporte de cabeça.
 - Parafusos de ajuste de ângulo e altura do encosto.
 - Parafusos de ajuste da profundidade do assento.
 - Parafusos de fixação do arnês pélvico /guia de quadril.
 - Ajuste de altura e ângulo do apoio para os pés..
3. Verifique se o mecanismo de ajuste da altura do chassi está a funcionar corretamente. Se o chassi for operado com pedal, verifique se a altura do assento não muda quando o pedal é libertado. Além disso, verifique se o pino de bloqueio engata de forma segura para impedir o ajuste accidental da altura do chassi.
4. Ajuste o assento no seu alcance máxima de espaço de inclinação e certifique-se de que a alavanca de bloqueio bloqueia o assento com segurança num ponto variável neste intervalo.
5. Verifique se, onde o assento e o chassi se unem, não há desgaste visível nos componentes metálicos.
6. Levante a base para verificar individualmente cada rodízio. Certifique-se de que todos se movimentam livremente e retire qualquer sujidade das rodas de borracha. Verifique se os travões bloqueiam as rodas com segurança.
7. Verifique visualmente a estrutura do produto, prestando atenção aos pontos soldados na armação garantindo que não existem sinais de fadiga ou rachas à volta das soldas.
8. A Leckey recomenda que seja mantido um registo escrito de todas as inspeções anuais do produto.

SECÇÃO 16: RELANÇAMENTO DOS PRODUTOS LECKEY

A maioria dos produtos Leckey é analisada e encomendada para atender às necessidades de um utilizador individual. Antes de relançar um produto, recomendamos que o terapeuta que prescreveu o produto realize uma verificação de compatibilidade do equipamento para o novo utilizador e garante que o produto que está a ser relançado não contém modificações ou acessórios especiais.

Deve ser realizada uma inspeção técnica detalhada no produto antes da reedição. Isto deve ser realizado por uma pessoa tecnicamente competente que tenha sido formada na utilização e inspeção do produto.

Consulte a **secção 15** sobre as verificações a realizar.

Antes de relançar um produto, recomendamos que o mesmo seja desinfetado de acordo com os seguintes procedimentos:

Nota: Limpe sempre o produto primeiro para remover a sujidade acumulada antes de desinfetar/higienizar.

1. Sempre que possível, recomendamos o uso de um sistema de desinfecção “nebulizador” automatizado que é usado para cobrir completamente as superfícies do produto com um agente desinfetante. As instruções do

fabricante para o sistema escolhido devem ser consultadas antes do uso e cumpridas exatamente.

2. Quando não estiver disponível um sistema de desinfecção automatizado, todas as superfícies do produto devem ser limpas com toalhetes desinfetantes ou desinfetante líquido com um pano macio. Os produtos adequados são 70% IPA, 70% álcool ou lixívia diluída. As instruções do fabricante para o produto escolhido devem ser seguidas. Certifique-se de que o produto foi limpo corretamente de acordo com a secção Informação sobre limpeza e manutenção deste manual.

Verifique se foi fornecida uma cópia do manual do utilizador com o produto. É possível descarregar uma cópia no nosso sítio web em **www.leckey.com**

A Leckey recomenda que seja mantido um registo escrito de todas as inspeções realizadas durante a reedição do produto.

SECÇÃO 17: MANUTENÇÃO DOS PRODUTOS

A assistência técnica de todos os produtos Leckey deve ser efetuada apenas por pessoas tecnicamente competentes com formação adequada sobre a utilização do produto.

Todos os pedidos de serviço internacionais devem ser direcionados ao distribuidor autorizado da Leckey, que terá todo o prazer em ajudar. Para mais informações sobre os distribuidores Leckey, visite o nosso website em **www.leckey.com**.



Em caso de dúvida sobre a utilização segura do seu produto Leckey ou se alguma peça estiver danificada, deixe de usar o produto e contacte a nossa equipa de Atendimento ao Cliente ou com o seu revendedor local, o mais rapidamente possível.

SECÇÃO 18: INFORMAÇÃO TÉCNICA

Detalhes Técnicos		
Tamanho	Tamanho 1	Tamanho 2
Idade (Anos <u>Aproxim</u>)	3- 10	8- 14
Códigos	117-610	137-600
Peso do utilizador <u>mín</u> <u>máx</u>	18kg / 40lbs 50kg / 110lbs	18kg / 40lbs 50kg / 110lbs
Altura do utilizador <u>mín</u> <u>máx</u>	105cm / 41 polegadas 150cm / 59 polegadas	127mm/ 50 polegadas 168cm / 66 polegadas
Largura do assento <u>mín</u> <u>máx</u>	200mm / 8 polegadas 325mm / 13 polegadas	220mm / 8,7 polegadas 345mm / 13,6 polegadas
Profundidade do assento <u>mín</u> <u>máx</u>	270mm / 10,6 polegadas 420mm / 16,5 polegadas	350mm / 13,8 polegadas 470mm / 18,5 polegadas
Largura do joelho <u>mín</u> <u>máx</u>	90mm / 3,5 polegadas 110mm / 4,3 polegadas	120mm / 4,7 polegadas 470mm / 18,5 polegadas
Ângulo da platina Abdução Adução <u>Plantar flexão/Dorsiflexão</u>	8° 12° 10°	8° 20° 10°
Largura do peito <u>máx</u>	170mm / 6,7 polegadas 270mm / 10,6 polegadas	170mm / 6,7 polegadas 270mm / 10,6 polegadas
Altura do encosto de costas <u>mín</u> <u>máx</u>	360mm / 14,20 polegadas 470mm / 18,5 polegadas	460mm / 18,1 polegadas 570mm / 22,4 polegadas
Ângulo do encosto: Pronação Reclinação	10° 25°	10° 25°

Assento até à Sandália		
<u>mín</u>	215mm / 8,5 polegadas	315mm / 12,4 polegadas
<u>máx</u>	350mm / 13,8 polegadas	470mm / 18,5 polegadas
Parte superior do assento até ao chão		
<u>mín</u>	360mm / 14,2 polegadas	360mm / 14,2 polegadas
<u>máx</u>	700mm / 27,5 polegadas	700mm / 27,5 polegadas
Altura do apoio de braços		
Tamanho da bandeja		
Peso do assento	10kg / 22lbs	14,5kg / 32lbs

OPÇÕES DE BASE HI LOW LECKEY

Detalhes Técnicos		
Pedal (topo do assento para o chão)	Mín 340cm / 13 polegadas	Máx 655cm / 26 polegadas
Motorizado (Topo do assento para o chão)	Mín 370cm / 15 polegadas	Máx 675cm / 27 polegadas
Espaço de inclinação: Pronação 10°	10° 25°	137-600
Reclinação	25°	
Peso da base	12kg	26,5lbs

6.3 Especificação do atuador LINAK - 281209-01 com classificação IP51

Ciclo de trabalho Máximo de 10% ou 2 minutos de uso contínuo seguido de 18 minutos sem uso. Temp ambiente +5 ° a +40 ° C Temp ambiente operacional 22 °

Temp armazenamento

-40 ° C a 70 ° C Empurrar Máx 3500N Puxar Máx 2000N

Autobloqueio em 3500N Empurrar - 2000N Puxar Velocidade normal com carga total

4,7 mm/s Amperagem máxima em carga de 3500N é 3,9 amps Nível de ruído dB 48

Tensão de entrada 24v +- 10%

6.4 Caixa de bateria LINAK - BA18021-00 com classificação IP51

Temp ambiente +5 ° a 40 ° C Temp de armazenamento -20 ° C a 60 ° C Capacidade nominal

1.2 Ah 24v A corrente de carga é de, no máximo, 0.3A Bateria chumbo-ácido gel

6.5 Comando LINAK - HB41000- 00004 Classificação IP51

Corrente de controlo 100mA por canal (máx.)

Temp ambiente +5 ° a +40 ° C Carregador de bateria LINAK - CH01 Rede elétrica 100-

240 VAC/50-60 Hz fonte de alimentação comutada Tensão de carregamento 27.6 VDC

+ - 2%

Corrente de carregamento máx. 500mA LED verde para ligar












LED amarelo para função de carregamento




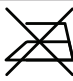




O LED amarelo fica verde quando as baterias estão totalmente carregadas.

Os produtos LINAK podem ser armazenados em instalações de armazenamento não aquecidas com humidade entre 0 e 100%, sem condensação. Sem condensação significa que não se deve levar um produto de um armazém refrigerado para uma sala com uma temperatura de 20 °

C; se isso for feito, aparecerá humidade nos produtos.

TABELA DE SÍMBOLOS

Símbolo	Significado
	Dispositivo Médico
	Ler as Instruções de Utilização
	Marcação CE
	Aviso
	Não eliminar no lixo doméstico
	Fabricante
	Número do modelo
	Número de série
	Peso máximo do utilizador
	Data de fabrico
	Sem látex

Símbolo	Significado
	Identificação Única de Dispositivo
	Testado contra colisões
	Lavagem na máquina - temperatura da água 40°C
	Não passar a ferro
	Não usar lixívia
	Não limpar a seco
	Secagem na máquina a baixa temperatura
	Lavagem à mão



Visite leckey.com para uma lista completa dos Distribuidores Leckey

James Leckey Design Limited
19 Ballinderry Road
Lisburn, BT28 2SA
Northern Ireland

[+44] 28 9260 0750
hello@leckey.com



leckey.com



LS1162-01