



Squiggles Seat

Manual do Utilizador



Apoio para crianças



O Assento Squiggles foi concebido para oferecer um elevado nível de posicionamento postural ao mesmo tempo que permite a função e a mobilidade. Este manual mostra como pode utilizar de forma rápida, fácil e segura todas as funções. As instruções sobre segurança e manutenção garantem que irá desfrutar da utilização deste produto durante um longo período de tempo.

CONTEÚDO

1. Utilização prevista	p.04
2. Certificação	p.04
3. Avisos e precauções	p.05
4. Termos da garantia	p.06
5. Registo histórico do produto	p.07
6. Registo formação produto	p.07
7. Informação de segurança	p.08
8. Precauções e contraindicações	p.11
9. Como desembalar e montar o assento	p.12
10. Encaixar as almofadas	p.24
11. Configuração clínica para a gestão postural	p.31
12. Ajustes frequentes para o uso diário	p.41
13. Informação sobre limpeza e cuidados	p.49
14. Inspeção diária do produto	p.50
15. Inspeção anual do produto	p.51
16. Relançamento de produtos leckey	p.52
17. Manutenção dos produtos	p.53
18. Informação técnica	p.54

SECÇÃO 01: UTILIZAÇÃO PREVISTA

Utilização prevista

Os sistemas de assento da Leckey destinam-se a apoiar crianças e adultos jovens com necessidades posturais ligeiras a complexas que afetam a capacidade de sentar sem apoio adicional.

Indicações para uso

O Assento Squiggles é um sistema de assento modular concebido para responder às necessidades de crianças com uma variedade de deficiências que afetam a sua capacidade de se sentarem de forma independente, sem suportes posturais externos. É indicado para uso principalmente em casa, ambiente escolar interior ou exterior, se usado sobre uma base de mobilidade ou carrinho. Existe um tamanho; para faixas etárias aproximadas de 1-5 anos de idade com peso máximo de utilizador de 22kg (48lbs). O suporte postural configurável disponibilizado pelo Assento Squiggles é indicado para uso com crianças com necessidades posturais moderadas a complexas (GMFCS III-V).

SECÇÃO 02: CERTIFICAÇÃO

O Assento Squiggles está classificado como dispositivo médico de classe I ao abrigo dos regulamentos da UE e do Reino Unido. Como fabricante, a James Leckey Design Limited declara que este produto cumpre com os requisitos do Regulamento de Dispositivos Médicos (2017/745), Regulamentos de Dispositivos Médicos do Reino Unido 2002, Diretiva de Dispositivos Médicos (93/42 CEE) e EN12182 Ajudas técnicas para pessoas deficientes, requisitos gerais e métodos de ensaio.

Aviso ao utilizador e/ou paciente: qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser reportado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou paciente está estabelecido.



NOTA:

**Conselhos gerais para o utilizador
O não cumprimento destas instruções
pode resultar em ferimentos , danos
para o produto ou para o meio
ambiente!**

SECÇÃO 03: AVISOS E PRECAUÇÕES

1. AVISO RISCO DE QUEDA

- Usar o assento nos limites da sua gama de posições reduzirá a sua estabilidade. Use o assento apenas na altura e/ou inclinação máximas quando em solo nivelado (inclinação inferior a 2 graus).
- Ao usar o assento em declives/ rampas (até 10 graus), certifique-se de que o encosto está na posição vertical e a altura do assento está abaixo da metade da altura.

2. RISCO DE ENTALAMENTO DE DEDOS

- Cuidado para que os dedos do operador ou das crianças no chão não fiquem presos no mecanismo de elevação e descida do assento elétrico.

3. AVISO DE SEGURANÇA DO OCUPANTE

- Certifique-se de que todos os arneses do ocupante e especialmente os cintos pélvicos estão apertados e ajustados para segurar o ocupante em segurança no lugar antes de movimentar o assento ou sair das proximidades do assento estático.

4. RISCO DE ESMAGAMENTO DE DEDOS

- Cuidado ao montar ou ajustar a posição dos componentes montagem do assento para que os seus dedos não fiquem esmagados ao posicionar os componentes do assento e a apertar as fixações.

5. VERIFICAÇÕES DIÁRIAS DE PRECAUÇÃO

- O assento deve ser verificado diariamente antes da utilização para garantir que todos os arneses e elementos do assento estão fixos com segurança. Antes da utilização, verifique ainda se o cabo de carregamento da bateria apresenta sinais de danos. Consulte a SECÇÃO 'Inspeção diária do produto' para mais detalhes sobre as verificações diárias.

6. CUIDADO RISCO DE DISPARO DO CHASSI MOTORIZADO

- Certifique-se de que a ligação de carregamento da bateria para o chassi motorizado é removida do assento antes de o movimentar.

7. CUIDADOS DE LIMPEZA

- Limpe o assento regularmente para evitar a acumulação de sujidade nos elementos do assento e no chassi. A sujidade acumulada pode desgastar prematuramente as almofadas do assento e estimular a corrosão do chassi. Use apenas produtos de limpeza não abrasivos e panos húmidos, não use água corrente nos estofos quando ainda estiverem presos ao assento. Consulte a SECÇÃO 'Informação sobre limpeza e cuidados'.

8. LAVADORAS/MANGUEIRAS DE LIMPEZA

- Não use mangueiras ou lavadoras de pressão nos componentes da armação, já que o sistema de elevação do assento elétrico não é vedado contra água corrente e pode ficar danificado com a

entrada de água. Consulte a SECÇÃO 'Informação sobre limpeza e cuidados'.

9. CUIDADOS DE MANUTENÇÃO/ REPARAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÓNICOS

- Não existem componentes no conjunto de elevação do assento elétrico cuja manutenção possa ser realizada pelo utilizador. A manutenção e as reparações devem ser realizadas apenas por pessoal autorizado pela Leckey.

10. CUIDADOS DE ELIMINAÇÃO

- Elimine a cadeira apenas num local de reciclagem de lixo comunitário e certifique-se de que os componentes elétricos são removidos para eliminação separada.

11. CUIDADOS DE COLOCAÇÃO EM UTILIZAÇÃO

- Ao colocar o assento em uso após o armazenamento, deixe-o aclimatar-se à temperatura ambiente durante 2 horas. Limpe qualquer humidade que se tenha condensado no produto.

SECÇÃO 04: TERMOS DA GARANTIA

A garantia aplica-se apenas quando o produto é usado de acordo com as condições específicas e para os fins previstos, seguindo todas as P recomendações dos fabricantes (consulte ainda os termos gerais de venda, entrega e pagamento). Todos os produtos e componentes fabricados pela Leckey têm uma garantia de três anos.

SECÇÃO 05: REGISTO HISTÓRICO PRODUTO

O seu produto Leckey está classificado como Dispositivo Médico de Classe 1 e, como tal, só deve ser prescrito, configurado ou relançado por um técnico competente com formação na utilização deste produto. A Leckey recomenda que seja mantido um registo escrito com detalhes de todas as configurações, reedições e inspeções anuais realizadas a este produto.

SECÇÃO 06: REGISTO FORMAÇÃO PRODUTO

(PAIS, PROFESSORES E CUIDADORES)

O seu produto Leckey está classificado como Dispositivo Médico de Classe 1 e, como tal, a Leckey recomenda que pais, professores e cuidadores que usem o equipamento devem ser alertados para as seguintes secções deste manual do utilizador por um técnico competente:

SECÇÃO 07

Informação de segurança

SECÇÃO 12

Ajustes Frequentes para o Uso Diário

SECÇÃO 13

Informação sobre limpeza e Cuidados

SECÇÃO 14

Inspeção diária do produto

A Leckey recomenda que seja mantido um registo escrito de todas as pessoas que receberam formação sobre a utilização correta deste produto.

SECÇÃO 07: INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

1. Leia sempre as instruções completas antes de utilizar o produto.
2. Para aumentar a segurança, recomendamos que os utilizadores não sejam deixados sozinhos durante a utilização do equipamento da Leckey.
3. Use apenas componentes aprovados pela Leckey com o seu produto. Não é permitido modificar o produto. O não cumprimento das instruções pode colocar o utilizador ou o cuidador em risco e invalidará a garantia do produto.
4. Em caso de dúvida sobre a utilização segura do seu produto Leckey ou se alguma peça estiver danificada, deixe de usar o produto e contacte a nossa equipa de Atendimento ao Cliente ou com o seu revendedor local, o mais rapidamente possível.
5. Realize todos os ajustes posturais relevantes e assegure-se de que estão bem seguros antes de colocar o utilizador neste produto. Alguns ajustes podem exigir a utilização de uma ferramenta que é fornecida com cada produto. Mantenha todas as ferramentas fora do alcance das crianças.
6. Ao colocar o utilizador num Assento, tanto por motivos de postura como de segurança, prenda sempre primeiro o arnês pélvico.
7. Quando o produto estiver parado, certifique-se de que todos os rodízios estão travados e voltados para o lado contrário da base, pois isto irá melhorar a estabilidade do produto. Isto é especialmente importante quando o recurso de espaço de inclinação ou reclinção das costas está a ser utilizada.
8. Quando o assento estiver a ser utilizado num chassi Hi-Lo, por favor, certifique-se de que o pedal de ajuste de altura e a alavanca do espaço de inclinação estão bloqueados e não podem ser ajustados acidentalmente por outras crianças.
9. Quando os Assentos Leckey são utilizados no chassi Hi-Lo, não recomendamos que os utilizadores sejam movidos sobre superfícies desniveladas quando se encontram no equipamento. Devem ser tomados os devidos cuidados e atenção ao colocar/retirar o utilizador do assento.
10. Nunca deixe o produto sobre uma superfície com mais de 5 graus de inclinação. Não se esqueça de bloquear os rodízios.
11. Utilize apenas a pega de empurrar para dirigir e mover o assento de uma área para outra. Nunca utilize a bandeja ou o encosto de cabeça para este fim.

12. O produto contém componentes que podem representar risco de asfixia para crianças pequenas. Verifique sempre se os manípulos e parafusos de bloqueio que se encontram ao alcance da criança estão sempre bem apertados e seguros.
13. Os produtos Leckey cumprem com a regulamentação de segurança contra incêndios de acordo com a EN12182. No entanto, o produto contém componentes plásticos e, como tal, deve ser mantido afastado de todas as fontes diretas de calor, incluindo chamas, cigarros, aquecedores elétricos e a gás.
14. Não coloque objetos quentes acima de 40 ° C na bandeja
15. Limpe o produto regularmente. Não utilize produtos de limpeza abrasivos. Realize verificações de manutenção regularmente para garantir que o seu produto está em boas condições de funcionamento.
16. O produto foi concebido para ser utilizado em espaços interiores e, quando não estiver a ser utilizado, deve ser guardado em local seco e que não esteja sujeito a temperaturas extremas. O intervalo de temperatura de operação segura do produto é entre +5 e +40 graus Celsius.
17. Verifique sempre se os botões plásticos na pega de empurrar estão bem apertados antes de mover a unidade do assento.
18. Antes de utilizar o Assento, verifique sempre se a pega da interface da unidade do assento está totalmente engatada no chassi. Certifique-se de que o pino de bloqueio está engatado para que a pega não possa ser libertada acidentalmente. Se a pega não estiver encaixada corretamente, a unidade do assento poderá soltar-se e provocar ferimentos graves à criança ou ao cuidador.

ASSENTO SQUIGGLES - TESTES DE COLISÃO

O Assento Squiggles da Leckey foi testado contra colisões e aprovado para utilização em veículos.

Foi testado na sua configuração completa numa base substituta com um suporte de cabeça contornado Leckey acoplado.

Se o Assento Squiggles da Leckey estiver a ser utilizado num veículo, os seguintes pontos devem ser seguidos:

O Assento Squiggles deve ser posicionado para a frente e utilizado com um Sistema de Retenção Unwin e um suporte de cabeça contornado que deve ser posicionado adequadamente em todos os momentos durante o transporte. O suporte de cabeça contornado está disponível como acessório opcional com o Assento Squiggles.

O Assento Squiggles é testado contra colisões e cumpre os requisitos da ISO16840 parte 4. Para mais informações, entre em contacto com a nossa Equipa de Atendimento ao Cliente.

Importante

Estes pormenores do teste de colisão referem-se apenas ao Assento Squiggles e à placa de interface. Se estiver a utilizar o de Assento Squiggles numa base de cadeira de rodas, consulte o manual do fabricante da cadeira de rodas para obter informações sobre os testes de colisão.

COMBINAÇÕES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

Pode ser possível combinar o Assento Squiggles com um ou mais do que um outro dispositivo médico ou outro produto. Informações sobre quais as combinações que são possíveis podem ser encontradas em **leckey.com**. Todas as combinações listadas foram validadas para cumprir com os Requisitos Gerais de Segurança e Desempenho, secção 14.1 do Regulamento de Dispositivos Médicos 2017/745.

Orientações sobre a combinação, tal como montagem, podem ser encontradas em **leckey.com**

SECÇÃO 08: PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

Precauções

- Deformações espinhais corrigidas, como escoliose ou cifose
- Contraturas musculares graves
- Assimetria muscular ou esquelética grave, incluindo deslocação da anca
- Condições progressivas e de perda muscular
- Risco elevado ou histórico recente de fraturas ósseas
- Risco elevado de lesão relacionada com pressão ou feridas abertas
- Padrões de movimento fortes e descontrolados
- Atividade convulsiva mal controlada
- Crianças dependentes do uso de gastrostomia endoscópica percutânea
- Instabilidade médica incluindo função respiratória ou cardiovascular comprometida
- Dependentes de aparelhos de sustentação da vida de terceiros, como tanques de oxigénio
- Dificuldades de aprendizagem significativas e/ou problemas comportamentais

Contraindicações

Não existem contra-indicações associadas à família de produtos Leckey Seating.

Todas as precauções e contra-indicações são consideradas a critério do clínico prescritor. A Leckey recomenda que um médico habilitado e experiente esteja presente durante a avaliação inicial, ajustes e configurações e reedições, para minimizar o risco.

SECÇÃO 09: COMO DESEMBALAR E MONTAR O ASSENTO

Verificar Peças

Parabéns pela aquisição do seu Assento Squiggles. Quando abrir as caixas, corte as tiras, tendo o cuidado de não cortar a caixa, pois pode danificar algumas das peças que se encontram no interior. Todas as peças estão embaladas em sacos de polietileno, estando cada uma deles claramente identificadas. Retire-as com cuidado das caixas e verifique se tem todas as peças que encomendou.

Alguns dos acessórios terão de ser montados antes de fixar o assento à base que adquiriu. Se estiver a instalar o assento numa base de mobilidade, certifique-se de que instala primeiro a placa de interface na base da mobilidade. As instruções sobre como fixar a interface a bases específicas serão fornecidas com a placa de interface. Depois de verificar todos os componentes, estará pronto para montar o de Assento Squiggles e fixá-lo à sua base.

Multi-ferramenta

Vários ajustes requerem a utilização da multi-ferramenta que é fornecida com cada assento e que pode ser encontrada na mochila.

⚠ A segurança em primeiro lugar
Mantenha os sacos de polietileno afastados das crianças.





9.1 LOCALIZAR O ENCOSTO

O encosto será rebatido para envio. Levante-o na posição vertical e, ao fazê-lo, deslize o tubo interior (A) para dentro do bloqueio do eixo de receção do encosto (B). Fixe o encosto na posição vertical e aperte pega de trinquete (C). Verifique se está seguro e não se move quando se aplica pressão.



9.2 FIXAR O APOIO DO OMBRO

Fixar o suporte de ombro aumentará o tamanho do assento Squiggles. Remova o suporte do encosto de cabeça. Este está travado na posição por motivos de segurança e exigirá força para partir. Insira o suporte de ombro entre o encosto e o suporte do encosto de cabeça. Volte a fixar o suporte do encosto de cabeça utilizando os 2 conjuntos de parafusos (A & B) fornecidos.

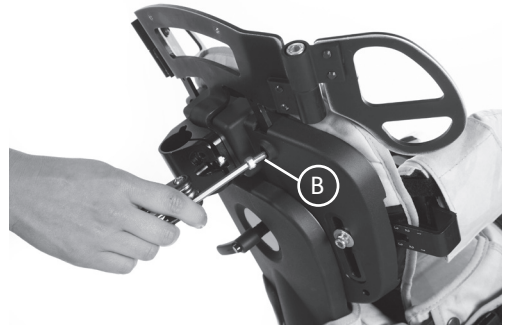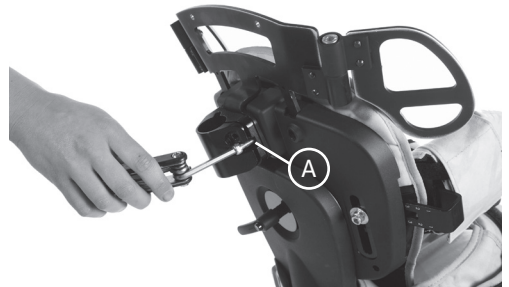

9.3 FIXAR O APOIO PARA OS PÉS PARA OS PÉS

Para fixar o apoio para os pés à base do assento, remova o parafuso e a porca da haste de metal do apoio para os pés. Em seguida, deslize o tubo de metal na moldura, tal como ilustrado. Quando o orifício na placa de metal estiver alinhado com o orifício na moldura, volte a colocar o parafuso e prenda com a porca fornecida. Certifique-se de que a extremidade do parafuso sai pela extremidade da porca.

Pode agora fixar o assento ao seu chassi e concluir a montagem do produto e de todos os acessórios que encomendou.


⚠ Certifique-se sempre de que a platina está bem presa.



9.4 FIXAR A PEGA DE EMPURRAR

A pega de empurrar é fixada ao chassi Hi-Lo inserindo as duas hastes inferiores nos tubos de receção, como ilustrado. A pega de empurrar dispõe de botões de segurança que devem ser pressionados ao inserir as hastes inferiores. Empurre as hastes no chassi Hi-Lo até que os botões saiam pela outra extremidade dos tubos de receção.

⚠ Verifique se os botões estão apertados antes de mover o produto, particularmente se estiver a mover a unidade do assento ao longo de corredores que podem ter superfícies.

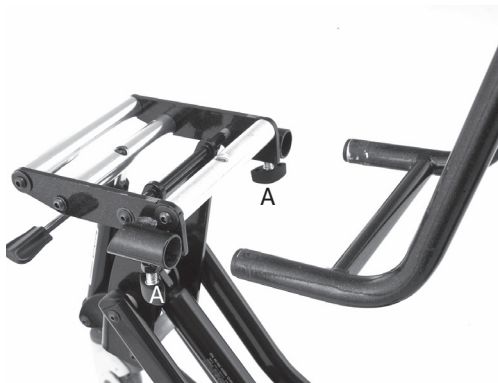

9.5 FIXAR O ENCOSTO DE CABEÇA

Em seguida, deslize a haste do encosto de cabeça Leckey para dentro do suporte de receção no encosto, coloque na posição pretendida e prenda usando a pega de trinquete de plástico.

O assento Squiggles foi concebido para fazer interface com os suportes de cabeça Whitmyer. O suporte de cabeça Lynx da Whitmyer é fixado da mesma forma que o encosto de cabeça da Leckey. Para fixar os suportes de cabeça Whitmyer Pro-Series, remova o colar de espaçamento do suporte de receção e bloqueie a haste vertical na posição utilizando a pega de trinquete.

⚠ Tenha em atenção que o Encosto de Cabeça nunca deve ser utilizado para empurrar ou conduzir o Assento, utilize sempre a pega de empurrar para este fim.



9.6 FIXAR OS SUPORTES LATERAIS RÍGIDOS/ ALMOFADAS DE PROTRAÇÃO

Ao mesmo tempo que mantém os componentes juntos, remova o parafuso e a anilha. Alinhe as molduras do ajustador de ângulo de plástico e o suporte lateral com a ranhura no encosto e volte a colocar a anilha e o parafuso A.

Use o mesmo método acima para prender as almofadas de protração.

9.7 FIXAR A MAÇANETA


Para fixar a maçaneta, coloque a haste de metal no canal de receção. Para prender na posição, pressione com firmeza. Existe uma ranhura para garantir que a haste está posicionada corretamente. A aba de metal na haste deve estar voltada para o encosto ao encaixar a maçaneta. Insira o pino para evitar que a maçaneta seja removida acidentalmente.

⚠️ Remova sempre a maçaneta antes de colocar a criança no assento.





9.8 INSERIR OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO NAS SANDÁLIAS

Insira o parafuso de fixação necessário (A) juntamente com a placa de retenção (B). Coloque uma tampa de borracha (C) na parte superior e inferior da sandália. Aperte utilizando os quatro parafusos (D) fornecidos. Para remover ou substituir o parafuso de fixação, inverta este processo.

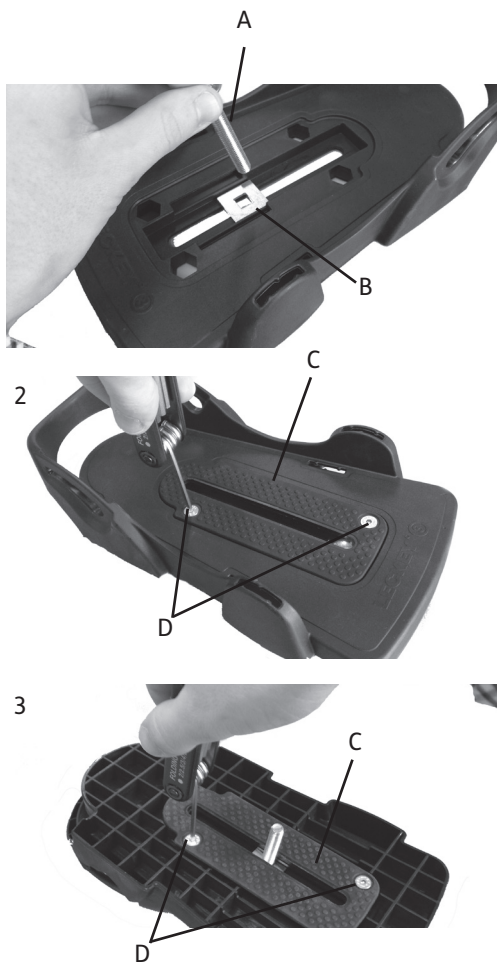

9.9 FIXAR AS SANDÁLIAS

Coloque a sandália para que o parafuso de fixação atravessa a ranhura na platina. Para prender, na parte inferior da platina coloque a anilha de borracha (A), seguida da anilha de metal (B) a knoflík (C) e em seguida, o botão na fixação parafuso. Para posicionar as sandálias, basta comprimento afrouxe o botão por baixo da platina, seleccione a posição necessária e volte a apertar o botão.

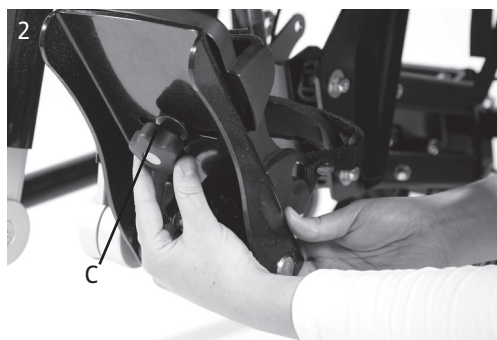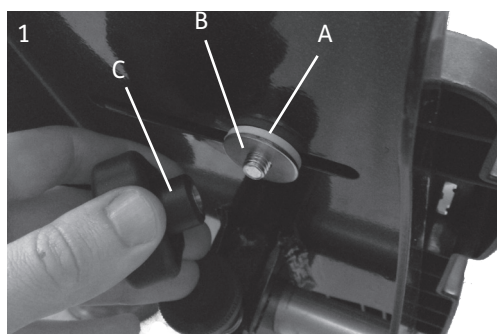

9.10 FIXAR OS ARNÊS DE TORNOZELO

Deslize a tela pela ranhura na sandália
Faça um laço em redor da parte inferior do triciclo. Em seguida, passe a tela pelo topo do triciclo. Finalmente, para prender a tela na posição, passando-a através da parte inferior do o triciclo novamente.
Apre a correia no necessário.



9.11 MONTAR A BANDEJA

Para fixar os braços aos suportes da bandeja, desaperte a pega de trinquete (A), coloque o molde no interior da placa da bandeja para que os dentes de plástico entrem na malha. Substitua a pega de trinquete do lado de fora. Repita no outro lado. Certifique-se de que os dois tubos horizontais estão alinhados de forma que fiquem nos recetores do suporte da bandeja.

9.12 FIXAR A BANDEJA

A bandeja é fixada ao assento inserindo os tubos nos suportes de receção. Quando a bandeja está na posição a pega de (A) deve trinquete ser apertada firmemente.




9.13 FIXAR A BARRA DE APOIO

Para fixar a barra de apoio, insira os suportes de receção (A) na ranhura da bandeja e prenda com o botão de plástico (B). Repetir do outro lado e, de seguida, deslize os tubos (A) para os suportes de e aperte receção o botão de plástico (C).



9.14 FIXAR O SUPORTE DE ASSENTO LONGO

Em primeiro lugar, fixe os suportes de recepção (A) à parte inferior da base do assento. Existe uma placa de alumínio com orifícios pré-perfurados nos quais estão fixados. Abra os suportes de recepção (A) por baixo da base do assento utilizando os botões manuais (B). Insira as barras de suporte de assento longo. Ajuste para a profundidade necessária e volte a apertar os botões.

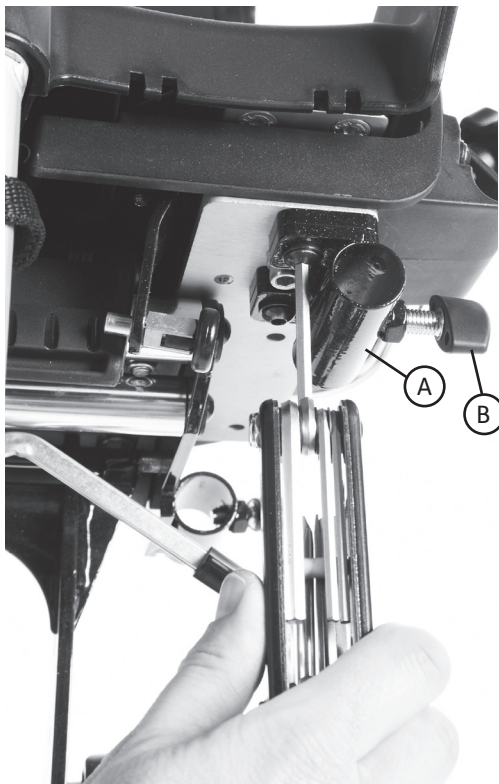

9.15 INTERFACES PARA CADEIRAS DE RODAS E BASES DE CARRINHO DE PASSEIO

A configuração e fixação do assento Squiggles a qualquer base de mobilidade deve ser realizada por uma pessoa tecnicamente competente que esteja familiarizada com a configuração da base de mobilidade.

Interface “A” ligação a uma base de mobilidade com a largura de 12” A interface universal foi desenhada para permitir que o Assento Squiggles seja fixado a qualquer base de mobilidade padrão de 12” (305mm) de largura que tenha sido construída a partir de tubos laterais de 1” (25,4 mm).

Por favor, consulte as instruções de montagem específicas fornecidas com a sua interface para o posicionamento correto na sua base.

A placa de Interface deve ser instalada por um técnico qualificado que

seja tecnicamente competente na configuração da base de mobilidade. Pode ser necessário ajustar a posição das pegas de empurrar, os suportes para pernas e os apoios de braços na base móvel, dependendo do tamanho e do peso da criança para garantir a estabilidade do assento.

⚠️ Consulte sempre as diretrizes do fabricante da base de mobilidade para uma configuração correta, prestando especial atenção ao centro de gravidade e estabilidade do produto.

Os utilizadores não devem ficar sozinhos em nenhum momento quando estiverem a utilizar o equipamento Leckey.



SECÇÃO 10: ENCAIXAR AS ALMOFADAS

É aconselhável ajustar as almofadas na seguinte ordem:

1. Guias femorais
2. Base assento
3. Suporte sacral
4. Cinto pélvico
5. Tiras de arnês de tronco (se aplicável)
6. Encosto
7. Laterais
8. Suporte de ombro (se aplicável)
9. Arnês para o peito
10. Encosto de cabeça



10.1 ALMOFADA FEMORAL

É mais fácil colocar a almofada femoral se deslizar primeiro a guia femoral para frente. (Consulte a secção 11 sobre como ajustar a profundidade do assento). Deslize a almofada femoral sobre as guias femorais. A almofada femoral fica por baixo da almofada da base do assento de uma só peça.




10.2 ALMOFADA DO ASSENTO DE UMA PEÇA

É mais fácil inclinar o encosto para a frente antes de colocar a almofada da base do assento (consulte a secção 11). Alinhe a almofada do assento de uma peça na base do assento com as secções das pernas voltadas para a frente. Prenda na parte de trás da almofada com os dois fechos de pressão (A) e, em seguida, nos lados (B). A almofada é então fixada na frente enganchando as duas abas elásticas (C) nos ganchos por baixo (D) do assento.

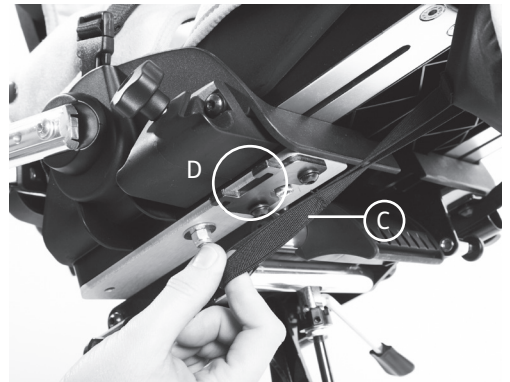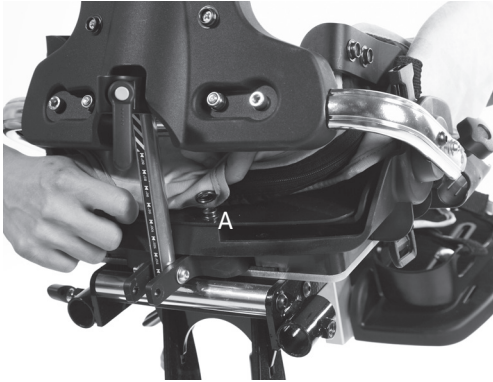


10.3 ALMOFADA SACRAL

Alinhe a almofada sacral com o encosto Inferior e pressione para localizar os fechos de pressão. Coloque as abas (A) inferiores por baixo do encosto e prenda ao velcro nas abas superiores (B).

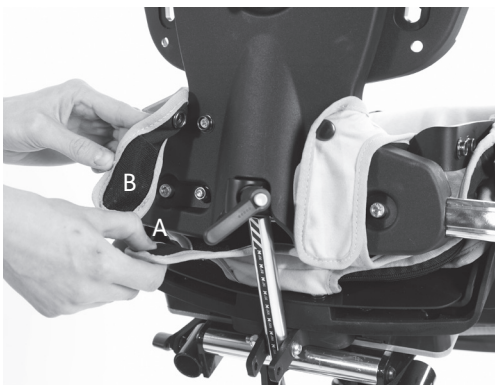

10.4 ARNÊS PÉLVICO

O arnês pélvico é fixado deslizando as guias do quadril nos bolsos (A) na face externa do arnês. Está fixado na posição desejado através de no suporte de guia de quadril ajustável (B). A fivela na correia de amarração é presa a (C) em ambos os lados da base do assento. uma fivela de receção de cada lado da base do assento. Finalmente, prenda o arnês pélvico, fixando a fivela plástica central (D).

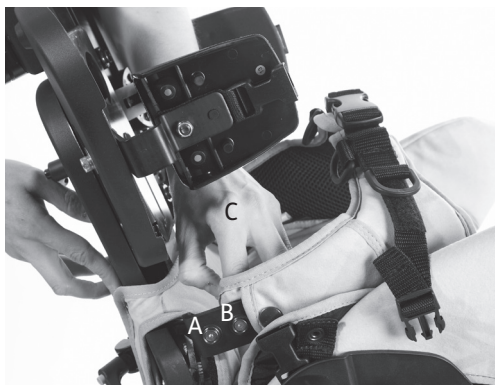

10.5 ARNÊS DE TRONCO

Com o chicote de tronco pequeno ou médio, receberá quatro correias de ligação, suportes, parafusos, anilhas e porcas de bloqueio. Fixe as correias de ligação ao encosto ou ao suporte do ombro antes de fixar o arnês de tronco. Para fixar as correias de ligação ao encosto, deslize o suporte para dentro da ranhura e ajuste à altura desejada utilizando os parafusos e

anilhas fornecidos. Para fixar as correias de ligação ao conjunto de suporte de ombro, é aconselhável

fixar as correias diretamente na parte frontal da secção dos ombros, sem o uso dos suportes. As duas correias de ligação laterais restantes são fixadas aos dois orifícios de receção, um de cada lado do encosto. Basta prender o arnês de tronco às correias de ligação no lado esquerdo e direito da criança.



10.6 ALMOFADA DO ENCOSTO

Se tiver apoios laterais instalados na sua cadeira, ajuste-os à sua largura máxima antes de colocar a almofada do encosto. Prenda a almofada no lugar usando os quatro fechos de pressão na moldura do encosto. Alinhe os fechos (A) superiores em primeiro lugar e aperte, e em seguida, fixe os fechos inferiores. Existe um painel de velcro na parte inferior da almofada para acomodar cunhas/almofadas de posição.



10.7 ALMOFADAS ACOLCHOADAS DO SUPORTE LATERAL

Para fixar as almofadas acolchoadas do suporte lateral, basta deslizar as almofadas, com o lado acolchoado voltado para o interior do assento. Passe a fivela de plástico pela ranhura na capa e, em seguida, coloque as duas tiras de fecho de velcro em torno da fechos superiores em primeiro lugar e aperte, Parte inferior da moldura e fixe-as em seguida, fixe os fechos inferiores (A). Existe um painel de velcro na parte inferior da almofada para acomodar cunhas/almofadas de posição. ao painel de velcro, tal como ilustrado. Feche por cima da aba (B).



10.8 ALMOFADA DO SUPORTE DE OMBRO (SE APLICÁVEL)

Se você tiver uma secção de suporte de ombro, deslize a almofada sobre o conjunto e prenda usando fechos de pressão. É mais fácil se afrouxar as laterais do suporte de ombro primeiro (consulte a secção 11).



10.9 ARNÊS PARA O PEITO

O arnês para o peito pode ser fixado prendendo a fivela macho (A) à fivela fêmea em cada lado dos suportes laterais.




10.10 ALMOFADA DE ENCOSTO DE CABEÇA CONTORNADO

Para fixar a almofada do encosto de cabeça, coloque a almofada na placa de suporte da cabeça, em seguida, encaixe os fechos laterais e superiores no lugar. Coloque a aba inferior por baixo da placa e encaixe os dois fechos restantes no lugar.

A peça de reforço de plástico deve ser colocada entre o conjunto do encosto de cabeça e a almofada, mas não deve ser fechada com fecho de correr dentro da almofada.

10.11 ALMOFADA PLANA DO ENCOSTO DE CABEÇA E CAPAS LATERAIS

Para prender a almofada plana do encosto de cabeça, coloque a almofada na placa de suporte de cabeça e, em seguida, encaixe os fechos centrais e superiores. As capas laterais do encosto de cabeça são fixadas da mesma forma que as capas acolchoadas dos apoios laterais.

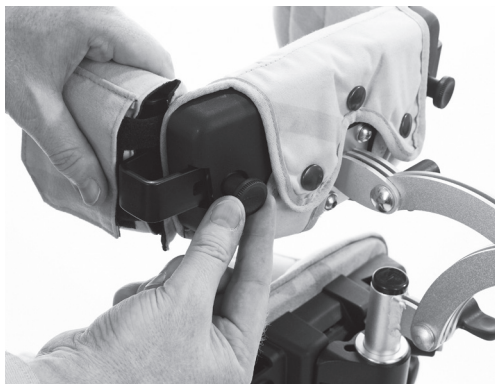

SECÇÃO 11: CONFIGURAÇÃO CLÍNICA PARA A GESTÃO POSTURAL

A configuração clínica do produto deve ser realizada por uma pessoa técnica e clinicamente competente, com formação na utilização do produto. A Leckey recomenda que seja mantido um registo escrito de todas as configurações clínicas realizadas para este produto.

Regule a altura do encosto, a profundidade do assento e a altura da platina antes de colocar a criança no assento. Estas podem ser ajustadas quando a criança está no assento.

11.1 ARNÊS PÉLVICO E GUIAS DO QUADRIL

Para definir a largura das guias do quadril afrouxe os parafusos (A), ajuste à largura desejada e volte a apertar. Para ajustar a profundidade do arnês, mova o fecho de pressão do arnês (B) para qualquer posição. Ajuste as tiras de suport (C) para o comprimento necessário. Certifique-se de que a fivela (D) encaixa firmemente no meio. Se usar o assento ao ar livre e o seu filho tiver um casaco vestido, coloque o arnês pélvico por baixo do casaco.




11.2 ALMOFADAS ESPAÇADORAS DO ARNÊS PÉLVICO

As almofadas espaçadoras do arnês pélvico podem ser usadas para reduzir a largura entre as guias do quadril. Para prender, basta colocar as almofadas espaçadoras na parte interna do arnês e prender com as abas de velcro na parte externa, tal como ilustrado.




11.3 PROFUNDIDADE DO ASSENTO

Para ajustar a profundidade do assento, basta afrouxar os parafusos (A), na parte inferior do assento e ajustar a profundidade necessária. Volte a apertar os parafusos firmemente. A altura pode ser ajustada com a criança no assento.

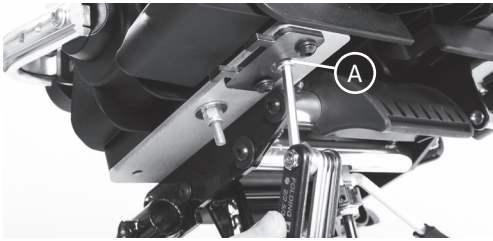

11.4 ALTURA DO ENCOSTO DE COSTAS

A altura total do encosto pode ser ajustada desapertando a pega de trinquete (A) e, em seguida, posicione-o na altura pretendida para o ombro do utilizador. Quando em posição, a pega de trinquete devem voltar a ser apertada firmemente. A posição pode ser ajustada com a criança no assento.

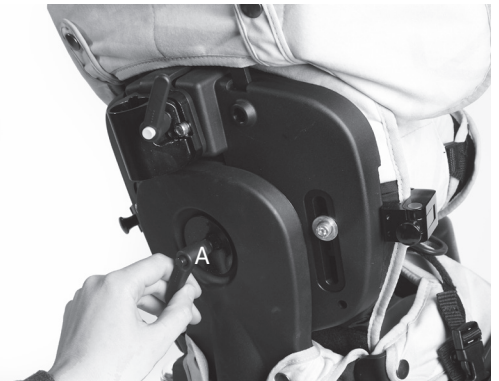

11.5 ÂNGULO DO ENCOSTO DE COSTAS

O encosto pode ser inclinado afrouxando a pega de trinquete (A) no bloqueio do eixo de receção do encosto, ajustando para o ângulo necessário e voltando a apertar a pega de trinquete com firmeza. Use a escala na lateral do tubo para ajudar a seleccionar o ângulo necessário.

⚠ Verifique sempre se o ângulo das costas está seguro para manter a postura desejada para a criança. O ângulo das costas pode ser ajustado com a criança sentada.

11.6 ALTURA DA PLATINA

Para configurar a altura da platina, afrouxe o parafuso (A) na frente do tubo de suporte do gêmeo e deslize a platina até à altura necessária e volte a apertar o parafuso.

Para definir a altura correta da platina, meça a distância da parte de trás do joelho da criança até à parte inferior do calcanhar. Isto pode ser ajustado quando a criança está no assento.

⚠ Antes de colocar a criança no assento, certifique-se sempre de que a platina está segura para evitar que deslize para baixo no assento.



11.7 ALMOFADA SACRAL E SUPORTE LOMBAR

Existe um painel de velcro na parte inferior da almofada do encosto e na almofada sacral para acomodar as cunhas/almofadas de posição (A). Estas cunhas simples em forma de “C” são um meio muito simples, mas eficaz, de fornecer suporte sacral ou lombar, dependendo das necessidades da criança.



11.8 SUPORTES LATERAIS/ ALMOFADAS DE PROTRAÇÃO


Afrouxe o parafuso (A) para ajustar a largura, altura e ângulo dos suportes laterais e volte a apertá-lo quando tiver atingido a posição desejada.

Use o mesmo método para ajustar a altura e o ângulo das almofadas de protração.



11.9 LATERAIS DO SUPORTE DE OMBRO

Para alterar o ângulo das laterais do suporte de ombro, afrouxe os parafusos (A), ajuste para o ângulo desejado e volte a apertar.

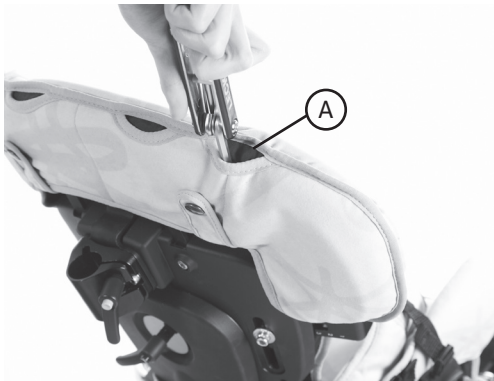

11.10 ARNÊS PARA O PEITO

Para alterar a largura do arnês para o peito, levante a tampa frontal, ajuste as tiras de de velcro (A) para a largura desejada e volte a colocar a tampa.



11.11 ARNÊS DE TRONCO

Antes de colocar a criança no assento, abra o arnês de tronco de um lado, destacando uma correia de ombro (A) um clipe

lateral e uma fivela do arnês de tronco . Quando a criança estiver no assento, Coloque o arnês na frente e volte a fixá-lo, ligando-o ao clipe lateral, correia de ombro (B) e a fivela do arnês pélvico (C). Todas as correias do arnês são ajustáveis levantando a capa (A), ajustando ao comprimento desejado e voltando a colocar a capa.

⚠ Certifique-se sempre de que as correias do arnês (c) estão seguras para evitar que subam, pois isso pode representar um risco de asfixia.



11.12 ÂNGULO DA PLATINA AJUSTE

Para configurar o ângulo para acomodar a plantarflexão ou a dorsiflexão, basta afrouxar ou apertar o botão manual para (A) selecionar o ângulo desejado.

11.13 SANDÁLIAS


Para posicionar os pés do utilizador nas sandálias, prenda as tiras de velcro fornecidas para que o pé fique seguro no lugar. As correias devem ser colocadas sobre o peito do pé e sobre os dedos. A correia frontal pode ser passada através de uma das duas ranhuras em cada lado das sandálias, de acordo com o tamanho dos pés do utilizador (2).

Se a criança estiver a usar sandálias ou calçado leves, verifique as correias para garantir que a cinta não irrita a pele.

1




2

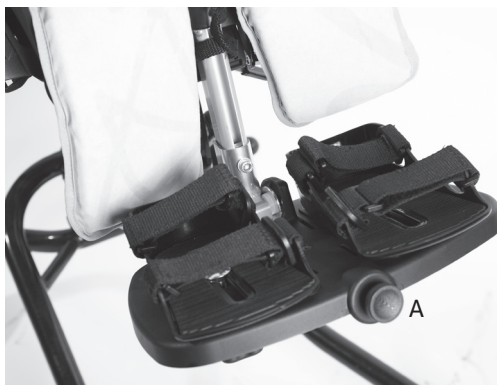

11.14 SUPORTE DE CABEÇA CONTORNADO

Para ajustar a altura, a profundidade e o ângulo do encosto de cabeça contornado, afrouxe os botões manuais (A) e, quando estiver na posição pretendida, volte a apertar os botões.


⚠ Tenha sempre cuidado para que os dedos não fiquem presos ao ajustar o encosto de cabeça.

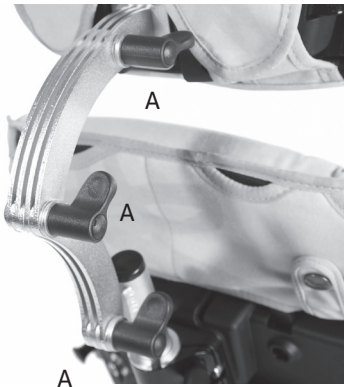

11.15 ENCOSTO DE CABEÇA PLANO COM SUPORTES LATERAIS

Para ajustar a altura, a profundidade e o ângulo do encosto de cabeça plano, ajuste utilizando as alavancas manuais (A).

Para ajustar a largura das laterais, desaperte o botão de plástico (B), deslize para a posição desejada e aperte firmemente.

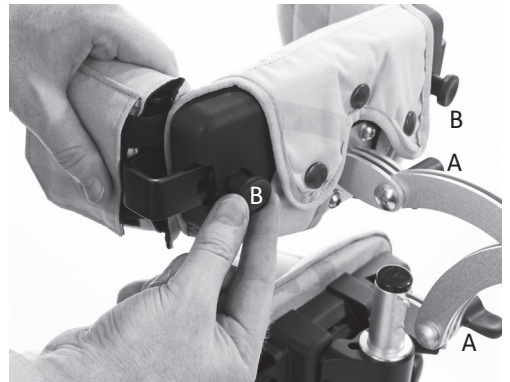

11.16 AJUSTE DA BANDEJA

Para ajustar a profundidade da bandeja, afrouxe o botão (A) coloque na posição desejada, em seguida, volte a apertar firmemente. Para ajustar a bandeja em altura, afrouxe o botão (B), coloque na posição desejada e, em seguida, volte a apertar firmemente.

Para ajustar o ângulo da bandeja, afrouxe a chave de triquete (C), coloque no ângulo desejado e volte a apertar firmemente.

⚠ Não ajuste as barras horizontais para além da moldura, exceto quando estiver a remover a bandeja.

Tenha cuidado para garantir que as mãos ou os braços da criança não ficam presos ao introduzir a bandeja.

Nunca use a bandeja para dirigir ou empurrar a cadeira.

Tenha sempre cuidado para que os dedos não fiquem presos na ranhura ao ajustar a altura do apoio de braços.

Não coloque objetos quentes com mais de 40 graus Celsius, sobre a bandeja. De notar que a bandeja deve apenas ser usada pelo utilizador. Não incline ou coloque objetos com peso superior a 8 kg (17.6



11.17 AJUSTE DA BARRA DE APOIO DE APOIO


Para configurar a altura, afrouxe o botão (D), ajuste para a posição desejada e volte a apertar firmemente.

Para configurar a profundidade da barra de apoio para ficar ao alcance da criança, afrouxe o botão (E) e ajuste a profundidade desejada e volte a apertar.

SECÇÃO 12: AJUSTES FREQUENTES PARA O USO DIÁRIO

(TERAPEUTAS/CUIDADORES/PAIS)

Os pais e os cuidadores devem aprender a fazer ajustes frequentes e devem conhecer as verificações de segurança na secção 7 com uma pessoa técnica e clinicamente competente com formação na utilização do produto. A Leckey recomenda que seja mantido um registo escrito de todos os pais e cuidados que receberam formação na utilização deste produto.

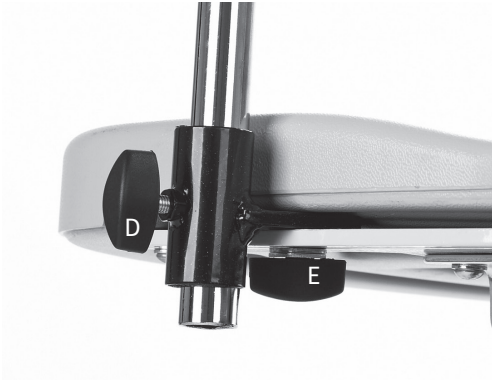


12.1 TRANSFERIR A CRIANÇA PARA O ASSENTO OU RETIRÁ-LA DO ASSENTO

Antes de transferir a criança para o assento, realize a inspeção diária do produto, conforme descrito na secção 14 deste manual do utilizador.

Ajuste o assento a uma altura confortável para facilitar a transferência. Bloqueie todos os rodízios, (A) certificando-se de que estão voltados para fora para maximizar a estabilidade do produto. Certifique-se de que a fivela de segurança no arnês de peito está solta (B) e fora do caminho para facilitar a transferência. Remover a maçaneta (C). Solte o arnês pélvico no meio e abra o (D) arnês para facilitar a transferência. Por último, se estiverem montadas sandálias abra as correias (E). Agora está pronto a transferir ou içar a criança para o assento.

⚠ Prenda sempre o arnês pélvico antes de prender outras fivelas ou arneses. Ajuste o arnês para que a criança não possa deslizar ou rastejar para a frente no assento.

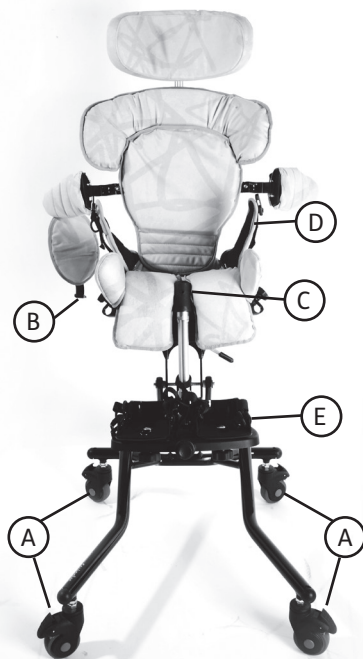

12.2 AJUSTAR O ARNÊS PÉLVICO

O posicionamento e tensão corretos do arnês pélvico é essencial para a gestão postural da criança, afetando o seu conforto e capacidade de atingir objetivos funcionais. Pergunte ao seu terapeuta sobre a tensão correta das correias para o seu filho, pois isso é fundamental para uma boa gestão postural.

Para tensionar as correias pélvicas e as almofadas em torno da criança, puxe a correia central (A) .

Puxe as duas correias laterais (B) para ajustara posição pélvica e ajuste a altura das almofadas nos quadris.

⚠ Verifique o arnês regularmente para garantir que a criança está segura e não consegue deslizar para a frente no assento.




12.3 CHASSI

O Assento Squiggles foi concebido para encaixar numa série de chassis. Este manual do utilizador mostra a utilização correta e segura do Assento com o chassi Hi-Lo da Leckey. Para todos Os outros chassis ou bases, consulte o manual do fabricante. Para preparar o chassi para o Assento, recomendamos que levante o chassi a uma altura de trabalho confortável pressionando a alavanca de pé mostrada.

12.4 AJUSTE DA ALTURA - CHASSI HI-LO

Pode fazer este ajuste com a criança na cadeira. Para ajustar a altura do chassi Hi-Lo, pressione a alavanca(A) de pé na parte traseira do chassi ao mesmo tempo que segura a pega de empurrar (B) . Depois de retirar o pé do pedal, o assento ficará preso à altura escolhida. Por segurança, o pedal de ajuste de altura no chassi pode ser travado engatando (C) o pino de no lado direito do tração pedal. Para destravar, puxe o pino para fora e gire 90 graus. O pedal pode então ser operado. O pino de bloqueio (C) deve ser mantido na posição bloqueada quando não estiver a ajustar o chassi.

⚠ Mantenha sempre o pino de bloqueio engatado quando não estiver a ajustar o chassi. Isto evitará que o pedal seja operado acidentalmente.

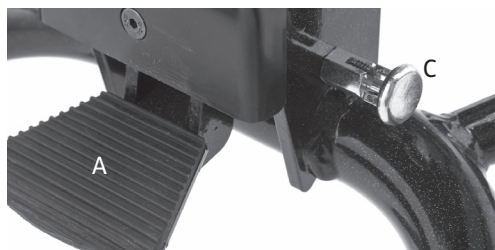

12.5 ESPAÇO DE INCLINAÇÃO


O espaço de inclinação pode ser angulado quando o utilizador se encontrar no assento. Antes de ajustar o ângulo do espaço de inclinação do assento, certifique-se sempre de que o arnês pélvico está preso, impedindo que o utilizador deslize para a frente no assento.

O colar (A) deve estar sempre na posição bloqueada quando o assento estiver a ser usado. Para acionar a alavanca (B) em primeiro lugar, desbloqueie o colar girando-o até que se encaixe na posição aberta. Pressione a alavanca para baixo e defina o ângulo desejado segurando o guiador. Volte a bloquear o colar de bloqueio após ter definido a posição de inclinação.

⚠ Mantenha sempre o colar A na posição bloqueada para evitar o acionamento acidental da Alavanca, o que pode fazer com que o assento faça um movimento brusco e possivelmente provoque ferimentos na criança.

Por favor, utilize o guiador ao operar o espaço de inclinação.

Verifique sempre com o seu terapeuta se a utilização do espaço de inclinação não provocará.

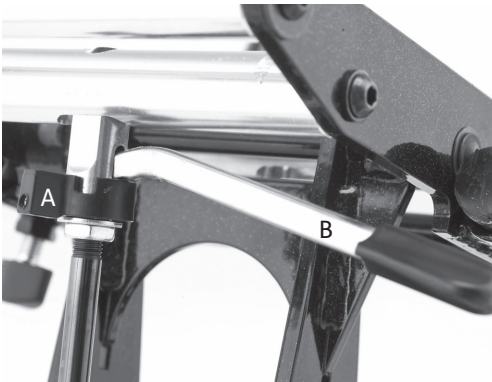

12.6 AJUSTE DO ARNÊS DE TRONCO E PEITO

Se a criança precisar de suporte torácico como parte do seu programa de suporte postural o assento será equipado com laterais rígidas ou com uma combinação de laterais, arnês de peito e arnês de tronco. Pode ser necessário ajustá-los diariamente para os adaptar às diferenças nas roupas.

Verifique sempre com o seu terapeuta o posicionamento e tensão ideais das correias e elementos de suporte para a criança.

Para alterar a largura do arnês para o peito, levante a tampa frontal, ajuste as tiras de Velcro (A) e configure a largura desejada. Quando a largura correta for alcançada, volte a colocar a tampa.

⚠️ Consulte a secção 11 para obter orientações específicas sobre o ajuste do arnês de tronco.

Certifique-se sempre de que as fivelas de plástico estão totalmente encaixadas quando usar o arnês para o peito.

Verifique se o arnês e as laterais estão presos para garantir que a criança está segura e não consegue deslizar para a frente no assento, pois isso pode restringir a sua respiração.



12.7 SANDÁLIAS

Para posicionar os pés do utilizador nas sandálias, prenda as tiras de velcro fornecidas para que o pé fique seguro no lugar. As correias devem ser colocadas sobre o peito do pé e sobre os dedos. A correia frontal pode ser passada através de uma das duas ranhuras em cada lado das sandálias, de acordo com o tamanho dos pés do utilizador (2).

⚠ Se a criança estiver a usar sandálias ou calçado leves, verifique as correias para garantir que a cinta não irrita a pele.

1



2



12.8 AJUSTE DA BANDEJA

A bandeja de atividades pode ser usada para uma variedade de funções e a sua posição pode ser ajustada para se adequar ao utilizador e à atividade, seja para diversão, educação ou alimentação. A bandeja é fixada ao Assento inserindo os tubos nos suportes de receção. Quando a bandeja está na posição, o botão (A) deve ser apertado firmemente.

Para ajustar a bandeja em altura, (B), afrouxe o botão e coloque na posição desejada e, em seguida, volte a apertar firmemente. Para ajustar o ângulo da bandeja, afrouxe o botão (C), coloque no ângulo desejado e volte a apertar

⚠ Tenha cuidado para garantir que as mãos ou os braços da criança não ficam presos ao introduzir a bandeja.


Nunca use a bandeja para dirigir ou empurrar a cadeira.

Tenha sempre cuidado para que os dedos não fiquem presos na ranhura ao ajustar a altura da bandeja.

Não coloque objetos quentes com mais de 40 graus Celsius sobre a bandeja.

Certifique-se sempre de que as fivelas de plástico estão totalmente encaixadas quando usar o arnês para o peito.

De notar que a bandeja é apenas para ser usada pelo utilizador. Não incline ou coloque objetos com peso superior a 8 kg (17.6 lbs) sobre o tabuleiro.

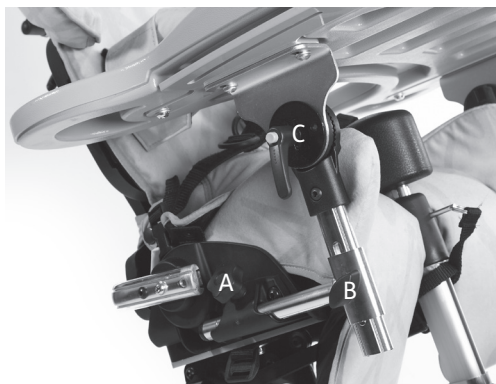

SECÇÃO 13: INFORMAÇÃO SOBRE LIMPEZA E CUIDADOS

Como manter

Quando limpar, recomendamos que use apenas água morna e um detergente não abrasivo. Nunca use solventes orgânicos ou fluidos de limpeza a seco.

Estofos e tecidos

1. Os estofos e os tecidos podem ser removidos e lavados na máquina a 40 ° C e secados na máquina a uma temperatura baixa. Remova a espuma das seguintes capas antes de lavar:

- Encosto de cabeça
- Suporte do ombro
- Almofada do encosto
- Almofada da base do assento

Todos os outros estofos podem ser colocados na máquina de



lavar inteiros, após a remoção de parafusos e fechos.

2. Também podem ser limpos manualmente enquanto colocados no assento. Quando limpar, recomendamos que use apenas água morna e um detergente não abrasivo. Um pano de microfibra é bom para limpar o tecido.
3. A manchas devem ser removidas logo que possível, com um pano absorvente, toalha ou esponja. Sabão comum e uma esponja com água quente é eficaz para a sujidade normal e pequenas nódoas/derrames. Cuidado para não molhar o tecido já que poderá provocar o aumento da nódoa.
4. Podem ser usados agentes de limpeza antissépticos em manchas mais resistentes. Isto pode exigir um solvente seguro como o álcool isopropílico ou bebidas mineralizadas. Usar uma mistura de meia chávena de lixívia para 5 litros de água como desinfetante.
5. Os arneses pélvico e de tronco podem ser lavados na máquina a 40 ° C. Certifique-se de que todos os parafusos e fechos são removidos primeiro, pois podem causar danos na máquina de lavar. Guarde-os num local seguro e fora do alcance das crianças.
6. Certifique-se sempre de que o produto está seco antes de usar.

Componentes metálicos e em plástico

7. Podem ser usados para a limpeza diária, sabão e água ou spray antibacteriano.
8. Para limpeza profunda, pode ser usado um equipamento de limpeza a vapor de baixa pressão.
9. Não use solventes para limpar componentes de plástico ou metal.
10. Confirme sempre que o arnês está seco antes de usar.

SECÇÃO 14: INSPEÇÃO DIÁRIA DO PRODUTO

**(Terapeuti, rodiče a pečovatelé)
(Terapeutas, pais e cuidadores)**

Recomendamos que as verificações visuais diárias do equipamento sejam realizadas pelos terapeutas, cuidadores ou pais para garantir que o produto está seguro para uso. As verificações diárias recomendadas são detalhadas abaixo.

1. Certifique-se de que todas as pegas, botões e parafusos de ajuste estão

no lugar e fixos.

2. Verifique todos os sinais de desgaste e danos dos estofos e velcro.
3. Verifique se todos os rodízios se movem livremente e ficam bloqueados em segurança.
4. Certifique-se de que a alavanca e o pino de bloqueio da placa de interface do assento estão completamente engatados e a unidade do assento está firmemente fixada ao chassi.
5. Certifique-se de que o arnês pélvico está bem preso em torno do utilizador e que o mesmo não consegue deslizar ou inclinar-se para a frente no assento. Certifique-se de que a platina está bem fixada.
6. Componentes metálicos e em plástico.



Em caso de dúvida sobre a utilização segura do seu produto Leckey ou se alguma peça estiver danificada, deixe de usar o produto e contacte a nossa equipa de Atendimento ao Cliente ou com o seu revendedor local, o mais

SECÇÃO 15: INSPEÇÃO ANUAL DO PRODUTO

(Terapeuta, Técnico, Especialista de Produto Leckey, Revendedor)

A Leckey recomenda que cada produto seja submetido a uma inspeção detalhada, no mínimo, uma vez por ano e sempre que o produto é relançado para uso. Esta inspeção deve ser realizada por uma pessoa tecnicamente competente que tenha sido formada na utilização do produto e deve incluir, como requisito mínimo, as seguintes verificações.

1. Verifique se todas as chaves de torniquete, botões, porcas, parafusos e fivelas de plástico estão no lugar, substituindo todos os itens em falta. Preste especial atenção aos seguintes itens;
 -
 - Parafusos de bloqueio do suporte de cabeça.
 - Parafusos de ajuste de ângulo e altura do encosto.
 - Parafusos de ajuste da profundidade do assento.
 - Parafusos de fixação do arnês pélvico /guia de quadril.
 - Ajuste de altura e ângulo do apoio para os pés.
2. Verifique se o mecanismo de ajuste da altura do chassi está a funcionar corretamente. Se o chassi for operado com pedal, verifique se a altura do assento não muda quando o pedal é libertado. Além

disso, verifique se o pino de bloqueio engata de forma segura para impedir o ajuste accidental da altura do chassi.

3. Ajuste o assento no seu alcance máxima de espaço de inclinação e certifique-se de que a alavanca de bloqueio bloqueia o assento com segurança num ponto variável neste intervalo.
4. Verifique se, onde o assento e o chassi se unem, não há desgaste visível nos componentes metálicos.
5. Levante a base para verificar individualmente cada rodízio. Certifique-se de que todos se movimentam livremente e retire qualquer sujidade das rodas de borracha. Verifique se os travões bloqueiam as rodas com segurança.
6. Verifique visualmente a estrutura do produto, prestando atenção aos pontos soldados na armação garantindo que não existem sinais de fadiga ou rachas à volta das soldas.
7. A Leckey recomenda que seja mantido um registo escrito de todas as inspeções anuais do produto.

⚠ Em caso de dúvida sobre a utilização segura do seu produto Leckey ou se alguma peça estiver danificada, deixe de usar o produto e contacte a nossa equipa de Atendimento ao Cliente ou com o seu revendedor local, o mais rapidamente possível.

SECÇÃO 16: RELANÇAMENTO DOS PRODUTOS LECKEY

A maioria dos produtos Leckey é analisada e encomendada para atender às necessidades de um utilizador individual. Antes de relançar um produto, recomendamos que o terapeuta que o prescreveu realize uma verificação de compatibilidade do equipamento para o novo utilizador e assegure que o produto que está a ser relançado não contém modificações ou acessórios especiais.

Deve ser realizada uma inspeção técnica detalhada no produto antes da reedição. Isto deve ser realizado por uma pessoa tecnicamente competente que tenha sido formada na utilização e inspeção do produto. Consulte a **secção 15** sobre as verificações a realizar.

Antes de relançar um produto, recomendamos que o mesmo seja desinfetado de acordo com o seguinte procedimento:

Nota: Limpe sempre o produto primeiro para remover a sujidade acumulada antes de desinfetar/higienizar

1. Sempre que possível, recomendamos o uso de um sistema de desinfecção “nebulizador” automatizado que é usado para cobrir completamente as superfícies do produto com um agente desinfetante. As instruções do fabricante para o sistema escolhido devem ser consultadas antes do uso e cumpridas exatamente.

2. Quando não estiver disponível um sistema de desinfecção automatizado, todas as superfícies do produto devem ser limpas com toalhetes desinfetantes ou desinfetante líquido com um pano macio. Os produtos adequados são 70% IPA, 70% álcool ou lixívia diluída. As instruções do fabricante para o produto escolhido devem ser seguidas. Certifique-se de que o produto foi limpo corretamente de acordo com a secção Informação sobre limpeza e manutenção deste manual.

Verifique se foi fornecida uma cópia do manual do utilizador com o produto. É possível descarregar uma cópia no nosso sítio web em www.leckey.com

A Leckey recomenda que seja mantido um registo escrito de todas as inspeções realizadas durante a reedição do produto.

SECÇÃO 17: MANUTENÇÃO DOS PRODUTOS

A assistência técnica de todos os produtos Leckey deve ser efetuada apenas por pessoas tecnicamente competentes com formação adequada sobre a utilização do produto.

Todos os pedidos de serviço internacionais devem ser direcionados ao distribuidor autorizado da Leckey, que terá todo o prazer em ajudar. Para mais informações sobre os distribuidores Leckey, visite o nosso sítio web **www.leckey.com**

SECÇÃO 18: INFORMAÇÃO TÉCNICA

Dimensões do assento Squiggles

Idades (aprox.)	1 - 5
Peso máximo do utilizador	22 kg / 48.4 lbs
Altura do utilizador	Min 750mm / 29,5 polegadas Máx 1100mm / 43,3 polegadas
Largura do assento (Distância entre guias do quadril)	Min 160mm / 6,25 polegadas Máx 260mm / 10,2 polegadas
Profundidade do assento (Suporte de costas até à parte de trás do joelho)	Min 190mm / 7,5 polegadas Máx 290mm / 11,4 polegadas
Largura do joelho (Distância entre a maçaneta e a lateral do assento)	Máx 90mm / 3,5 polegadas
Platina	Plantarflexão 10° Dorsiflexão 10°
Largura do peito (Distância entre laterais)	Min 160mm / 6,25 polegadas Máx 220mm / 8,75 polegadas
Chassi Hi-Lo (Dimensões mínimas para armazenamento)	Peso 9kg / 19,8lbs Largura 540mm / 21,13 polegadas Comprimento 640mm / 25,2 polegadas Altura 315mm / 12,4 polegadasW
Peso do assento	6kg / 19,8lbs
Largura do assento	524mm / 21,3 polegadas


Dimensões do assento Squiggles

Altura do encosto de costas (Altura dos ombros sentado)	Min 320mm / 12,6 polegadas Máx 380mm / 15 polegadas
Ângulo do encosto	Pronação 10° Reclinação 25°
Assento à platina (Sola do pé até à parte de trás do joelho)	Min 122,5mm / 4,8 polegadas Máx 270mm / 10,6 polegadas
Espaço de inclinação - Chassi Hi-Lo	Pronação 10° Reclinação 30°
Parte superior do assento até ao chão (Chassi Hi-Lo)	Min 270mm / 10 polegadas Máx 650 mm / 25 polegadas
Altura da bandeja (Assento até à parte superior da bandeja)	Min 115mm / 4,5 polegadas Máx 170mm / 6,7 polegadas
Tamanho da bandeja	460mm x 560mm 18,1 polegadas x 22 polegadas
Diretrizes de estabilidade do produto	5 graus para frente 10 graus para trás 5 graus lateralmente

TABELA DE SÍMBOLOS

Símbolo	Significado
	Dispositivo Médico
	Ler as Instruções de Utilização
	Marcação CE
	Aviso
	Fabricante
	Número de série
	Código do produto
	Peso máximo do utilizador
	Data de fabrico
	Sem látex
	Identificação Única de Dispositivo
	Testado contra colisões
	Lavagem na máquina - temperatura da água 40°C
	Secagem na máquina a baixa temperatura
	Não passar a ferro
	Não usar lixívia



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



Visite leckey.com para uma lista completa dos Distribuidore Leckey.

James Leckey Design Limited
19 Ballinderry Road
Lisburn, BT28 2SA
Northern Ireland

(+44) 28 9260 0750
hello@leckey.com



leckey.com



LS1156-01