



Freestander

Manual de Utilizador



Apoio para crianças



O Leckey Freestander foi desenhado para promover o suporte do peso e a simetria de linha média. Este manual mostra-lhe como pode usar de forma rápida e fácil todas as funções. As instruções sobre a segurança e manutenção do produto asseguram que irá desfrutar do mesmo durante um longo período de tempo.

CONTEÚDO

1.	Utilização prevista	p.04
2.	Certificação	p.04
3.	Avisos e Precauções	p.05
4.	Termos de Garantia	p.07
5.	Registo de Histórico do Produto	p.07
6.	Registo de Formação do Produto	p.07
7.	Informação de segurança	p.08
8.	Precauções e Contraindicações	p.10
9.	Como desembalar e montar	p.11
10.	Configuração clínica para a gestão postural	p.14
11.	Ajustes frequentes para o uso diário	p.18
12.	Informação sobre limpeza e cuidados	p.22
13.	Inspeção diária do produto	p.23
14.	Inspeção anual do produto	p.23
15.	Relançamento de produtos Leckey	p.24
16.	Assistência de produtos	p.16
17.	Detalhes Técnicos	p.26

SECÇÃO 1: UTILIZAÇÃO PREVISTA

Utilização prevista

Os dispositivos são destinados a ajudar crianças que não conseguem ficar ou manter-se numa posição em pé de forma independente, como parte de um programa de suporte de peso.

Indicações para uso

O Freestander foi desenhado para ser usado em casa ou na escola para posição vertical. O andador encontra-se disponível em três tamanhos para atender às necessidades de crianças de 1 aos 18 anos de idade.

O tamanho 1 tem um peso máximo do utilizador de 60 kgs de peso (132lbs), o tamanho 2 80kgs (176lbs) e o tamanho 3 90kgs (198lbs). Adequado para:

- Crianças e adultos com deficiências, como paralisia cerebral, lesões cerebrais traumáticas, distrofia muscular e outras condições em que programas de apoio em pé são incentivados.
- Crianças que apresentam atraso no desenvolvimento e que atualmente não se movimentam.
- Crianças com indicação de intervenção precoce.

SECÇÃO 2: CERTIFICAÇÃO

O Freestander encontra-se classificado como um Dispositivo Médico Classe I ao abrigo dos regulamentos da UE e do RU. Segundo o fabricante, James Leckey Design Limited, que declara que este produto está em conformidade com o Regulamento de Dispositivos Médicos (2017/745), com os Regulamentos de Dispositivos Médicos do RU de 2002, com a Diretiva de Dispositivos Médicos (93/42 EEC) e EN 12182:2012 Produtos auxiliares para pessoas com deficiência, requisitos gerais e métodos de teste.

**Aviso ao utilizador e/ou paciente:
Qualquer incidente grave que tenha ocorrido relacionadas com o dispositivo deve ser reportado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro onde o utilizador e/ou o paciente se encontra.**



NOTA:

**Aconselhamento a utilizador geral.
O incumprimento destas instruções pode resultar em lesões físicas, danos no produto ou ambientais!**

SECÇÃO 3: AVISOS E PRECAUÇÕES

1. AVISO RISCO DE QUEDA

- Nunca use o produto sobre uma superfície com mais de 5 graus de inclinação.
- Antes de usar, verifique sempre a operação dos acionamentos lineares, amortecedores a gás e unidades motorizadas.
- Ao ajustar o ângulo de suporte, certifique-se de que existe espaço de acesso suficiente em todos os lados do produto.
- Trave sempre os rodízios voltados para fora antes de colocar o utilizador no produto.

2. AVISO DE RISCO DE ENTALAMENTO DE DEDOS

- Certifique-se de que o utilizador ou o cuidador não deve tocar em nenhuma articulação ou eixo móvel que não se encontre travada.
- Enquanto o utilizador está no produto, o cuidador deve esforçar-se para manter os ajustes do produto no mínimo.

3. AVISO DE SEGURANÇA DO OCUPANTE

- As transferências do utilizador para dentro e para fora do produto devem ser realizadas com equipamentos e pessoal adequados.

- Ao transferir o utilizador para o produto, use primeiro a faixa pélvica para proteger o utilizador.
- Certifique-se de que todos os arneses, tiras das sandálias e proteção do tórax estão bem colocados.
- Se o utilizador apresentar qualquer forma de desconforto, retire-o em segurança do produto o mais rapidamente possível.

4. RISCO DE ENTALAMENTO DE DEDOS

- Enquanto o utilizador se encontra no produto, o cuidador deve esforçar-se para manter os ajustes do produto ao mínimo.
- Cuidado ao montar ou ajustar a posição dos componentes montagem do andador para que os seus dedos não fiquem esmagados ao posicionar os componentes do andador e a apertar as fixações.
- Durante a montagem e o ajuste do produto, o cuidador deve evitar o risco de entalamento com os dedos das articulações ou pivôs do produto.
- Durante as transferências e os ajustes, o cuidador deve evitar o risco de esmagamento nas fivelas centrais e nos fixadores.

5. VERIFICAÇÕES DIÁRIAS DE PRECAUÇÃO

- O andador deve ser verificado diariamente antes da utilização para garantir que todos os arneses e andador estão fixos de forma segura.

- Antes de usar, verifique sempre a operação dos acionamentos lineares, amortecedores a gás e unidades motorizadas.

6. RISCO DE TROPEÇAMENTO COM CHASSIS MOTORIZADO

- Antes de movimentar um andador motorizado, certifique-se de que a ligação de carregamento da bateria foi removida.

7. CUIDADOS DE LIMPEZA

- Limpe o andador regularmente para evitar a acumulação de sujidade. A sujidade acumulada pode desgastar prematuramente o tecido dos componentes e estimular a corrosão no andador. Utilize apenas produtos de limpeza domésticos não abrasivos e panos húmidos. Não use água corrente nos estofos quando ainda estiverem presos ao assento. Consulte a secção sobre Informação sobre limpeza e cuidados.

8. LAVADORAS/MANGUEIRAS DE LIMPEZA

- Não devem ser usadas para limpar o produto, mangueiras e lavadoras de pressão. Os andadores com um sistema de elevação elétrico não são vedados contra água corrente e podem ficar danificados com a entrada de água. Consulte a secção sobre Informação sobre limpeza e cuidados.

9. CUIDADOS DE MANUTENÇÃO/ REPARAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÓNICOS

- Os componentes eletrónicos e elétricos NÃO podem ser reparados pelo utilizador. A manutenção e as reparações devem ser realizadas apenas por pessoal autorizado pela Leckey.

10. CUIDADOS DE ELIMINAÇÃO

- Sempre que eliminar o produto para um centro de reciclagem comunitário, a estrutura e os componentes elétricos devem ser eliminados separadamente.

11. CUIDADOS DE COLOCAÇÃO EM UTILIZAÇÃO

- Antes de usar, aguarde 2 horas para que o produto se adapte à temperatura ambiente.

SECÇÃO 4: TERMOS DE GARANTIA

A garantia aplica-se apenas quando o produto é usado de acordo com as condições específicas e para os fins previstos, seguindo todas as recomendações dos fabricantes (consulte ainda os termos gerais de venda, entrega e pagamento). Todos os produtos e componentes fabricados pela Leckey têm uma garantia de três anos.

SECÇÃO 5: REGISTO DE HISTÓRICO DO PRODUTO

O seu produto Leckey está classificado como Dispositivo Médico de Classe 1 e, como tal, só deve ser prescrito, configurado ou relançado para utilização por um técnico competente com formação sobre a utilização deste produto. A Leckey recomenda que seja mantido um registo escrito com detalhes de todas as configurações, reedições e inspeções anuais realizadas a este produto.

SECÇÃO 6: REGISTO DE FORMAÇÃO DO PRODUTO

(PAIS, PROFESSORES E CUIDADORES)

O seu produto Leckey é prescrito como um Dispositivo Médico de Classe 1 e, como tal, a Leckey recomenda que pais, professores e cuidadores que usem o equipamento devem ser alertados para as seguintes secções deste manual de utilizador por um técnico competente.

SECÇÃO 07

Informação de segurança

SECÇÃO 11

Ajustes frequentes para o uso diário

SECÇÃO 12

Informação sobre limpeza e Cuidados

SECÇÃO 13

Inspeção diária do produto

A Leckey recomenda que seja mantido um registo escrito de todas as pessoas que receberam formação sobre a utilização correta deste produto.

SECÇÃO 7: INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

1. Leia sempre as instruções completas antes de utilizar o produto.
2. Os utilizadores não devem ficar sozinhos em nenhum momento quando estiverem a utilizar o equipamento da Leckey.
3. Use apenas componentes aprovados pela Leckey com o seu produto. Não é permitido modificar o produto. O não cumprimento das instruções pode colocar o utilizador ou o cuidador em risco e invalidará a garantia do produto.
4. Em caso de dúvida sobre a utilização segura do seu produto ou se alguma peça estiver danificada, deixe de utilizar o produto e contacte com o nosso departamento de serviço ao cliente ou com revendedor local, o mais rapidamente possível.
5. Recomendamos que os utilizadores nunca sejam transferidos diretamente da posição de sentados para de pé sem preparação e alongamento. A melhor forma de o fazer é deitado num tapete mas pode ser transportado numa cadeira de rodas ou no sistema de assento se necessário.
6. Realize todos os ajustes posturais relevantes e assegure-se de que estão bem seguros antes de colocar o utilizador neste produto.
7. Quando colocar o utilizador num andador, por razões de segurança, fixe sempre primeiro a banda pélvica. As correias do peito e dos joelhos devem ser fixadas.
8. Quando o produto estiver parado, certifique-se de que todos os rodízios estão travados e voltados para o lado contrário da base, pois isto irá melhorar a estabilidade do produto.
9. Nunca ajuste a altura total do Freestander enquanto a estrutura estiver em utilização. Outros ajustes de posição mais finos podem ser realizados em segurança quando o utilizador está na estrutura.
10. Nunca deixe o produto sobre uma superfície com mais de 5 graus de inclinação. Não se esqueça de bloquear os rodízios.
11. O produto contém componentes que podem representar risco de asfixia para crianças pequenas. Verifique sempre se os manípulos e parafusos de bloqueio que se encontram ao alcance da criança estão sempre bem apertados e seguros.
12. Os produtos Leckey cumprem com a regulamentação de segurança contra incêndios de acordo com a EN12182. No entanto, o produto contém componentes plásticos e, por isso, deve ser mantido afastado de todas as fontes diretas de calor, incluindo chamas, cigarros, aquecedores elétricos e a gás.

13. Nunca coloque artigos quentes a uma temperatura superior a 40 graus na bandeja.
14. Limpe o produto regularmente. Não utilize produtos de limpeza abrasivos. Realize verificações de manutenção regularmente para garantir que o seu produto está em boas condições de funcionamento.
15. O produto foi concebido para ser utilizado em espaços interiores e, quando não estiver a ser utilizado, deve ser guardado em local seco e que não esteja sujeito a temperaturas extremas. O intervalo de temperatura de operação segura do produto é entre +5 e +40 graus Celsius.

SECÇÃO 8: PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

Precauções

- Deformações espinhais corrigidas, como escoliose ou cifose
- Contraturas musculares graves
- Assimetria muscular ou esquelética grave, incluindo deslocação da anca
- Condições progressivas e de perda muscular
- Risco elevado ou histórico recente de fraturas ósseas
- Risco elevado de lesão relacionada com pressão ou feridas abertas
- Padrões de movimento fortes e descontrolados
- Atividade convulsiva mal controlada
- Crianças dependentes do uso de gastrostomia endoscópica percutânea
- Instabilidade médica incluindo função respiratória ou cardiovascular comprometida
- Dependentes de aparelhos de sustentação da vida de terceiros, como tanques de oxigénio
- Dificuldades de aprendizagem significativas e/ou problemas comportamentais

Contraindicações

- Crianças que sentem dores ou desconforto que não possa ser resolvido com o ajuste do suporte/ posicionamento.
- Crianças com contratura em flexão da anca/joelho além dos limites do andador

Todas as precauções e contra-indicações são consideradas a critério do clínico prescritor ou dos pais.


A Leckey recomenda que um médico habilitado e experiente esteja presente durante a avaliação inicial, ajustes, configurações e reedições para minimizar o risco.

SECÇÃO 9: COMO DESEMBALAR E MONTAR

CVerificar as peças

Parabéns por ter adquirido o seu Leckey Freestander. Quando receber o seu Freestander, o mesmo estará numa caixa e embalado em vários volumes. O seu Freestander chega normalmente numa versão padrão com placa peitoral incluindo laterais flexíveis, placa de joelho, faixa pélvica, tabuleiro de atividades e taça, base com rodízios, postes internos e sandálias. O Totstander é fornecido sem rodízios, bandeja e com uma correia peitoral em vez de uma placa sólida para o peito. Retire todos os volumes com cuidado da caixa e verifique se tem todas as peças que encomendou.

! **A Segurança Primeiro**
Mantenha os sacos de polietileno afastados das crianças.

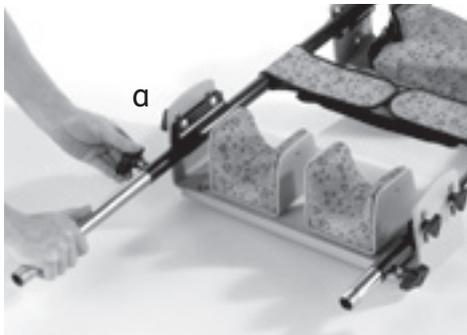



9.1 MONTAGEM DO FREESTANDER

Para montar o seu Freestander, comece por desapertar os parafusos de ajuste de altura nos (a)

Postes verticais exteriores e remova os postes interiores.


Insira os postes interiores nos respetivos tubos na estrutura de rodízios base. A chave sextavada fornecida aperta os dois pequenos parafusos de encaixe em cada tubo recetor de forma segura (b).

Depois faça deslizar a estrutura exterior sobre os postes interiores e aperte os dois (c) parafusos de ajuste de à altura desejada.

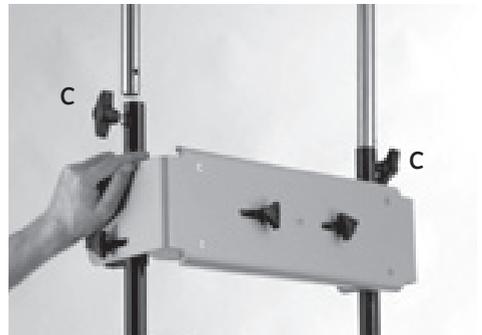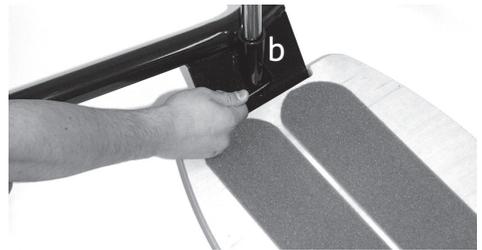

9.2 FIXAR A BANDEJA



A bandeja do Freestander é fixada deslizando os postes exteriores já fixados na bandeja sobre os postes interiores já fixados à base e depois aperte os parafusos (a). A bandeja é então fixada com um pino da bandeja num dos orifícios das laterais da estrutura.

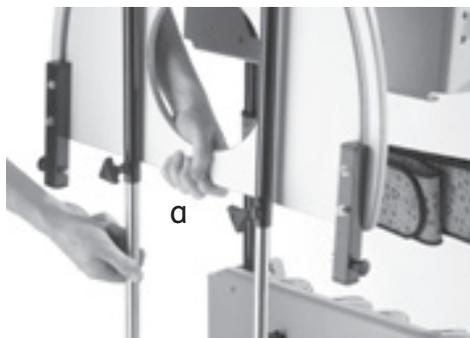


9.3 FIXAR AS SANDÁLIAS

Inserir o parafuso de fixação (a) necessário juntamente com a placa de retenção (b). Coloque Uma tampa de borracha no topo e parte inferior da sandália (c). Apertar usando os quatro parafusos fornecidos (d). Para retirar ou substituir o parafuso de fixação, inverta este processo.

Coloque a sandália para que o parafuso de fixação atravessasse a ranhura na platina. Para segurar, na parte de baixo da platina colocar a anilha de borracha (e), seguida pela anilha metálica (f), por último, o botão (g) No parafuso de fixação.

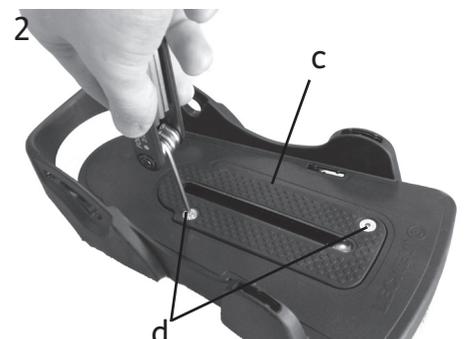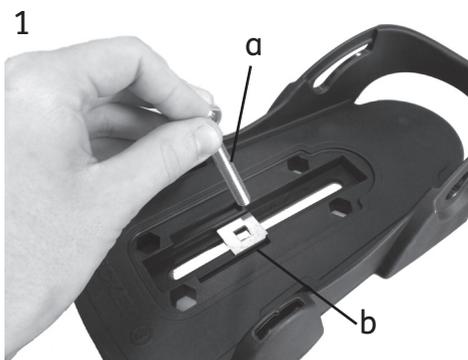

Para posicionar as sandálias, basta soltar o botão (g) sob a platina, selecionar a posição necessária e voltar a apertar o botão.

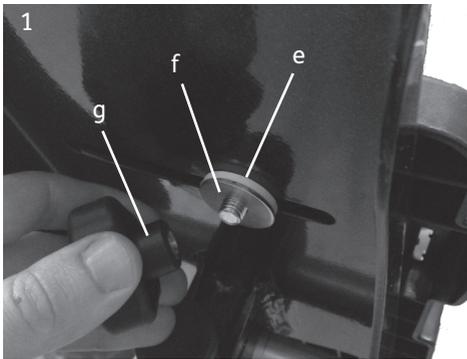

SECÇÃO 10: CONFIGURAÇÃO CLÍNICA PARA A GESTÃO POSTURAL

A configuração clínica do produto deve ser realizada por uma pessoa técnica e clinicamente competente, com formação na utilização do produto. A Leckey recomenda que seja mantido um registo escrito de todas as configurações clínicas realizadas para este produto.

10.1 AJUSTAR A PLACA PEITORAL

Primeiramente deve medir a distância desde os pés do utilizador para debaixo dos braços. A melhor forma de o fazer quando seja possível é na posição deitada, num tapete. A altura entre o topo da placa peitoral, e as sandálias deve ficar configurada para o equivalente desta distância. Este será sempre o primeiro ajuste que é necessário executar.

Para ajustar a altura da placa Peitoral (b), desaperte os parafusos, ajuste para a posição necessária e depois volte a apertar o parafuso (a) em segurança.

A placa peitoral tem uma série de outros ajustes que são realizados ao Desapertar os para (a) Na parte lateral da placa peitoral.

Ao desapertar estes parafusos a placa peitoral pode ser movida:

1. Para a frente para trás para contorno do corpo.
2. Para cima e para baixo para os últimos ajustes, mais finos à altura da placa peitoral.
3. Inclinar para a frente/para baixo ou para trás/para cima ligeiramente para assistir a gestão de posição da extensão ou flexão respetivamente.



⚠ Não tente ajustar a altura da armação principal quando o andador estiver a ser usado.

10.2 AJUSTAR A PLACA DO JOELHO



A placa do joelho é ajustada da mesma forma que a placa do peito utilizando os parafusos (a).

 **Tenha sempre cuidado para garantir que os dedos não ficam presos ao ajustar a placa do joelho.**

10.3 AJUSTAR OS APOIOS DO JOELHO

Os apoios do joelho são fixados com os parafusos na frente do bloco de joelho. Quando este parafuso for desapertado, o apoio do joelho pode ser movido da esquerda para a direita e rodado. Assim que é alcançada a posição desejada, o parafuso deve ser reapertado de forma segura (a).

 **Tenha sempre cuidado para garantir que os dedos não ficam presos ao ajustar os apoios do joelho.**

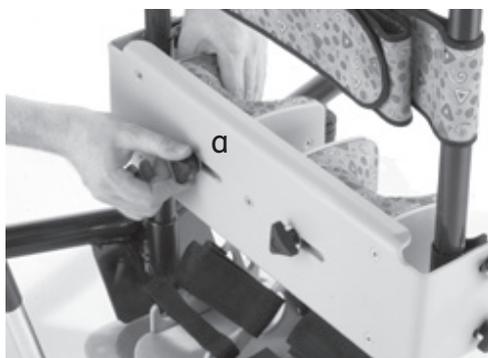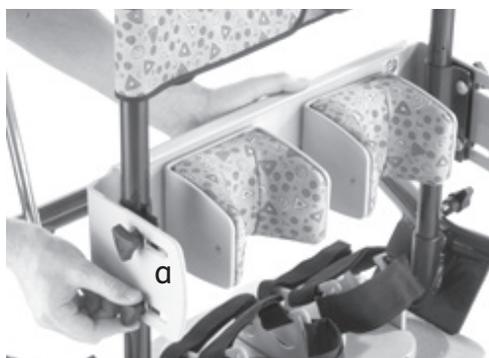

10.4 AJUSTAR AS SANDÁLIAS

Para posicionar as sandálias, basta soltar o botão sob a platina, seleccionar a posição necessária e voltar a apertar o botão. Para posicionar os pés do utilizador nas sandálias, prenda as tiras de velcro fornecidas para que o pé fique seguro no lugar. As correias devem ser colocadas sobre o peito do pé e sobre os dedos. A correia frontal pode ser passada através de uma das duas ranhuras em cada lado das sandálias, de acordo com o tamanho dos pés do utilizador.



Se a criança estiver a usar sandálias ou calçado leves, verifique as correias para garantir que a cinta não irrita a pele.

10.5 FIXAR A BANDA PÉLVICA

A banda pélvica deve ser fixada ao utilizador primeiro, se for prático novamente num tapete.

As correias pélvicas deve ser fixadas à volta da pélvis do utilizador. As correias mais longas são então deslizadas através dos postes exteriores da estrutura e firmemente fixadas por detrás do utilizador com Velcro no cinto. Para se certificar de que consegue identificar facilmente a correia que passa à volta do utilizador e a que se fixa à estrutura, foi cosida uma etiqueta Leckey à que vai passar à volta da estrutura.



SECÇÃO 11: AJUSTES FREQUENTES PARA USO DIÁRIO

Os pais e os cuidadores devem aprender a fazer ajustes frequentes e as verificações de segurança na secção 7 com uma pessoa técnica e clinicamente competente que tenha recebido formação sobre a utilização do produto. A Leckey recomenda que seja mantido um registo escrito de todos os pais e cuidados que receberam formação sobre o uso correto deste produto.

11.1 TRANSFERÊNCIA DO UTILIZADOR PARA E DO ANDADOR

Antes de transferir a criança para o andador, realize a inspeção diária do produto, conforme descrito na secção 13 deste manual do utilizador.

Antes de transferir a criança para o produto, bloqueie todos os rodízios, certificando-se de que estão voltados para fora para maximizar a estabilidade do produto. Certifique-se de que as correias no peito, os arneses de suporte da anca e as sandálias estão soltos mas que não impedem ou interferem na transferência.





Prenda sempre a banda pélvica e a banda de segurança primeiro e depois a correia do peito e os pés do utilizador.

11.2 AJUSTAR AS LATERAIS FLEXÍVEIS

Os apoios laterais flexíveis Freestander podem ser ajustados para fora ou para dentro Desapertando os parafusos (a) na parte posterior da placa peitoralal.

Assim que os parafusos tiverem sido desapertados, os apoios laterais flexíveis podem ser ajustados Para a posição necessária e assim que estiverem em posição, os parafusos devem voltar a ser Apertados com segurança. As laterais flexíveis têm também uma pequena porção de ajuste em altura. Para alterar a altura, desaperte os parafusos sextavados (b), posicione as laterais conforme necessário e depois volte a apertar os parafusos sextavado em segurança. Os apoios laterais flexíveis são fixados à volta do utilizador apertando a correia de segurança na posição. Aperte a correia de segurança imediatamente.

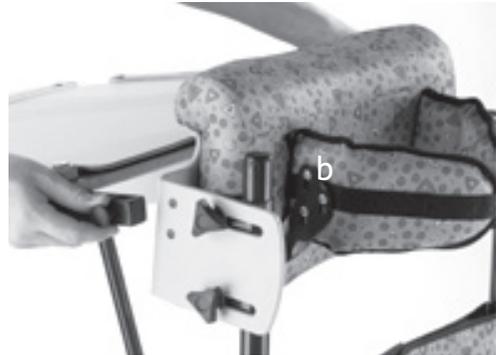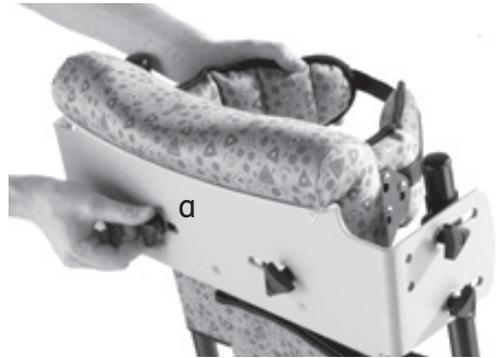

Ter sempre cuidado para garantir que os dedos não ficam presos ao ajustar os suportes laterais.

11.3 AJUSTAR OS APOIOS DO JOELHO

Os apoios do joelho são fixados com os parafusos na frente do bloco de joelho. Quando Este parafuso (a) estiver solto, o apoio do joelho podem ser movidos da esquerda para a direita e rodados. Assim que é alcançada a posição desejada, o parafuso (a) deve voltar a ser apertado de forma segura.




Agire sempre con molta cautela per assicurarsi che le dita non rimangano intrappolate nella fessura mentre si regolano le ginocchiere.

11.4 AJUSTAR AS SANDÁLIAS

Para posicionar as sandálias, basta soltar o botão debaixo da plataforma, selecionar a posição pretendida e voltar a apertar o botão. Para posicionar os pés do utilizador nas sandálias, prenda as tiras de velcro fornecidas para que o pé fique seguro no lugar. As correias devem ser colocadas sobre o peito do pé e sobre os dedos. A correia frontal pode ser passada através de uma das duas ranhuras em cada lado das sandálias, de acordo com o tamanho dos pés do utilizador.




Ter sempre cuidado para garantir que os dedos não ficam presos ao ajustar os suportes laterais.

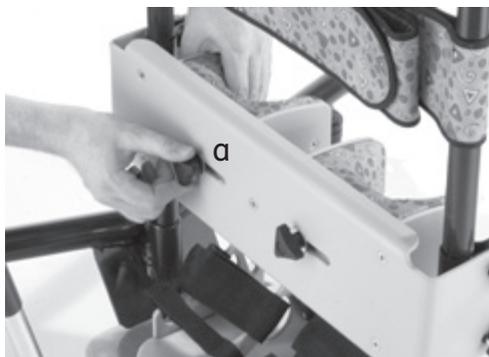

11.5 AJUSTAR A BANDEJA

A bandeja pode ser ajustada em altura e ângulo desapertando o parafuso (a) nos postes da bandeja, ajustando para a posição necessária e depois voltando a apertar os parafusos (a) em segurança.

A posição da bandeja também pode ser alterado em relação à placa peitoral. Uma das três funções pode ser seleccionada para ajudar a facilitar uma boa função manual. A bandeja virá completa com uma cobertura de bandeja e uma taça, o que significa que pode usar a bandeja com uma cobertura plana e utilizar a taça para atividades lúdicas.

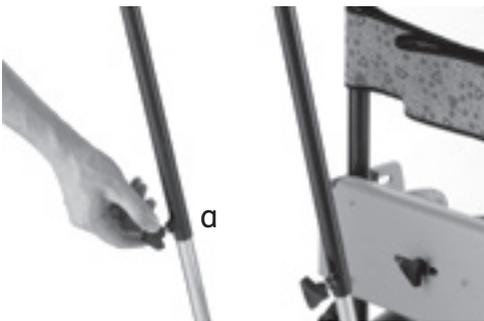

11.6 FIXAR A BANDA PÉLVICA

A banda pélvica deve ser fixada ao utilizador primeiro, se possível novamente num tapete. As correias pélvicas deve ser fixadas à volta da pélvis do utilizador, as correias mais longas são então deslizadas através dos postes exteriores da estrutura e firmemente fixadas por detrás do utilizador com Velcro no cinto. Para se certificar de que consegue identificar facilmente a correia que passa à volta do utilizador e a que se fixa à estrutura, foi cosida uma etiqueta Leckey à que vai passar à volta da estrutura.



SECÇÃO 12: IIINFORMAÇÃO SOBRE LIMPEZA E CUIDADOS

Como manter

Quando limpar, recomendamos que use apenas água morna e um detergente não abrasivo. Nunca use solventes orgânicos ou fluidos de limpeza a seco.

Estofos e tecidos

1. Os estofos e os tecidos podem ser limpos manualmente enquanto colocados. Quando limpar, recomendamos que use apenas água morna e um detergente não abrasivo.
2. O melhor método de limpeza é uma técnica “limpar e secar”.
3. As manchas devem ser removidas logo que possível, com um pano absorvente, toalha ou esponja. Sabão comum e uma esponja com água quente é eficaz para a sujidade normal e pequenas nódoas/derrames. Cuidado para não molhar o tecido já que poderá provocar o aumento da nódoa.
4. Podem ser usados agentes de limpeza antissépticos em manchas mais resistentes. Isto pode exigir um solvente seguro como o álcool isopropílico ou bebidas mineralizadas. Usar uma mistura de meia chávena de lixívia para 5 litros de água como desinfetante.
5. Certifique-se sempre de que o produto está seco antes de usar.

Componentes em metal e plástico e madeira

1. Podem ser usados para a limpeza diária, sabão e água ou spray antibacteriano.
2. Para limpeza profunda, pode ser usado um equipamento de limpeza a vapor de baixa pressão.
3. Não use solventes para limpar componentes de plástico, madeira ou metal.
4. Confirme sempre que o arnês está seco antes de usar.
5. Verifique todos os componentes de madeira regularmente para garantir que não estão rachados ou lascados.

SECÇÃO 13: INSPEÇÃO DIÁRIA DO PRODUTO

(Terapeutas, pais e cuidadores)

Recomendamos que as verificações visuais diárias do equipamento sejam realizadas pelos terapeutas, cuidadores ou pais para garantir que o produto está seguro para uso. As verificações recomendadas são detalhadas abaixo.

1. Certifique-se de que todos os botões e parafusos de ajuste estão no lugar e fixos.
2. Verificar todos os sinais de desgaste e danos dos estofos.
3. Verifique se todos os rodízios se movem livremente e ficam bloqueados em segurança.
4. Verifique todas as tiras de velcro e escove qualquer algodão para garantir que agarram firmemente quando usadas.



Em caso de dúvida sobre a utilização segura do seu produto Leckey ou se alguma estiver danificada, por favor, deixe de utilizar o produto e contacte com nosso departamento de serviço ao cliente ou com o revendedor local, o mais rápido possível.

SECÇÃO 14: INSPEÇÃO ANUAL DO PRODUTO

(Terapeuta, Técnico, Consultores de Produto Leckey, Revendedor)

A Leckey recomenda que cada produto seja submetido a uma inspeção detalhada, no mínimo, uma vez por ano e sempre que o produto seja relançado para uso. Esta inspeção deve ser realizada por uma pessoa tecnicamente competente que tenha sido formada na utilização do produto e deve incluir, como requisito mínimo, as seguintes verificações.

1. Verifique se todos os botões, porcas, parafusos e fivelas de plástico estão no lugar, substituindo todos os itens em falta. Preste especial atenção aos seguintes artigos;
 - Ajustes de ângulo e altura do peito e anca
 - Botões de ajuste de apoios de joelhos
2. Levante a base para verificar individualmente cada rodízio. Certifique-se de que todos se movimentam livremente e retire qualquer sujidade das rodas de borracha. Verifique se os travões bloqueiam as rodas com segurança.
3. Verifique visualmente a estrutura do produto, prestando atenção aos pontos soldados na armação garantindo que não existem sinais de fadiga ou rachas à volta das soldas.

4. A Leckey recomenda que seja mantido um registo escrito de todas as inspeções anuais do produto.



Em caso de dúvida sobre a utilização segura do seu produto Leckey ou se alguma peça estiver danificada, deixe de usar o produto e contacte a nossa equipa de Atendimento ao Cliente ou com o seu revendedor local, o mais rapidamente possível.

SECÇÃO 15: RELANÇAMENTO DE PRODUTOS LECKEY

A maioria dos produtos Leckey é analisada e encomendada para atender às necessidades de um utilizador individual. Antes de relançar um produto, recomendamos que o terapeuta que prescreveu o produto realize uma verificação de compatibilidade do equipamento para o novo utilizador e assegure que o produto que está a ser reeditado não contém modificações ou acessórios especiais.

Deve ser realizada uma inspeção técnica detalhada no produto antes do relançamento. Isto deve ser realizado por uma pessoa tecnicamente competente que tenha sido formada na utilização e inspeção do produto. Consulte a **secção 14** sobre as verificações a realizar. Antes do relançamento do produto, recomenda-se o mesmo seja desinfetado utilizando o seguinte procedimento:

Nota: Limpe sempre o produto antes para remover o lixo acumulado antes da higienização/desinfecção

1. Sempre que possível, recomendamos a utilização de um sistema de desinfeção “nebulizante” que é utilizado para cobrir totalmente as superfícies do produto com um agente desinfetante. As instruções do fabricante para o sistema escolhido devem ser consultadas antes da utilização e estritamente seguidas.
2. Quando não está disponível um sistema de desinfeção automatizada, todas as superfícies do produto devem

ser limpas com toalhas desinfetantes ou com líquido desinfetante num pano suave. Os produtos adequados contêm 70% IPA, 70% de álcool ou lixívia diluída. As instruções do fabricante para o Produto escolhido devem ser seguidas. Os estofos e tecidos do produto devem ser limpos corretamente de acordo com a secção Informação sobre limpeza e manutenção, deste manual.

Verifique se foi fornecida uma cópia do manual do utilizador com o produto. Pode descarregar uma cópia a partir do nosso website **www.leckey.com**

A Leckey recomenda que seja mantido um registo escrito de todas as inspeções realizadas durante a reedição do produto.



Em caso de dúvida sobre a utilização segura do seu produto Leckey ou se alguma peça estiver danificada, deixe de usar o produto e contacte a nossa equipa de Atendimento ao Cliente ou com o seu revendedor local, o mais rapidamente possível.

SECÇÃO 16: ASSISTÊNCIA DE PRODUTOS

A assistência técnica de todos os produtos Leckey deve ser efetuada apenas por pessoas tecnicamente competentes com formação adequada sobre a utilização do produto.

No RU e ROI, contacte o Centro de Serviço Leckey através de:

UK 0800 318265 ou ROI 1800 626020

E do nosso departamento de Serviço ao cliente terá todo o prazer em dar-lhe assistência com as suas necessidades de assistência técnica.

Todos os pedidos de serviço internacionais devem ser direcionados ao distribuidor autorizado da Leckey, que terá todo o prazer em ajudar. Para mais informações sobre os distribuidores Leckey, visite o nosso website: **www.leckey.com/contact**

SECÇÃO 17: DETALHES TÉCNICOS

Detalhes Técnicos						
Tamanho	Tamanho 1		Tamanho 2		Tamanho 3	
Idade (Anos aprox.)	1 - 5		4 - 10		9 - 18	
Códigos	LFS/1		LFS/2		LFS/3	
	mm	polegadas	mm	polegadas	mm	polegadas
Freestander						
Altura de placa de peito min max	470	18,5	680	27	975	38
	680	27	975	38	1350	53
Base comprim ento largura	650	26	750	30	750	30
	650	26	750	30	750	30
Bandeja de atividades Profundi dade largura	400	16	425	18	470	20
	540	21	590	23	644	25
Peso máximo utilizador	60kg	132lbs	80kg	176lbs	90kg	198lbs
Totstander						
Altura de placa de peito min max	470		18,5			
	680		27			
Base comprimento largura	450		18			
	450		18			

TABELA DE SÍMBOLOS

Símbolo	Significado
	v
	Leia as Instruções para utilização
	Marca CE
	Aviso
	Fabricante
	Número de Série
	Código do produto
	Peso máximo do ocupante
	Data de fabrico
	Apenas para utilização interna
	Sem látex
	Identificação Única do Dispositivo
	Lavagem à máquina - temperatura da água 50 °C
	Máquina de secar - baixo calor
	Ferro a baixa temperatura
	Não utilizar limpeza a seco



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Polska

Tel: +{48} 42 275 83 38

Faks: +{48} 42 209 35 23

pl@sunrisemedical.de
www.sunrise-medical.pl

James Leckey Design Limited
19 Ballinderry Road
Lisburn, BT28 2SA
Northern Ireland

{+44} 28 9260 0750

hello@leckey.com

leckey.com



LS1152-01