

Riktlinjer för förvaring och returer av elrullstolar och skotrar med gelbatterier

Dessa riktlinjer är avsedda att hjälpa kunder till Sunrise Medical att hantera produkter vid förvaring och returtransport.

Det finns tre olika produktkategorier med särskilda riktlinjer för lagring och/eller returtransport:

1. Produkter utan elektronik/batterier (manuella rullstolar, rollatorer etc.)
- 2. Elrullstolar och skotrar med gelbatterier**
3. E-mobilitetsprodukter med litiumjonbatterier

Följande rekommendationer har skapats för att ge praktisk vägledning för en säker förvaring, och tillämpliga bestämmelser för (retur)transport av produkter med gelbatterier.

Förutsättningar för säker förvaring

- Produkterna bör förvaras på en torr plats: mellan 20 – 75% relativ luftfuktighet.
- Skydda mot direkt solljus och damm under långa perioder. Förvara inte nära öppen låga.
- Förvara aldrig nära en direkt värmekälla, i temperaturer mellan -40 °C och 65 °C, rekommenderad temperatur mellan -25 °C och 50 °C.
- Vid förvaring ska de förpackade produkterna positioneras enligt instruktion på paketet (pilar som indikerar vilken sida som är uppåt).
- Om ett paket är högt och smalt och därför potentiellt instabilt, se till att det är väl säkrat för att förhindra att det faller ner.
- Stapla inte något annat ovanpå de förpackade produkterna när förpackningen indikerar att detta inte ska göras.
- Produkten ska aldrig förvaras utomhus och utsatt för väder och vind.

Returer

Vissa bestämmelser gäller vid leverans av gelbatterier. Dessutom ställer leverantörer av logistikjänster också krav på förpackningar för gelbatterier.

- För att följa förordningen, använd originalförpackningen inklusive förpackningsmaterial och, om möjligt även lastpallen.





Om originalförpackningen inte är tillgänglig, använd en förpackning som uppfyller följande krav:

Packetering

- Batterier ska skyddas mot kortslutning.
- Batterier ska säkras för att förhindra oavsiktlig rörelse och batteripolerna skall inte utsättas för tryck, vikt eller belastning av annat packat gods eller emballage
- Material/wellpapp av god kvalitet ska användas, anpassad till lådans avsedda bruk.
- Materialet ska ha lämpliga egenskaper för dess avsedda bruk.
- Förslut lådan ordentligt för att förhindra förlust av delar, säkerställ att delar lätt kan tas ut och att lådan förblir i gott skick.
- Förpackningen bör vara tillräckligt stark för att skydda produkten/produkterna under transport.

Märkning

- Om en försändelse består av mer än ett paket ska alla enskilda paket märkas med det totala antalet paket.

	Gel Batteries	Gel Batteries packed with product	Gel Batteries contained in product
HAZARD CLASS	Hazard Class: 8 UN no. 2800 Packing Group II	Hazard Class: 8 UN no. 2800 Packing Group II	Hazard Class: 8 UN no. 2800 Packing Group II
AIR SHIPPING PACKAGING INSTRUCTION	<u>IATA 872</u>  UN package required	No UN package required	No UN package required
LABELING			
DECLARATION		No special declaration required	No special declaration required
TRUCK & SEA SHIPPING PACKAGING INSTRUCTION	No special instruction required	No special instruction required	No special instruction required
LABELING		No special labeling required	No special labeling required
DECLARATION	No special declaration required	No special declaration required	No special declaration required

Dynor & ryggar

- Det är viktigt att dynor och ryggar är ordentligt rengjorda innan retur. Detaljerad information om rengöring finns i bruksanvisningen.