



Squiggles Stander System

Instrukcja użytkowania
pionizatora Squiggles



Pionizator Squiggles zaprojektowano z myślą o zapewnieniu dziecku niezbędnego podparcia w pozycji stojącej w położeniu pionowym, odchylonym do przodu (ze wsparciem z przodu) lub odchylonym do tyłu (ze wsparciem z tyłu). Pionizator ma konstrukcję modułową i można go połączyć z różnymi podstawami przeznaczonymi do użytku w szkole lub w domu.

W niniejszej instrukcji wyjaśniono, w jaki sposób można szybko, łatwo i bezpiecznie skorzystać ze wszystkich funkcji ramy pionizatora Squiggles. Przestrzeganie instrukcji dotyczących bezpiecznego użycia i konserwacji produktu gwarantuje długi okres użytkowania.

SPIS TREŚCI

01	Przeznaczenie produktu
02	Deklaracja zgodności
03	Warunki gwarancji
04	Historia produktu
05	Dokumentacja dotycząca szkolenia w zakresie obsługi produktu
06	Informacje dotyczące bezpiecznego użycia
07	Rozpakowywanie i montaż pionizatora
08	Mocowanie poduszek
09	Ustawienie kliniczne w celu regulacji postawy
10	Częste regulacje związane z codziennym użytkowaniem
11	Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji
12	Codzienna kontrola produktu
13	Coroczna kontrola produktu
14	Wydawanie produktów firmy Leckey do ponownego użyciu
15	Serwisowanie produktu
16	Informacje techniczne

ROZDZIAŁ 01: PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Pionizator Squiggles to rama stabilizująca w pozycji pionowej przeznaczona dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku od 1 roku do 5 lat do użytku w domu lub w środowisku szkolnym. Ramy pionizatora można używać na podstawie obrotowej, nieruchomej lub mobilnej. Podstawa obrotowa i podstawa nieruchoma są przeznaczone do użytku w pomieszczeniach na równych powierzchniach.

Podstawa mobilna jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach lub na zewnątrz. Niezależnie od używanej podstawy maksymalna waga użytkownika to 22 kg (48,4 funta).

ROZDZIAŁ 02: DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma James Leckey Design Ltd. jako producent oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że pionizator Squiggles spełnia wymogi Wytycznych 93/42/EWG, Regulacji dotyczących wyrobów medycznych z 2002 oraz normy EN12182: Wyroby pomocnicze dla osób niepełnosprawnych. Wymagania ogólne i metody badań.

ROZDZIAŁ 03: WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja obowiązuje wyłącznie, gdy produkt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, określonymi warunkami i wszystkimi zaleceniami producenta (patrz również: ogólne warunki sprzedaży, dostawy i płatności). Wszystkie produkty i części produktów firmy Leckey są objęte trzyletnią gwarancją.

ROZDZIAŁ 04: HISTORIA PRODUKTU

Niniejszy produkt firmy Leckey został sklasyfikowany jako urządzenie medyczne klasy 1, w związku z czym powinien być przepisywany pacjentowi, ustawiany lub wydawany do ponownego użytku wyłącznie przez osobę o odpowiedniej wiedzy technicznej, która przeszła wcześniej szkolenie w zakresie jego obsługi. Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wszelkich ustawień, kontroli przy wydawaniu do ponownego użytku oraz corocznych kontroli niniejszego produktu.

ROZDZIAŁ 05: DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI PRODUKTU

(rodzice, nauczyciele i opiekunowie)

Niniejszy produkt firmy Leckey to przepisywany przez lekarza sprzęt medyczny klasy 1, w związku z czym firma Leckey zaleca, aby osoba o odpowiedniej wiedzy technicznej zapoznała rodziców, nauczycieli i opiekunów używających wspomnianego sprzętu z następującymi rozdziałami niniejszej instrukcji użytkownika:

Rozdział 6

Informacje dotyczące bezpiecznego użycia

Rozdział 10

Częste regulacje związane z codziennym użytkowaniem

Rozdział 11

Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji

Rozdział 12

Codzienna kontrola produktu

Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru osób, które zostały przeszkolone w zakresie prawidłowego użytkowania niniejszego produktu.

ROZDZIAŁ 06: INFORMACJE DOTYCZĄCEGO BEZPIECZNEGO UŻYCIA

1. Przed użyciem należy zawsze dokładnie przeczytać instrukcję.
2. Podczas korzystania ze sprzętu firmy Leckey użytkowników nie powinno się w żadnym wypadku pozostawiać bez opieki.
3. Razem z produktem należy używać wyłącznie elementów zatwierdzonych przez firmę Leckey. Nie należy w żaden sposób modyfikować produktu. Nieprzestrzeganie instrukcji może narazić użytkownika lub opiekuna na niebezpieczeństwo i będzie skutkować unieważnieniem gwarancji.
4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dalszego bezpiecznego użytkowania produktu lub w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części należy zaprzestać dalszego użytkowania produktu i jak najszybciej skontaktować się z naszym Zespołem ds. Obsługi Klientów lub lokalnym przedstawicielem handlowym.
5. Przed umieszczeniem użytkownika w pionizatorze należy wykonać wszystkie czynności regulacji pozycji i upewnić się, że wszystkie elementy są odpowiednio przymocowane. Niektóre regulacje mogą wymagać

- użycia narzędzia dostarczanego z każdym produktem. Wszystkie narzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Po umieszczeniu użytkownika w pionizatorze dla zachowania bezpieczeństwa i odpowiedniej postawy należy zawsze najpierw zapiąć uprzęż biodrową i piersiową.
 - Po umieszczeniu produktu w stabilnej pozycji należy się upewnić, że wszystkie kółka samonastawne są zablokowane i skierowane z dala od podstawy, co zapewni większą stabilność produktu. Jest to szczególnie istotne, gdy rama pionizatora znajduje się w pozycji odchylonej.
 - Podczas korzystania z produktu należy się upewnić, że dźwignia regulacji kąta odchylenia na obrotowej podstawie lub śruby blokujące na nieruchomej i mobilnej podstawie są zablokowane i nie mogą być przestawione przypadkowo, zwłaszcza jeśli w pobliżu przebywają dzieci.
 - W przypadku używania pionizatora Squiggles na obrotowej podstawie nie zaleca się przemieszczania użytkowników w pionizatorze po nierównych powierzchniach. W przypadku używania nieruchomej podstawy nie należy przesuwać pionizatora razem z dzieckiem. W przypadku używania nieruchomej podstawy nie należy przesuwać pionizatora razem z dzieckiem. Podczas przenoszenia użytkownika z pionizatora i na pionizator należy zachować szczególną ostrożność.
 - Nie należy nigdy pozostawiać produktu na powierzchni o pochyłości większej niż 5 stopni. Należy zawsze pamiętać o zablokowaniu wszystkich kółek samonastawnych.
 - Choć pionizator z obrotową podstawą jest wyposażony w kółka samonastawne, nie zaprojektowano go z myślą o zapewnieniu mobilności. Przed przesunięciem pionizatora należy zawsze umieścić użytkownika w pozycji pionowej. Podczas przesuwania pionizatora należy przytrzymać tylną część wykonanego z tworzywa sztucznego podparcia klatki piersiowej.
 - Produkt zawiera elementy, które stwarzają ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia przez małe dzieci. Należy zawsze upewnić się, że pokrętła i śruby blokujące znajdujące się w zasięgu dziecka są dokręcone i zabezpieczone.
 - Produkty firmy Leckey są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa przeciwpożarowego według normy EN12182. Jednakże produkt zawiera elementy z tworzywa sztucznego, a zatem powinien być przechowywany i użytkowany z dala od wszelkich bezpośrednich źródeł ciepła, w tym otwartego ognia, papierosów oraz grzejników elektrycznych i gazowych.

ROZDZIAŁ 07: ROZPAKOWYWANIE I MONTAŻ PIONIZATORA

14. Na stoliku nie należy umieszczać przedmiotów rozgrzanych do temperatury wyższej niż 40°C.
15. Należy regularnie czyścić produkt. Nie należy używać ściernych środków czyszczących. Należy regularnie przeprowadzać konserwację, aby upewnić się, że produkt jest w dobrym stanie.
16. Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach (o ile nie jest zamontowany na podstawie mobilnej), a nieużywany produkt powinien być przechowywany w suchym miejscu, niewystawionym na działanie wysokich temperatur. Bezpieczna temperatura użytkowania produktu mieści się w zakresie od +5°C do +40°C.

Sprawdzanie części


Gratulujemy zakupu systemu pionizatora Squiggles. W celu otworzenia pudełek należy przeciąć paski, uważając, aby nie ciąć zbyt głęboko, ponieważ mogłoby to skutkować uszkodzeniem znajdujących się w środku części. Wszystkie części zostaną dostarczone w polietylenowych opakowaniach z czytelnymi etykietami. Należy ostrożnie wyjąć je z pudełka i sprawdzić, czy nie brakuje żadnej z zamówionych części.



7.1 ROZKŁADANIE I SKŁADANIE OBROTOWEJ PODSTAWY

Narzędzie wielofunkcyjne

Niektóre regulacje będą wymagać użycia narzędzia uniwersalnego dostarczanego z każdym produktem.

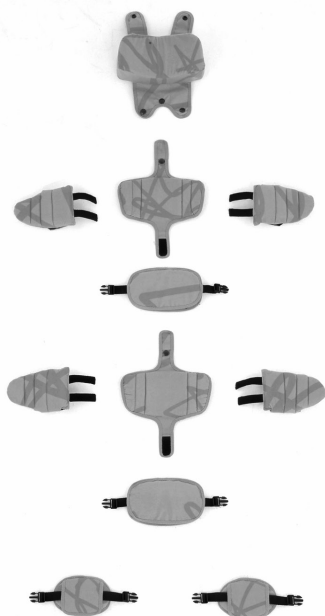

Obrotową podstawę można łatwo złożyć na czas przechowywania lub transportu. Aby ją rozłożyć, należy zwolnić przedstawione na zdjęciu dźwignie **A**, naciskając je jednocześnie, i obracać tylne rurki do zablokowania dźwigni. Aby złożyć podstawę, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.



Przed złożeniem podstawy należy zawsze zdemontować ramę pionizatora.

Należy zawsze zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców podczas składania i rozkładania obrotowej podstawy.




Bezpieczeństwo przede wszystkim
wszystkim Polietylenowe
opakowania należy trzymać
z dala od dzieci.



7.2 MOCOWANIE PIONIZATORA NA PODSTAWIE

Pionizatora Squiggles można używać w pozycji ze wsparciem z przodu, ze wsparciem z tyłu lub pionowo, a jego konstrukcja pozwala na zamocowanie go na trzech różnych podstawach: mobilnej, obrotowej i nieruchomej.

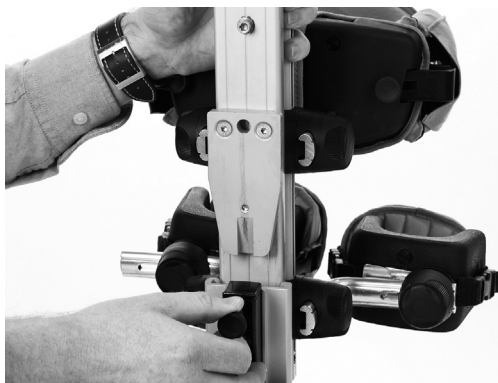

7.3 MOCOWANIE PIONIZATORA NA OBROTOWEJ PODSTAWIE

Aby zamocować pionizator na obrotowej podstawie, należy wyciągnąć sworzeń blokujący, wsunąć pręt główny we wspornik mocujący do całkowitego połączenia i puścić sworzeń, aby automatycznie powrócił na miejsce.




Przed umieszczeniem dziecka w pionizatorze należy zawsze upewnić się, że sworzeń blokujący jest odpowiednio zablokowany.

7.4 MOCOWANIE PIONIZATORA NA NIERUCHOMEJ PODSTAWIE

Aby zamocować pionizator na nieruchomej podstawie, należy wsunąć pręt główny we wspornik mocujący do całkowitego połączenia. Pociągnąć sworzeń blokujący znajdujący się z boku pedału i obrócić go o 90 stopni do pozycji zablokowanej. Wcisnąć pedał i umieścić dolną część pręta głównego w zagłębieniu w pręcie blokującym. Zwolnić pedał, aby zablokować ramę pionizatora. Ponownie obrócić sworzeń blokujący, aby pedał nie mógł zostać wciśnięty przypadkowo.



element połączeniowy pręta głównego we wspornik mocujący do całkowitego połączenia, upewniając się, że sworzeń blokujący jest odpowiednio zablokowany.

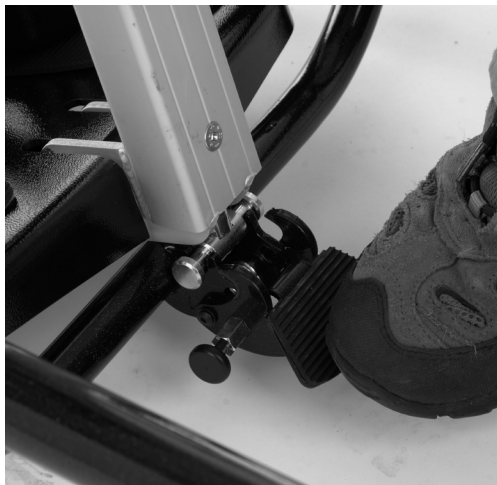

Przed umieszczeniem dziecka w pionizatorze należy zawsze upewnić się, że sworzeń blokujący jest odpowiednio zablokowany.

7.5 MOCOWANIE PIONIZATORA NA MOBILNEJ PODSTAWIE

Najpierw należy wsunąć ramę pionizatora w element mocujący na podstawie. W tym celu należy zwolnić sworzeń blokujący znajdujący się z boku pedału, ciągnąc go i obracając o 90 stopni do pozycji zablokowanej. Wcisnąć pedał i umieścić dolną część pręta głównego w zagłębieniu w pręcie blokującym. Zwolnić pedał, aby zablokować ramę pionizatora. Ponownie obrócić sworzeń blokujący, aby pedał nie mógł zostać wciśnięty przypadkowo. Następnie należy wsunąć




Przed umieszczeniem dziecka w pionizatorze należy zawsze upewnić się, że sworzeń blokujący jest odpowiednio zablokowany.

7.6 MOCOWANIE UKŁADU ZAWIESZENIA


Aby zamocować układ zawieszenia, należy najpierw przymocować podstawę z zamocowaną sprężyną zawieszenia. W tym celu należy wyrównać otwory, wsunąć w nie cztery śruby i nałożyć podkładki i nakrętki. Mocno dokręcić, upewniając się, że końce śrub wystają ponad nakrętki.

Na koniec należy wsunąć zespół piasty w górny element i ustawić wymaganą wysokość, uwzględniając rozmiar zamówionych kół. W przypadku 27-calowych kół należy wyrównać dolny otwór **B** w piaście względem górnego otworu w zawieszeniu **C**, wsunąć śrubę i zamocować po drugiej stronie przy użyciu nakrętki. W przypadku 24-calowych kół, aby ustawić zawieszenie, należy wyrównać otwór **A** względem otworu **C** i zamocować za pomocą śruby i nakrętki. Powtórzyć czynności przy drugim kole.

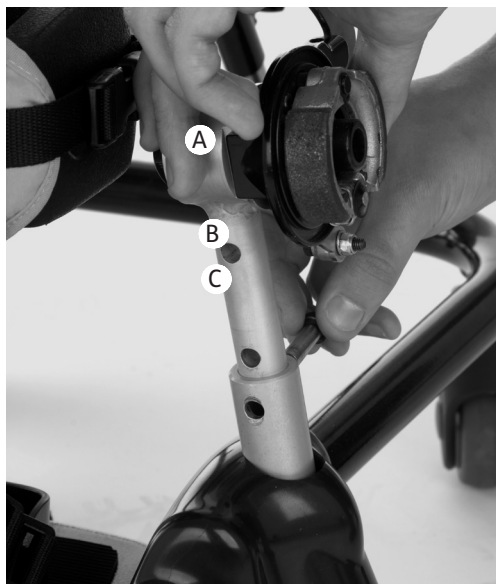

7.7 MOCOWANIE KÓŁ

Podczas mocowania kół do podstawy hamulce muszą być zwolnione. Unieść nieco podstawę, jednocześnie wciskając czarny przycisk pośrodku koła. Nadal wciskając przycisk, przymocować koło do podstawy, a następnie zwolnić przycisk. Aby zdemontować koła, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

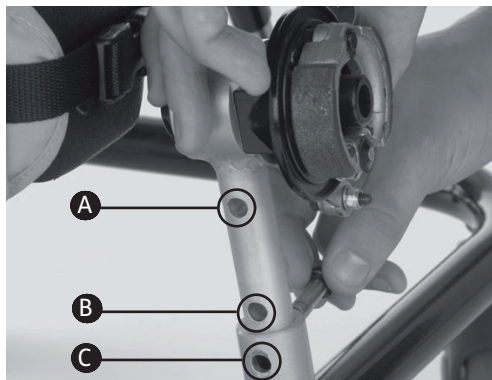

7.8 MOCOWANIE ZAGŁÓWKA

Aby zamocować zagłówek firmy Leckey, należy najpierw zwolnić dźwignię blokującą, naciskając przycisk bezpieczeństwa i ciągnąc uchwyt, a następnie wyjąć wkładkę z tworzywa sztucznego z pierścienia mocującego. Następnie należy wsunąć pręt zagłówek we wspornik mocujący na pręcie głównym, ustawić wymaganą pozycję i przymocować przy użyciu uchwytu blokującego.


Zagłówek Lynx firmy Whitmyer mocuje się w taki sam sposób. Aby zamocować zagłówek firmy Whitmyer z linii Pro, należy zdjąć podkładkę pierścieniową ze wspornika mocującego i zablokować pionowy pręt w odpowiednim położeniu przy użyciu dźwigni blokującej.



Produkt zawiera elementy, które stwarzają ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia przez małe dzieci. Należy zawsze upewnić się, że pokrętła i śruby blokujące znajdujące się w zasięgu dziecka są dokręcone i zabezpieczone.





Należy zawsze upewnić się, że koła są odpowiednio zamocowane.

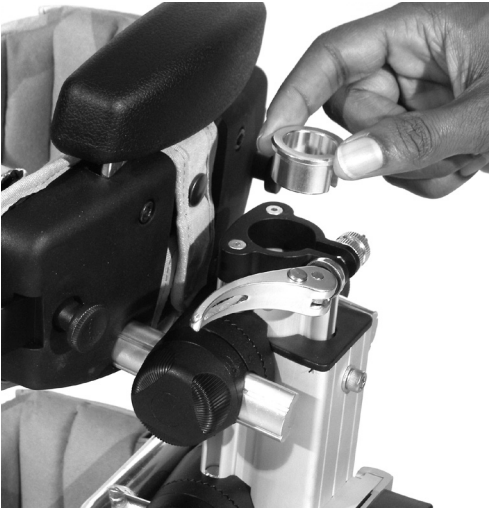

7.9 MOCOWANIE ŚRUB W SANDAŁACH


Przełożyć wymaganą śrubę mocującą **A** przez płytkę z otworem **B**. Nałożyć gumowe osłony **C** na wierzch i spód sandału. Przymocować przy użyciu czterech dostarczonych śrub **D**. Aby zdemonstrować lub wymienić śrubę mocującą, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

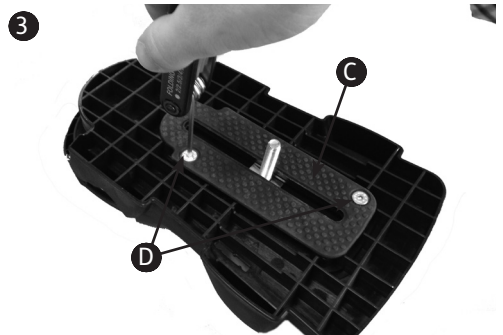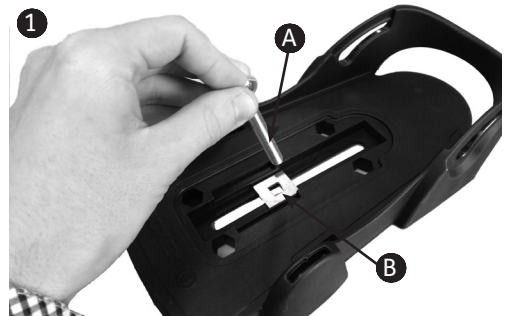

7.10 MOCOWANIE SANDAŁÓW

Umieścić sandał w taki sposób, aby śruba mocująca przechodziła przez otwór w podnóżku. Aby przymocować sandał, należy nałożyć na śrubę mocującą znajdującą się na spodzie podnóżka

gumową podkładkę **A**, a następnie metalową podkładkę **B** i pokrętkę **C**. Aby wyregulować pozycję sandałów, wystarczy poluzować pokrętkę **C** znajdującą się na spodzie podnóżka, wybrać wymagane położenie i ponownie przykręcić pokrętkę.

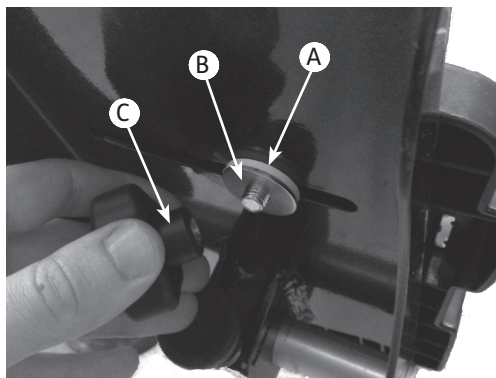

sztucznego. Ponownie zamocować pokrętkę po zewnętrznej stronie i dokręcić. Powtórzyć po drugiej stronie. Należy się upewnić, że poziome rurki są wyrównane względem siebie tak, aby pasowały do elementów mocujących wsporniki stolika.




7.11 MONTAŻ STOLIKA

Aby przymocować boczne podparcia do wsporników stolika, należy poluzować pokrętkę **A** i umieścić usztywnienie tak, aby było skierowane do wewnątrz i zazębiało się z elementem z tworzywa

7.12 MOCOWANIE OSŁONY STOLIKA

Aby zamocować osłonę stolika, należy nałożyć ją na blat i przypiąć za pomocą automatycznych zatrzasków. Aby zdjąć osłonę, należy opiąć ją od blatu.

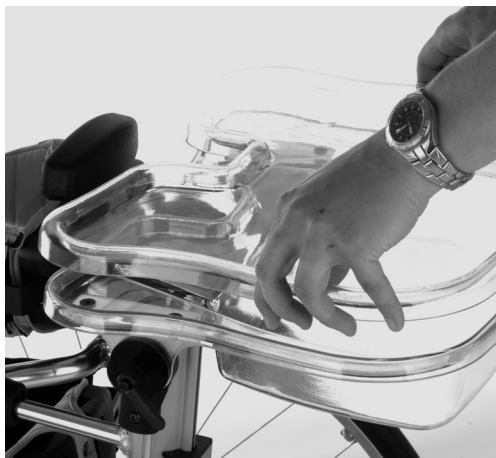

7.13 MOCOWANIE STOLIKA W POZYCJI ZE WSPARCIEM Z PRZODU I ZE WSPARCIEM Z TYŁU

Stolik mocuje się do pionizatora, wsuwając rurki we wsporniki mocujące. Po zamocowaniu stolika, należy dokręcić pokrętła. Wycięcie w stoliku powinno być zawsze skierowane w stronę dziecka. Aby zamocować stół w pozycji ze wsparciem z przodu, należy się upewnić, że rurki mocujące stół są wysunięte na maksymalną wysokość.



pozycja ze wsparciem
z przodu



pozycja ze wsparciem
z tyłu



Należy zawsze zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć dłoni lub przedramion dziecka podczas wsuwania stolika.

7.14 MOCOWANIE PORĘCZY


Aby przymocować poręcz, należy wsunąć wsporniki mocujące **D** w otwory w stoliku i przymocować przy użyciu pokrętki z tworzywa sztucznego **E**. Powtórzyć czynności po drugiej stronie, a następnie wsunąć rurki w elementy mocujące **D** i dokręcić pokrętło z tworzywa sztucznego **B**.



ROZDZIAŁ 8: MOCOWANIE PODUSZEK


8.1 PODUSZKA PIERSIOWA I PODUSZKA BIODROWA

Zamocować poduszkę pośrodku płyty podparcia klatki piersiowej/bioder. Przełożyć górny pasek materiału z przymocowanym zatrzaskiem nad górną częścią usztywnienia i zapiąć zatrzask. Przełożyć dolny pasek materiału pod podparciem i przypiąć górny pasek za pomocą rzepów.

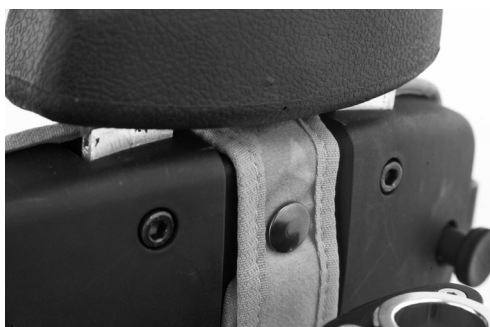

8.2 PELOTY BOCZNE

Aby zamocować wyściełane poduszki pelot bocznych, wystarczy nasunąć poduszki na peloty wyściełaną stroną do wewnątrz. Przełożyć sprzączkę z tworzywa sztucznego **A** przez otwór w pokrowcu. Następnie przeciągnąć dwa paski z rzepami wokół spodniej części usztywnienia i przypiąć je do panelu z rzepami w sposób przedstawiony na zdjęciu. Opuścić klapkę **B**.

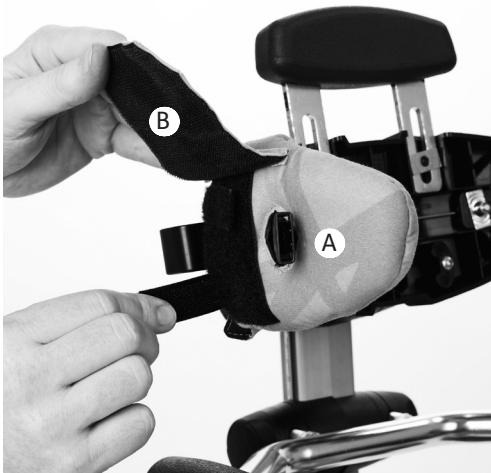

8.3 UPRZAŻ PODPIERAJĄCA KLATKĘ PIERSIOWĄ

Podparcie klatki piersiowej **A** można przymocować, wsuwając klamry męskie w klamry żeńskie po obu stronach pelot piersiowych.

8.4 UPRZAŻ BIODROWA

Aby zamocować uprząż biodrową, wystarczy nasunąć lewą i prawą stronę uprząży na peloty. Przełożyć sprzączki z tworzywa sztucznego przez otwory w uprząży. Następnie przeciągnąć paski z rzepami wokół spodniej części usztywnienia i przypiąć je do paneli z rzepami w sposób przedstawiony na zdjęciu.

Na koniec należy pociągnąć paski mocujące z rzepami i zapiąć uprząż wokół użytkownika.




W celu regulacji pozycji i dla zachowania bezpieczeństwa uprząż biodrowa musi być zawsze zamocowana, gdy używa się pionizatora.



8.5 UPRZĄŻ PODPIERAJĄC BIODRA

Podparcie bioder powinno być mocowane wokół upręży biodrowej jako dodatkowe zabezpieczenie, gdyby rzep na upręży biodrowej zaczął okazywać oznaki zużycia. Podparcie bioder można przymocować, wsuwając klamry męskie w klamry żeńskie na obu końcach upręży biodrowej.

Aby odpowiednio naciągnąć, należy podnieść przedni panel, wyregulować paski do wymaganej długości i ponownie założyć panel.

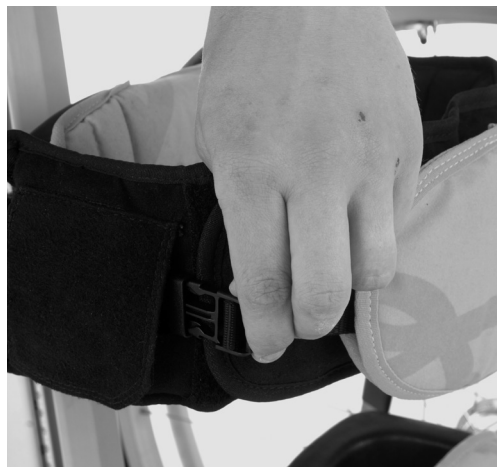

8.6 NAKOLANNIKI

Zamocować poduszki kolan, wsuwając klamry męskie w klamry żeńskie po obu stronach podparcia kolan i upewniając się, że otwór w przednim pokrowcu jest skierowany w dół, jak przedstawiono na zdjęciu.



8.7 WYŚCIEŁANA OSŁONKA PRĘTA GŁÓWNEGO

Należy nałożyć wyściełaną osłonkę na górny koniec pręta głównego ramy pionizatora, a następnie nałożyć pętlę z tworzywa sztucznego na pokrętła regulacyjne.



8.8 PODUSZKA PROFILOWANEGO ZAGŁÓWKA

Aby przymocować poduszkę zagłówek, należy umieścić ją na płycie zagłówek, a następnie zapiąć środkowy zatrzask i dwa górne zatrzaski. Wsunąć dolną klapkę pod płytę i zapiąć dwa pozostałe zatrzaski.



8.9 PŁASKI ZAGŁÓWEK

Aby przymocować poduszkę zagłówek, należy umieścić ją na płycie zagłówek, a następnie zapiąć środkowy zatrzask i dwa górne zatrzaski. Wsunąć dolną klapkę pod płytę i zapiąć dwa pozostałe zatrzaski.



8.10 PELOTY PŁASKIEGO ZAGŁÓWKA

Aby zamocować pokrowce pelot zagłówek, wystarczy nasunąć pokrowce na peloty wyścielaną stroną do wewnątrz. Następnie należy przeciągnąć dwa paski z rzepami wokół spodniej części usztywnienia i przypiąć je do panelu z rzepami w sposób przedstawiony na zdjęciu. Opuścić klapkę.



ROZDZIAŁ 09: USTAWIENIE KLINICZNE W CELU REGULACJI POSTAWY

Ustawienie kliniczne produktu powinno być wykonane przez osobę o odpowiedniej wiedzy technicznej i klinicznej, która przeszła wcześniej szkolenie w zakresie użytkowania produktu. Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru wszystkich ustawień klinicznych niniejszego produktu.

9.1 USTAWIANIE WYSOKOŚCI PODPARCIA KLATKI PIERSIOWEJ


Aby ustawić wysokość podparcia klatki piersiowej, należy najpierw umieścić dziecko na macie w pozycji leżącej. Zmierzyć odległość od stopy dziecka do punktu tuż poniżej dołu pachowego. Odległość od górnej części podparcia klatki piersiowej do podnóżka powinna być odpowiednio dostosowana.



Nie należy nigdy podejmować prób regulacji wysokości ramy głównej, gdy użytkownik znajduje się w pionizatorze.

9.2 REGULACJA CAŁKOWITEJ WYSOKOŚCI

Całkowitą wysokość ramy pionizatora można wyregulować poprzez poluzowanie śruby znajdującej się z tyłu ramy głównej przy użyciu narzędzia wielofunkcyjnego. Następnie należy przesunąć wewnętrzny pręt na wymaganą wysokość i ponownie dokręcić śrubę z łbem sześciokątnym. Na boku wewnętrznej ramy znajduje się pasek z oznaczeniami ułatwiającymi regulację i zapamiętanie wybranych pozycji podparcia. Ponadto na maksymalnej wysokości znajduje się blokada bezpieczeństwa.

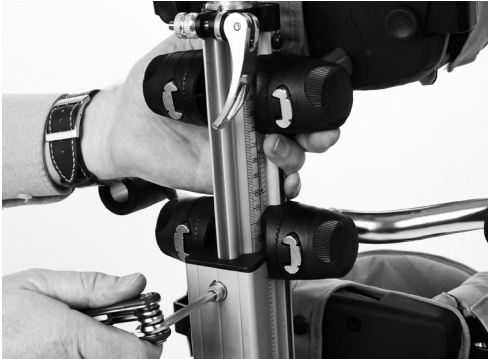

9.3 REGULACJA PODPARCIA KLATKI PIERSIOWEJ I BIODER

Aby wyregulować podparcie klatki piersiowej i bioder, należy obrócić jedno z pokręteł **A** zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a drugie pokrętło **B** — przeciwnie do ruchu wskazówek

zegara, jak ukazano na zdjęciu. Ustawić wymaganą pozycję i ponownie dokręcić. W przypadku podparcia klatki piersiowej można jedynie wyregulować kąt odchylenia i głębokość.



Należy zawsze zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców podczas regulowania podparcia klatki piersiowej i bioder.



9.4 PELOTY PIERSIOWE

Poluzować ręczne pokrętko **A** aby wyregulować szerokość pelot i ponownie przykręcić po ustawieniu wymaganej pozycji. Jeśli peloty mocuje się za pomocą śrub zamiast ręcznych pokręteł, można je wyregulować przy użyciu narzędzia wielofunkcyjnego.



Należy zawsze zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców podczas regulowania pelot.



9.6 UPRZĄŻ PODPIERAJĄCA KLATKĘ PIERSIOWĄ I BIODRA

Aby zmienić szerokość uprząży piersiowej, należy podnieść przedni pokrowiec, wyregulować pasy z rzepami, ustawić wymaganą szerokość i ponownie założyć pokrowiec.



Gdy uprząż piersiowa jest używana, należy zawsze upewnić się, że sprzączki z tworzywa sztucznego są odpowiednio zapięte.



9.5 REGULACJA UPRZĘŻY BIODROWEJ

Aby wyregulować uprząż biodrową, należy przeciągnąć paski mocujące z rzepami wokół użytkownika tak, aby ustawić wymaganą pozycję.





Należy zawsze zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców podczas regulowania poduszki pod mostek.



Gdy uprzęż piersiowa jest używana, należy zawsze upewnić się, że sprzączki z tworzywa sztucznego są odpowiednio zapięte.


9.7 REGULACJA PODUSZKI POD MOSTEK

Poduszkę pod mostek można podnieść, aby zapewnić dodatkowe podparcie w formie przedłużenia poparcia klatki piersiowej. W ten sposób można też obniżyć podparcie klatki piersiowej, aby zapewnić większą swobodę ruchów rąk. Aby wyregulować płytę podparcia mostka, należy poluzować dwie śruby z przodu płyty podparcia klatki piersiowej przy użyciu narzędzia wielofunkcyjnego, ustawić wymaganą wysokość i ponownie dokręcić.

9.8 REGULACJA WYSOKOŚCI, ELEMENTÓW PODPIERAJĄCYCH KOLANA

Pozycję każdego podparcia kolana można wyregulować niezależnie. Aby wyregulować wysokość, głębokość i kąt odchylenia podparcia kolana, należy poluzować pokrętko **(A)**, ustawić wymaganą wysokość, kąt odchylenia i głębokość i ponownie mocno dokręcić pokrętko.

Aby wyregulować szerokość podparcia kolana, należy poluzować pokrętko **(B)**, ustawić wymaganą szerokość i ponownie dokręcić.

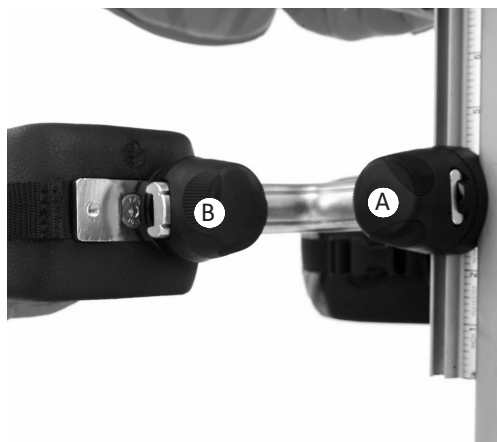

9.10 REGULACJA PROFILOWANEGO I PŁASKIEGO ZAGŁÓWKA

Zagłóвка powinno się używać wyłącznie, gdy dziecko znajduje się w pozycji ze wsparciem z tyłu. Aby wyregulować wysokość, głębokość i kąt odchylenia profilowanego zagłóвка, należy poluzować ręczne pokręćła A, ustawić wymaganą pozycję i ponownie dokręcić pokręćła.

9.9 NAKOLANNIKI


Aby wyregulować nakolanniki, należy podnieść przedni panel z materiału, wyregulować pas do wymaganej długości i ponownie zamocować panel.



Należy zawsze zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców podczas regulowania wysokości zagłóвка.



Drobne regulacje pozycji elementów podpierających kolana i podparcia bioder można wykonywać, gdy pionizator jest używany.

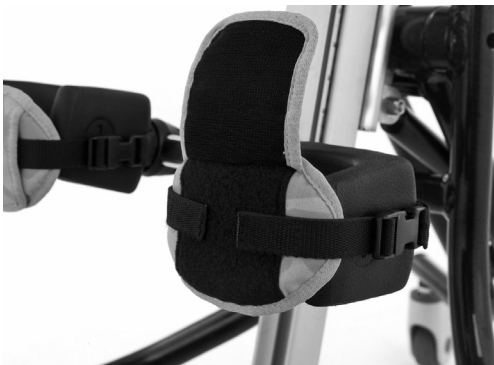

9.11 REGULACJA PELOT PŁASKIEGO ZAGŁÓWKA

Aby wyregulować szerokość pelot, należy poluzować pokrętło z tworzywa sztucznego **A**, ustawić peloty w odpowiedniej pozycji i mocno dokręcić.



! Jeśli dziecko nosi sandały lub lekkie obuwie, należy sprawdzić paski, aby upewnić się, że nylonowy materiał nie podrażnia skóry.



9.12 REGULACJA POZYCJI SANDAŁÓW

Aby wyregulować pozycję sandałów, wystarczy poluzować pokrętło **A** znajdujące się na spodzie podnóżka, wybrać wymagane położenie i ponownie przykręcić pokrętło. Aby ułożyć stopy użytkownika w sandałach, należy zapiąć załączone paski z rzepami tak, aby przytrzymały stopy w miejscu. Paski powinny się znajdować na zgięciu stopy i nad palcami. Przedni pasek można przepchnąć przez jeden z dwóch otworów po bokach sandałów, w zależności od rozmiaru stopy użytkownika **3**.



2



9.13 REGULACJA KĄTA ODCHYLENIA PODNOŻKA

Aby ustawić kąt odchylenia uwzględniający zgięcie podeszwy lub grzbietowe, wystarczy poluzować lub dokręcić śrubę z łbem sześciokątnym **B** i ustawić odpowiedni kąt.



9.14 ZMIANA KONFIGURACJI PRODUKTU — OD POZYCJI ZE WSPARCIEM Z TYŁU DO POZYCJI ZE WSPARCIEM Z PRZODU

Aby zmienić konfigurację pionizatora Squiggles z pozycji ze wsparciem z tyłu na pozycję ze wsparciem z przodu, wystarczy zdemontować zagłówek w sposób opisany w rozdziale „Mocowanie zagłówek” i zamocować stolik tak, aby wycięcie było skierowane w stronę dziecka. Poluzować sandały i odwrócić o 180°. Teraz można ustawić pionizator w pozycji ze wsparciem z przodu.



9.15 ZMIANA KONFIGURACJI PRODUKTU — OD POZYCJI ZE WSPARCIEM Z PRZODU DO POZYCJI ZE WSPARCIEM Z TYŁU

Aby zmienić konfigurację pionizatora Squiggles z pozycji ze wsparciem z przodu na pozycję ze wsparciem z tyłu, wystarczy zamocować zagłówek w sposób opisany w rozdziale „Mocowanie zagłówek” i zamocować stolik tak, aby wycięcie było skierowane w stronę dziecka. Poluzować sandały i odwrócić o 180°. Teraz można ustawić pionizator w pozycji ze wsparciem z tyłu.



9.16 REGULACJA WYSOKOŚCI STOLIKA W POZYCJI ZE WSPARCIEM Z PRZODU I ZE WSPARCIEM Z TYŁU

Pokręta regulacji wysokości stolika znajdują się po obu stronach pręta głównego. Obrócić jedno z pokręteł **A** zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a drugie pokrętło **B** — przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w sposób przedstawiony na zdjęciu, ustawić wymaganą wysokość i ponownie dokręcić.



9.17 REGULACJA GŁĘBOKOŚCI I KĄTA ODCHYLENIA STOLIKA

Poluzować pokrętła regulacyjne **C** po obu stronach, wsunąć rurki we wsporniki mocujące na wymaganą głębokość i ponownie dokręcić pokrętła. Aby wyregulować kąt odchylenia stolika, należy poluzować pokrętła **D** po obu stronach stolika, ustawić stolik pod wymaganym kątem i ponownie mocno dokręcić.



Nie należy nigdy używać stolika do manewrowania pionizatorem lub popychania go.

Na stoliku nie należy umieszczać przedmiotów rozgrzanych do temperatury wyższej niż 40°C.

Należy mieć na uwadze, że stolik jest przeznaczony wyłącznie dla użytkownika. Nie należy opierać się o stolik ani kłaść na nim żadnych przedmiotów cięższych niż 8 kg (17,6 funta).



ROZDZIAŁ 10: CZĘSTE REGULACJE ZWIĄZANE Z CODZIENNYM UŻYTKOWANIEM

(TERAPEUCI/ OPIEKUNOWIE/RODZICE)

Rodzicom i opiekunom powinno się zademonstrować, w jaki sposób należy przeprowadzać częste regulacje, a także powinno się zwrócić ich uwagę na konieczność przeprowadzania opisanych w rozdziale 6 kontroli bezpieczeństwa. Taką kontrolę przeprowadza osoba o odpowiedniej wiedzy technicznej i klinicznej, która przeszła wcześniej szkolenie w zakresie użytkowania produktu. Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru wszystkich rodziców i opiekunów, którzy zostali przeszkoleni w zakresie prawidłowego użytkowania niniejszego produktu.

10.1 PRZENOSZENIE DZIECKA Z PIONIZATORA I NA PIONIZATOR

Przed umieszczeniem dziecka w pionizatorze należy przeprowadzić codzienną kontrolę produktu w sposób opisany w rozdziale 12 niniejszej instrukcji użytkownika. Przed umieszczeniem dziecka w pionizatorze należy zablokować wszystkie



kółka samonastawne, upewniając się, że są skierowane na zewnątrz, aby zapewnić maksymalną stabilność produktu. Należy upewnić się, że paski uprząży piersiowej, uprząży biodrowej i sandałów są zwolnione i nie przeszkadzają w przeniesieniu dziecka.

Aby ułatwić umieszczenie dziecka w pionizatorze w pozycji ze wsparciem z tyłu, należy odchylić ramę pionizatora do pozycji maksymalnie poziomej. Ustawienie pozycji poduszek i pasków jest łatwiejsze, gdy dziecko leży na plecach.



Należy zawsze najpierw zapinać uprząż biodrową i uprząż piersiową.


10.2 UPRZĄŻ PIERSIOWA I UPRZĄŻ BIODROWA

Aby rozpiąć uprzęż piersiową lub biodrową, należy rozpiąć jedną sprzączkę i odsunąć uprzęż na bok, pozostawiając drugą sprzączkę zapiętą. Po umieszczeniu użytkownika w pionizatorze należy ponownie zapiąć sprzączki.



Należy zawsze najpierw zapinać uprzęż piersiową i uprzęż biodrową przed regulacją jakichkolwiek innych elementów.

Należy zawsze upewnić się, że sprzączki z tworzywa sztucznego są odpowiednio zapięte.

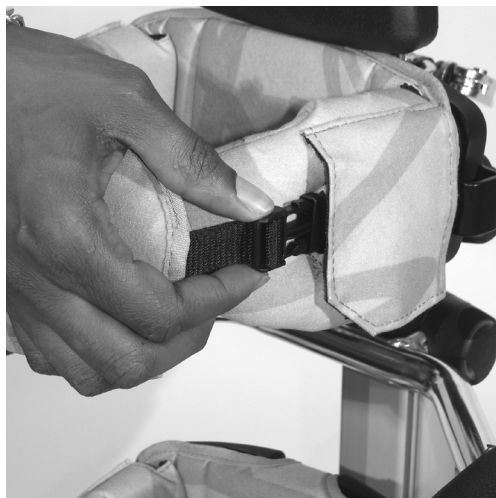

10.3 NAKOLANNIKI

Aby zdjąć nakolanniki, należy rozpiąć sprzączki po zewnętrznej stronie każdego z nakolanników i odsunąć je na bok, pozostawiając wewnętrzne sprzączki zapięte. Po umieszczeniu użytkownika w pionizatorze należy ponownie zapiąć sprzączki.



Należy zawsze upewnić się, że sprzączki z tworzywa sztucznego są odpowiednio zapięte.



10.4 SANDAŁY

Aby ułożyć stopy użytkownika w sandałach, należy zapiąć załączone paski z rzepami tak, aby przytrzymały stopy w miejscu. Paski powinny się znajdować na zgięciu stopy i nad palcami. Przedni

pasek można przepchnąć przez jeden z dwóch otworów po bokach sandałów, w zależności od rozmiaru stopy użytkownika ②.



Jeśli dziecko nosi sandały lub lekkie obuwie, należy sprawdzić paski, aby upewnić się, że nylonowy materiał nie podrażnia skóry.

1



2



10.5 REGULACJA WYSOKOŚCI STOLIKA W POZYCJI ZE WSPARCIEM Z PRZODU I ZE WSPARCIEM Z TYŁU

Pokręta regulacji wysokości stolika znajdują się po obu stronach pręta głównego. Obrócić jedno z pokręteł **A** zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a drugie pokrętko **B** — przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, ustawić wymaganą wysokość i ponownie dokręcić.



10.6 REGULACJA GŁĘBOKOŚCI I KĄTA ODCHYLENIA STOLIKA

Poluzować pokrętło regulacyjne **C** po obu stronach, wsunąć rurki we wsporniki mocujące na wymaganą głębokość i ponownie dokręcić pokrętła. Aby wyregulować kąt odchylenia stolika, należy poluzować pokrętła **D** po obu stronach stolika, ustawić stolik pod wymaganym kątem i ponownie mocno dokręcić.



Nie należy nigdy używać stolika do manewrowania pionizatorem lub popychania go.

Na stoliku nie należy umieszczać przedmiotów rozgrzanych do temperatury wyższej niż 40°C.


Należy mieć na uwadze, że stolik jest przeznaczony wyłącznie dla użytkownika. Nie należy opierać się o stolik ani kłaść na nim żadnych przedmiotów cięższych niż 8 kg (17,6 funta).



10.7 REGULACJA PORĘCZY

Aby wyregulować głębokość poręczy tak, aby dziecko mogło jej dosięgnąć, należy poluzować pokrętło **E**, ustawić wymaganą głębokość i ponownie dokręcić.

Aby wyregulować wysokość poręczy, należy poluzować pokrętło **F**, przesunąć poręcz na wymaganą wysokość i ponownie dokręcić.

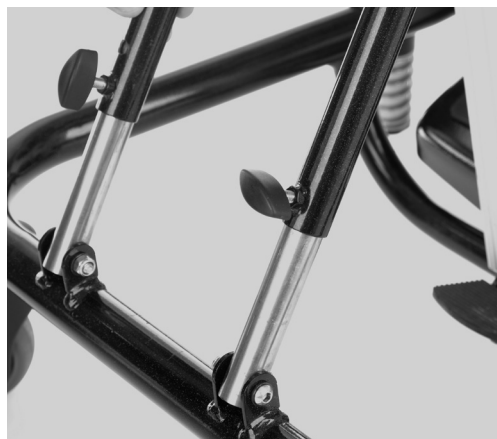

10.8 REGULACJA KĄTA ODCHYLENIA MOBILNEJ PODSTAWY

Aby wyregulować kąt odchylenia mobilnej podstawy, należy poluzować dwa pokrętła z tworzywa sztucznego. Nacisnąć zatrzask i ustawić wymagany kąt odchylenia. Po zablokowaniu zatrzasku ponownie mocno dokręcić pokrętła.

10.9 REGULACJA WYSOKOŚCI UKŁADU ZAWIESZENIA

W przypadku zakupu większego zestawu kół do mobilnego pionizatora należy wyregulować wysokość układu zawieszenia. Aby wyregulować wysokość, należy poluzować i wyjąć nakrętkę i śrubę z górnej części zawieszenia w pozycji pionowej, przesunąć pręt na wyższą

pozycję, ponownie zamocować śrubę i nakrętkę i mocno dokręcić. Powtórzyć tę czynność w przypadku drugiego koła.



10.10 UŻYCI HAMULCÓW


Aby zablokować hamulce mobilnej podstawy, należy przesunąć dźwignie w dół po obu stronach podstawy. Aby odblokować hamulce, należy przesunąć dźwignie w górę.



10.11 REGULACJA KĄTA ODCHYLENIA OBROTOWEJ PODSTAWY

Kąt odchylenia można regulować, gdy użytkownik znajduje się w pionizatorze. Należy upewnić się, że dziecko jest przypięte do pionizatora za pomocą poduszki piersiowej i poduszki biodrowej. Aby wyregulować kąt odchylenia pionizatora, należy najpierw zwolnić sworzeń blokujący. Aby zwolnić sworzeń, należy go pociągnąć i obrócić pokrętło z tworzywa sztucznego **A** o 90°, do pozycji zablokowanej.

Przesunąć dźwignię **B** w dół i ustawić pionizator pod wymaganym kątem. Należy zawsze pamiętać o ponownym zablokowaniu sworznia blokującego **A**.

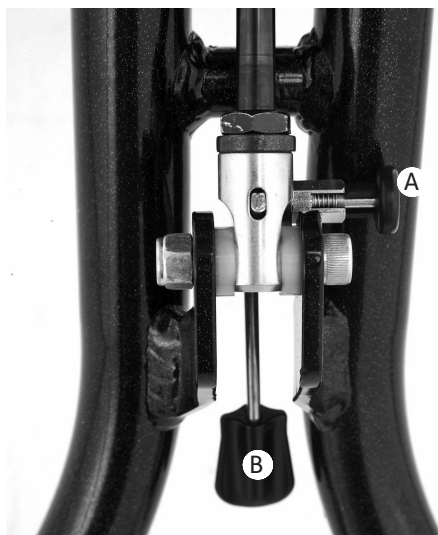



Kąt odchylenia obrotowej podstawy należy regulować w pewnym oddaleniu od mebli, aby użytkownik ani produkt nie uderzyli o nie.

10.12 REGULACJA KĄTA ODCHYLENIA NIERUCHOMEJ PODSTAWY

Aby wyregulować kąt odchylenia nieruchomej podstawy, należy poluzować dwa pokręta z tworzywa sztucznego **B**. Nacisnąć zatrzaski i wsunąć zewnętrzne rurki tak, aby znajdowały się pod wymaganym kątem, a następnie ponownie zablokować zatrzaski **C**. Na koniec należy ponownie mocno dokręcić pokrętła **B** z tworzywa sztucznego.



Nie należy regulować kąta odchylenia nieruchomej podstawy, gdy dziecko znajduje się w pionizatorze.



10.13 SKŁADANIE NIERUCHOMEJ PODSTAWY W CELU PRZECHOWYWANIA

Nieruchomą podstawę można złożyć na płasko, aby ułatwić jej przechowywanie. W tym celu należy zdjąć główną ramę pionizatora z podstawy. Ustawić zewnętrzną ramę pod minimalnym kątem i zablokować podpórkę przy użyciu środkowej blokady.



ROZDZIAŁ 11: INFORMACJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

Konserwacja

Zaleca się, aby do czyszczenia używać wyłącznie ciepłej wody i nieściernego środka czyszczącego. Nie należy nigdy używać rozpuszczalników organicznych ani środków do czyszczenia na sucho.

Obicia i tkaniny

1. Obicia i tkaniny można czyścić ręcznie, nie zdejmując ich z pionizatora. Zaleca się, aby do czyszczenia używać wyłącznie ciepłej wody i nieściernego środka czyszczącego.
2. Najlepszą metodą czyszczenia jest przetarcie najpierw mokrą, a następnie suchą ściereczką.
3. Plamy należy usuwać możliwie jak najszybciej przy użyciu ściereczki z materiału wchłaniającego wilgoć, ręczników lub gąbki. Czyszczenie zwykłą gąbką i wodą z mydłem jest skuteczne w przypadku zwykłych zabrudzeń i niewielkich plam rozlanych cieczy. Należy zachować ostrożność, aby zbytnio nie zamoczyć tkaniny, ponieważ mogłoby to skutkować rozlaniem się plamy.
4. W przypadku trudniejszych do usunięcia plam można użyć

antyseptycznych środków czyszczących. W takim przypadku konieczne może być użycie bezpiecznego rozpuszczalnika, takiego jak alkohol izopropylowy lub spirytus mineralny. Jako przydatnego środka dezynfekującego można również użyć pół kubka wybielacza na 5 litrów wody.

5. Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że produkt zdążył wyschnąć.

Elementy metalowe i elementy z tworzywa sztucznego

1. Do codziennego czyszczenia można użyć wody z mydłem lub sprayu antybakteryjnego.
2. Do dokładniejszego czyszczenia można użyć niskociśnieniowej myjki parowej.
3. Do czyszczenia elementów metalowych lub elementów z tworzywa sztucznego nie należy używać rozpuszczalników.
4. Przed użyciem należy upewnić się, że produkt zdążył wyschnąć.

ROZDZIAŁ 12: CODZIENNA KONTROLA PRODUKTU

(terapeuci, rodzice i opiekunowie)

Zaleca się, aby terapeuci, opiekunowie lub rodzice przeprowadzali codzienne kontrole wzrokowe sprzętu, aby upewnić się, że produkt jest bezpieczny w użyciu. Zalecane codzienne kontrole wymieniono poniżej.

1. Należy się upewnić, że wszystkie pokrętła regulacyjne i śruby znajdując się na swoich miejscach i są odpowiednio dokręcone.
2. Należy sprawdzić wszystkie obicia pod kątem zużycia.
3. Należy sprawdzić, czy wszystkie kółka samonastawne obracają się swobodnie i czy blokady działają.
4. Sprawdzić wszystkie rzepy i usunąć strzępki, aby upewnić się, że pasy się nie rozepną.



W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dalszego bezpiecznego użytkowania produktu firmy Leckey lub w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części należy zaprzestać dalszego użytkowania produktu i jak najszybciej skontaktować się z naszym Zespołem ds. Obsługi Klientów lub lokalnym przedstawicielem handlowym.

ROZDZIAŁ 13: COROCZNA KONTROLA PRODUKTU

(terapeuta, technik, specjalista ds. produktów firmy VIDA, przedstawiciel handlowy)

Firma Leckey zaleca, aby każdy produkt był poddawany szczegółowej kontroli co najmniej raz w roku i za każdym razem, gdy produkt jest wydawany do ponownego użytku. Taka kontrola powinna być przeprowadzana przez osobę o odpowiedniej wiedzy technicznej, która przeszła wcześniej szkolenie w zakresie użytkowania produktu, i powinna uwzględniać co najmniej czynności wymienione poniżej.

1. Sprawdzić, czy wszystkie pokrętła, nakrętki, śruby i klamry z tworzywa sztucznego są na swoich miejscach i uzupełnić wszelkie brakujące elementy. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące elementy:
 - Śruby blokujące zagłówek
 - Mechanizmy regulacji wysokości i kąta odchylenia podpór klatki piersiowej i bioder
 - Pokrętła regulacyjne i pasy elementów podpierających kolana
 - Mechanizm regulacji kąta odchylenia podnóżka

2. Sprawdzić, czy mechanizm składający podstawę i mechanizm regulacji kąta odchylenia podstawy funkcjonują prawidłowo. Ponadto należy sprawdzić, czy sworzeń blokujący na obrotowej lub nieruchomej podstawie odpowiednio blokuje pedał.
3. Unieść podstawę i sprawdzić poszczególne kółka samonastawne. Należy upewnić się, że gumowe kółka obracają się swobodnie i usunąć wszelkie zabrudzenia. Sprawdzić funkcjonowanie hamulców blokujących kółka.
4. Przeprowadzić kontrolę wzrokową konstrukcji produktu, zwracając uwagę na elementy spawane ramy, aby upewnić się, że nie są pęknięte ani zużyte.
5. Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru corocznych kontroli produktu.



W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dalszego bezpiecznego użytkowania produktu firmy Leckey lub w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części należy zaprzestać dalszego użytkowania produktu i jak najszybciej skontaktować się z naszym Zespołem ds. Obsługi Klientów lub lokalnym przedstawicielem handlowym.

13.1 Etykieta identyfikacyjna

Etykieta identyfikacyjną umieszczono na produkcie oraz instrukcji użytkownika. Składając reklamację lub zamówienie na części zamienne, należy podać następujące informacje:

- Numer seryjny
- Datę produkcji



	Nazwa/kod produktu
	Maksymalny ciężar
	Oznaczenie CE
	Instrukcja użytkownika
	Data produkcji
	Numer seryjny

ROZDZIAŁ 14: WYDAWANIE PRODUKTÓW FIRMY LECKEY DO PONOWNEGO UŻYTKU

Większość produktów firmy Leckey dopasowuje się do indywidualnych potrzeb użytkowników. Przed wydaniem produktu do ponownego użytku zaleca się, aby terapeuta przepisujący produkt przeprowadził kontrolę kompatybilności i upewnił się, że produkt wydawany do ponownego użytku jest odpowiedni dla nowego użytkownika i nie został w żaden sposób zmodyfikowany ani nie dołączono do niego żadnych dodatkowych elementów.

Przed wydaniem produktu do ponownego użytku należy przeprowadzić szczegółową kontrolę techniczną. Taka kontrola powinna być przeprowadzana przez osobę o odpowiedniej wiedzy technicznej, która przeszła wcześniej szkolenie w zakresie użytkowania i przeprowadzania przeglądu produktu. Wymagane czynności kontrolne wymieniono w rozdziale 13.

Należy się upewnić, że produkt został dokładnie wyczyszczony zgodnie z opisem w rozdziale 11 niniejszej instrukcji obsługi.

Należy się upewnić, że do produktu dołączono kopię instrukcji obsługi. Instrukcję można pobrać ze strony internetowej www.leckey.com.

Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru wszystkich kontroli produktu przeprowadzanych przed ponownym wydaniem go do użytku.



W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dalszego bezpiecznego użytkowania produktu firmy Leckey lub w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części należy zaprzestać dalszego użytkowania produktu i jak najszybciej skontaktować się z naszym Zespołem ds. Obsługi Klientów lub lokalnym przedstawicielem handlowym.

ROZDZIAŁ 15: SERWISOWANIE PRODUKTU

Przeglądy serwisowe wszystkich produktów firmy Leckey mogą przeprowadzać wyłącznie osoby o odpowiedniej wiedzy technicznej, które przeszły wcześniej szkolenie w zakresie użytkowania produktu.

Wszystkie międzynarodowe zapytania dotyczące serwisowania produktów powinny być kierowane do odpowiedniego dystrybutora firmy Leckey, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji. Więcej informacji o dystrybutorach firmy Leckey można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem www.leckey.com

ROZDZIAŁ 16: INFORMACJE TECHNICZNE

Kody produktów	i akcesoriów
118-600	Rama pionizatora
118-760	Pokrowce pionizatora – kolor zielony
118-761	Pokrowce pionizatora – kolor pomarańczowy
118-762	Pokrowce pionizatora – kolor niebieski
118-763	Pokrowce pionizatora – kolor różowy
Podstawa	
118-764	Obrotowa podstawa
118-765	Nieruchoma podstawa
129-600	Mobilna podstawa
1129-601	Mobilna podstawa z zawieszeniem
Akcesoria	
Gwiazdki przy kodach produktów oznaczają, że produkty te są dostępne w czterech opcjach kolorystycznych:	
01	kolor zielony
02	kolor pomarańczowy
03	kolor niebieski
04	kolor różowy
152-1600	Sandały, rozmiar 1
152-2600	Sandały, rozmiar 2
118-619	Stolik
117-769	Poręcz
118-697	Usztywnienie zagłówek
*137-699	Poduszka profilowanego zagłówek
Cushion - NEEDS TRANSLATION	
*120-792	Poduszka płaskiego zagłówek
*120-793	Peloty płaskiego zagłówek
Lateral Supports - NEEDS TRANSLATION	
*120-785	Zestaw płaskiego zagłówek
129-647 24"	całowe kółka [para]
129-646 27"	całowe kółka [para]
129-631	Układ zawieszenia
129-629	Przezroczysty stolik

Wymiary pionizatora Squiggles

Wiek [w przybliżeniu]	od 1 do 5 lat
Maksymalna waga użytkownika	22 kg / 48,4 funta
Wzrost użytkownika Min 730mm / 28.5 cala	Maks. 1100mm / 43.3 cala
Wysokość podparcia klatki piersiowej [odległość od podnóżka do pachy] Min 160mm / 6.25 cala	Maks. 820mm / 32 cala
Szerokość klatki piersiowej/bioder Min 160mm / 6.25 cala	Maks. 230mm / 9 cala
Wysokość podparcia bioder [odległość od podnóżka do połowy pośladków] Min 300mm / 11.8 cala	Maks. 530mm / 20.8 cala
Odstęp między kolanami Min 140mm / 5.5 cala	Maks. 215mm / 8.4 cala
Podnóżek Zgięcie podeszwy 10°	Zgięcie grzbietowe 10°
Ciężar mobilnej podstawy Min 6.1kg / 13.4kg	Bez zawieszenia i kół - 6.1kg Z zawieszeniem, ale bez kół - 8.4kg Z zawieszeniem i z - kołami 13.4kg
Wymiary mobilnej podstawy	Z kołami: 740mm x 740mm Bez kół: 490mm x 760mm
Regulacja kąta odchylenia obrotowej podstawy 90 - 160°	Regulacja kąta odchylenia obrotowej podstawy 90-70°
Wysokość stolika — w pozycji ze wsparciem z przodu Min 555mm / 21.9 cala	Maks. 825mm / 32.5 cala
Wysokość stolika — w pozycji ze wsparciem z tyłu Min 480mm / 18.5 cala	Maks. 825mm / 32.5 cala
Wymiary obrotowej podstawy [minimalne wymiary do przechowywania] Min 5.5kg / 12.1lbs	Szerokość 550mm / 21.7 cala Długość 700mm / 27.6 cala Wysokość 300mm / 11.8 cala
Nieruchoma podstawa Min 1.5kg / 3.3lbs	Szerokość 540mm / 21.3 cala Długość 690mm / 27.2 cala Wysokość 80mm / 2.5 cala
Standardowa rama pionizatora [minimalne wymiary do przechowywania] Min 7kg / 15.4lbs	Szerokość 380mm / 15.4 cala Długość 890mm / 26.8 cala Wysokość 380mm / 15.4 cala



James Leckey Design Ltd.
19 Ballinderry Road
Lisburn, BT28 2SA
Northern Ireland

(+44) 28 9260 0750
hello@leckey.com

leckey.com

