

LECKEY[®]

Fotelik multipozycyjny

Everyday Activity Seat 1, 2 & 3

Instrukcja użytkowania





Fotelik multipozycyjny to system siedziska dla osób o umiarkowanych potrzebach regulacji postawy, przeznaczony do użycia w domu i w szkole. Dostępne są trzy rozmiary o regulowanej wysokości, głębokości i szerokości fotelika, przeznaczone dla użytkowników w wieku od jednego roku do dorosłości. W niniejszej instrukcji wyjaśniono, w jaki sposób można szybko i łatwo skorzystać ze wszystkich funkcji. Przestrzeganie instrukcji dotyczących bezpiecznego użycia i konserwacji produktu gwarantuje długi okres użytkowania.

Spis treści

- 01 Przeznaczenie produktu
- 02 Deklaracja zgodności 03
- Warunki gwarancji
- 04 Historia produktu 05
- Szkolenie dotyczące korzystania z produktu
- 06 Informacje dotyczącego bezpiecznego użycia
- 07 Rozpakowywanie i montaż 08
- Mocowanie poduszek
- 09 Ustawienie kliniczne w celu regulacji postawy
- 10 Częste regulacje związane z codziennym użytkowaniem
- 11 Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji
- 12 Codzienna kontrola produktu
- 13 Coroczna kontrola produktu
- 14 Wydawanie produktów Leckey do ponownego użytku
- 15 Serwisowanie produktu
- 16 Informacje techniczne



1. Przeznaczenie produktu

Fotelik multipozycyjny, zaprojektowany z myślą o potrzebach dzieci z niepełnosprawnościami, jest dostępny w trzech rozmiarach. Rozmiar 1 jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat, rozmiar 2 — dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat, a rozmiar 3 — dla dzieci w wieku od 11 do 18 lat, przy czym maksymalna waga użytkownika to odpowiednio 30 kg (100 funtów), 50 kg (132 funty) i 100 kg (220 funtów).

2. Deklaracja zgodności

Firma James Leckey Design Ltd. jako producent oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że fotelik multipozycyjny firmy Leckey spełnia wymogi Wytycznych 93/42/EWG oraz normy EN12182: Wyroby pomocnicze dla osób niepełnosprawnych — wymagania ogólne i metody badań

3. Warunki gwarancji

Gwarancja obowiązuje wyłącznie, gdy produkt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, określonymi warunkami i wszystkimi zaleceniami producenta (patrz również: ogólne warunki sprzedaży, dostawy i płatności). Wszystkie produkty i części produktów firmy Leckey są objęte trzyletnią gwarancją.

4. Historia produktu

Niniejszy produkt firmy Leckey został sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy 1, w związku z czym powinien być przepisywany pacjentowi, ustawiany lub wydawany do ponownego użytku wyłącznie przez osobę o odpowiedniej wiedzy technicznej, która przeszła wcześniej szkolenie w zakresie jego obsługi. Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wszelkich

ustawień, kontroli przy wydawaniu do ponownego użytku oraz corocznych kontroli niniejszego produktu.

5. Dokumentacja dotycząca szkolenia w zakresie obsługi produktu (klienci i opiekunowie)

Niniejszy produkt firmy Leckey to przepisywane przez lekarza wyrób medyczny klasy 1, w związku z czym firma Leckey zaleca, aby osoba o odpowiedniej wiedzy technicznej zapoznała rodziców, nauczycieli i opiekunów używających wspomnianego wyrobu z następującymi rozdziałami niniejszej instrukcji użytkownika:

Rozdział 6

Informacje dotyczącego bezpiecznego użycia

Rozdział 9

Ustawienie kliniczne w celu regulacji postawy

Rozdział 10

Częste regulacje związane z codziennym użytkowaniem

Rozdział 11

Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji

Rozdział 12

Codzienna kontrola produktu

Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru osób, które zostały przeszkolone w zakresie prawidłowego użytkowania niniejszego produktu.

Nazwa i pieczęć dystrybutora

6 Informacje dotyczącego bezpiecznego użycia



6.1 Przed użyciem należy zawsze dokładnie przeczytać instrukcję.



6.2 Podczas korzystania ze sprzętu firmy Leckey użytkowników nie powinno się w żadnym wypadku pozostawiać bez opieki.



6.3 Razem z produktem należy używać wyłącznie elementów zatwierdzonych przez firmę Leckey. Nie należy w żaden sposób modyfikować produktu. Nieprzestrzeganie instrukcji może narazić użytkownika lub opiekuna na niebezpieczeństwo i będzie skutkowało unieważnieniem gwarancji.



6.4 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dalszego bezpiecznego użytkowania produktu lub w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części należy zaprzestać dalszego użytkowania produktu i jak najszybciej skontaktować się z naszym Zespołem ds. Obsługi Klientów lub lokalnym przedstawicielem handlowym.



6.5 Przed umieszczeniem użytkownika w foteliku należy wykonać wszystkie czynności regulacji pozycji i upewnić się, że wszystkie elementy są odpowiednio przymocowane.

Niektóre regulacje mogą wymagać użycia narzędzia dostarczanego z każdym produktem. Wszystkie narzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



6.6 Po umieszczeniu użytkownika w foteliku dla zachowania bezpieczeństwa należy zawsze najpierw zapiąć uprząż biodrową.



6.7 Po umieszczeniu produktu w stabilnej pozycji należy się upewnić, że wszystkie cztery kółka samonastawne są zablokowane i skierowane z dala od podstawy. Jest to szczególnie istotne, gdy używa się funkcji odchylenia przestrzennego i odchylenia oparcia.



6.8 Podczas korzystania z fotelika należy się upewnić, że pedał lub śruby regulacji wysokości oraz mechanizm odchylenia przestrzennego są zablokowane i nie mogą być przestawione przypadkowo, zwłaszcza jeśli w pobliżu przebywają dzieci.



6.9 Choć mobilność to istotna funkcja fotelika multipozycyjnego, nie jest on wózkiem, dlatego nie zaleca się przemieszczania fotelików z użytkownikami po nierównych powierzchniach. Podczas przenoszenia użytkownika z innego siedziska na fotelik należy zachować szczególną ostrożność.



6.10 Fotelik multipozycyjny nie był poddawany testom zderzeniowym, dlatego nie może być używany w pojazdach mechanicznych.



6.11 Nie należy nigdy używać produktu na powierzchni o pochyłości większej niż 5 stopni. Należy zawsze pamiętać o zablokowaniu wszystkich kółek samonastawnych.



6.12 Do manewrowania fotelikiem i przesuwania go na inne miejsce służy wyłącznie rączka do prowadzenia. Nie należy nigdy używać w tym celu stolika.



6.13 Produkt zawiera elementy, które stwarzają ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia przez małe dzieci. Należy zawsze upewnić się, że pokrętła i śruby blokujące znajdujące się w zasięgu dziecka są dokręcone i zabezpieczone.



6.14 Produkty firmy Leckey są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa przeciwpożarowego według normy EN12182. Jednakże produkt zawiera elementy z tworzywa sztucznego, a zatem powinien być przechowywany i użytkowany z dala od wszelkich bezpośrednich źródeł ciepła, w tym otwartego ognia, papierosów oraz grzejników elektrycznych i gazowych.



6.15 Nie należy nigdy umieszczać gorących przedmiotów na stoliku, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem tworzywa sztucznego.



6.16 Należy regularnie czyścić produkt. Nie należy używać ściernych środków czyszczących. Należy regularnie przeprowadzać konserwację, aby upewnić się, że produkt jest w dobrym stanie.



6.17 Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach, a nieużywany produkt powinien być przechowywany w suchym miejscu, niewystawionym na działanie wysokich temperatur. Bezpieczna temperatura użytkowania produktu mieści się w zakresie od +5° do +40° Celsjusza.

Rozpakowywanie i montaż

Sprawdzanie części

Gratulujemy zakupu fotelika multipozycyjnego. Wszystkie zamówione części zostaną dostarczone w polietylenowych opakowaniach z czytelnymi etykietami. Należy ostrożnie wyjąć je z pudełek i sprawdzić wszystkie zamówione części.



Polietylenowe opakowania należy trzymać z dala od dzieci.

Narzędzie wielofunkcyjne

Niektóre regulacje mogą wymagać użycia narzędzia uniwersalnego dostarczanego z każdym fotelikiem.



7.1 Mocowanie sandałów/Mocowanie pasków podnóżka (akcesorium do drewnianego podnóżka)

Aby przymocować sandały, wystarczy odkręcić pokrętło i podkładki sandałów. Umieścić sandał na podnóżku, przekładając śrubę przez otwór i ponownie zamocować podkładki i pokrętło. Powtórzyć czynności z drugiej strony.

Mocowanie pasków podnóżka (akcesorium do drewnianego podnóżka)

Dopasować paski podnóżka do stóp użytkownika i zaznaczyć na drewnianym podnóżku miejsca, w których powinny znajdować się otwory na paski. W zaznaczonych miejscach wywiercić 7 mm otwory na paski. Przymocować paski do drewnianego podnóżka, mocując zaślepkę gniazda, podkładkę i nakrętkę. Dokręcić, aby przymocować.

Regulowanie pasków podnóżka

Aby zdjąć wyścielane paski podnóżka, należy odpiąć rzepy. Aby zaciśnąć wyścielany pasek wokół stopy użytkownika, należy mocno pociągnąć za pasek i zapiąć rzepy.





7.2 Mocowanie podłokietników

Wsunąć podłokietnik we wspornik i przymocować na odpowiedniej wysokości poprzez dokręcenie pokrętła (a).




7.3 Mocowanie stolika

Aby przymocować szary, przezroczysty lub czarny stół, należy przełożyć rurki stoła przez środek podłokietników (a). Aby przymocować drewniany stół, należy wsunąć pojedynczą rurkę stoła w środek prawego lub lewego podłokietnika w zależności od wymaganej pozycji (b). Po zamocowaniu stoła (przezroczystego, czarnego, szarego lub drewnianego), należy mocno dokręcić pokrętkę (c).



7.4 Mocowanie pelot biodrowych

Wykręcić pokrętko (a) znajdujące się na spodzie siedziska. Nałożyć wspornik peloty biodrowej na śrubę (b). Ponownie zamocować i dokręcić pokrętko (c).

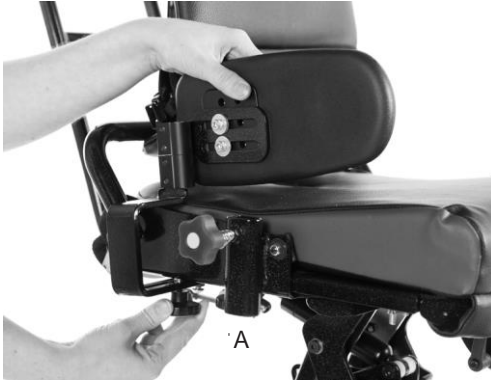

7.5 Mocowanie standardowych i odchylanych pelot piersiowych

Aby przymocować peloty piersiowe, należy wyrównać wspornik względem otworów w metalowym oparciu. Przełożyć dwie śruby z łbem sześciokątnym przez niewielką owalną płytkę oraz otwór w oparciu tak, aby wsunąć je w dwa przesuwane elementy osadzone we wsporniku, a następnie dokręcić.

Aby dodatkowo podwyższyć peloty, należy je zdemontować, odwrócić dołem do góry i przymocować lewą pelotę po prawej stronie oparcia, a prawą pelotę — po lewej.




7.6 Mocowanie wydłużonych poduszek pod ramiona

Aby przymocować wydłużone poduszki pod ramiona, należy wyrównać wspornik względem otworów w oparciu. Wsunąć dwie śruby z łbem sześciokątnym razem z podkładkami przez otwór w oparciu i przykręcić do wspornika wydłużonej poduszki.





7.7 Mocowanie poduszki udowej

Wsunąć wspornik poduszki udowej w zagłębienie, a następnie wsunąć pokrętko (a) i dokręcić.

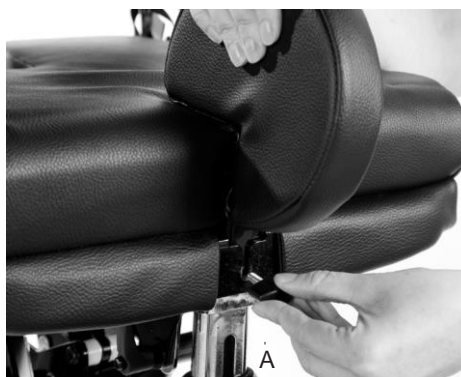

7.8 Mocowanie podnóżka

W przypadku rozmiarów 1 i 2 nasunąć podnóżek na rurkę kątową podpierającą łydkę (a) i dokręcić śrubę (b). W przypadku rozmiaru 3 nasunąć rurki podnóżka na rurki kątowe podpierające łydki (c) i dokręcić śruby na każdym podparciu łydki (d).

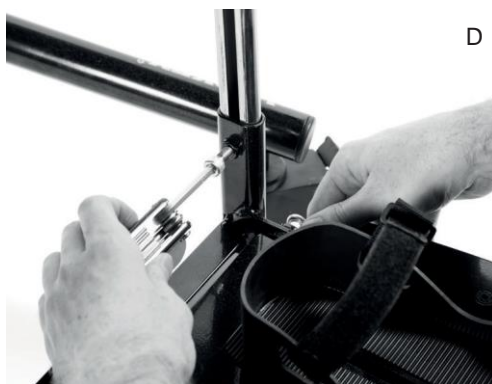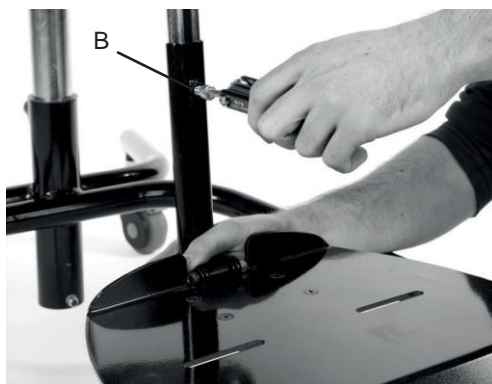

7.9. Mocowanie bocznych poduszek odwodzących

W przypadku rozmiaru 1 i 2 należy ustawić fotelik w pozycji maksymalnej głębokości i wykręcić pokrętko znajdujące się na spodzie siedziska. Nałożyć wspornik bocznej poduszki odwodzącej na śrubę (a), a następnie ponownie zamocować i dokręcić pokrętko (b).

W przypadku rozmiaru 3 należy ustawić fotelik w pozycji maksymalnej głębokości i wyrównać wspornik bocznej poduszki odwodzącej względem otworu w przedniej części siedziska. Przesunąć na wymaganą pozycję, wsunąć śrubę i mocno dokręcić (c).



7.10 Mocowanie upręży biodrowej

Otworzyć poszczególne sprzączki (a).
Przełożyć każdy z 4 pasków przez sprzączki i przeciągać dalej przez dodatkową klamrę zabezpieczającą triglide (b), a następnie zatrzasnąć sprzączkę (c).



7.11 Mocowanie wspornika zagłówka Mygo

Przełożyć śruby przez wspornik zagłówka Mygo i podkładkę. Wyrównać względem otworów w tylnej płytce i przepchnąć przez otwory.

Przymocować wszystkie końce śrubami i dokręcić.



7.12 Mocowanie pasa na łydki

Owinąć pas na łydki wokół dwóch prętów podpierających łydki. Wyrównać zatrzaski na rzepach i zamocować pas.



Po zamocowaniu przesunąć zatrzaski na tył podparcia łydek, aby chronić nogi użytkownika.




7.13 Mocowanie rączki do prowadzenia

W przypadku rozmiaru 1 rączka do prowadzenia jest mocowana do wsporników podstawy jezdnej poprzez wsunięcie dwóch dolnych końców w pasujące rurki w sposób przedstawiony na zdjęciu (a). W przypadku rozmiarów 2 i 3 rączka do prowadzenia jest mocowana do siedziska poprzez wsunięcie dwóch dolnych końców w pasujące rurki w sposób przedstawiony na zdjęciach (b i c).

Rączka do prowadzenia jest wyposażona w zatrzaski bezpieczeństwa, które należy nacisnąć przy wsuwaniu dolnych końców w rurki. Pchać dolne końce rączki, aż zatrzaski będą wystawać z drugiego końca rurek. W przypadku rozmiarów 1 i 2 zamocować rączkę poprzez dokręcenie śruby (d). W przypadku rozmiaru 3 zamocować rączkę poprzez dokręcenie pokręteł blokujących (e).

Należy regularnie sprawdzać, czy śruba/pokrętła blokujące są mocno dokręcone, w szczególności w sytuacji gdy produkt jest przesuwany wzdłuż korytarzy o nierównych lub pochyłych powierzchniach.



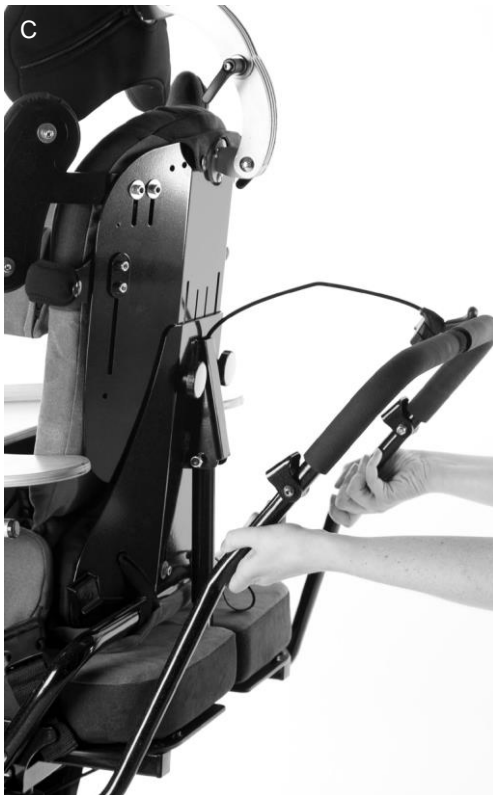


Mocowanie poduszek

8

8.1 Poduszka oparcia

Aby przymocować poduszkę oparcia, wystarczy nałożyć ją na oparcie i docisnąć, aby zapiąć zatrzaski w górnej części. Przypiąć do rzepu na oparciu. Następnie należy nałożyć na hak pętlę z elastycznego materiału. Krótszy kawałek elastycznego materiału służy do ustawiania niższej pozycji, a dłuższy — do ustawiania wyższej pozycji.

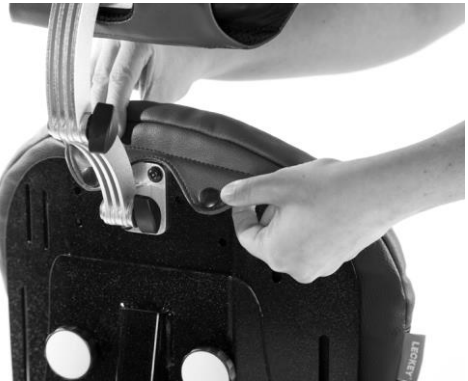

8.2 Poduszka siedziska

Aby przymocować poduszkę siedziska, wystarczy nałożyć ją na siedzisko, a następnie docisnąć, aby zapiąć zatrzaski (a) na spodzie. Następnie należy zawinąć pokrowiec pod spód siedziska i zapiąć zatrzaski (b). Fragmentu materiału pośrodku poduszki siedziska można użyć do przykrycia wspornika poduszki udowej, gdy poduszka udowa nie jest używana. Należy wyciągnąć tę część materiału spod poduszki siedziska i przymocować po obu stronach za pomocą rzepów. Gdy poduszka udowa jest używana, tę część materiału należy wsunąć pod siedzisko.



8.3 Pokrowce pelot piersiowych

Aby przymocować pokrowce pelot piersiowych, wystarczy nasunąć je na peloty tak, aby suwaki znajdowały się po zewnętrznej stronie. Przełożyć zaczep z tworzywa sztucznego przez otwór w pokrowcu (a), a następnie zapiąć suwaki znajdujące się z tyłu pokrowca (b).



8.4 Peloty biodrowe

Nasunąć pokrowce na peloty boczne tak, aby suwaki znajdowały się po zewnętrznej stronie (a). Zapiąć suwaki znajdujące się z tyłu pokrowca (b).



8.5 Pokrowiec wspornika peloty biodrowej

Nasunąć pokrowiec na wspornik tak, aby pokrywał mechanizm regulacji kąta, naciągnąć zapięcie na górną część mechanizmu regulacji kąta i zapiąć zatrzask.



8.6 Profilowany pokrowiec zagłówka

Aby zamocować pokrowiec, należy nałożyć go na zagłówek i zapiąć suwak.



8.7 Uprząż piersiowa

Uprząż piersiową można przymocować, wsuwając klamry męskie (a) w klamry żeńskie po obu stronach pelot piersiowych.



8.8 Mocowanie uprząży na tułów

Do uprząży na tułów są dołączone dwa regulowane pasy boczne, dwa regulowane pasy ramienne, cztery klamry (dwie z przymocowanymi nylonowymi paskami i dwie bez pasków), dwie śruby z łbem stożkowym płaskim, dwie śruby z łbem kulistym i cztery nakrętki blokujące. Przymocować pasy ramienne i pasy boczne w górnej (a) i dolnej (b) części oparcia przy użyciu klucza francuskiego i narzędzia wielofunkcyjnego. Następnie połączyć pasy ramienne (c) z dwoma klamrami w górnej części oparcia i dwoma klamrami po bokach.



8.9 Pokrowiec bocznej poduszki odwodzącej

Aby zamocować pokrowiec bocznej poduszki odwodzącej, należy nałożyć go na poduszkę i zapiąć suwak.



Ustawienie kliniczne w celu regulacji postawy

Ustawienie kliniczne produktu powinno być wykonane przez osobę o odpowiedniej wiedzy technicznej i klinicznej, która przeszła wcześniej szkolenie w zakresie użytkowania produktu. Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru wszystkich ustawień klinicznych niniejszego produktu.

Przed umieszczeniem dziecka w foteliku należy ustawić wysokość oparcia, głębokość fotelika i wysokość zagłówka. Ustawienia można dodatkowo skorygować, gdy dziecko znajduje się w foteliku.



9.1 Uprząż biodrowa

W celu wyregulowania uprząży po bokach, należy odpiąć sprzączki i, w zależności od potrzeb, albo pociągnąć paski, aby zacieśnić zapięcie, albo przepchnąć więcej materiału przez sprzączkę, aby poluzować zapięcie (a). Aby wyregulować środek uprząży, należy odczepić klamrę D-kształtną od rzepu i przepchnąć więcej materiału przez sprzączkę, aby poluzować pasek, lub pociągnąć za klamrę D-kształtną, aby zacisnąć pasek (b).




Należy upewnić się, że pasek został również przepchnięty przez klamrę triglide zabezpieczającą sprzączkę przed przypadkowym otwarciem.

9.2 Peloty biodrowe

Aby wyregulować szerokość pelot biodrowych, należy poluzować pokrętko (a), ustawić wymaganą szerokość i ponownie dokręcić.

Aby wyregulować głębokość, należy poluzować dwie śruby z łbem sześciokątnym (b) przy użyciu dostarczonego narzędzia wielofunkcyjnego, ustawić wymaganą głębokość i ponownie dokręcić śruby.

Kąt odchylenia pelot biodrowych można wyregulować poprzez poluzowanie śruby z łbem sześciokątnym (c), ustawienie wymaganego kąta i ponowne dokręcenie śruby.

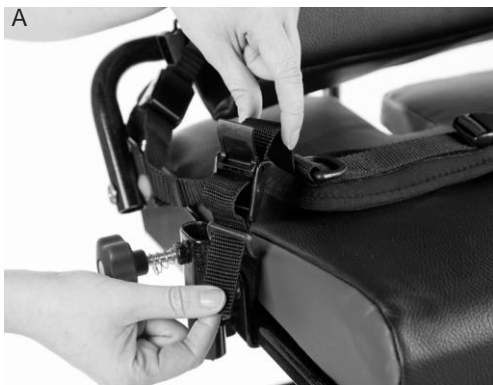

9.3 Wysokość oparcia

Ogólną wysokość oparcia można wyregulować poprzez poluzowanie dwóch pokręteł, a następnie dopasowanie wysokości oparcia do wysokości ramion użytkownika. Po ustawieniu wymaganej wysokości należy ponownie mocno dokręcić pokręta. Ustawienie wysokości można dodatkowo skorygować, gdy użytkownik znajduje się w foteliku. Podczas obniżania wysokości poduszka musi być naciągnięta wokół spodniej części oparcia i przymocowana do tylnej części oparcia przy użyciu rzepu i elastycznych pasków.



Przy ustawianiu minimalnej wysokości należy zachować ostrożność, aby palce nie zostały przytrzaśnięte między ruchomymi i nieruchomymi częściami.




9.4 Kąt nachylenia oparcia

Kąt nachylenia oparcia można zmienić poprzez poluzowanie śruby (a) przy użyciu narzędzia wielofunkcyjnego. Ustawić wymaganą pozycję i ponownie mocno dokręcić śrubę. Aby utrzymać wymaganą pozycję ciała dziecka, zawsze należy upewnić się, że oparcie zostało dokręcone pod odpowiednim kątem.

Kąt nachylenia oparcia można wyregulować, gdy dziecko znajduje się w foteliku, ale należy zawsze przytrzymać oparcie jedną ręką.




Należy zawsze upewnić się, że śruba jest dokręcona, aby uniknąć uszkodzenia ciała dziecka lub opiekuna.

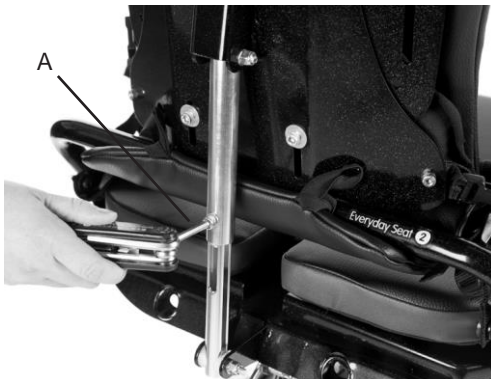

9.5 Głębokość fotelika

Aby wyregulować głębokość fotelika, wystarczy poluzować pokrętła (a) na spodzie siedziska, pociągnąć siedzisko do siebie do uzyskania wymaganej głębokości i mocno dokręcić pokrętła.


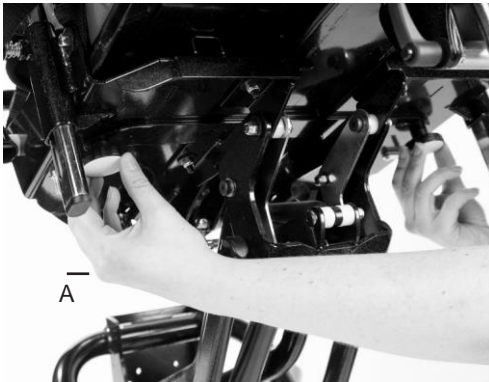


9.6 Wysokość podnóżka

Aby wyregulować wysokość podnóżka w przypadku rozmiarów 1 i 2, należy poluzować śrubę (a) w przedniej części rurki podpierającej łydkę, przesunąć podnóżek na wymaganą wysokość i ponownie dokręcić śrubę. W przypadku rozmiaru 3 należy poluzować śruby po bokach obu podpór łydek (b). Przesunąć podnóżek na wymaganą wysokość i ponownie dokręcić śrubę.



Należy zawsze sprawdzać, czy podnóżek jest odpowiednio przymocowany, aby użytkownik nie zsunął się na przednią część siedziska, co mogłoby stwarzać ryzyko uduszenia, jeśli uprząż piersiowa lub uprząż na tułów jest zamocowana.

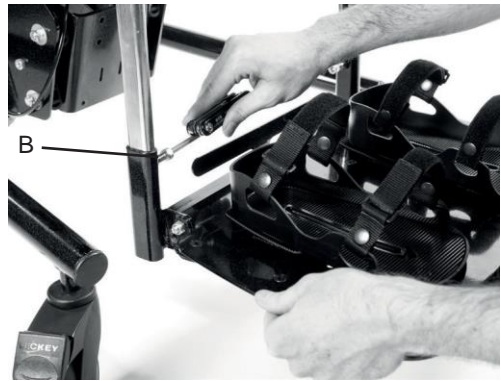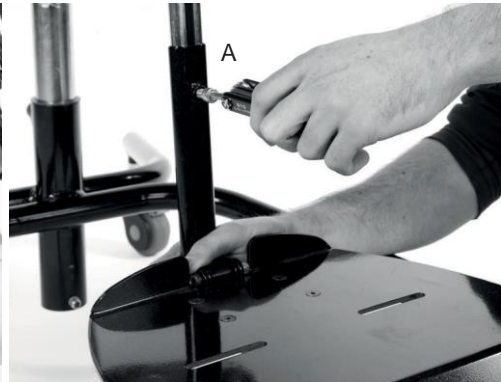

9.7 Kąt nachylenia podnóżka

Aby ustawić kąt nachylenia podnóżka w przypadku rozmiarów 1 i 2, należy poluzować uchwyt pozycjonujący (a), ustawić wymagany kąt nachylenia i ponownie przykręcić uchwyt. W przypadku rozmiaru 3 należy poluzować śrubę (b), ustawić wymagany kąt nachylenia i ponownie przykręcić śrubę.



Należy zawsze zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców podczas regulowania kąta nachylenia.



9.8 Podparcie krzyżowe

Aby wyregulować wysokość, należy poluzować śruby po obu stronach przy użyciu dostarczonego narzędzia wielofunkcyjnego. Ustawić prawidłową wysokość podparcia i ponownie dokręcić śruby.



Należy zawsze zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców podczas regulowania podparcia krzyżowego.



9.9 Peloty piersiowe

Poluzować śruby z łbem sześciokątnym (a), aby wyregulować szerokość, wysokość i kąt nachylenia pelot i ponownie przykręcić po ustawieniu wymaganej pozycji.

Aby zmienić ustawienie odchylanych pelot, należy użyć pokrętła (b).



9.10 Uprząż piersiowa

Aby zmienić szerokość uprząży piersiowej, należy podnieść przedni pokrowiec, wyregulować paski z rzepami do wymaganej szerokości i ponownie założyć pokrowiec.



9.11 Uprząż na tułów

Uprząż na tułów będzie otwarta, ale nadal będzie przypięta bocznymi zatrzaskami (a). Umieszczając dziecko w systemie siedziska, należy założyć uprząż na przednią część tułowia dziecka i przymocować, łącząc zatrzask ze sprzączką po drugiej stronie (b). Można regulować długość wszystkich łączonych pasków.

A



B



9.12 Sandały

Aby wyregulować pozycję sandałów, wystarczy poluzować pokrętko znajdujące się na spodzie podnóżka, ustawić wymagane położenie i ponownie przykręcić pokrętko. Aby odpowiednio ułożyć stopy użytkownika w sandałach, należy zapiąć załączone pasy z rzepami przytrzymujące kostki.



9.13 Mocowanie stabilizatorów kostek

Przeciągnąć nylonowy pasek przez otwór w sandale. Przeciągnąć koniec nylonowego paska z powrotem przez otwór, tworząc pętlę, a następnie przeciągnąć pasek przez dolną część klamry triglide. Przeciągnąć pasek nylonowy przez górną część klamry triglide. Na koniec, aby zablokować pasek, należy ponownie przeciągnąć go przez dolną część klamry triglide.

Skrócić pasek do wymaganej długości.



9.14 Podparcie ramienia

Aby wyregulować wysokość podparcia ramienia, należy poluzować śruby z łbem sześciokątnym, przesunąć wspornik podparcia ramienia na wymaganą wysokość i ponownie dokręcić śruby.



9.15 Zagłówek

Aby wyregulować wysokość i głębokość zagłówka, w przypadku rozmiarów 1 i 2 należy poluzować ręczne pokrętła (a) i przykręcić je ponownie po ustawieniu wymaganej pozycji. W przypadku rozmiaru 3 postępuje się w ten sam sposób, ale zamiast pokrętła, używa się uchwyty pozycjonującego (b). Nie należy zdejmować zagłówka, gdy użytkownik znajduje się w foteliku.



Nie należy nigdy używać zagłówka do wymuszania ułożenia głowy użytkownika.



Należy zawsze zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców podczas regulowania zagłówka.



9.16 Regulowanie podłokietnika

Aby wyregulować wysokość podłokietnika, należy poluzować pokrętkę (a), ustawić wymaganą wysokość i ponownie dokręcić. Aby wyregulować kąt nachylenia, należy obracać uchwyt pozycjonujący (b) do uzyskania wymaganej pozycji.



9.17 Regulowanie stolika

Wysokość i kąt nachylenia stolika można ustawić poprzez regulację podłokietników w sposób opisany w punkcie 9.16. Aby zdjąć stolik i wyregulować jego głębokość, należy poluzować pokrętkę (a) pod podłokietnikami, ustawić wymaganą pozycję i ponownie mocno przykręcić.



Należy zawsze zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć dłoni lub przedramion dziecka podczas wsuwania stolika.




Nie należy nigdy używać stolika do manewrowania fotelikiem lub popychania go.



Na stoliku nie należy umieszczać przedmiotów rozgrzanych do temperatury wyższej niż 40°C.



Należy mieć na uwadze, że stolik jest przeznaczony wyłącznie dla użytkownika. Nie należy opierać o stolik ani kłaść na nim żadnych przedmiotów cięższych niż 8 kg (17,6 funta).

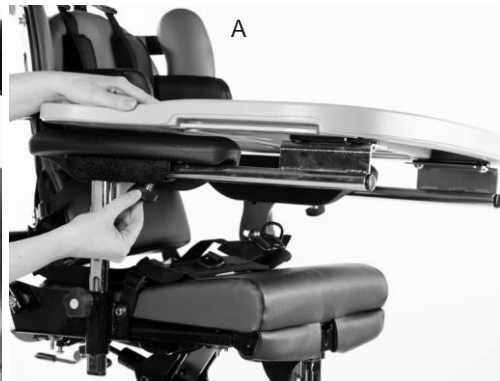

Częste regulacje związane z codziennym użytkowaniem (terapeuci/opiekuno wie/rodzice)

Rodzicom i opiekunom powinno się zademonstrować, w jaki sposób należy przeprowadzać częste regulacje, a także powinno się zwrócić ich uwagę na konieczność przeprowadzenia opisanej w rozdziale 6 kontroli bezpieczeństwa. Taką kontrolę przeprowadza osoba o odpowiedniej wiedzy technicznej i klinicznej, która przeszła wcześniej szkolenie w zakresie użytkowania produktu. Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru wszystkich rodziców i opiekunów, którzy zostali przeszkoleni w zakresie prawidłowego użytkowania niniejszego produktu.

10

101 Przenoszenie dziecka z fotelika i na fotelik

Przed przeniesieniem dziecka na fotelik należy przeprowadzić codzienną kontrolę produktu w sposób opisany w rozdziale 12 niniejszego podręcznika użytkownika.

Aby ułatwić przeniesienie dziecka na fotelik, należy odpowiednio wyregulować wysokość fotelika. Zablokować wszystkie kółka samonastawne tak, aby były skierowane na zewnątrz. Zapewnia to maksymalną stabilność produktu. Upewnić się, że klamra bezpieczeństwa na uprząży piersiowej jest zwolniona i nie przeszkadza w przeniesieniu dziecka na fotelik.

Jeśli fotelik jest wyposażony w odchylane peloty piersiowe, należy najpierw odchylić je tak, aby nie przeszkadzały. Odpiąć środkową sprzączkę uprząży biodrowej. Na koniec rozpiąć paski sandałów, jeśli są zamontowane. Po wykonywaniu powyższych czynności można przenieść dziecko na fotelik.

Po umieszczeniu dziecka w foteliku należy najpierw zapiąć uprząż biodrową przy użyciu środkowej sprzączki. Następnie należy ponownie zapiąć paski sandałów oraz wszystkie pozostałe uprząże i ponownie ustawić peloty piersiowe. Piersiowe.



Należy zawsze najpierw zapinać uprząż lub osłonę biodrową, a następnie pozostałe sprzączki lub uprząże. Wyregulować uprząż tak, aby dziecko nie mogło się zsunąć na przednią część siedziska.

102 Regulowanie uprząży biodrowej

W celu wyregulowania uprząży po bokach, należy odpiąć klamry i, w zależności od potrzeb, albo pociągnąć paski, aby zacieśnić zapięcie, albo przepchnąć więcej materiału przez sprzączkę, aby poluzować zapięcie (a). Aby wyregulować środek uprząży, należy odczepić klamrę D-kształtną od rzepu i przepchnąć więcej materiału przez sprzączkę, aby poluzować pasek, lub pociągnąć za klamrę D-kształtną, aby zacisnąć pasek (b).



Należy upewnić się, że pasek został również przepchnięty przez klamrę triglide zabezpieczającą sprzączkę przed przypadkowym otwarciem.



B



10.3 Regulowanie upręży piersiowej i upręży na tułów

Jeśli dziecko wymaga podparcia klatki piersiowej w ramach programu utrzymywania postawy, fotelik zostanie wyposażony w sztywne peloty boczne lub połączenie pelot, upręży piersiowej i upręży na tułów. Mogą one wymagać codziennej regulacji w celu dopasowania do różnych ubrań.

Należy zawsze skonsultować się z terapeutą w kwestii optymalnego umiejscowienia i naprężenia pasków oraz elementów podparcia dziecka.

Aby zmienić szerokość upręży piersiowej, należy podnieść przedni pokrowiec i wyregulować pasy z rzepami do wymaganej szerokości, a następnie ponownie założyć pokrowiec.

Szczegółowe instrukcje regulowania upręży na tułów można znaleźć w punkcie 9.11. Gdy uprząż piersiowa jest używana, należy zawsze upewnić się, że sprzączki z tworzywa sztucznego są całkowicie zapięte.



Sprawdzić, czy uprząż i peloty boczne są odpowiednio zamocowane, aby upewnić się, że dziecko jest bezpieczne i nie zsunie się na przednią część siedzenia, co mogłoby utrudnić oddychanie.



Jeśli dziecko jest ruchliwe lub miewa skurcze mięśni prostujących, po każdym skurczu należy sprawdzić, czy uprząż biodrowa jest zapięta, aby upewnić się, że dziecko jest bezpieczne



i nie zsunie się na przednią część siedzenia.

Należy zawsze zapinać środkową sprzączkę na upręży biodrowej przed regulacją jakichkolwiek innych elementów.



104 Podstawa jezdna

Fotelik multipozycyjny jest zaprojektowany w taki sposób, aby można go było zamocować na kilku rodzajach podstawy jezdnej.

Rozmiar 1 pasuje do standardowej podstawy jezdnej oraz podstawy jezdnej z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej.

Rozmiar 2 pasuje do standardowej podstawy jezdnej oraz podstaw jezdnych z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej i mechanizmu elektrycznego. Rozmiar 3

pasuje do standardowej podstawy jezdnej oraz podstawy jezdnej z regulacją wysokości za pomocą mechanizmu hydraulicznego. W

niniejszym podręczniku użytkownika przedstawiono prawidłowy, bezpieczny sposób użytkowania systemu siedziska z

wyżej wymienionymi podstawami jezdny. Kółka samonastawne podstawy jezdnej są wyposażone w blokady kierunkowe. Aby

użyć blokady, należy nacisnąć szary pedał. Po użyciu blokady kierunkowej fotelikiem można manewrować za pomocą tylnych kółek samonastawnych.

105 Regulacja wysokości — podstawa jezdna z regulacją wysokości

Wysokość można wyregulować, gdy użytkownik znajduje się w foteliku. Aby wyregulować wysokość podstawy jezdnej, należy nacisnąć pedał znajdujący się w jej tylnej części, jednocześnie trzymając rączkę do prowadzenia. Po zdjęciu stopy z pedału siedzisko zostanie ustawione

na wybranej wysokości. Dla bezpieczeństwa pedał regulacji wysokości na podstawie jezdnej można zablokować przy użyciu sworznia blokującego (a) znajdującego się po prawej stronie pedału. Aby odblokować sworznie i użyć pedału, należy pociągnąć sworznie i obrócić go o 90 stopni. Gdy podstawa jezdna nie jest regulowana, sworznie blokujący (a) powinien znajdować się w pozycji zablokowanej.

Przed użyciem pedału, należy odchylić go od fotelika.



Gdy podstawa jezdna nie jest regulowana, pedał powinien być zawsze zablokowany przy użyciu sworznia blokującego. Zapobiegnie to przypadkowemu naciśnięciu pedału.



10.6 Regulacja wysokości — standardowa podstawa jezdna



W przypadku dzieci o wadze powyżej 27 kg (60 funtów) zwiększenie wysokości podstawy jezdnej wymaga dwóch osób (zgodnie z brytyjskimi przepisami dotyczącymi podnoszenia ciężarów i manipulowania nimi).



Należy zawsze zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć dłoni podczas regulacji wysokości siedziska.



Wysokość standardowej podstawy jezdnej powinno się ustawiać przed umieszczeniem dziecka w foteliku. Aby wyregulować wysokość, należy poluzować uchwyt pozycjonujący (a) znajdujący się z tyłu pręta głównego i ustawić wymaganą wysokość siedziska. Aby obniżyć wysokość siedziska, należy obciążyć jego środek nad prętym głównym. Ponownie przykręcić uchwyt pozycjonujący.



Należy regularnie sprawdzać uchwyt pozycjonujący, aby upewnić się, że regulacja wysokości siedziska jest zabezpieczona.



Nie należy regulować wysokości, gdy dziecko znajduje się w foteliku.

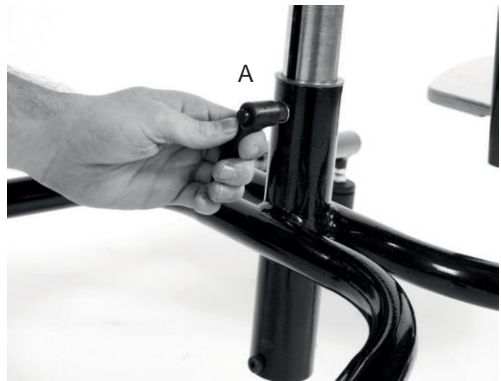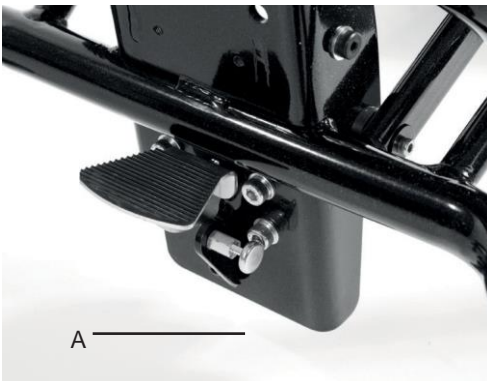

10.7 Regulacja wysokości — podstawa jezdna z hydrauliczną regulacją wysokości

Wysokość można wyregulować, gdy użytkownik znajduje się w foteliku. Aby wyregulować wysokość podstawy jezdnej, należy kilkakrotnie nacisnąć pedał z tyłu podstawy, jednocześnie trzymając rączkę do prowadzenia. Po zdjęciu stopy z pedału siedzisko zostanie ustawione na wybranej wysokości.

Przed użyciem pedału, należy odchylić go od fotelika.



10.8 Regulacja wysokości — podstawa jezdna z elektryczną regulacją wysokości

Wysokość można wyregulować, gdy użytkownik znajduje się w foteliku. Nacisnąć strzałkę w dół lub strzałkę w górę na pilocie, w zależności od wymaganej wysokości. Przytrzymać przycisk do uzyskania wymaganej wysokości. Po zwolnieniu przycisku fotelik zostanie ustawiony na wybranej wysokości.



10.9 Odchylanie przestrzenne

Mechanizmu odchylania przestrzennego można używać, gdy użytkownik znajduje się w foteliku. Przed regulacją kąta odchylenia mechanizmu odchylania przestrzennego fotelika należy zawsze upewnić się, że uprząż biodrowa jest zapięta, aby użytkownik nie zsunął się na przednią część siedziska.

Aby wyregulować kąt odchylenia, należy nacisnąć dźwignię znajdującą się pod siedziskiem. Po ustawieniu wymaganego kąta odchylenia wystarczy puścić dźwignię, a fotelik zostanie zablokowany w tej pozycji. Mechanizm odchylania przestrzennego powinien być odblokowywany, gdy użytkownik znajduje się w foteliku. Aby zablokować dźwignię, należy przekręcić sworzeń w prawo względem dźwigni tak, aby wskoczył na miejsce. Może to wymagać lekkiego uniesienia dźwigni.

Aby odblokować dźwignię, należy wyciągnąć sworzeń i obrócić go o 90 stopni.



Dźwignia odchylania przestrzennego powinna zawsze znajdować się w pozycji zablokowanej, aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu, co mogłoby skutkować szarpnięciem fotelika i uszkodzeniem ciała dziecka.



Mechanizm odchylania przestrzennego obsługuje się przy użyciu uchwytów.



Należy zawsze skonsultować się z terapeutą, aby upewnić się, że użycie mechanizmu odchylania przestrzennego nie spowoduje zablokowania dróg oddechowych dziecka.



Używając dźwigni, należy zawsze mocno trzymać uchwyt jedną ręką.

10.10 Sandały

Aby ułożyć stopy użytkownika w sandałach, należy zapiąć załączone paski z rzepami tak, aby przytrzymały stopy w miejscu. Paski powinny się znajdować na zgięciu stopy i nad palcami.



Jeśli dziecko nosi sandały lub lekkie obuwie, należy sprawdzić paski, aby upewnić się, że nylonowy materiał nie podrażnia skóry.

10.11 Regulowanie stolika

Stolik może pełnić wiele różnych funkcji, a jego pozycję można dokładnie wyregulować w zależności od potrzeb użytkownika i wykonywanych czynności, np. zabawy, uczenia się lub jedzenia. Aby przymocować szary, przezroczysty lub czarny stolik, należy przełożyć rurki stolika przez środek podłokietników. Aby przymocować drewniany stolik, należy wsunąć pojedynczą rurkę stolika w środek prawego lub lewego podłokietnika w zależności od wymaganej pozycji. Po zamocowaniu stolika (przezroczystego, czarnego, szarego lub drewnianego), należy mocno dokręcić pokrętko (a).

Wyregulować podłokietniki, aby ustawić wysokość i kąt nachylenia stolika.



Należy zawsze zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców podczas regulacji wysokości.



Należy zawsze zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć dłoni lub przedramion dziecka podczas wsuwania stolika.



Nie należy nigdy używać stolika do manewrowania fotelikiem lub popychania go.



Gdy użytkownik znajduje się w foteliku, podczas demontażu stolika należy zawsze przytrzymywać pojedynczą rurkę, dopóki stolik nie zostanie wysunięty na bezpieczną odległość od użytkownika i fotelika.

10.12 Regulowanie podłokietnika




Na stoliku nie należy umieszczać przedmiotów rozgrzanych do temperatury wyższej niż 40°C.




Należy mieć na uwadze, że stolik jest przeznaczony wyłącznie dla użytkownika. Nie należy opierać o stolik ani kłaść na nim żadnych przedmiotów cięższych niż 8 kg (17,6 funta).

Aby wyregulować wysokość podłokietnika, należy poluzować pokrętko (a), ustawić wymaganą wysokość i ponownie dokręcić. Aby wyregulować kąt nachylenia, należy obracać uchwyt pozycjonujący (b) do uzyskania wymaganej pozycji.

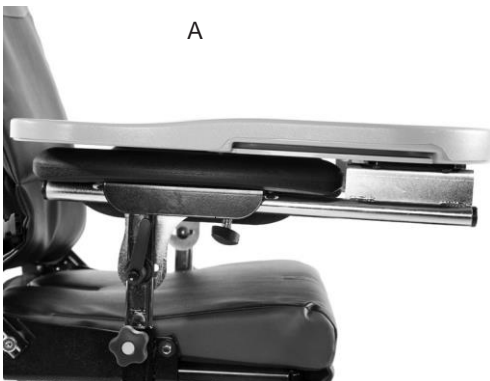

10.13 Korzystanie z odchylanego podnóżka

Aby unieść podnóżek, należy chwycić za jego przednią część i odchylić do góry (a). W pozycji maksymalnego odchylenia do góry sworzeń blokady zablokuje się automatycznie. Aby obniżyć podnóżek, należy wyciągnąć sworzeń blokujący (b) i pchnąć podnóżek w dół. Można również odblokować podnóżek i pozostawić go w pozycji odblokowanej. W tym celu po wyciągnięciu sworznia blokującego należy go przekręcić.

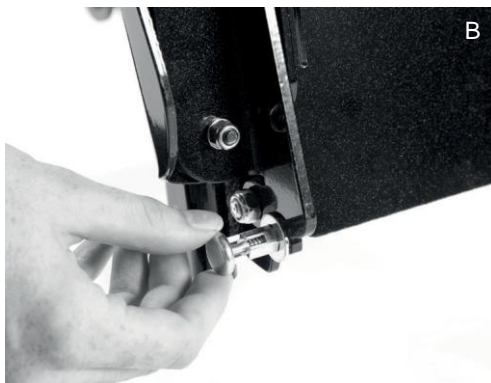

11 Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji

Konserwacja

Zaleca się, aby do czyszczenia używać wyłącznie ciepłej wody i nieściernego środka czyszczącego. Nie należy nigdy używać rozpuszczalników organicznych ani środków do czyszczenia na sucho.

Obicia i tkaniny

1. Pokrowce na poduszki wykonane z miękkiej tkaniny można zdjąć i wyprać w pralce w temperaturze 40°C, ale nie nadają się one do suszenia w suszarce bębnowej. Należy wyjąć piankowe wypełnienia z następujących pokrowców przed umieszczeniem ich w pralce:

Pokrowiec zagłówka
Pokrowiec poduszki oparcia
Pokrowiec poduszki siedziska

Wszystkie inne obicia z miękkiej tkaniny można umieścić w pralce w całości, po wyjęciu śrub i elementów mocujących.

Pokrowce poduszek wykonane z winylu można czyścić ściereczką zamoczoną w wodzie.

2. Obicia i tkaniny można również czyścić ręcznie, nie zdejmując ich z fotelika. Zaleca się, aby do czyszczenia używać wyłącznie ciepłej wody i nieściernego środka czyszczącego.

3. Plamy należy usuwać możliwe jak najszybciej przy użyciu ściereczki z materiału wchłaniającego wilgoć, ręczników lub gąbki. Czyszczenie zwykłą gąbką i wodą z mydłem jest skuteczne w przypadku zwykłych zabrudzeń i niewielkich plam rozlanych cieczy. Należy zachować ostrożność, aby zbytnio nie zamoczyć tkaniny, ponieważ mogłoby to skutkować rozlaniem się plamy.

4. W przypadku trudniejszych do usunięcia plam można użyć antyseptycznych środków czyszczących. W takim przypadku konieczne może być

użycie bezpiecznego rozpuszczalnika, takiego jak alkohol izopropylowy lub spirytus mineralny. Jako przydatnego środka dezynfekującego można również użyć pół kubka wybielacza na 5 litrów wody.

5. Uprząż biodrową i uprząż na tułów można prać w pralce w temperaturze 40°C. Najpierw należy jednak wyjąć wszystkie śruby i odczepić zapięcia, aby nie uszkodziły pralki. Należy umieścić je w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

6. Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że produkt zdążył wyschnąć.

Elementy metalowe i elementy z tworzywa sztucznego

1. Do codziennego czyszczenia można użyć wody z mydłem lub sprayu antybakteryjnego.

2. Do dokładniejszego czyszczenia można użyć niskociśnieniowej myjki parowej.

3. Do czyszczenia elementów metalowych lub elementów z tworzywa sztucznego nie należy używać rozpuszczalników.

4. Przed użyciem należy upewnić się, że produkt zdążył wyschnąć.

12 Codzienna kontrola produktu

(terapeuci, rodzice i opiekunowie)

Zaleca się, aby terapeuci, opiekunowie lub rodzice przeprowadzali codzienne kontrole wzrokowe sprzętu, aby upewnić się, że produkt jest bezpieczny w użyciu. Zalecane codzienne kontrole wymieniono poniżej.

1. Należy się upewnić, że wszystkie pokręta regulacyjne i śruby znajdują się na swoich miejscach i są odpowiednio dokręcone.
2. Należy sprawdzić wszystkie obicia i rzepey pod kątem zużycia.
3. Należy sprawdzić, czy wszystkie kółka samonastawne obracają się swobodnie i czy blokady działają.
4. Należy upewnić się, że rączka i sworzeń blokujący na ramie fotelika są całkowicie zablokowane, a fotelik jest odpowiednio przymocowany do podstawy jezdnej.
5. Należy upewnić się, że uprząż biodrowa jest odpowiednio zapięta wokół użytkownika tak, aby użytkownik nie zsunął się na przednią część siedziska.
6. Należy upewnić się, że podnózek jest odpowiednio przymocowany.



W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dalszego bezpiecznego użytkowania produktu firmy Leckey lub w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części należy zaprzestać dalszego użytkowania produktu i jak najszybciej skontaktować się z naszym Zespołem ds. Obsługi Klientów lub lokalnym przedstawicielem handlowym.

13 Coroczna kontrola produktu

(terapeuta, technik, specjalista ds. produktów firmy VIDA, przedstawiciel handlowy)

Firma Leckey zaleca, aby każdy produkt był poddawany szczegółowej kontroli co najmniej raz w roku i za każdym razem, gdy produkt jest wydawany do ponownego użytku. Taka kontrola powinna być przeprowadzana przez osobę o odpowiedniej wiedzy technicznej, która przeszła wcześniej szkolenie w zakresie użytkowania produktu, i powinna uwzględniać co najmniej czynności wymienione poniżej.

1. Sprawdzić, czy wszystkie uchwyty pozycjonujące, pokręta, nakrętki, śruby i klamry z tworzywa sztucznego są na swoich miejscach i uzupełnić wszelkie brakujące elementy. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące elementy:
 - > Śruby blokujące podgóówek.
 - > Śruby regulujące wysokość i kąt nachylenia oparcia.
 - > Śruby regulujące głębokość siedziska.
 - > Śruby mocujące uprząż biodrową/elementy pozycjonujące biodra.
 - > Mechanizm regulujący wysokość i kąt nachylenia podnóżka.

2. Sprawdzić, czy mechanizm regulujący wysokość podstawy jezdnej funkcjonuje prawidłowo. Jeśli wysokość podstawy jezdnej reguluje się za pomocą pedału, należy się upewnić, że wysokość fotelika nie ulega zmianie po zwolnieniu pedału. Należy również upewnić się, że sworzeń blokujący jest zablokowany, aby zapobiec przypadkowej zmianie wysokości podstawy jezdnej.

3. Wyregulować maksymalny zakres odchylenia przestrzennego fotelika i upewnić się, że dźwignia blokująca blokuje fotelik w różnych pozycjach w ustawionym zakresie kątów odchylenia.

4. Sprawdzić połączenie podstawy jezdnej i siedziska pod kątem zużycia metalowych elementów.

5. Unieść podstawę i sprawdzić poszczególne kółka samonastawne. Należy upewnić się, że gumowe kółka obracają się swobodnie i usunąć wszelkie zabrudzenia. Sprawdzić funkcjonowanie hamulców blokujących kółka.

6. Przeprowadzić kontrolę wzrokową konstrukcji produktu, zwracając uwagę na elementy spawane ramy, aby upewnić się, że nie są pęknięte ani zużyte.

7. Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru corocznych kontroli produktu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dalszego bezpiecznego użytkowania produktu firmy Leckey lub w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części należy zaprzestać dalszego użytkowania produktu i jak najszybciej skontaktować się z naszym Zespołem ds. Obsługi Klientów lub lokalnym przedstawicielem handlowym.

13.1 Etykieta identyfikacyjna

Etykieta identyfikacyjną umieszczono na produkcie oraz instrukcji użytkownika. Składając reklamację lub zamówienie na części zamienne, należy podać następujące informacje:

- Numer seryjny
- Datę produkcji



 Nazwa/kod produktu

 Maksymalny ciężar

 Oznaczenie CE

 Instrukcja użytkownika

 Data produkcji

 Numer seryjny

14 Wydawanie produktów Leckey do ponownego użytku

Większość produktów firmy Leckey dopasowuje się do indywidualnych potrzeb użytkowników. Przed wydaniem produktu do ponownego użytku zaleca się, aby terapeuta przepisujący produkt przeprowadził kontrolę kompatybilności i upewnił się, że produkt wydawany do ponownego użytku jest odpowiedni dla nowego użytkownika i nie został w żaden sposób zmodyfikowany ani nie dołączono do niego żadnych dodatkowych elementów.

Szczegółową kontrolę techniczną produktu powinno się przeprowadzić przed wydaniem do ponownego użytku. Taka kontrola powinna być przeprowadzana przez osobę o odpowiedniej wiedzy technicznej, która przeszła wcześniej szkolenie w zakresie użytkowania i przeprowadzania przeglądu produktu. Wymagane czynności kontrolne wymieniono w rozdziale 13.

Należy się upewnić, że produkt został dokładnie wyczyszczony zgodnie z opisem w rozdziale 11 niniejszej instrukcji obsługi.

Należy się upewnić, że do produktu dołączono kopię instrukcji obsługi. Instrukcję można pobrać ze strony internetowej www.leckey.com.

Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru wszystkich kontroli produktu przeprowadzanych przed ponownym wydaniem go

do użytku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dalszego bezpiecznego użytkowania produktu firmy Leckey lub w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części należy zaprzestać dalszego użytkowania produktu i jak najszybciej skontaktować się z naszym Zespołem ds. Obsługi Klientów lub lokalnym przedstawicielem handlowym.

15 Serwisowanie produktu

Przeglądy serwisowe wszystkich produktów firmy Leckey mogą przeprowadzać wyłącznie osoby o odpowiedniej wiedzy technicznej, które przeszły wcześniej szkolenie w zakresie użytkowania produktu.

Wszystkie międzynarodowe zapytania dotyczące serwisowania produktów powinny być kierowane do odpowiedniego dystrybutora firmy Leckey, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji. Więcej informacji o dystrybutorach firmy Leckey można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem www.leckey.com.

16 Informacje techniczne

Rozmiar	1		2		3	
	mm/kg	cale/funty	mm/kg	cale/funty	mm/kg	cale/funty
Maksymalne obciążenie	30 kg	66 funtów	50 kg	110 funtów	100 kg	220 funtów
Ciężar — fotelik i standardowa podstawa jezdna	22,5 kg	50 funtów	27 kg	60 funtów	35,9 kg	79 funtów
Ciężar — fotelik i podstawa jezdna z regulacją wysokości	29,5 kg	65 funtów	34 kg	75 funtów	49 kg	108 funtów
Wysokość fotelika — standardowa podstawa jezdna	450–600	17,7–23,6	450–600	17,7–23,6	450–600	17,7–23,6
Wysokość fotelika — podstawa jezdna z regulacją wysokości	250–600	9,8–23,6	320–600	12,6–23,6	450–600	17,7–23,6
Szerokość fotelika	160–280	6,3–11	260–380	10,2–15	340–500	13,4–19,7
Głębokość fotelika	150–280	5,9–11	230–380	9–15	330–480	13–18,9
Odstęp między pelotami piersiowymi	150–220	5,9–8,7	170–240	6,7–9,4	240–370	9,4–14,6
Wysokość oparcia	300–400	11,8–15,7	400–520	15,7–20,5	450–630	17,7–24,8
Kąt nachylenia oparcia	30° w tył 10° w przód		30° w tył 10° w przód		30° w tył 10° w przód	
Wysokość podłokietników	150–250	5,9–9,8	200–300	7,9–11,8	180–325	7–12,7
Długość elementów podpierających tydki	150–250	5,9–9,8	250–450	9,8–17,7	250–450	9,8–17,7
Kąt nachylenia elementów podpierających tydki	od -10° do +50°		od -10° do +50°		od -10° do +50°	
Kąt nachylenia podnóżka	od -15° do +10°		od -15° do +10°		od -15° do +10°	
Odchylenie przestrzenne	30° w tył i 10° w przód		30° w tył i 10° w przód		30° w tył i 10° w przód	

Wszystkie międzynarodowe zapytania dotyczące serwisowania produktów powinny być kierowane do odpowiedniego dystrybutora firmy Leckey, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji. Więcej informacji o dystrybutorach firmy Leckey można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Akcesoria

PODSTAWA JEZDNA

- | | |
|----------|---|
| 151-6100 | Siedzisko, oparcie i standardowa podstawa jezdna ze sprężyną gazową i 100 mm kółkami samonastawnymi, rozmiar 1 — kolor czarny |
| 151-6200 | Siedzisko, oparcie i standardowa podstawa jezdna ze sprężyną gazową i 100 mm kółkami samonastawnymi, rozmiar 2 — kolor czarny |
| 151-6300 | Siedzisko, oparcie i standardowa podstawa jezdna ze sprężyną gazową i 100 mm kółkami samonastawnymi, rozmiar 3 — kolor czarny |
| 151-6101 | Siedzisko, oparcie i standardowa podstawa jezdna ze sprężyną gazową i 100 mm kółkami samonastawnymi, rozmiar 1 — kolor biały |
| 151-6201 | Siedzisko, oparcie i standardowa podstawa jezdna ze sprężyną gazową i 100 mm kółkami samonastawnymi, rozmiar 2 — kolor biały |
| 151-6301 | Siedzisko, oparcie i standardowa podstawa jezdna ze sprężyną gazową i 100 mm kółkami samonastawnymi, rozmiar 3 — kolor biały |
| 151-6102 | Siedzisko, oparcie i podstawa jezdna z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej i 100 mm kółkami samonastawnymi, rozmiar 1 — kolor czarny |
| 151-6202 | Siedzisko, oparcie i podstawa jezdna z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej i 100 mm kółkami samonastawnymi, rozmiar 2 — kolor czarny |
| 151-6103 | Siedzisko, oparcie i podstawa jezdna z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej i 100 mm kółkami samonastawnymi, rozmiar 1 — kolor biały |
| 151-6203 | Siedzisko, oparcie i podstawa jezdna z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej i 100 mm kółkami samonastawnymi, rozmiar 2 — kolor biały |
| 151-6204 | Siedzisko, oparcie i podstawa jezdna z elektryczną regulacją wysokości i 100 mm kółkami samonastawnymi, rozmiar 2 — kolor czarny |
| 151-6205 | Siedzisko, oparcie i podstawa jezdna z elektryczną regulacją wysokości i 100 mm kółkami samonastawnymi, rozmiar 2 — kolor biały |
| 151-6302 | Siedzisko, oparcie i podstawa jezdna z hydrauliczną regulacją wysokości i 125 mm kółkami samonastawnymi, rozmiar 3 — kolor czarny |
| 151-6303 | Siedzisko, oparcie i podstawa jezdna z hydrauliczną regulacją wysokości i 125 mm kółkami samonastawnymi, rozmiar 3 — kolor biały |

ZESTAWY POKROWCÓW

151-6104-01	Poduszki i pokrowce, rozmiar 1 — zielone siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)
151-6104-03	Poduszki i pokrowce, rozmiar 1 — niebieskie siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)
151-6104-04	Poduszki i pokrowce, rozmiar 1 — malinowe siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)
151-6104-05	Poduszki i pokrowce, rozmiar 1 — ciemnoszare siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)
151-6104-01VIN	Poduszki i pokrowce, rozmiar 1 — zielone siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)
151-6104-03VIN	Poduszki i pokrowce, rozmiar 1 — niebieskie siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)
151-6104-04VIN	Poduszki i pokrowce, rozmiar 1 — malinowe siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)
151-6104-07VIN	Poduszki i pokrowce, rozmiar 1 — czarne siedzisko (z piankowym podkładkami krzyżowymi)
151-6206-01	Poduszki i pokrowce, rozmiar 2 — zielone siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)
151-6206-03	Poduszki i pokrowce, rozmiar 2 — niebieskie siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)
151-6206-04	Poduszki i pokrowce, rozmiar 2 — malinowe siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)
151-6206-05	Poduszki i pokrowce, rozmiar 2 — ciemnoszare siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)
151-6206-01VIN	Poduszki i pokrowce, rozmiar 2 — zielone siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)
151-6206-03VIN	Poduszki i pokrowce, rozmiar 2 — niebieskie siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)
151-6206-04VIN	Poduszki i pokrowce, rozmiar 2 — malinowe siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)
151-6206-07VIN	Poduszki i pokrowce, rozmiar 2 — czarne siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)
151-6304-01	Poduszki i pokrowce, rozmiar 3 — zielone siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)
151-6304-03	Poduszki i pokrowce, rozmiar 3 — niebieskie siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)
151-6304-04	Poduszki i pokrowce, rozmiar 3 — malinowe siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)
151-6304-05	Poduszki i pokrowce, rozmiar 3 — ciemnoszare siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)
151-6304-01VIN	Poduszki i pokrowce, rozmiar 3 — zielone siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)
151-6304-03VIN	Poduszki i pokrowce, rozmiar 3 — niebieskie siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)
151-6304-04VIN	Poduszki i pokrowce, rozmiar 3 — malinowe siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)
151-6304-07VIN	Poduszki i pokrowce, rozmiar 3 — czarne siedzisko (z piankowymi podkładkami krzyżowymi)

AKCESORIA ZAGŁÓWKA

- 151-3751-05 Profilowany zagłówek, rozmiar 3 (czarny neopren)
- 151-6208-05 Płaski zagłówek i pokrowiec, rozmiar 1/2 — kolor ciemnoszary (dostępne wyłącznie z zestawami poduszek 01, 03 i 04)
- 151-6208-06 Płaski zagłówek i pokrowiec, rozmiar 1/2 — kolor jasnoszary (dostępne wyłącznie z zestawem poduszek 05)
- 151-6208-05VIN Płaski zagłówek i pokrowiec, rozmiar 1/2 — kolor ciemnoszary (dostępne wyłącznie z zestawami poduszek 01VIN, 07VIN i 04VIN)
- 151-6208-07VIN Płaski zagłówek i pokrowiec, rozmiar 1/2 — kolor czarny (dostępne wyłącznie z zestawem poduszek 03VIN)
- 151-6209-05 Płaski zagłówek z pelotami bocznymi i pokrowiec — kolor ciemnoszary (dostępne wyłącznie z zestawami poduszek 01, 03 i 04)
- 151-6209-06 Płaski zagłówek z pelotami bocznymi i pokrowiec — kolor jasnoszary (dostępne wyłącznie z zestawem poduszek 05)
- 151-6209-05VIN Płaski zagłówek z pelotami bocznymi i pokrowiec — kolor ciemnoszary (dostępne wyłącznie z zestawami poduszek 01VIN, 07VIN i 04VIN)
- 151-6209-07VIN Płaski zagłówek z pelotami bocznymi i pokrowiec — kolor czarny (dostępne wyłącznie z zestawem poduszek 03VIN)
- 151-1756 Wspornik do mocowania zagłówek Mygo

AKCESORIA PODPARCIA KLATKI PIERSIOWEJ

- 151-6106-01 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (zielony pokrowiec), czarna metalowa rama
- 151-6106-03 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (niebieski pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6106-04 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6106-05 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (ciemnoszary pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6106-01VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (zielony pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6106-03VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (niebieski pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6106-04VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6106-07VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (czarny pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6107-01 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (zielony pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6107-03 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (niebieski pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6107-04 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (malinowy pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6107-05 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (ciemnoszary pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6107-01VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (zielony pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6107-03VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (niebieski pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6107-04VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (malinowy pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6107-07VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (czarny pokrowiec) — biała metalowa rama

- 151-6210-01 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (zielony pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6210-03 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (niebieski pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6210-04 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6210-05 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (ciemnoszary pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6210-01VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (zielony pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6210-03VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (niebieski pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6210-04VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6210-07VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (czarny pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6211-01 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (zielony pokrowiec), biała metalowa rama
- 151-6211-03 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (niebieski pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6211-04 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (malinowy pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6211-05 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (ciemnoszary pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6211-01VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (zielony pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6211-03VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (niebieski pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6211-04VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (malinowy pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6211-07VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (czarny pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6306-01 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (zielony pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6306-03 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (niebieski pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6306-04 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6306-05 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar (ciemnoszary pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6306-01VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (zielony pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6306-03VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (niebieski pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6306-04VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6306-07VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (czarny pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6307-01 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (zielony pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6307-03 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (niebieski pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6307-04 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (malinowy pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6307-05 Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (ciemnoszary pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6307-01VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (zielony pokrowiec) — biała metalowa rama

- 151-6307-03VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (niebieski pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6307-04VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (malinowy pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6307-07VIN Para sztywnych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (czarny pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6108-01 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (zielony pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6108-03 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (niebieski pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6108-04 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6108-05 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (ciemnoszary pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6108-01VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (zielony pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6108-03VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (niebieski pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6108-04VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6108-07VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu — rozmiar 1 (czarny pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6109-01 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (zielony pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6109-03 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (niebieski pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6109-04 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (malinowy pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6109-05 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (ciemnoszary pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6109-01VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (zielony pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6109-03VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (niebieski pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6109-04VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (malinowy pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6109-07VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 1 (czarny pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6212-01 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (zielony pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6212-03 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (niebieski pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6212-041 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6212-05 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (ciemnoszary pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6212-01VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (zielony pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6212-03VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (niebieski pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6212-04VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6212-07VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (czarny pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6213-01 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (zielony pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6213-03 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (niebieski pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6213-04 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (malinowy

- 151-6213-05 pokrowiec), biała metalowa rama
Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (ciemnoszary pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6213-01VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (zielony pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6213-03VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (niebieski pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6213-04VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (malinowy pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6213-07VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 2 (czarny pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6308-01 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (zielony pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6308-03 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (niebieski pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6308-04 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6308-05 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (ciemnoszary pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6308-01VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (zielony pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6308-03VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (niebieski pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6308-04VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6308-07VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (czarny pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6309-01 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (zielony pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6309-03 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (niebieski pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6309-04 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (malinowy pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6309-05 Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (ciemnoszary pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6309-01VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (zielony pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6309-03VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (niebieski pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6309-04VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (malinowy pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6309-07VIN Para odchylanych pelot piersiowych z poliuretanu, rozmiar 3 (czarny pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6214-01 Uprząż piersiowa, rozmiar 1/2 (załączony zielony pokrowiec)
- 151-6214-03 Uprząż piersiowa, rozmiar 1/2 (załączony niebieski pokrowiec)
- 151-6214-04 Uprząż piersiowa, rozmiar 1/2 (załączony malinowy pokrowiec)
- 151-6214-05 Uprząż piersiowa, rozmiar 1/2 (załączony ciemnoszary pokrowiec)
- 151-6214-01VIN Uprząż piersiowa, rozmiar 1/2 (załączony zielony pokrowiec)
- 151-6214-03VIN Uprząż piersiowa, rozmiar 1/2 (załączony niebieski pokrowiec)
- 151-6214-04VIN Uprząż piersiowa, rozmiar 1/2 (załączony malinowy pokrowiec)
- 151-6214-07VIN Uprząż piersiowa, rozmiar 1/2 (załączony czarny pokrowiec)
- 133-625 Uprząż piersiowa, rozmiar 3 (czarny neopren)
- 151-1757 Para wieloczęściowych składanych pelot, rozmiar 1 — czarna metalowa rama
- 151-2757 Para wieloczęściowych składanych pelot, rozmiar 2 — czarna metalowa rama
- 151-3757 Para wieloczęściowych składanych pelot, rozmiar 3 — czarna metalowa rama
- 151-6110 Para wieloczęściowych składanych pelot, rozmiar 1 — biała metalowa rama
- 151-6215 Para wieloczęściowych składanych pelot, rozmiar 2 — biała metalowa rama
- 151-6311 Para wieloczęściowych składanych pelot, rozmiar 3 — biała metalowa rama

- 151-6111-01 Para standardowych pelot, rozmiar 1 (załączony zielony pokrowiec)
— czarna metalowa rama
- 151-6111-03 Para standardowych pelot, rozmiar 1 (załączony niebieski pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6111-04 Para standardowych pelot, rozmiar 1 (załączony malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6111-05 Para standardowych pelot, rozmiar 1 (załączony ciemnoszary pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6111-01VIN Para standardowych pelot, rozmiar 1 (załączony zielony pokrowiec)
— czarna metalowa rama
- 151-6111-03VIN Para standardowych pelot, rozmiar 1 (załączony niebieski pokrowiec)
— czarna metalowa rama
- 151-6111-04VIN Para standardowych pelot, rozmiar 1 (załączony malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6111-07VIN Para standardowych pelot, rozmiar 1 (załączony czarny pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6112-01 Para standardowych pelot, rozmiar 1 (załączony zielony pokrowiec)
— biała metalowa rama
- 151-6112-03 Para standardowych pelot, rozmiar 1 (załączony niebieski pokrowiec)
— biała metalowa rama
- 151-6112-04 Para standardowych pelot, rozmiar 1 (załączony malinowy pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6112-05 Para standardowych pelot, rozmiar 1 (załączony ciemnoszary pokrowiec)
— biała metalowa rama
- 151-6112-01VIN Para standardowych pelot, rozmiar 1 (załączony zielony pokrowiec)
— biała metalowa rama
- 151-6112-03VIN Para standardowych pelot, rozmiar 1 (załączony niebieski pokrowiec)
— biała metalowa rama
- 151-6112-04VIN Para standardowych pelot, rozmiar 1 (załączony malinowy pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6112-07VIN Para standardowych pelot, rozmiar 1 (załączony czarny pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6216-01 Para standardowych pelot, rozmiar 2 (załączony zielony pokrowiec)
— czarna metalowa rama
- 151-6216-03 Para standardowych pelot, rozmiar 2 (załączony niebieski pokrowiec)
— czarna metalowa rama
- 151-6216-04 Para standardowych pelot, rozmiar 2 (załączony malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6216-05 Para standardowych pelot, rozmiar 2 (załączony ciemnoszary pokrowiec)
— czarna metalowa rama
- 151-6216-01VIN Para standardowych pelot, rozmiar 2 (załączony zielony pokrowiec)
— czarna metalowa rama
- 151-6216-03VIN Para standardowych pelot, rozmiar 2 (załączony niebieski pokrowiec)
— czarna metalowa rama
- 151-6216-04VIN Para standardowych pelot, rozmiar 2 (załączony malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6216-07VIN Para standardowych pelot, rozmiar 2 (załączony czarny pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6217-01 Para standardowych pelot, rozmiar 2 (załączony zielony pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6217-03 Para standardowych pelot, rozmiar 2 (załączony niebieski pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6217-04 Para standardowych pelot, rozmiar 2 (załączony malinowy pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6217-05 Para standardowych pelot, rozmiar 2 (załączony ciemnoszary pokrowiec)
— biała metalowa rama
- 151-6217-01VIN Para standardowych pelot, rozmiar 2 (załączony zielony pokrowiec) — biała metalowa rama

- 151-6217-03VIN Para standardowych pelot, rozmiar 2 (załączony niebieski pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6217-04VIN Para standardowych pelot, rozmiar 2 (załączony malinowy pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6217-07VIN Para standardowych pelot, rozmiar 2 (załączony czarny pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6312-01 Para standardowych pelot, rozmiar 3 (załączony zielony pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6312-03 Para standardowych pelot, rozmiar 3 (załączony niebieski pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6312-04 Para standardowych pelot, rozmiar 3 (załączony malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6312-05 Para standardowych pelot, rozmiar 3 (załączony ciemnoszary pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6312-01VIN Para standardowych pelot, rozmiar 3 (załączony zielony pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6312-03VIN Para standardowych pelot, rozmiar 3 (załączony niebieski pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6312-04VIN Para standardowych pelot, rozmiar 3 (załączony malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6312-07VIN Para standardowych pelot, rozmiar 3 (załączony czarny pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6313-01 Para standardowych pelot, rozmiar 3 (załączony zielony pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6313-03 Para standardowych pelot, rozmiar 3 (załączony niebieski pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6313-04 Para standardowych pelot, rozmiar 3 (załączony malinowy pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6313-05 Para standardowych pelot, rozmiar 3 (załączony ciemnoszary pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6313-01VIN Para standardowych pelot, rozmiar 3 (załączony zielony pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6313-03VIN Para standardowych pelot, rozmiar 3 (załączony niebieski pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6313-04VIN Para standardowych pelot, rozmiar 3 (załączony malinowy pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6313-07VIN Para standardowych pelot, rozmiar 3 (załączony czarny pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6218-05 Para wydłużonych poduszek, rozmiar 1/2 (załączony ciemnoszary pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6218-06 Para wydłużonych poduszek, rozmiar 1/2 (załączony jasnoszary pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6218-05VIN Para wydłużonych poduszek, rozmiar 1/2 (załączony ciemnoszary pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6218-07VIN Para wydłużonych poduszek, rozmiar 1/2 (załączony czarny pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6219-05 Para wydłużonych poduszek, rozmiar 1/2 (załączony ciemnoszary pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6219-06 Para wydłużonych poduszek, rozmiar 1/2 (załączony jasnoszary pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6219-05VIN Para wydłużonych poduszek, rozmiar 1/2 (załączony ciemnoszary pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6219-07VIN Para wydłużonych poduszek, rozmiar 1/2 (załączony czarny pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6314-05 Para wydłużonych poduszek, rozmiar 3 (załączony ciemnoszary pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6314-06 Para wydłużonych poduszek, rozmiar 3 (załączony jasnoszary pokrowiec) — czarna metalowa rama

- 151-6314-05VIN Para wydłużonych poduszek, rozmiar 3 (załączony ciemnoszary pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6314-07VIN Para wydłużonych poduszek, rozmiar 3 (załączony czarny pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6315-05 Para wydłużonych poduszek, rozmiar 3 (załączony ciemnoszary pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6315-06 Para wydłużonych poduszek, rozmiar 3 (załączony jasnoszary pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6315-05VIN Para wydłużonych poduszek, rozmiar 3 (załączony ciemnoszary pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6315-07VIN Para wydłużonych poduszek, rozmiar 3 (załączony czarny pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-1754 Boczne poduszki, rozmiar 1 (para — bez pokrowca) — czarna metalowa rama
- 151-2754 Boczne poduszki, rozmiar 2 (para — bez pokrowca) — czarna metalowa rama
- 151-3754 Boczne poduszki, rozmiar 3 (para — bez pokrowca) — czarna metalowa rama
- 151-6113 Boczne poduszki, rozmiar 1 (para — bez pokrowca) — biała metalowa rama
- 151-6220 Boczne poduszki, rozmiar 2 (para — bez pokrowca) — biała metalowa rama
- 151-6114-01 Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 1 (kolor zielony)
- 151-6114-03 Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 1 (kolor niebieski)
- 151-6114-04 Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 1 (kolor malinowy)
- 151-6114-05 Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 1 (kolor ciemnoszary)
- 151-6114-01VIN Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 1 (kolor zielony)
- 151-6114-03VIN Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 1 (kolor niebieski)
- 151-6114-04VIN Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 1 (kolor malinowy)
- 151-6114-07VIN Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 1 (kolor czarny)
- 151-6221-01 Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 2 (kolor zielony)
- 151-6221-03 Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 2 (kolor niebieski)
- 151-6221-04 Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 2 (kolor malinowy)
- 151-6221-05 Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 2 (kolor ciemnoszary)
- 151-6221-01VIN Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 2 (kolor zielony)
- 151-6221-03VIN Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 2 (kolor niebieski)
- 151-6221-04VIN Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 2 (kolor malinowy)
- 151-6221-07VIN Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 2 (kolor czarny)
- 151-6316-01 Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 3 (kolor zielony)
- 151-6316-03 Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 3 (kolor niebieski)
- 151-6316-04 Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 3 (kolor malinowy)
- 151-6316-05 Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 3 (kolor ciemnoszary)
- 151-6316-01VIN Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 3 (kolor zielony)
- 151-6316-03VIN Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 3 (kolor niebieski)
- 151-6316-04VIN Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 3 (kolor malinowy)
- 151-6316-07VIN Para pokrowców bocznych poduszek, rozmiar 3 (kolor czarny)
- 151-6115-01 Para bocznych poduszek, rozmiar 1 (załączony zielony pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6115-03 Para bocznych poduszek, rozmiar 1 (załączony niebieski pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6115-04 Para bocznych poduszek, rozmiar 1 (załączony malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6115-05 Para bocznych poduszek, rozmiar 1 (załączony ciemnoszary pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6115-01VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 1 (załączony zielony pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6115-03VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 1 (załączony niebieski pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6115-04VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 1 (załączony malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6115-07VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 1 (załączony czarny pokrowiec) — czarna metalowa rama

- 151-6116-01 Para bocznych poduszek, rozmiar 1 (załączony zielony pokrowiec) —
biała metalowa rama
- 151-6116-03 Para bocznych poduszek, rozmiar 1 (załączony niebieski
pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6116-04 Para bocznych poduszek, rozmiar 1 (załączony malinowy
pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6116-05 Para bocznych poduszek, rozmiar 1 (załączony ciemnoszary pokrowiec) —
biała metalowa rama
- 151-6116-01VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 1 (załączony zielony pokrowiec)
— biała metalowa rama
- 151-6116-03VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 1 (załączony niebieski pokrowiec)
— biała metalowa rama
- 151-6116-04VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 1 (załączony malinowy pokrowiec)
— biała metalowa rama
- 151-6116-07VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 1 (załączony czarny pokrowiec) —
biała metalowa rama
- 151-6222-01 Para bocznych poduszek, rozmiar 2 (załączony zielony pokrowiec) —
czarna metalowa rama
- 151-6222-03 Para bocznych poduszek, rozmiar 2 (załączony niebieski pokrowiec)
— czarna metalowa rama
- 151-6222-04 Para bocznych poduszek, rozmiar 2 (załączony malinowy pokrowiec) —
czarna metalowa rama
- 151-6222-05 Para bocznych poduszek, rozmiar 2 (załączony ciemnoszary pokrowiec) —
czarna metalowa rama
- 151-6222-01VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 2 (załączony zielony pokrowiec) —
czarna metalowa rama
- 151-6222-03VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 2 (załączony niebieski pokrowiec) —
czarna metalowa rama
- 151-6222-04VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 2 (załączony malinowy pokrowiec) —
czarna metalowa rama
- 151-6222-07VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 2 (załączony czarny pokrowiec) —
czarna metalowa rama
- 151-6223-01 Para bocznych poduszek, rozmiar 2 (załączony zielony pokrowiec) —
biała metalowa rama
- 151-6223-03 Para bocznych poduszek, rozmiar 2 (załączony niebieski pokrowiec) —
biała metalowa rama
- 151-6223-04 Para bocznych poduszek, rozmiar 2 (załączony malinowy pokrowiec) —
biała metalowa rama
- 151-6223-05 Para bocznych poduszek, rozmiar 2 (załączony ciemnoszary pokrowiec) —
biała metalowa rama
- 151-6223-01VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 2 (załączony zielony pokrowiec) —
biała metalowa rama
- 151-6223-03VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 2 (załączony niebieski pokrowiec) —
biała metalowa rama
- 151-6223-04VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 2 (załączony malinowy pokrowiec) —
biała metalowa rama
- 151-6223-07VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 2 (załączony czarny pokrowiec) —
biała metalowa rama
- 151-6317-01 Para bocznych poduszek, rozmiar 3 (załączony zielony pokrowiec) —
czarna metalowa rama
- 151-6317-03 Para bocznych poduszek, rozmiar 3 (załączony niebieski pokrowiec)
— czarna metalowa rama
- 151-6317-04 Para bocznych poduszek, rozmiar 3 (załączony malinowy pokrowiec) —
czarna metalowa rama
- 151-6317-05 Para bocznych poduszek, rozmiar 3 (załączony ciemnoszary pokrowiec) —
czarna metalowa rama
- 151-6317-01VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 3 (załączony zielony pokrowiec) —
czarna metalowa rama

- 151-6317-03VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 3 (załączony niebieski pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6317-04VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 3 (załączony malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6317-07VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 3 (załączony czarny pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6318-01 Para bocznych poduszek, rozmiar 3 (załączony zielony pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6318-03 Para bocznych poduszek, rozmiar 3 (załączony niebieski pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6318-04 Para bocznych poduszek, rozmiar 3 (załączony malinowy pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6318-05 Para bocznych poduszek, rozmiar 3 (załączony ciemnoszary pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6318-01VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 3 (załączony zielony pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6318-03VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 3 (załączony niebieski pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6318-04VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 3 (załączony malinowy pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6318-07VIN Para bocznych poduszek, rozmiar 3 (załączony czarny pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6224-01 Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 2 (załączony zielony pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6224-03 Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 2 (załączony niebieski pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6224-04 Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 2 (załączony malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6224-05 Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 2 (załączony ciemnoszary pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6224-01VIN Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 2 (załączony zielony pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6224-03VIN Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 2 (załączony niebieski pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6224-04VIN Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 2 (załączony malinowy pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6224-07VIN Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 2 (załączony czarny pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6225-01 Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 2 (załączony zielony pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6225-03 Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 2 (załączony niebieski pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6225-04 Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 2 (załączony malinowy pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6225-05 Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 2 (załączony ciemnoszary pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6225-01VIN Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 2 (załączony zielony pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6225-03VIN Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 2 (załączony niebieski pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6225-04VIN Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 2 (załączony malinowy pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6225-07VIN Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 2 (załączony czarny pokrowiec) — biała metalowa rama
- 151-6320-01 Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 3 (załączony zielony pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6320-03 Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 3 (załączony niebieski pokrowiec) — czarna metalowa rama
- 151-6320-04 Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 3 (załączony malinowy pokrowiec)

- czarna metalowa rama
- 151-6320-05 Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 3 (załączony ciemnoszary pokrowiec)
- czarna metalowa rama
- 151-6320-01VIN Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 3 (załączony zielony pokrowiec)
- czarna metalowa rama
- 151-6320-03VIN Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 3 (załączony niebieski pokrowiec)
- czarna metalowa rama
- 151-6320-04VIN Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 3 (załączony malinowy pokrowiec)
- czarna metalowa rama
- 151-6320-07VIN Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 3 (załączony czarny pokrowiec)
- czarna metalowa rama
- 151-6321-01 Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 3 (załączony zielony pokrowiec)
- biała metalowa rama
- 151-6321-03 Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 3 (załączony niebieski pokrowiec)
- biała metalowa rama
- 151-6321-04 Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 3 (załączony malinowy pokrowiec)
- biała metalowa rama
- 151-6321-05 Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 3 (załączony ciemnoszary pokrowiec)
- biała metalowa rama
- 151-6321-01VIN Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 3 (załączony zielony pokrowiec)
- biała metalowa rama
- 151-6321-03VIN Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 3 (załączony niebieski pokrowiec)
- biała metalowa rama
- 151-6321-04VIN Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 3 (załączony malinowy pokrowiec)
- biała metalowa rama
- 151-6321-07VIN Boczna poduszka odwodząca, rozmiar 3 (załączony czarny pokrowiec)
- biała metalowa rama
- 155-H001-L600 Uprząż w kształcie litery H, rozmiar S + zestaw pasków (firmy Leckey)
- 155-H001-L601 Uprząż w kształcie litery H, rozmiar M + zestaw pasków (firmy Leckey)
- 155-H001-L602 Uprząż w kształcie litery H, rozmiar L + zestaw pasków (firmy Leckey)
- 155-H001-L603 Uprząż w kształcie litery H, rozmiar XL + zestaw pasków (firmy Leckey)
- 155-N001-L600 Wąska uprząż, rozmiar S + zestaw pasków (firmy Leckey)
- 155-N001-L601 Wąska uprząż, rozmiar M + zestaw pasków (firmy Leckey)
- 155-N001-L602 Wąska uprząż, rozmiar L + zestaw pasków (firmy Leckey)
- 155-N001-L603 Wąska uprząż, rozmiar XL + zestaw pasków (firmy Leckey)
- 155-N001-L604 Wąska uprząż, rozmiar XXL + zestaw pasków (firmy Leckey)
- 120-799 Mała uprząż na tułów (firmy Mygo)
- 120-757 Średnia uprząż na tułów (firmy Mygo)
- 117-761 Duża uprząż na tułów (firmy Mygo)
- 117-750 Przedłużenie upręży (10 cm)
- 151-6122 Drewniany odchylany stolik, rozmiar 1
- 151-6231 Drewniany odchylany stolik, rozmiar 2
- 151-6326 Drewniany odchylany stolik, rozmiar 3
- 151-1644 Stolik z tworzywa sztucznego, rozmiar 1
- 151-2644 Stolik z tworzywa sztucznego, rozmiar 2
- 133-2148 Zespół stolika (wydłużony podłokietnik, przezroczysty)
- 133-2149 Zespół stolika (wydłużony podłokietnik, czarny)
- 151-3766 Zespół stolika, przezroczysty (dodatkowe 20 mm szerokości fotelika)
- 151-3767 Zespół stolika, czarny (dodatkowe 20 mm szerokości fotelika)

AKCESORIA PODPARCIA BIODER

- 151-1660 4-punktowy pas biodrowy, rozmiar 1
- 151-2660 4-punktowy pas biodrowy, rozmiar 2
- 151-3660 4-punktowy pas biodrowy, rozmiar 3

AKCESORIA PODPARCIA STÓP

151-1745	Podnóżek jednoczęściowy, rozmiar 1, metalowy — kolor czarny
151-2745	Podnóżek jednoczęściowy, rozmiar 2, metalowy — kolor czarny
151-3745	Podnóżek jednoczęściowy, rozmiar 3, metalowy — kolor czarny
151-6123	Podnóżek jednoczęściowy, rozmiar 1, metalowy — kolor biały
151-6223	Podnóżek jednoczęściowy, rozmiar 2, metalowy — kolor biały
151-6327	Podnóżek jednoczęściowy, rozmiar 3, metalowy — kolor biały
151-1746	Podnóżek jednoczęściowy, rozmiar 1, drewniany
151-6232	Podnóżek jednoczęściowy, rozmiar 2, drewniany
151-6125	Podnóżek jednoczęściowy, rozmiar 1, drewniany — kolor biały
151-6235	Podnóżek jednoczęściowy, rozmiar 2, drewniany — kolor biały
6329	Podnóżek jednoczęściowy, rozmiar 3, drewniany — kolor biały
152-1600	Sandały z paskami, rozmiar 1
152-2600	Sandały z paskami, rozmiar 2
152-3600	Sandały z paskami, rozmiar 3
151-1755	Paski podnóżka, rozmiar 1
151-2755	Paski podnóżka, rozmiar 2
151-3755	Paski podnóżka, rozmiar 3
151-1760	Podkładka podwyższająca sandał, grubość: 1 cal (jedna sztuka), rozmiar 1 i 2
151-3760	Podkładka podwyższająca sandał, grubość: 1 cal (jedna sztuka), rozmiar 3
AH01	Para małych stabilizatorów kostek
AH02	Para średnich stabilizatorów kostek

INNE AKCESORIA

151-6117	Podłokietniki (para), rozmiar 1
151-6226	Podłokietniki (para), rozmiar 2
151-3747	Podłokietniki (para), rozmiar 3
151-6124	Podłokietniki (para), rozmiar 1, kolor biały
151-6234	Podłokietniki (para), rozmiar 2, kolor biały
151-6328	Podłokietniki (para), rozmiar 3, kolor biały
151-6118-01	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 1 (zielona) — czarna metalowa rama
151-6118-03	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 1 (niebieska) — czarna metalowa rama
151-6118-04	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 1 (malinowa) — czarna metalowa rama
151-6118-05	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 1 (ciemnoszara) — czarna metalowa rama
151-6118-01VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 1 (zielona) — czarna metalowa rama
151-6118-03VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 1 (niebieska) — czarna metalowa rama
151-6118-04VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 1 (malinowa) — czarna metalowa rama
151-6118-07VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 1 (czarna) — czarna metalowa rama
151-6119-01	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 1 (zielona) — biała metalowa rama
151-6119-03	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 1 (niebieska) — biała metalowa rama
151-6119-04	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 1 (malinowa) — biała metalowa rama
151-6119-05	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 1 (ciemnoszara) — biała metalowa rama
151-6119-01VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 1 (zielona) — biała metalowa rama

151-6119-03VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 1 (niebieska) — biała metalowa rama
151-6119-04VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 1 (malinowa) — biała metalowa rama
151-6119-07VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 1 (czarna) — biała metalowa rama
151-6227-01	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 2 (zielona) — czarna metalowa rama
151-6227-03	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 2 (niebieska) — czarna metalowa rama
151-6227-04	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 2 (malinowa) — czarna metalowa rama
151-6227-05	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 2 (ciemnoszara) — czarna metalowa rama
151-6227-01VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 2 (zielona) — czarna metalowa rama
151-6227-03VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 2 (niebieska) — czarna metalowa rama
151-6227-04VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 2 (malinowa) — czarna metalowa rama
151-6227-07VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 2 (czarna) — czarna metalowa rama
151-6228-01	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 2 (zielona) — biała metalowa rama
151-6228-03	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 2 (niebieska) — biała metalowa rama
151-6228-04	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 2 (malinowa) — biała metalowa rama
151-6228-05	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 2 (ciemnoszara) — biała metalowa rama
151-6228-01VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 2 (zielona) — biała metalowa rama
151-6228-03VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 2 (niebieska) — biała metalowa rama
151-6228-04VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 2 (malinowa) — biała metalowa rama
151-6228-07VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 2 (czarna) — biała metalowa rama
151-6322-01	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 3 (zielona) — czarna metalowa rama
151-6322-03	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 3 (niebieska) — czarna metalowa rama
151-6322-04	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 3 (malinowa) — czarna metalowa rama
151-6322-05	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 3 (ciemnoszara) — czarna metalowa rama
151-6322-01VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 3 (zielona) — czarna metalowa rama
151-6322-03VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 3 (niebieska) — czarna metalowa rama
151-6322-04VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 3 (malinowa) — czarna metalowa rama
151-6322-07VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 3 (czarna) — czarna metalowa rama
151-6323-01	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 3 (zielona) — biała metalowa rama
151-6323-03	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 3 (niebieska) — biała metalowa rama

151-6323-04	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 3 (malinowa) — biała metalowa rama
151-6323-05	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 3 (ciemnoszara) — biała metalowa rama
151-6323-01VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 3 (zielona) — biała metalowa rama
151-6323-03VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 3 (niebieska) — biała metalowa rama
151-6323-04VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 3 (malinowa) — biała metalowa rama
151-6323-07VIN	Poduszka udowa w kształcie dysku, rozmiar 3 (czarna) — biała metalowa rama
151-6120-01	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 1 (zielona) — czarna metalowa rama
151-6120-03	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 1 (niebieska) — czarna metalowa rama
151-6120-04	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 1 (malinowa) — czarna metalowa rama
151-6120-05	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 1 (ciemnoszara) — czarna metalowa rama
151-6120-01VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 1 (zielona) — czarna metalowa rama
151-6120-03VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 1 (niebieska) — czarna metalowa rama
151-6120-04VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 1 (malinowa) — czarna metalowa rama
151-6120-07VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 1 (czarna) — czarna metalowa rama
151-6121-01	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 1 (zielona) — biała metalowa rama
151-6121-03	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 1 (niebieska) — biała metalowa rama
151-6121-04	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 1 (malinowa) — biała metalowa rama
151-6121-05	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 1 (ciemnoszara) — biała metalowa rama
151-6121-01VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 1 (zielona) — biała metalowa rama
151-6121-03VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 1 (niebieska) — biała metalowa rama
151-6121-04VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 1 (malinowa) — biała metalowa rama
151-6121-07VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 1 (czarna) — biała metalowa rama
151-6229-01	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 2 (zielona) — czarna metalowa rama
151-6229-03	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 2 (niebieska) — czarna metalowa rama
151-6229-04	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 2 (malinowa) — czarna metalowa rama
151-6229-05	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 2 (ciemnoszara) — czarna metalowa rama
151-6229-01VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 2 (zielona) — czarna metalowa rama
151-6229-03VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 2 (niebieska) — czarna metalowa rama
151-6229-04VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 2 (malinowa) — czarna metalowa rama

151-6229-07VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 2 (czarna) — czarna metalowa rama
151-6230-01	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 2 (zielona) — biała metalowa rama
151-6230-03	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 2 (niebieska) — biała metalowa rama
151-6230-04	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 2 (malinowa) — biała metalowa rama
151-6230-05	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 2 (ciemnoszara) — biała metalowa rama
151-6230-01VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 2 (zielona) — biała metalowa rama
151-6230-03VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 2 (niebieska) — biała metalowa rama
151-6230-04VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 2 (malinowa) — biała metalowa rama
151-6230-07VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 2 (czarna) — biała metalowa rama
151-6334-01	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 3 (zielona) — czarna metalowa rama
151-6334-03	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 3 (niebieska) — czarna metalowa rama
151-6334-04	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 3 (malinowa) — czarna metalowa rama
151-6334-05	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 3 (ciemnoszara) — czarna metalowa rama
151-6334-01VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 3 (zielona) — czarna metalowa rama
151-6334-03VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 3 (niebieska) — czarna metalowa rama
151-6334-04VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 3 (malinowa) — czarna metalowa rama
151-6334-07VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 3 (czarna) — czarna metalowa rama
151-6335-01	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 3 (zielona) — biała metalowa rama
151-6335-03	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 3 (niebieska) — biała metalowa rama
151-6335-04	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 3 (malinowa) — biała metalowa rama
151-6335-05	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 3 (ciemnoszara) — biała metalowa rama
151-6335-01VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 3 (zielona) — biała metalowa rama
151-6335-03VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 3 (niebieska) — biała metalowa rama
151-6335-04VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 3 (malinowa) — biała metalowa rama
151-6335-07VIN	Poduszka udowa w kształcie klina, rozmiar 3 (czarna) — biała metalowa rama
151-6239	Katalog próbek materiałów