



Mygo

Seating System

Instrukcja użytkowania



Wspieranie
dzieci

Polski

System siedziska Mygo zaprojektowano z myślą o zapewnieniu zaawansowanej regulacji postawy, nie rezygnując przy tym z funkcjonalności i mobilności. W niniejszej instrukcji wyjaśniono, w jaki sposób można szybko, łatwo i bezpiecznie skorzystać ze wszystkich funkcji. Przestrzeganie instrukcji dotyczących bezpiecznego użycia i konserwacji produktu gwarantuje długi okres użytkowania.

SPIS TREŚCI

01	Przeznaczenie produktu
02	Deklaracja zgodności
03	Warunki gwarancji
04	Historia produktu
05	Dokumentacja dotycząca szkolenia w zakresie obsługi produktu
06	Informacje dotyczące bezpiecznego użycia
07	Rozpakowywanie i montaż systemu siedziska
08	Plecak
09	Mocowanie poduszek
10	Ustawienie kliniczne w celu regulacji postawy
11	Częste regulacje związane z codziennym użytkowaniem
12	Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji
13	Codzienna kontrola produktu
14	Coroczna kontrola produktu
15	Wydawanie produktów firmy Leckey do ponownego użytku
16	Serwisowanie produktu
17	Informacje techniczne

ROZDZIAŁ 01: PRZEZNACZENIE PRODUKTU

System siedziska Mygo to fotelik multipozycyjny przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnościami do użytku w domu, w środowisku szkolnym lub na zewnątrz, jeśli jest zamontowany na mobilnej podstawie. Rozmiar 1 jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat, a rozmiar 2 — dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat. Maksymalna waga użytkownika systemu siedziska to 50 kg (110 funtów) w przypadku rozmiaru 1 oraz 60 kg (132 funty) w przypadku rozmiaru 2. System siedziska jest modułowy i można go używać z różnymi podstawami jezdnymi, przeznaczonymi do użytku w pomieszczeniach lub na zewnątrz. Podstawa jezdna z regulacją wysokości jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach, ale można jej również używać na zewnątrz na równej powierzchni. Podstawę jezdnią z regulacją wysokości należy zawsze chronić przed wpływem warunków atmosferycznych, które mogłyby spowodować korozję metalowych elementów.

Fotelik Mygo można połączyć z wieloma różnymi mobilnymi podstawami, których szczegółowe opisy można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem **www.leckey.com**.

ROZDZIAŁ 02: DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma James Leckey Design Ltd. jako producent oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że system siedziska Mygo spełnia wymogi Wytycznych 93/42/EWG, Regulacji dotyczących wyrobów medycznych z 2002 oraz normy EN12182: Wyroby pomocnicze dla osób niepełnosprawnych i metody badań.

EN12182 Technical aids for disabled persons and test methods.

ROZDZIAŁ 03: WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja obowiązuje wyłącznie, gdy produkt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, określonymi warunkami i wszystkimi zaleceniami producenta (patrz również: ogólne warunki sprzedaży, dostawy i płatności). Wszystkie produkty i części produktów firmy Leckey są objęte dwuletnią gwarancją.

ROZDZIAŁ 04: HISTORIA PRODUKTU

Niniejszy produkt firmy Leckey został sklasyfikowany jako urządzenie medyczne klasy 1, w związku z czym powinien być przepisywany pacjentowi, ustawiany lub wydawany do ponownego użytku wyłącznie przez osobę o odpowiedniej wiedzy technicznej, która przeszła wcześniej szkolenie w zakresie jego obsługi. Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wszelkich ustawień, kontroli przy wydawaniu do ponownego użytku oraz corocznych kontroli niniejszego produktu.

**Nazwa i pieczęć
dystrybutora**

ROZDZIAŁ 05: DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA W ZAKRESIE OBSŁUGI PRODUKTU (RODZICE, NAUCZYCIELE I OPIEKUNOWIE)

Niniejszy produkt firmy Leckey to przepisywany przez lekarza wyrób medyczny klasy 1, w związku z czym firma Leckey zaleca, aby osoba o odpowiedniej wiedzy technicznej zapoznała rodziców, nauczycieli i opiekunów używających wspomnianego wyrobu z następującymi rozdziałami niniejszej instrukcji użytkownika:

Rozdział 6

Informacje dotyczącego bezpiecznego użycia

Rozdział 11

Częste regulacje związane z codziennym użytkowaniem

Rozdział 12

Czyszczenie i konserwacja

Rozdział 13

Codzienna kontrola produktu

Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru osób, które zostały przeszkolone w zakresie prawidłowego użytkowania niniejszego produktu.

ROZDZIAŁ 06: INFORMACJE DOTYCZĄCEGO BEZPIECZNEGO UŻYCIA

1. Przed użyciem należy zawsze dokładnie przeczytać instrukcję.
2. Z myślą o większym bezpieczeństwie użytkowników zaleca się, aby podczas korzystania ze sprzętu firmy Leckey użytkownicy w żadnym wypadku nie byli pozostawiani bez opieki.
3. Razem z produktem należy używać wyłącznie elementów zatwierdzonych przez firmę Leckey. Nie należy w żaden sposób modyfikować produktu. Nieprzestrzeganie instrukcji może narazić użytkownika lub opiekuna na niebezpieczeństwo i będzie skutkować unieważnieniem gwarancji.
4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dalszego bezpiecznego użytkowania produktu firmy Leckey lub w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części należy zaprzestać dalszego użytkowania produktu i jak najszybciej skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta lub lokalnym przedstawicielem handlowym.
5. Przed umieszczeniem użytkownika w foteliku należy wykonać wszystkie czynności regulacji pozycji i upewnić się, że wszystkie elementy są odpowiednio przymocowane. Niektóre regulacje mogą wymagać użycia narzędzia dostarczanego z każdym produktem. Wszystkie narzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Po umieszczeniu użytkownika w systemie siedziska dla zachowania bezpieczeństwa i odpowiedniej postawy należy zawsze najpierw zapiąć uprząż biodrową.
7. Po umieszczeniu produktu w stabilnej pozycji należy się upewnić, że wszystkie kółka samonastawne są zablokowane i skierowane z dala od podstawy, co zapewni większą stabilność produktu. Jest to szczególnie istotne, gdy używa się funkcji odchylania przestrzennego lub odchylania oparcia.
8. W przypadku używania fotelika z podstawą jezdną z regulacją wysokości należy się upewnić, że pedał regulacji wysokości i dźwignia mechanizmu odchylania przestrzennego są zablokowane i nie mogą być przestawione przypadkowo przez inne dzieci.

9. W przypadku używania systemów siedziska firmy Leckey z podstawą jezdną z regulacją wysokości nie zaleca się przemieszczania użytkowników w foteliku po nierównych powierzchniach. Podczas umieszczania użytkownika w foteliku lub wyjmowania go z fotelika należy zachować szczególną ostrożność.
10. Nie należy nigdy używać produktu na powierzchni o pochyłości większej niż 5 stopni. Należy zawsze pamiętać o zablokowaniu wszystkich kółek samonastawnych.
11. Do manewrowania fotelem i przesuwania go na inne miejsce służy wyłącznie rączka do prowadzenia. Nie należy nigdy używać w tym celu stolika.
12. Produkt zawiera elementy, które stwarzają ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia przez małe dzieci. Należy zawsze upewnić się, że pokrętła i śruby blokujące znajdujące się w zasięgu dziecka są dokręcone i zabezpieczone.
13. Produkty firmy Leckey są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa przeciwpożarowego według normy EN12182. Jednakże produkt zawiera elementy z tworzywa sztucznego, a zatem powinien być przechowywany i użytkowany z dala od wszelkich bezpośrednich źródeł ciepła, w tym otwartego ognia, papierosów oraz grzejników elektrycznych i gazowych.
14. Na stoliku nie należy umieszczać przedmiotów rozgrzanych do temperatury wyższej niż 40°C.
15. Należy regularnie czyścić produkt. Nie należy używać ściernych środków czyszczących. Należy regularnie przeprowadzać konserwację, aby upewnić się, że produkt jest w dobrym stanie.
16. Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach, a nieużywany produkt powinien być przechowywany w suchym miejscu, niewystawionym na działanie wysokich temperatur. Bezpieczna temperatura użytkowania produktu mieści się w zakresie od +5°C do +40°C.
17. Przed przesunięciem fotelika należy zawsze sprawdzić, czy ręczne pokrętła z tworzywa sztucznego zamocowane na rączce do prowadzenia są odpowiednio dokręcone.
18. Przed użyciem systemu siedziska należy zawsze sprawdzić, czy uchwyt na płycie połączeniowej fotelika jest odpowiednio połączony z podstawą jezdną. Jeśli uchwyt nie jest odpowiednio połączony z fotelem, może się obluźnić i spowodować poważne uszkodzenie ciała dziecka lub opiekuna.

SYSTEM SIEDZISKA MYGO — TEST ZDERZENIOWY

System siedziska Mygo przeszedł testy zderzeniowe i może być używany w pojazdach mechanicznych. Został przetestowany w kompletnej konfiguracji na zastępczej podstawie, z zamocowanym zagłówkiem firmy Leckey.



Jeśli system siedziska Mygo jest używany w pojeździe mechanicznym, należy przestrzegać następujących zasad:

System siedziska Mygo musi być skierowany w stronę przedniej części pojazdu i używany razem z system pasów bezpieczeństwa firmy Unwin oraz zagłówkiem, który zawsze powinien być odpowiednio ustawiony w trakcie transportu. Zagłówek jest dostępny jako opcjonalne akcesorium do systemu siedziska Mygo.

System siedziska Mygo przeszedł testy zderzeniowe i spełnia wymogi normy ISO16840, część 4. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta lub lokalnym przedstawicielem handlowym.



Ważna informacja

Powyższy opis dotyczący testów zderzeniowych odnosi się wyłącznie do systemu siedziska Mygo z płytą połączeniową. W przypadku używania systemu siedziska Mygo na podstawie wózka należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi testów zderzeniowych zamieszczonymi w instrukcji producenta wózka.

ROZDZIAŁ 07: ROZPAKOWYWANIE I MONTAŻ SYSTEMU SIEDZISKA

Sprawdzanie części

Gratulujemy zakupu systemu siedziska Mygo. Wszystkie części zostaną dostarczone w polietylenowych opakowaniach z czytelnymi etykietami. Należy ostrożnie wyjąć je z pudełek i sprawdzić wszystkie zamówione części.

Niektóre z akcesoriów należy zmontować przed przymocowaniem fotelika do zakupionej podstawy. Jeśli fotelik jest mocowany do mobilnej podstawy, należy najpierw przymocować do niej płytę połączeniową. Instrukcje dotyczące sposobu przymocowania płyty połączeniowej do poszczególnych podstaw zostaną dostarczone razem z płytą połączeniową. Po sprawdzeniu wszystkich elementów można przystąpić do montażu systemu siedziska Mygo i przymocować go do podstawy.

Narzędzie wielofunkcyjne

Niektóre regulacje będą wymagać użycia narzędzia wielofunkcyjnego dostarczanego z każdym fotelikiem. Narzędzie to można znaleźć w plecaku.



Bezpieczeństwo przede wszystkim. Polietylenowe opakowania należy trzymać z dala od dzieci.

Rozmiar 1



Rozmiar 2



7.1 USTAWIANIE OPARCIA

Oparcie zostanie dostarczone złożone. Należy podnieść je do pozycji pionowej, jednocześnie wsuwając rurkę wewnętrzną w pasującą rurkę zewnętrzną.

Ustawić oparcie w pozycji pionowej i dokręcić zaślepkę gniazda. Sprawdzić, czy oparcie jest zablokowane i nie zmieni ustawienia pod naciskiem. Nagłe szarpnięcie w przód lub w tył mogłoby skutkować uszkodzeniem ciała użytkownika lub opiekuna.



7.2 MOCOWANIE PODNÓŻKÓW (JEŚLI ZOSTAŁY ZAMÓWIONE)

W przypadku używania podnóżków firmy Leckey należy zdjąć fotelik z podstawy jezdnej i umieścić system siedziska na powierzchni roboczej spodem do góry. Otworzyć mechanizm regulacji kąta podparcia nóg, zwalniając dwie dźwignie blokujące **A** przedstawione na zdjęciu, i rozsunąć na maksymalną szerokość. Zdjąć zaślepki gniazd **B** i wsunąć podparcia tydek. Ustawić wymaganą pozycję, przy czym podnóżki muszą być skierowane do przodu, i dokręcić śruby z łbem gniazdowym przy użyciu narzędzia wielofunkcyjnego.





Należy zawsze upewnić się, że oparcie jest odpowiednio przymocowane.

Podczas wsuwania rurki wewnętrznej należy zachować ostrożność, aby nie przytraśnąć palców.



Należy zawsze upewnić się, że podnózek jest odpowiednio przymocowany.

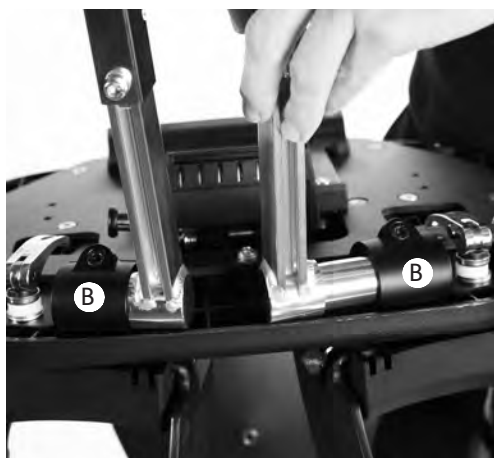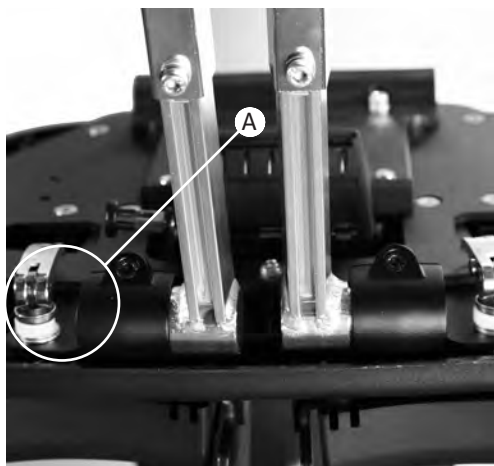

7.3 MOCOWANIE SYSTEMU SIEDZISKA DO PODSTAWY JEZDNEJ Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Należy ustawić maksymalną wysokość podstawy jezdnej, aby zmniejszyć ryzyko naciągnięcia pleców podczas mocowania fotelika. W rozdziale 11 opisano, w jaki sposób reguluje się wysokość zakupionej podstawy jezdnej.

Najpierw należy zwolnić sworzeń blokady bezpieczeństwa znajdujący się w przedniej części fotelika. W tym celu należy wyciągnąć sworzeń i obrócić go o 90 stopni. Ostrożnie unieść fotelik i umieścić go na podstawie jezdnej. Na spodzie siedziska, w jego tylnej części, znajduje się kanał mocujący. Należy odpowiednio nałożyć go na rurkę biegnącą w kierunku tylnej części podstawy jezdnej.

Pociągnąć uchwyt znajdujący się w przedniej części fotelika i obrócić fotelik w przód i do dołu.

Po maksymalnym obniżeniu przedniej części fotelika należy zwolnić uchwyt i pchnąć go, aby upewnić się, że jest odpowiednio połączony z przednią rurką. Obrócić stworzeń blokady bezpieczeństwa tak, aby połączyć go z przednią częścią uchwyty. Jeśli uderzy o uchwyt, oznacza to, że fotelik nie jest prawidłowo zamocowany. Należy wówczas zdjąć fotelik i powtórzyć procedurę opisaną powyżej.



Przed umieszczeniem dziecka w systemie siedziska należy zawsze sprawdzić, czy uchwyt i sworzeń blokujący są odpowiednio połączone. Jeśli uchwyt nie jest odpowiednio połączony, fotelik może się obluźować i spowodować poważne uszkodzenie ciała dziecka lub opiekuna.



7.4 MOCOWANIE RĄCZKI DO PROWADZENIA

Rączkę do prowadzenia mocuje się do podstawy jezdnej z regulacją wysokości poprzez wsunięcie dwóch dolnych końców w pasujące rurki w sposób przedstawiony na zdjęciu. Rączka do prowadzenia jest wyposażona w zatrzaski bezpieczeństwa **A**, które należy wcisnąć przy wsuwaniu dolnych końców w rurki. Pchać dolne końce rączki, aż zatrzaski będą wystawać z drugiego końca rurek. Zamocować rączkę poprzez dokręcenie pokręteł blokujących **B**.




Należy regularnie sprawdzać, czy pokrętła są mocno dokręcone, w szczególności w sytuacji gdy produkt jest przesuwany wzdłuż korytarzy o nierównych lub pochyłych powierzchniach.

7.5 MOCOWANIE ZAGŁÓWKA

Aby przymocować zagłówek, należy wsunąć pręt w tuleję ograniczającą **A** i pasujący wspornik. Upewnić się, że otwór w tulei ograniczającej jest wyrównany względem otworu w pasującym wsporniku. Ustawić wymaganą pozycję i zamocować przy użyciu ręcznej dźwigni **B**.

System siedziska Mygo można połączyć z zagłówkami firmy Whitmyer. Zagłówek Lynx firmy Whitmyer **C** mocuje się w taki sam sposób jak zagłówek firmy Leckey. Aby zamocować zagłówek firmy Whitmyer z linii Pro, należy zdjąć podkładkę pierścieniową **D** ze wspornika mocującego i zablokować pionowy pręt w odpowiednim położeniu przy użyciu uchwyty pozycjonującego. Aby przymocować zagłówek Otto Bock, należy użyć odpowiedniej nasadki Otto Bock.

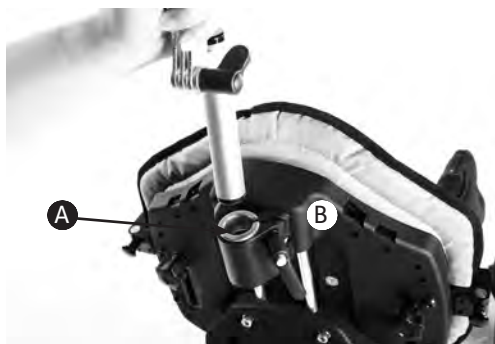



7.6 MOCOWANIE PODPARCIA RAMION

Aby przymocować podparcie ramion fotelika Mygo w rozmiarze 1, należy zdemonstrować wspornik do mocowania zagłówka, wykręcając śruby **A**. Wsunąć wspornik podparcia ramion i załączoną podkładkę między oparcie a wspornik do mocowania zagłówka. Ponownie przykręcić śruby. Przymocować dwa metalowe elementy dodatkowymi śrubami **B** dostarczonymi razem z nową podkładką. Śruby mocuje się od przodu. Sprawdzić, czy podparcie ramion jest odpowiednio przymocowane.



7.7 MOCOWANIE PELOT BOCZNYCH

Przytrzymując elementy razem, należy zdemonstrować pokrętkę z tworzywa sztucznego i podkładkę. Wyrównać wykonane z tworzywa sztucznego elementy mechanizmu regulacji kąta oraz boczny wspornik względem otworu w oparciu, a następnie ponownie zamocować podkładkę i pokrętkę z tworzywa sztucznego.





7.8 MOCOWANIE NAKOLANNIKÓW



Przy użyciu zatrzasków przymocować nakolanniki do elementów pozycjonujących kolana znajdujących się pod bokach podparcia ud



7.9 MOCOWANIE ŚRUB W SANDAŁACH


Przełożyć wymaganą śrubę mocującą **A** przez płytkę z otworem **B**. Nałożyć gumowe osłony **C** na wierzch i spód sandału. Przymocować przy użyciu czterech dostarczonych śrub **D**. Aby zdemonstować lub wymienić śrubę mocującą, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.



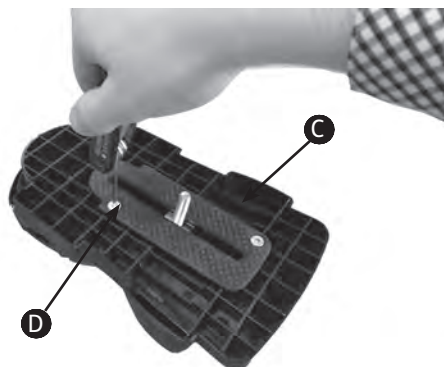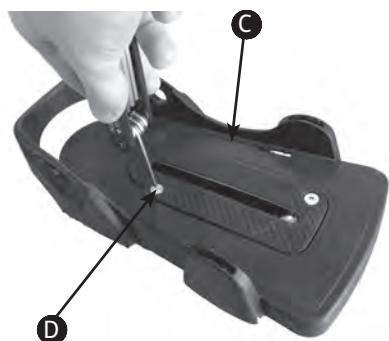

7.10 MOCOWANIE SANDAŁÓW

Umieścić sandał w taki sposób, aby śruba mocująca przechodziła przez otwór w podnóżku. Aby przymocować sandał, należy nałożyć na śrubę mocującą znajdującą się na spodzie podnóżka najpierw gumową podkładkę **A**, a następnie metalową podkładkę **B** i pokrętko **C**. Aby ustawić sandały w odpowiedniej pozycji, wystarczy poluzować pokrętko **C** znajdujące się na spodzie podnóżka, wybrać wymagane położenie i ponownie przykręcić pokrętko.

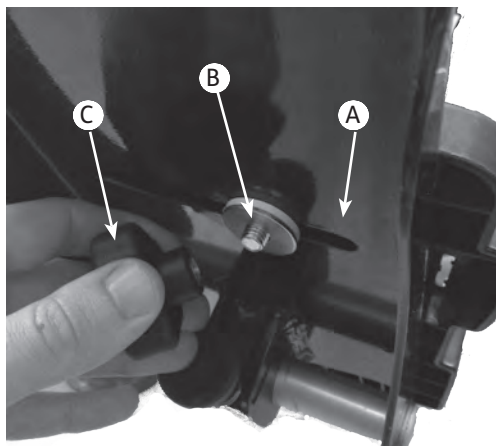

7.11 MOCOWANIE OBEJMÓW NA KOSTKACH

Przeciągnąć nylonowy pasek przez otwór w sandale. Przeciągnąć koniec nylonowego paska z powrotem przez otwór, tworząc pętlę, a następnie przeciągnąć pasek przez dolną część klamry triglide. Przeciągnąć pasek nylonowy przez górną część klamry triglide. Na koniec, aby zablokować pasek, należy ponownie przeciągnąć go przez dolną część klamry triglide. Skrócić pasek do wymaganej długości.



7.12 MOCOWANIE PODŁOKIETNIKÓW

Otworzyć wspornik mocujący poprzez poluzowanie uchwytu pozycjonującego **A** i wsunąć podłokietnik. Upewnić się, że zatrzask **B** jest odpowiednio zablokowany. Ponownie przykręcić uchwyt pozycjonujący.



7.13 MOCOWANIE STOLIKA

Stolik mocuje się do fotelika, przekładając rurki stolika przez środek podłokietników. Po zamocowaniu stolika, należy mocno dokręcić pokrętkę **A**.



7.14 MOCOWANIE PORĘCZY

Aby przymocować poręcz, należy wsunąć wsporniki mocujące **A** w otwór w stoliku i przymocować przy użyciu pokrętła z tworzywa sztucznego **B**. Powtórzyć czynności po drugiej stronie, a następnie wsunąć rurki we wsporniki mocujące **A** i dokręcić pokrętkę z tworzywa sztucznego **C**.



7.15 MOCOWANIE PELOT BIODROWYCH

Pelotów biodrowych używa się razem z osłoną biodrową. W razie konieczności należy najpierw zdemonstrować wsporniki uprząży biodrowej, wykręcając śrubę i zdejmując nakrętkę kołnierkową **A**. Umieścić polipropylenowy element znajdujący się w przedniej części podparcia krzyżowego. Umieścić wsporniki pelot biodrowych w otworach i przymocować przy użyciu dostarczonych nakrętek kołnierkowych **B** i śrub **C**. Nakrętki kołnierkowe powinny znaleźć się na przodzie podparcia krzyżowego.




7.16 MOCOWANIE RUCHOMEGO OPARCIA

Aby zamienić standardowe nieruchome oparcie na ruchome, należy przede wszystkim wykręcić śrubę **C** znajdującą się w górnej części standardowego zespołu oparcia. W tym celu należy poluzować nakrętkę **A** przy użyciu narzędzia firmy Leckey i 10 mm klucza francuskiego, a następnie wyjąć śrubę i podkładki **B**.

Ponownie użyć narzędzia firmy Leckey i 10 mm klucza francuskiego, aby poluzować nakrętkę **A** znajdującą się na spodzie standardowego zespołu oparcia, a następnie wyjąć śrubę **C**, podkładki siodłowe **D** i standardowe podkładki **B**.



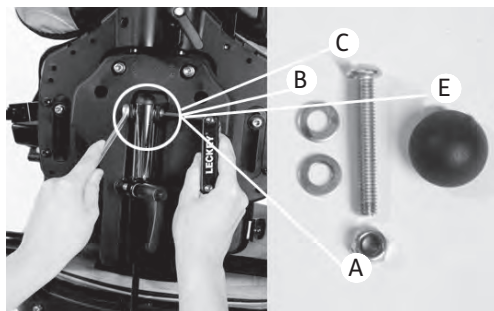

Aby zamocować ruchome oparcie, należy wsunąć pręt w dolny wspornik w sposób przedstawiony na zdjęciu. W tym celu należy użyć dostarczonej śruby **C**, nakrętki **A**, podkładek siedlowych **D** i standardowych podkładek **B**. Należy upewnić się, że gwint śruby wystaje ponad nakrętkę **A**.

Następnie należy przesunąć ruchomy pręt w górę i wsunąć go w górny wspornik w sposób przedstawiony na zdjęciu. Przymocować nowe oparcie ruchome w sposób przedstawiony na zdjęciu, używając dostarczonej śruby **C**, nakrętki **A** i podkładek **B**.

Należy upewnić się, że śruba przechodzi przez środek zespołu oparcia w sposób przedstawiony na zdjęciu **F**. Na koniec należy zamocować wypukłą zaślepkę **E**.




Podczas montażu i mocowania ruchomego oparcia należy zachować ostrożność z uwagi na niewielkie ryzyko przytraśnięcia palców.



7.17 MOCOWANIE UKOŚNYCH PODUSZEK

Aby przymocować ukośne poduszki, należy najpierw zdemontować poduszkę siedziska. Ustawić panel ukośnej poduszki tak, aby zatrzask przechodził przez otwory w zaczepach. Włożyć piankowe wypełnienia wedle potrzeb i ponownie przymocować poduszkę siedziska.

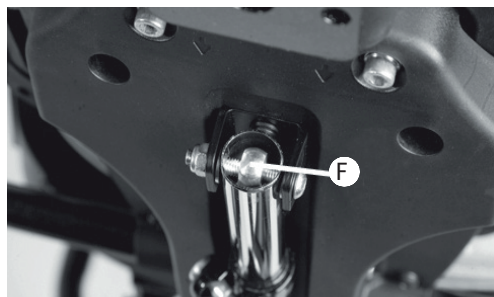



7.18 ELEMENTY POŁĄCZENIOWE DO MOCOWANIA NA PODSTAWACH WÓZKA INWALIDZKIEGO I SPACEROWEGO



Wszystkie czynności związane z ustawianiem i mocowaniem fotelika Mygo na mobilnej podstawie powinny być wykonywane przez osobę o odpowiedniej wiedzy technicznej, która zna ustawienie mobilnej podstawy.



Element połączeniowy „A” do podstawy mobilnej o szerokości 16 cali

Uniwersalny element połączeniowy zaprojektowano z myślą o możliwości połączenia fotelika Mygo z dowolną standardową podstawą mobilną o szerokości 16 cali (405 mm) z 1-calowymi (25,4 mm) bocznymi rurkami.



Aby prawidłowo ustawić fotelik na podstawie, należy zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami montażu dołączonymi do elementu połączeniowego.

Płyta połączeniowa powinna być mocowana przez wykwalifikowaną osobę o odpowiedniej wiedzy technicznej w zakresie ustawiania mobilnej podstawy. Pozycja rączek do prowadzenia, podłużnych poduszek pod nogi i podłokietników na podstawie mobilnej może wymagać regulacji w zależności od wymiarów i wagi dziecka, aby zapewnić stabilność fotelika.



Aby zapewnić prawidłowe ustawienie, należy zawsze kierować się wytycznymi producenta mobilnej podstawy, zwracając szczególną uwagę na środek ciężkości produktu i jego stabilność.

Podczas korzystania ze sprzętu firmy Leckey użytkowników nie powinno się w żadnym wypadku pozostawiać bez opieki.

ROZDZIAŁ 08:

PLECAK

8.1 ZAWARTOŚĆ PLECAKA

Plecak zawiera karty ustawień fotelika, zestaw naklejek ze wskaźnikami, karty do kolorowania Mygo, kredki firmy Leckey, podręcznik użytkownika Mygo i narzędzie wielofunkcyjne firmy Leckey.

8.2 MOCOWANIE PLECAKA

Plecak należy mocować dopiero po ustawieniu systemu siedziska. Plecak najłatwiej zamocować po zdjęciu poduszki oparcia. Mocuje się go za pomocą elastycznych pasków, które naciągają się na oparcie. Paski będą również naciągnięte na peloty boczne, jeśli zostały zamontowane. Po przymocowaniu plecaka należy z powrotem założyć poduszkę oparcia.



8.3 KARTY DO KOLOROWANIA I KREDKI

Dzieci mogą napisać na kartach swoje imię, narysować obrazek lub pokolorować je, aby nadać swojemu systemowi siedziska indywidualny, unikalny wygląd.



8.4 KARTY USTAWIEŃ FOTELIKA I ZESTAW NAKLEJEK ZE WSKAŹNIKAMI


Naklejki ze wskaźnikami można przykleić na wolnym pasku znajdującym się z boku regulacji ustawienia oparcia. Służą do wskazywania preferowanej pozycji lub kąta odchylenia oparcia w zależności od wykonywanej czynności.

Karty ustawień fotelika służą do wyszczególnienia różnych czynności, które terapeuta chciałby wykonywać z dzieckiem w szkole lub w domu. Będą zawierać informacje dotyczące nowego ustawienia oraz charakteru i czasu trwania czynności.



Plecak zawiera małe elementy, które stwarzają ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia przez małe dzieci. Należy zawsze sprawdzać, czy suwak jest zapięty.

Podczas korzystania ze sprzętu firmy Leckey użytkowników nie powinno się w żadnym wypadku pozostawiać bez opieki.

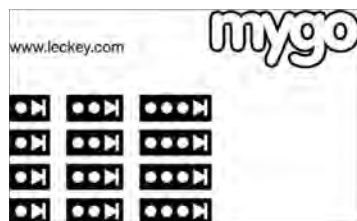

Activity setting record

www.leckey.com

mygo

Activity

Back angle

Right angle

Left angle

Angle

Description of activity and settings

Signed

Unterzeichnet

mygo

ROZDZIAŁ 09: MOCOWANIE PODUSZEK

Zaleca się mocowanie poduszek w następującej kolejności

1. Poduszki udowe (jeśli dotyczy)
2. Poduszka siedziska
3. Poduszka krzyżowa
4. Pas biodrowy
5. Peloty biodrowe
6. Uprząż na tułów
7. Oparcie
8. Peloty boczne
9. Podparcie ramienia
10. Uprząż piersiowa
11. Nakolanniki
12. Zagłówek

9.1 PODUSZKI UDOWE

(wyłącznie rozmiar 1)

Nasunąć poduszki udowe na oba podparcia udowe i połączyć je pośrodku przy użyciu rzepu. Poduszki udowe powinno się mocować przed zamocowaniem poduszki siedziska i dotyczy to wyłącznie rozmiaru 1.



9.2 JEDNOCZĘŚCIOWA PODUSZKA SIEDZISKA

Aby przymocować poduszkę siedziska, wystarczy nałożyć ją na siedzisko, a następnie docisnąć, aby zapiąć tylny zatrzask **A**. Następnie należy zapiąć dwa zatrzaski boczne **B**. Założyć pętlę z elastycznego materiału **C** na dźwignię blokującą element pozycjonujący udo **D** znajdującą się pod fotelikiem.



Przed umieszczeniem dziecka w foteliku należy zawsze sprawdzić, czy poduszka siedziska jest przymocowana.



9.3 ELASTYCZNA PODUSZKA KRZYŻOWA

Elastyczną poduszkę krzyżową można przymocować, nasuwając ją na występ z tworzywa sztucznego i zapinając zatrzask



9.4 UPRZĄŻ BIODROWA

(rozmiar 1 lub 2)

Uprząż biodrową mocuje się, wsuwając elementy pozycjonujące biodra **A** w kieszenie na przedniej stronie upręży. Aby ustawić wymaganą pozycję, należy zapiąć uprząż przy użyciu jednego z zatrasków **B** na regulowanym wsporniku elementu pozycjonującego biodra. Klamry na paskach mocujących łączy się ze sprzączkami **C** po obu stronach siedziska. Na koniec należy zamocować uprząż biodrową, zapinając środkową sprzączkę z tworzywa sztucznego **D**.



9.5 OSŁONA BIODROWA

(wyłącznie rozmiar 2)

Zapiąć osłonę biodrową i umieścić ją na poduszce siedziska. Na osłonie znajdują się oznaczenia wskazujące prawidłowe ułożenie. Docisnąć rzep do poduszki siedziska i zapiąć cztery sprzączki **A**: dwie z tyłu fotelika i dwie po bokach.



9.6 PODUSZKA POD POŚLADKI

Jeśli poduszka pod pośladki **B** jest wymagana, należy przypiąć ją do osłony biodrowej przy użyciu rzepu



9.7 PELOTY BIODROWE

Pelotów biodrowych używa się wyłącznie razem z osłoną biodrową. Nasunąć pokrowce poduszek na peloty biodrowe tak, aby klapka z rzepem znajdowała się po zewnętrznej stronie. Owinąć dwa pasy z rzepami **A** wokół wspornika i przypiąć do poduszki z rzepem **B**. Opuścić klapkę.




9.8 UPRZĄŻ NA TUŁÓW

Do uprząży na tułów są dołączone cztery regulowane pasy boczne i dwa pasy ramienne oraz wsporniki, śruby, podkładki i nakrętki blokujące. Przed zamocowaniem uprząży na tułów należy przypiąć pasy łączące do oparcia. W przypadku rozmiaru 1, aby przymocować pasy łączące w okolicy ramion, należy wsunąć wspornik w otwór **A** i ustawić na wymaganej wysokości przy użyciu załączonych śrub i podkładek.

W przypadku rozmiaru 2 pasy ramienne, zamiast do oparcia, powinny być mocowane do podparcia ramion **B**. Pozostałe cztery regulowane pasy boczne



mocuje się bezpośrednio, bez użycia wsporników, do otworów po obu stronach oparcia **C**. Następnie wystarczy przypiąć uprząż na tułów do pasów łączących. Długość pasów bocznych można regulować, aby dopasować uprząż do odzieży wierzchniej.

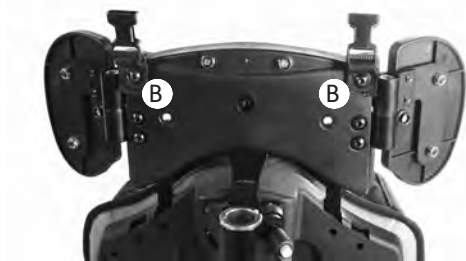

9.9 PODUSZKA OPARCIA

Jeśli do fotelika są przymocowane peloty boczne, przed przymocowaniem poduszki oparcia należy maksymalnie je rozchylić.

Nasunąć poduszkę oparcia na elastyczną poduszkę krzyżową i zamocować przy użyciu czterech zatrzasków znajdujących na usztywnieniu oparcia. Najpierw należy zapiąć dolne zatrzaski, a następnie górne.



9.10 WYŚCIEŁANE PODUSZKI PELOT BOCZNYCH

Aby zamocować wyściełane poduszki pelot bocznych, wystarczy nasunąć poduszki na peloty wyściełaną stroną do wewnątrz. Przełożyć plastikową sprzączkę przez otwór w pokrowcu, a następnie przeciągnąć dwa paski z rzepami wokół spodniej części usztywnienia i przypiąć je do panelu z rzepami w sposób przedstawiony na zdjęciu. Opuścić klapkę.



9.11 PODUSZKA PODPARCIA RAMION


(jeśli dotyczy)

Najpierw należy poluzować peloty podparcia ramion (**patrz: rozdział 10**). Nasunąć poduszkę na zespół podparcia i zamocować w czterech miejscach przy użyciu zatrzasków **A**.



9.12 UPRZĄŻ PIERSIOWA

Uporzędk piersiową można przymocować, wsuwając klamry męskie **A** w klamry żeńskie po obu stronach pelot piersiowych.

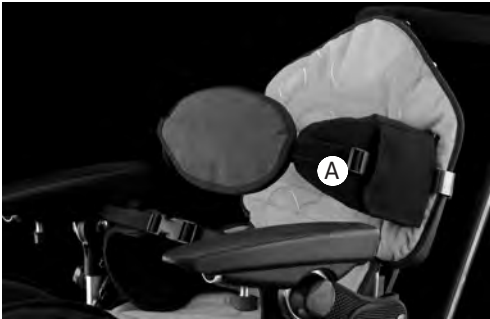

9.13 NAKOLANNIKI

Przy użyciu zatrzasków **A** przymocować nakolanniki do elementów pozycjonujących kolana znajdujących się po bokach podparcia ud.



9.14 PODUSZKA PROFILOWANEGO ZAGŁÓWKA

Aby przymocować poduszkę zagłówek, należy najpierw umieścić polipropylenowe usztywnienie między pokrowcem poduszki a zespołem zagłówek. Usztywnienia nie powinno się umieszczać wewnątrz pokrowca poduszki.

Następnie należy umieścić poduszkę na zagłówek. Zapiąć zatrzaski pośrodku i po bokach. Wsunąć dolną klapkę pod zagłówek i przymocować przy użyciu rzepu.



9.15 PODUSZKA PŁASKIEGO ZAGŁÓWKA

Umieścić poduszkę na zagłówku. Zapiąć środkowy zatrzask. Wsunąć dolną klapkę pod zagłówek i przypiąć przy użyciu pozostałych dwóch zatrzasków. Pokrowce pelotów zagłówka zakłada się w taki sam sposób jak w przypadku wyściełanych pokrowców pelot bocznych.



ROZDZIAŁ 10: STAWIENIE KLINICZNE W CELU REGULACJI POSTAWY

Ustawienie kliniczne produktu powinno być wykonane przez osobę o odpowiedniej wiedzy technicznej i klinicznej, która przeszła wcześniej szkolenie w zakresie użytkowania produktu. Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru wszystkich ustawień klinicznych niniejszego produktu.

Przed umieszczeniem dziecka w foteliku należy ustawić wysokość oparcia, głębokość fotelika i wysokość podnóżka. Ustawienia można dodatkowo skorygować, gdy dziecko znajduje się w foteliku.

10.1 UPRZĄŻ BIODROWA

Aby wyregulować głębokość uprząży biodrowej, należy przesunąć zatrzaski na odpowiednią pozycję (**B** lub **C**). Wyregulować paski podpierające do wymaganej długości. Upewnić się, że środkowa sprzączka jest mocno zapięta **D**. Jeśli fotelik jest używany na zewnątrz, a dziecko ma na sobie kurtkę, uprząż biodrowa powinna znajdować się pod kurtką.



Pas biodrowy należy zapinać zawsze przed regulacją jakichkolwiek innych elementów.



10.2 OSŁONA BIODROWA

Gdy dziecko jest umieszczane w systemie siedziska, osłona biodrowa powinna być ułożona na płasko i otwarta. Wszystkie boczne i tylne sprzączki powinny być wcześniej przymocowane do fotelika.

Należy najpierw zapiąć sprzączkę **A** znajdującą się w przedniej części osłony biodrowej. Następnie należy zapiąć rzepy **B** po obu stronach, aby dopasować osłonę biodrową do użytkownika. Następnie należy wyregulować przednie i tylne pasy **C** i **D**, aby zapewnić odpowiednie ułożenie miednicy użytkownika.



10.3 PELOTY BIODROWE

(wyłącznie razem z osłoną biodrową)

Aby wyregulować szerokość elementów pozycjonujących biodra, należy poluzować śruby z łbem sześciokątnym **A**, ustawić wymaganą szerokość i ponownie dokręcić.



10.4 GŁĘBOKOŚĆ OPARCIA


Głębokość oparcia reguluje się poprzez wciśnięcie zatrzasku i przesunięcie rurki oparcia na wymaganą pozycję. Jest to bardzo ważne, ponieważ zapewnia prawidłowe ułożenie ciała dziecka, zarówno w pozycji wyprostowanej, jak i odchylonej.

Dostępne są trzy ustawienia.

Zaleca się, aby dopasować głębokość fotelika (SD) do długości ud dziecka. Udo dziecka mierzy się od dolnej części pleców do tylnej części stawu kolanowego. Następnie należy ustawić oparcie w położeniu A, B lub C według poniższej tabeli.



Głębokości oparcia nie powinno się regulować, gdy dziecko znajduje się w systemie siedziska.

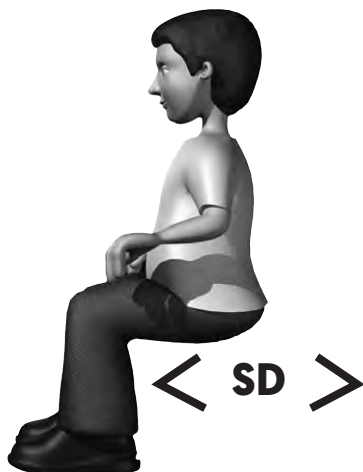


Głębokość oparcia	Rozmiar 1 (SD)	Rozmiar 2 (SD)
Pozycja A	270 - 320mm / 10.6 - 12.6 cala	350 - 390mm / 13.8 - 15.4 cala
Pozycja B	320 - 370mm / 12.6 - 14.6 cala	390 - 430mm / 15.4 - 16.9 cala
Pozycja C	370 - 420mm / 14.6 - 16.5 cala	430 - 470mm / 16.9 - 18.5 cala



10.5 WYSOKOŚĆ OPARCIA

Ogólną wysokość oparcia można wyregulować poprzez poluzowanie dwóch śrub z łbem gniazdowym, a następnie dopasowanie wysokości oparcia do wysokości ramion użytkownika. Po ustawieniu wymaganej wysokości należy ponownie mocno dokręcić śruby z łbem gniazdowym. Ustawienie wysokości można dodatkowo skorygować, gdy użytkownik znajduje się w foteliku.

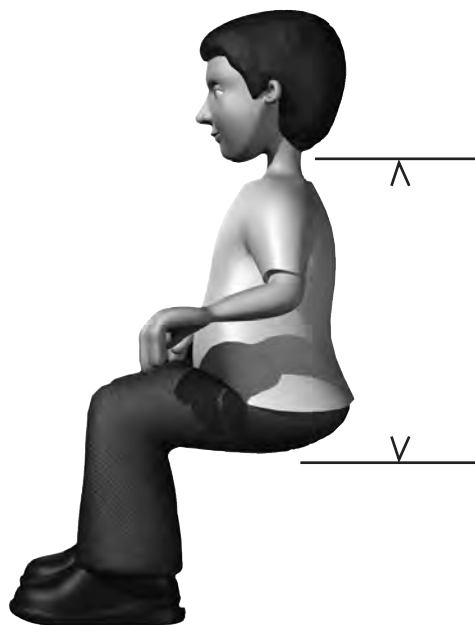

Przy ustawianiu minimalnej wysokości należy zachować ostrożność, aby palce nie zostały przytrzaśnięte między ruchomymi i nieruchomymi częściami.



10.6 KĄT NACHYLENIA OPARCIA

Kąt nachylenia oparcia można zmienić poprzez poluzowanie śruby **A**. Ustawić wymaganą pozycję i ponownie mocno dokręcić śrubę. Aby utrzymać wymaganą pozycję ciała dziecka, zawsze należy upewnić się, że oparcie zostało dokręcone pod odpowiednim kątem.

Kąt nachylenia oparcia można wyregulować, gdy dziecko znajduje się w foteliku, ale należy zawsze przytrzymywać oparcie jedną ręką.

naklejek. Można je nakleić na wolny pasek na rurce mechanizmu regulacji, aby wskazać wymagane pozycje dla różnych czynności, takich jak odpoczynek, jedzenie i zabawa.

Naklejony pasek ze wskaźnikami kątów odchylenia służy do oznaczenia kątów mierzonych od poduszki siedziska do oparcia.



Czarno-żółty pasek z ostrzeżeniami przed niebezpieczeństwem, naklejony na wewnętrzną rurkę, wskazuje maksymalne możliwe odchylenie oparcia w przód lub w tył.







Po obu stronach regulacji ustawienia oparcia znajdują się naklejone paski ze wskaźnikami. Wskaźniki kąta odchylenia (przedstawione poniżej) można znaleźć w załączonym zestawie



10.7 REGULOWANIE RUCHOMEGO OPARCIA

Aby zapewnić wystarczająco płynny ruch oparcia, należy poluzować uchwyt **A**, przesunąć oparcie na wymaganą pozycję i mocno dokręcić. Aby z powrotem ustawić oparcie w pozycji nieruchomej, należy poluzować uchwyt **A**, wsunąć pręt oparcia w jego spodnią część i ponownie dokręcić uchwyt.

Aby wyregulować kąt odchylenia ruchomego oparcia, należy użyć uchwyty na podstawie oparcia. Pociągnąć sworzeń blokujący **C**, przekręcić i odblokować. Przesunąć uchwyt **B** w górę i wyregulować oparcie. Pociągnąć sworzeń blokujący **C**. Upewnić się, że sworzeń blokujący jest zablokowany.

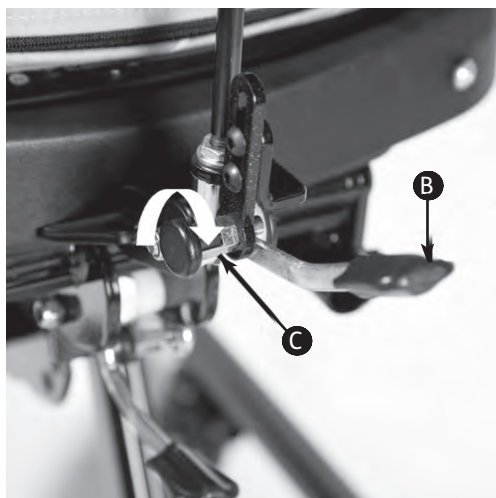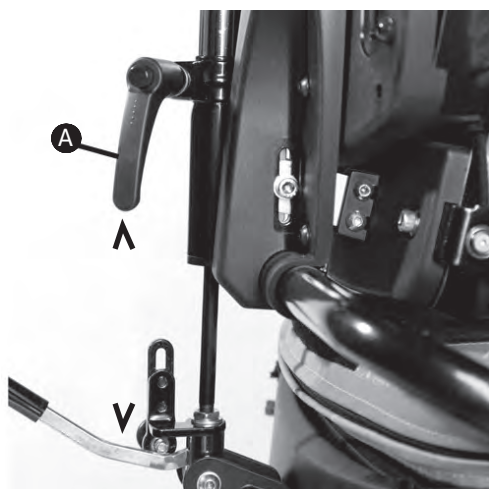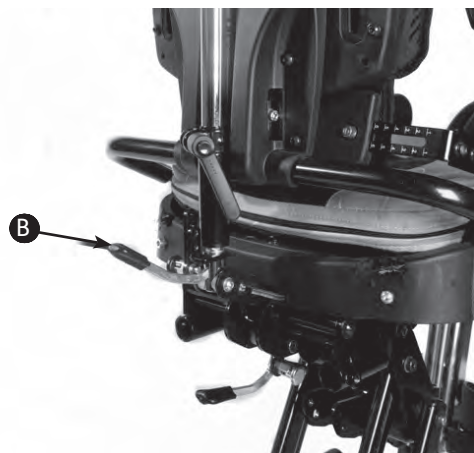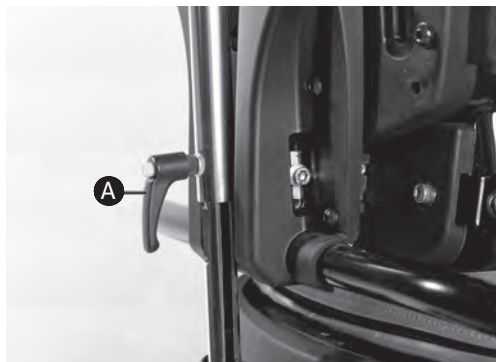

Zakres regulacji kąta odchylenia oparcia i zakres płynnego ruchu wynosi 30°, tj., jeśli oparcie jest ustawione pionowo, system płynnego ruchu zapewnia odchylenie o pełne 30°. Jeśli kąt odchylenia oparcia wynosi 10°, wówczas płynny ruch oparcia jest możliwy jedynie w zakresie 20° itd.



Gdy system siedziska jest używany w środku transportu, oparcie musi znajdować się w pozycji pionowej z zablokowaną funkcją płynnego ruchu (tj. uchwyt A musi znajdować się w najniższym położeniu z tyłu oparcia) i należy upewnić się, że sworzeń blokujący C jest zablokowany.


10.8 REGULOWANIE PODPARCIA UD

W chwili dostawy podparcie ud będzie ustawione w pozycji minimalnej głębokości. Głębokość należy ustawić przed umieszczeniem dziecka w foteliku. Dokładna regulacja jest możliwa po umieszczeniu dziecka w foteliku, ale jest ograniczona przez wagę użytkownika. Aby ustawić prawidłową pozycję, należy zmierzyć odległość od dolnej części pleców do tylnej części stawu kolanowego dziecka.


W przypadku rozmiaru 1 należy ustawić podparcie w wymaganej pozycji przy użyciu dźwigni blokującej **A** znajdujących się na spodzie siedziska. Aby

wyregulować, należy nacisnąć i puścić przycisk blokujący. Podparcia powinny być wówczas skierowane do przodu. Jednakże w sytuacji, gdy należy dodatkowo uwzględnić szpotawość kolan lub ruchy odwodzenia i przywodzenia, kąt odchylenia powinien być odpowiednio dostosowany przy użyciu dźwigni blokującej.

Podparcia można wyregulować ponownie po umieszczeniu dziecka w foteliku.

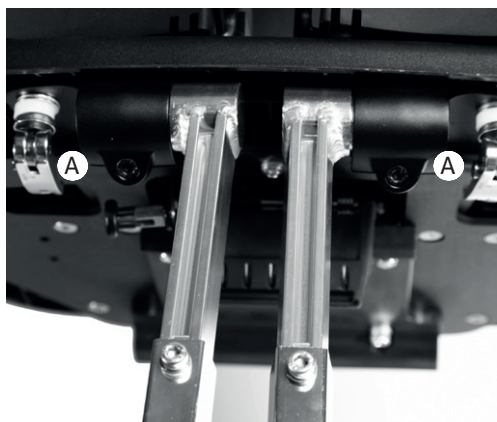


W przypadku rozmiaru 2 należy poluzować dźwignie blokujące znajdujące się pod fotelikiem i przesunąć podparcia nóg na wymaganą pozycję. Podparcia powinny być wówczas skierowane do przodu. Jednakże w sytuacji, gdy należy dodatkowo uwzględnić szpotawość kolan lub ruchy odwodzenia i przywodzenia, kąt odchylenia powinien być odpowiednio dostosowany. Ponownie przykręcić śrubę. Aby dodatkowo zwiększyć kąt odchylenia, należy wykręcić śrubę i odpowiednio odchylić podparcie nóg. Wsunąć śrubę w drugi otwór **B** i dokręcić.

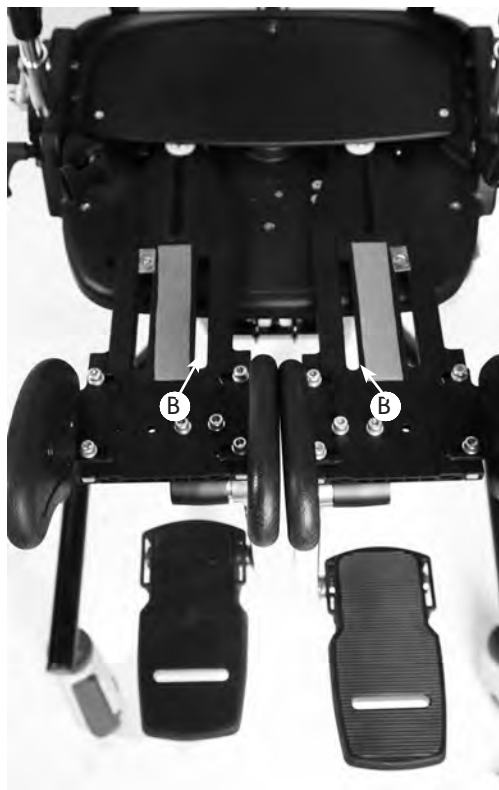

10.9 PELOTY ELEMENTÓW POZYCJONUJĄCYCH UDA

W przypadku rozmiaru 1, aby wyregulować szerokość podparcia kolan, należy poluzować śruby **A** znajdujące się na spodzie podparcia nóg. Ustawić wymaganą szerokość i ponownie dokręcić. W przypadku rozmiaru 2, aby wyregulować szerokość lub kąt odchylenia pelot, należy poluzować śruby **B** od góry, przesunąć elementy pozycjonujące i dokręcić śruby.

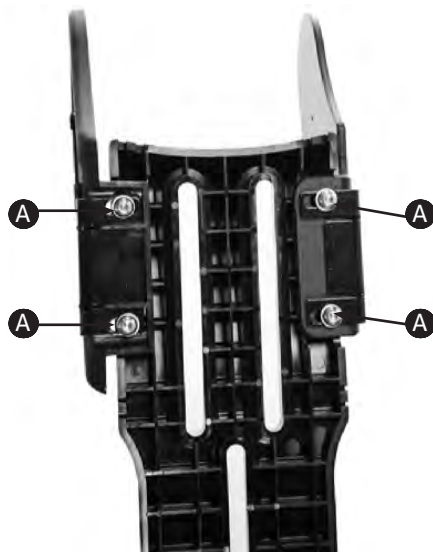

10.10 WYSOKOŚĆ PODNOŻKA

Aby wyregulować wysokość podnóżka, należy poluzować śrubę **A** znajdującą się w przedniej części rurki podpierającej łydkę, przesunąć podnóżek na wymaganą wysokość i ponownie dokręcić śrubę.

Aby ustawić prawidłową wysokość podnóżka, należy zmierzyć odległość od tylnej części stawu kolanowego dziecka do jego pięty.

Ustawienie wymaganej pozycji stopy może wymagać regulacji kąta odchylenia. Aby wyregulować kąt odchylenia, należy poluzować śrubę **B** przy użyciu narzędzia wielofunkcyjnego, ustawić wymagany kąt odchylenia i ponownie przykręcić.

Zatrząsk bezpieczeństwa wskazuje maksymalne bezpieczne wydłużenie. Wysokość podnóżka można wyregulować, gdy dziecko znajduje się w foteliku.




Należy zawsze sprawdzać, czy podnóżek jest odpowiednio przymocowany, aby użytkownik nie zsunął się na przednią część siedziska, co mogłoby stwarzać ryzyko uduszenia, jeśli uprząż piersiowa lub uprząż na tułów jest zamocowana.

10.11 REGULACJA KĄTA NACHYLENIA PODNOŻKA

Aby ustawić kąt odchylenia uwzględniający zgięcie podeszwy lub grzbietowe, wystarczy poluzować lub dokręcić ręczne pokrętko **A** i wybrać odpowiedni kąt.

Aby ułatwić transport, można odchylić podnóżek do góry

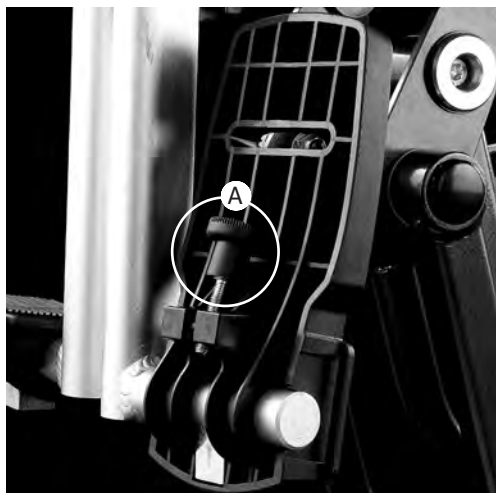

10.12 ELASTYCZNE PODPARCIE KRZYŻOWE

Elastycznego podparcia krzyżowego używa się razem z uprzężą pozycjonującą biodra lub osłoną biodrową. Aby wyregulować wysokość, głębokość i kąt odchylenia, należy poluzować śruby po obu stronach przy użyciu dostarczonego narzędzia wielofunkcyjnego.

Ustawić prawidłowy kąt odchylenia podparcia i ponownie dokręcić śruby. Podparcie będzie się odginać w przód i w tył, aby pomóc dziecku w przyjęciu preferowanej postawy.

Należy zawsze zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców podczas regulowania podparcia krzyżowego.




Należy zawsze zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców podczas regulowania podparcia krzyżowego.



10.13 PELOTY PIERSIOWE

Poluzować zaślepkę gniazda **A**, aby wyregulować szerokość, wysokość i kąt nachylenia pelot i ponownie przykręcić po ustawieniu wymaganej pozycji.

Aby zmienić ustawienie odchylanych pelot, należy użyć pokrętła B.

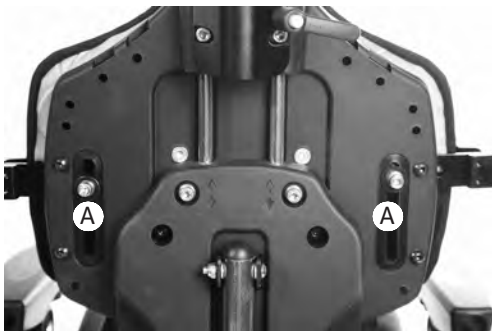

10.14 UPRZĘŻ PIERSIOWA

Aby zmienić szerokość uprząży piersiowej, należy podnieść przedni pokrowiec, wyregulować pasy z rzepami do wymaganej szerokości i ponownie założyć pokrowiec.



10.15 UPRZĄŻ NA TUŁÓW

Gdy dziecko nie znajduje się w systemie siedziska, uprząż na tułów będzie otwarta, ale nadal będzie przymocowana za pomocą dwóch bocznych zatrzasków **A** po jednej stronie i jednego zatrzasku uprząży biodrowej **B**. Umieszczając dziecko w systemie siedziska, należy założyć uprząż na przednią część tułowia dziecka i zapiąć ją, łącząc zatrzaski ze sprzączkami po drugiej stronie **C**.

Połączyć pozostałe paski z uprząż lub osłoną biodrową, przepychając je przez klamrę **D** i zapinając zatrzaski.

Następnie połączyć pasy ramienne **E** z dwoma zatrzaskami w górnej części.

Jeśli dziecko ma na sobie okrycie wierzchnie, boczne pasy można odpiąć, zwalniając zatrzaski. Pas łączący uprząż biodrową można zwolnić, przepinając go na niższy zatrzask.

Wszystkie pasy łączące można wyregulować. W tym celu należy podnieść pokrowiec, ustawić wymaganą długość i ponownie założyć pokrowiec.



Należy regularnie sprawdzać peloty i uprząże, aby upewnić się, że nie obluźowały się, ponieważ bez odpowiedniego podparcia tułowia dziecko może zsunąć się na pozycję, z której nie będzie mogło się samodzielnie wydostać. Mogłoby to stworzyć ryzyko uduszenia.





10.16 REGULOWANIE NAKOLANNIKÓW

Nakolanników można użyć jako organiczników, które pomagają zapobiec zsunięciu się dziecka na przednią część siedziska. Nakolannik można również zapiąć nad kolanem, aby dziecko nie podnosiło stopy. Aby wyregulować nakolanniki, należy podnieść przedni pokrowiec, wyregulować pasy z rzepami do wymaganej długości i ponownie zamocować pokrowiec. Aby zdjąć nakolannik, należy odpiąć zatrzask po jeden stronie.



10.17 SANDAŁY

Aby ułożyć stopy użytkownika w sandałach, należy zapiąć załączone pasy z rzepami tak, aby przytrzymywały stopy w miejscu. Paski powinny się znajdować na zgięciu stopy i nad palcami. Przedni pasek można przepchnąć przez jeden z dwóch otworów po bokach sandałów, w zależności od rozmiaru stopy użytkownika (2).



Jeśli dziecko nosi sandały lub lekkie obuwie, należy sprawdzić paski, aby upewnić się, że nylonowy materiał nie podrażnia skóry.

1



2



10.18 PELOTY PODPARCIA RAMION

(wyłącznie rozmiar 2)

Aby wyregulować kąt odchylenia pelot podparcia ramion, należy poluzować śrubę A, ustawić peloty pod wymaganym kątem i ponownie dokręcić śrubę.



10.19 PROFILOWANY ZAGŁÓWEK

Aby wyregulować wysokość, głębokość i kąt nachylenia profilowanego zagłówka, należy poluzować ręczne pokrętło **A** i przykręcić je ponownie po ustawieniu wymaganej pozycji. Nie należy zdejmować zagłówka, gdy użytkownik znajduje się w foteliku.



Nie należy nigdy używać zagłówka do wymuszania ułożenia głowy użytkownika.

Należy zawsze zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców podczas regulowania zagłówka.



10.20 PŁASKI ZAGŁÓWEK Z PELOTAMI BOCZNYMI

Aby wyregulować wysokość, głębokość i kąt nachylenia płaskiego zagłówka, należy użyć ręcznych dźwigni **A** w sposób przedstawiony w odniesieniu do profilowanego zagłówka.

Aby wyregulować szerokość pelot, należy poluzować pokrętło z tworzywa sztucznego **B**, przesunąć peloty na wymaganą pozycję i mocno dokręcić.



10.21 REGULOWANIE PODŁOKIETNIKA

Aby wyregulować wysokość podłokietnika, należy poluzować ręczne pokrętło

Ⓐ, ustawić wymaganą wysokość i ponownie dokręcić. Aby wyregulować kąt nachylenia, należy obracać uchwyt pozycjonujący Ⓑ do uzyskania wymaganej pozycji.

Aby całkowicie zdemontować podłokietnik, należy poluzować uchwyt pozycjonujący Ⓒ, nacisnąć zatrzask Ⓓ i unieść podłokietnik.



Należy zawsze zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców podczas regulacji wysokości.



10.22 REGULOWANIE STOLIKA

Wysokość i kąt nachylenia stolika można ustawić poprzez regulację podłokietników w sposób opisany powyżej. Aby zdjąć stół lub wyregulować jego głębokość, należy poluzować pokrętło Ⓐ pod podłokietnikami, ustawić wymaganą pozycję i ponownie mocno przykręcić.



Należy zawsze zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć dłoni lub przedramion dziecka podczas wsuwania stolika.

Nie należy nigdy używać stolika do manewrowania fotelikiem lub popychania go.

Na stoliku nie należy umieszczać przedmiotów rozgrzanych do temperatury wyższej niż 40°C.

Należy mieć na uwadze, że stolik jest przeznaczony wyłącznie dla użytkownika. Nie należy opierać o stolik ani kłaść na nim żadnych przedmiotów cięższych niż 8 kg (17,6 funta).

10.23 REGULACJA PORĘCZY

Aby wyregulować głębokość poręczy tak, aby dziecko mogło jej dosięgnąć, należy poluzować pokrętkę **A**, ustawić wymaganą głębokość i ponownie dokręcić.

Poziome pręty nie powinny wystawać poza stolik, jeśli nie zamierza się go zdemontować.



ROZDZIAŁ 11: CZĘSTE REGULACJE ZWIĄZANE Z CODZIENNYM UŻYTKOWANIEM

(terapeuci/ opiekunowie/rodzice)

Rodzicom i opiekunom powinno się zademonstrować, w jaki sposób należy przeprowadzać częste regulacje, a także powinno się zwrócić ich uwagę na konieczność przeprowadzania opisanych w rozdziale 6 kontroli bezpieczeństwa. Taką kontrolę przeprowadza osoba o odpowiedniej wiedzy technicznej i klinicznej, która przeszła wcześniej szkolenie w zakresie użytkowania produktu. Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru wszystkich rodziców i opiekunów, którzy zostali przeszkoleni w zakresie prawidłowego użytkowania niniejszego produktu.

11.1 PRZENOSZENIE DZIECKA Z FOTELIKA I NA FOTELIK

Przed przeniesieniem dziecka na fotelik należy przeprowadzić codzienną kontrolę produktu w sposób opisany w rozdziale 13 niniejszego podręcznika użytkownika.

Aby ułatwić przeniesienie dziecka na fotelik, należy odpowiednio wyregulować wysokość fotelika. Zablokować wszystkie kółka samonastawne tak, aby były skierowane na zewnątrz. Zapewnia to maksymalną stabilność produktu. Upewnić się, że klamra bezpieczeństwa

na uprząży piersiowej jest zwolniona i nie przeszkadza w przeniesieniu dziecka na fotelik.

Jeśli fotelik jest wyposażony w odchylane peloty piersiowe, należy najpierw odchylić je przy użyciu pokrętła A tak, aby nie przeszkadzały.

Odpiąć uprząż lub osłonę biodrową w jej środkowej części, rozpiąć boczny rzep osłony biodrowej i rozchylić uprząż tak, aby ułatwić przeniesienie dziecka na fotelik. Na koniec należy rozpiąć paski sandałów, jeśli są zamocowane. Po wykonywaniu powyższych czynności można przenieść dziecko na fotelik.

Uprząż i osłonę biodrową zapina się przy użyciu środkowej sprzączki, a osłonę biodrową przypina się również za pomocą bocznego rzepu.





Należy zawsze najpierw zapinać uprząż lub osłonę biodrową, a następnie pozostałe sprzączki lub uprząże. Wyregulować uprząż tak, aby dziecko nie mogło się zsunąć na przednią część siedziska.

11.2 REGULOWANIE UPRZĘŻY LUB OSŁONY BIODROWEJ

Prawidłowe umiejscowienie i naciągnięcie uprząży lub osłony biodrowej jest kluczowe dla regulacji postawy dziecka i ma wpływ na jego komfort i możliwość wykonywania różnych czynności.

Aby upewnić się, że uprząż jest prawidłowo umiejscowiona, a paski są odpowiednio naciągnięte, należy skonsultować się z terapeutą.

Aby naciągnąć pasy uprząży biodrowej i poduszki wokół dziecka, należy pociągnąć za środkowy pas **A**. Pociągnąć dwa pasy boczne **B** do góry tak, aby dokładnie wyregulować ułożenie bioder oraz wysokość poduszek na biodrach.

Aby naciągnąć osłonę biodrową, należy użyć 4 pasów bocznych **C** i rzepów **D**.

Jeśli fotelik jest używany na zewnątrz, a dziecko ma na sobie kurtkę, uprząż lub osłona biodrowa powinna znajdować się pod kurtką.

Uprząż biodrowa (rozmiar 1 lub 2)



Osłona biodrowa (wyłącznie rozmiar 2)





11.3 PODSTAWA JEZDNA

Konstrukcja fotelika Mygo pozwala na zamocowanie go na różnych podstawach jezdnych. W niniejszym podręczniku użytkownika przedstawiono prawidłowy, bezpieczny sposób użytkowania systemu siedziska z podstawą jezdłą firmy Leckey z regulacją wysokości. Informacji na temat wszystkich innych podstaw jezdnych należy szukać w instrukcjach producentów.

Aby przygotować podstawę jezdłą z regulacją wysokości do zamocowania systemu siedziska, zalecamy podnieść ją na wysokość zapewniającą komfortową pozycję do montażu, naciskając pedał znajdujący się z tyłu podstawy jezdnej lub wciskając przycisk na pilocie w przypadku wersji z zasilaniem elektrycznym.



Jeśli dziecko jest ruchliwe lub miewa skurcze mięśni prostujących, po każdym skurczu należy sprawdzić, czy uprząż lub osłona biodrowa jest zapięta, aby upewnić się, że dziecko jest bezpieczne i nie zsunie się na przednią część siedzenia.

Należy zawsze zapinać środkową sprzączkę na uprząży lub osłonie biodrowej przed regulacją jakichkolwiek innych elementów.



11.4 ELEKTRYCZNA REGULACJA WYSOKOŚCI

Podstawę jezdną z elektryczną regulacją wysokości można łatwo wyregulować za pomocą przycisku na pilocie. Wysokość fotelika można regulować, gdy użytkownik znajduje się w foteliku. Przed pierwszym użyciem produktu zaleca się ładowanie akumulatora przez 12 godzin. W tym celu należy podłączyć adapter do zasilanego gniazdka w ścianie, a przewód **A** — do akumulatora. Po naładowaniu należy odłączyć adapter i przewód zasilający. Akumulator należy ładować codziennie przez około jedną godzinę. Można regulować wysokość fotelika, gdy jest on podłączony do gniazdka w ścianie.




11.5 REGULACJA WYSOKOŚCI — PODSTAWA JEZDNA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCIŚ

Wysokość można wyregulować, gdy dziecko znajduje się w foteliku. Aby wyregulować wysokość podstawy jezdnej, należy nacisnąć pedał znajdujący się w jej tylnej części lub — w przypadku wersji z zasilaniem elektrycznym — wcisnąć przycisk na pilocie, jednocześnie trzymając rączkę do prowadzenia. Po zdjęciu stopy z pedału lub zwolnieniu przycisku na pilocie fotelik zostanie ustawiony na wybranej wysokości.

Dla bezpieczeństwa pedał regulacji wysokości na podstawie jezdnej można zablokować przy użyciu sworznia blokującego **C** znajdującego się po prawej stronie pedału. Aby odblokować



sworzeń i użyć pedału, należy pociągnąć sworzeń i obrócić go o 90 stopni. Gdy podstawa jezdna nie jest regulowana, sworzeń blokujący **C** powinien znajdować się w pozycji zablokowanej.

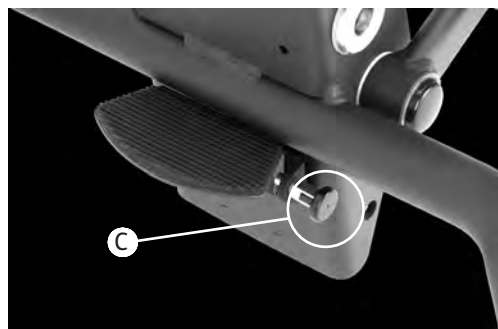

11.6 ODCHYLENIE PRZESTRZENNE

Mechanizmu odchylania przestrzennego można używać, gdy użytkownik znajduje się w foteliku. Przed regulacją kąta odchylenia mechanizmu odchylania przestrzennego fotelika należy zawsze upewnić się, że uprząż biodrowa jest zapięta, aby użytkownik nie zsunął się na przednią część siedziska.

Aby wyregulować kąt odchylenia, należy nacisnąć dźwignię znajdującą się pod siedziskiem. Po ustawieniu wymaganego kąta odchylenia wystarczy puścić dźwignię, a fotelik zostanie zablokowany w tej pozycji. Mechanizm odchylania przestrzennego powinien być odblokowywany, gdy użytkownik znajduje się w foteliku. Aby zablokować dźwignię, należy przekręcić sworzeń w prawo względem dźwigni tak, aby wskoczył na miejsce. Może to wymagać lekkiego uniesienia dźwigni. Aby odblokować dźwignię, należy wyciągnąć sworzeń i obrócić go o 90 stopni.




Dźwignia odchylania przestrzennego powinna zawsze znajdować się w pozycji zablokowanej, aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu, co mogłoby skutkować szarpnięciem fotelika i uszkodzeniem ciała dziecka.



Mechanizm odchyłania przestrzennego obsługuje się przy użyciu uchwytów.

Należy zawsze skonsultować się z terapeutą, aby upewnić się, że użycie mechanizmu odchyłania przestrzennego nie spowoduje zablokowania dróg oddechowych dziecka.

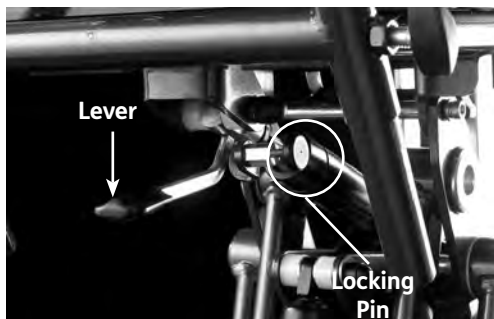

Always keep the tilt-in- space lever in the locked position to prevent accidental actuation of the lever which could cause the seat unit to jolt and possibly cause injury to the child.

Please use handle bars when operating tilt-in-space.

Always check with your therapist that the use of tilt-in-space will not cause any obstructions to the child's airways.


11.7 REGULOWANIE RUCHOMEGO OPARCIA

Aby z powrotem ustawić oparcie w pozycji nieruchomej, należy poluzować uchwyt **A**, wsunąć pręt oparcia w jego spodnią część i ponownie dokręcić uchwyt.



Gdy system siedziska jest używany w środku transportu, oparcie musi znajdować się w pozycji

pionowej z zablokowaną funkcją płynnego ruchu (tj. uchwyt A musi znajdować się w najniższym położeniu z tyłu oparcia) i należy upewnić się, że sworzeń blokujący C jest zablokowany.

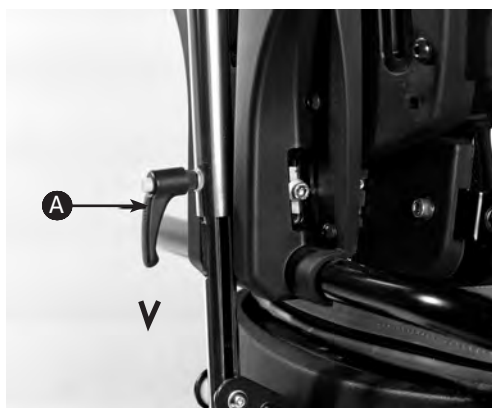

11.8 REGULOWANIE UPRZĘŻY PIERSIOWEJ I UPRZĘŻY NA TUŁÓW

Jeśli dziecko wymaga podparcia klatki piersiowej w ramach programu utrzymywania postawy, fotelik zostanie wyposażony w sztywne peloty boczne lub połączenie pelot, uprząży piersiowej i uprząży na tułów. Mogą one wymagać codziennej regulacji w celu dopasowania do różnych ubrań.



Należy zawsze skonsultować się z terapeutą w kwestii optymalnego umiejscowienia i naciągnięcia pasków oraz elementów podparcia dziecka.

Aby zmienić szerokość uprząży piersiowej, należy podnieść przedni pokrowiec i wyregulować pasy z rzepami do wymaganej szerokości, a następnie ponownie założyć pokrowiec.

Szczegółowe instrukcje regulowania uprząży na tułów można **znaleźć w rozdziale 10.**





Gdy uprząż piersiowa jest używana, należy zawsze upewnić się, że sprzączki z tworzywa sztucznego są odpowiednio zapięte.

Sprawdzić, czy uprząż i peloty boczne są odpowiednio zamocowane, aby upewnić się, że dziecko jest bezpiecznie i nie zsunie się na przednią część siedzenia, co mogłoby utrudnić oddychanie.



11.9 SANDAŁY

Aby ułożyć stopy użytkownika w sandałach, należy zapiąć załączone paski z rzepami tak, aby przytrzymały stopy w miejscu. Paski powinny się znajdować na zgięciu stopy i nad palcami. Przedni pasek można przepchnąć przez jeden z dwóch otworów po bokach sandałów, w zależności od rozmiaru stopy użytkownika (2).



Jeśli dziecko nosi sandały lub lekkie obuwie, należy sprawdzić paski, aby upewnić się, że nylonowy materiał nie podrażnia skóry.



11.10 REGULOWANIE STOLIKA

Stolik może pełnić wiele różnych funkcji, a jego pozycję można dokładnie wyregulować w zależności od potrzeb użytkownika i wykonywanych czynności, np. zabawy, uczenia się lub jedzenia.

Stolik mocuje się do fotelika, przekładając rurki stolika przez środek podłokietników. Po zamocowaniu stolika, należy mocno dokręcić pokrętko **A**.

Wyregulować podłokietniki, aby ustawić wysokość i kąt nachylenia stolika.



Należy zawsze zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców podczas regulacji wysokości.

Należy zawsze zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć dłoni lub przedramion dziecka podczas wsuwania stolika. Nie należy nigdy używać stolika do manewrowania fotelikiem lub popychania go.



Na stoliku nie należy umieszczać przedmiotów rozgrzanych do temperatury wyższej niż 40°C.

Należy mieć na uwadze, że stolik jest przeznaczony wyłącznie dla użytkownika. Nie należy opierać o stolik ani kłaść na nim żadnych przedmiotów cięższych niż 8 kg (17,6 funta).

11.11 REGULOWANIE PODŁOKIETNIKA

Aby wyregulować wysokość podłokietnika, należy poluzować ręczne pokrętko **B**, ustawić wymaganą wysokość i ponownie dokręcić. Aby wyregulować kąt odchylenia, należy obracać ręczne pokrętko **A** do uzyskania wymaganej pozycji.

Aby całkowicie zdemontować podłokietnik w celu łatwiejszego przeniesienia dziecka na fotelik lub wyjęcia go z fotelika, należy poluzować ręczne pokrętko **C**, nacisnąć zatrzask **D** i unieść podłokietnik.

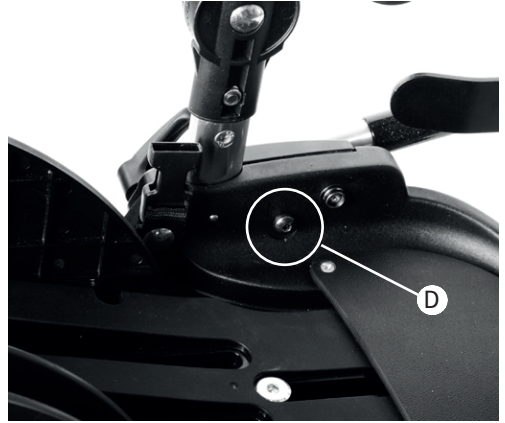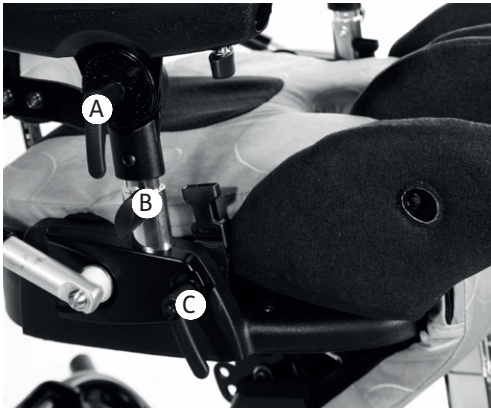


11.12 REGULACJA PORĘCZY

Aby wyregulować głębokość poręczy tak, aby dziecko mogło jej dosięgnąć, należy poluzować pokrętko **A**, ustawić wymaganą głębokość i ponownie dokręcić.

Poziome pręty nie powinny wystawać poza stolik, jeśli nie zamierza się go zdemontować.

Aby szybko zdemontować poręcz, należy poluzować pokrętki **B** po obu stronach i wysunąć poręcz, ciągnąc w górę.

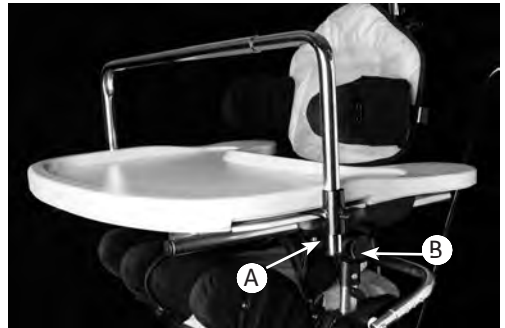

ROZDZIAŁ 12: INFORMACJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

Konserwacja

Zaleca się, aby do czyszczenia używać wyłącznie ciepłej wody i nieściernego środka czyszczącego. Nie należy nigdy używać rozpuszczalników organicznych ani środków do czyszczenia na sucho.

Obicia i tkaniny

1. Pokrowce poduszek można zdjąć, wyprać w pralce w temperaturze 40°C i wysuszyć w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze.

Należy wyjąć piankowe wypełnienia z następujących pokrowców przed umieszczeniem ich w pralce:

- Pokrowiec zagłówka
- Pokrowiec podparcia ramion
- Pokrowiec poduszki oparcia
- Pokrowiec poduszki siedziska

Wszystkie inne obicia z miękkiej tkaniny można umieścić w pralce w całości, po wyjęciu śrub i elementów mocujących.



2. Obicia i tkaniny można również czyścić ręcznie, nie zdejmując ich z fotelika. Zaleca się, aby do czyszczenia używać wyłącznie ciepłej wody i nieściernego środka czyszczącego.
3. Plamy należy usuwać możliwe jak najszybciej przy użyciu ściereczki z materiału wchłaniającego wilgoć, ręczników lub gąbki. Czyszczenie zwykłą gąbką i wodą z mydłem jest skuteczne w przypadku zwykłych zabrudzeń i niewielkich plam rozlanych cieczy. Należy zachować ostrożność, aby zbyt nie zamoczyć tkaniny, ponieważ mogłoby to skutkować rozlaniem się plamy.
4. W przypadku trudniejszych do usunięcia plam można użyć antyseptycznych środków czyszczących. W takim przypadku koniecznie może być użycie bezpiecznego rozpuszczalnika, takiego jak alkohol izopropylowy lub spirytus mineralny. Jako przydatnego środka dezynfekującego można również użyć pół kubka wybielacza na 5 litrów wody.
5. Uprząż biodrową i uprząż na tułów można prać w pralce w temperaturze 40°C. Najpierw należy jednak wyjąć wszystkie śruby i odczepić zapięcia, aby nie uszkodziły pralki. Należy umieścić je w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

ROZDZIAŁ 13: CODZIENNA KONTROLA PRODUKTU

6. Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że produkt zdążył wyschnąć.

Elementy metalowe i elementy z tworzywa sztucznego

1. Do codziennego czyszczenia można użyć wody z mydłem lub sprayu antybakteryjnego.
2. Do dokładniejszego czyszczenia można użyć niskociśnieniowej myjki parowej.
3. Do czyszczenia elementów metalowych lub elementów z tworzywa sztucznego nie należy używać rozpuszczalników.
4. Przed użyciem należy upewnić się, że produkt zdążył wyschnąć.

(terapeuci, rodzice i opiekunowie)

Zaleca się, aby terapeuci, opiekunowie lub rodzice przeprowadzali codzienne kontrole wzrokowe sprzętu, aby upewnić się, że produkt jest bezpieczny w użyciu. Zalecane codzienne kontrole wymieniono poniżej.

1. Należy się upewnić, że wszystkie pokrętła regulacyjne i śruby znajdują się na swoich miejscach i są odpowiednio dokręcone.
2. Należy sprawdzić wszystkie obicia i rzepty pod kątem zużycia.
3. Należy sprawdzić, czy wszystkie kółka samonastawne obracają się swobodnie i czy blokady działają.
4. Należy upewnić się, że rączka i sworzeń blokujący na ramie fotelika są całkowicie zablokowane, a fotelik jest odpowiednio przymocowany do podstawy jezdnej.
5. Należy upewnić się, że uprząż biodrowa jest odpowiednio zapięta wokół użytkownika tak, aby użytkownik nie zsunął się na przednią część siedziska.
6. Należy upewnić się, że podnózek jest odpowiednio przymocowany.



W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dalszego bezpiecznego użytkowania produktu firmy Leckey lub w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części należy zaprzestać dalszego użytkowania produktu i jak najszybciej skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta lub lokalnym przedstawicielem handlowym.

13.1 Etykieta identyfikacyjna

Etykietę identyfikacyjną umieszczono na produkcie oraz instrukcji użytkownika. Składając reklamację lub zamówienie na części zamienne, należy podać następujące informacje:

- Numer seryjny
- Datę produkcji



	Nazwa/kod produktu
	Maksymalny ciężar
	Oznaczenie CE
	Instrukcja użytkownika
	Data produkcji
	Numer seryjny

ROZDZIAŁ 14: COROCZNA KONTROLA PRODUKTU

(Terapeuta, technik, konsultant ds. produktów firmy Leckey, przedstawiciel handlowy)

Firma Leckey zaleca, aby każdy produkt był poddawany szczegółowej kontroli co najmniej raz w roku i za każdym razem, gdy produkt jest wydawany do ponownego użytku. Taka kontrola powinna być przeprowadzana przez osobę o odpowiedniej wiedzy technicznej, która przeszła wcześniej szkolenie w zakresie użytkowania produktu, i powinna uwzględniać co najmniej czynności wymienione poniżej.

1. Sprawdzić, czy wszystkie uchwyty pozycjonujące, pokrętki, nakrętki, śruby i klamry z tworzywa sztucznego są na swoich miejscach i uzupełnić wszelkie brakujące elementy. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące elementy:
 - Śruby blokujące zagłówek.
 - Śruby regulujące wysokość i kąt nachylenia oparcia.
 - Śruby regulujące głębokość siedziska.
 - Śruby mocujące uprząż biodrową/elementy pozycjonujące biodra.
 - Mechanizm regulujący wysokość i kąt nachylenia podnóżka.
2. Sprawdzić, czy mechanizm regulujący wysokość podstawy jezdnej funkcjonuje prawidłowo. Jeśli wysokość podstawy jezdnej reguluje się za pomocą pedału, należy się upewnić, że wysokość fotelika nie ulega zmianie po zwolnieniu pedału. Należy również upewnić się, że sworzeń blokujący jest zablokowany, aby zapobiec przypadkowej zmianie wysokości podstawy jezdnej.
3. Wyregulować maksymalny zakres odchylania przestrzennego fotelika i upewnić się, że dźwignia blokująca blokuje fotelik w różnych pozycjach w ustawionym zakresie kątów odchylenia.
4. Sprawdzić połączenie podstawy jezdnej i siedziska pod kątem zużycia metalowych elementów.
5. Unieść podstawę i sprawdzić poszczególne kółka samonastawne. Należy upewnić się, że gumowe kółka obracają się swobodnie i usunąć wszelkie zabrudzenia. Sprawdzić funkcjonowanie hamulców blokujących kółka.
6. Przeprowadzić kontrolę wzrokową konstrukcji produktu, zwracając uwagę na elementy spawane ramy, aby upewnić się, że nie są pęknięte ani zużyte.
7. Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru corocznych kontroli produktu. product inspections.

ROZDZIAŁ 15: WYDAWANIE PRODUKTÓW FIRMY LECKEY DO PONOWNEGO UŻYTKU

Większość produktów firmy Leckey dopasowuje się do indywidualnych potrzeb użytkowników. Przed wydaniem produktu do ponownego użytku zaleca się, aby terapeuta przepisujący produkt przeprowadził kontrolę kompatybilności i upewnił się, że produkt wydawany do ponownego użytku jest odpowiedni dla nowego użytkownika i nie został w żaden sposób zmodyfikowany ani nie dołączono do niego żadnych dodatkowych elementów.

Przed wydaniem produktu do ponownego użytku należy przeprowadzić szczegółową kontrolę techniczną. Taka kontrola powinna być przeprowadzana przez osobę o odpowiedniej wiedzy technicznej, która przeszła wcześniej szkolenie w zakresie użytkowania i przeprowadzania przeglądu produktu. Wymagane czynności kontrolne wymieniono w **rozdziale 14**.

Należy się upewnić, że produkt został dokładnie wyczyszczony zgodnie z opisem w **rozdziale 12** niniejszej instrukcji obsługi.

Należy się upewnić, że do produktu dołączono kopię instrukcji obsługi. Instrukcję można pobrać z naszej strony internetowej pod adresem **www.leckey.com**.

Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru wszystkich kontroli produktu przeprowadzanych przed ponownym wydaniem go do użytku.



W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dalszego bezpiecznego użytkowania produktu firmy Leckey lub w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części należy zaprzestać dalszego użytkowania produktu i jak najszybciej skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta lub lokalnym przedstawicielem handlowym.

ROZDZIAŁ 16: SERWISOWANIE PRODUKTU

Przeglądy serwisowe wszystkich produktów firmy Leckey mogą przeprowadzać wyłącznie osoby o odpowiedniej wiedzy technicznej, które przeszły wcześniej szkolenie w zakresie użytkowania produktu.

W przypadku produktów użytkowanych na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii należy skontaktować się z Centrum Serwisowym firmy Leckey pod brytyjskim numerem telefonu 0800 318265 lub irlandzkim numerem telefonu 1800 626020, a pracownicy naszego Działu Obsługi Klienta udzielą wszelkiej niezbędnej pomocy związanej z serwisowaniem produktu.

Wszystkie międzynarodowe zapytania dotyczące serwisowania produktów powinny być kierowane do odpowiedniego dystrybutora firmy Leckey, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji. Więcej informacji o dystrybutorach firmy Leckey można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem **www.leckey.com**.

ROZDZIAŁ 17: INFORMACJE TECHNICZNE

Kody produktów i akcesoriów

117-610	Size 1 Seat Shell
137-600	Size 2 Seat Shell
117-1851*	Size 1 Seat Cushion & Covers
117-2851*	Size 2 Seat Cushion & Covers
194-700	Mygo Seat Interface for Sunrise Base

Podstawa jezdna

102-2753	Hi-Low Chassis Foot Pedal
102-2754	Hi-Low Chassis Powered
117-780	Mygo on Mobility Base (UK only)
117-784	Mygo on Stroller Base

Akcesoria

117-801	Uprząż biodrowa — mała
117-802	Uprząż biodrowa — średnia
133-728	Ostona biodrowa
137-632	Peloty biodrowe
117-1777	Podłokietniki, rozmiar 1
117-2777	Podłokietniki, rozmiar 2
117-1776	Podnóżki, rozmiar 1
117-2776	Podnóżki, rozmiar 2
152-1600	Sandały, rozmiar 1
152-2600	Sandały, rozmiar 2
152-3600	Sandały, rozmiar 3
117-803	Sztywne peloty z czarnymi pokrowcami
117-837	Odchylane peloty z czarnymi pokrowcami
137-621	Podparcie ramion
137-801*	Poduszka podparcia ramion i pokrowiec
117-757	Uprząż piersiowa
120-799	Uprząż na tułów — mała
120-757	Uprząż na tułów — średnia
117-761	Uprząż na tułów — duża
117-765	Nakolanniki
117-851-05	Płaski zagłówek i poduszka
120-893-05	Płaski zagłówek z pelotami i pokrowcami
137-699-05	Profilowany zagłówek i poduszka
117-724	Stolik
117-769	Poręcz
117-791	Zestaw ukośnych poduszek
AH01	Para małych stabilizatorów kostek
AH02	Para średnich stabilizatorów kostek

Opcje mobilnych połączeń

117-775	Element połączeniowy A
117-726	Element połączeniowy B
117-727	Element połączeniowy C

*Dodatkowe opcje kolorystyczne

- +07 Kolor pomarańczowy
- +08 Kolor niebieski
- +09 Kolor różowy
- +06 Kolor szary

ROZDZIAŁ 17: SPECYFIKACJA

Wymiary fotelika Mygo		
Rozmiar	Size 1	Size 2
Wiek (w przybliżeniu)	3- 10 lat	8- 14 lat
Kody	117-610	137-600
Waga użytkownika	Min. 18kg / 40lbs Maks. 50kg / 110lbs	Min. 18kg / 40lbs Maks. 50kg / 110lbs
Wzrost użytkownika	Min. 105cm / 41 cala Maks. 150cm / 59 cala	Min. 127cm / 50 cala Maks. 168cm / 66 cala
Szerokość fotelika	Min. 200mm / 8 cala Maks. 325mm / 13 cala	Min. 220mm / 8.7 cala Maks. 345mm / 13.6 cala
Głębokość fotelika	Min. 270mm / 10.6 cala Maks. 420mm / 16.5 cala	Min. 350mm / 13.8 cala Maks. 470mm / 18.5 cala
Szerokość kolana	Min. 90mm / 3.5 cala Maks. 110mm / 4.3 cala	Min. 120mm / 4.7 cala Maks. 470mm / 18.5 cala
Podnózek:		
Odwodzenie	8°	8°
Przywodzenie	12°	20°
Zgięcie podeszwowe/grzbietowe	10°	10°
Szerokość klatki piersiowej	Min. 170mm / 6.7 cala Maks. 270mm / 10.6 cala	Min. 170mm / 6.7 cala Maks. 270mm / 10.6 cala
Wysokość oparcia	Min. 360mm / 14.2 cala Maks. 470mm / 18.5 cala	Min. 460mm / 18.1 cala Maks. 570mm / 22.4 cala
Kąt nachylenia oparcia:		
W przód	10°	10°
W tył	25°	25°
Odległość od siedziska do sandału	Min. 215mm / 8.5 cala Maks. 350mm / 13.8 cala	Min. 315mm / 12.4 cala Maks. 470mm / 18.5 cala
Odległość od górnej części siedziska do podłogi	Min. 360mm / 14.2 cala Maks. 700mm / 27.5 cala	Min. 360mm / 14.2 cala Maks. 700mm / 27.5 cala
Wysokość podłokietników		
Rozmiar stolika		
Ciężar fotelika	10kg / 22 funty	14.5kg / 32 funty

OPCJE PODSTAWY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI FIRMY LECKEY

Szczegóły techniczne		
Z regulacją wysokości przy użyciu pedału [odległość od górnej części siedziska do podłogi]	Min 340cm / 13 cala	Max 655cm / 26 cala
Z elektryczną regulacją wysokości [odległość od górnej części siedziska do podłogi]	Min 370cm / 15 cala	Max 675cm / 27 cala
Odchylenie przestrzenne:		137-600
W przód	10°	
W tył	25°	
Ciężar podstawy	12kg	26.5lbs

6.3 Dane techniczne siłownika LINAK

- 281209-01

Oznaczenie IP51

Cykl pracy: maks. 10% lub 2 min ciągłego użytkowania, po których następuje 18 min bezczynności.

Temperatura otoczenia: od +5°C do +40°C Temperatura robocza otoczenia: 22°C

Temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C Maksymalna siła pchania: 3500 N

Maksymalna siła ciągnięcia 2000 N

Autoblokada przy 3500 N siły pchania – 2000 N siły ciągnięcia Typowa prędkość przy pełnym obciążeniu 4,7 mm/sek. Maks. natężenie prądu przy obciążeniu 3500 N to 3,9 ampera Poziom hałas w dB(A): 48

Napięcie wejściowe zasilania: 24 V +/- 10%

6.4 Akumulator LINAK - BA18021-00 Oznaczenie IP51

Temperatura otoczenia: od +5°C do 40°C Temperatura przechowania: od -20°C do 60°C

Pojemność znamionowa: 1,2 Ah 24 V Natężenie prądu ładowania wynosi maks. 0,3 A.

Akumulator ołowiowo-kwasowy

6.5 Pilot LINAK - HB41000-00004 Oznaczenie IP51

Prąd sterujący: 100 mA na kanał (maks.) Temperatura otoczenia: od +5°C do +40°C

Ładowarka LINAK - CH01

Prąd zasilania: 100–240 V AC/50–60 Hz, zasilacz impulsowy

Napięcie ładowania: 27,6 V DC +/- 2% Maks. prąd ładowania: 500 mA Zielona dioda

LED sygnalizująca zasilanie

Żółta dioda LED sygnalizująca ładowanie

Żółta dioda LED zmienia kolor na zielony, gdy akumulator jest w pełni naładowany.

Produkty LINAK można przechowywać w nieogrzewanych pomieszczeniach o wilgotności wynoszącej od 0 do 100% przy braku kondensacji. Brak kondensacji oznacza, że produkt nie powinien być przenoszony z wychłodzonego magazynu do pomieszczenia o temperaturze 20°C. W takim przypadku na produkcie pojawi się wilgoć



James Leckey Design Ltd.
19 Ballinderry Road
Lisburn, BT28 2SA
Northern Ireland

[+44] 28 9260 0750
hello@leckey.com

leckey.com



LS151-06