

LECKEY

# ProneStander

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA





Pionizator Leckey Pronestander zaprojektowano z myślą o podtrzymywaniu ciężaru ciała przy zachowaniu symetrycznej postawy. W niniejszym podręczniku wyjaśniono, jak szybko i łatwo korzystać z wszystkich funkcji pionizatora. Przestrzeganie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i konserwacji produktu zapewni długi okres użytkowania.

## Spis treści

01. Przeznaczenie
02. Deklaracja zgodności
03. Warunki gwarancji
04. Historia produktu
05. Dokumentacja dotycząca szkolenia w zakresie obsługi produktu
06. Informacje dotyczące bezpiecznego użycia
07. Rozpakowywanie i montaż
08. Ustawienie kliniczne w celu regulacji postawy
09. Częste regulacje związane z codziennym użytkowaniem
10. Informacje o czyszczeniu i konserwacji produktu
11. Codzienna kontrola produktu
12. Coroczna kontrola produktu
13. Wydawanie produktów firmy Leckey do ponownego użytku
14. Serwisowanie produktu
15. Informacje techniczne

## **1 Przeznaczenie**

Pionizator Leckey Pronestander jest przeznaczony do użytku w domu lub w szkole.

Dostępny zakres kątów ustawienia w pozycji pionowej z podparciem z przodu umożliwi stopniowe zwiększanie obciążenia w miarę wzrostu tolerancji.

Pionizator Leckey Pronestander jest przeznaczony dla dzieci

w wieku 1–17 lat z

niepełnosprawnościami, takimi jak porażenie mózgowe. Pozycja stojąca sprzyja prawidłowemu rozwojowi bioder oraz kształtowaniu się mięśni. Ponadto korzystnie wpływa na samopoczucie.

## **2 Deklaracja zgodności**

Firma James Leckey Design Ltd. jako producent oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że pionizator Leckey Freestander spełnia wymogi Wytycznych EWG 93/42 oraz normy EN12182: Wyroby pomocnicze dla osób niepełnosprawnych. Wymagania ogólne i metody badań.

## **3 Warunki gwarancji**

Gwarancja obowiązuje wyłącznie, gdy produkt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, określonymi warunkami i wszystkimi zaleceniami producenta (patrz również: ogólne warunki sprzedaży, dostawy i płatności). Wszystkie produkty i części produktów firmy Leckey są objęte trzyletnią gwarancją.

## **4 Historia produktu**

Niniejszy produkt firmy Leckey został sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy 1, w związku z czym powinien być przepisywany pacjentowi, ustawiany lub wydawany do ponownego użytku wyłącznie przez osobę o odpowiedniej wiedzy technicznej, która przeszła wcześniej szkolenie w zakresie jego obsługi. Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wszelkich ustawień, kontroli przy wydawaniu do ponownego użytku oraz corocznych kontroli niniejszego produktu.

## **5 Dokumentacja dotycząca szkolenia w zakresie obsługi produktu (rodzice, nauczyciele i opiekunowie)**

Niniejszy produkt firmy Leckey to przepisany przez lekarza wyrób medyczny klasy 1, w związku z czym firma Leckey zaleca, aby osoba o odpowiedniej wiedzy technicznej zapoznała rodziców, nauczycieli i opiekunów używających wspomnianego wyrobu z następującymi rozdziałami niniejszej instrukcji użytkownika:

### **Rozdział 6**

Informacje dotyczące bezpiecznego użycia

### **Rozdział 9**

Częste regulacje związane z codziennym użytkowaniem

### **Rozdział 11**

Codzienna kontrola produktu

Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru osób, które zostały przeszkolone w zakresie prawidłowego użytkowania niniejszego produktu.

## 6 Informacje dotyczące bezpiecznego użycia



6.1 Przed użyciem należy zawsze dokładnie przeczytać instrukcję.



6.2 W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa podczas korzystania z produktu firmy Leckey użytkowników nie powinno się w żadnym wypadku pozostawiać bez opieki.



6.3 Razem z produktem należy używać wyłącznie elementów zatwierdzonych przez firmę Leckey. Nie należy w żaden sposób modyfikować produktu. Nieprzestrzeganie instrukcji może narazić użytkownika lub opiekuna na niebezpieczeństwo i będzie skutkowało unieważnieniem gwarancji.



6.4 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dalszego bezpiecznego użytkowania produktu lub w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części należy zaprzestać dalszego użytkowania produktu i jak najszybciej skontaktować się z naszym Zespołem ds. Obsługi Klientów lub lokalnym przedstawicielem handlowym.



6.5 Zaleca się, aby nigdy nie przenosić użytkowników bezpośrednio z pozycji siedzącej do pozycji stojącej bez przygotowania i rozciągania. Najlepiej wykonywać te czynności w pozycji leżącej na macie, ale w razie konieczności można je również wykonywać na wózku lub w systemie siedziska.



6.6 Przed umieszczeniem użytkownika w pionizatorze należy wykonać wszystkie czynności regulacji pozycji i upewnić się, że wszystkie elementy są odpowiednio przymocowane.



6.7 Po umieszczeniu użytkownika w ramie pionizatora dla zachowania bezpieczeństwa należy zawsze najpierw zapiąć pas biodrowy. Następnie należy zapiąć pas piersiowy i pasy kolanowe.



6.8 Po umieszczeniu produktu w stabilnej pozycji należy się upewnić, że wszystkie kółka samonastawne są zablokowane i skierowane z dala od podstawy, co zapewni większą stabilność produktu.



6.9 Nie należy nigdy regulować kąta odchylenia pionizatora ani całkowitej wysokości podparcia klatki piersiowej podczas korzystania z ramy pionizatora. Bardziej dokładną regulację można bezpiecznie przeprowadzać, gdy użytkownik znajduje się w pionizatorze.



6.10 Nie należy nigdy pozostawiać produktu na powierzchni o pochyłości większej niż 5 stopni. Należy zawsze pamiętać o zablokowaniu wszystkich kółek samonastawnych.



6.11 Produkt zawiera elementy, które stwarzają ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia przez małe dzieci. Należy zawsze upewnić się, że pokręta i śruby blokujące znajdujące się w zasięgu dziecka są dokręcone i zabezpieczone.



6.12 Produkty firmy Leckey są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa przeciwpożarowego według normy EN12182. Jednakże produkt zawiera elementy z tworzywa sztucznego, a zatem powinien być przechowywany i użytkowany z dala od wszelkich bezpośrednich źródeł ciepła, w tym otwartego ognia, papierosów oraz grzejników elektrycznych i gazowych.



6.13 Na stoliku nie należy umieszczać przedmiotów rozgrzanych do temperatury wyższej niż 40°C.



**6.14 Należy regularnie czyścić produkt. Nie należy używać ściernych środków czyszczących. Należy regularnie przeprowadzać konserwację, aby upewnić się, że produkt jest w dobrym stanie.**



**6.15 Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach, a nieużywany produkt powinien być przechowywany w suchym miejscu, niewystawionym na działanie wysokich temperatur.**



**6.16 Bezpieczna temperatura użytkowania produktu mieści się w zakresie od +5° do +40°C.**

# **Rozpakowywanie i montaż**

**7**

### **Sprawdzanie części**

Gratulujemy zakupu pionizatora Leckey Pronestander. Pionizator zostanie dostarczony w pudełku, w pozycji złożonej. Stolik zostanie zapakowany osobno. Do standardowego wyposażenia pionizatora należą: podparcie klatki piersiowej razem z odchylanymi pelotami, podparcie kolan, podparcie bioder razem z pasem, odchylany podnózek, sandały i stolik z miską.



**Bezpieczeństwo przede wszystkim**  
**Polietylenowe opakowania należy trzymać z dala od dzieci.**



**Przed umieszczeniem użytkownika w pionizatorze należy się upewnić, że pręt mechanizmu regulacji kąta odchylenia jest odpowiednio zamocowany.**

### **Montaż pionizatora**

W celu zmontowania pionizatora należy najpierw wyciągnąć go z pudełka z pomocą drugiej osoby lub zdjąć opakowanie i wytoczyć pionizator, korzystając z kótek samonastawnych. Następnie kółka samonastawne należy zablokować pod kątem 45 stopni tak, aby były skierowane na zewnątrz ramy.



## 7.1 Ustawianie kąta odchylenia

Aby ustawić pionizator w pozycji odchylonej pod wymaganym kątem, należy najpierw przytrzymać podparcie klatki piersiowej, a następnie ostrożnie przechylić w pionie główną ramę pionizatora. Aby odpowiednio ustawić pręt mechanizmu regulacji kąta odchylenia (b), należy poluzować trzy śruby (a) w sposób przedstawiony na zdjęciach. Następnie należy ponownie umieścić podparcie na swoim miejscu i dokręcić trzy śruby (a).






**Nie należy nigdy regulować kąta odchylenia pionizatora podczas korzystania z ramy.**




## 7.2 Mocowanie stolika

Aby zamocować stolik pionizatora, należy nasunąć zewnątrz pręty przymocowane do stolika na wewnętrzne pręty przymocowane do ramy i dokręcić śruby (a). Następnie należy umieścić sworzeń mocujący w jednym z otworów (b) z boku ramy.

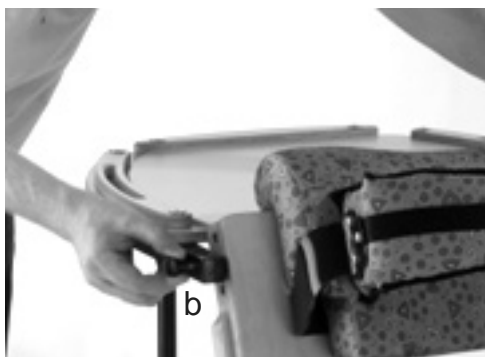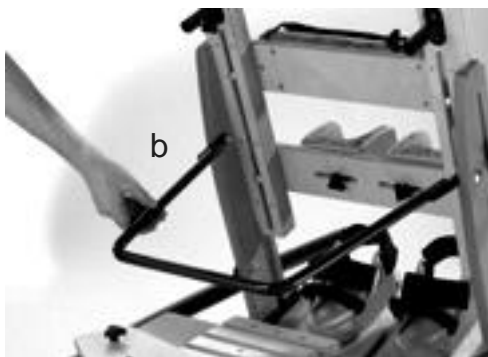
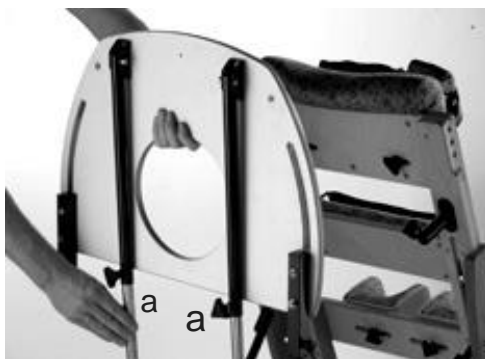


## 7.3 Mocowanie sandałów

Przełożyć wymaganą śrubę mocującą (a) przez płytkę z otworem (b). Nałożyć gumowe osłony (c) na wierzch i spód sandału. Przymocować przy użyciu czterech dostarczonych śrub (d). Aby zdemontować lub wymienić śrubę mocującą, należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

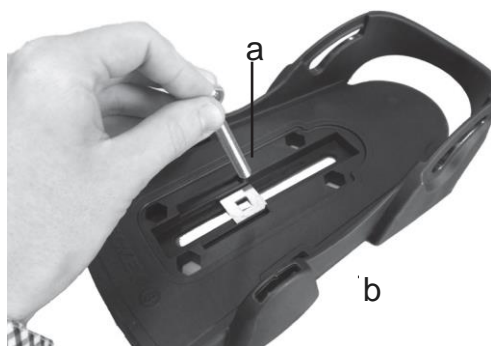

Umieścić sandał w taki sposób, aby śruba mocująca przechodziła przez otwór w podnóżku. Aby przymocować sandał, należy nałożyć na śrubę mocującą znajdującą się na spodzie podnóżka najpierw gumową podkładkę (e), a następnie metalową podkładkę (f) i pokrętkę (g). Aby wyregulować sandały, wystarczy poluzować pokrętkę (g) znajdujące się na spodzie podnóżka, wybrać wymagane położenie i ponownie przykręcić pokrętkę.

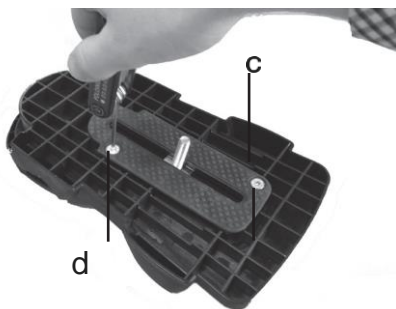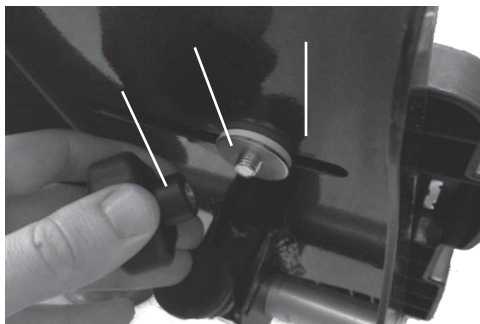

# Ustawienie kliniczne w celu regulacji postawy

Ustawienie kliniczne produktu powinno być wykonane przez osobę o odpowiedniej wiedzy technicznej i klinicznej, która przeszła wcześniej szkolenie w zakresie użytkowania produktu. Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru wszystkich ustawień klinicznych niniejszego produktu.





## 8.1 Ustawianie kąta odchylenia

Dostępnych jest pięć różnych ustawień kąta odchylenia pionizatora. W zależności od stopnia tolerancji pozycji stojącej przez użytkownika pionizator można ustawić albo całkowicie pionowo, albo pod kątem, z podparciem z przodu.

Po wyborze wymaganego kąta odchylenia pozostałe elementy pionizatora można ustawić odpowiednio do potrzeb użytkownika.



**Przed umieszczeniem użytkownika w pionizatorze należy się upewnić, że pręt mechanizmu regulacji kąta odchylenia jest odpowiednio zamocowany.**

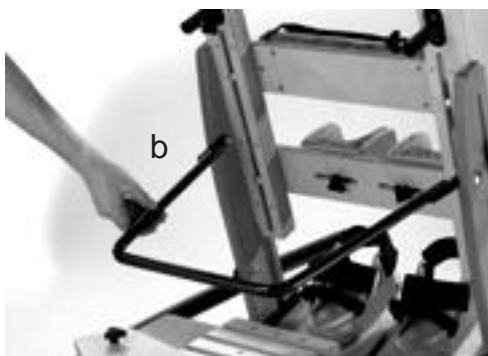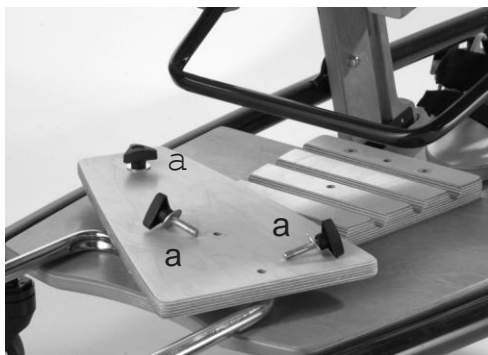

## 8.2 Regulacja wysokości podparcia klatki piersiowej

Najpierw należy zmierzyć odległość od stóp użytkownika do punktu tuż poniżej rąk.

Ten pomiar najlepiej wykonać, gdy użytkownik leży na macie. Odległość między górną częścią podparcia klatki piersiowej a sandałami należy ustawić tak, aby była równa zmierzonej odległości.

Wysokość podparcia klatki piersiowej można później zmienić poprzez poluzowanie pokręteł znajdujących się z boku ramy. Po poluzowaniu pokręteł całą wewnętrzną część (w tym podparcie klatki piersiowej, podparcie bioder i podparcie kolan) można przesunąć w górę lub w dół. Po ustawieniu wymaganej wysokości należy ponownie mocno dokręcić pokrętła.



**Nie należy nigdy regulować wysokości głównej ramy podczas korzystania z pionizatora.**



**Przed umieszczeniem użytkownika w pionizatorze należy sprawdzić, czy pokrętła regulacyjne na podparciu klatki piersiowej są dokręcone.**



## 8.3 Regulacja podparcia bioder

Należy ustawić wysokość podparcia bioder równą odległości między górną częścią bioder użytkownika a jego stopami. Aby wyregulować podparcie bioder, należy poluzować śruby po obu stronach podparcia i przesunąć wyściełane podparcie na wymaganą pozycję. Po ustawieniu wymaganej pozycji należy ponownie mocno dokręcić śruby (a).



## 8.4 Regulacja podparcia kolan

Aby wyregulować wysokość podparcia kolan, należy poluzować śruby (a) po obu stronach podparcia, przesunąć podparcie na wymaganą pozycję i ponownie mocno dokręcić śruby (a).



**Pomniejsze regulacje podparcia kolan i bioder można wykonywać podczas korzystania z pionizatora.**



**Podczas regulacji podparcia kolan należy zawsze zachowywać ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców.**



## 8.5 Regulacja elementów podtrzymujących kolana

Elementy podtrzymujące kolana można przesuwając w lewo lub w prawo, a każdy taki element jest przymocowany do tylnej części podparcia kolan za pomocą pojedynczej śruby. Aby wyregulować element podtrzymujący kolano należy poluzować śrubę, umieścić element na wymaganej pozycji, a następnie ponownie mocno dokręcić śrubę (a).



**Podczas regulacji elementów podtrzymujących kolana należy zawsze zachowywać ostrożność, aby nie przytrafić palców.**



## 8.6 Mocowanie pasa biodrowego

Pas biodrowy należy najpierw zapiąć wokół użytkownika. Również w tym przypadku najlepiej robić to na macie.

Paski biodrowe mocuje się wokół bioder użytkownika, a dłuższe paski przeciąga się przez sprzączki D-kształtne na podparciu bioder i zapina za użytkownikiem przy pomocy rzepów. Aby ułatwić odróżnienie paska zapinanego wokół użytkownika od paska mocowanego do ramy, na pasku otaczającym ramę umieszczono naszywkę firmy Leckey.



**Należy zawsze najpierw zapinać pas biodrowy i pas bezpieczeństwa, a następnie pas piersiowy i paski przytrzymujące stopy użytkownika.**



# Częste regulacje związane z codziennym użytkowaniem

Osoba o odpowiedniej wiedzy technicznej i klinicznej, która przeszła wcześniej szkolenie w zakresie użytkowania produktu, powinna zademonstrować rodzicom i opiekunom, w jaki sposób należy przeprowadzać częste regulacje, a także zwrócić ich uwagę na konieczność przeprowadzania opisanych w rozdziale 6 kontroli bezpieczeństwa. Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru wszystkich rodziców i opiekunów, którzy zostali przeszkoleni w zakresie prawidłowego użytkowania niniejszego produktu.



## 9.1 Przenoszenie użytkownika z pionizatora i na pionizator

Przed umieszczeniem dziecka w pionizatorze należy przeprowadzić codzienną kontrolę produktu w sposób opisany w rozdziale 11 niniejszego podręcznika użytkownika.

Przed umieszczeniem dziecka w pionizatorze należy zablokować wszystkie kółka samonastawne, upewniając się, że są skierowane na zewnątrz, aby zapewnić maksymalną stabilność produktu. Należy również upewnić się, że paski podtrzymujące klatkę piersiową, uprząż podparcia bioder i sandały są rozpięte i nie przeszkadzają w przeniesieniu użytkownika.



**Należy zawsze najpierw zapinać pas biodrowy i pas bezpieczeństwa, a następnie pas piersiowy i paski przytrzymujące stopy użytkownika.**

## 9.2 Regulacja sandałów i podnóżków

Podnóżek pionizatora jest rozdzielony i przymocowany zawiasowo do tylnej części płyty podnóżka. Ułatwia to regulację sandałów oraz przenoszenie użytkownika z pozycji siedzącej, np. z wózka. Aby wyregulować pozycję sandałów, wystarczy poluzować pokrętko znajdujące się na spodzie podnóżka (fotografia 1), wybrać wymaganą pozycję i ponownie przykręcić pokrętko. Aby ułożyć stopy użytkownika w sandałach, należy zapiąć załączone paski z rzepami tak, aby przytrzymały stopy w miejscu. Paski powinny się znajdować nad śródstopiem i nad palcami. Przedni pasek można przeciągnąć przez jeden z dwóch otworów znajdujących się po bokach sandałów, w zależności od rozmiaru stopy użytkownika (fotografia 2).



**Jeśli dziecko nosi sandały lub lekkie obuwie, należy sprawdzić paski, aby upewnić się, że nylonowy materiał nie podrażnia skóry.**



1

2





## 9.3 Regulacja odchylanych pelot bocznych


Peloty boczne pionizatora można odchyłać do wewnątrz i na zewnątrz. W tym celu należy poluzować śruby znajdujące się z tyłu podparcia klatki piersiowej.

Po poluzowaniu śrub można ustawić odchylane peloty boczne w wymaganej pozycji, po czym należy ponownie dokręcić śruby. Można również w niewielkim zakresie regulować wysokość odchylanych pelot bocznych. Aby zmienić wysokość, należy poluzować śruby z gniazdem sześciokątnym (b), umieścić peloty w wymaganym położeniu i ponownie przykręcić śruby (b).

Odchylane peloty boczne mocuje się wokół użytkownika, odpowiednio zaciskając pas bezpieczeństwa. Pas bezpieczeństwa należy zapiąć natychmiast po umieszczeniu użytkownika w pionizatorze.



**Podczas regulacji pelot bocznych należy zawsze zachowywać ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców.**

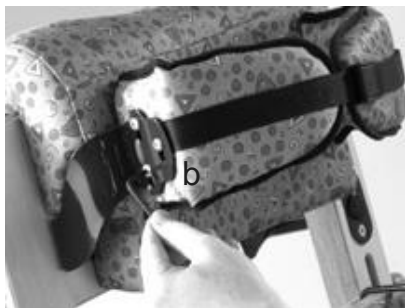

## 9.4 Regulacja stolika

Aby wyregulować wysokość i kąt odchylenia stolika, należy poluzować śruby (a) na prętach stolika, ustawić wymaganą pozycję i ponownie dokręcić śruby (a). Można również zmieniać położenie stolika względem podparcia klatki piersiowej. Można wybrać jedną z trzech dostępnych pozycji, aby zapewnić swobodę ruchów rąk.



## 9.5 Mocowanie pasa biodrowego

Pas biodrowy należy najpierw zapiąć wokół użytkownika. Również w tym przypadku najlepiej robić to na macie. Paski biodrowe mocuje się wokół bioder użytkownika, a dłuższe paski przeciąga się przez sprzączki D-kształtne na podparciu bioder i zapina za użytkownikiem przy pomocy rzepów. Aby ułatwić odróżnienie paska zapinanego wokół użytkownika od paska mocowanego do ramy, na pasku otaczającym ramę umieszczono naszywkę firmy Leckey.



**Należy zawsze najpierw zapinać pas biodrowy i pas bezpieczeństwa, a następnie pas piersiowy i paski przytrzymujące stopy użytkownika.**



## 10 Informacje o czyszczeniu i konserwacji produktu

### Konserwacja

Zaleca się, aby do czyszczenia produktu używać wyłącznie ciepłej wody i nieściernego środka czyszczącego. Nie należy nigdy używać rozpuszczalników organicznych ani środków do czyszczenia na sucho.

### Obicia i tkaniny

1. Obicia i tkaniny można czyścić ręcznie, nie zdejmując ich z pionizatora. Zaleca się, aby do czyszczenia używać wyłącznie ciepłej wody i nieściernego środka czyszczącego.

2. Plamy należy usuwać możliwie jak najszybciej przy użyciu ściereczki z materiału wchłaniającego wilgoć, ręczników lub gąbki. Czyszczenie zwykłą gąbką i wodą z mydłem jest skuteczne w przypadku zwykłych zabrudzeń i niewielkich plam rozlanych cieczy. Należy zachować ostrożność, aby zbytnio nie zamoczyć tkaniny, ponieważ mogłoby to skutkować rozlaniem się plamy.

3. W przypadku trudniejszych do usunięcia plam można użyć antyseptycznych środków czyszczących. W takim przypadku konieczne może być użycie bezpiecznego rozpuszczalnika, takiego jak alkohol izopropylowy lub spirytus mineralny. Jako przydatnego środka dezynfekującego można również użyć pół kubka wybielacza na 5 litrów wody.

4. Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że produkt zdążył wyschnąć.

### Elementy metalowe i drewniane oraz elementy z tworzywa sztucznego

1. Do codziennego czyszczenia można użyć wody z mydłem lub sprayu antybakteryjnego.

2. Do dokładniejszego czyszczenia można użyć niskociśnieniowej myjki parowej.

3. Do czyszczenia elementów metalowych, drewnianych lub wykonanych z tworzywa sztucznego nie należy używać rozpuszczalników.

4. Przed użyciem należy upewnić się, że produkt zdążył wyschnąć.

5. Należy regularnie sprawdzać wszystkie elementy drewniane pod kątem pęknięć i wystających drzazg.

## 11 Codzienna kontrola produktu

### (terapeuci, rodzice i opiekunowie)

Zaleca się, aby terapeuci, opiekunowie lub rodzice przeprowadzali codzienne kontrole wzrokowe sprzętu, aby upewnić się, że produkt jest bezpieczny w użyciu. Zalecane codzienne kontrole wymieniono poniżej.

1. Należy się upewnić, że wszystkie pokrętła regulacyjne i śruby znajdują się na swoich miejscach i są odpowiednio dokręcone.
2. Należy sprawdzić wszystkie obicia pod kątem zużycia.
3. Należy sprawdzić, czy wszystkie kółka samonastawne obracają się swobodnie i czy blokady działają.
4. Sprawdzić wszystkie rzepy i usunąć strzępki, aby upewnić się, że pasy się nie rozepną.
5. Przed umieszczeniem użytkownika w pionizatorze należy sprawdzić, czy pokrętła regulacyjne na podparciu klatki piersiowej są dokręcone.
6. Przed umieszczeniem użytkownika w pionizatorze należy się upewnić, że pręt mechanizmu regulacji kąta odchylenia jest odpowiednio zamocowany.



**W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dalszego bezpiecznego użytkowania produktu firmy Leckey lub w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części należy zaprzestać dalszego użytkowania produktu i jak najszybciej skontaktować się z naszym Zespołem ds. Obsługi Klientów lub lokalnym przedstawicielem handlowym.**

## 12 Coroczna kontrola produktu

### (terapeuta, technik, specjalista ds. produktów firmy VIDA, przedstawiciel handlowy)

Firma Leckey zaleca, aby każdy produkt był poddawany szczegółowej kontroli co najmniej raz w roku i za każdym razem, gdy jest wydawany do ponownego użytku. Taka kontrola powinna być przeprowadzana przez osobę o odpowiedniej wiedzy technicznej, która przeszła wcześniej szkolenie w zakresie użytkowania produktu, i powinna uwzględniać co najmniej czynności wymienione poniżej.

1. Sprawdzić, czy wszystkie pokrętła, nakrętki, śruby i klamry z tworzywa sztucznego są na swoich miejscach, i uzupełnić wszelkie brakujące elementy. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące elementy:

- Mechanizmy regulacji wysokości i kąta odchylenia podpór klatki piersiowej i bioder
- Pokrętła regulacyjne elementów podtrzymujących kolana

2. Unieść podstawę i sprawdzić poszczególne kółka samonastawne. Należy upewnić się, że gumowe kółka obracają się swobodnie, i usunąć wszelkie zabrudzenia. Sprawdzić funkcjonowanie hamulców blokujących kółka.
3. Przeprowadzić kontrolę wzrokową konstrukcji produktu, zwracając uwagę na elementy spawane ramy, aby upewnić się, że nie są pęknięte ani zużyte.
4. Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru corocznych kontroli produktu.



**W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dalszego bezpiecznego użytkowania produktu firmy Leckey lub w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części należy zaprzestać dalszego użytkowania produktu i jak najszybciej skontaktować się z naszym Zespołem ds. Obsługi Klientów lub lokalnym przedstawicielem handlowym.**

### **13 Wydawanie produktów firmy Leckey do ponownego użytku**

Większość produktów firmy Leckey dopasowuje się do indywidualnych potrzeb użytkowników. Przed wydaniem produktu do ponownego użytku zaleca się, aby terapeuta przepisujący produkt przeprowadził kontrolę kompatybilności i upewnił się, że produkt wydawany do ponownego użytku jest odpowiedni dla nowego użytkownika i nie został w żaden sposób zmodyfikowany ani nie dołączono do niego żadnych dodatkowych elementów.

Przed wydaniem produktu do ponownego użytku należy przeprowadzić szczegółową kontrolę techniczną. Taka kontrola powinna być przeprowadzana przez osobę o odpowiedniej wiedzy technicznej, która przeszła wcześniej szkolenie w zakresie użytkowania i przeprowadzania przeglądu produktu.

Wymagane czynności kontrolne wymieniono w rozdziale 12.

Należy się upewnić, że produkt został dokładnie wyczyszczony zgodnie z opisem w rozdziale 11 niniejszej instrukcji obsługi.

Należy się upewnić, że do produktu dołączono kopię instrukcji obsługi. Instrukcję można pobrać z naszej strony internetowej [www.leckey.com](http://www.leckey.com).

Firma Leckey zaleca prowadzenie rejestru wszystkich kontroli produktu przeprowadzanych przed ponownym wydaniem go do użytku.



**W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących dalszego bezpiecznego użytkowania produktu firmy Leckey lub w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części należy zaprzestać dalszego użytkowania produktu i jak najszybciej skontaktować się z naszym Zespołem ds. Obsługi Klientów lub lokalnym przedstawicielem handlowym.**

### **14 Serwisowanie produktu**

Przeglądy serwisowe wszystkich produktów firmy Leckey mogą przeprowadzać wyłącznie osoby o odpowiedniej wiedzy technicznej, które przeszły wcześniej szkolenie w zakresie użytkowania produktu.

Wszystkie międzynarodowe zapytania dotyczące serwisowania produktów powinny być kierowane do odpowiedniego dystrybutora firmy Leckey, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji. Więcej informacji o dystrybutorach firmy Leckey można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem [www.leckey.com](http://www.leckey.com).

## 15 Informacje techniczne

### Kody produktów

LPS/#/ Pionizator Pronestander

### KODY AKCESORIÓW

LPS/#/G Poręcz/Zawieszana poprzeczka

LPS/#/H Pręty-uchwyty

# Należy wybrać rozmiar.

Pionizator jest dostępny z dwoma rodzajami obić materiałowych. Pionizator w rozmiarze 1 jest dostępny ze standardowymi obiciami Meadow, a pionizatory w rozmiarach 2 i 3 są dostępne z niebieskimi obiciami Mondeo.

W ofercie akcesoriów do niniejszego produktu dostępne są również podgłówki. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z zespołem ds. obsługi klientów firmy VIDA lub lokalnym przedstawicielem handlowym.

## 15 Dane techniczne

### Rozmiary produktu

Rozmiar	1		2		3	
Wiek	1-5		4- 9 1/2		9-17	
Kody	LPS/1		LPS/2		LPS/3	
	mm	cale	mm	cale	mm	cale
Wysokość podparcia klatki piersiowej						
min.	470	18,5	680	27	975	38
maks.	680	27	975	38	1350	53
Podstawa						
długość	820	32	1070	42	1270	50
szerokość	600	24	650	26	700	28
Stolik						
głębokość	400	16	450	18	500	20
szerokość	525	21	575	23	625	25
Waga użytkownika						
maks.	30 kg	66 funtów	60 kg	132 funty	100 kg	220 funtów
Kąty odchylenia od pionu z podparciem z przodu	0° 10°	20° 30°	40°			

# LECKEY<sup>o</sup>

---

James Leckey Design Ltd.  
19C Ballinderry Road Lisburn  
BT28 2SA  
Irlandia Północna, Wielka Brytania

---

Tel.: 028 9260 0750  
Faks: 028 9260 0799  
E-mail: [info@leckey.com](mailto:info@leckey.com)  
Strona www: [www.leckey.com](http://www.leckey.com)