

Artikelnummer J3RFE

Jay J3 rygg på rullstol Etac Cross och Next

1



Ta fram originalfästet för J3 ryggen

2



Skruva bort låsdelen (till höger på bilden) från originalfästet (4mm Insexnyckel). Dessa skruvar skall användas vid montering på det nya beslaget. Skruva av vajern till låssprinten om denna skall användas.

3



Montera låsdelen på metallbeslaget. Följ formen på beslaget och låsdelen. Använd skruvarna som togs bort i moment 2, använd medföljande gänglåsning eller Loctite.

4


Ta bort all ryggklädsel från rullstolen.

5



Ta bort skruvarna som håller körhandtagen. Spara på de fyrkantiga muttrarna.

6

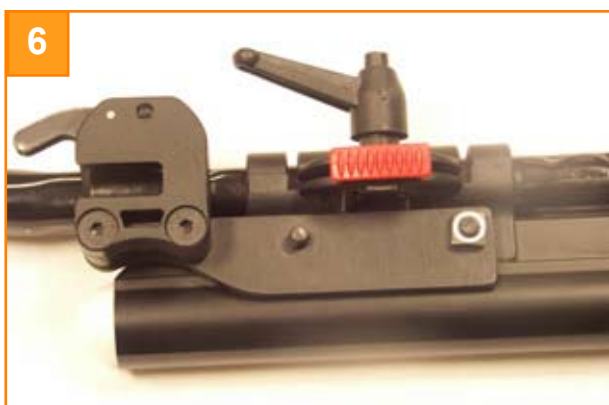

Sätt dit fästena, med låsdelen, på insidan av ryggroren med de längre svarta skruvarna, som levererats med fästena. Den rundade sidan skall vara framåt. Sätt dit muttrarna, som togs bort i moment 5, använd gänglåsning. Om låssprinten ska användas måste öglan borraras upp med 6 mm borr och fästas i ovan nämnda skruvar.