

Q300 M Mini Kids

Le fauteuil roulant
compact évolutif.



UN FAUTEUIL ROULANT TRÈS COMPACT POUR LES ENFANTS EN PLEINE CROISSANCE.

C'est un fait. Les enfants grandissent, souvent à vitesse grand V, plus rapidement que leurs vêtements et leurs fauteuils roulants électriques. C'est pourquoi nous avons développé le Q300 M Mini Kids - un fauteuil roulant électrique capable de suivre le rythme de croissance des enfants !

Passer à un nouveau fauteuil roulant plus grand est tout un changement pour les enfants, un changement qu'on peut éviter. Grâce à un système d'assise réglable grandissant à la fois en longueur et en largeur, un enfant de 10 ans peut parfaitement utiliser le même Q300 M Mini qu'il utilisait à l'âge de 6 ans.

Ce fauteuil roulant mérite bien l'épithète de « mini ». Sa base motrice super maniable et incroyablement étroite de 520 mm de large est parfaite pour naviguer aisément dans les endroits restreints. Aller à l'école, au cinéma ou au parc avec des amis ; tout est possible grâce aux excellentes performances en extérieur du Q300 M Mini Kids.

La fonction C-Me du fauteuil permet de rouler au pas avec l'assise relevée. Ainsi votre enfant peut s'amuser et jouer avec ses ami(e)s en toute joie et sécurité !



Scannez le code QR avec la caméra de votre smartphone pour voir la vidéo.



Le Q300 M Mini Kids est tellement compact que les portes ou les passages étroits à l'école ne sont plus un problème !




520

LARGEUR MM



QU'EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE ROUES MOTRICES CENTRALES ?

Les roues motrices sont positionnées précisément au milieu du fauteuil : placées plus en avant ou en arrière, le diamètre de braquage et l'espace de manœuvre nécessaire pour faire demi-tour entre deux murs augmenteraient inévitablement. Aussi, la traction serait réduite puisque une partie du poids ne sera plus les roues motrices. Grâce à sa VÉRITABLE traction centrale, le Q300 M Mini Kids offre le rayon de braquage le plus compact, ainsi qu'une traction et une stabilité supérieures.

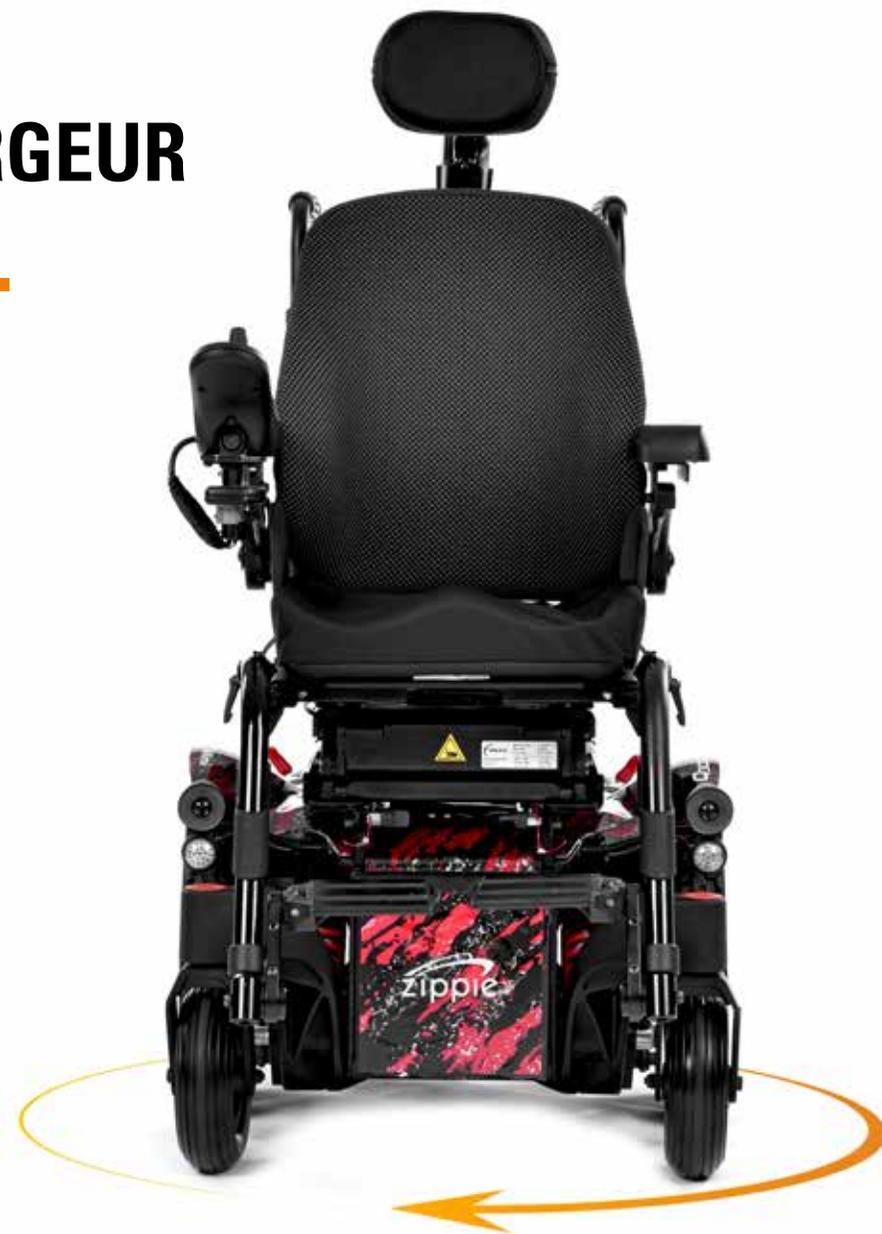

1120 mm

PETIT CERCLE DE BRAQUAGE

ESPACES RESTREINTS ? ROUES MOTRICES CENTRALES !

Salles de classe encombrées ou
couloirs bondés : le Q300 M Mini Kids
gère facilement. Ne plus jamais faire de
détour !





1120 mm

LONGUEUR

Avec une longueur de seulement 1120 mm, le Q300 M Mini Kids rentre facilement dans les plus petits ascenseurs et d'autres endroits restreints. Son poids, à partir de 103 kg, lui permet d'emprunter sans problèmes la plupart des plateformes élévatrices pour fauteuils roulants.

410 mm


HAUTEUR D'ASSISE

Les concepteurs du Q300 M Mini Kids se sont efforcés pour minimiser la hauteur d'assise. Le résultat : une hauteur de **410 mm** (bascule manuelle) ou **430 mm** (bascule électrique) permettant de prendre place à une table ou bureau aisément.



UNITÉ DE COMMANDE

Que faire si la position du manipulateur ne convient pas ? Avec l'option de montage (optionnelle) il est possible de verrouiller le manipulateur en 3 positions différentes : faire pivoter **vers l'extérieur** (pour s'approcher d'une table), **vers l'intérieur** (en cas de mobilité réduite des mains) ou utiliser la position **standard** (pour la conduite).

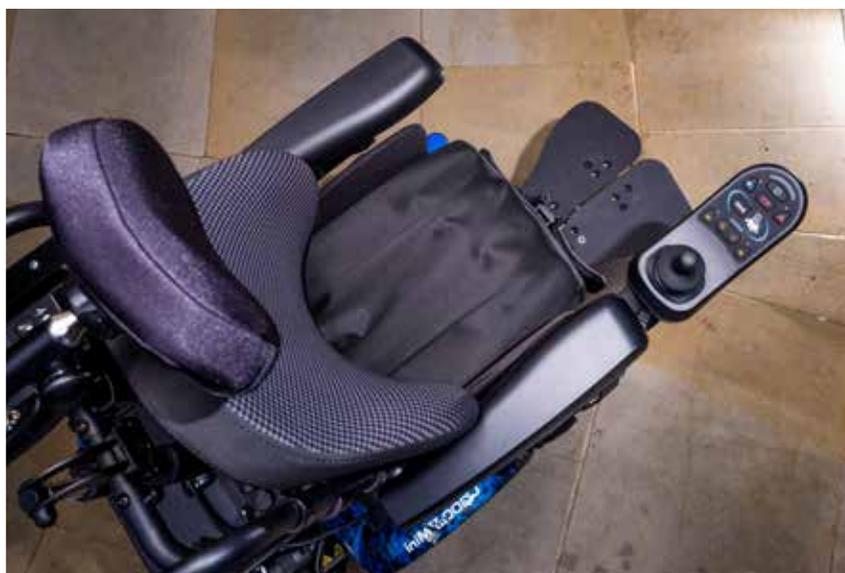

SE RAPPROCHER PLUS AVEC UN REPOSE-JAMBES CENTRAL

Avec un repose-jambes central au lieu des repose-pieds standards, le Q300 M Mini Kids a un diamètre de braquage vraiment minime. Aussi, les enfants peuvent se rapprocher encore plus des objets et mieux rouler leur fauteuil sous une table.

FAUTEUIL ROULANT COMPACT, GRANDES PERFORMANCES.

Profitez pleinement du Q300 M Mini Kids, le fauteuil roulant électrique compact avec de GRANDES performances en extérieur. Sortez en famille !

70 mm

MONTE-TROTTOIR

Franchir des trottoirs jusqu'à 70 mm ne forme aucun problème pour le Q300 M Mini Kids avec roues motrices 14". Il n'est donc pas nécessaire de faire de détour.



36 km

AUTONOMIE

Partir tranquille, sans se soucier de la charge des batteries

TECHNOLOGIE ANTI-PITCH

La technologie anti-tangage empêche le châssis de basculer trop vers l'avant lorsque le fauteuil ralentit, assurant la stabilité et sécurité de l'enfant assis dans le fauteuil roulant.



SYSTÈME DE SUSPENSION AJUSTABLE UNIQUE

Grâce au système de suspension indépendante en ajustable, les six roues ont leur propre suspension et restent au sol lorsque votre enfant franchit des obstacles. Le système de suspension absorbe également les chocs et les vibrations, pour un confort et une sécurité de conduite optimales.

MOTEURS 4 PÔLES PUISSANTS

Les moteurs puissants et fiables à 4 pôles et à couple élevé offrent des vitesses de 6 et de 10 km/h. Découvrez le monde ensemble !



UN SYSTÈME D'ASSISE ÉVOLUTIF.

Grandir ne signifie pas tout de suite grandir au-delà des limites de son fauteuil roulant électrique. Le Q300 M Mini Kids est équipé d'un système d'assise évolutif, réglable en largeur (280-400 mm) et en profondeur (260-400 mm). C'est une solution idéale pour les enfants qui ont besoin d'une assise de petite largeur avec une profondeur qui va augmenter avec le temps.



APPUI-TÊTE UNIVERSEL

Un appui-tête soutient et stabilise la tête. La fixation universelle pour appui-tête permet de monter des appuis-tête SEDEO ou WHITMYER et répond à différents besoins pour le positionnement de la tête (solutions standard ou à réglages multiples).





PALETTES MONTÉES EN HAUTEUR

L'angle et la position des palettes sont ajustables en continu (pour un positionnement parfait des pieds, des chevilles et des genoux). La hauteur des palettes est réglable, entre **+180 mm** et **-480 mm** par rapport au plan de l'assise.



DOSSIER SEDEO PRO DEEP CONTOUR

Le dossier intègre des joues latérales profondes, conçues pour apporter plus de confort et plus de soutien latéral. Ce dossier convient parfaitement aux enfants qui ont besoin d'un maintien latéral prononcé mais également d'espace suffisant pour les mouvements des omoplates. Les joues latérales gardent leur position optimale au fil du temps.

DES BESOINS CLINIQUES SPÉCIFIQUES AU NIVEAU DE L'ASSISE ?

Combinez alors le Q300 M Mini Kids avec un dossier Jay® J3 adapté à des besoins de positionnement moyens à élevés. Le dossier Jay® J3 est disponible en plusieurs tailles et niveaux de soutien pour s'adapter avec précision à la morphologie et aux besoins de votre enfant.



PLUS DE PUISSANCE !

Le Q300 M Mini Kids offre non seulement de GRANDES performances, mais également les fonctionnalités d'un « GRAND » fauteuil roulant électrique !

Un réglage électrique de l'angle du dossier, une bascule et lift électriques : le Q300 M Mini Kids regorge d'options pour répondre aux besoins cliniques et au mode de vie de votre enfant.





COMMANDE VR2 OU R-NET

Le fauteuil Q300 M Mini Kids est livré avec une commande VR2 fiable et intuitive. Si l'enfant a besoin de technologie de pointe, optez alors pour une commande avancée R-Net (optionnelle). Le grand écran assure une bonne lisibilité et les commutateurs facile d'emploi permettent à votre enfant de contrôler non seulement son fauteuil mais également de rester connecté à son environnement.



BASCULE D'ASSISE

La bascule mécanique ou électrique (optionnelle) permettent d'ajuster la posture de votre enfant à tout moment de la journée. Basculez l'assise pour déplacer le poids du corps du coussin d'assise vers le dossier - sans tension sur les muscles et tout en gardant une posture confortable.



REPOSE-PIEDS ÉLECTRIQUES À COMPENSATION DE LA LONGUEUR

Des repose-pieds ou un repose-jambes électriques à compensation de longueur permettent de relever et descendre les jambes régulièrement afin de soutenir la circulation sanguine et favoriser la réduction d'œdèmes. Grâce à la compensation de longueur, il est possible de maintenir une posture assise correcte qui évite les mouvements indésirables dans le bassin.

COMBINÉ LIFT & BASCULE D'ASSISE

Un lift de **300 mm** permet de saisir tous les objets autrement hors de portée de votre enfant. Cette fonction apporte plus d'autonomie et donc plus de liberté à votre enfant. La fonction lift peut également faciliter les transferts de votre enfant et alléger ainsi la tâche des parents.



CONDUIRE À HAUTEUR DE REGARD AVEC C-ME.

Discuter avec ses amis à hauteur de regard, tout en roulant, sans être obligé de s'arrêter. C'est possible grâce à C-Me. Avec cette fonction, votre enfant peut s'élever jusqu'à 300 mm tout en conduisant avec une vitesse jusqu'à 4,8 km/h. S'intégrer, juste être un enfant !



CONDUIRE AVEC L'ASSISE RELEVÉE EN TOUT CONFORT

Contrairement à d'autres fauteuils roulants, notre suspension ne se verrouille pas au moment de relever l'assise avec C-Me, pas même sur les terrains irréguliers. De plus, la technologie anti-tangage offre une sécurité et une stabilité supplémentaires sur les pentes.





TÉLÉCOMMANDE D'ARRÊT À DISTANCE POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Avec la télécommande d'arrêt à distance, un accompagnateur peut arrêter le Q300 M Mini Kids à tout moment et à une distance jusqu'à 30 mètres. La distance dépend de l'environnement. Sécurité avant tout !




ASSIGNATION DE BOUTONS

Grâce à la technologie brevetée d'assignation de boutons de ZIPPIE®, vous pouvez changer la fonction de tous les boutons / commutateurs sur le manipulateur. Il est même possible d'attribuer une deuxième fonction qui s'enclenche en appuyant plus longtemps sur un bouton / commutateur. Tous ces raccourcis donnent à votre enfant un accès simple et rapide à des fonctions souvent utilisées, sans se servir du joystick. Bien pratique !




LA JOIE DES COULEURS.

12 carénages graphiques colorés, à combiner avec 7 coloris d'inserts tendance pour les roues et les roulettes.

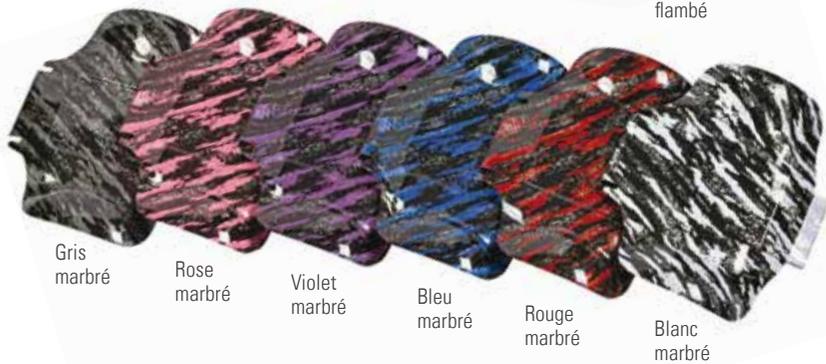

CARÉNAGE : Rouge Bleu Blanc Noir

ACCENTS : Vert Orange Bleu Rouge Argent Blanc Noir

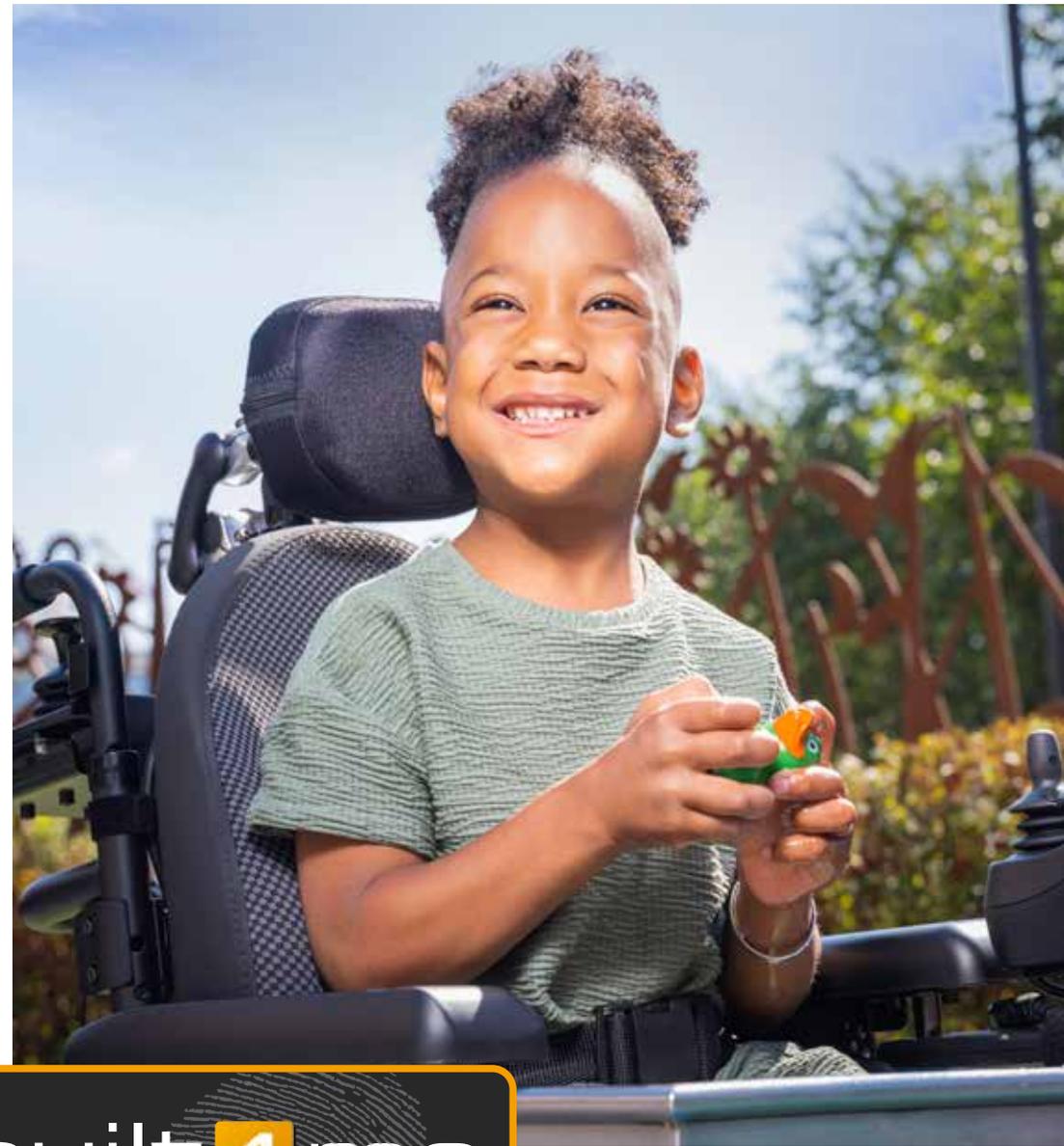



CARÉNAGE PERSONNALISÉ

Chaque enfant a des souhaits et goûts différents, et ses propres idées sur les apparences de son fauteuil roulant. Heureusement, l'équipe Built-4-Me est très créative et peut réaliser presque toutes les idées pour décorer le carénage.

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise	280 - 400 mm
Profondeur d'assise	260 - 400 mm
Hauteur d'assise	410 - 470 mm
Hauteur du dossier	380 - 485 mm
Longueur du segment jambier	180 - 5 mm
Bascule d'assise électrique	0 - 50° / 0 - 30° / -5 - 25°
Largeur totale	À partir de 520 mm
Longueur totale (avec repose-jambes central)	1060 mm
Diamètre de braquage	1120 mm
Pente max. de sécurité	6°
Franchissement max.	50 mm (avec roues motrices 12") 70 mm (avec roues motrices 14")
Autonomie (ISO 7176-4)	Jusqu'à 25 km (avec batteries 41 Ah) Jusqu'à 36 km (avec batteries 56 Ah)
Poids du fauteuil (sans les batteries)	À partir de 103 kg
Poids max. utilisateur	75 kg
Roues motrices	12" / 14"
Vitesse max.	6 km/h ou 10 km/h
Batteries	41 Ah / 50Ah / 56 Ah
Commande	VR2, R-NET
Crash test	Oui, essai de collision conforme à ISO 7176-19 passé avec succès
Usage et environnement d'usage prévus:	Produit d'assistance pour les enfants en situation de handicap, usage à l'intérieur et à l'extérieur. Fauteuil roulant classe B.



Scannez le code QR avec la caméra de votre smartphone pour voir la vidéo.

Rendez-vous chez votre revendeur pour plus d'informations ou pour un essai.



built4me



www.SunriseMedical.be