



Squiggles+

Benutzerhandbuch



Kinder
unterstützen

Deutsche

Der Squiggles+ wurde entwickelt, um Ihrem Kind die nötige Unterstützung in einer aufrechten, nach vorne geneigten (Bauchlage) oder nach hinten geneigten (Rückenlage) Stehhaltung zu bieten. Der Stehständer ist modular aufgebaut und wurde für den Einsatz in der Schule oder zu Hause entwickelt. Dieses Handbuch zeigt, wie Sie die Rahmenfunktionen Ihres Squiggles+ schnell, sicher und einfach bedienen können. Die Sicherheits- und Wartungshinweise sorgen dafür, dass Sie dieses Produkt eine lange Zeit genießen werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Verwendungszweck	p.03
2. Zertifizierung	p.04
3. Warn- Und Sicherheitshinweise	p.04
4. Garantiebedingungen	p.06
5. Aufzeichnung der Produkthistorie	p.06
6. Produktschulungsnachweis	p.06
7. Sicherheitshinweise	p.07
8. Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen	p.08
9. Das Auspacken und Aufbauen des Stehsystems	p.09
10. Montage der Kissen	p.14
11. Klinischer Aufbau für das Haltungs-Management	p.18
12. Regelmäßige Anpassungen für den täglichen Gebrauch	p.26
13. Reinigungs- und Pflegehinweise	p.30
14. Tägliche Produktüberprüfung	p.31
15. Jährliche Produktüberprüfung	p.32
16. Wiedereinsatz von Leckey Produkten	p.33
17. Produktwartung	p.34
18. Technische Informationen	p.35

1.0 Verwendungszweck

Verwendungszweck

Die Geräte sind zur Unterstützung von Kindern gedacht, die nicht selbstständig stehen oder eine stehende Position halten können, als Teil eines unterstützten Gewichtsbelastungsprogramms.

Indikationen

Squiggles+ ist ein Stehgestell, das für Kinder mit Behinderungen im Alter von 1-5 Jahren für den Gebrauch zu Hause oder im Klassenzimmer entwickelt wurde. Das maximale Benutzergewicht beträgt unabhängig vom verwendeten Fahrgestell 22 kg (48,4 lbs). Geeignet für:

- Kinder mit Behinderungen wie Zerebralparese, traumatische Hirnverletzungen, Muskeldystrophie und anderen Erkrankungen, bei denen unterstützte Stehprogramme gefördert werden.
- Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, die derzeit nicht gehfähig sind.
- Kinder, bei denen eine Frühintervention indiziert ist.

2.0 Zertifizierung

Squiggles+ ist nach den Vorschriften der EU und Großbritanniens als ein Medizinprodukt der Klasse I eingestuft. James Leckey Design Limited erklärt als Hersteller, dass dieses Produkt mit der Medizinprodukte-Verordnung (2017/745) der EU, UK Medical Device Regulations 2002 (Britische Medizinprodukte-Verordnung), sowie mit Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte und EN 12182:2012, Technische Hilfen für behinderte Menschen – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren, konform ist.

Hinweis für den Anwender und/oder den Patienten:

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.



HINWEIS: Allgemeine Empfehlungen für den Benutzer.

Wenn diese Anweisungen nicht beachtet werden, kann das zu Körperverletzung, Beschädigung des Produkts oder Umweltschäden führen!

3.0 Warn- Und Sicherheitshinweise

1) WARNUNG KIPPGEFAHR:

- Lassen Sie das Produkt niemals auf einer schiefen Ebene stehen, die eine Neigung von mehr als 5 Grad aufweist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Produktes stets die Funktion von Linearantrieben, Gasdruckfedern und Motorantrieben.
- Achten Sie bei der Winkelverstellung des Stehständers auf ausreichenden Freiraum auf allen Seiten des Produkts.
- Verriegeln Sie stets die

nach außen gerichteten Lenkrollen, bevor Sie den Benutzer in das Produkt einführen.

2) WARNUNG

FINGEREINKLEMMGEFAHR:

- Vergewissern Sie sich, dass der Benutzer oder die Pflegekraft nicht mit den beweglichen und nicht verriegelten Gelenken oder Drehpunkten in Kontakt treten.
- Die Pflegekraft muss darauf achten, dass das Produkt so wenig wie möglich verstellt wird, während sich der Benutzer

darin befindet.

3) WARNUNG

INSASSENSICHERHEIT:

- Die Verlegung des Benutzers in das und aus dem Produkt muss mit Hilfe einer geeigneten Ausrüstung und mit passendem Personal erfolgen.
- Verwenden Sie bei der Verlegung des Benutzers in das Produkt zuerst den Beckengurt für die Befestigung des Benutzers.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Gurte, Fußschalenriemen und

- die Brustpelotte sicher angelegt sind.
- Falls der Benutzer irgendeine Form von Überlastung zeigt, nehmen Sie ihn so schnell und so sicher wie möglich aus dem Produkt.
- 4) VORSICHT FINGERQUETSCHGEFAHR:**
- Die Pflegekraft muss die Produkteinstellungen auf ein Mindestmaß beschränken, während sich der Benutzer im Produkt befindet.
 - Achten Sie bei der Montage oder Positionsverstellung der Komponenten am Stehständer darauf, dass Ihre Finger während der Positionierung der Komponenten und des Festziehens der Halterungen nicht gequetscht werden.
 - Die Pflegekraft muss die Gefahr vermeiden, sich während der Montage und Einstellung des Produkts, die Finger an den Gelenken oder Drehpunkten des Produkts zu quetschen.
 - Die Pflegekraft muss während der Verlegungen und Einstellungen die Gefahr vermeiden, sich die Finger an übergroßen Schnallen und Riegeln zu quetschen.
- 5) VORSICHT TÄGLICHE ÜBERPRÜFUNGEN:**
- Der Stehständer ist täglich vor der Verwendung zu überprüfen, um zu gewährleisten, dass alle Gurte und Komponenten desselben sicher befestigt sind.
- Die Funktion von Linearantrieben, Gasdruckfedern und Motorantrieben muss stets vor der Verwendung überprüft werden.
- 6) VORSICHT STOLPERGEFAHR BEI ANGETRIEBENEM FAHRGESTELL:**
- o Vergewissern Sie sich vor der Bewegung eines angetriebenen Stehständers, dass der Akkuladeanschluss entfernt wurde.
- 7) VORSICHT REINIGUNG:**
- Reinigen Sie den Stehständer regelmäßig, um der Schmutzansammlung vorzubeugen. Der angesammelte Schmutz kann einen vorzeitigen Verschleiß der Gewebekomponenten verursachen und die Korrosion am Stehständer fördern. Verwenden Sie ausschließlich nicht scheuernde Haushaltsreiniger und feuchte Tücher. Verwenden Sie kein fließendes Wasser für das Polster, solange es noch am Sitz befestigt ist. Siehe Abschnitt „Informationen zu Reinigung und Pflege“.
- 8) VORSICHT BEI DER REINIGUNG MIT HOCHDRUCKREINIGERN BZW. SCHLÄUCHEN:**
- Schläuche und Hochdruckreiniger dürfen nicht für die Produktreinigung verwendet werden. Die Stehständer mit dem elektrischen Liftsystem sind nicht gegen fließendes Wasser abgedichtet und können durch eindringendes Wasser beschädigt werden. Siehe Abschnitt „Informationen zu Reinigung und Pflege“.
- 9) VORSICHT BEI DER WARTUNG BZW. REPARATUR ELEKTRONISCHER KOMPONENTEN:**
- Alle elektronischen und elektrischen Komponenten dürfen NICHT vom Benutzer gewartet werden. Die Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur durch das von Leckey befugte Personal durchgeführt werden.
- 10) VORSICHT BEI DER ENTSORGUNG:**
- Wenn Sie das Produkt über eine kommunale Entsorgungsstelle entsorgen, sollten Sie den Rahmen und alle elektrischen Komponenten getrennt entsorgen.
- 11) VORSICHT BEI DER INBETRIEBNAHME:**
- Lassen Sie das Produkt vor seiner Verwendung 2 Stunden lang auf Raumtemperatur akklimatisieren.

4.0 Garantiebedingungen

Die Garantie kommt ausschließlich dann zum Einsatz, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und den vorgegebenen Zwecken eingesetzt wird, wobei allen Empfehlungen des Herstellers Folge zu leisten ist (siehe auch allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen). Auf alle von Leckey hergestellten Produkte und Komponenten wird eine dreijährige Garantie gewährt.

5.0 Produkthistorie

Ihr Leckey-Produkt ist als Medizinprodukt der Klasse 1 eingestuft und sollte daher nur von einer technisch kompetenten Person, die in der Anwendung dieses Produkts geschult wurde, verschrieben, aufgebaut oder wiedereingesetzt werden. Leckey empfiehlt, dass ein schriftliches Protokoll geführt wird, in dem alle Einstellungen, Prüfungen für den Wiedereinsatz und jährlichen Inspektionen dieses Produkts detailliert aufgeführt sind.

6.0 Produktschulungsnachweis (Eltern, Lehrer & Betreuer)

Ihr Leckey-Produkt ist ein verschriebenes Medizinprodukt der Klasse 1 und als solches empfiehlt Leckey, dass Eltern, Lehrer und Betreuer, die das Gerät benutzen, von einer technisch kompetenten Person auf die folgenden Abschnitte dieses Benutzerhandbuchs aufmerksam gemacht werden sollten:

- 7.0 Sicherheitshinweise**
- 12.0 Häufige Anpassungen für den täglichen Gebrauch**
- 13.0 Reinigungs- und Pflegehinweise**
- 14.0 Tägliche Produktüberprüfung**

Leckey empfiehlt, dass über alle Personen, die in der korrekten Anwendung dieses Produkts geschult wurden, eine schriftliche Aufzeichnung geführt wird.

7.0 Sicherheitshinweise

7.1 Lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch immer vollständig durch.

7.2 Die Benutzer sollten während der Nutzung der Leckey Geräte zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt bleiben.

7.3 Verwenden Sie nur von Leckey zugelassene Komponenten für Ihr Produkt. Verändern Sie das Produkt niemals in irgendeiner Weise. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann den Benutzer oder die Pflegekraft gefährden und führt zum Erlöschen der Garantie für das Produkt.

7.4 Wenn Sie Zweifel an der weiteren sicheren Verwendung Ihres Produkts haben oder wenn Teile ausfallen sollten, stellen Sie bitte die Benutzung des Produkts ein und wenden sich so schnell wie möglich an unser Kundendienstteam oder unseren örtlichen Händler.

7.5 Führen Sie alle positionellen Einstellungen durch und vergewissern Sie sich, dass sie sicher befestigt sind, bevor Sie den Benutzer in dieses Produkt platzieren. Einige Anpassungen erfordern möglicherweise ein Werkzeug, das mit jedem Produkt mitgeliefert wird. Bewahren Sie alle Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

7.6 Wenn Sie den Benutzer sowohl aus Positions- als auch Sicherheitsgründen in den Stehständer platzieren, sichern Sie stets zuerst die Becken- und Brustgurte.

7.7 Wenn das Produkt stillsteht, vergewissern Sie sich, dass alle Lenkrollen arretiert sind und vom Boden weg zeigen, da dies die Produktstabilität verbessert. Das ist besonders wichtig, wenn sich der Stützrahmen in einer zurückgelehnten Position befindet.

7.8 Wenn das Produkt in Gebrauch ist, vergewissern Sie sich bitte, dass das Fußpedal der Winkelverstellung verriegelt ist und nicht versehentlich verstellt werden kann, insbesondere wenn sich Kinder in der Nähe befinden.

7.9 Wenn der Squiggles+ von Leckey am schwenkbaren Fahrgestell benutzt wird, empfehlen wir, den Benutzer im Gerät nicht über unebene Flächen zu bewegen. Beim Transfer des Benutzers in den und aus dem Stehständer ist mit aller Sorgfalt vorzugehen.

7.10 Lassen Sie das Produkt niemals auf einer schrägen Fläche mit einer Neigung über 5 Grad liegen. Denken Sie stets daran, alle Lenkrollen festzustellen.

7.11 Obwohl das schwenkbare Fahrgestell mit Lenkrollen ausgestattet ist, handelt es sich hierbei nicht um eine Mobilitätsvorrichtung. Stellen Sie den Benutzer immer in eine aufrechte Position, bevor Sie den Stehständer bewegen. Halten Sie den Schiebegriff fest, wenn Sie den Stehständer bewegen.

7.12 Das Produkt enthält Komponenten, die eine Erstickungsgefahr für Kleinkinder darstellen können. Überprüfen Sie stets, ob die Verriegelungsknöpfe und -schrauben in Reichweite des Kindes angezogen und stets gesichert sind.

7.13 Die Leckey Produkte erfüllen die Brandschutzbestimmungen nach EN12182. Das Produkt enthält jedoch Kunststoffkomponenten und sollte daher von allen direkten Wärmequellen wie offenen Flammen, Zigaretten, Elektro- und Gasheizungen ferngehalten werden.

7.14 Stellen Sie keine heißen Gegenstände über 40°C auf den Therapietisch.

7.15 Reinigen Sie das Produkt regelmäßig. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel. Führen Sie regelmäßige Wartungskontrollen durch, um zu gewährleisten, dass Ihr Produkt in einem guten Zustand ist.

7.16 Das Produkt ist für den Einsatz im Innenbereich konzipiert und sollte bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort gelagert werden, der keinen extremen

Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Der sichere Betriebstemperaturbereich des Produkts liegt bei +5 bis +40 Grad Celsius.

Therapietischs, in die ein Kind seinen Finger zwischen Metallkonsole und dem Boden des Kunststofftisches legen kann.

7.17 Bitte beachten Sie die Lücke auf der Unterseite des

8.0 Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen

Vorsichtsmaßnahmen

- Fixierte Wirbelsäulendeformitäten wie Skoliose oder Kyphose
- Schwere Muskelkontrakturen
- Schwere muskuläre oder skelettale Asymmetrie einschließlich Hüftluxation
- Progressive und Muskelschwundzustände
- Hohes Risiko von Knochenbrüchen in der Vorgeschichte
- Hohes Risiko druckbedingter Verletzungen oder offener Wunden
- Starke, unkontrollierte Bewegungsmuster
- Schlecht eingestellte

Krampfanfälle

- Kinder mit perkutaner endoskopischer Gastrostomie (PEG)
- Medizinische Instabilität einschließlich eingeschränkter Atem- oder Herz-Kreislauf-Funktion
- Abhängigkeit von lebenserhaltenden Fremdgeräten wie Sauerstoffflaschen
- Betonte Lernbehinderungen bzw. Verhaltensauffälligkeiten

Kontraindikationen

- Kinder mit Schmerzen oder Beschwerden, die durch die Anpassung der Unterstützung bzw.

Positionierung nicht behoben werden können



- Kinder mit einer Hüft- bzw. Kniebeugekontraktur, die über die Grenzen des Stehständers hinausgehen

Alle Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen liegen im Ermessen des/r verordnenden Krankenhausarztes/-ärztin oder der Eltern. Leckey empfiehlt die Anwesenheit eines/r geschulten und erfahrenen Krankenhausarztes/-ärztin bei allen Erstbeurteilungen, Einstellungen, Konfigurationen und der Wiederausgabe, um das Risiko auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

9.0 Das Auspacken und Aufbauen des Stehsystems

9.1 Das Ein- und Ausklappen des schwenkbaren Fahrgestells

Das schwenkbare Fahrgestell kann zur Lagerung oder zum Transport einfach eingeklappt werden. Zum Ausklappen werden die abgebildeten Hebel **A** durch Zusammendrücken gelöst, die hintere Rohre gedreht, bis die Hebel in der verriegelten Position einrasten. Um das Fahrgestell einzuklappen, kehren Sie den Vorgang einfach um.

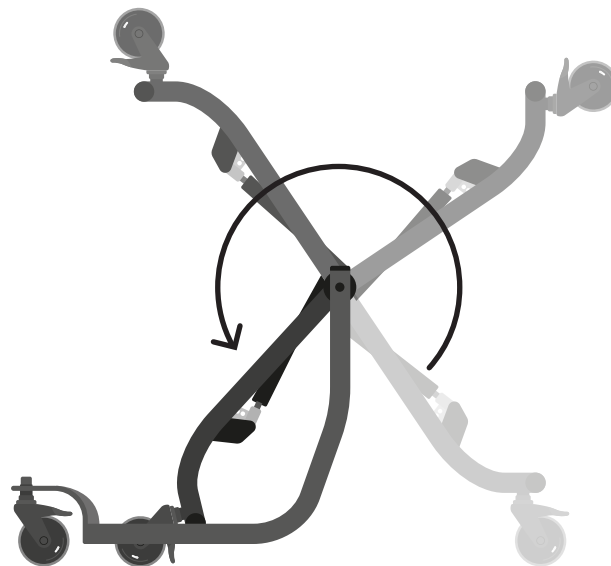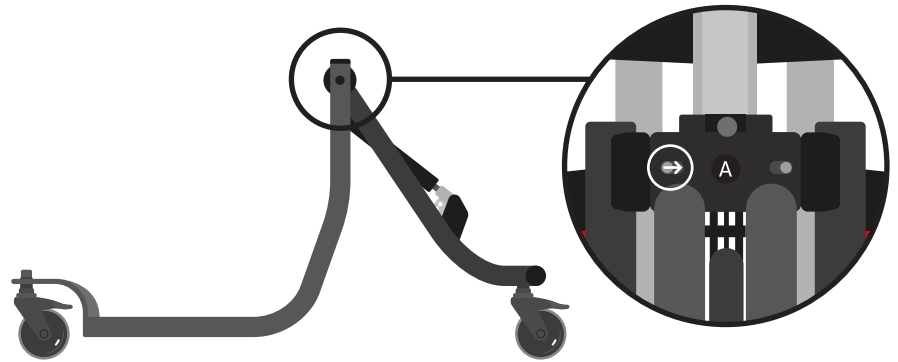


Entfernen Sie stets den stehenden Stützrahmen, bevor Sie versuchen, das Fahrgestell zusammenzuklappen.

Achten Sie stets darauf, die Finger beim Ein- und Ausklappen des schwenkbaren Fahrgestells nicht einzuklemmen.

Der Squiggles+ kann in Bauchlage, Rückenlage oder aufrecht verwendet werden und wurde daher mit einem schwenkbaren Fahrgestell ausgestattet.

9.2 Das Befestigen des Stehständers am schwenkbaren Fahrgestell



Um den Stehständer am schwenkbaren Fahrgestell zu befestigen, ziehen Sie den Sicherungsstift heraus **A**, schieben den mittleren Rücken in die Aufnahmealterung, bis er vollständig eingerastet ist, und lösen den Stift, damit er wieder einrasten kann.

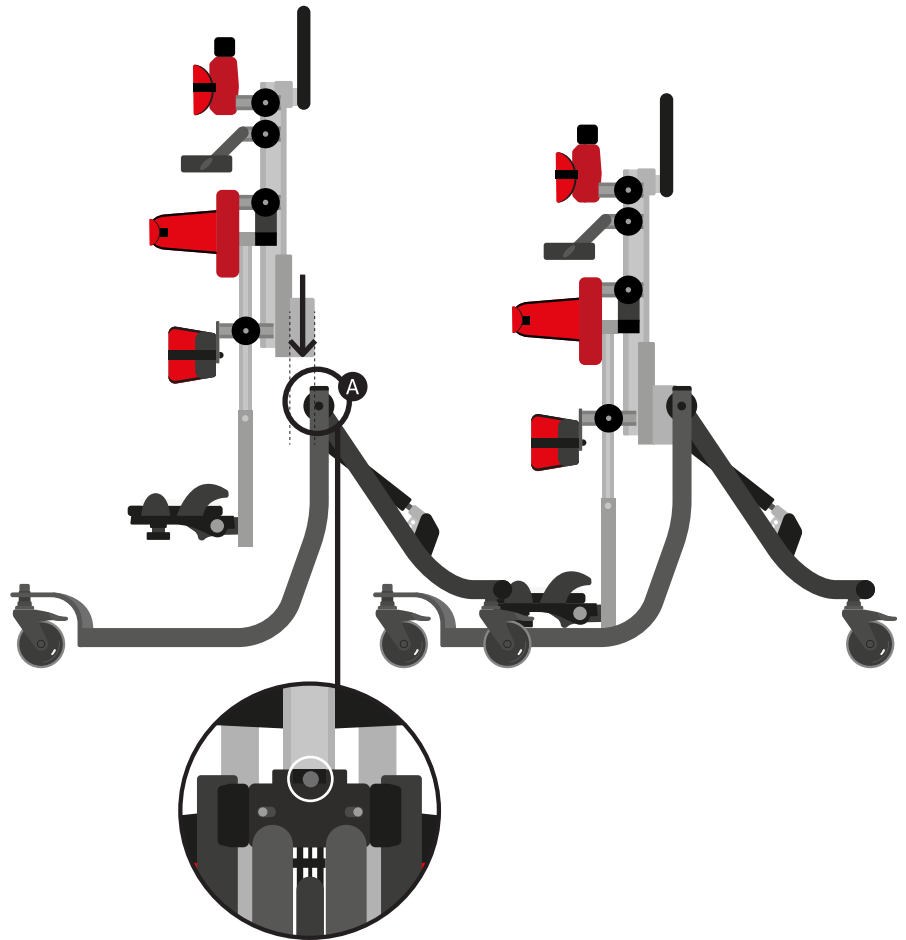

Vergewissern Sie sich stets, dass der Sicherungsstift vollständig eingerastet ist, bevor Sie das Kind in den Stehständer platzieren.

9.3 Das Anbringen der Kopfstütze


Um die Kopfstütze von Leckey zu befestigen, öffnen Sie zuerst den Verriegelungshebel, indem Sie die Sicherheitstaste drücken und den Griff ziehen **A**. Schieben Sie dann den Schaft in die Aufnahmehalterung am mittleren Rücken, stellen Sie ihn in die gewünschte Position und sichern Sie ihn mit dem Verriegelungsgriff. **B**

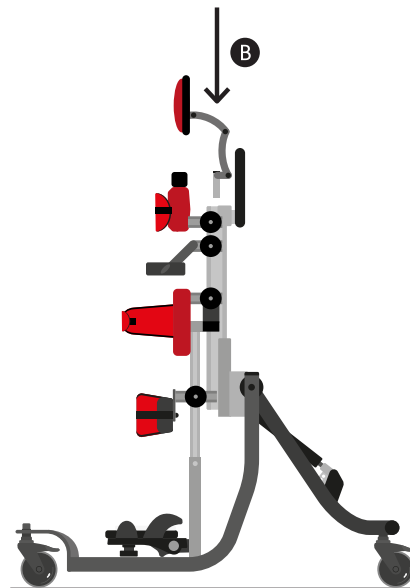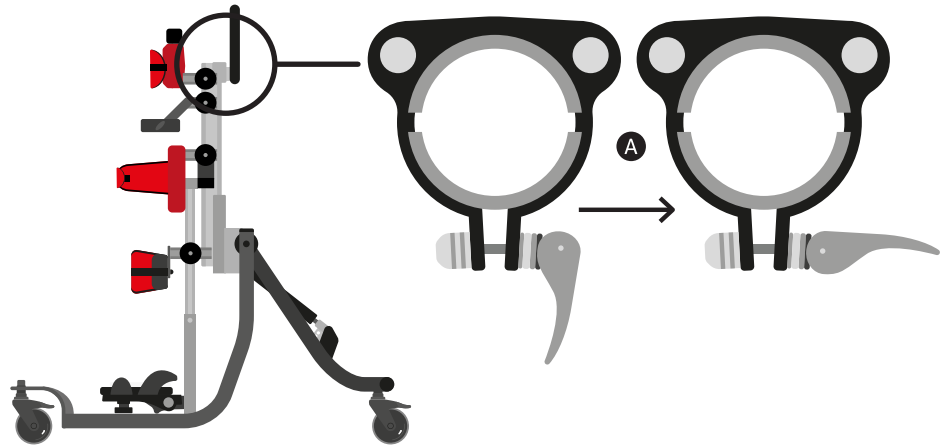

Das Produkt enthält Komponenten, die für Kleinkinder eine Erstickengefahr darstellen können. Überprüfen Sie stets, ob die Verriegelungsknöpfe und -schrauben in Reichweite des Kindes angezogen und immer gesichert sind.


9.4 Das Einsetzen des Befestigungsbolzens

Setzen Sie den gewünschten Befestigungsbolzen **A** along zusammen mit der Halteplatte ein **B**. Legen Sie einen Gummiddeckel **C** auf die Ober- und Unterseite der Fußschale. Mit den vier mitgelieferten Schrauben befestigen. Um die Befestigungsschraube **D** zu entfernen oder auszutauschen, kehren Sie den Vorgang um.

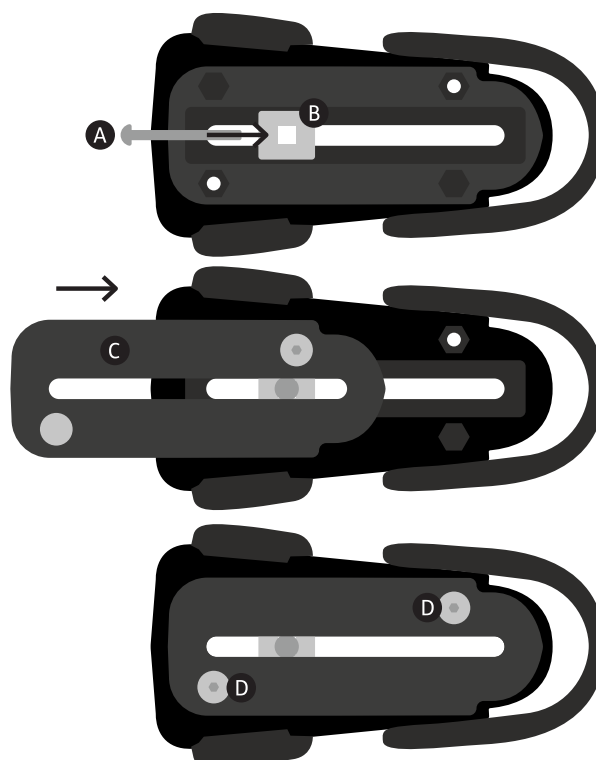



9.5 Das Anbringen der Fußschalen

Platzieren Sie die Fußschale so, dass der Befestigungsbolzen durch den Schlitz in der Fußplatte geht. Zur Befestigung platzieren Sie die Gummischeibe **A**, auf der Unterseite der Fußplatte, gefolgt von der Metallscheibe **B** und anschließend dem Knopf **C** der auf der Befestigungsschraube angebracht wird. Um die Fußschalen zu positionieren, lösen Sie einfach den Knopf unter der Fußplatte, wählen die gewünschte Position und befestigen den Knopf erneut.

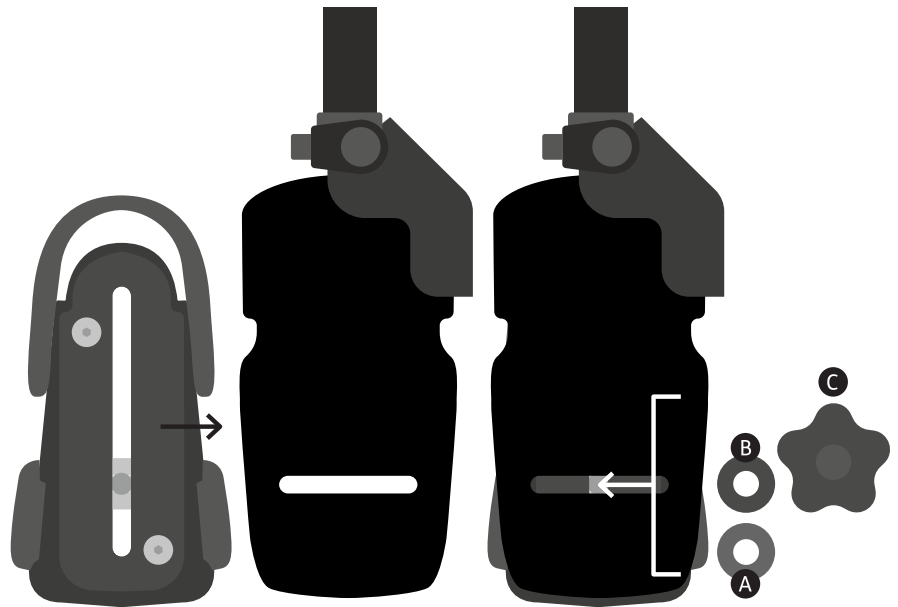

9.6 Das Montieren des Therapietischs

Um die Arme an den Tischhalterungen zu befestigen, lösen Sie den Drehknopf und platzieren das Profil auf der Innenseite des Therapietischs, so dass die Kunststoffzähne ineinander greifen. **A** Den Drehknopf an der Außenseite wieder einsetzen und befestigen. Auf der anderen Seite wiederholen. Vergewissern Sie sich, dass beide horizontalen Rohre so ausgerichtet sind, dass sie in die Aufnahmehalterungen des Tisches passen. **B**

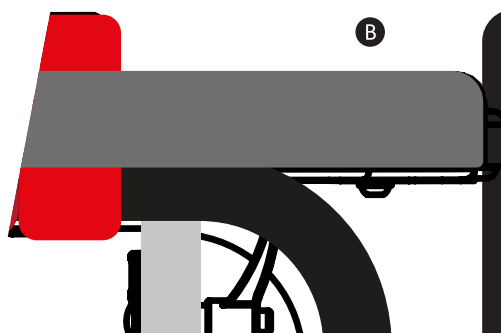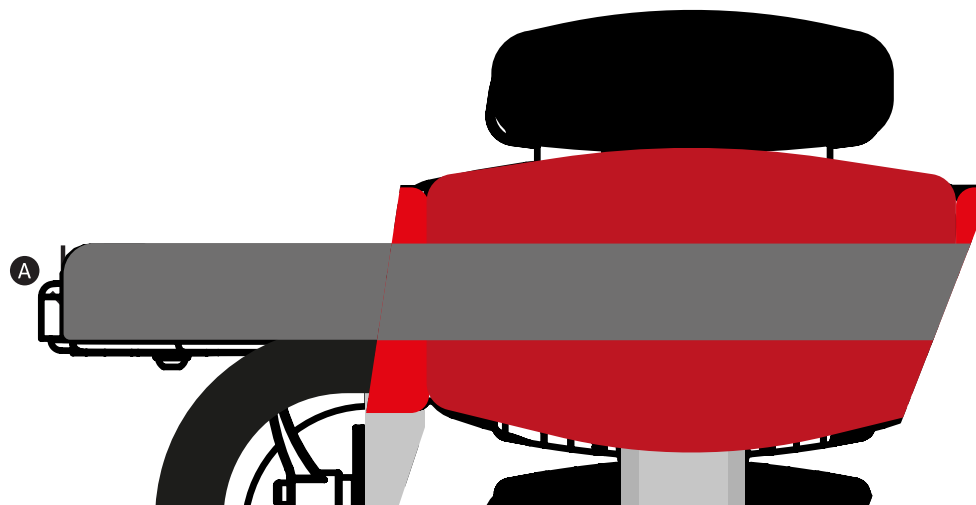


Bitte beachten Sie die Lücke auf der Unterseite der Platte, in die ein Kind seinen Finger zwischen der Metallhalterung und dem Boden des Kunststofftischs stecken kann.

9.7 Das Befestigen des Therapietisches in Bauchlage und Rückenlage

Der Therapietisch wird am Stehständer befestigt, indem die Rohre in die Aufnahmealterungen eingeführt werden. Sobald der Tisch positioniert ist, sollten die Drehknöpfe angezogen werden. Der Ausschnitt des Tisches sollte immer zum Kind gerichtet sein. Um den Therapietisch in der liegenden Version zu befestigen, achten Sie darauf, dass sich die Aufnahmebohrung des Tisches auf der maximalen Höhe befinden.




Achten Sie stets darauf, dass die Hände oder Arme des Kindes beim Einsetzen des Therapietisches nicht eingeklemmt werden.

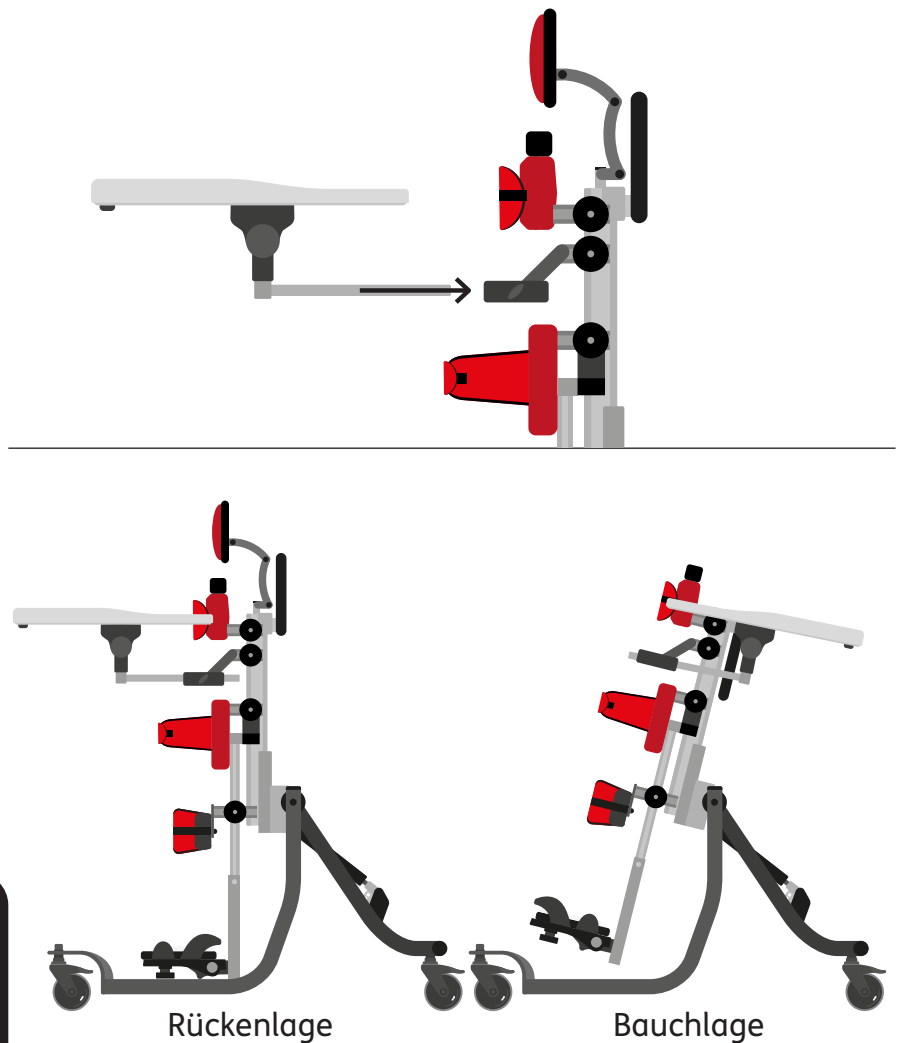

9.8 Das Anbringen des Haltebügels


Den Haltebügel bringen Sie an, indem Sie die Aufnahmebohrung **A** in den Tischschlitz einsetzen und ihn mit dem Kunststoffknopf befestigen **B**. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite und schieben Sie die Rohre anschließend in das Rohr **C**. Ziehen Sie den Kunststoffknopf fest **D**.

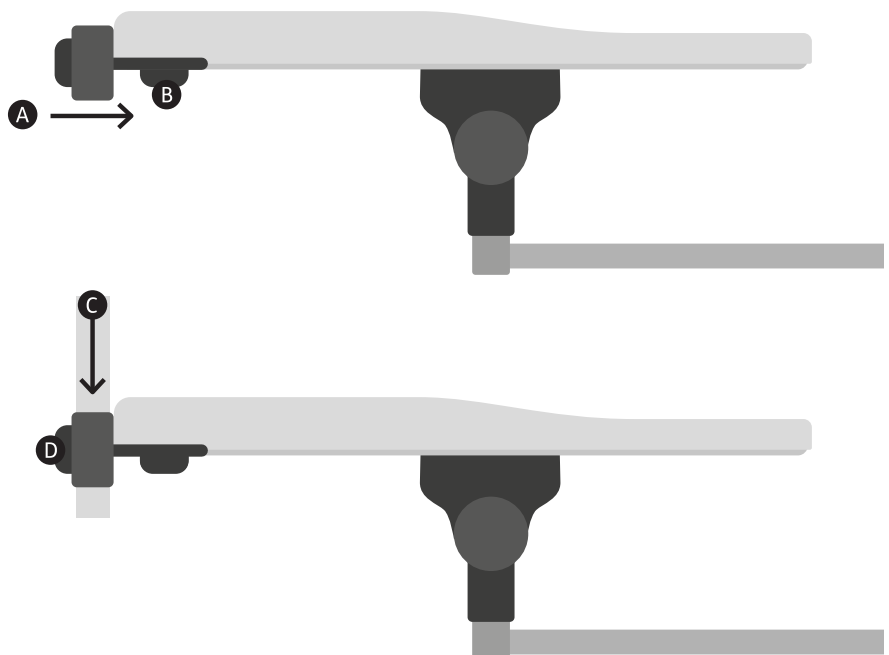

10.0 Das Anbringen der Pelotten


10.1 Hüftpelotten

Legen Sie die Pelotte mittig auf die Brust-/Hüftstützplatte **A**. Führen Sie die obere Lasche, an der der Klettverschluss befestigt ist, über die Oberseite des Profils und schließen Sie den Klettverschluss. Bringen Sie die untere Lasche unter die Stütze und befestigen Sie die obere Lasche mit den Klettverschlüssen **B**.

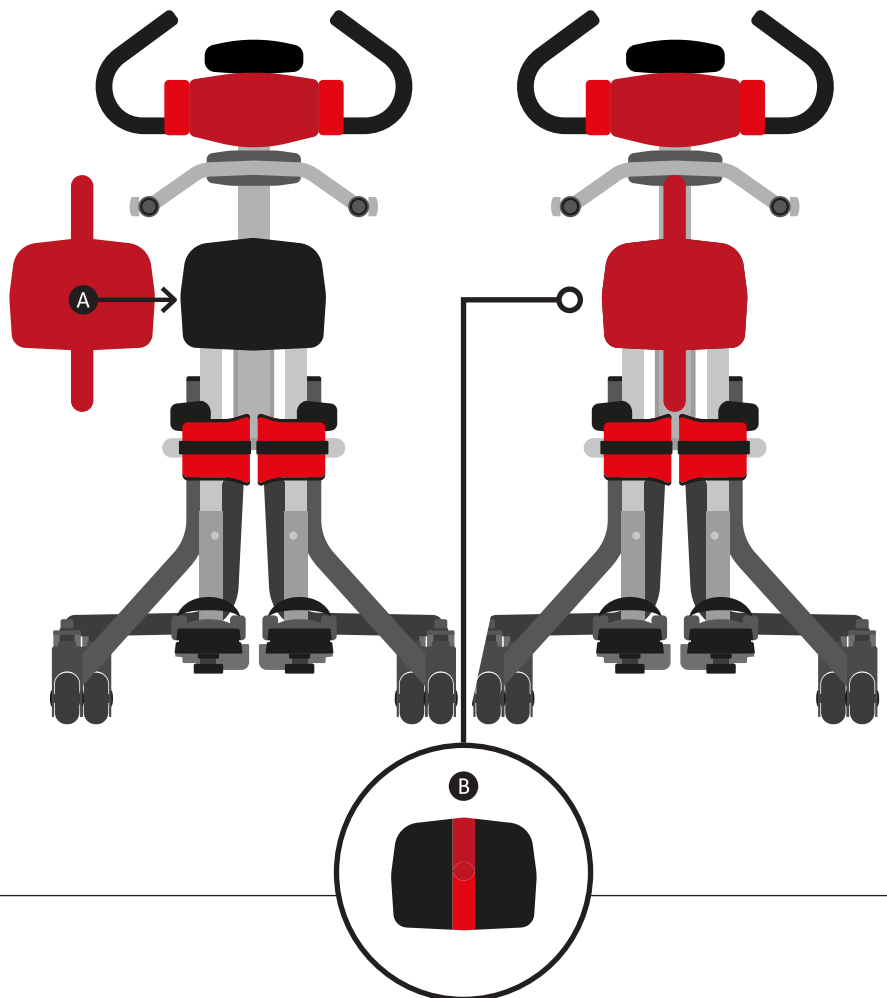


10.2 Seitenpelotten

Um die gepolsterten Kissen der Seitenpelotten zu befestigen, schieben Sie die Kissen einfach mit der gepolsterten Seite in Richtung Innenseite des Stehständers. Führen Sie die Kunststoffschnalle **A** durch den Schlitz in der Abdeckung. Befestigen Sie anschließend die Druckknöpfe auf der Rückseite.

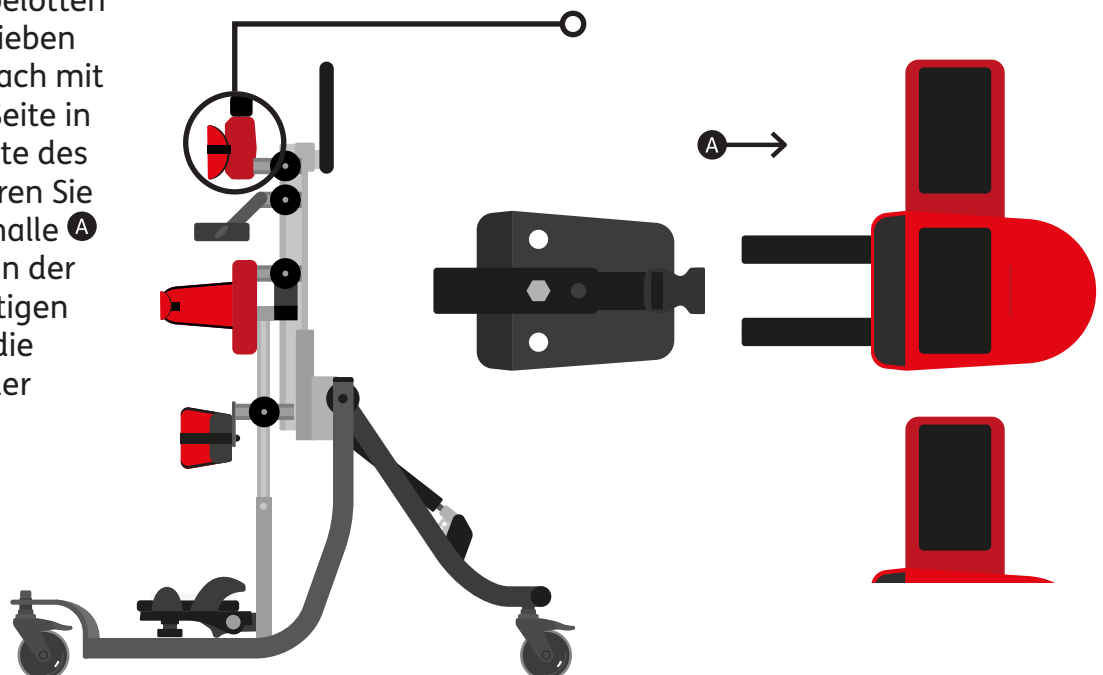

10.3 Bruststützgurt


Die Bruststütze wird befestigt, indem die männliche Schnalle an beiden Seiten der Seitenpelotten in die weibliche Schnalle eingesteckt wird.

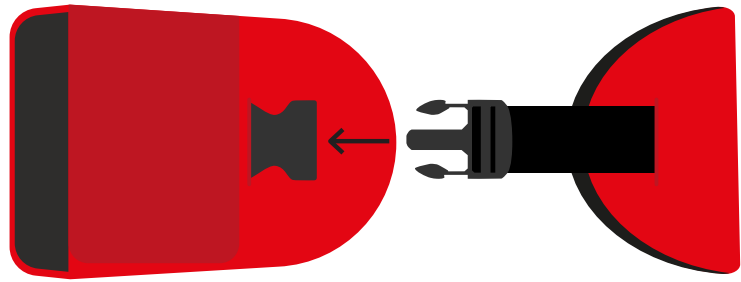

10.4 Beckengurt

Um den Beckengurt zu befestigen, schieben Sie einfach die linke und rechte Seite des Gurts über die Seitenpelotten. Schieben Sie die Kunststoffschnallen durch die Schlitze im Gurt **A**. Befestigen Sie anschließend die Druckknöpfe auf der Rückseite des Gurts.


Ziehen Sie schließlich die Klettverschlüsse um den Benutzer herum, um ihn in dem Gurt zu sichern. **B**

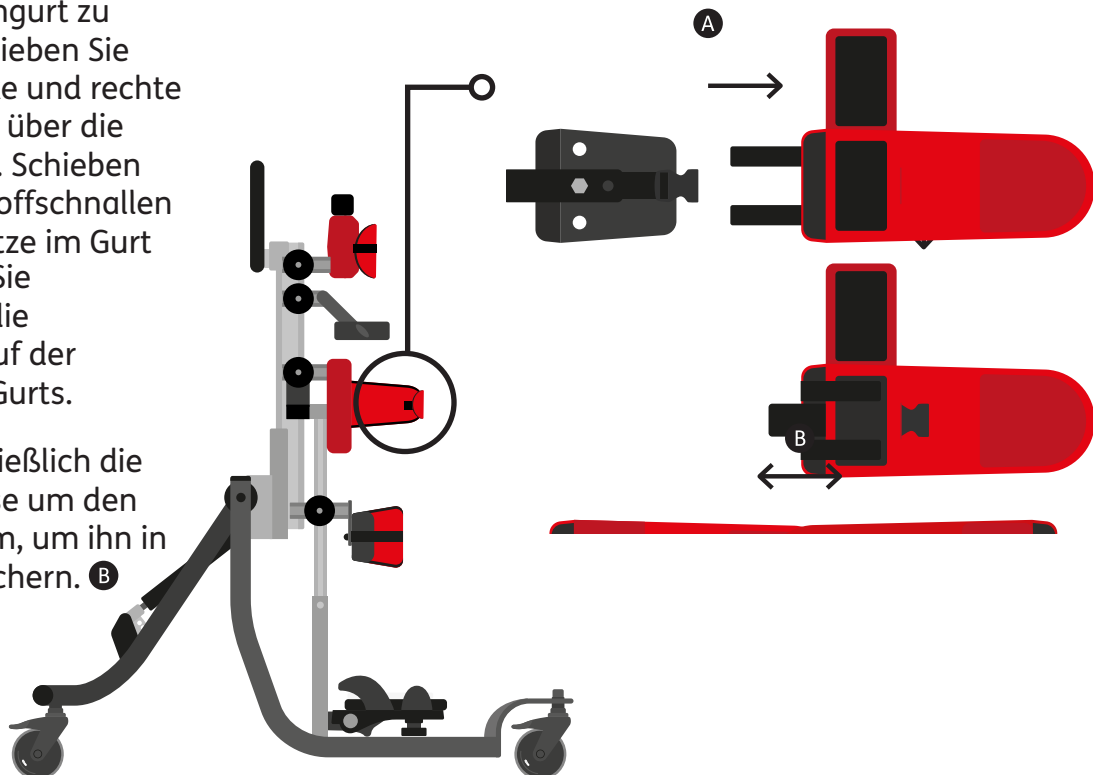

10.5 Hüftstützgurt


Die Hüftstütze sollte um den Beckengurt herum als zusätzliche Sicherheitsstütze angebracht werden, wenn der Klettverschluss am Beckengurt zu verschleißan beginnt. Sie wird befestigt, indem die männliche Schnalle in die weibliche Schnalle an beiden Enden des Beckengurtes gesteckt wird.

Um die Gurtspannung einzustellen, heben Sie die Frontplatte an, stellen die Gurte auf die gewünschte Länge ein und platzieren die Platte anschließend erneut.

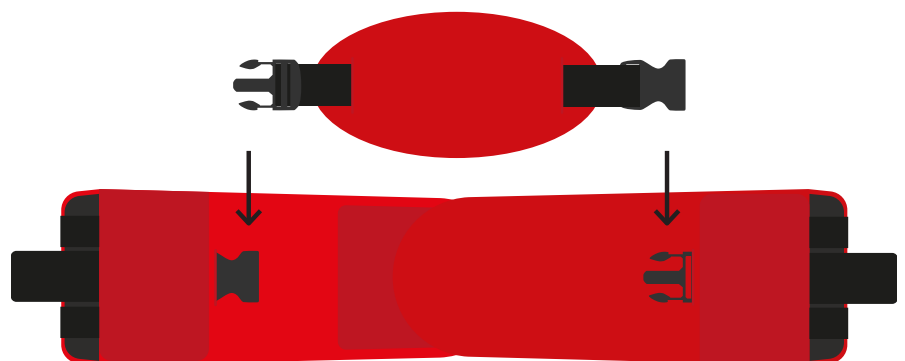


10.6 Kniepelotten

Öffnen Sie die Kniehalterungen vollständig. Bringen Sie das Knie des Kindes in Position **A**. Wickeln Sie einen kleinen Riemen über das Knie, dann legen Sie den längeren Riemen darüber, um einen festen Sitz über dem Knie **B** zu gewährleisten. Mit dem Klettverschluss befestigen und mit der Schnalle sichern **C**. Sobald sich das Knie in der richtigen Position befindet, sichern Sie das Hebelschloss für eine weitere Wiederholbarkeit.

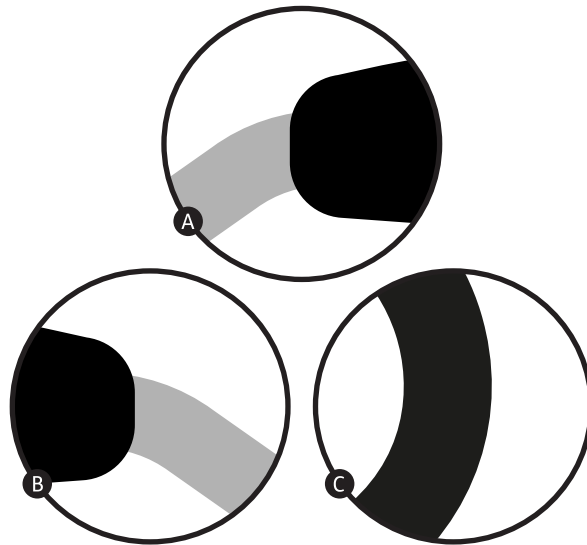


10.7 Gepolsterte Abdeckkappe für den Rücken

Legen Sie die gepolsterte Abdeckkappe für den Rücken über den Rücken der Stehhilfe und platzieren Sie die Kunststoffschlaufen um die Einstellknöpfe.

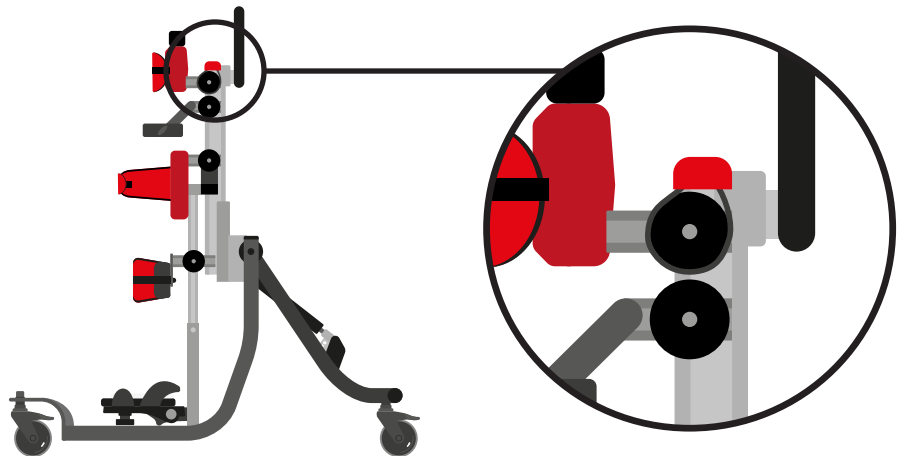

10.8 Kopfstützpelotte

Um die Kopfstützpelotte zu befestigen, legen Sie zuerst das Polster auf die Kopfstützplatte und befestigen Sie es mit dem Klettverschluss. Bringen Sie die untere Klappe unter die Platte und befestigen Sie die beiden Befestigungselemente mit dem Klettverschluss.

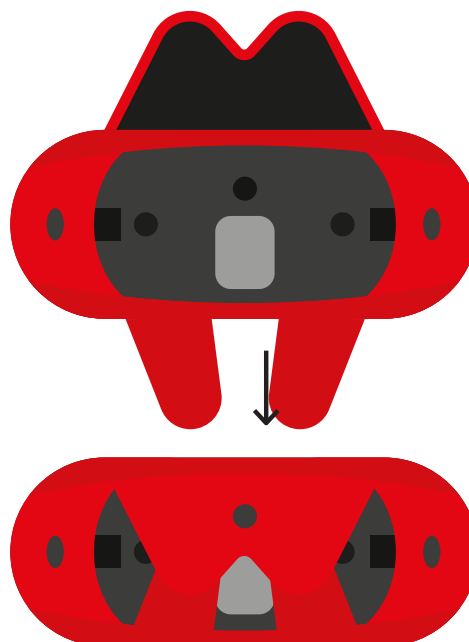


10.9 Seitenpelotten an der Kopfstütze

Um die seitlichen Pelottenabdeckungen an der Kopfstütze zu befestigen, schieben Sie die Abdeckungen mit der gepolsterten Seite einfach in Richtung Innenseite des Stehständers **A**. Befestigen Sie anschließend die Druckknöpfe auf der Rückseite. **B**

Klinischer Aufbau zur Haltungskontrolle 9

Der klinische Aufbau des Produkts sollte von einer technisch und klinisch kompetenten Person durchgeführt werden, die in der Anwendung des Produkts geschult wurde. Leckey empfiehlt, dass über alle klinischen Einrichtungen für dieses Produkt eine schriftliche Aufzeichnung geführt wird.

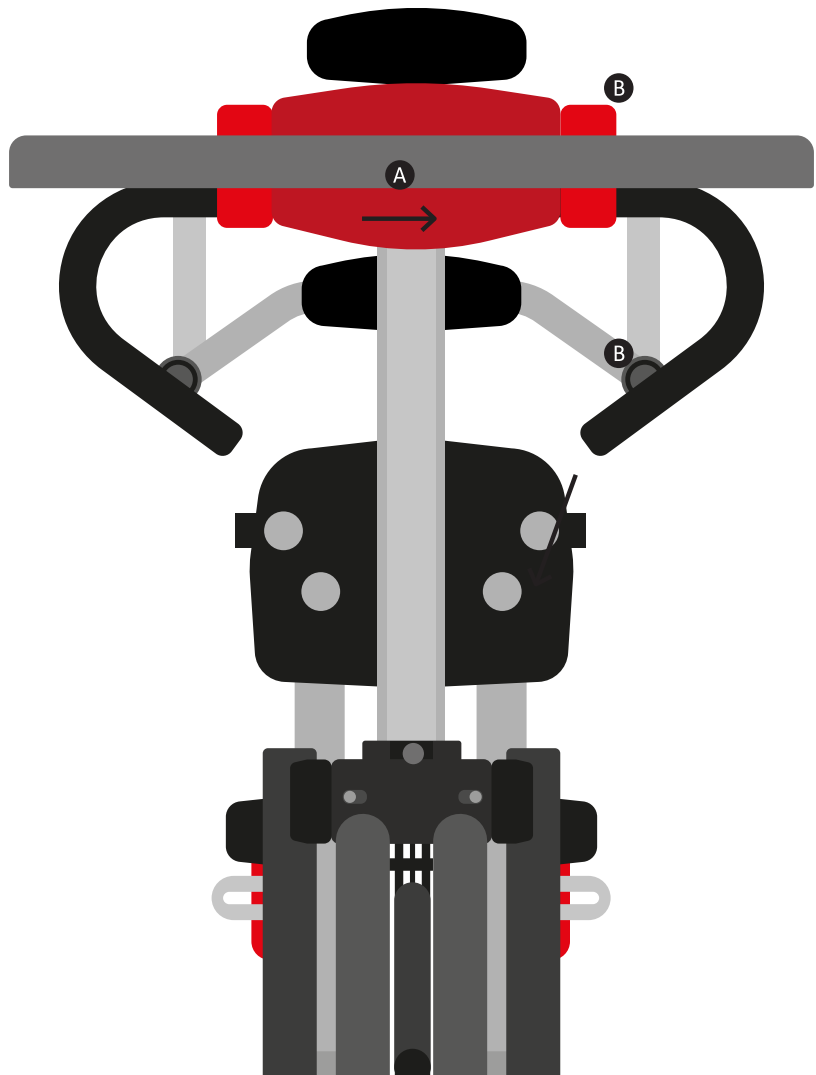


11.0 Klinischer Aufbau zur Haltungskontrolle

11.1 Die Höhenverstellung


Stellen Sie die Höhe zuerst ein, indem Sie das Kind in eine liegende Position auf eine Matte legen. Messen Sie den Abstand zwischen den Füßen und Hüften des Kindes. **A**

Die Höhe zwischen der Mitte der Hüftausformung und der Oberseite der Fußschale sollte durch Einstellen der Beinstütze auf diese Höhe verstellt werden. **B** Messen Sie den Abstand zwischen den Füßen des Kindes bis knapp unter seine Achselhöhle **C** Die Höhe zwischen der Oberseite der Brustpelotte und der Fußschale sollte auf diesen Abstand eingestellt sein. Stellen Sie diesen Abstand durch Einstellen der Hüftpelotte ein. **D** Es wird empfohlen, die Höhe einzustellen, während sich der Rahmen in einer aufrechten Position befindet.

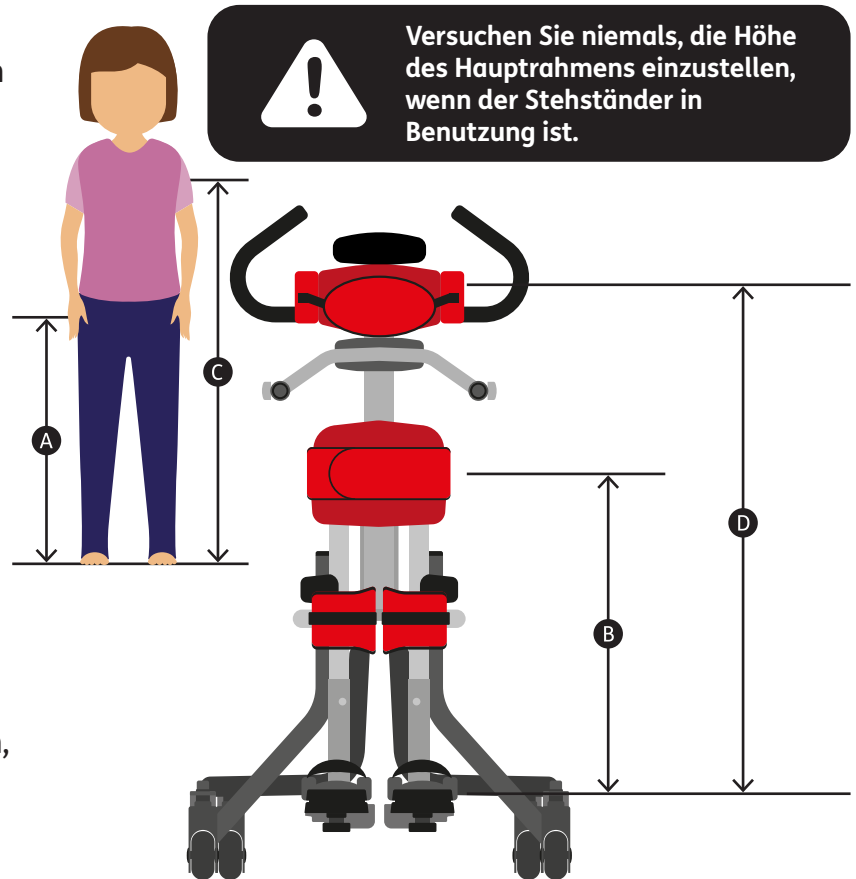

11.2 Das Einstellen der Gesamthöhe

Die Gesamthöhe des Stehständers kann durch Lösen der Schraube auf der Rückseite des Hauptrahmens mit dem Multiwerkzeug eingestellt werden **A**. Schieben Sie den inneren Schaft auf die gewünschte Höhe und ziehen Sie die Inbusschraube wieder an. An der Seite des Innenrahmens ist ein Kalibrierstreifen angebracht, der Ihnen hilft, die gewählten Positionen der Stützen aufzuzeichnen. Es gibt auch einen Sicherheitsstopp in der maximalen Höhe.


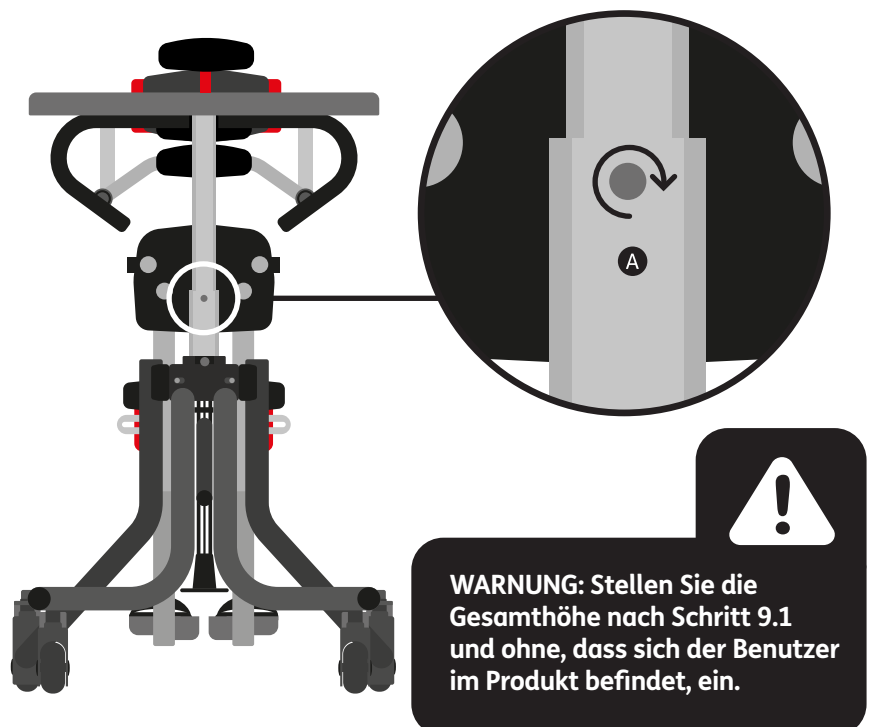


11.3 Das Einstellen des Schiebegriffs

Die Höhe des Schiebegriffs kann durch Lösen der Inbusschraube **A** an der Befestigungsstelle am Stehständer eingestellt werden. In der gewünschten Höhe einstellen und Inbusschraube erneut anziehen. Der Winkel der Schiebegriffe kann durch Lösen des Hebels **B** an der Befestigungsstelle am Stehständer eingestellt werden. Drehen Sie den Schiebegriff in die gewünschte Position und sichern Sie den Hebel in der ursprünglichen Ausrichtung.




Um das Einklemmen der Finger zu verhindern, halten Sie den Schiebegriff immer mit einer Hand fest, während Sie die Einstellung mit der anderen Hand vornehmen.

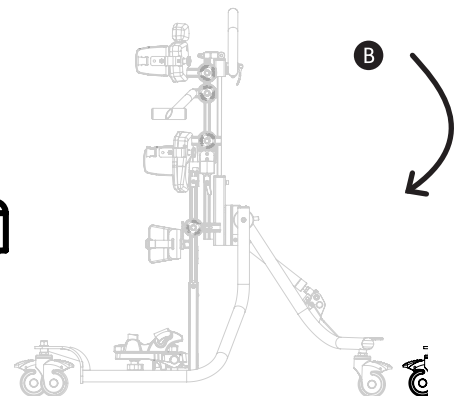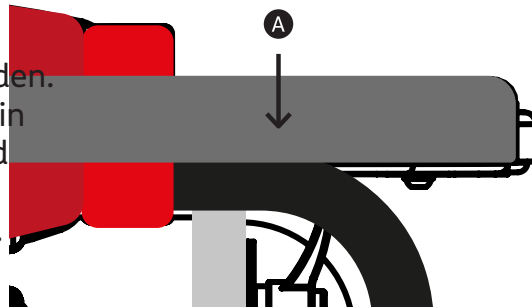

11.4 Das Einstellen der Brust- und Hüftpelotten

Um die Brustpelotte einzustellen, drehen Sie beide Drehknöpfe **A** wie abgebildet gegen den Uhrzeigersinn. Stellen Sie die gewünschte Position ein und ziehen Sie dann beide Drehknöpfe wie abgebildet im Uhrzeigersinn wieder fest **B**.


Um die Hüftpelotte einzustellen, lösen Sie die 4 Verriegelungsschrauben (2 auf jeder Seite) **C**. Drehen Sie beide Drehknöpfe **D** wie abgebildet gegen den Uhrzeigersinn. Stellen Sie die gewünschte Position ein und ziehen Sie dann beide Drehknöpfe wie abgebildet im Uhrzeigersinn wieder fest **E**. Ziehen Sie die 4 Verriegelungsschrauben schließlich wieder fest.

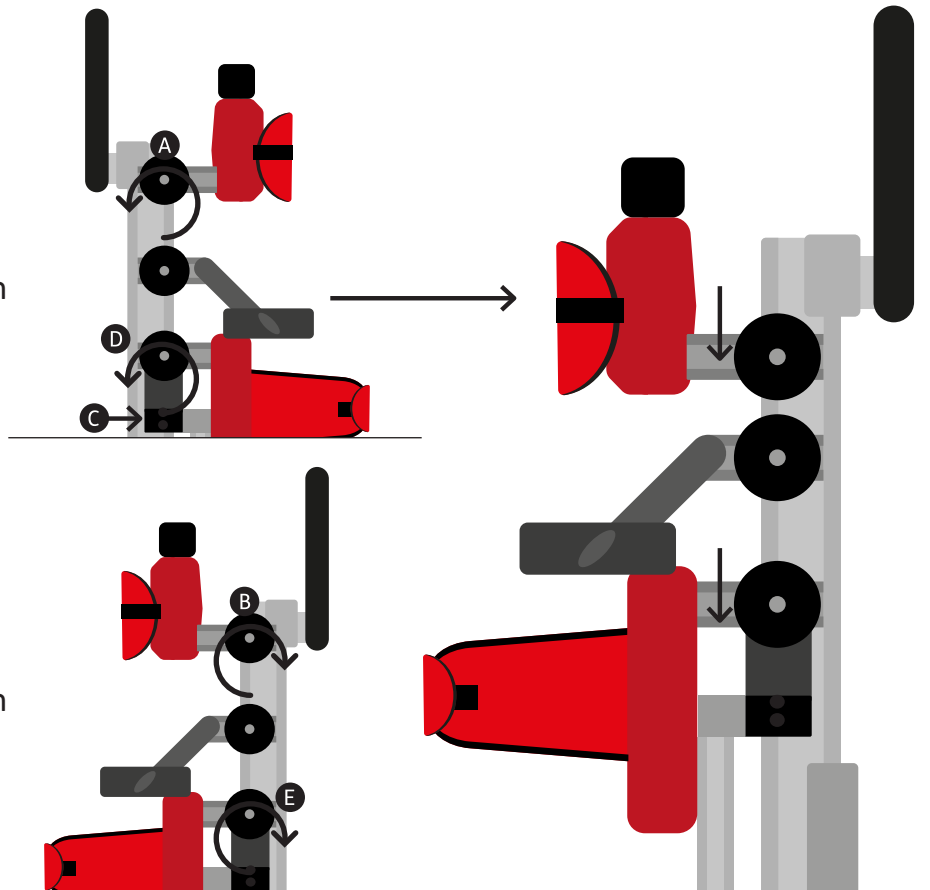

Achten Sie stets darauf, dass die Finger beim Einstellen der Brust- und Hüftpelotten nicht eingeklemmt werden.

11.5 Seitenpelotten

Lösen Sie den Handknopf **A** um die Breite der Seitenpelotten einzustellen, und ziehen Sie ihn wieder an, wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben. Sollten die Seitenpelotten mit Schrauben statt mit Handknöpfen befestigt sein, können sie mit dem Multiwerkzeug eingestellt werden.

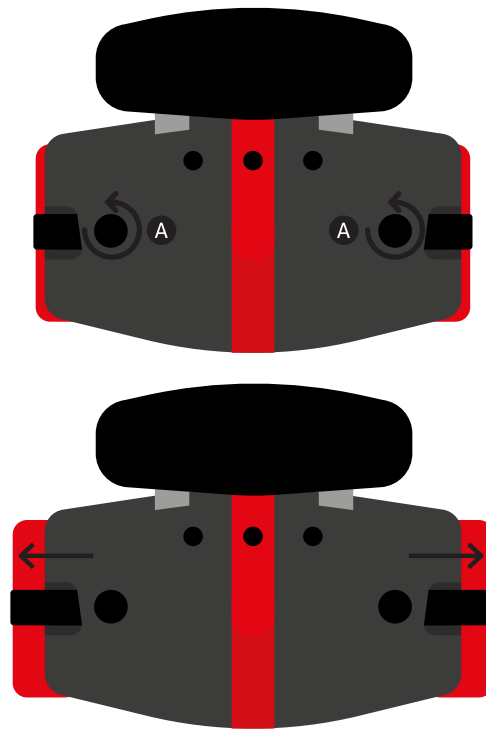




Achten Sie stets darauf, dass die Finger beim Einstellen der Brust- und Hüftpelotten nicht eingeklemmt werden.


11.6 Das Einstellen des Beckengurtes


Um den Beckengurt einzustellen, ziehen Sie die Klettbinden um den Benutzer herum, bis die gewünschte Position erreicht ist.

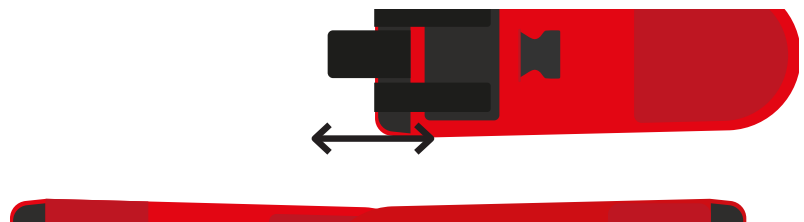

11.7 Brust- und Hüftstützgurt

Um die Breite des Brustgurts zu verändern, heben Sie die vordere Abdeckung an, passen die Klettverschlüsse an und stellen sie in der gewünschte Breite ein. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.

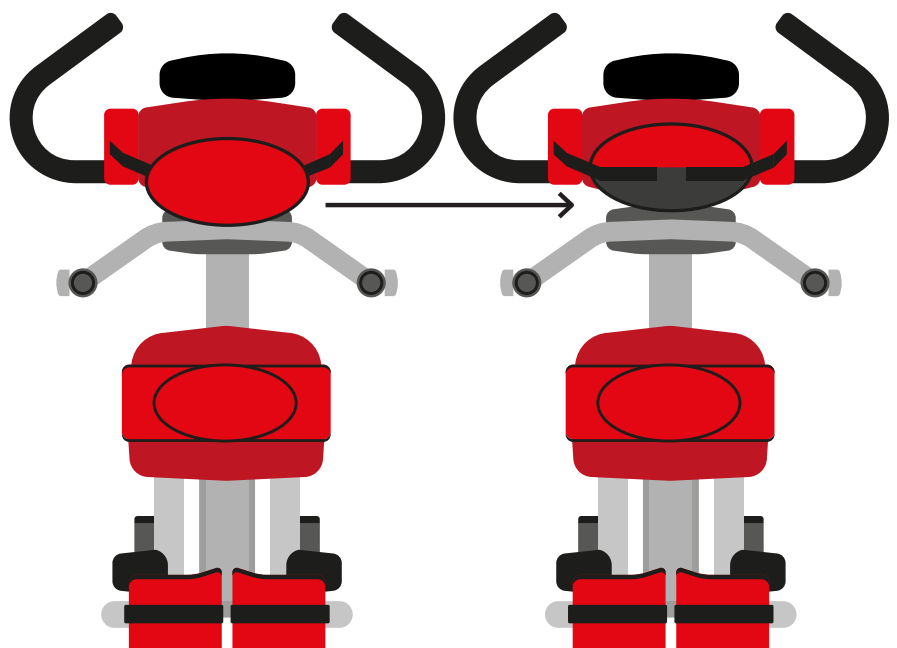




Achten Sie bei der Verwendung des Brustgurtes immer darauf, dass die Kunststoffschnallen vollständig eingerastet sind.

11.8 Das Einstellen des Sternumpolsters


Das Sternumpolster kann angehoben werden, um eine zusätzliche Unterstützung bei der thorakalen Extension zu bieten. Dadurch kann auch die Bruststütze tiefer eingestellt werden, um eine größere Bewegungsfreiheit der Arme zu ermöglichen. Die Einstellung der Sternumplatte erfolgt durch Lösen der beiden Schrauben an der Vorderseite der Sternumplatte mit dem Multiwerkzeug. In der gewünschten Höhe einstellen und erneut anziehen.

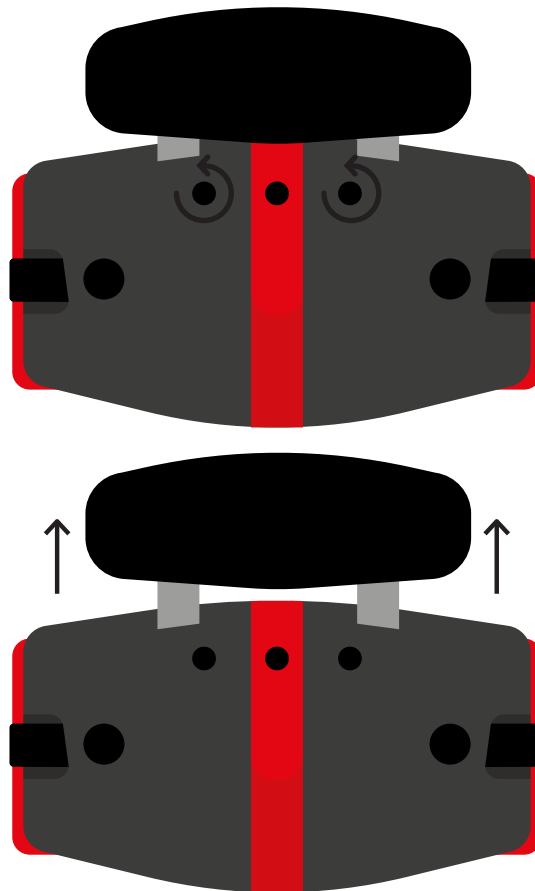

Achten Sie stets darauf, dass die Finger beim Einstellen des Sternumpolsters nicht eingeklemmt werden.

11.9 Das Einstellen der Höhe, Tiefe und des Winkels der Kniepelotten

Die Kniepelotten sind individuell verstellbar. Um Höhe, Tiefe und Winkel der Kniepelotten einzustellen, lösen Sie den Drehknopf **A**, wählen die gewünschte Höhe, Tiefe sowie den Winkel und drehen den Drehknopf wieder zu. Um die Breite der Kniepelotte einzustellen, lösen Sie den Drehknopf **B**, stellen die gewünschte Breite ein und ziehen ihn anschließend wieder fest.

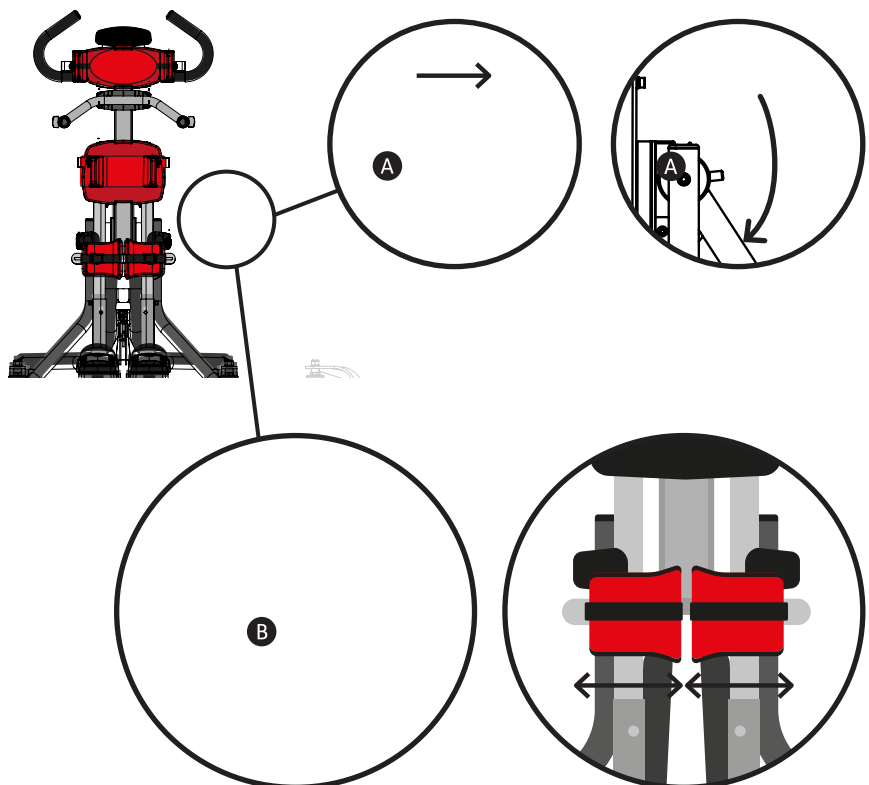


11.10 Das Einstellen der Kopfstütze

Die Kopfstütze sollte nur verwendet werden, wenn das Kind in Rückenlage steht. Um Höhe, Tiefe und Winkel der konturierten Kopfstütze einzustellen, lösen Sie die Handknöpfe **A** und ziehen Sie wieder an, wenn die gewünschte Position erreicht wurde.




Achten Sie stets darauf, dass die Finger bei der Höhenverstellung der Kopfstütze nicht eingeklemmt werden.

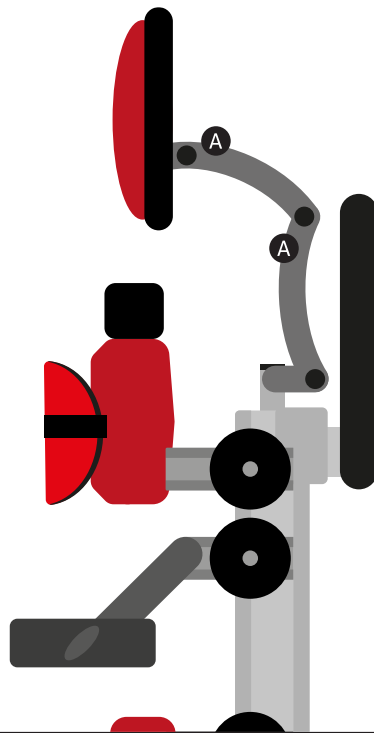

11.11 Die Seitenverstellung der flachen Kopfstütze

Um die Breite der Seitenteile einzustellen, lösen Sie den Kunststoffknopf **A** wählen die gewünschte Position und ziehen ihn fest an.

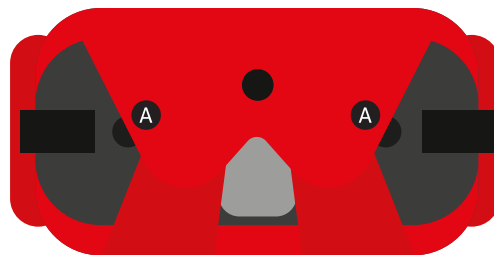

11.12 Das Positionieren der Fußschalen

Um die Fußschalen zu positionieren, lösen Sie einfach den Drehknopf **A** unter der Fußplatte, wählen die gewünschte Position und befestigen ihn erneut. Um die Füße des Benutzers in den Fußschalen zu positionieren, schließen Sie die mitgelieferten Klettverschlüsse, damit der Fuß in Position bleibt. Die Gurte sollten über die Brücke des Fußes und die Zehen gelegt werden. Der vordere Riemen kann je nach Größe der Füße des Benutzers durch einen von zwei Schlitzen auf beiden Seiten der Fußschalen geführt werden.



Wenn das Kind Fußschalen oder leichtes Schuhwerk trägt, überprüfen Sie die Riemen, um sicherzustellen, dass das Gurtband die Haut nicht reizt.


11.13 Die Winkelverstellung der Fußplatte

Um den Winkel zur Anpassung einer Plantarflexion und Dorsalflexion einzustellen, lösen Sie einfach den Drehknopf **A** oder ziehen ihn wieder fest, um die gewünschte Winkelposition zu erhalten.




11.14 Das Einstellen bei Abduktion

Lösen Sie die Hebel **A** an jeder Beinstütze, stellen Sie den gewünschten Winkel ein, wie auf der Winkelanzeige angezeigt. Ziehen Sie die Hebel wieder fest.

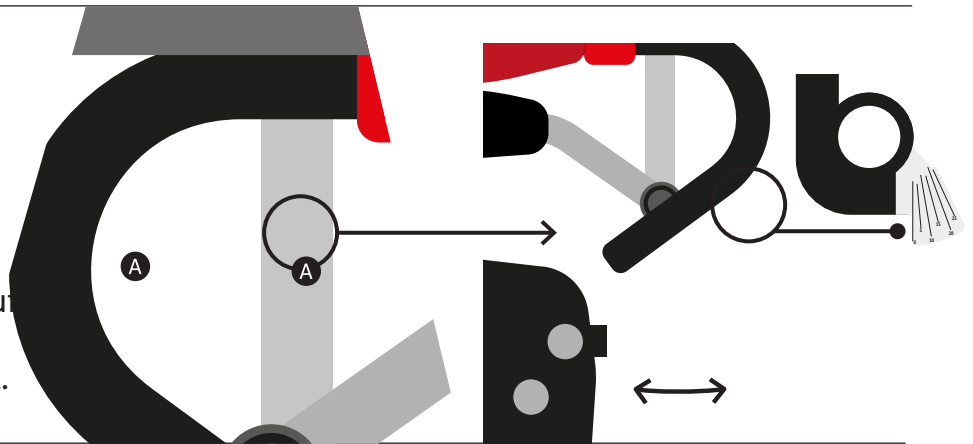


11.15 Produktumstellung – von Rückenlage in Bauchlage

Um den Squiggles+ aus der Rückenlage in die Bauchlage umzustellen, entfernen Sie einfach die Kopfstütze wie unter „Das Anbringen der Kopfstütze“ beschrieben und befestigen den Therapietisch mit dem Ausschnitt zum Kind. Lösen Sie die Fußschalen und drehen Sie sie um 180 Grad. Drehen Sie den Griff nach unten (siehe 11.3) und das Stehen in Bauchlage ist nun möglich.

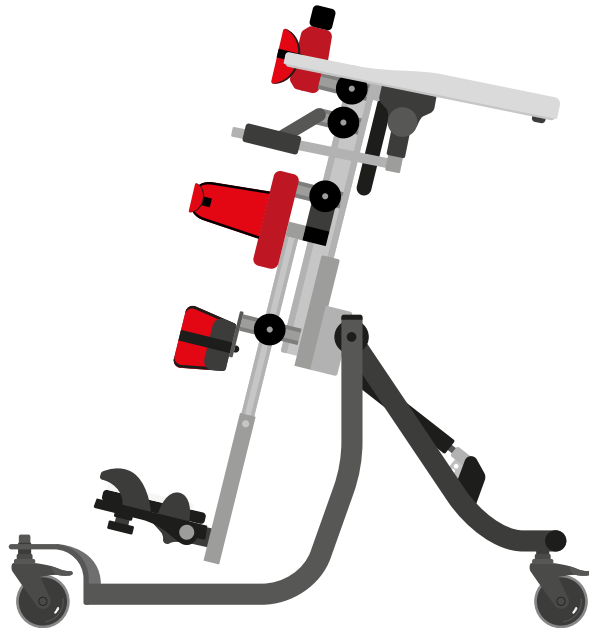


11.16 Produktumstellung – von Bauchlage in Rückenlage

Um den Squiggles+ aus der Bauchlage in die Rückenlage umzustellen, befestigen Sie einfach die Kopfstütze wie unter „Das Anbringen der Kopfstütze“ beschrieben und befestigen den Therapietisch mit dem Ausschnitt zum Kind. Lösen Sie die Fußschalen und drehen Sie sie um 180 Grad und das Stehen in Rückenlage ist nun möglich.

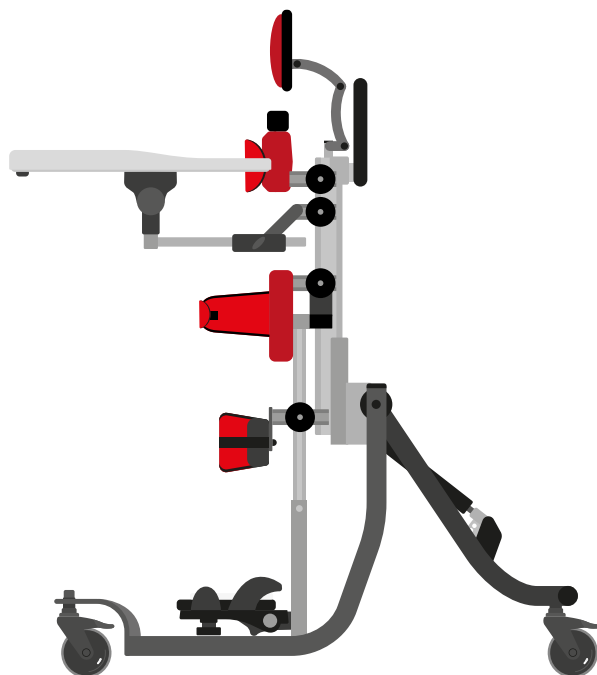


11.17 Die Höhenverstellung des Therapietisches in Bauchlage und Rückenlage

Die Drehknöpfe für die Höhenverstellbarkeit des Therapietisches befinden sich auf beiden Seiten des mittleren Rückens. Lösen Sie die beiden Knöpfe **A**, wählen Sie die gewünschte Höhe und ziehen Sie sie wieder an.

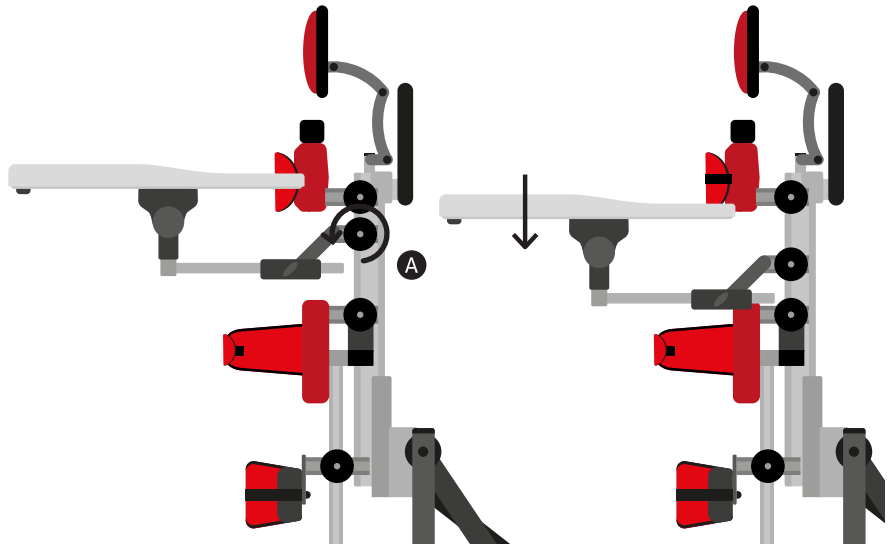

11.18 Die Tiefen- und Winkelverstellung des Therapietisches

Lösen Sie den Einstellknopf **A** auf beiden Seiten, schieben Sie die Rohre entlang der Aufnahmewinkel, um die gewünschte Tiefe zu erreichen, und ziehen Sie die Drehknöpfe erneut fest. Um den Winkel des Tisches einzustellen, lösen Sie die Drehknöpfe **B** auf beiden Seiten, stellen den gewünschten Winkel ein und ziehen sie wieder fest.

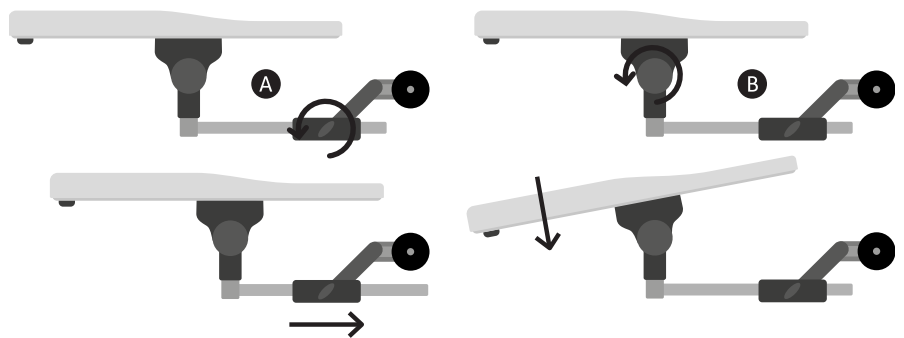

Verwenden Sie den Therapietisch niemals zum Lenken oder Schieben des Stuhls.

Stellen Sie keine heißen Gegenstände mit einer Temperatur von über 40 Grad Celsius auf den Therapietisch.

Bitte beachten Sie, dass der Therapietisch ausschließlich für den Benutzer bestimmt ist. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Therapietisch, die mehr als 8 kg (17,6 lbs) wiegen.

12.0 Regelmäßige Anpassungen für den täglichen Gebrauch

(Therapeuten/Pfleger/Eltern)


Eltern und Betreuern sollten von einer technisch und klinisch kompetenten Person, die in der Handhabung des Produkts geschult wurde, unterwiesen werden, wie sie regelmäßige Anpassungen vornehmen können. Sie sollten ebenfalls auf die Sicherheitskontrollen in Abschnitt 7 aufmerksam gemacht werden. Leckey empfiehlt, dass über alle Eltern und Betreuer, die in der Verwendung dieses Produkts geschult wurden, ein schriftliches Protokoll geführt wird.

12.1 Das Transferieren des Benutzers in den und aus dem Stehständer

Führen Sie vor dem Transfer des Kindes in den Stehständer die tägliche Produktüberprüfung gemäß Abschnitt 14 dieses Benutzerhandbuchs durch.


Vor dem Transfer des Kindes in das Produkt stellen Sie alle Lenkrollen fest und vergewissern sich **A**, dass sie nach außen zeigen, um die Produktstabilität zu maximieren. Achten Sie darauf, dass die Riemen an den Brust-, Hüftstützgurten und Fußschalen gelöst und aus dem Weg geräumt sind, um den Transfer zu erleichtern.

Um den Transfer in die Rückenlage zu erleichtern, winkeln Sie den Stützrahmen in die horizontale Position ab. Dies ermöglicht eine einfachere Positionierung der Pelotten und Riemen, während das Kind auf dem Rücken liegt.

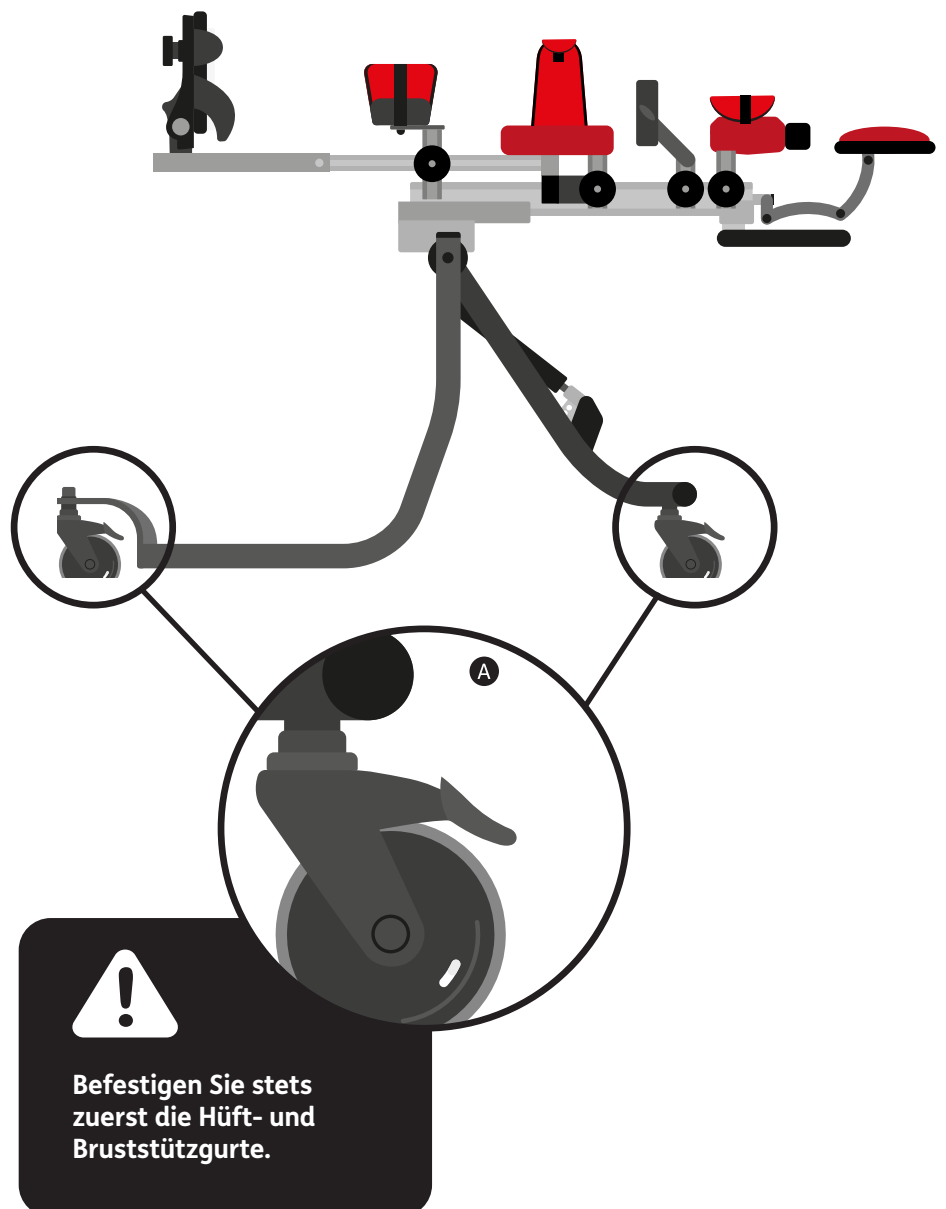

12.2 Brust- und Hüftstützgurt

Um den Brust- oder Hüftstützgurt zu öffnen, lösen Sie eine Schnalle und bewegen den Gurt auf eine Seite, während die andere Schnalle befestigt bleibt. Kehren Sie den Prozess um, wenn Sie den Benutzer wieder in das Produkt platzieren.

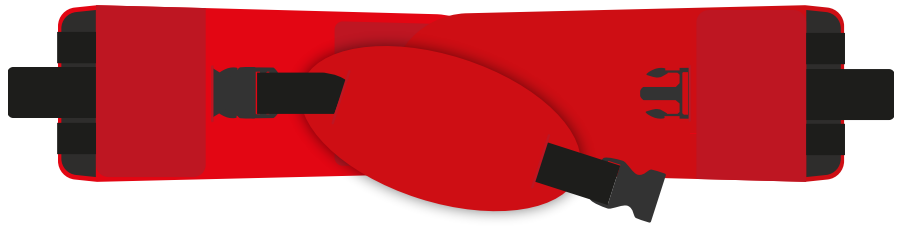

Befestigen Sie stets zuerst die Brust- und Hüftstützgurte, bevor Sie weitere Einstellungen vornehmen.

Achten Sie stets darauf, dass die Kunststoffschnallen vollständig eingerastet sind.

12.3 Fußschalen


Um die Füße des Benutzers in den Fußschalen zu positionieren, sichern Sie die mitgelieferten Klettverschlüsse, damit der Fuß in Position bleibt. Die Gurte sollten über die Brücke des Fußes und die Zehen gelegt werden. Der vordere Riemen kann je nach Größe der Füße des Benutzers durch einen von zwei Schlitzern auf beiden Seiten der Fußschalen geführt werden.



Wenn das Kind Sandalen oder leichtes Schuhwerk trägt, überprüfen Sie die Riemen, um zu gewährleisten, dass das Gurtband die Haut nicht reizt.


12.4 Die Höhenverstellung des Therapietisches in Bauchlage und Rückenlage

Die Drehknöpfe für die Höhenverstellung des Therapietisches befinden sich auf beiden Seiten des mittleren Rückens. Lösen Sie die beiden Drehknöpfe **A**, wählen Sie die gewünschte Höhe und ziehen Sie sie wieder an.

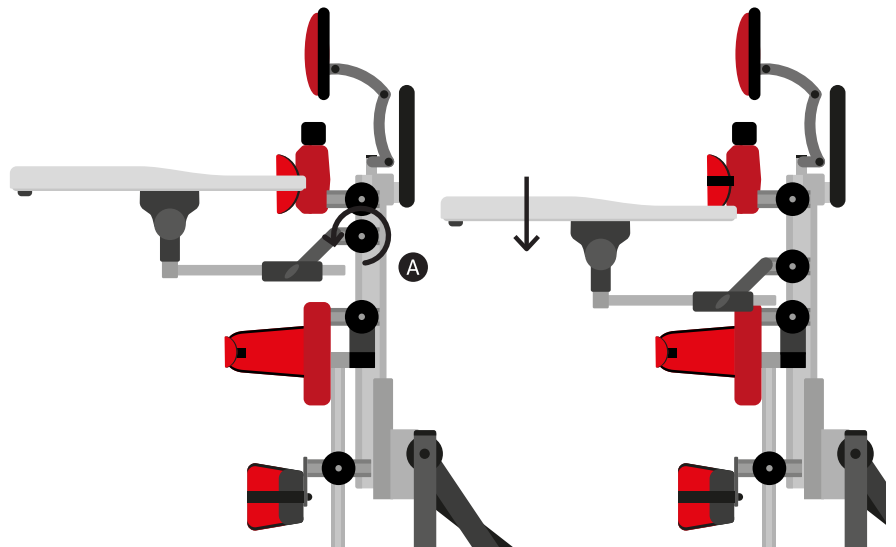

12.5 Die Tiefen- und Winkelverstellung des Therapietisches

Lösen Sie den Einstellknopf **A** Einstellknopf auf beiden Seiten, schieben Sie die Rohre entlang der Aufnahmewinkel, um die gewünschte Tiefe zu erreichen, und ziehen Sie die Drehknöpfe erneut fest. Um den Winkel des Tisches einzustellen, lösen Sie die Drehknöpfe **B** auf beiden Seiten des Tisches, stellen den gewünschten Winkel ein und ziehen sie erneut fest.

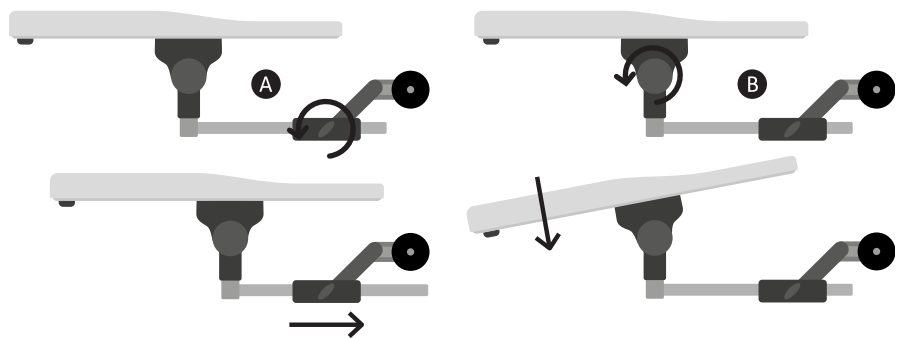


Verwenden Sie den Therapietisch niemals zum Lenken oder Schieben des Stuhls.

Stellen Sie keine heißen Gegenstände mit einer Temperatur von über 40 Grad Celsius auf den Therapietisch.

Bitte beachten Sie, dass der Therapietisch ausschließlich für den Benutzer bestimmt ist. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Therapietisch, die mehr als 8 kg (17,6 lbs) wiegen.

12.6 Das Einstellen des Haltebügels


Um die Tiefe des Haltebügels auf die Reichweite des Kindes einzustellen, lösen Sie den Drehknopf **A**, stellen die gewünschte Tiefe ein und ziehen ihn erneut fest.

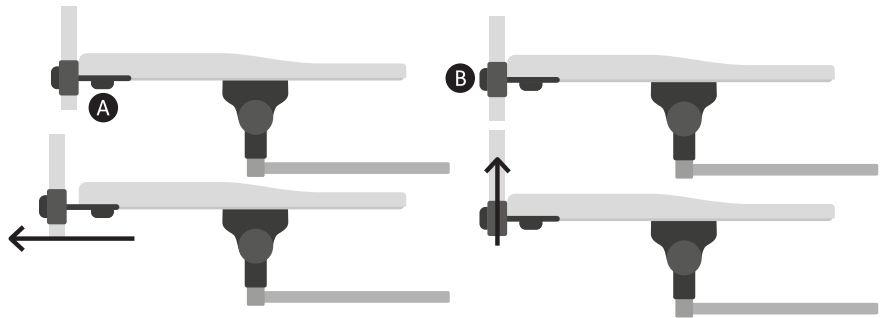


Um die Höhe der Schiene einzustellen, lösen Sie den Drehknopf **B**, schieben die Schiene auf die gewünschte Höhe und ziehen ihn anschließend wieder an.

12.7 Die Winkelverstellung des schwenkbaren Fahrgestells

Der Winkelverstellung ist möglich, während sich der Benutzer im Stehständer befindet. Sie sollten sich vergewissern, dass das Kind mit den Brust- und Hüftpelotten im Stehständer gesichert ist. Um den Winkel des Stehständers einzustellen, lösen Sie zuerst den Sicherungsstift. Den Stift lösen Sie, indem Sie den Kunststoffknopf **A** um 90 Grad in die verriegelte Position ziehen und drehen. **B** Bitte beachten Sie, dass neuere Versionen von Squiggles+ einen Stift haben, der vollständig herausgezogen werden kann, um das Gehäuse zu entsperren, und ersetzt werden, um es erneut zu verriegeln.

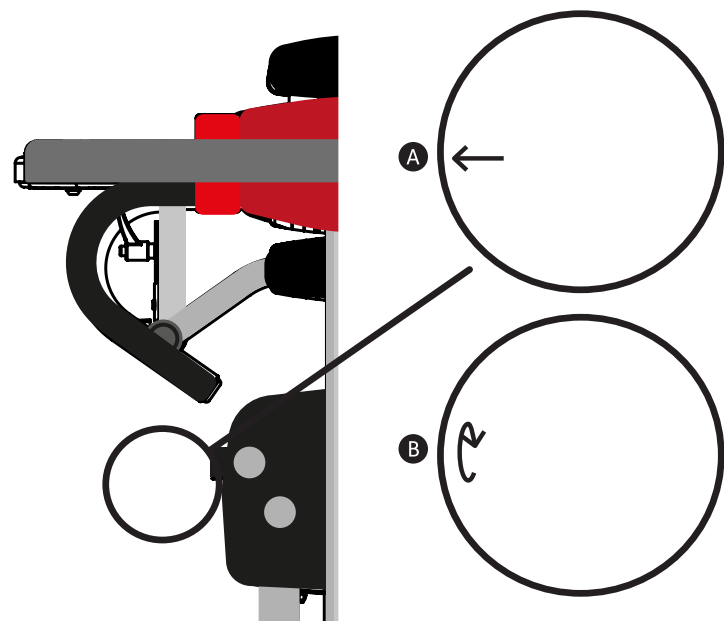

Drücken Sie das Fußpedal **C** nach unten und stellen Sie den Stehständer mit Hilfe der Lenker auf den gewünschten Winkel ein. Verriegeln Sie den Sicherungsstift jedes Mal erneut **A**.

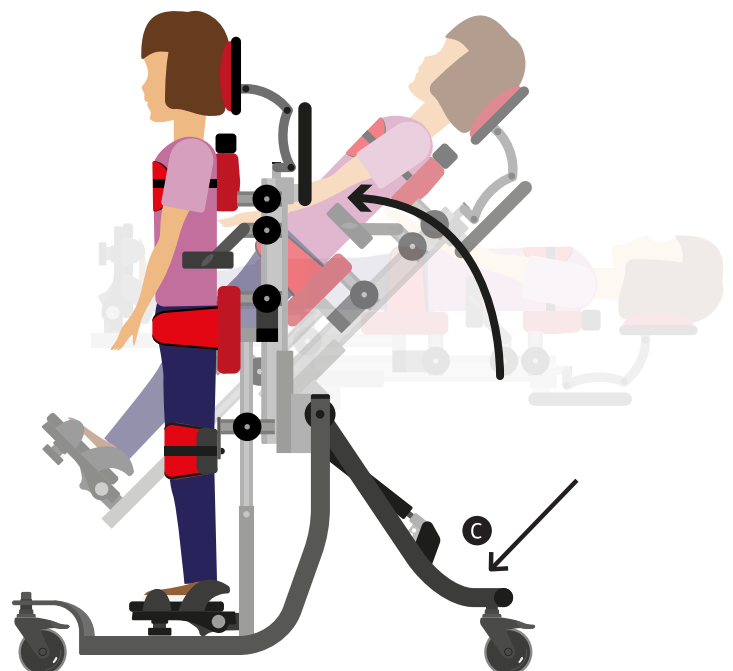

Vergewissern Sie sich, dass das Produkt und der Benutzer sich nicht in der Nähe von Möbeln befinden, um mögliche Zusammenstöße beim Einstellen des Winkels am schwenkbaren Fahrgestell zu vermeiden.

13.0 Reinigungs- und Pflegehinweise

Instandhaltung

Zur Reinigung empfehlen wir warmes Wasser und ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel. Benutzen Sie niemals organische Lösungsmittel oder trockene Reinigungsmittel.

Polster und Stoffe

1. Die Polster und Stoffe können von Hand am Produkt gereinigt werden. Zur Reinigung empfehlen wir warmes Wasser und ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel.
 2. Die beste Reinigungsmethode ist die „Abwischen & Trocknen“ Technik.
 3. Flecken sollten so schnell wie möglich mit einem saugfähigen Tuch, Handtüchern oder einem Schwamm entfernt werden. Das Abschwämmen mit einer handelsüblichen Seife und warmem Wasser ist bei gewöhnlicher Verschmutzung und leichten Flecken wirksam. Achten Sie darauf, den Stoff nicht allzu nass zu machen, da sich die Flecken sonst ausbreiten.
 4. Bei hartnäckigeren Flecken können auch Desinfektionsreiniger verwendet werden. Dies erfordert den Gebrauch eines ungefährlichen Lösungsmittels, wie z.B. Isopropylalkohol oder Lackbenzin. Eine halbe Tasse üblicher Hausbleiche, verteilt auf 5 Liter Wasser, kann ebenfalls als nützliches Desinfektionsmittel verwendet werden.
 5. Achten Sie stets darauf, dass das Produkt vor Gebrauch trocken ist.
-

Metall- und Kunststoffteile

1. Für die tägliche Reinigung können Wasser und Seife oder ein antibakterielles Spray verwendet werden.
2. Für die Tiefenreinigung kann ein Niederdruck-Dampfreiniger verwendet werden.
3. Verwenden Sie keine Lösungsmittel zur Reinigung von Kunststoff- oder Metallteilen.
4. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass das Produkt trocken ist.

14.0 Tägliche Produktprüfung

Therapeuten, Eltern & Betreuer

Wir empfehlen, dass die Geräte täglich von Therapeuten, Pflegepersonal oder Eltern visuell überprüft werden, um zu gewährleisten, dass das Produkt sicher ist.

Die empfohlenen täglichen Kontrollen sind im Folgenden aufgeführt.

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Einstellknöpfe und Schrauben richtig sitzen und befestigt sind.

2. Überprüfen Sie alle Polster auf Anzeichen von Abnutzung und Verschleiß.

3. Überprüfen Sie, ob sich alle Lenkrollen frei bewegen und sicher arretieren.

4. Überprüfen Sie alle Klettverschlüsse und bürsten Sie die Flusen ab, um sicherzustellen, dass sich die Gurte fest schließen lassen.

Wenn Sie Zweifel an der weiteren sicheren Verwendung Ihres Leckey Produkts haben oder Teile nicht mehr funktionstüchtig sind, stellen Sie Nutzung des Produkts bitte umgehend ein und nehmen schnellstmöglich Kontakt mit unserem Kundendienst oder Ihrem lokalen Händler auf.

15.0 Jährliche Produktüberprüfung

(Therapeut, Techniker, Produktspezialist, Händler)

Leckey empfiehlt, dass jedes Produkt mindestens einmal im Jahr, und vor jeder erneuten Herausgabe gründlich überprüft werden muss. Die Inspektion muss von einer technisch kompetenten Person durchgeführt werden, die in der Benutzung des Produkts ausgebildet ist, und muss als Mindestanforderung folgende Prüfungen enthalten.

1. Überprüfen Sie, ob alle Knöpfe, Muttern, Schrauben und Kunststoffschnallen richtig sitzen und ersetzen Sie alle fehlenden Teile. Folgende Punkte sind besonders zu beachten: > Verriegelungsschrauben für die Kopfstütze > Höhen- und Winkelverstellung für Brust- und Hüftbereich > Verstellknöpfe und Riemen für die Kniepelotten > Winkelverstellung an der Fußstütze

 2. Überprüfen Sie, ob der Klapp- und Winkelverstellmechanismus des Fahrgestells ordnungsgemäß funktioniert. Überprüfen Sie auch, ob der Sicherungsstift am schwenkbaren Fahrgestell sicher in das Pedal eingreift.

 3. Heben Sie die Basis an, um jede Lenkrolle einzeln zu überprüfen. Achten Sie darauf, dass sie sich frei bewegen und entfernen Sie jeglichen Schmutz von den Gummirädern. Überprüfen Sie, ob die Bremsen die Räder sicher arretieren.

 4. Überprüfen Sie die Struktur des Produkts visuell und achten Sie dabei auf die Schweißpunkte am Rahmen, um zu gewährleisten, dass keine Anzeichen von Ermüdung oder Rissen um die Schweißnähte herum vorhanden sind.

 5. Leckey empfiehlt, alle jährlichen Produktüberprüfungen schriftlich festzuhalten.
-

Wenn Sie Zweifel an der weiteren sicheren Verwendung Ihres Leckey Produkts haben oder wenn Teile nicht mehr funktionstüchtig sein sollten, stellen Sie die Nutzung des Produkts bitte umgehend ein und nehmen Sie schnellstmöglich Kontakt mit unserem Kundendienst oder Ihrem lokalen Händler auf.

16.0 Wiedereinsatz von Leckey Produkten

Die meisten Leckey Produkte werden bewertet und bestellt, um den Bedürfnissen eines einzelnen Benutzers gerecht zu werden. Bevor ein Produkt für den Wiedereinsatz freigegeben wird, empfehlen wir, dass der Therapeut, der das Produkt verschrieben hat, einen Kompatibilitätstest des Produkts für den neuen Benutzer durchführt und sicherstellt, dass keine Veränderungen an dem Produkt vorgenommen oder Sonderteile angebracht wurden.

Vor der Freigabe für den Wiedereinsatz muss eine detaillierte technische Inspektion durchgeführt werden. Sie sollte von einer technisch kompetenten Person durchgeführt werden, die im Gebrauch und der Inspektion dieses Produkts geschult wurde. Bitte schlagen Sie die noch durchzuführenden erforderlichen Überprüfungen in Abschnitt 15 nach.

Vor der erneuten Zuteilung eines Produkts wird die Desinfektion mit einem der folgenden Verfahren empfohlen:

Hinweis: Entfernen Sie immer zuerst angesammelten Schmutz, bevor Sie das Produkt desinfizieren.

1. Wenn möglich, empfehlen wir, ein automatisiertes „Nebelsystem“ für die Desinfektion zu verwenden, mit dem alle Oberflächen des Produkts mit einem Desinfektionsmittel behandelt werden. Die Anweisungen des Herstellers des gewählten Systems sind vor dem Gebrauch durchzulesen und genau zu beachten.
2. Wenn kein automatisiertes Desinfektionssystem verfügbar ist, sollten alle Oberflächen des Produkts mit desinfizierenden Wischtüchern oder mit einem weichen Tuch, das mit einem flüssigen Desinfektionsmittel getränkt wurde, abgewischt werden. Dafür sind folgende Produkte geeignet: IPA 70 %, Alkohol 70 % oder verdünnte Bleiche. Die Anweisungen des Herstellers für das ausgewählte Produkt sind zu beachten. Die Bespannung und Stoffe des Produkts sollten wie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“ in diesem Handbuch beschrieben gründlich gereinigt werden.

Vergewissern Sie sich, dass eine Kopie des Benutzerhandbuchs dem Produkt beiliegt. Eine Kopie kann von unserer Website www.leckey.com heruntergeladen werden.

Leckey empfiehlt, dass Sie ein schriftliches Protokoll aller jährlich durchgeführten Wartungen während des Wiedereinsatzes des Produkts führen.

Wenn Sie Zweifel an der weiteren sicheren Verwendung Ihres Leckey Produkts haben oder wenn Teile nicht mehr funktionstüchtig sind, stellen Sie die Nutzung des Produkts bitte umgehend ein und nehmen schnellstmöglich Kontakt mit unserem Kundendienst oder Ihrem lokalen Händler auf.

17.0 Produktwartung












Die Wartung aller Leckey Produkte sollte nur von technisch kompetenten Personen durchgeführt werden, die in der Handhabung des Produkts geschult wurden.












Alle internationalen Wartungsanfragen sollten an den zuständigen Leckey Vertriebspartner gerichtet werden, der Ihnen gerne weiterhilft. Für weitere Informationen über Leckey Vertriebspartner besuchen Sie bitte unsere Website www.leckey.com.

18.0 Technische Informationen

Alter (ca.)	1-5
Max. Benutzergewicht	22kg / 48.4lbs
Benutzergröße - Min 730mm / 28.5 Zoll	Max 1100mm / 43.3 Zoll
Höhe der Bruststütze (Abstand von der Fußplatte zur Achselhöhle) Min 160mm / 6.25 Zoll	Max 820mm / 32 Zoll
Brust- / Hüftbreite - Min 160mm / 6.25 Zoll	Max 230mm / 9 Zoll
Hüftstützhöhe (Abstand von der Fußplatte bis zur Mitte des Gesäßes) Min 300mm / 11.8 Zoll	Max 530mm / 20.8 Zoll
Abstand zwischen der Mittellinie der Knie - Min 140mm / 5.5 Zoll	Max 215mm / 8.4 Zoll
Fußplatte - Plantarflexion 10°	Dorsiflexion 10°
Winkelbereich des schwenkbaren Fahrgestells - 90-180°	Winkelbereich des schwenkbaren Fahrgestells 90 - 70°
Therapietischhöhe - Bauchlage - Min 555mm / 21.9 Zoll	Max 825mm / 32.5 Zoll
Therapietischhöhe - Rückenlage - Min 480mm / 18.5 Zoll	Max 825mm / 32.5 Zoll
Grundfläche des schwenkbaren Fahrgestells (Mindestabmessungen für die Lagerung) Min 5.5kg / 12.1lbs	Breite 550mm / 21.7 Zoll Länge 700mm / 27.6 Zoll Höhe 300mm / 11.8 Zoll
Standard-Stützrahmen (Mindestabmessungen für die Lagerung) Min 7kg / 15.4lbs	Breite 380mm / 15.4 Zoll Länge 890mm / 26.8 Zoll Höhe 380mm / 15.4 Zoll

Tabelle Der Symbole

Symbol	Bezeichnung
	Medizinprodukt
	Bedienungsanleitung lesen
	CE-Kennzeichnung
	Warnung
	Hersteller
	Modellnummer
	Seriennummer
	Max. Körpergewicht des Benutzers
	Herstelldatum
	Nur für den Gebrauch im Innenbereich
	Latexfrei

	Kennzeichnungssystem „Unique Device Identification“
	Nur Handwäsche
	Nicht für den Trockner geeignet
	Nicht bleichen
	Nicht bügeln
	Nicht im Wäschetrockner trocknen
	Waschmaschine – Wassertemperatur 40 °C
	Chemische Reinigung – alle Lösungsmittel außer Perchlorethylen
	Waschmaschine – Wassertemperatur 60 °C
	Bügeln – bei mittlerer Temperatur
	Nass aufhängen



James Leckey Design Limited
19 Ballinderry Road
Lisburn, BT28 2SA
Northern Ireland

(+44) 28 9260 0750
hello@leckey.com



leckey.com



LS978-02