

**BENOIT** SYSTEMES




# LIGHT ASSIST 2.1

BRUGERVEJLEDNING




[WWW.BENOITSYSTEMES.COM](http://WWW.BENOITSYSTEMES.COM)



CE

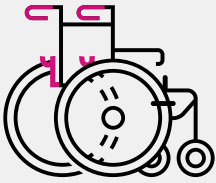

Din kørestol er blevet udstyret med **stænger og beslag**, som giver dig mulighed for at opsætte din hjælpemotor meget hurtigt. Der er monteret **beslag** på kørestolens bageste håndtag til at påsætte Light Assist-håndtagene.


## 1 OPSÆTNING AF HJÆLPEMOTOR

1. Aktivér bremserne på kørestolen for at gøre påsætningen nemmere.
2. Peg de to koblingshåndtag bagud (neutral stilling). Træk om nødvendigt i den sorte koblings-knap 
3. Hold i hjælpemotorens øverste håndtag, og anbring akslerne på krogene.
4. Sørg for, at akslerne er placeret korrekt.

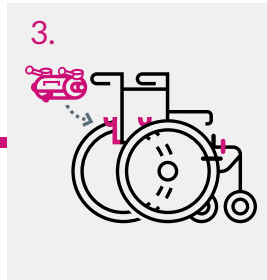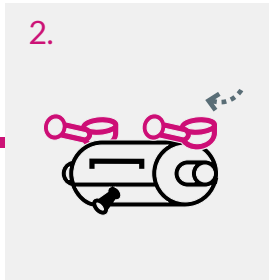

## 2 LÅS HÅNDTAGENE


1. Forlæng begge teleskophåndtag for at få mere kraft.
2. Sæt begge håndtag i indgreb, altid begyndende med højre side.

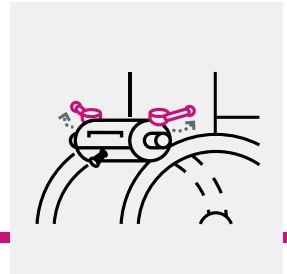

## 3 PÅSÆTNING AF SKUBBEHÅNDTAG

Der leveres to håndtag med hjælpemotoren:

Fremad/  
Bak kontakt

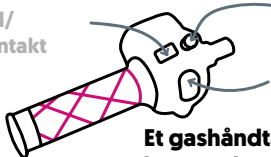

Et gashåndtag til at køre stolen

Hastigheds-  
regulator

On/Off  
kontakt





Et statisk håndtag til at gøre begge håndtag lige lange

Håndtagene låses med en split i venstre eller højre side på kørestolens bageste håndtag.


## 4 OPSÆTTNING AF BATTERIET

1. Placér batteriholderen i batteriprofilen på hjælpemotoren.
2. Skub batteriholderen fast, indtil du hører, at stikkene går ind i hinanden.

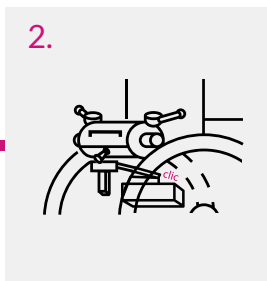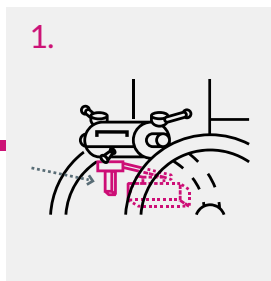


## 5 MONTERING AF ANTI-TIP

Indsæt anti-tip i det bagerste håndtag på hjælpemotoren (hjulet skal pege nedad).

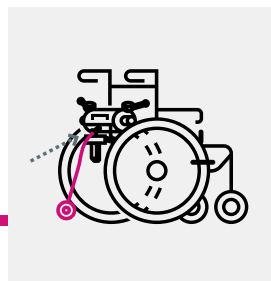

### EKSTRA FUNKTION

Et enkelt skift af koblingshåndtagene er nok til at frakoble hjælpemotoren og få din sædvanlige manuelle kørestol tilbage.

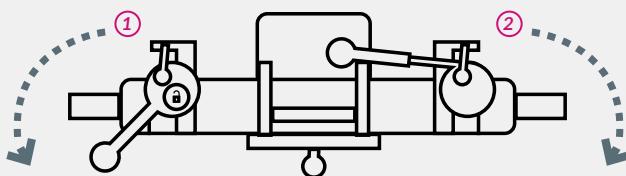

- 1 Frigør det venstre håndtag og drej det til højre.
- 2 Frigør det højre håndtag og drej det helt tilbage mod ryglænet.

## BRUGSANVISNING

Ved begrænset plads er der 2 løsninger:

1. Frakobl hjælpemotoren og betjen kørestolen manuelt.
2. Brug hastighedsregulatoren til at holde hjælpemotoren ved en lav hastighed og køр kørestolen med gashåndtaget.

Når du nærmer dig et fortov:




Stop ikke og prøv at løfte kørestolen!  
Kør langsomt frem til kantstenen, vip kørestolen (forhjul på kantstenen) og fortsæt.

## 6 AFMONTERING AF HJÆLPEMOTOREN

Aktivér bremserne på kørestolen for at lette afmonteringen.


1. Hold håndtagene i indgreb.
2. Fjern tipsikringen, og hæng den på det angivne sted på batteriet.
3. Lås batteriet op ved hjælp af låsemekanismen og træk det bagud.
4. Fjern de to Light Assist<sup>2</sup>-håndtag, og opbevar dem i den angivne position bagest på motoren.
5. Sæt koblingshåndtagene i neutral position (træk i den sorte knap).

Løft hjælpemotoren af ved at tage fat i det øverste håndtag. Akslerne skal komme af beslagene.

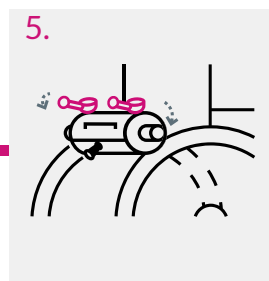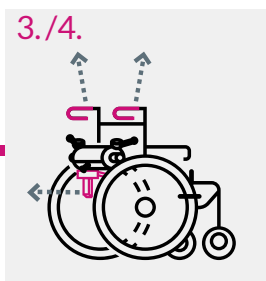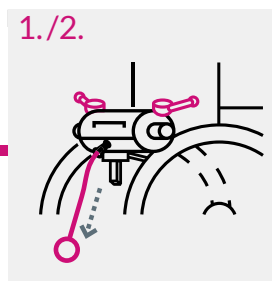

## 7 GENOPLADNING AF BATTERI

Saml de røde stik på batteri og oplader, og sæt derefter opladeren i strømforsyningen. Afbryd forbindelsen, når opladningen er fuldført.

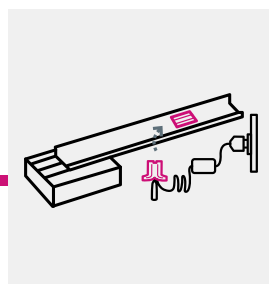

### LÆS SERVICE MANUALEN

for kørsels-,  
sikkerheds- og  
vedligeholdelses-  
instruktioner

**BENOIT  
SYSTEMES**  
Autonomy is power

7 Rue du Pont, 21450 Billy Les Chanceaux FRANCE  
☎ (+33) 3 80 96 51 25 | @ export@benoitssystemes.com

WWW.BENOITSYSTEMES.COM