

Nova 30 håndkontroll for rettløft



Beskrivelse

Art.nr.

Håndkontroll for Nova 30 for rettløft

12737111

NOVA

Benytt Håndkontroll for rettløft for å oppnå enklest mulig betjening av rettløft på Nova 30.

Åpne glidelåsen bak på ryggtrekket, løsne ryggtrekket fra festeskinnen og brett ryggtrekket til side.

Åpne elektronikkboksen som sitter bak på stolryggen ved hjelp av en flat skrutrekker. Press ned låsehakene på toppen.



Sett stolen i sitte posisjon før rettløft funksjonen (bryterrekke nr.4 på håndkontrollen) benyttes.



Aktuatorledningen må bytte plass inne i kontrollboksen og det må i tillegg monteres en krysset kabel.

Oppkobling ved rettløft:

Port 1	Ryggaktuator
Port 2	Tiltaktuator med krysset kabel
Port 3	Løfteaktuator





Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no