


## MONTERINGSANVISNING

# Attende ledsagerstyring

Til Quickie Puma 40

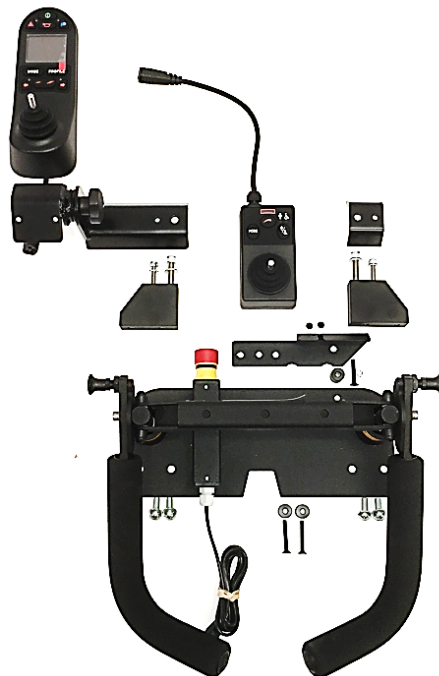


### Sikkerhet!

Montering skal kun utføres av kyndig personell som har gjennomgått og bestått aktuell opplæring i Attende ledsagerstyring for Sedeo Pro+ rygg, dens bruk og funksjoner.

Montering av ledsagerstyringens styreboks, JSM, brytere og nødstop, samt programmering av disse, skal kun utføres av kyndig personell som har gjennomgått og bestått aktuell opplæring.

Feil montering kan føre til skade/død på personer i og rundt rullestolen og øvrige omgivelser.

Ta kontakt med Sunrise Medical AS ved behov for opplæring eller veiledning dersom det råder usikkerhet rundt montering av utstyret.

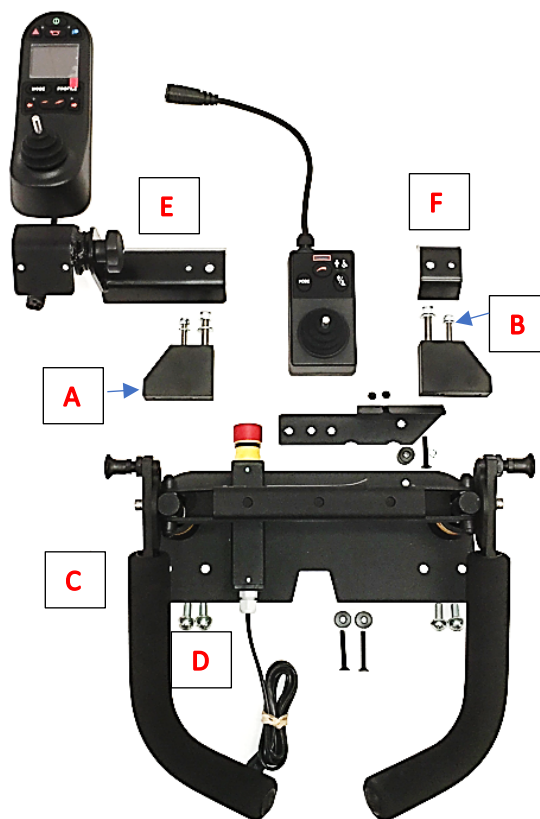

A – Distanseblokk

B – Bolter til distanseblokk

C – Attende ledsagerstyring

D – Bolter til Attende ledsagerstyring


E – JSM inkl beslag

F – Foring ved bruk av sidemontert JSM

1. Monter distanseblokkene (A) i hullene på Sedeo Pro+ ryggbrakett, som vist, en på hver side. Benytt medfølgende bolter (B).




2. Monter Attende ledsagerstyring (C) til distanseblokkene (A) ved hjelp av 4stk bolter (D).

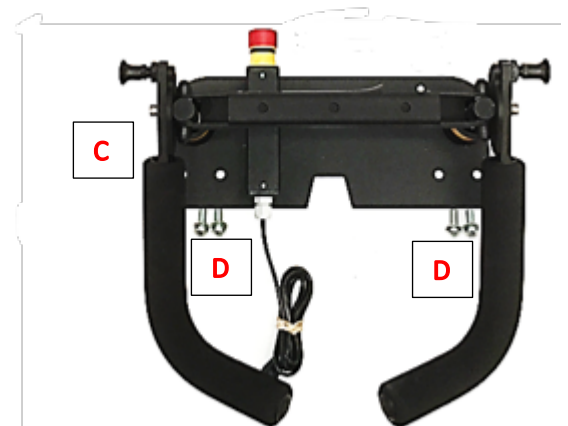


3. Dersom det skal monteres sidemontert JSM (E) i tillegg, skal beslaget for JSM plasseres direkte mot ryggprofilen til Sedeo Pro+ før distanseblokkene monteres. Monter foring (F) på motsatt side for JSM. Dette vil utligne dybdeforskjell for montering av distanseblokkene. (Bildet viser JSM for montering på venstre side).



4. Monter ønsket type R-Net joystick i monteringshullene (G) på monteringsplaten.

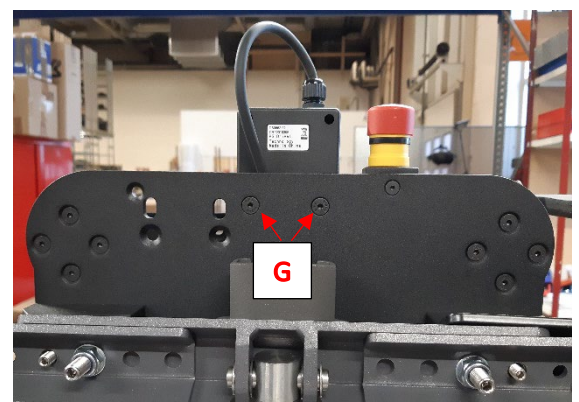

Når joystick er korrekt montert, skal joystickpinnen har fri plass i alle retninger, uten å berøre metallet i nøytral posisjon.

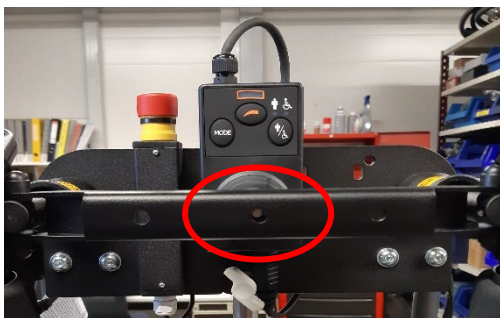

5. Kabling av JSM, brytere og nødstopp til R-Net systemet utføres i henhold til servicemanual for R-Net systemet. Normalt kobles nødstopp inn på Inh5 på ISM dersom denne ikke allerede er tatt i bruk.

### Sikkerhet!

Montering skal kun utføres av kyndig personell som har gjennomgått aktuell opplæring i Attende ledsagerstyring for Sedeo Pro+ rygg, dens bruk og funksjoner.

Montering av ledsagerstyringens styreboks, JSM, brytere og nødstopp, samt programmering av disse, krever inngående kunnskap om programmering av R-Net for å sikre korrekt oppsett og tilpassing til ulike behov. Dette skal kun utføres av kyndig personell som har gjennomgått og bestått aktuell opplæring.

Feil montering kan føre til skade/død på personer i og rundt rullestolen og øvrige omgivelser.

Ta kontakt med Sunrise Medical AS ved behov for opplæring eller veiledning i montasje og bruk, dersom det råder usikkerhet rundt montering og/eller bruk av utstyret.

Det er anbefalt å prøvekjøre løsningen etter montering og eventuelt gjøre justeringer slik at joystickpinne er korrekt plassert.



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3, 1540 Vestby  
T: +47 66 96 38 00  
E: [post@sunrisemedical.no](mailto:post@sunrisemedical.no)  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)