

JAY BALANCE

Optimalizována pro lepší ochranu pokožky, stabilitu a komfort



Nové rozměry

CRYO FLUID

Perfektní rovnováha mezi ochranou kůže a stabilitou


Objevte svou rovnováhu s JAY Balance

Sedací polštář Jay Balance byl navržen na základě našich mnohaletých zkušeností s vývojem a výrobou sedacích systémů JAY tak, aby poskytoval nejvyšší úroveň ochrany proti kožním defektům a maximální stabilitu a komfort sedu.

Nová sendvičově vrstvená základna složená z různě tvrdých pěnových vrstev, zabraňuje styku trochanterů s podkladem. Nově tvarovaný prostor pro pánev zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku a zároveň zabraňuje nežádoucímu pohybu hydrokoloidní vložky. Nově navržená hydrokoloidní vložka s dvojitou krycí vrstvou nabízí vysoký stupeň ochrany pokožky a zaručuje komfort.

Maximální stability a optimální polohy sedu je dosaženo díky kombinaci základny s nově tvarovaným prostorem pro pánev a elementů pro korekci sedu, které je možné vložit do vnitřního potahu sedačky.




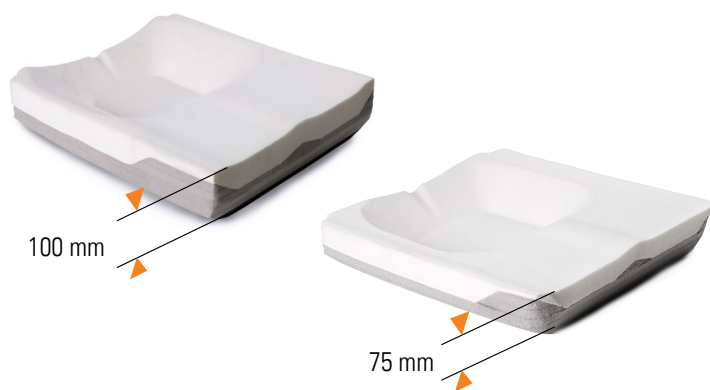

Vrstvená konturovaná pěnová základna

Anatomicky tvarovaná základna sedačky Jay Balance je vyrobená ze speciální pěny s uzavřenou strukturou buněk.

Zvýšená stehenní část sedacího polštáře a zadní profil pánevní prohlubně zabraňují nežádoucímu pohybu hydrokoloidní vložky a zároveň jemně podporují trochantery a pánevní hrboly. Základna sedu se vyrábí ve dvou různých výškách reflektujících požadavky uživatelů mechanických a elektrických vozíků.

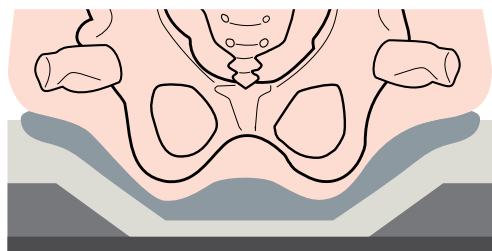

Šířka pánevní prohlubně byla stanovena průměrem měření pánevních kostí u vybraného vzorku uživatelů. Stanovená šířka vyhovuje drtivé většině klientů a poskytuje jim optimální přední a boční stabilitu při běžném rozložení hmotnosti uživatele. Poskytuje nejvyšší možnou ochranu proti kožním defektům.



Antidekubitní vložky

Základním prvkem sedacího polštáře je antidekubitní vložka, která má za úkol rozkládat hmotnost uživatele na větší plochu sedu a tím chránit kůži a svalovou tkáň před tlakem exponovaných hrbolů sedacích kostí.

Sedací polštář Jay Balance je možné objednat s hydrokoloidní JAY, Cryo Fluid nebo nafukovací vložkou, jež se přizpůsobí požadavkům každého uživatele.



Cryo Fluid je patentovaný revoluční materiál, který aktivně ochlazuje povrch kůže pacienta vsedě až po dobu 8 hodin a zároveň rovnoměrně rozkládá tlak, snižuje stříh a riziko vzniku vlhkosti.



Hydrokoloidní tekutá a bezúdržbová vložka poskytuje vynikající ochranu po celou dobu životnosti polštáře.



Úroveň tlaku vzduchu je během používání možné upravit tak, aby se přizpůsobila asymetrickým polohám pánve a měnícím se potřebám klienta.



Prostor umožňující snadnou aplikaci příslušenství pro korekci sedu

Volitelně je možné sedací polštář doplnit celou řadou příslušenství určeného ke korekci správné polohy sedu. Jay Balance se vždy dokáže přizpůsobit měnícím se potřebám uživatelů, splňuje veškeré ortopedické požadavky a zvyšuje celkový komfort sedu.



Inovativní, dvouvrstvý systém potahu sedačky

- Pro větší pohodlí a ochranu je sedací polštář Jay Balance vybaven systémem dvouvrstvé ochrany. Inovativní krycí technologie použitá na vnitřní a vnější obal optimálně splňuje požadavky na dobrou prodyšnost a zároveň nabízí efektivní řešení inkontinence.
- Vnitřní voděodolný potah se snadno čistí a udržuje, zatímco pěnová základna je díky zip uzávěru „Aqua-guard“ suchá.
- Pro větší ochranu proti kožním defektům je sedačka vybavena mikroklimatickým vnějším potahem odvádějícím teplo a vlhkost od pokožky. K dispozici je také inkontinentní a strečový vnější potah. Všechny typy potahů je možné prát v pračce při teplotě 60°C. Snadno se suší.
- Všechny typy vnějších potahů jsou uzpůsobeny pro snadnou aplikaci příslušenství (například abdukčních/addukčních klínů) určených ke korekci správného sedu. Potah se vždy přizpůsobí tvaru sedačky bez vytváření povrchového napětí nebo nežádoucích záhybů na materiálu, z něhož je vyroben.





JAY BALANCE - PARAMETRY

Šířka sedačky	340 mm - 600 mm; s Cryo Fluid od 360 mm
Hloubka sedačky	340 mm - 600 mm ; s Cryo Fluid od 360 mm
Výška sedačky	75 mm (Standard), 100 mm (Deep Contour)
Nosnost sedačky	150 kg (340 mm - 500 mm); 225 kg (560 mm - 600 mm)
Hmotnost sedačky	2,4 kg (400 x 460 s hydrokoloidní vložkou); 3,0 kg (400 x 460 s Cryo hydrokoloidní vložkou); 1,9 kg (400 x 460 s nafukovací vložkou)
Antidekubitní vložky	Hydrokoloidní, Cryo, jednokomorová / dvoukomorová vzduchová
Vnější potahy	Mikroklimatický, inkontinentní a strečový - vypínatelný
Příslušenství pro korekci sedu	Volitelně



MEDICCO s.r.o.

Heršpická 1013/11d, 639 00 Brno

Tel.: +420 800 900 809

E-Mail: info@medicco.cz

www.medicco.cz