

# StreetJet

## Guide de Compatibilité



Rev.:05/2024

Fauteuil Roulant Marque / Modèle	Pincés de fixation	Fauteuil Roulant Marque / Modèle	Pincés de fixation
<b>Sunrise Medical</b>		<b>RGK</b>	
Nitrum	<b>C</b>	Tiga	<b>B</b>
Nitrum Hybrid	<b>C</b>	Tiga Sub4	<b>B</b>
Helium	<b>C</b>	Tiga F2	<b>B</b>
Xenon <sup>2</sup>	<b>C</b>	Octane	<b>B</b>
Xenon <sup>2</sup> Hybrid	<b>C</b>	Octane Sub4	<b>B</b>
Argon <sup>2</sup>	<b>B</b>	Hilite	<b>B</b>
Neon <sup>2</sup>	<b>A</b>	Hilite XTR	<b>B</b>
Easy 200	<b>A</b>	Maxlite	<b>A</b>
Easy Life R	<b>A</b>	<b>Pro Activ</b>	
Easy Life F	<b>A</b>	Traveler	<b>B</b>
Easy max	<b>A</b>	Speedy	<b>B</b>
QS5 X	<b>B</b>	Buddy	<b>B</b>

**Remarque:** La liste, ci-dessus, est une indication des modèles de fauteuils roulants sur lesquels la Streetjet peut être montée. Cependant, la forme du cadre, le centre de gravité, la taille des roues et la profondeur d'assise ont une influence. De plus, une section droite du tube du cadre d'au moins 45 mm est aussi nécessaire pour la fixation des pincés. Il est donc essentiel d'essayer et de tester pour être sûr à 100% ! Ou demandez conseil à votre fournisseur. Le guide de compatibilité ne montre que les fauteuils roulants pour lesquels un accord de combinaison a été signé. Vous trouverez le test de compatibilité en 6 étapes sur les pages suivantes.


# StreetJet

## Vérification de la compatibilité en 6 étapes

La StreetJet est compatible avec les fauteuils roulants à châssis rigide ou pliant (uniquement avec potences fixes) et avec un angle de châssis compris entre 75° et 90°. Pour vous assurer de la compatibilité de la StreetJet avec le fauteuil roulant, veuillez suivre les étapes de vérification de compatibilité ci-dessous.


**1 - Accord de combinaison** - Vérifiez si la combinaison entre la StreetJet et votre fauteuil roulant est approuvée. La vue d'ensemble des combinaisons existantes peut-être consultée sur [www.sunrisemedical.fr](http://www.sunrisemedical.fr)

**2 - Diamètre du tube du cadre avant** - Vérifiez si les pinces de fixation StreetJet disponibles s'adaptent aux tubes du cadre avant du fauteuil roulant. Les formes de pinces suivantes sont disponibles :

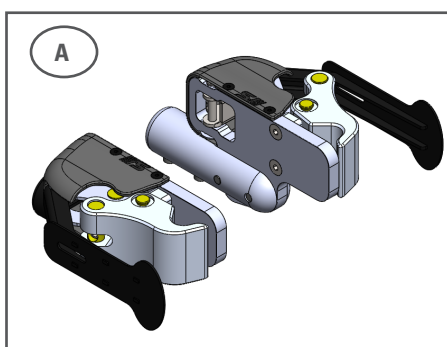


### Version A

Pinces One Touch pour cadres à tubes ronds, diamètre réglable 19mm - 24mm (STE010053)

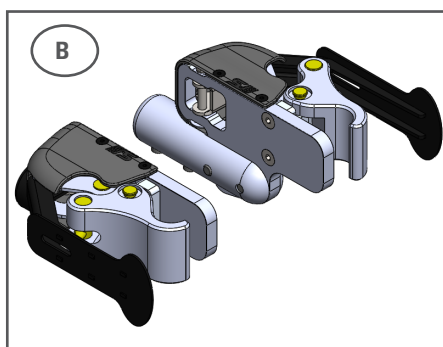

### Version B


Pinces One Touch pour cadres à tubes ronds, diamètre réglable 25mm - 35mm (STE010054)

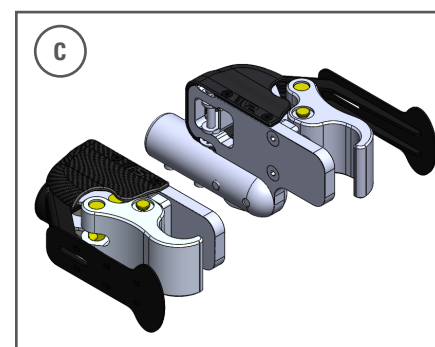

### Version C

Pinces One Touch pour cadres à tubes ovales (Quickie Helium, Quickie Nitrum, Quickie Xenon<sup>2</sup> potences fixes) (STE010059)

**3 - Mesure de la Hauteur Minimale de Montage** - L'angle optimal de la StreetJet par rapport au sol est de 80°. Pour une performance optimale, il est recommandé de ne pas descendre en dessous d'une hauteur de montage minimale de 322 mm (mesurée du sol au bord inférieur de la pince).

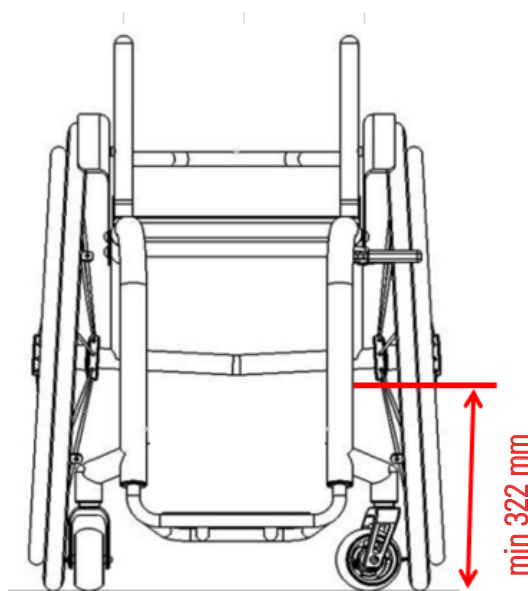



Roues Motrices 12" & 16"

Hauteur de montage minimale de 322 mm

## StreetJet

# Vérification de la compatibilité en 6 étapes

**4 - Mesure de la Section Droite du Tube** - Pour installer correctement les pinces One Touch, une section droite d'au moins 45 mm est nécessaire sur le tube du cadre. Veuillez vérifier s'il existe une section droite d'au moins 45mm sur le tube du cadre avant, à hauteur de montage minimale ou au-dessus. S'il y a un ajustement de châssis, la position de montage des pinces doit être en dessous de la courbure.

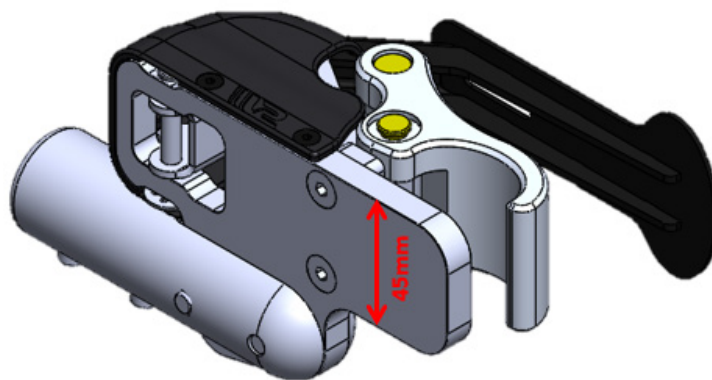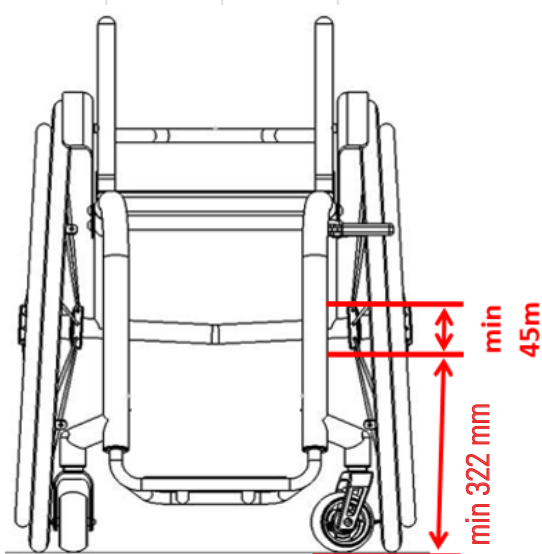


Roues Motrices 12" & 16"

Hauteur de montage minimale de 322mm

**5 - Mesure de la Largeur du Cadre Avant** - La largeur du cadre avant, mesurée de tube intérieur à tube intérieur à la hauteur de montage minimale ou supérieure, doit être comprise entre 220mm - 425mm.

La largeur ainsi mesurée peut différer de la largeur de l'assise en raison de la méthode de mesure utilisée ou de la version du cadre (standard, en V, en abduction ou en adduction, etc.). Pour vérifier la compatibilité, utilisez uniquement la dimension du cadre avant mesurée et non la largeur d'assise.

**Veillez sélectionner la plage de largeur du cadre avant appropriée sur la fiche de mesures!**

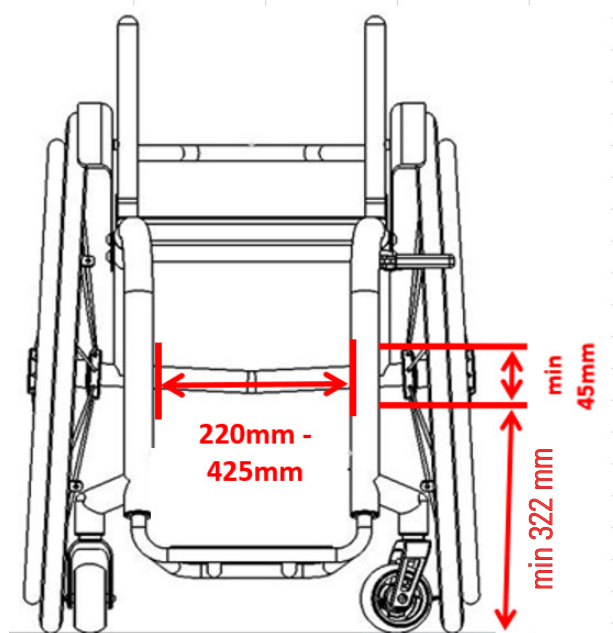

Plages de largeur du cadre avant:

220-275 mm

275-330 mm

330-425 mm

## StreetJet

# Vérification de la compatibilité en 6 étapes

6 - Mesure de la Hauteur du Repose-pieds - La distance mesurée entre le sol et le dessous du repose-pieds doit être au moins de 60mm

