

Huvudstöd Sterling Elite2Plus



Benämning

Huvudstöd

Artikelnummer

EB74025



MONTERINGSANVISNING

Fig. 1



Montera huvudstödet i ryggens förberedda hål (Fig 2).

Fig. 2



Hålen är täckta med ett lock som bänds bort med en skruvmejsel (Fig 3).

Fig. 3



Tryck därefter ner huvudstödet i hålen (Fig 4)

Fig. 4





Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands

T: +31 (0)492 59 38 88
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.eu



Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sverige

T: +46 (0) 31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se