

Elektrisk sving (Nova 30)



Beskrivelse

Artikkelnummer

Elektrisk sving	Nova 30 standard/Nova 30 lav	☐	12739100
Elektrisk sving	Nova 30 høy	☐	12939100

NOVA

Verktøy

Unbraco 5mm og 6mm
Skralle med pipe 13mm


OBS! Montering av elektrisk sving må utføres av teknisk kvalifisert personale.

Ta ut seteputen.



Kjør oppreisingsfunksjonen
til setet er plant.



Legg stolen ned på siden og skru av de 6 mutterne
under trefoten.


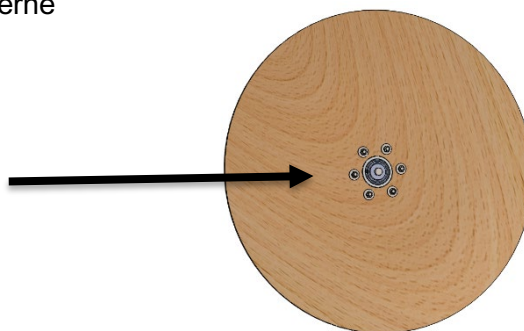


Ta av trefoten.
Løsne skruene A og E
Skrut ut skruene F
Trekk ut foten B

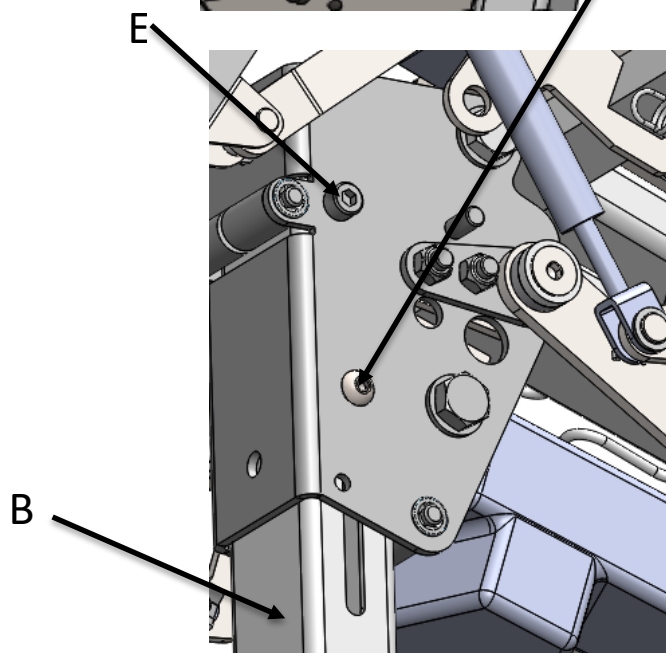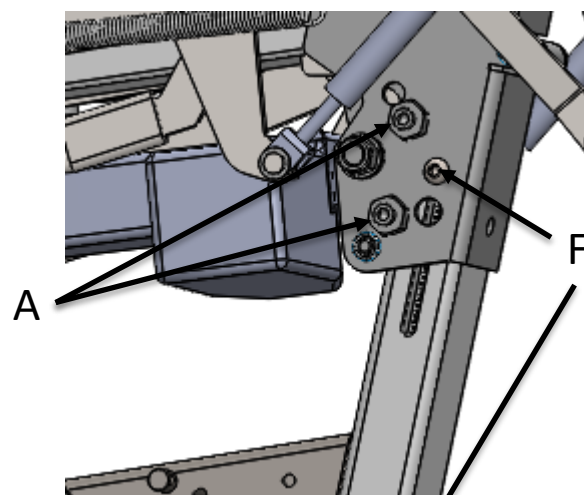

Sett inn fot med elektrisk sving.

Monter sammen i motsatt rekkefølge. Bruk blå Locktite 243 på skruene F.

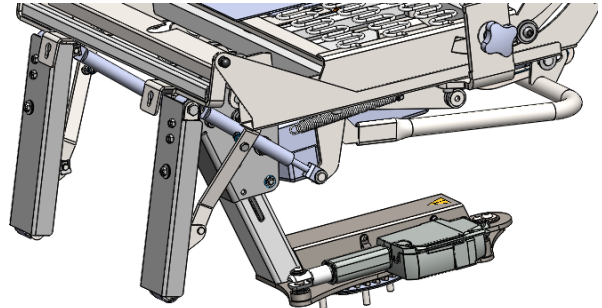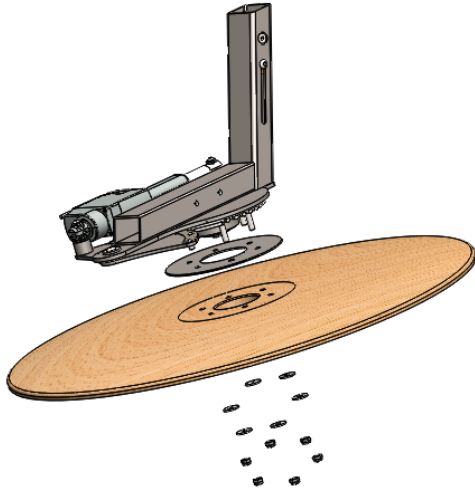

Gradet kant på skiven skal vende opp

Skru på igjen trefoten og sett opp stolen.

Husk å vatre opp stolen etter at stolen er justert til ønsket setehøyde. Trekk til alle skruer. Se brukermanual kap. 5.3

Kjør stolen til oppreist stilling og tilt helt tilbake. Strips fast ledningen i henhold til bildet, slik at kabler ikke blir strukket eller kommer i klem.

Prøvekjør alle funksjoner på stolen med fulle utslag og påse at ingen kabler kommer i klem.



Etter montering av elektrisk sving, må kablene inne i kontrollboksen byttes om.
Bruk en flat skrutrekker og press ned låsehakene på toppen for å frigjøre lokket på elektronikkboksen.



Oppkobling elektrisk sving Nova 30:

Port 1 Ryggaktuator

Port 2 Tiltaktuator

Port 3 Løfteaktuator

Port 4 Elektrisk sving



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no