

Empulse StreetJet

Montage instructie





BENODIGDE MATERIALEN



VOORBEREIDING

- Zet de rolstoel op de rem
- Zorg ervoor dat de StreetJet ontkoppeld is
 1. Ontgrendel de koppeling
 2. Knijp de ontgrendelhendel in
 3. Trek het subframe omhoog

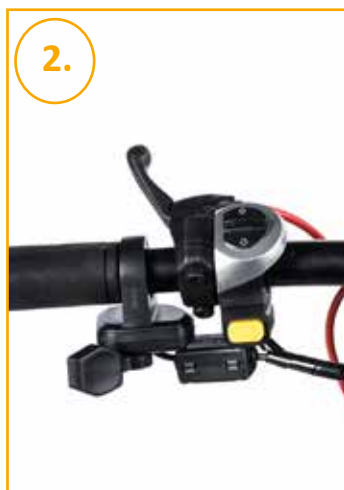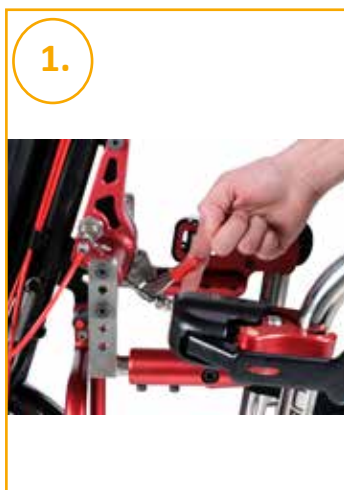

1. AFSTELLEN ONE TOUCH KLEMMEN

4 mm inbussleutel



- Draai tegen de klok in de klem open
- Plaats de klem om het frame
- Draai met de klok mee totdat de klem het frame raakt
- Draai vervolgens $\frac{3}{4}$ draai met de klok mee strakker
- Controleer of de klem stevig op de rolstoel zit



2.A INSTELLEN BREEDTE

5 en 6 mm inbussleutel

- Zorg dat je de juiste maat subframe hebt
- Draai schroeven A (5 mm) en B (6 mm) los
- Draai schroeven C (5 mm) van het subframe los

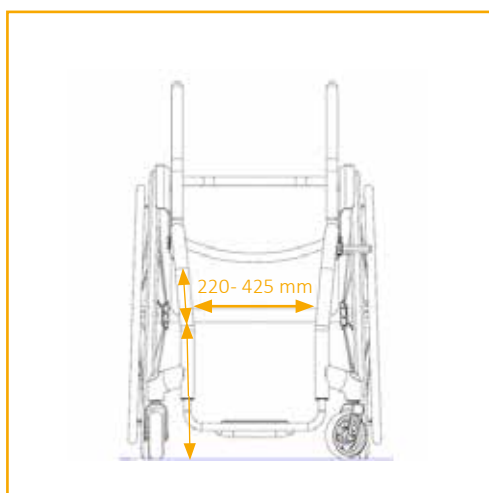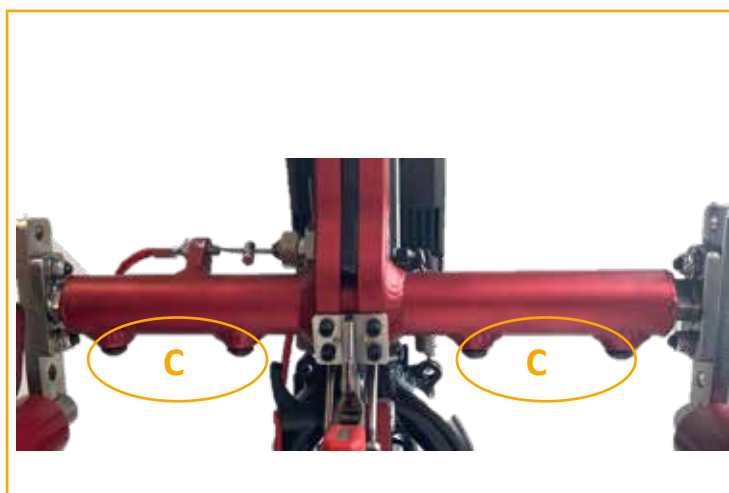

Gemeten breedte


220 - 275 mm

275 - 330 mm

330 - 425 mm



2.B INSTELLEN BREEDTE

- Plaats de StreetJet voor de rolstoel
- Bevestig de One-touch klemmen aan de rolstoel
- Controleer of de klemmen op een recht stuk buis zitten en de onderkant van de klem minimaal 350 mm (12") of 365 mm (16") van de grond af gemonteerd is. Indien dit niet het geval is, stel de hoogte van het subframe af zodat de one-touch klemmen te monteren zijn

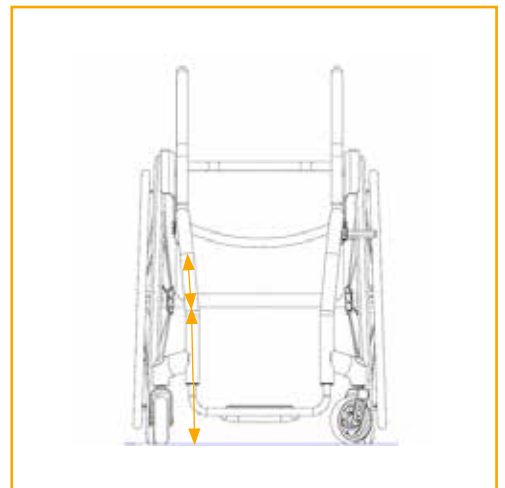



3. AFSTELLEN HOOGTE SUBFRAME

- Draai schroeven D los en verstel deze zodanig dat de hoogte van de klem op het frame minimaal 350 mm (12") of 365 mm (16") is en de klem op een recht stuk frame gemonteerd kan worden
- Draai schroeven D aan met 16 Nm
- Draai schroeven C aan met 20 Nm

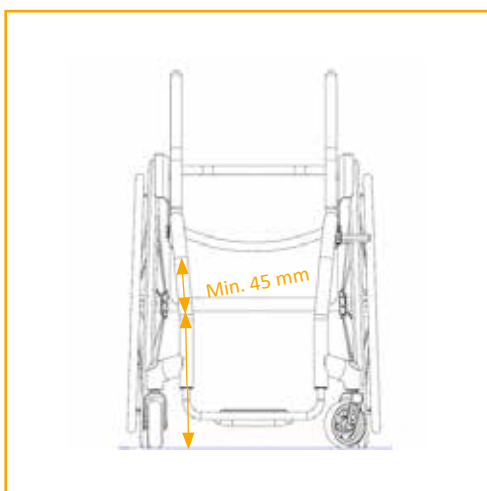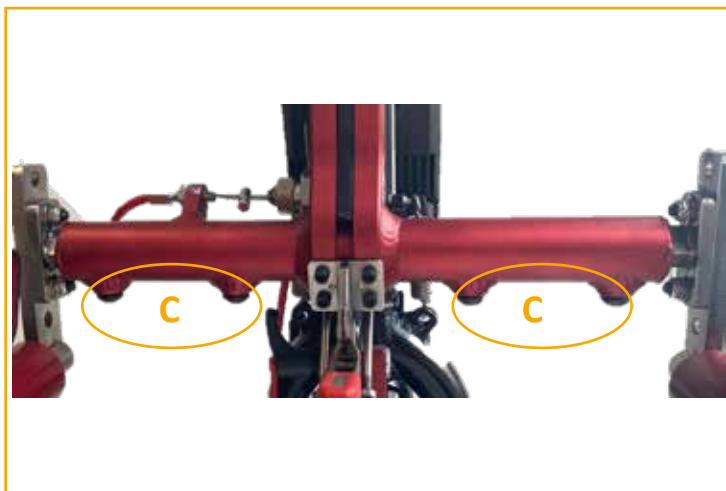

4A. AFSTELLEN DIEPTE

- Zorg ervoor dat de afstand tussen de montageplaat en de one-touch klemmen aan beide zijden gelijk is en niet groter is dan 20 mm
- Zorg ervoor dat er geen contact mogelijk is tussen de voetplaat en het aandrijf wiel
- Indien er wel contact is tussen de voetplaat en het aandrijf wiel, kan de hoek van de standaard aangepast worden. Verwijder daarvoor schroef E en herpositioneer de standaard zodat de schroef in de andere montagepositie past
- Draai schroef E vast met 12 Nm

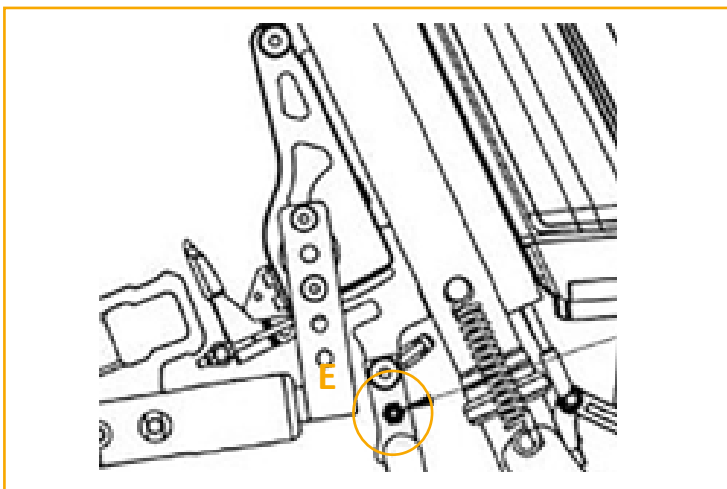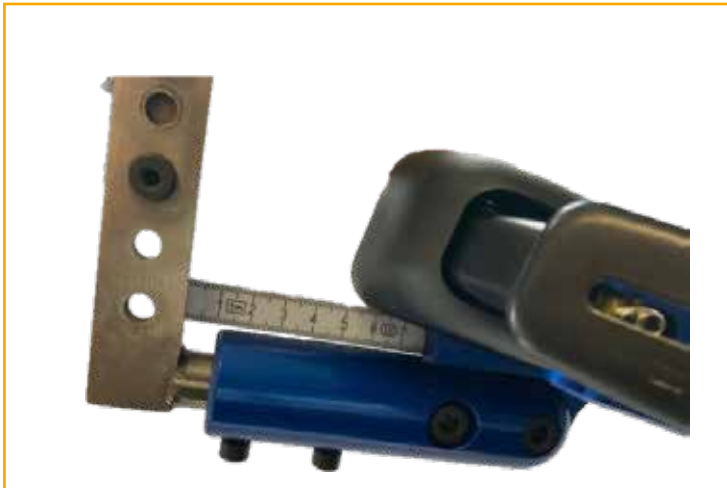

4B. AFSTELLEN DIEPTE

- Draai schroeven A en B vast met 16 Nm



Draai alle schroeven 30 minuten voor gebruik en na 24 uur nogmaals aan



Zorg dat er voldoende ruimte is tussen de voeten van de rolstoelgebruiker en het aandrijf wiel, zelfs met volledige stuuruitslag



Schroeven voorzien van Loctite moeten elke keer nieuwe loctide™ 243 krijgen.

5. AANPASSEN STUURPOSITIE

De hoek van het stuur kan gewijzigd worden van 0° tot 90°

- Draai schroef F los
- Stel de gewenste hoek in
- Draai schroef F weer vast met 20 Nm



Controleer of alle kabels niet gebogen of uitgerekt worden. Gebruik eventueel kabelbinders om de kabels te begeleiden