



BeMe

Manuale d'uso



Supporting
Children



Leckey BeMe è stato progettato per fornire supporto posturale e consentire funzioni e mobilità del bambino. Questo manuale illustra come utilizzare tutte le funzioni di BeMe in modo rapido, facile e in condizioni di sicurezza. Le istruzioni per la sicurezza e la manutenzione consentono di utilizzare questo prodotto per molto tempo.

SOMMARIO

1.	Destinazione d'uso	p.03
2.	Certificazione	p.05
3.	Avvertenza e precauzioni	p.05
4.	Termini e condizioni di garanzia	p.07
5.	Rapporto sull'uso del prodotto	p.08
6.	Rapporto sulla formazione degli assistenti per l'utilizzo del prodotto	p.08
7.	Avvisi di sicurezza	p.09
8.	Precauzioni e controindicazioni	p.11
9.	Regolazioni frequenti durante l'uso quotidiano	p.12
10.	Istruzioni per la pulizia e la cura	p.31
11.	Ispezione quotidiana del prodotto	p.32
12.	Ispezione annuale del prodotto	p.33
13.	Riassegnazione dei prodotti Leckey	p.34
14.	Assistenza tecnica	p.35
15.	Informazioni tecniche	p.36
16.	Disimballaggio e montaggio del sistema di seduta	p.42
17.	Applicazione dei teli di rivestimento	p.83
18.	Configurazione del prodotto	p.99

SEZIONE 01: DESTINAZIONE D'USO

Leckey BeMe può essere abbinato alle basi per la mobilità qui di seguito indicate. Leckey BeMe è un sistema di seduta per il supporto posturale, destinato ai bambini con disabilità, per interni e per esterni (in combinazione con una base da esterni).

Leckey BeMe è disponibile in 3 misure.

- Struttura centrale della seduta Small con portata massima di 35 kg
- Struttura centrale della seduta Medium con portata massima di 50 kg
- Struttura centrale della seduta Large con portata massima di 70 kg
- Schienale Small con portata massima di 35 kg
- Schienale Medium con portata massima di 50 kg
- Schienale Large con portata massima di 70 kg
- Base High-Low Small con portata massima di 35 kg
- Base High-Low Medium con portata massima di 50 kg
- Base High-Low Large con portata massima di 70 kg



Avvisi di sicurezza -

Il peso del bambino deve essere **inferiore a quello indicato per:**

- Struttura centrale della seduta
- Schienale
- Base

Per ulteriori informazioni si rimanda alla Sezione 8 "Precauzioni e controindicazioni".

Il sistema di seduta è di tipo modulare e può essere abbinato a basi da interni o da esterni differenti. La base "High-Low" è stata progettata per essere usata in abbinamento con Leckey BeMe ed è disponibile nelle varianti da interni o da esterni. La versione da esterni può essere usata in ambienti esterni su terreni non sconnessi.

Leckey BeMe può essere abbinato alle basi per la mobilità qui di seguito indicate.

Struttura centrale della seduta BeMe	Basi per la mobilità	Interfaccia necessaria
Small	Sunrise Medical Zippie Iris	150-1760
	Sunrise Medical Quickie Iris	150-1760
	Sunrise Medical Quickie SR45	150-1760
	Sunrise Medical Quickie Q300 M (inclusa versione Mini)	150-1771
	Sunrise Medical Quickie Q300 M (inclusa versione Mini) con basculamento e elevazione della seduta elettronici	150-1772
Medium	Sunrise Medical Zippie Iris	150-2760
	Sunrise Medical Quickie Iris	150-2760
	Sunrise Medical Quickie SR45	150-2760
	Sunrise Medical Quickie Q300 M (inclusa versione Mini)	150-2771
	Sunrise Medical Quickie Q300 M (inclusa versione Mini) con basculamento e elevazione della seduta elettronici	150-2772
	Sunrise Medical Quickie Q400	150-2771
	Sunrise Medical Quickie Q400 con basculamento e elevazione della seduta elettronici	150-2772
Large	Sunrise Medical Quickie Iris	150-3760
	Sunrise Medical Quickie SR45	150-3760
	Sunrise Medical Quickie Q300 M (inclusa versione Mini)	150-3771
	Sunrise Medical Quickie Q300 M (inclusa versione Mini) con basculamento e elevazione della seduta elettronici	150-3772
	Sunrise Medical Quickie Q400	150-3771
	Sunrise Medical Q 400 con basculamento e elevazione della seduta elettronici	150-3772

Per ulteriori dettagli contattare il **Servizio Clienti** Sunrise Medical

Indicazioni d'uso

BeMe è un sistema di seduta di tipo modulare progettato per soddisfare le esigenze di bambini con diversi tipi di disabilità che influiscono sulla loro capacità di rimanere seduti in modo autonomo senza supporto posturale. È indicato soprattutto per essere usato in casa, in ambiente scolastico e, qualora dotato di base per la mobilità, all'esterno. Disponibile in tre misure: portata massima 35 kg, 50 kg e 70 kg.

Il supporto posturale del sistema di seduta configurabile BeMe è destinato a bambini con esigenze posturali di livello da moderato a complesso (GMFCS - Gross Motor Function Classification System: III-V).

SEZIONE 02: CERTIFICAZIONE

In base ai regolamenti dell'Unione Europea e del Regno Unito, Leckey BeMe è un prodotto classificato come "Dispositivo Medico di Classe 1". In quanto fabbricante, James Leckey Design Ltd dichiara che questo prodotto è conforme a quanto previsto dal Regolamento sui Dispositivi Medici [2017/745]. Regolamento UK del 2002 "Dispositivi Medici" e norme EN 12182:2012 "Prodotti destinati all'assistenza di persone con disabilità, requisiti generali e metodi di prova".

Avviso per l'utente: Gli incidenti gravi riconducibili all'uso di questo dispositivo devono essere comunicati al fabbricante e alle Autorità competenti dello Stato dove l'utente risiede.

SEZIONE 03: AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Nota: La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare lesioni fisiche, danneggiare il prodotto o l'ambiente!

- **Avvertenza: rischio di ribaltamento.**
L'uso di telai high-low e di sistemi di seduta portati ai limiti delle loro possibilità di regolazione riduce il livello di stabilità. Quando si usa una base high-low su una superficie in piano (pendenza inferiore a 2°) regolare sempre la seduta alla sua altezza e/o inclinazione massime. Quando si usa il sistema di seduta in pendenza o su una rampa (pendenza fino a 10°) accertarsi che lo schienale sia in posizione eretta e che l'altezza della seduta sia regolata nella sua posizione più bassa.
- **Avvertenza: rischio di intrappolamento delle dita.** Quando si attiva il meccanismo di elevazione o di abbassamento elettronico della base fare attenzione a evitare possibili intrappolamenti delle dita dell'operatore o del bambino.
- **Avvertenza: sicurezza dell'occupante:** Quando si usa la cintura a 2 punti, accertarsi che la cinghia passi attraverso la fessura della seduta posta sopra la leva di fissaggio.
- **Avvertenza: sicurezza dell'occupante:** Prima di spostare il sistema di seduta o di allontanarsi anche solo di poco da esso, accertarsi che tutte le imbragature, e in particolare le cinture pelviche, siano state allacciate e regolate in modo da mantenere il bambino in condizioni di sicurezza.

- **Avvertenza: sicurezza dell'occupante:** Quando si usa BeMe per il trasporto su un veicolo, lo schienale dinamico deve essere impostato su "Firm" (Stabile).
- **Attenzione: pericolo di pizzicamento delle dita:** Quando si devono assemblare dei componenti della seduta o è necessario regolarne la posizione, fare attenzione a non pizzicarsi le dita con gli elementi di fissaggio.
- **Attenzione: controlli quotidiani:** Prima dell'uso ispezionare quotidianamente il sistema di seduta per verificare che tutte le imbragature e gli elementi della seduta siano correttamente fissati alla seduta e alla base. Prima dell'uso controllare anche l'eventuale presenza di danni al cavo di ricarica della batteria. Per altri dettagli relativi ai controlli fare riferimento alla Sezione 11.
- **Attenzione: rischio di inciampare in caso di base elettronica:** Prima di muovere il sistema di seduta accertarsi di aver rimosso dalla base elettronica il cavo di ricarica della batteria.
- **Attenzione: pulizia:** Pulire regolarmente il sistema di seduta per evitare possibili accumuli di sporcizia sulla seduta e sulla base. Gli accumuli di sporcizia possono usurare prematuramente i cuscini della seduta e causare la corrosione prematura della base. Utilizzare esclusivamente detergenti domestici non abrasivi e un panno umido; non pulire i teli di rivestimento con l'acqua corrente senza averli prima rimossi dal sistema di seduta. Fare riferimento alla sezione 10.
- **Attenzione: utilizzo di idropulitrici/ canne dell'acqua per la pulizia:** Per la pulizia dei componenti della base non usare idropulitrici o canne dell'acqua in quanto il sistema di seduta non è sigillato/impermeabile e l'acqua diretta potrebbe danneggiarlo. Fare riferimento alla sezione 10.
- **Attenzione: manutenzione/riparazione dei componenti elettronici della base elettronica high-low:** Il gruppo per l'elevazione della base elettronica high-low non contiene elementi che possano essere riparati direttamente dall'utente. Per l'assistenza e le riparazioni rivolgersi a un tecnico autorizzato Sunrise Medical.
- **Attenzione: smaltimento:** Per smaltire il sistema di seduta rivolgersi esclusivamente a un centro di raccolta abilitato e accertarsi che i componenti elettronici siano smaltiti in modo corretto.
- **Attenzione: uso del sistema di seduta dopo un lungo periodo di non utilizzo:** Se il prodotto è rimasto a lungo immagazzinato in un luogo molto freddo, lasciarlo 2 ore a temperatura ambiente e, prima di usarlo, asciugare l'eventuale condensa. Asciugare l'eventuale condensa che si è formata sul prodotto.

SEZIONE 04: TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA

La garanzia è valida solo se il prodotto viene utilizzato rispettando le condizioni e gli scopi indicati nel presente manuale e tutte le raccomandazioni del fabbricante [in caso di dubbi o domande contattare il Servizio Clienti Sunrise Medical.

Tutti i prodotti e i componenti Leckey sono coperti da una garanzia di 24 mesi.

SEZIONE 4.1: INFORMAZIONI DI GARANZIA AGGIUNTIVE

I prodotti forniti da Sunrise Medical Pty Ltd in Australia sono associati a una garanzia di Sunrise che, in base alle leggi australiane a difesa dei consumatori, non può essere esclusa. In caso di malfunzionamenti gravi, l'utente avrà diritto alla sostituzione del prodotto, oppure a un risarcimento di altre perdite o danni ragionevolmente prevedibili. L'utente avrà anche il diritto alla riparazione o alla sostituzione dei beni quando non vengono ritenuti di qualità accettabile e quando il guasto non porta a un danno più grave. I benefici previsti da questa garanzia sono aggiuntivi ad altri diritti e rimedi previsti dalle leggi in vigore relativi ai beni ai quali questa garanzia fa riferimento.

SEZIONE 5: RAPPORTO SULL'USO DEL PRODOTTO

Questo prodotto Leckey è un Dispositivo Medico e deve essere prescritto, configurato o riadattato all'uso da una persona tecnicamente competente e debitamente formata sull'uso di questo prodotto. Sunrise Medical raccomanda di stilare e conservare un rapporto scritto che descriva i dati di tutte le impostazioni, i controlli effettuati in caso di riassegnazione e le ispezioni annuali effettuate sul prodotto.

SEZIONE 6: RAPPORTO SULLA FORMAZIONE DEGLI ASSISTENTI PER L'UTILIZZO DEL PRODOTTO

[Genitori - Insegnanti - Assistenti]

Questo prodotto Leckey è un Dispositivo Medico di Classe 1 e Sunrise Medical raccomanda che i genitori, gli insegnanti e gli assistenti che utilizzano questa apparecchiatura siano stati messi al corrente da una persona tecnicamente competente sul contenuto delle seguenti Sezioni di questo Manuale:

- **SEZIONE 7** Avvisi di sicurezza
- **SEZIONE 9** Regolazioni frequenti durante l'uso quotidiano
- **SEZIONE 10** Pulizia e manutenzione
- **SEZIONE 11** Ispezione quotidiana del prodotto

Sunrise Medical raccomanda a tutte le persone che hanno ricevuto una formazione sull'uso corretto di questo prodotto di stilare e conservare un rapporto scritto.

SEZIONE 7:

AVVISI DI SICUREZZA

- 7.1** Prima dell'uso leggere sempre e con attenzione tutte le istruzioni.
- 7.2** Per aumentare le condizioni di sicurezza si raccomanda di non lasciare mai soli i bambini quando utilizzano un prodotto Leckey.
- 7.3** Utilizzare esclusivamente componenti approvati da Sunrise Medical per questo prodotto. Non modificare mai e in alcun modo il prodotto. La mancata osservanza di queste indicazioni potrebbe mettere a rischio il bambino o l'assistente e annullare la garanzia sul prodotto.
- 7.4** In caso di dubbi sull'uso in condizioni di sicurezza del prodotto Leckey, oppure in caso di guasto di un componente, interrompere l'uso del prodotto e contattare nel più breve tempo possibile il Rivenditore o il Servizio Clienti Sunrise Medical.
- 7.5** Prima di posizionare il bambino nel prodotto effettuare tutte le regolazioni necessarie e accertarsi che i componenti siano adeguatamente fissati. Alcune regolazioni possono richiedere l'uso degli utensili forniti con il prodotto. Conservare gli utensili forniti fuori dalla portata dei bambini.
- 7.6** Dopo aver posizionato il bambino sul sistema di seduta, per ragioni di posizionamento e di sicurezza allacciare sempre per prima la cintura pelvica.
- 7.7** Quando il prodotto non è in movimento, e per aumentarne la stabilità, accertarsi che le ruote piroettanti siano bloccate e rivolte verso l'esterno rispetto alla base. Questa è una cosa particolarmente importante quando il sistema di seduta è basculato o lo schienale è reclinato.
- 7.8** Quando si usa il sistema di seduta in abbinamento con una base high-low, accertarsi che il pedale per la regolazione dell'altezza e la leva per il basculamento siano bloccati e che non possano essere accidentalmente attivati da altri bambini.
- 7.9** Quando il bambino è seduto in un sistema di seduta Leckey abbinato a una base high-low si raccomanda di non percorrere superfici sconnesse. Quando si trasferisce il bambino da o su un sistema di seduta prestare moltissima attenzione.
- 7.10** Per cambiare direzione e trasferire il sistema di seduta da un luogo all'altro utilizzare sempre il maniglione di spinta. Non utilizzare mai il tavolino o l'appoggiatesta a questo scopo.
- 7.11** Il prodotto utilizza componenti che per i bambini piccoli presentano rischio di soffocamento. Verificare sempre che le manopole e i bulloni di blocco che il bambino potrebbe raggiungere siano sempre ben stretti.
- 7.12** I prodotti Leckey sono conformi ai regolamenti antincendio previsti dalla norma EN 12182. Tuttavia, il prodotto contiene componenti in plastica e, pertanto, è necessario tenerlo lontano da fonti dirette di calore, comprese fiamme libere, sigarette e stufe a gas.
- 7.13** Non appoggiare sul tavolino oggetti con temperature superiori a 40 °C.

7.14 Il prodotto è destinato all'uso in ambienti interni, quando non è utilizzato riporlo in un luogo asciutto e non esposto a temperature estreme. La temperatura operativa di sicurezza del prodotto va da +5 a +40 °C.

7.15 Prima di muovere il sistema di seduta controllare sempre che la manopola in plastica del maniglione di spinta sia correttamente fissata e che il maniglione di spinta sia adeguatamente fissato alla base con le due viti a testa tonda.

7.16 Prima di usare il sistema di seduta verificare sempre che la struttura centrale della seduta sia perfettamente collegata alla base. In caso contrario, potrebbe allentarsi e causare lesioni gravi al bambino e all'assistente.

7.17 Prestare attenzione allo spazio vuoto sotto il tavolino; il bambino potrebbe infilare le dita fra la staffa di metallo e la base del tavolino di plastica.

7.18 Il peso del bambino deve essere **inferiore** a quelli indicati per la struttura centrale della seduta, lo schienale e la base presi singolarmente.

7.19 Quando si attiva il meccanismo di basculamento afferrare bene il maniglione di spinta o trattenere la struttura centrale della seduta per evitare eventuali sobbalzi.

Leckey BeMe – Crash test

Leckey BeMe è stato sottoposto a crash test, lo ha superato ed è conforme ai criteri previsti dallo standard ISO 16840, Parte 4. Per ulteriori dettagli contattare il Servizio Clienti di Sunrise Medical. È stato sottoposto a crash test nella sua configurazione completa su una base surrogata e con un appoggiatesta Leckey installato.

Quando si trasporta il sistema di seduta Leckey BeMe su un veicolo è necessario attenersi alle indicazioni seguenti.

- Orientare Leckey BeMe nel senso di marcia.
- Utilizzare un sistema di ancoraggio UnWin e un appoggiatesta adeguatamente posizionato per tutta la durata del trasporto.

Importante

I dati del crash test fanno specifico riferimento unicamente al sistema di seduta Leckey BeMe e alla sua piastra di interfaccia. Quando si utilizza Leckey BeMe con una base per la mobilità, per i dati relativi al crash test fare riferimento al manuale d'uso del fabbricante della base per la mobilità.

COMBINAZIONE DI PIÙ DISPOSITIVI MEDICI

Il sistema di seduta Leckey BeMe può essere abbinato a uno o più Dispositivi Medici o ad altri prodotti. Informazioni sul possibile utilizzo di più dispositivi in combinazione sono disponibili sul sito www.SunriseMedical.it. Tutte le combinazioni elencate sono state convalidate per soddisfare i Requisiti Generali di Sicurezza e Prestazioni, Sezione 14.1 del Regolamento Dispositivi Medici 2017/745.

Sul sito www.SunriseMedical.it sono **disponibili le informazioni relative alle combinazioni possibili, come ad esempio le istruzioni per il montaggio.**

SEZIONE 8: PRECAUZIONI E CONTROINDICAZIONI

Precauzioni

- deformità spinali permanenti, per es., scoliosi o cifosi;
- gravi contratture muscolari;
- gravi asimmetrie muscolari o scheletriche compresa la dislocazione dell'anca;
- condizioni progressive di indebolimento muscolare;
- rischio elevato correlato a fratture ossee recenti;
- rischio elevato di lesioni da decubito o presenza di piaghe aperte;
- movimenti violenti e incontrollati;
- crisi convulsive scarsamente controllate;
- bambini dipendenti dall'uso di gastrostomie endoscopiche percutanee;
- instabilità clinica, compresa la compromissione dell'attività respiratoria o della funzione cardiovascolare;
- dipendenza da apparecchiature di supporto vitale, come le bombole per l'ossigeno;
- significative difficoltà di apprendimento e/o problemi comportamentali;

Controindicazioni

Non sono previste controindicazioni per l'uso di Leckey BeMe.

Tutte le precauzioni e le controindicazioni devono essere valutate da personale clinico specializzato. Per ridurre al minimo i rischi, Leckey raccomanda che nel corso della valutazione, della personalizzazione, della configurazione iniziale e della riassegnazione a un altro utente sia presente personale clinico specializzato.

SEZIONE 9: REGOLAZIONI FREQUENTI DURANTE L'USO QUOTIDIANO

[Terapisti - Assistenti - Genitori]

Una persona tecnicamente e clinicamente competente ed esperta nell'uso del prodotto deve spiegare ai genitori e agli assistenti come procedere con le regolazioni che devono essere effettuate frequentemente e metterli al corrente dei controlli per la sicurezza riportati nella Sezione 7. Sunrise Medical raccomanda di stilare e conservare un rapporto scritto relativo a tutti i genitori e assistenti che hanno ricevuto una formazione sull'utilizzo di questo prodotto.

SEZIONE 9.1: TRASFERIMENTO DEL BAMBINO

Prima di trasferire il bambino su BeMe eseguire l'ispezione quotidiana del prodotto, così come descritto nella Sezione 11 di questo Manuale d'uso.

Regolare la seduta a un'angolazione tale che consenta di procedere agevolmente con il trasferimento. Per ottimizzare la stabilità del prodotto, bloccare le ruote piroettanti accertandosi che siano rivolte verso l'esterno.

Se il sistema di seduta è dotato di supporti laterali per il tronco, di imbragature pettorali o di supporti laterali per il bacino, prima di trasferire il bambino procedere alla loro rimozione (vedere la Sezione 9.2).

Sganciare la cintura pelvica o la cintura pelvica Contour Cradle e liberare il Velcro laterale della cintura pelvica Contour Cradle per consentirne l'apertura e facilitare il trasferimento. Infine, se sono presenti i sandaletti, slacciare i cinturini. Ora sarà possibile trasferire il bambino.

La cintura pelvica e la cintura pelvica Contour Cradle sono collegati da una fibbia centrale e da Velcro laterale (nel caso della cintura pelvica Contour Cradle). Quando il bambino è seduto nel sistema, accertarsi sempre di aver chiuso correttamente il fermaglio.

SEZIONE 9.2: REGOLAZIONE DEGLI ELEMENTI LATERALI RIBALTABILI

Per regolare gli elementi laterali ribaltabili tirare il perno **B** indicato nella figura qui sotto.




Per facilitare i trasferimenti è possibile ripiegare temporaneamente verso l'esterno il rivestimento laterale Wraparound e fissarlo sotto i cinturini elastici.

SEZIONE 9.3: APPLICAZIONE, RIMOZIONE E REGOLAZIONE DELLA CINTURA PELLVICA A 4 PUNTI

Per applicare la cintura pelvica a 4 punti fare scorrere la cinghia grigia **attraverso la fessura superiore** della struttura della seduta **A** e, quindi, attraverso la fibbia a camma **B**. Fare scorrere la cinghia nera attraverso la fibbia a camma anteriore **C**. Tirare la cinghia e assicurare le fibbie a camma. Verificare che la cintura sia orientata con l'imbottitura rivolta verso il bambino.



Agganciare la fibbia **D** sul davanti per assicurare il bambino.

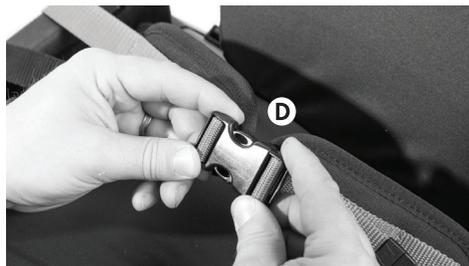

Prima di procedere con qualsiasi altra regolazione allacciare sempre la cintura pelvica.




Per rimuovere la cintura pelvica a 4 punti, ripetere la procedura in ordine inverso.



Avvisi di sicurezza: Quando si usa la cintura a 2 punti accertarsi sempre di passare la cinghia nella fessura della struttura della seduta (non sopra la struttura della seduta). Lo stesso vale anche per la cintura pelvica a 4 punti.

SEZIONE 9.4: APPLICAZIONE, RIMOZIONE E REGOLAZIONE DELLA CINTURA A 2 PUNTI

Per applicare la cintura a 2 punti fare scorrere la cinghia grigia attraverso la fessura superiore della struttura della seduta **A** e, quindi, attraverso la fibbia a camma **B**. Tirare la cinghia e assicurare le fibbie a camma. Verificare che la cintura sia orientata con l'imbottitura rivolta verso il bambino.

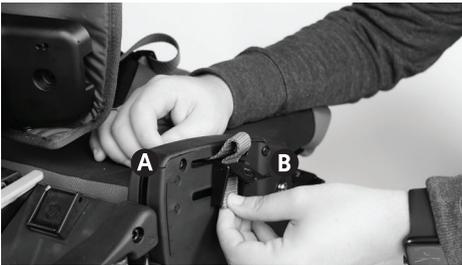

Agganciare la fibbia **C** sul davanti per assicurare il bambino.



Per rimuovere la cintura a 2 punti, ripetere la procedura in ordine inverso.



Avvisi di sicurezza: Quando si usa la cintura a 2 punti accertarsi sempre di passare la cinghia nella fessura della struttura della seduta (non sopra la struttura della seduta). Lo stesso vale anche per la cintura pelvica a 4 punti.



Prima di procedere con qualsiasi altra regolazione allacciare sempre la cintura pelvica.

SEZIONE 9.5: REGOLAZIONE DELLA CINTURA PELVICA CONTOUR CRADLE


La cintura pelvica Contour Cradle può essere stretta o allentata per fare sentire il bambino più a suo agio e per dargli stabilità pelvica tramite la cinghia grigia anteriore **1**, oppure tramite i dispositivi di blocco laterali ripiegabili **2**.



SEZIONE 9.6: REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA BASE – MOLLA A GAS

Per ragioni di sicurezza, è necessario bloccare il pedale per la regolazione dell'altezza della base inserendo il perno estraibile **C** che si trova sul lato destro del pedale. Per sbloccarlo, tirare il perno verso l'esterno e ruotarlo di 90°. A questo punto si potrà agire sul pedale.

Questa regolazione può essere effettuata anche quando il bambino è seduto. Per regolare l'altezza della base high-low, afferrare il maniglione di spinta **B** e premere il pedale **A** sul retro della base. Quando si rilascia il pedale il sistema di seduta si bloccherà all'altezza desiderata.

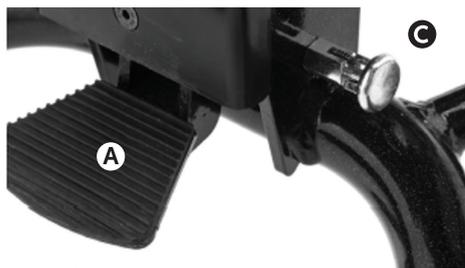

Dopo aver regolato l'altezza è necessario reinserire il perno di sicurezza.

SEZIONE 9.7: REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA BASE – IDRAULICA (MECCANISMO A POMPA)

Premere più volte il pedale della pompa fino a quando si sarà raggiunta l'altezza desiderata (la seduta si solleverà a ogni pressione del pedale). Per abbassare la seduta posizionare il piede sotto il pedale e sollevarlo delicatamente (la seduta si abbassa automaticamente).



SEZIONE 9.8: REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA BASE – ELETTRONICA

Le basi elettroniche possono essere facilmente regolate agendo sul pulsante del comando remoto e la loro altezza può essere regolata autonomamente dall'utente. La base può essere elevata o abbassata e, di solito, per coprire l'intera corsa (260 mm) sono necessari 17 secondi.



Quando non la si usa, riporre il comando remoto come mostrato nella figura seguente **A**:



Prima di usare il prodotto per la prima volta si raccomanda di ricaricare completamente la batteria per almeno 12 ore. Per farlo, collegare il caricabatterie fornito al lato della batteria **A** e a una presa di corrente CA. Lo stato di ricarica della batteria viene segnalato da un indicatore luminoso:

- Verde: collegato alla rete di alimentazione;
- Giallo: In carica;
- di nuovo verde: batteria completamente carica.

Al termine della ricarica scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente CA, estrarre la spina dall'adattatore e scollegare il cavo dalla batteria. Prima di muovere il sistema di seduta verificare di aver scollegato dalla batteria il caricabatterie. La ricarica quotidiana della batteria dovrebbe richiedere circa 1 ora. La regolazione elettronica dell'altezza della seduta può essere eseguita anche quando mentre la batteria si sta ricaricando.



Prima di procedere verificare che il cavo del comando remoto non possa avvolgersi su un qualsiasi elemento della base.

Durante l'operazione accertarsi che le dita del bambino o di altri bambini nelle vicinanze non possano rimanere intrappolate nel meccanismo di elevazione della seduta.


Prima di muovere il sistema di seduta, verificare di aver scollegato il caricabatterie dalla batteria.

Ciclo di lavoro: 2 minuti ogni 20 minuti [dopo un'operatività continua di 2 minuti lasciare raffreddare la batteria per 18 minuti].

I componenti elettrici sono classificati IP 51 e non sono impermeabili. Pulirli esclusivamente con un panno umido e non usare un getto acqua corrente per evitare che l'acqua possa penetrare nei collegamenti dei cavi.

Se il prodotto è rimasto a lungo immagazzinato in un luogo molto freddo, lasciarlo 2 ore a temperatura ambiente e, prima di usarlo, asciugare l'eventuale condensa.

SEZIONE 9.9: BASCULAMENTO – BASE HIGH-LOW SMALL

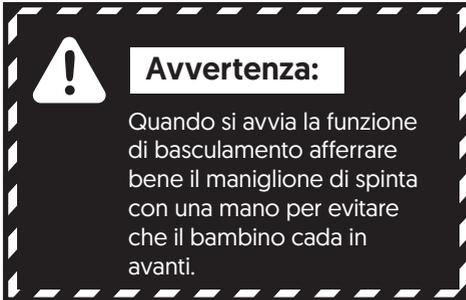

Mantenere sempre la leva di basculamento nella sua posizione bloccata per evitare che possa essere attivata involontariamente e causare sobbalzi con conseguenti possibili lesioni al bambino.

Quando si attiva la funzione di basculamento afferrare saldamente il maniglione di spinta.

Verificare sempre con il terapista che la funzione di basculamento non possa in alcun modo causare l'ostruzione delle vie aeree del bambino.



Avvertenza: La funzione di basculamento deve essere avviata solo su superfici in piano. Se si avvia la funzione di basculamento su una superficie in pendenza con la seduta in posizione elevata, il sistema di seduta corre il rischio di diventare instabile. La funzione di basculamento può essere avviata anche quando il bambino è seduto. Prima di procedere con la regolazione del basculamento del sistema di seduta accertarsi sempre di aver allacciato la cintura pelvica per evitare che il bambino possa scivolare in avanti sulla seduta.

Per sbloccare il basculamento tirare verso l'esterno e ruotare il perno di blocco **1**. Per avviare il basculamento premere la leva **2**. Per evitare movimenti improvvisi afferrare il sistema di seduta utilizzando la parte della seduta o le maniglie di spinta.

1



2



SEZIONE 9.10: BASCULAMENTO – BASE HIGH-LOW MEDIUM



Avvertenza:

Quando si avvia la funzione di basculamento afferrare bene il maniglione di spinta con una mano per evitare che il bambino cada in avanti.



Avvertenza: La funzione di basculamento deve essere avviata solo su superfici in piano. Se si avvia la funzione di basculamento su una superficie in pendenza con la seduta in posizione elevata, il sistema di seduta corre il rischio di diventare instabile. La funzione di basculamento può essere avviata anche quando il bambino è seduto. Prima di procedere con la regolazione del basculamento del sistema di seduta accertarsi sempre di aver allacciato la cintura pelvica per evitare che il bambino possa scivolare in avanti sulla seduta.

Per regolare il basculamento premere la leva posta sotto la base della seduta. Dopo aver stabilito l'angolazione desiderata lasciare la leva per bloccare la seduta in posizione. La funzione di basculamento può essere sbloccata anche con il bambino seduto.

Per bloccare la leva ruotare a destra il perno di blocco della leva per consentire al perno di bloccarsi in posizione **2**. Per facilitarne il blocco potrebbe essere necessario sollevare leggermente la leva. Per sbloccarla tirare il perno verso l'esterno e ruotarlo di 90°, a questo punto la leva può essere azionata **1**.



Mantenere sempre la leva di basculamento nella sua posizione bloccata per evitare che possa essere attivata involontariamente e causare sobbalzi con conseguenti possibili lesioni al bambino.

Quando si attiva la funzione di basculamento afferrare saldamente il maniglione di spinta.

Verificare sempre con il terapista che la funzione di basculamento non possa in alcun modo causare l'ostruzione delle vie aeree del bambino.

SEZIONE 9.11: BASCULAMENTO – BASE HIGH-LOW LARGE



Avvertenza: La funzione di basculamento deve essere avviata solo su superfici in piano. Se si avvia la funzione di basculamento su una superficie in pendenza con la seduta in posizione elevata, il sistema di seduta corre il rischio di diventare instabile. La funzione di basculamento può essere avviata anche quando il bambino è seduto. Prima di procedere con la regolazione del basculamento del sistema di seduta accertarsi sempre di aver allacciato la cintura pelvica per evitare che il bambino possa scivolare in avanti sulla seduta.

Per regolare l'angolo di basculamento tirare la leva presente sul maniglione di spinta **1**, inclinare la seduta nella posizione desiderata e, al termine, lasciare la leva.



Mantenere sempre la leva di basculamento nella sua posizione bloccata per evitare che possa essere attivata involontariamente e causare sobbalzi con conseguenti possibili lesioni al bambino.

Quando si attiva la funzione di basculamento afferrare saldamente il maniglione di spinta.

Verificare sempre con il terapista che la funzione di basculamento non possa in alcun modo causare l'ostruzione delle vie aeree del bambino.

SEZIONE 9.12: REGOLAZIONE DELLA RESISTENZA DINAMICA DELLO SCHIENALE

La resistenza associata all'aumento dell'angolazione dello schienale può essere regolata modificando la pressione dell'aria in base al peso, alla posizione di seduta, al design della seduta e alle esigenze personali del bambino.

La pressione dell'aria viene regolata da una pompa pneumatica **A** (fornita con lo schienale dinamico) applicata alla valvola dell'aria principale del sistema dinamico **B**.




Per aumentare la pressione dell'aria pompare aria nella valvola fino al raggiungimento della pressione desiderata. Per diminuire la pressione premere la valvola di sfiato dell'aria sulla pompa fino a raggiungere la pressione desiderata.



Avvertenza: Il range di pressione va da 50 a 250 psi [3,45-17,24 bar]. In un sistema di ammortizzazione non compresso, non superare mai la pressione di 250 psi [17,24 bar]. Il superamento della pressione massima dell'aria oltre 250 psi [17,24 bar] potrebbe provocare lesioni gravi.

SEZIONE 9.13: REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DI RIPOSIZIONAMENTO DELO SCHIENALE DINAMICO


Per regolare la velocità di riposizionamento dello schienale dinamico ruotare la rotellina rossa **A** dell'ammortizzatore dinamico. Una rotazione in senso orario diminuisce la velocità di riposizionamento, mentre una rotazione in senso antiorario la aumenta.

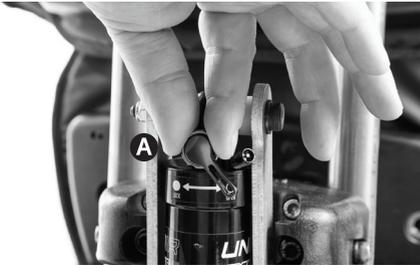

La forza da applicare per il riposizionamento dello schienale dipende dal peso del bambino, dalla costante della molla impostata dalla pressione dell'aria, dalla frequenza d'uso, dallo stile di seduta e dalle esigenze personali. Il modo migliore per regolare la forza necessaria da applicare per il riposizionamento dello schienale è portarla al minimo ed effettuare una prova con il bambino accomodato su BeMe. Aumentare lentamente la forza fino a quando il bambino si sente a suo agio e in sicurezza senza che le sospensioni lo spingano eccessivamente in avanti.

SEZIONE 9.14: IMPOSTAZIONE DELLO SCHIENALE DINAMICO SU “FIRM” (STABILE)

Per bloccare lo schienale dinamico spostare la leva blu dell'ammortizzatore dinamico nella posizione “Lock” (Bloccato) **A**. Per sbloccare lo schienale dinamico spostare la leva nella posizione “Open” (Aperto) **B**.

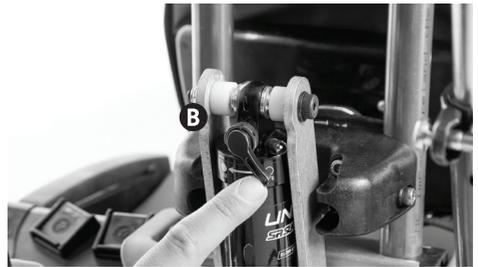

Avvisi di sicurezza: Quando si usa BeMe per il trasporto su un veicolo, la leva blu deve essere impostato su “Firm” (Stabile).


SEZIONE 9.15: REGOLAZIONE DELL'IMBRAGATURA DYNAMIC BUTTERFLY

Per regolare l'imbragatura Dynamic Butterfly modificare la quantità di cinghia che passa attraverso le fibbie a camma sul retro della base della seduta **A** o della parte superiore dello schienale **B**. In alternativa, regolare la lunghezza delle cinghie dei cinturini dell'imbragatura in corrispondenza dei quattro angoli dell'imbragatura stessa **C**.



SEZIONE 9.16: MONTAGGIO E RIMOZIONE DEL TAVOLINO

Prima di inserire il tavolino accertarsi di aver prima allentato la vite a farfalla **A** situata sulla parte anteriore dei braccioli. Per applicare il tavolino inserire i tubi al centro del bracciolo e accertarsi che fuoriescano dal lato opposto dell'elemento ricettore. Dopo aver sistemato il tavolino nella posizione corretta stringere nuovamente le viti a farfalla **A**.

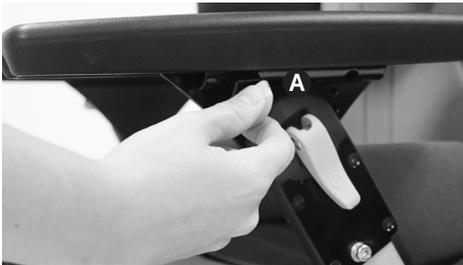

Quando si inserisce il tavolino, fare attenzione a non intrappolare le mani o le braccia del bambino.

Non usare mai il tavolino per far girare o spingere il sistema di seduta.

Non appoggiare sul tavolino oggetti con una temperatura superiore a 40 °C.

Tenere presente che il tavolino è a uso esclusivo del bambino. Non appoggiarsi o depositare sul tavolino oggetti di peso superiore a 8 kg.



Prestare attenzione allo spazio vuoto sotto il tavolino; il bambino potrebbe infilare le dita fra la staffa di metallo e la base del tavolino di plastica.

Per rimuovere il tavolino ripetere la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 9.17: REGOLAZIONE DELL'ANGOLAZIONE DEL TAVOLINO

Per regolare l'angolazione del tavolino individuare la leva a camma, **A** della parte centrale del bracciolo. Sollevare la leva a camma per sbloccare e modificare l'angolazione del tavolino/bracciolo **B** fino a raggiungere la posizione desiderata. Fissare l'angolazione abbassando la leva a camma in posizione bloccata **C**.



Quando si inserisce il tavolino, fare attenzione a non intrappolare le mani o le braccia del bambino.


Non usare mai il tavolino per far girare o spingere il sistema di seduta.

Non appoggiare sul tavolino oggetti con una temperatura superiore a 40 °C.

Tenere presente che il tavolino è a uso esclusivo del bambino. Non appoggiarsi o depositare sul tavolino oggetti di peso superiore a 8 kg.


SEZIONE 9.18: REGOLAZIONE DELL'ANGOLAZIONE DEL BRACCIOLO

Per regolare l'angolazione del bracciolo agire sulla leva a camma **A** al centro del bracciolo. Sollevarla per sbloccare e modificare l'angolazione del bracciolo **B** fino a raggiungere la posizione desiderata. Fissare l'angolazione abbassando la leva a camma in posizione bloccata **C**.

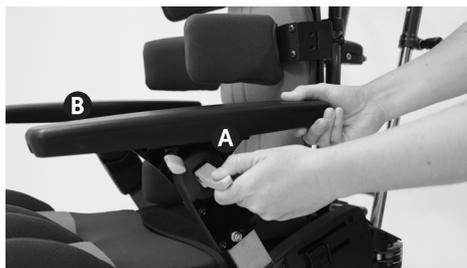

SEZIONE 9.19: REGOLAZIONE DELLA PEDANA RIBALTABILE

Per ribaltare verso l'alto la pedana unica individuare il pistone **A** situato sotto la pedana e tirarlo verso l'esterno per liberare il perno. Ruotare la pedana verso l'alto **B** e rilasciare il pistone per consentire al perno di bloccarsi in posizione rivolta verso l'alto.

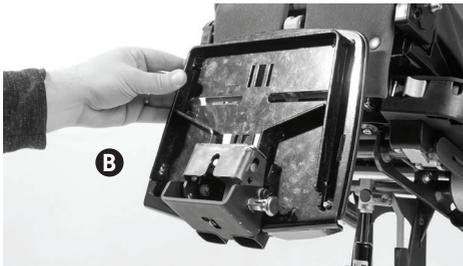


Per abbassare la pedana unica ribaltabile verso l'alto eseguire la procedura in ordine inverso.

Le pedane separate non prevedono alcun meccanismo di blocco. Per ribaltare verso l'alto le singole pedane è sufficiente ruotarle verso l'alto.


SEZIONE 9.20: REGOLAZIONE DEI SANDALETTI

Per posizionare e mantenere i piedi del bambino in posizione nei sandaletti, utilizzare i cinturini di Velcro forniti. I cinturini devono essere posizionati sopra il collo **A** e le dita **B** del piede. Il cinturino anteriore può essere fatto scorrere in una delle due fessure laterali dei sandaletti per adattarli alla dimensione del piede del bambino.

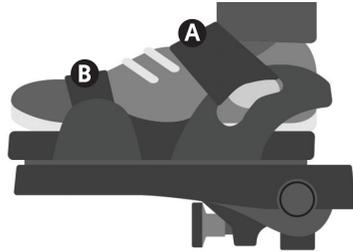

Se il bambino indossa sandali o altre calzature leggere, verificare che i cinturini non possano causare irritazioni della pelle.

Per regolare la posizione dei sandaletti sulla pedana allentare la manopola **C** e spostarli nella posizione desiderata **D**. Quindi serrarla per bloccarli in posizione.

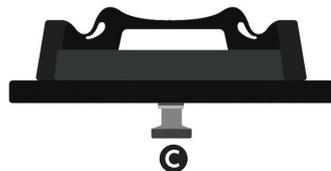


SEZIONE 9.21: REGOLAZIONE DELLE CAVIGLIERE

Per regolare i cinturini dei sandaletti agire sulla parte in Velcro sistemandoli sul collo del piede **A** e attorno alle caviglie **B**.



SEZIONE 9.22: REGOLAZIONE DEI CINTURINI PER LE CAVIGLIE

Per regolare i cinturini per le caviglie agire sulle parti in Velcro sistemandoli attorno alla caviglia **A** e regolare la lunghezza del cinturino attraverso la fibbia Tri-Glide **B**.

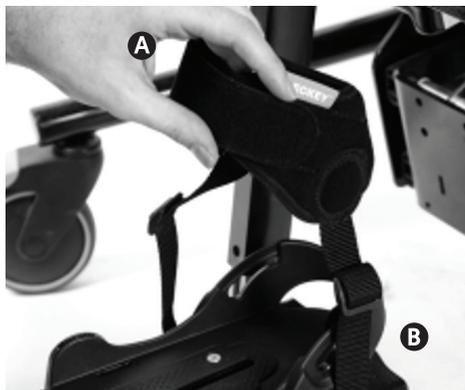

SEZIONE 9.23: ATTIVAZIONE DEI FRENI

Per attivare i freni su una base per interni premere con il piede sul pedale del freno **A** fino a quando si sente in "clac". Ripetere l'operazione su tutte quattro le ruote piroettanti. Per rilasciare i freni toccare con il piede la parte superiore del pedale per riportarlo nella sua posizione standard originale sbloccata.



Per attivare i freni su una base per uso interno e/o esterno, oppure a una base high-low large, spingere verso il basso la leva del freno manuale **B**, situata davanti alla ruota posteriore. Per rilasciare i freni tirare la leva verso l'alto. Le ruote anteriori di una base per interni e/o esterni o delle basi high-low large non sono dotate di freni.



Per attivare i freni su una base per la mobilità fare riferimento alle istruzioni fornite dal fabbricante.

SEZIONE 9.24: REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL MANIGLIONE DI SPINTA


Per regolare l'altezza del maniglione di spinta ruotare entrambe le leve di blocco **A** sui tubi del maniglione di spinta per allentarle e alzare o abbassare il maniglione fino a raggiungere la posizione desiderata. Per fissarle in posizione ruotare nuovamente le leve di blocco.



SEZIONE 9.25: MONTAGGIO E RIMOZIONE DEL CUNEO DIVARICATORE

Il cuneo divaricatore può essere applicato solo sulle sedute Basic. **Il corretto orientamento del cuneo divaricatore prevede che la parte più sottile sia rivolta verso il bambino.**


Per applicare il cuneo divaricatore agire sulla leva a camma di blocco della parte anteriore della seduta **A** e posizionare la staffa del cuneo divaricatore nell'apertura del cuscino della seduta e nella fessura dell'elemento ricettore della seduta **B**. Per fissarlo in posizione spingere completamente la leva verso il basso **C**. Orientare il cuneo divaricatore in modo che si trovi all'esterno dell'area della seduta.

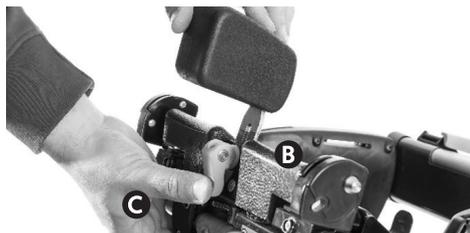


Se, con il passare del tempo, il meccanismo di aggancio dovesse allentarsi, si potranno sempre serrare di nuovo le viti (rotazione in senso orario) situate in corrispondenza della leva di blocco quando si trova in posizione sollevata **A**. Per rimuovere il cuneo divaricatore eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 9.26: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLE GUIDE FEMORALI

Per installare una guida femorale, inserire il tubo della guida femorale **A** nell'elemento ricettore della seduta **B** e premere verso il basso. Verificare che la guida femorale si sia correttamente bloccata tirandola verso l'alto.

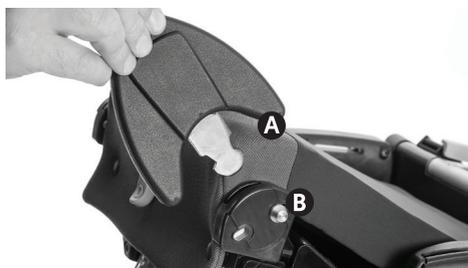

Per rimuovere la guida femorale fare scorrere diagonalmente verso l'alto il pulsante di rilascio argentato **C** ed estrarla dalla fessura.

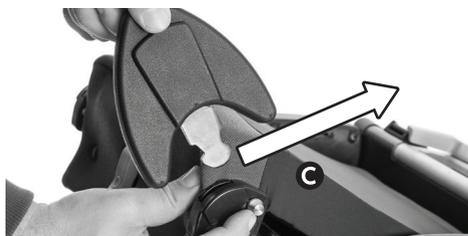

SEZIONE 9.27: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLO SCHIENALE

Per applicare lo schienale, individuare l'elemento ricettore dello schienale della parte posteriore della base della seduta **A**. Aprire le alette di blocco **B** della parte posteriore della base della seduta tirandole **orizzontalmente verso l'esterno** e, quindi, ruotarle in alto.



Posizionare la base dello schienale **C** nell'elemento ricettore accertandosi che sia completamente inserita. Per fissare in posizione lo schienale ruotare in basso le alette **D** e spingerle verso l'interno **E**.

Verificare che lo schienale sia installato correttamente tirandolo verso l'alto e muovendolo avanti e indietro.

SEZIONE 10: ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA CURA

Manutenzione

Per la pulizia si raccomanda di usare esclusivamente acqua calda e un detergente non abrasivo. Non usare mai solventi organici o liquidi per il lavaggio a secco.

Teli di rivestimento e parti in tessuto

I rivestimenti dei cuscini possono essere rimossi, lavati in lavatrice a 60 °C (centrifuga lenta, quando possibile) e asciugati a bassa temperatura. Tenere presente che dopo ripetuti lavaggi a 60 °C il tessuto elasticizzato può essere soggetto a scolorimento senza che le prestazioni ne risentano. Per evitare lo scolorimento si consiglia di usare temperature più basse.

Rimuovere i componenti in schiuma dai rivestimenti qui indicati prima di sottoporli a lavaggio:

- Schienale Basic
- Cuscini

Tutti gli altri rivestimenti morbidi potranno essere lavati in lavatrice così come sono, dopo aver rimosso gli eventuali sistemi di fissaggio.

1. I teli di rivestimento e le parti in tessuto possono essere puliti a mano senza rimuoverli. Per la pulizia si raccomanda di usare esclusivamente acqua calda e un detergente non abrasivo.
2. Caratteristica innovativa – Il tessuto elasticizzato è impermeabile ai liquidi per 30 minuti per consentirne la pulizia.

3. Rimuovere eventuali macchie non appena possibile con un panno assorbente, un asciugamano o una spugna. Per l'eliminazione di macchie ordinarie o di perdite di liquidi minori è sufficiente utilizzare una spugna con acqua calda e sapone comune. Per evitare di espandere ulteriormente la macchia, non bagnare eccessivamente il tessuto.
4. Per eliminare macchie più resistenti si possono usare agenti detergenti antisettici. In questo caso, tuttavia, potrebbe essere necessario abbinarli a un solvente sicuro come l'alcol isopropilico o acquaragia minerale.
5. Le imbragature pelviche e per il torace possono essere lavate in lavatrice a 60 °C. Prima di procedere al lavaggio accertarsi di aver rimosso tutti i bulloni e gli elementi di fissaggio che potrebbero danneggiare la lavatrice. Riporli in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
6. Prima dell'uso, accertarsi sempre che il prodotto sia asciutto.

Componenti di metallo e di plastica

1. Per la pulizia quotidiana usare acqua saponata, oppure uno spray antibatterico.
2. Per la pulizia della base usare un panno umido e mai un getto d'acqua diretto.
3. Per la pulizia dei componenti di plastica o di metallo non usare solventi.
4. Prima di riutilizzare il prodotto accertarsi che il sia completamente asciutto.

SEZIONE 11: ISPEZIONE QUOTIDIANA DEL PRODOTTO

[Terapisti - Genitori - Assistenti]

Per garantire la sicurezza del prodotto si raccomanda che i terapeuti, gli assistenti o i genitori effettuino controlli quotidiani su tutte le parti visibili. Qui di seguito vengono indicati i controlli quotidiani raccomandati.

1. Verifica dell'assenza di movimento laterale od oscillazione di un qualsiasi componente mobile. Verifica della presenza e corretto fissaggio di tutte le manopole e bulloni di regolazione.
2. Verifica di segnali di usura o di lacerazioni sui teli di rivestimento e sui cinturini di Velcro.
3. Verifica del corretto funzionamento del sistema di blocco delle ruote piroettanti.
4. Verifica del corretto fissaggio della struttura centrale della seduta alla base. Verifica della corretta operatività delle leve di blocco per la reclinazione dello schienale.
5. Verifica della corretta applicazione della cintura pelvica intorno al bambino per impedire che possa scivolare in avanti sulla seduta.
6. Verifica del corretto posizionamento della pedana.

In caso di dubbi sull'uso in condizioni di sicurezza del prodotto Leckey, oppure in caso di guasto di un componente, interrompere l'uso del prodotto e contattare nel più breve tempo possibile il Rivenditore o il Servizio Clienti Sunrise Medical.

SEZIONE 12: ISPEZIONE ANNUALE DEL PRODOTTO

[Terapista - Tecnico - Specialista di prodotto Leckey - Rivenditore]

Sunrise Medical raccomanda di sottoporre il prodotto a un'ispezione approfondita almeno una volta l'anno, oppure ogni volta che il prodotto viene riassegnato. L'ispezione deve essere eseguita da un tecnico competente e adeguatamente formato sull'uso del prodotto e deve prevedere, per lo meno, i seguenti controlli/verifiche.

1. Verifica dell'assenza di movimento laterale od oscillazione di un qualsiasi componente mobile. Verifica della presenza e corretto fissaggio di tutte le manopole e bulloni di regolazione.
2. Verifica della presenza di tutte le manopole a cricchetto, manopole, dadi, bulloni e fibbie di plastica e sostituzione di elementi mancanti. Prestare particolare attenzione agli elementi seguenti:
 - Bulloni di fissaggio dell'appoggiatesta.
 - Bulloni di regolazione dell'altezza e dell'angolazione dello schienale.
 - Bulloni per la regolazione della profondità della seduta.
 - Attacchi della cintura pelvica/supporti per il bacino.
 - Regolazione dell'altezza e dell'angolo della pedana.
3. Verifica del corretto funzionamento del meccanismo di regolazione dell'altezza della base high-low. Se la base prevede un funzionamento a pedale, verificare che rilasciando il pedale l'altezza della seduta non si modifichi. Inoltre, verifica del corretto innesto del perno di blocco per prevenire regolazioni involontarie dell'altezza della base.
4. Regolare la seduta al suo valore massimo di basculamento e verificare che la leva di blocco blocchi la seduta in condizioni di sicurezza ai vari livelli di basculamento possibili.
5. Verifica che nelle aree dove la struttura centrale della seduta è abbinata alla base i componenti di metallo non presentino usure o crepe.
6. Sollevare la base per verificare il corretto funzionamento di ogni singola ruota piroettante. Accertarsi che possano girare liberamente e rimuovere la sporcizia dalle ruote in gomma. Verificare che i freni blocchino bene le ruote.
7. Verifica visiva della struttura del prodotto, prestando particolare attenzione ai punti di saldatura della base, per rilevare la presenza di possibili segnali di fatica o di crepe attorno alle saldature.
8. Sunrise Medical raccomanda di stilare e conservare un rapporto scritto di tutte le ispezioni annuali eseguite.

In caso di dubbi sull'uso in condizioni di sicurezza del prodotto Leckey, oppure in caso di guasto di un componente, interrompere l'uso del prodotto e contattare nel più breve tempo possibile il Rivenditore o il Servizio Clienti Sunrise Medical.

SEZIONE 13: RIASSEGNAZIONE DEI PRODOTTI LECKEY

(Terapisti - Genitori - Assistenti)

La maggior parte dei prodotti Leckey è stata valutata e realizzata per adattarsi alle esigenze specifiche del bambino. Prima di riassegnare un prodotto si raccomanda che il terapeuta che prescrive il prodotto esegua una verifica di compatibilità dell'apparecchiatura per il nuovo utente e garantisca che il prodotto da riassegnare non sia stato modificato o contenga accessori speciali.

Prima della riassegnazione il prodotto deve essere sottoposto a una ispezione tecnica approfondita. Questa ispezione deve essere eseguita da una persona tecnicamente competente e adeguatamente formata sull'uso e l'ispezione del prodotto. Per l'elenco dei controlli da effettuare si rimanda alla Sezione 12.

Accertarsi, inoltre, che il prodotto sia stato pulito approfonditamente così come indicato nella Sezione 10 di questo manuale.

Nota: Prima di procedere con la disinfezione/sanificazione, pulire il prodotto per eliminare possibili accumuli di sporcizia.

1. Quando possibile, si raccomanda di usare un sistema di disinfezione "Fogger" automatizzato per irrorare completamente le superfici del prodotto con un agente disinfettante. Prima di usare un prodotto per la pulizia, leggere e attenersi strettamente alle istruzioni del produttore.

2. Se non è disponibile un sistema di disinfezione automatizzato, pulire tutte le superfici del prodotto con salviette disinfettanti per superfici, oppure con un panno morbido imbevuto di liquido disinfettante. Prodotti adatti: soluzione di alcol isopropilico (IPA) al 70%, alcol al 70% o candeggina diluita. Attenersi comunque alle istruzioni del produttore del prodotto scelto per la pulizia. Il rivestimento e le parti in tessuto del prodotto devono essere accuratamente puliti attenendosi alle istruzioni fornite nella sezione "Istruzioni per la pulizia e la cura" di questo manuale.

Consegnare anche una copia del Manuale d'uso fornito con il prodotto. Sul sito Web www.SunriseMedical.it è possibile richiedere e ottenere una copia del manuale.

Sunrise Medical raccomanda di stilare e conservare un rapporto scritto di tutte le ispezioni effettuate nel corso della riassegnazione del prodotto.

In caso di dubbi sull'uso in condizioni di sicurezza del prodotto Leckey, oppure in caso di guasto di un componente, interrompere l'uso del prodotto e contattare nel più breve tempo possibile il Rivenditore o il Servizio Clienti Sunrise Medical.

SEZIONE 14: ASSISTENZA TECNICA

L'assistenza su tutti i prodotti Leckey deve essere eseguita esclusivamente da tecnici competenti e adeguatamente formati sull'uso del prodotto.

Tutte le richieste di assistenza internazionali devono essere indirizzate al distributore Leckey appropriato, che si occuperà dell'assistenza al cliente.

Per ulteriori informazioni sui distributori Leckey accedere al sito Web **www.leckey.com**

SEZIONE 15: INFORMAZIONI TECNICI – SISTEMA METRICO

Struttura centrale della seduta					
	Small	Medium	Large	Medium Long	Large Long
Profondità seduta (mm)	170*-325	275-390	350-475	325-440	400-525
Larghezza massima della seduta (Senza supporti per il bacino) (mm)	275	325	415	325	415
Larghezza massima della seduta (Contoured) (mm)	250	300	400	300	400
Larghezza femorale su seduta Split (mm)		90-125	110-160	90-125	110-160
Portata massima (kg)**	35	50	70	50	70

Schienale			
	Small	Medium	Large
Altezza schienale (mm)	360-470	390-520	500-650
Altezza schienale con seduta Contoured (mm)	370-480	400-530	475-625
Larghezza (mm)	130-230	200-300	225-350
Larghezza dei supporti "Standard" per il bacino (mm)	165-230	200-260	250-350
Larghezza dei supporti "Slim" per il bacino (mm)	190-255	225-285	275-375
Angolo dello schienale (gradi)	+10 a -25	+10 a -25	+10 a -25
Portata massima (kg)**	35	50	70

Pedana			
	Small	Medium	Large
Lunghezza pedane con Seduta Basic/ Split (mm)	185-285	280-450	290-510
Lunghezza pedane con Seduta Contoured (mm)	185-285	290-460	300-520
Dorsiflessione massima (gradi)	+/- 10	+/- 10	+/- 10
Flessione plantare massima (gradi)	+/- 10	+/- 10	+/- 10

Base						
	Small	Medium Int - A Gas	Medium Int - Idraulica	Medium Int/Est	Large - Idraulica	Large - Elettronica
Ingombro - Larghezza (mm)	535	690	690	740	800	800
Ingombro - Lunghezza (mm)	635	840	840	880	770/850***	770
Range basculamento (gradi)	-10 a 30	-10 a 25	-10 a 25	-10 a 25	-10 a 30	-10 a 30
Da terra a superficie seduta - Minimo	270	340	325	380	460	460
Da terra a superficie seduta - Massimo	650	655	615	670	640	640
Portata massima (kg)**	35	50	50	50	70	70

* La profondità seduta 170-220 mm richiede uno spessore.

** Il peso del bambino deve essere minore di quelli della struttura centrale della seduta, della base e dello schienale presi singolarmente.

*** Compreso il pedale.

INFORMAZIONI TECNICI - SISTEMA IMPERIALE

Struttura centrale della seduta					
	Small	Medium	Large	Medium Long	Large Long
Profondità seduta (pollici)	6,7-12,8	10,8-15,4	13,8-18,7	12,8-17,3	15,7-20,7
Larghezza massima della seduta (Senza supporti per il bacino) (pollici)	10,8	12,8	16,3	12,8	16,3
Larghezza massima della seduta (Contoured) (pollici)	9,8	11,8	15,7	11,8	15,7
Larghezza femorale con seduta Split (pollici)		3,57-4,9	4,3-6,3	3,5-4,9	4,3-6,3
Portata massima (lb)**	77,175	110,25	154,35	110,25	154,35

Schienale			
	Small	Medium	Large
Altezza schienale (pollici)	14,2-18,5	15,4-20,5	19,7-25,6
Altezza schienale con Seduta Contoured (pollici)	14,6-18,9	16,1-19,7	20,1-25,2
Larghezza (pollici)	5,1-9,1	7,9-11,8	8,9-13,8
Larghezza dei supporti "Standard" per il bacino (pollici)	6,5-9,1	7,9-10,2	9,8-13,8
Larghezza dei supporti "Slim" per il bacino (pollici)	7,5-10	8,9-11,2	10,8-14,8
Angolo dello schienale (gradi)	+10 a -25	+10 a -25	+10 a -25
Portata massima (lb)**	77,175	110,25	154,35

CONTINUA



Pedana			
	Small	Medium	Large
Lunghezza pedana con seduta Basic/Split (pollici)	7,3-11,2	11-17,7	11,4-20,1
Lunghezza pedana con seduta Contoured (pollici)	7,3-11,2	11,4-18,1	11,8-20,5
Dorsiflessione massima (gradi)	+/- 10	+/- 10	+/- 10
Flessione plantare massima (gradi)	+/- 10	+/- 10	+/- 10

Base						
	Small	Medium Int - A Gas	Medium Int - Idraulica	Medium Int/Est	Large - Idraulica	Large - Elettronica
Ingombro - Larghezza (pollici)	21,1	27,2	27,2	29,1	31,5	31,5
Ingombro - Lunghezza (pollici)	25	33,1	33,1	34,6	27,6/33,5***	30,3
Range basculamento (gradi)	-10 a 30	-10 a 25	-10 a 25	-10 a 25	-10 a 30	-10 a 30
Da terra a superficie seduta - Minimo	10,6	13,3	12,8	15	18,1	18,1
Da terra a superficie seduta - Massimo	25,6	25,8	24,2	26,3	25,2	25,2
Portata massima (lb)**	77,2	110,3	110,3	110,3	154,4	154,4

* La profondità seduta 6,7-8,7 pollici richiede uno spessore.

** Il peso del bambino deve essere minore di quelli della struttura centrale della seduta, della base e dello schienale presi singolarmente.

*** Compreso il pedale.

SPECIFICHE TECNICHE:

Caratteristica	Parametro	Valore
Marca e modello	Attuatore	LINAK 281209-01
	Batteria	LINAK BA18021-00
	Controllore manuale	LINAK HB41000-00004
	Caricabatteria	Caricabatterie LINAK CH01. Utilizza esclusivamente questo caricabatterie
Elevazione della seduta	Ciclo di lavoro	Massimo 10%, oppure 2 minuti consecutivi seguiti da 18 minuti di pausa
	Potenza attuatore	Spinta 3500N, Trazione 2000N
	Velocità operativa attuatore	4,7 mm/sec a pieno carico
	Livello rumore	48 dB[A]
Ambiente	Classificazione IP	IP 51 (non impermeabile, pulire esclusivamente con un panno umido)
	Funzionamento	da +5°C a 40°C Umidità relativa (RH) da 20% a 80%, non condensante
	Trasporto e immagazzinamento	-da 10°C a 50°C Umidità relativa (RH) da 20% a 80%, non condensante
		Se il prodotto è rimasto a lungo immagazzinato, lasciarlo 2 ore a temperatura ambiente.
	Altitudine s.l.m.	Max 3000 m
Componenti elettronici	Tensione operativa attuatore	24 V
	Corrente operativa attuatore	Max 3,9 A
	Ingresso caricabatteria	100 – 240 Vac, 50/60 Hz
	Uscita caricabatteria	27,6 V c.c. ± 2%
	Corrente di carica	Max 500 mA
	Indicatori di ricarica sul caricabatterie	LED verde – Alimentazione di rete LED giallo – In ricarica. Ritorna verde a ricarica completata
Certificazione	IEM	IEC 60601-1-2:2014 per uso in ambienti domestici
	Sicurezza elettrica	IEC60601-1:2005/A1:2012

TABELLA DEI SIMBOLI

Simbolo	Significato
	Dispositivo Medico
	Leggere le Istruzioni per l'uso
	Marchio CE
	Marchio UKCA
	Avvertenza
	Fabbricante
	Numero di serie
	Codice del prodotto
	Portata massima
	Data di produzione
	Latex Free
	Identificazione univoca del dispositivo
	Crash test
	Lavabile in lavatrice - Temperatura acqua 40 °C
	Asciugatrice - Bassa temperatura
	Non stirare
	Non candeggiare

SEZIONE 16: DISIMBALLAGGIO E MONTAGGIO DEL SISTEMA DI SEDUTA

Verifica del contenuto della confezione

Al momento dell'acquisto di un sistema di seduta Leckey BeMe, tutti i componenti sono inseriti in buste di polietilene e debitamente etichettati. Estrarli con attenzione dalle scatole e verificare che siano presenti tutti i componenti ordinati.

Alcuni accessori dovranno essere montati prima di posizionare la seduta sulla base. Se si desidera posizionare BeMe su una base per la mobilità, è necessario prima installare sulla base la piastra di interfaccia per la base per la mobilità. Le istruzioni su come montare l'interfaccia su basi specifiche sono allegate alla piastra di interfaccia. Dopo aver verificato la presenza di tutti i componenti, si potrà iniziare a montare il sistema di seduta BeMe e abbinarlo alla sua base.



La sicurezza innanzitutto: Non lasciare le buste di polietilene a portata di bambino.

Strumenti


Per alcune regolazioni è necessario usare l'utensile multiplo o la chiave a brugola a braccio lungo forniti con ogni seduta.



SEZIONE 16.1: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELL'UNITÀ DI SEDUTA SULLA BASE


Quando si deve montare la struttura centrale della seduta regolare la base alla sua altezza massima per ridurre il rischio di dolori alla schiena. Per la regolazione dell'altezza della base fare riferimento alla Sezione 9 di questo manuale.

Prima di fissare la base della seduta accertarsi che il fermo di blocco della parte anteriore **A** sia in posizione di rilascio. Se il fermo di blocco è in posizione bloccata **B** procedere come segue.

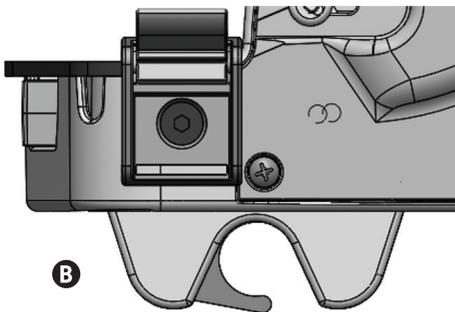


Fermo di blocco in posizione bloccata

Individuare i pulsanti grigi destro e sinistro del fermo di blocco situati in corrispondenza della parte anteriore della seduta **C**. Ruotare contemporaneamente i pulsanti verso il centro della seduta **D** e, quindi, premerli verso l'interno **E**. Al rilascio dei fermi si dovrebbe sentire un "clic".

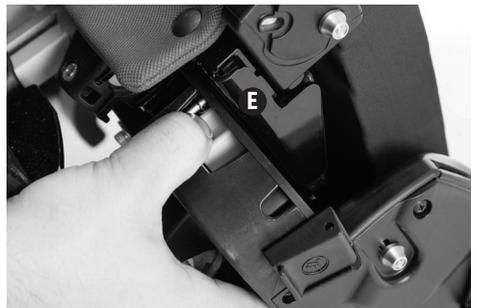

Dopo aver rilasciato i fermi di blocco procedere con il posizionamento della struttura centrale della seduta sulla base. Sollevare la struttura centrale della seduta con entrambe le mani afferrandola su entrambi i lati. Sul retro della struttura centrale della seduta vi sono due ganci **F** che devono essere allineati con il tubo posteriore dell'interfaccia della base **G**. Inclinare verso il basso la parte anteriore della seduta **H** premendola fino a quando si senta il "clic" del blocco in sede.

Verificare che sia ben bloccata tirando verso l'alto la parte anteriore e posteriore della struttura della seduta.

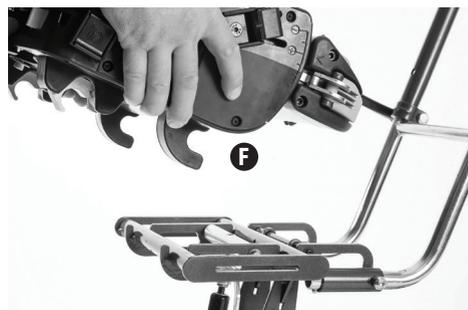



Accertarsi sempre che la base della seduta sia correttamente fissata.

Quando si fissa la seduta fare attenzione a non pizzicarsi le dita.

Per rimuovere la seduta, identificare e rilasciare i fermi di blocco come mostrato in **C**, **D** ed **E**. Quindi, ripetere la procedura precedente in ordine inverso da **H**, **G** ed **F**.

SEZIONE 16.2: MONTAGGIO E RIMOZIONE DEL MANIGLIONE DI SPINTA REGOLABILE IN ALTEZZA (SOLO BASI HIGH-LOW SMALL E MEDIUM)

Il maniglione di spinta deve essere applicato alla base high-low inserendo i due tubi inferiori negli alloggiamenti ricettori come qui illustrato. Il maniglione di spinta è dotato di pulsanti di sicurezza **A** che devono essere premuti quando si inseriscono i tubi inferiori. Spingere i tubi fino a quando i pulsanti di sicurezza fuoriescono dagli alloggiamenti ricettori **B**. Fissare in posizione il maniglione di spinta serrando i bulloni di fissaggio **C**.

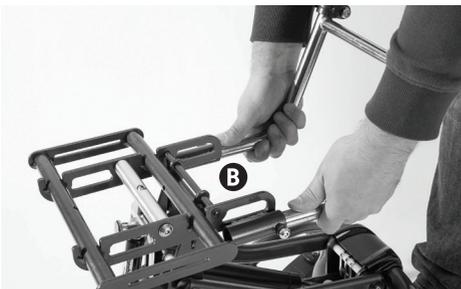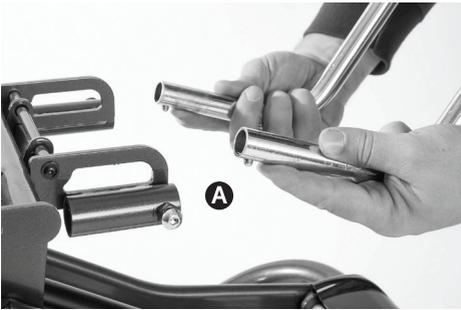



Per rimuovere il maniglione di spinta eseguire la procedura precedente in ordine inverso **C** premendo i pulsanti di sicurezza **D** ed estraendo i tubi dagli alloggiamenti ricettori inferiori.




Verificarli periodicamente per accertarsi che le manopole siano correttamente fissate, in particolare quando si sposta il prodotto su superfici che presentano una pavimentazione irregolare o in pendenza.

SEZIONE 16.3: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLE GUIDE FEMORALI



Prima di tutto fissare il meccanismo davanti alle due fessure anteriori della parte inferiore della base della seduta **A**. Verificare di aver inserito la rondella aperta **B** fra la rondella piatta più grande e la testa del bullone. Posizionare la piastra di blocco **C** fra la sagomatura e il dado. Fissare il dado in posizione in modo che la parte terminale del bullone sia a filo con la parte terminale del dado. La piastra di blocco deve potersi muovere liberamente lungo il bullone fra la sagomatura e il dado. Orientare la piastra di blocco in modo che la parte corta sia rivolta in avanti.

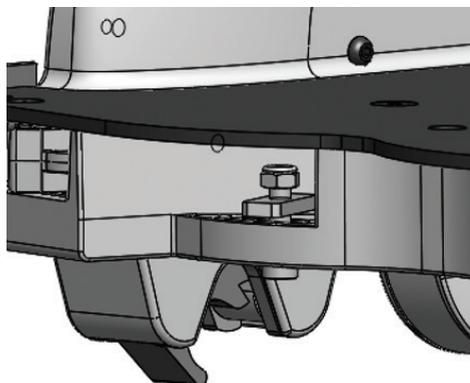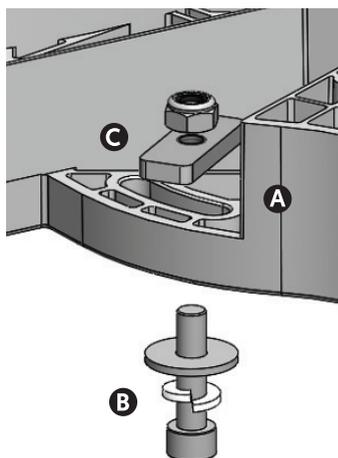

Il gruppo della guida femorale viene fornito con il componente destro e sinistro. Accertarsi di montare il componente destro e sinistro con il lato a filo rivolto verso l'esterno della seduta. **D**.

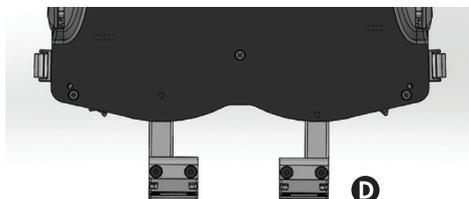


Inserire la guida femorale nell'alloggiamento della base della seduta **E** e verificare che la piastra di blocco sia trattenuta entro le guide femorali. Inserire la vite a testa conica nella piastra di copertura della base della seduta **F** e fissarla da sotto con il dado fornito e trattenuto dalla rientranza della sagomatura. Ripetere la procedura sull'altro lato.

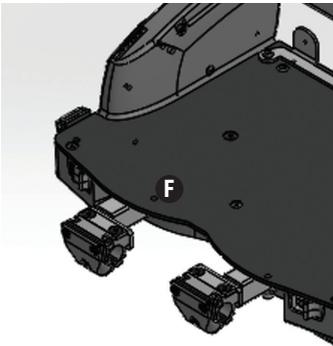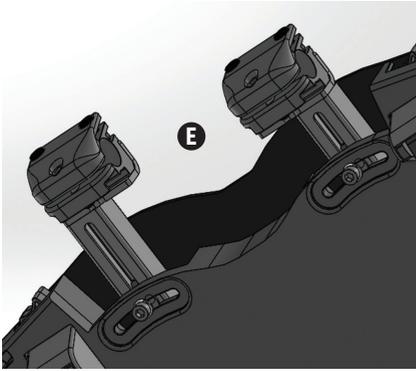

Per rimuovere le guide femorali eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 16.4: MONTAGGIO E RIMOZIONE DEL TUBO DELLA PEDANA

Prima di applicare il tubo superiore della pedana **A** verificare di aver allentato il morsetto **B**. Quindi, inserire la sporgenza rotonda del tubo superiore della pedana nel morsetto della parte interna e serrarlo con la chiave a brugola fornita **B**.

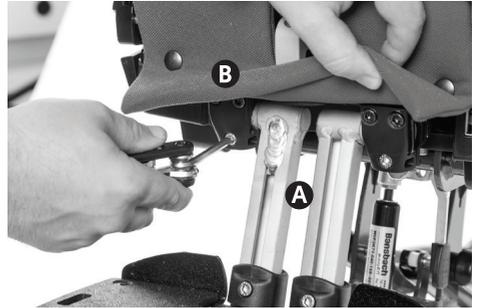



Per consentire il corretto inserimento della guida femorale superiore potrebbe essere necessario regolarne la posizione. Per farlo, allentare il bullone **C** situato nella parte inferiore della base della seduta e spostarlo in una posizione appropriata. Per alcune impostazioni potrebbe anche essere necessario rimuovere la piastra della seduta come descritto nella Sezione 16.5 "Montaggio e rimozione della Seduta Basic, Split e Contoured".



Per rimuovere il tubo superiore delle pedane eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 16.5: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLA SEDUTA BASIC, SPLIT E CONTOURED

La piastra anteriore delle sedute Basic, Split e Contoured deve essere fissata agli elementi ricettori della base della seduta. Per prima cosa individuare gli elementi sporgenti rivolti verso il basso della parte anteriore della piastra della seduta, **A**, e la fessura superiore degli elementi ricettori **B** all'estremità delle guide femorali. Inserire gli elementi sporgenti negli elementi ricettori destro e sinistro accertandosi che i due fori su ogni lato siano allineati. Per regolare la posizione della guida femorale potrebbe essere necessario apportare delle regolazioni per consentire di posizionare correttamente gli elementi ricettori. Per farlo, allentare il bullone **C** situato nella parte inferiore della base della seduta e spostarlo in una posizione appropriata. Dopo aver posizionato gli elementi sporgenti della piastra della seduta serrare completamente i 4 bulloni, **D**, con la chiave a brugola.

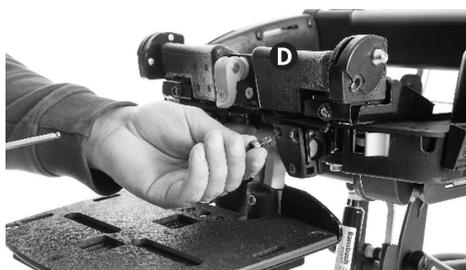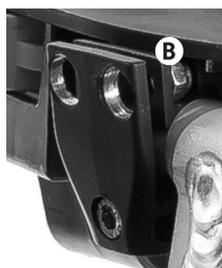

Per rimuovere la piastra della seduta eseguire la procedura in ordine inverso.



SEZIONE 16.6: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLA SEDUTA CONTOURED

La seduta Contoured deve essere fissata alla piastra della seduta con le fasce in Velcro situate sotto la seduta Contoured, **A**, e sulla parte superiore della piastra della seduta **B**.

Inserire le figure compreso il Velcro e l'allineamento anteriore.



Per montare la seduta Contoured sulla base della seduta allineare la parte anteriore della piastra della seduta alla parte anteriore in schiuma della seduta Contoured. Premere quindi verso il basso per fare aderire la parte in Velcro.

Per rimuovere la seduta Contoured eseguire la procedura in ordine inverso.

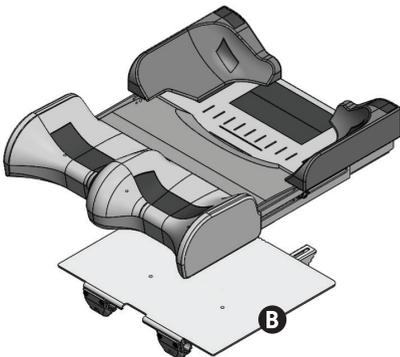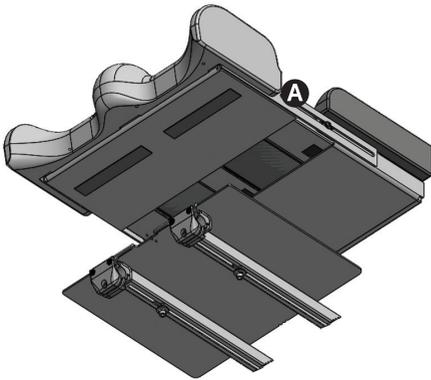

SEZIONE 16.7: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLO SCHIENALE

Per applicare lo schienale, individuare l'elemento ricettore dello schienale della parte posteriore della base della seduta **A**. Aprire le alette di blocco **B** della parte posteriore della base della seduta tirandole **orizzontalmente verso l'esterno** e, quindi, ruotarle in alto.

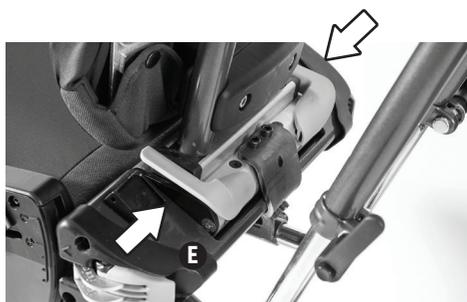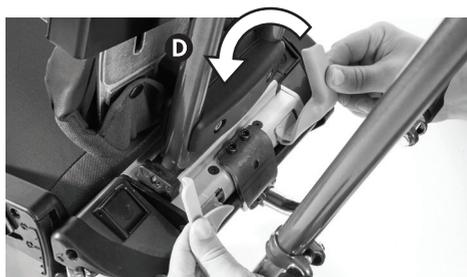

Posizionare la base dello schienale **C** nell'elemento ricettore accertandosi che sia completamente inserita. Per fissare in posizione lo schienale ruotare in basso le alette **D** e spingerle verso l'interno **E**.

Verificare che lo schienale sia installato correttamente tirandolo verso l'alto e muovendolo avanti e indietro.

Per rimuovere lo schienale eseguire la procedura in ordine inverso.



Accertarsi sempre che la base della seduta sia correttamente fissata.


SEZIONE 16.8: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLA PEDANA

Per montare la pedana orientare la piastra di blocco del tubo inferiore **A** con l'estremità più corta rivolta in avanti. Inserire il tubo inferiore nell'estremità del tubo superiore **B**, accertandosi di fissare la piastra di blocco tra le sporgenze del tubo superiore. Fissare in posizione serrando il bullone **C** con la chiave a brugola. Le pedane divise possono essere montate indipendentemente l'una dall'altra, mentre per la pedana unica è necessario che entrambi i tubi vengano inseriti contemporaneamente nei tubi superiori **D**.

Per rimuovere la pedana eseguire la procedura in ordine inverso.




Verificare sempre che la pedana sia adeguatamente fissata.

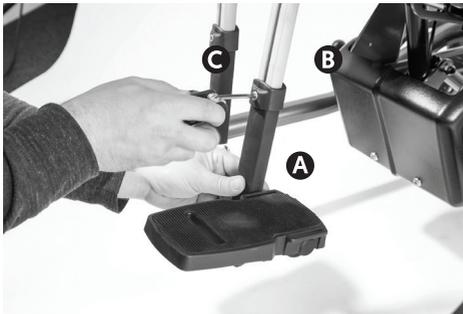

SEZIONE 16.9: MONTAGGIO E RIMOZIONE DEI BRACCIOLI

Per applicare il bracciolo individuare la scanalatura sul fianco della base del sedile **A** e sistemare il bracciolo orientando la vite a farfalla in avanti e verso l'esterno **B**. Inserire il tubo del bracciolo nella fessura e spingerlo verso il basso **C**. Verificare che il bracciolo si sia bloccato automaticamente provando a tirarlo verso l'alto.


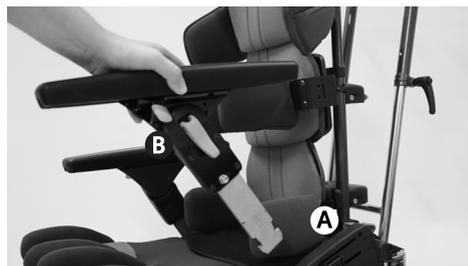


Per smontare il bracciolo fare scorrere il pulsante di rilascio verso la parte anteriore della seduta **D** ed estrarre il bracciolo dalla fessura **E**.





SEZIONE 16.10: MONTAGGIO E RIMOZIONE DEI SANDALETTI

Inserire il bullone di fissaggio **A** nella piastra di ritenzione **B**. Applicare la protezione di gomma **C** alla parte superiore e inferiore del sandaletto. Serrare le quattro viti **D** fornite. Per rimuovere o sostituire il bullone di fissaggio eseguire la procedura in ordine inverso.

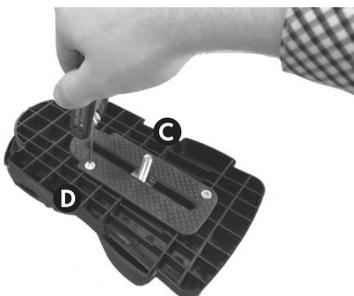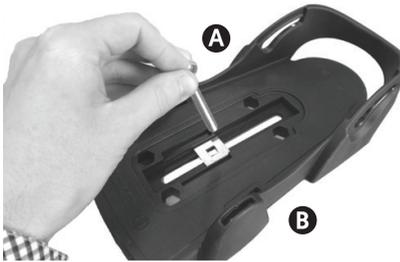

Per rimuovere i bulloni di fissaggio dei sandaletti eseguire la procedura in ordine inverso.


Per montare il sandaletto **A**, posizionarlo sulla pedana **B** e inserire il bullone di fissaggio, **C**, nella scanalatura della pedana. Per fissarlo, applicare la rondella di gomma, quella di metallo e la vite manuale **D** al bullone di fissaggio sotto la pedana e serrare.

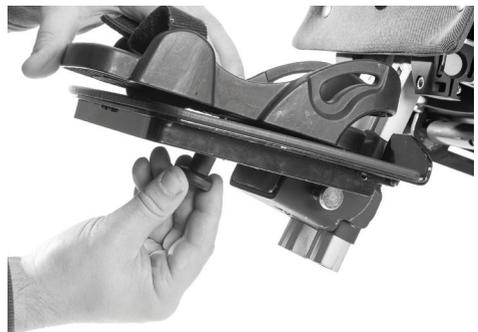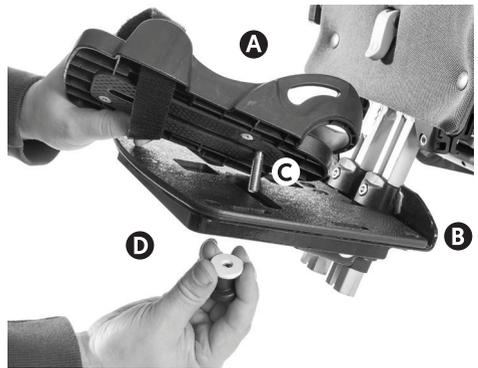

Per smontare i sandaletti eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 16.11: MONTAGGIO E RIMOZIONE DEI CINTURINI PER LE CAVIGLIE

Per montare i cinturini per le caviglie fare scorrere le cinghie attraverso le fessure laterali del sandaletto **A**. Riprendere la cinghia e farla passare attraverso la parte inferiore e, poi, superiore della fibbia Tri-Glide **B**. Infine, per fissare la cinghia in posizione, farla di nuovo passare attraverso la parte inferiore della fibbia Tri-Glide **C**. Tagliare la parte eccedente della cinghia.

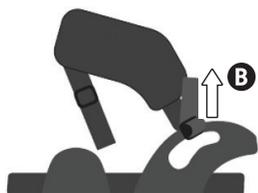

Per rimuovere i cinturini per le caviglie eseguire la procedura in ordine inverso.

I cinturini per le caviglie possono essere applicati sia alle pedane divise che alla pedana unica. Inserire la cinghia attraverso le fessure e fissarla con la fibbia Tri-Glide fornita con i cinturini per le caviglie.



SEZIONE 16.12: MONTAGGIO E RIMOZIONE DEI CINTURINI PER LE CAVIGLIE

Per applicare il cinturino per la caviglia fare passare le cinghie inferiore

A, e superiore **B** del cinturino dotate di bottoni automatici sotto e sopra l'arco posteriore del sandaletto e allacciarle **C**.



Per sganciare il cinturino per la caviglia eseguire la procedura in ordine inverso.

Inserire la fibbia Tri-Glide **D** applicata alle cinghie nere e bianche facendola passare attraverso la fessura laterale del sandaletto. Fare passare le cinghie nere e bianche di Velcro **E** attraverso la fessura opposta del sandaletto. Fare passare l'estremità di questa cinghia attraverso la fibbia Tri-Glide e ripiegarla due volte per fissarla in posizione con il Velcro **F**.


SEZIONE 16.13: MONTAGGIO E RIMOZIONE DEI SANDALETTI A STIVALE MORBIDI


Per montare i sandaletti a stivale morbidi fare passare le cinghie attraverso le fessure della pedana unica e fissarle con la fibbia Tri-Glide fornita.



SEZIONE 16.14: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLA STAFFA LATERALE – SCHIENALE BASIC

Per fissare la staffa laterale su uno schienale Basic, inserire il dado a "T" **A** nella fessura verticale della parte anteriore della piastra dello schienale. Se le imbottiture dello schienale sono state già posizionate potranno essere parzialmente spostate. Unire i due lati dei morsetti radiali (componenti circolari con denti a cocodrillo) **B**, e individuare la sporgenza nella fessura della staffa. Individuare la sporgenza opposta del morsetto radiale nella fessura dello schienale e accertarsi che il morsetto radiale sia a filo con la superficie della piastra **C**. Accertarsi che il dado a "T" si trovi fra le due superfici del morsetto radiale della parte anteriore dello schienale **D**.

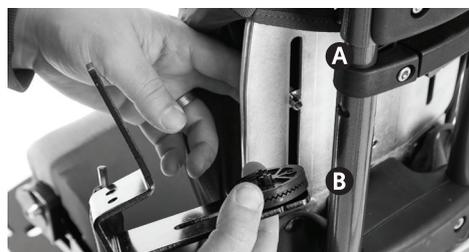

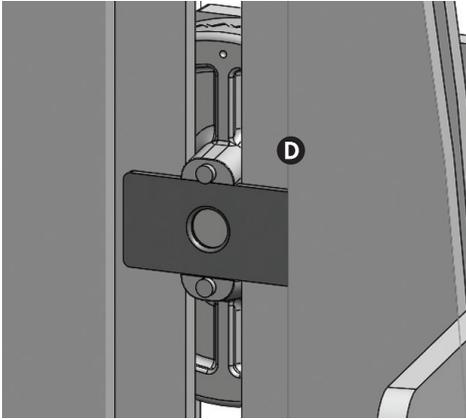

Posizionare la rondella aperta e, quindi, quella piatta sul bullone, inserirlo nel foro del morsetto radiale **E** e avvitarlo al dado a "T". Fissare in posizione con la chiave a brugola.



Per rimuovere la staffa laterale eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 16.15: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLA STAFFA LATERALE – SCHIENALE MODERATE E COMPLEX 3D

Per applicare la staffa laterale a schienali Moderate o Complex 3D, inserire il dado a "T" **A** nella fessura della staffa laterale. Unire le due parti dei morsetti radiali e inserire la sporgenza del morsetto radiale nella fessura sul lato opposto della staffa laterale, **B**. Accertarsi che il dado a "T" si trovi fra le due superfici del morsetto radiale **C**.





Posizionare i morsetti radiali nella rientranza anteriore della sagomatura toracica **D** accertandosi che la sporgenza del morsetto radiale si inserisca nella fessura laterale. Se allo schienale è stato applicato un cuscino, lo si potrà parzialmente spostare. Posizionare la rondella aperta e, quindi, quella piatta sul bullone, inserirlo nella fessura verticale sul retro della sagomatura toracica **E**, e avvitarlo al dado a "T". Fissare in posizione con la chiave a brugola.



Per rimuovere la staffa laterale eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 16.16: MONTAGGIO E RIMOZIONE DEL SUPPORTO LATERALE SLIMLINE

Per fissare il supporto laterale Slimline alla staffa laterale, prima posizionare la sporgenza lavorata nella fessura corrispondente del rivestimento di plastica del supporto laterale Slimline **A**. Posizionare il gruppo contro la superficie interna della staffa laterale in modo che la staffa possa entrare nella rientranza del rivestimento di plastica e che il componente lavorato possa essere sistemato nella fessura della staffa laterale **B**.

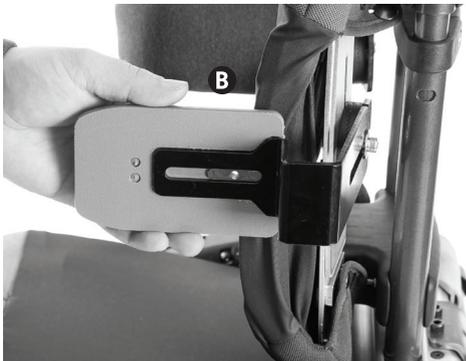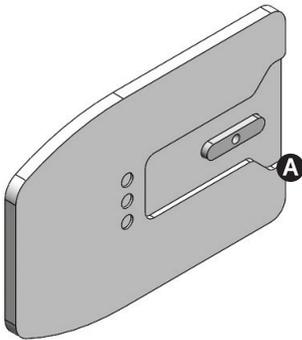

Posizionare la rondella aperta e, quindi, quella piatta sul bullone e inserirlo nel foro filettato del componente lavorato **C**. Fissare in posizione con la chiave a brugola.



Per rimuovere il sostegno laterale Slimline, eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 16.17: MONTAGGIO E RIMOZIONE DI SUPPORTI LATERALI COMPLEX

Per fissare i sostegni laterali Complex alla staffa laterale, prima posizionare il dado nell'incavo sagomato del sostegno laterale **A**. Posizionare il gruppo contro la superficie interna della staffa laterale in modo che la staffa possa entrare nella rientranza della parte sagomata di plastica **B**.




Posizionare la rondella aperta e, quindi, quella piatta sul bullone, inserirlo nel foro dell'incavo sagomato **C** e avvitarlo al dado. Fissare in posizione con la chiave a brugola.



Per rimuovere i sostegni laterali Complex eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 16.18: MONTAGGIO E RIMOZIONE DEL SOSTEGNO LATERALE FLESSIBILE

Il montaggio di un sostegno laterale flessibile richiede gli stessi elementi previsti per il sostegno laterale Slimline. Per fissare il supporto laterale Slimline alla staffa laterale, prima posizionare la sporgenza lavorata nella fessura corrispondente del rivestimento di plastica del supporto laterale Slimline **A**. Posizionare il gruppo contro la superficie interna della staffa laterale in modo che la staffa possa entrare nella rientranza del rivestimento di plastica e che il componente lavorato possa essere sistemato nella fessura della staffa laterale **B**.

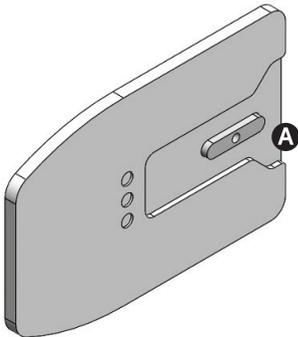



Posizionare la rondella aperta e, quindi, quella piatta sul bullone e inserirlo nel foro filettato del componente lavorato **C**. Fissare in posizione con la chiave a brugola.



Per rimuovere il sostegno laterale Slimline, eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 16.19: MONTAGGIO E RIMOZIONE DEL SUPPORTO LATERALE

Per montare il supporto laterale, allineare i due fori del dispositivo ai due fori corrispondenti della staffa laterale, **A**, accertandosi che la piega della piastra non sia rivolta verso il componente laterale. Inserire i due bulloni nei fori e fissare in posizione sul lato più lontano con due dadi usando la chiave a brugole e un'altra chiave **B**.

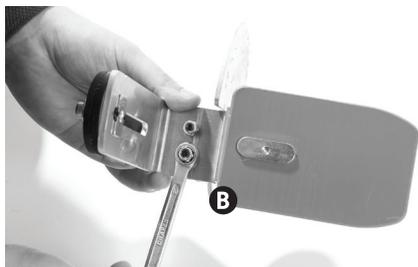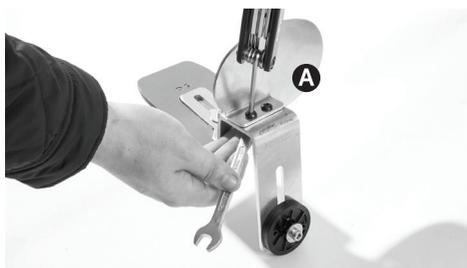

Per smontare il supporto laterale eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 16.20: MONTAGGIO E RIMOZIONE DEI SUPPORTI PER IL BACINO (SCHIENALE BASIC)

Per montare i supporti per il bacino su uno schienale Basic, inserire il dado a "T" **A** nel foro anteriore della piastra dello schienale Basic, accertandosi che il lato più lungo del dado a "T" sia allineato alla piastra rettangolare. Posizionare la staffa nella parte rientrante sul retro della piastra dello schienale Basic **B**. Se allo schienale è stato applicato un cuscino, lo si potrà parzialmente spostare.




]Posizionare la rondella aperta e, quindi, quella piatta sul bullone, inserirlo nella fessura | **C**, e avvitarlo al dado a "T". Fissare in posizione con la chiave a brugola.

Per smontare i supporti per il bacino, eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 16.21: MONTAGGIO E RIMOZIONE DEI SUPPORTI PER IL BACINO (SCHIENALI MODERATE E COMPLEX 3D)

Per applicare i supporti per il bacino su schienali Moderate e Complex 3D inserire il dado a "T" **A** nella fessura anteriore della staffa dei supporti per il bacino. Posizionare la staffa nella parte rientrante anteriore del supporto lombare **B** accertandosi che i bordi più corti del dado a "T" siano allineati alle superfici superiore e inferiore della rientranza. Se allo schienale è stato applicato un cuscino, lo si potrà parzialmente spostare.

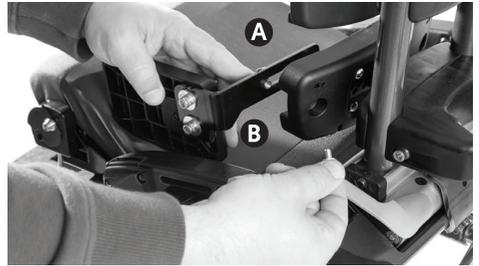


Posizionare la rondella aperta e, quindi, quella piatta sul bullone, inserirlo nel foro posteriore del supporto lombare **C** e avvitarlo al dado a "T". Fissare in posizione con la chiave a brugola.


Per smontare i supporti per il bacino, eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 16.22: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLO SPESSORE PER SCHIENALE BASIC SMALL

Per montare lo spessore per uno schienale Basic Small rimuovere dallo schienale il rivestimento dell'imbottitura e le quattro viti superiori e inferiori, **A**, per separare la piastra dello schienale dai morsetti. Fissare gli spessori ai morsetti superiore e inferiore usando le quattro viti lunghe **B**.

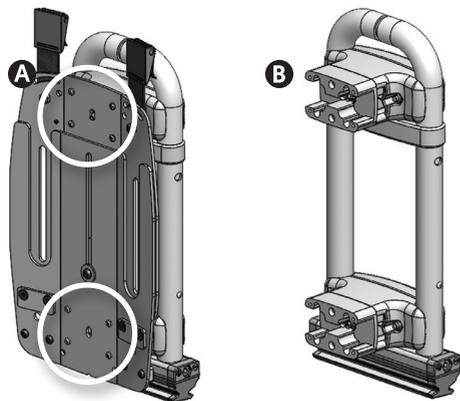

Posizionare lo spessore della piastra dello schienale **C** sulla superficie anteriore della sagomatura del morsetto inferiore **D**. Rimontare la piastra dello schienale fissandola in alto e in basso con le quattro viti **A**.

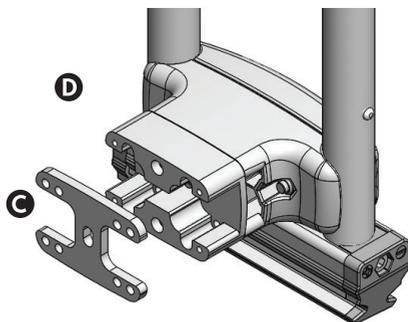

Per rimuovere gli spessori dello schienale Basic Small, eseguire la procedura in ordine inverso. Questa operazione deve essere eseguita una sola volta prima della sostituzione dei morsetti dello schienale Basic.

SEZIONE 16.23: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELL'APPOGGIATESTA

Per montare l'appoggiatesta accertarsi di aprire il morsetto allentando il bullone per rilasciarlo dall'altro componente del morsetto **A**. Posizionare e centrare il morsetto sulla barra superiore dello schienale **B**.





Serrare i componenti del morsetto accedendo alla testa del bullone attraverso il foro della superficie esterna della sporgenza **C** e inserire l'estremità finale del bullone nel foro dell'altra metà del morsetto e avvitarlo al dado. Il dado viene trattenuto all'interno della sporgenza e potrebbe essere necessario riallinearlo al foro. Serrare con la chiave a brugola.



Per rimuovere l'appoggiatesta, eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 16.24: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELL'APPOGGIATESTA UNIVERSALE

Per montare la staffa universale dell'appoggiatesta aprire il morsetto allentando il bullone per separarlo dall'altra parte del morsetto **A**. Posizionare e centrare il morsetto sulla barra superiore dello schienale **B**.

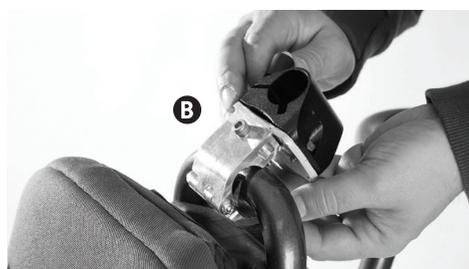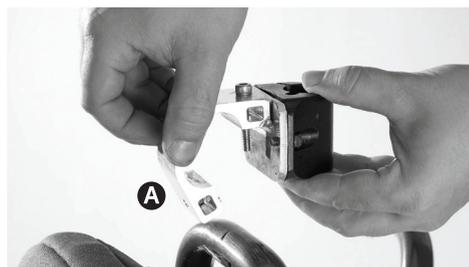



Serrare inserendo l'estremità finale dal bullone **C** nel foro dell'altra metà del morsetto e avvitarlo al dado. Il dado viene trattenuto all'interno della sporgenza e potrebbe essere necessario riallinearlo al foro. Serrare con la chiave a brugola.



Per rimuovere la staffa universale per l'appoggiatesta, eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 16.25: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELL'APPOGGIATESTA UNIVERSALE


Per montare l'appoggiatesta universale inserire il collare a fascetta **A** nella staffa riceptrice **B**. Fare scorrere il tubo **C** nel collare a fascetta **D** e fissarlo agendo sulla leva manuale **E**.

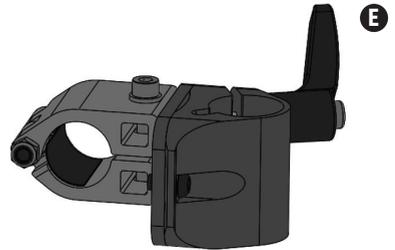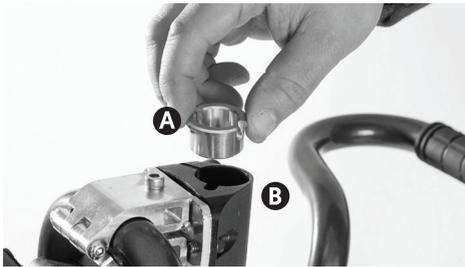

Per rimuovere l'appoggiatesta universale eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 16.26: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELL'APPOGGIATESTA WHITMYER


Per montare l'appoggiatesta Whitmyer inserire il tubo **A** nella staffa ricettrice **B**. Fissare agendo sulla leva manuale **C**.

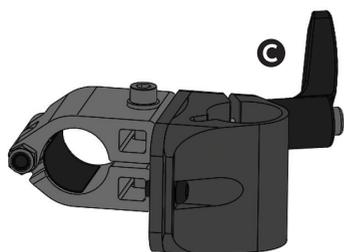

Per smontare l'appoggiatesta Whitmyer eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 16.27: MONTAGGIO E RIMOZIONE DEL TAVOLINO

Prima di inserire il tavolino accertarsi di aver prima allentato la vite a farfalla **A** situata sulla parte anteriore dei braccioli. Per applicare il tavolino inserire i tubi al centro del bracciolo e accertarsi che fuoriescano dal lato opposto dell'elemento ricettore. Dopo aver sistemato il tavolino nella posizione corretta serrare completamente le viti a farfalla **A**.

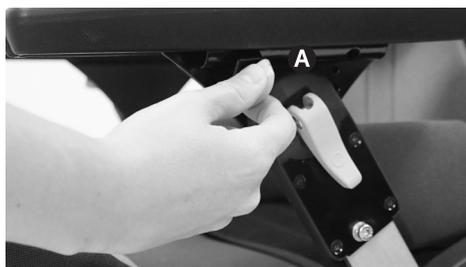

Quando si inserisce il tavolino, fare attenzione a non intrappolare le mani o le braccia del bambino.

Non usare mai il tavolino per far girare o spingere il sistema di seduta.

Non appoggiare sul tavolino oggetti con una temperatura superiore a 40 °C.

Tenere presente che il tavolino è a uso esclusivo del bambino. Non appoggiarsi o depositare sul tavolino oggetti di peso superiore a 8 kg.



Prestare attenzione allo spazio vuoto sotto il tavolino; il bambino potrebbe infilare le dita fra la staffa di metallo e la base del tavolino di plastica.

Per rimuovere il tavolino ripetere la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 16.28: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELL'IMBRAGATURA DYNAMIC BUTTERFLY

Per applicare l'imbragatura Dynamic Butterfly è prima necessario individuare le fibbie a camma della parte posteriore e superiore dello schienale **A**, visibili attraverso aperture delle imbottiture. Fare scorrere le cinghie attraverso la fibbia a camma e fissarle in posizione bloccandole verso il basso **B**.



I punti di connessione inferiori si trovano sul retro della base della seduta **C**. Fare scorrere le cinghie attraverso la fibbia a camma **sul retro della struttura della seduta** e fissarle in posizione bloccandole verso il basso **D**.



Per le imbragature toraciche eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 16.29: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLA CAPPOTTINA SOLE/ PIOGGIA


Per montare la cappottina sole/pioggia è necessario aver prima installato i montanti dello schienale per cappottina. Per rimuovere i tubi dello schienale attuale allentare i bulloni del morsetto per la regolazione dell'altezza dello schienale **A** e tirare verso l'alto il tubo fino a raggiungere la sua altezza massima. Premere i pulsanti di sicurezza **B** sui lati dei tubi e tirare verso l'alto per liberare completamente i tubi dello schienale.



Allentare i bulloni del morsetto dell'imbottitura delle spalle **C** e fare scorrere il tubo dello schienale. Fare scorrere il morsetto del supporto per le spalle lungo i tubi dello schienale e serrare i bulloni **D**.



Inserire le estremità dei tubi dello schienale nel componente ricettore del morsetto per la regolazione dell'altezza dello schienale. Premere i pulsanti di sicurezza **E** sui lati e spingere ulteriormente verso il basso il tubo dello schienale. Serrare i bulloni del morsetto per la regolazione dell'altezza dello schienale **F**.

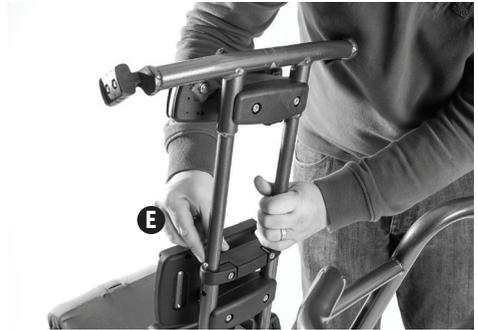

Per montare la cappottina sole/pioggia fare scorrere i connettori verso il basso e sopra il componente ricettore **G**, e ruotare il fermaglio verso l'interno, **H** per fissarlo in posizione.





SEZIONE 16.30: APPLICAZIONE E RIMOZIONE DEL RIVESTIMENTO IMBOTTITO PER IL TAVOLINO

Per applicare al tavolino la copertura imbottita per prima cosa rimuovere il tavolino dalla seduta. Liberare le fascette di Velcro e infilare la copertura imbottita **A** sulla superficie del tavolino **B**. Per fissarla, sovrapporre le fascette di Velcro **C** sul lato inferiore del tavolino. Al termine, tutta la superficie del tavolino dovrà risultare completamente coperta **D**.




Per rimuovere la cappottina sole/pioggia eseguire la procedura in ordine inverso.



Per rimuovere la copertura imbottita del tavolino procedere in ordine inverso.



SEZIONE 16.31: MONTAGGIO E RIMOZIONE DEL SUPPORTO BLOCCA GOMITI

Per montare i supporti blocca gomiti, per prima cosa rimuovere il tavolino. Rimuovere le due rondelle e i bulloni **A**. Posizionare la staffa dei supporti blocca gomiti **B** in modo che l'estremità dell'imbottitura sia in corrispondenza della superficie superiore del tavolino **C** e allinearla ai fori. Reinserrire i due bulloni e le rondelle **D** e fissare con la chiave a brugola.

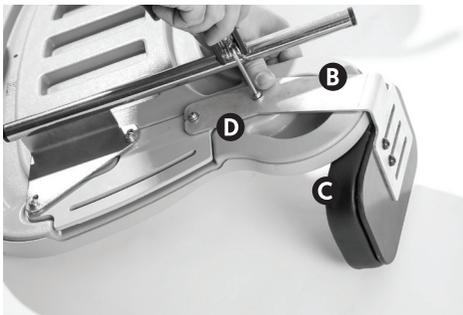

Per smontare i supporti blocca gomiti, eseguire la procedura in ordine inverso.

I supporti blocca gomiti possono essere installati sia su tavolini standard, sia su tavolini imbottiti.

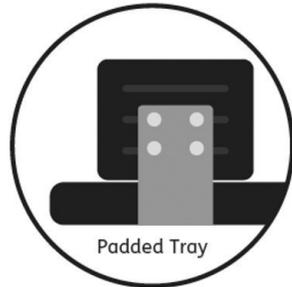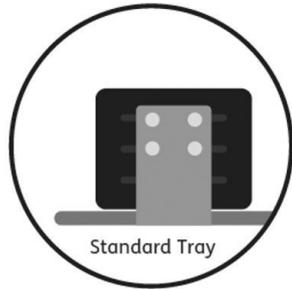


SEZIONE 16.32: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLA CINTURA PELVICA A 4 PUNTI

Per applicare la cintura pelvica a 4 punti fare scorrere la cinghia grigia **attraverso la fessura superiore** della struttura della seduta **A** e, quindi, attraverso la fibbia a camma **B**. Fare scorrere la cinghia nera attraverso la fibbia a camma anteriore **C**. Tirare la cinghia e assicurare le fibbie a camma. Verificare che la cintura sia orientata con l'imbottitura rivolta verso il bambino.



Agganciare la fibbia **D** sul davanti per assicurare il bambino.

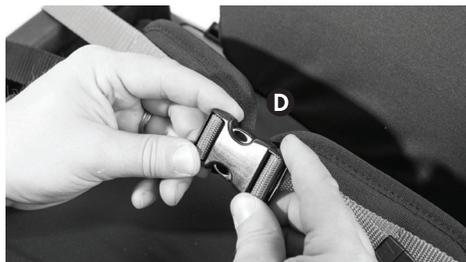

Prima di procedere con qualsiasi altra regolazione allacciare sempre la cintura pelvica.

Per rimuovere la cintura pelvica a 4 punti, ripetere la procedura in ordine inverso.




Avvisi di sicurezza: Quando si usa la cintura a 2 punti accertarsi sempre di passare la cinghia nella fessura della struttura della seduta.



SEZIONE 16.33: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLA CINTURA A 2 PUNTI

Per applicare la cintura a 2 punti fare scorrere la cinghia grigia attraverso la fessura superiore della struttura della seduta **A** e, quindi, attraverso la fibbia a camma **B**. Tirare la cinghia e assicurare le fibbie a camma. Verificare che la cintura sia orientata con l'imbottitura rivolta verso il bambino.

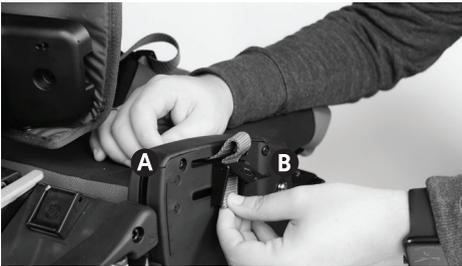

Agganciare la fibbia **C** sul davanti per assicurare il bambino.



Per rimuovere la cintura a 2 punti, ripetere la procedura in ordine inverso.



Avvisi di sicurezza: Quando si usa la cintura a 2 punti accertarsi sempre di passare la cinghia nella fessura della struttura della seduta.




Prima di procedere con qualsiasi altra regolazione allacciare sempre la cintura pelvica.

SEZIONE 16.34: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLA CINTURA PELVICA CONTOUR CRADLE


La cintura pelvica Contour Cradle e la fascia di fissaggio possono essere usati solo con le sedute "Basic" o "Split", non con la seduta "Contoured".

Per applicare la fascia di fissaggio della cintura pelvica Contour Cradle rimuovere prima lo schienale (vedere la Sezione "Montaggio e rimozione dello schienale") e rilasciare gli elementi di serraggio a scatto che si trovano sulla parte anteriore del cuscino della seduta. Aprire la fascia di fissaggio della cintura pelvica Contour Cradle in modo che la parte da afferrare sia rivolta verso l'alto **A**. Sistemare la sezione diritta della fascia sotto il cuscino della seduta **B**.

Avvolgere la fascia attorno al cuscino della seduta e fissarla all'imbottitura con Velcro della parte laterale del cuscino della seduta. Accertarsi che la sagoma ovale del profilo sia centrata sulla seduta **C** e riapplicare lo schienale. Posizionare la fascia in modo che il suo bordo posteriore si trovi a circa 25 mm dalla sezione sacrale dello schienale. Riapplicare i dispositivi di fissaggio a scatto alla parte anteriore del cuscino della seduta.

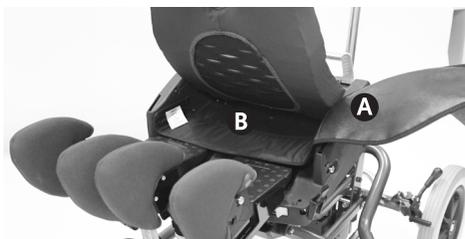

Posizionare la base con Velcro **D** della cintura pelvica Contour Cradle sulla fascia di fissaggio **C** e assicurarsi che il Velcro della cintura pelvica Contour Cradle non tocchi il rivestimento del cuscino della seduta. Fare scorrere la cinghia nera attraverso le fibbie a camma di entrambi i lati anteriori della seduta, **E**, e chiudere le fibbie a camma. Fare scorrere la cinghia grigia nelle fibbie a camma di entrambi i lati del retro della seduta **F** e chiudere le fibbie a camma.

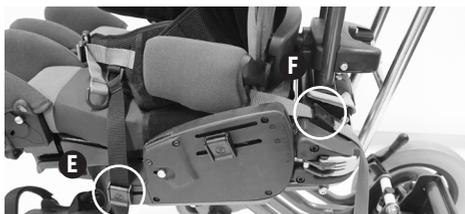

In caso di schienale "Moderate" e "Complex" infilare il lembo in eccesso sotto l'imbottitura toracica **G**. Agganciare la fibbia **H** sul davanti per trattenere l'utente. Per un'impostazione di tipo clinico si rimanda alla Sezione "Regolazione della cintura pelvica Contour Cradle".



Prima di procedere con qualsiasi altra regolazione allacciare sempre la cintura pelvica.



Prima di allacciare altre cinture di sicurezza o fibbie, allacciare sempre per prime le cinture pelviche o la cintura pelvica Contour Cradle. Regolare l'imbragatura in modo che il bambino non possa scivolare in avanti sulla seduta.

Per rimuovere la cintura pelvica Contour Cradle e la fascia di fissaggio procedere in modo inverso.

SEZIONE 16.35: MODIFICA DELLO SCHIENALE DA STATICO A DINAMICO


Il kit "Dynamic Upgrade" (Modifica dinamica) consente di passare da uno schienale statico **A** a uno schienale dinamico **B**. Il montaggio del kit di modifica dinamica deve essere eseguito da un tecnico competente. Il kit di modifica dinamica viene fornito con le istruzioni per il montaggio.




Quando si installa e si monta lo schienale dinamico, fare attenzione a non pizzicarsi le dita.

SEZIONE 16.36: MONTAGGIO E RIMOZIONE SUPPORTI LATERALI PER LE SPALLE (SOLO SCHIENALE MODERATE)

Per montare i supporti per le spalle è necessario prima rimuovere la copertura del supporto svitando con la chiave a brugola le 3 viti **A** che la tengono in posizione. Dopo averla rimossa **B** posizionare il supporto per le spalle **C** orientandolo in modo che la testa del bullone **D** sia rivolta in alto. Assicurare in posizione fissando le 3 viti **E** con la chiave a brugola. Non stringere troppo.


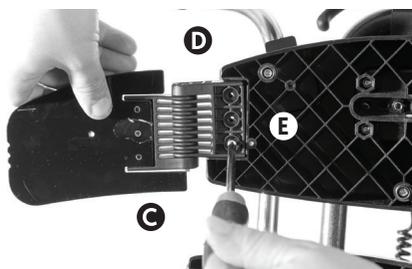


Per rimuovere i supporti per le spalle eseguire la procedura in ordine inverso.


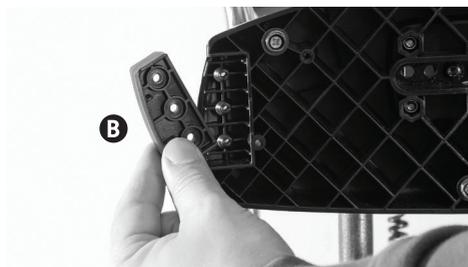


SEZIONE 16.37: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLO SPESSORE PER LA SEZIONE DELLE SPALLE (SOLO SCHIENALE MODERATE)

Per montare lo spessore per la sezione delle spalle, rimuovere il rivestimento dell'imbottitura dalla struttura delle spalle e le 4 viti per liberarla dalla staffa **A**.
 . Posizionare lo spessore per la sezione delle spalle **B** sulla superficie anteriore del gruppo della staffa **C**.

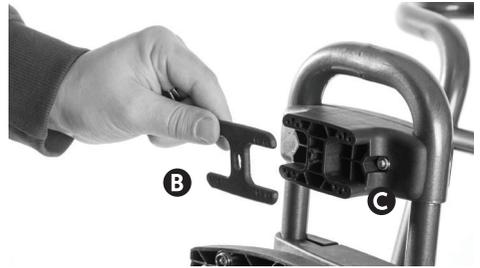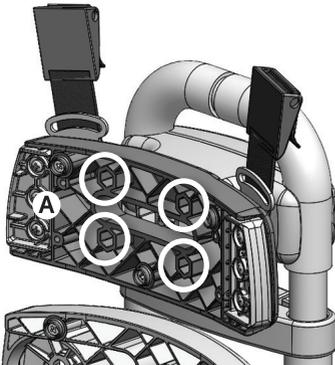

Fissare lo spessore per la sezione delle spalle con le quattro viti più lunghe **D**.
 Rimontare la struttura per le spalle serrando le viti **E** dello spessore per la sezione delle spalle.

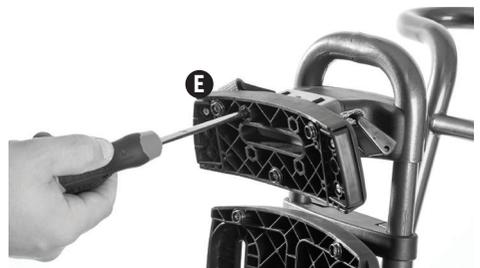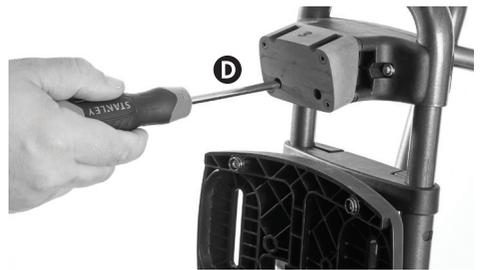

Non sarà possibile utilizzare gli stessi componenti per eseguire il processo in ordine inverso. Per rimuovere lo spessore sarà necessario un nuovo morsetto.

SEZIONE 16.38: MONTAGGIO E RIMOZIONE DEL CUNEO DIVARICATORE



Il cuneo divaricatore può essere applicato solo sulle sedute Basic. Per applicare il cuneo divaricatore agire sulla leva a camma di blocco della parte anteriore della seduta **A** e posizionare la staffa del cuneo divaricatore nell'apertura del cuscino della seduta e nella fessura dell'elemento ricettore della seduta **B**. Per fissarlo in posizione, spingerlo vigorosamente verso il basso nell'unità di blocco a camma **C**. Orientare il cuneo divaricatore in modo che si trovi all'esterno dell'area della seduta.

Se, con il passare del tempo, il meccanismo di aggancio dovesse allentarsi, si potranno sempre serrare di nuovo le viti (rotazione in senso orario) situate in corrispondenza della leva di blocco quando si trova in posizione sollevata **A**.




Prima di posizionare il bambino sulla seduta, rimuovere sempre il cuneo divaricatore.

Per rimuovere il cuneo divaricatore eseguire la procedura in ordine inverso.

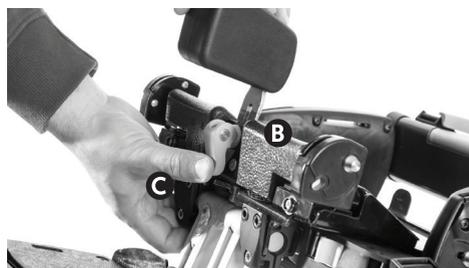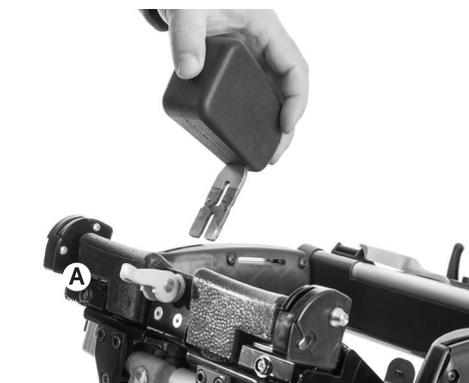

SEZIONE 16.39: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLE GUIDE FEMORALI

Per installare una guida femorale, inserire il tubo della guida femorale **A** nell'elemento ricevitore della seduta **B** e premere verso il basso. Verificare che la guida femorale si sia correttamente bloccata tirandola verso l'alto.

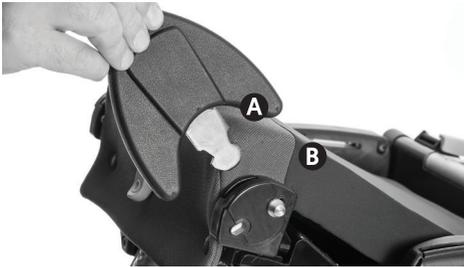

Per rimuovere la guida femorale fare scorrere diagonalmente e verso l'alto il pulsante di rilascio **C** ed estrarla dalla fessura.




SEZIONE 16.40: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLO SCHIENALE

Per applicare lo schienale, individuare l'elemento ricettore della schienale della parte posteriore della base della seduta **A**. Aprire le alette di blocco **B** della parte posteriore della base della seduta tirandole **orizzontalmente verso l'esterno** e, quindi, ruotarle in alto.



Posizionare la base dello schienale nell'elemento ricettore accertandosi che sia completamente inserita. Per fissare in posizione lo schienale ruotare in basso le alette **C** e spingerle verso l'interno **D**.

Verificare che lo schienale sia installato correttamente tirandolo verso l'alto e muovendolo avanti e indietro.

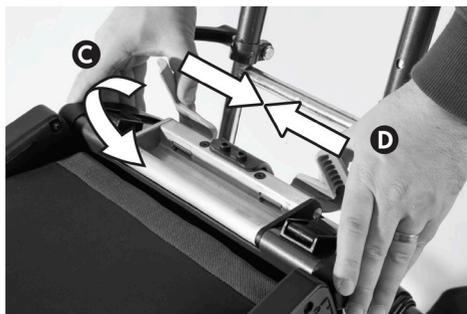


SEZIONE 17: APPLICAZIONE DEI TELI DI RIVESTIMENTO

Si suggerisce di applicare i teli di rivestimento procedendo nell'ordine qui indicato:

1. **Rivestimento della guida femorale [Opzionale]**
2. **Cuscino**
 - a. Cuscino della seduta Basic
 - b. Cuscino della seduta Split
 - c. Cuscino della seduta Contoured
3. **Imbottitura(e) dello schienale**
 - a. Schienale Basic (prima la schiuma, poi il rivestimento)
 - b. Schienale Moderate o Complex 3D (3 zone: lombare, toracica e spalle)
4. **Cintura pelvica [Contour Cradle, a 2 punti o a 4 punti]**
5. **Imbottiture supporti per il bacino**
6. **Imbragature toraciche /Dynamic Butterfly**
7. **Rivestimenti supporti laterali del tronco**
8. **Rivestimento appoggiatesta**
9. **Imbottitura per i piedi**
10. **Rivestimento del cuneo divaricatore**
11. **Rivestimento imbottito supporto**

SEZIONE 17.1: APPLICAZIONE E RIMOZIONE DEI RIVESTIMENTI DELLA GUIDA FEMORALE


Per applicare il rivestimento alla guida femorale infilare il rivestimento sull'estremità della guida femorale **A**. Fissarla in posizione con i bottoni automatici **B** su entrambi i lati del tubo di metallo.

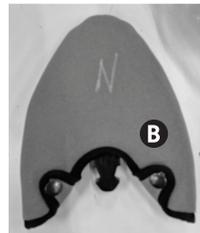


Per rimuovere il rivestimento della guida femorale eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 17.2: APPLICAZIONE E RIMOZIONE DEL CUSCINO DELLA SEDUTA BASIC

Per fissare il cuscino della seduta Basic alla parte posteriore della seduta, individuare la serie di dispositivi di fissaggio **A** sul retro della base della seduta. Fare scorrere le linguette di fissaggio fra il cuscino della seduta e le cinghiette **B** e fissarle ai dispositivi di fissaggio **C**.

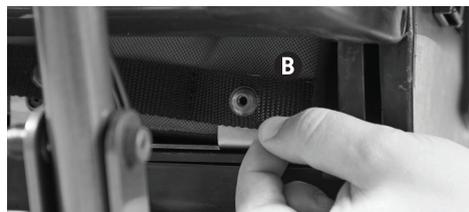

Per fissare la parte anteriore del cuscino della seduta Basic, allineare la parte anteriore del cuscino a quella anteriore della seduta e fissarla premendo sulla parte in Velcro. Individuare i dispositivi di fissaggio della parte anteriore della base della seduta **D**. Abbassare il lembo anteriore del cuscino della seduta e fissarlo in posizione con i bottoni automatici **E**. Accertarsi di poter agevolmente accedere alla leva del cuneo divaricatore tramite l'apertura del cuscino della seduta **F**.

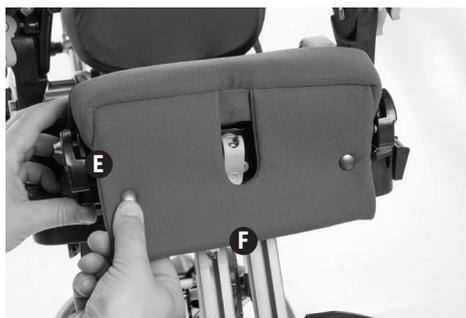


Per rimuovere il cuscino della seduta Basic eseguire la procedure in ordine inverso.



Prima di accomodare il bambino sulla seduta, verificare sempre che il cuscino della base della seduta sia correttamente bloccato.

SEZIONE 17.3: POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DEL CUSCINO DELLA SEDUTA SPLIT

Per fissare il cuscino della seduta Split alla parte posteriore della seduta, individuare la serie di bottoni automatici **A** sul retro della base della seduta. Fare scorrere le linguette di fissaggio fra il cuscino della seduta e le cinghiette **B** e fissarle ai dispositivi di fissaggio **C**.

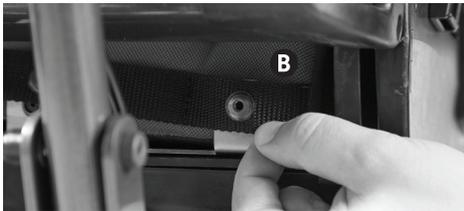

Per fissare la parte anteriore del cuscino della seduta Split, allineare la parte anteriore di ogni lato del cuscino alla parte anteriore della seduta e fissarla premendo sulla parte in Velcro. Individuare i dispositivi di fissaggio della parte anteriore della base della seduta **D**. Abbassare il lembo anteriore del cuscino della seduta e fissarlo in posizione con i bottoni automatici **E**.




Per rimuovere il cuscino della seduta Split eseguire la procedure in ordine inverso.



Prima di accomodare il bambino sulla seduta, verificare sempre che il cuscino della base della seduta sia correttamente bloccato.

SEZIONE 17.4: APPLICAZIONE E RIMOZIONE DEL CUSCINO DALLA SEDUTA CONTOURED

Per applicare il cuscino della seduta Contoured è prima necessario separare l'imbottitura di schiuma a fisarmonica dal rivestimento di tessuto. Allineare il bordo anteriore della schiuma a fisarmonica alla sagomatura anteriore della base della seduta e fissarla premendo sulla parte in Velcro **A**. Tirare la schiuma in modo da allinearne la parte posteriore al bordo posteriore della base della seduta e fissarla premendo sulla parte in Velcro **B**. Accertarsi che la schiuma sia distribuita nello stesso modo sulla base.

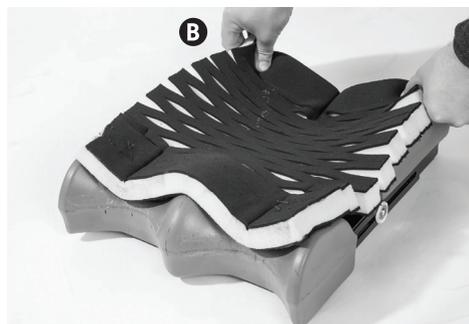

Infilare la parte anteriore del rivestimento di tessuto del cuscino della seduta sulla parte anteriore della seduta **C**, estenderla fino alla parte posteriore e fissarla premendo sulla parte in Velcro **D**.



Per rimuovere il cuscino di una seduta Contoured eseguire la procedura in ordine inverso.



Prima di accomodare il bambino sulla seduta, verificare sempre che il cuscino della base della seduta sia correttamente bloccato.


SEZIONE 17.5: APPLICAZIONE E RIMOZIONE DELLA SCHIUMA SU UNO SCHIENALE BASIC

Per applicare la schiuma a uno schienale Basic, individuare i fori presenti nella parte superiore e inferiore dell'elemento in schiuma

A. Inserire la rondella sulla vite **B** e inserirla nei fori dell'elemento in schiuma e in quelli corrispondenti della piastra **C**.



Con una chiave, fissare in posizione con un dado tutte quattro le viti **D** fino a quando l'estremità della vite risulterà a filo con l'estremità del dado **E**.

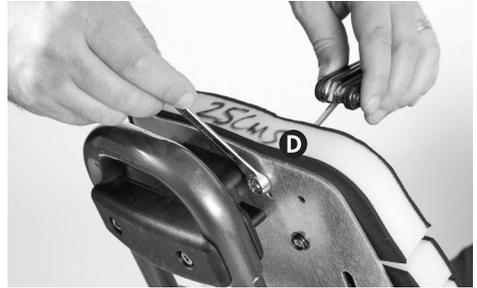

Per rimuovere la schiuma di uno schienale Basic eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 17.6: APPLICAZIONE E RIMOZIONE DEL RIVESTIMENTO DELLO SCHIENALE BASIC

Per applicare il rivestimento a uno schienale Basic infilare la parte superiore del rivestimento sulla parte superiore dello schienale, **A**, e fissarlo in posizione con i bottoni automatici **B**. Su ogni lato del rivestimento sono presenti delle aperture **C** che consentono di applicare i connettori per le imbragature.




Infilare il tessuto elasticizzato fra la schiuma e la piastra **D** su entrambi i lati dello schienale. Fare scorrere la parte inferiore del rivestimento fino a raggiungere la parte inferiore dello schienale e fissarlo in posizione con i bottoni automatici **E**.



Per rimuovere il rivestimento di uno schienale Basic eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 17.7: APPLICAZIONE E RIMOZIONE DEL RIVESTIMENTO DEL SUPPORTO LOMBARE

Per applicare il rivestimento dello schienale toracico allineare il rivestimento alla sagomatura e fissarlo in posizione con i bottoni automatici sui lati **A** e sotto la sagomatura **B**.

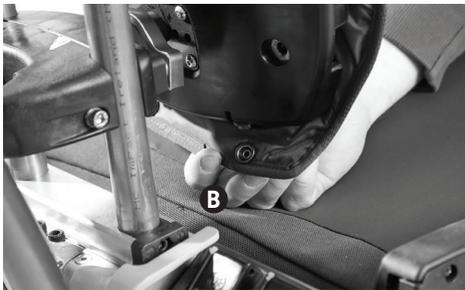

Per rimuovere il rivestimento del supporto lombare eseguire la procedura in ordine inverso.


SEZIONE 17.8: APPLICAZIONE E RIMOZIONE DEL RIVESTIMENTO DELLO SCHIENALE TORACICO

Per applicare il rivestimento del supporto toracico infilare la parte superiore del rivestimento del supporto lombare nella rientranza della parte inferiore del rivestimento del supporto toracico **A**. Allineare il rivestimento del supporto toracico alla sagomatura e fissarlo in posizione con i bottoni automatici superiori e inferiori **B**.



SEZIONE 17.9: APPLICAZIONE E RIMOZIONE DEL RIVESTIMENTO DELLA SEZIONE SPALLE

Per applicare il rivestimento della sezione spalle, inserire il rivestimento del supporto toracico nella rientranza inferiore del rivestimento della sezione spalle **A**. Allineare il rivestimento per le spalle alla sagomatura e sistemare il rivestimento su entrambi i lati, fissandolo in posizione con le cerniere lampo **B**. Accertarsi che le fenditure sul retro del rivestimento della sezione spalle siano allineate con i dispositivi di connessione delle imbragature, oppure che ne fuoriescano **C**.

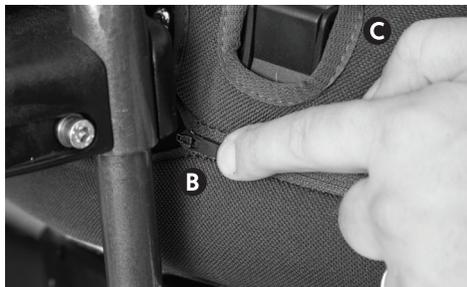


Per rimuovere il rivestimento della sezione spalle eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 17.10: MONTAGGIO E RIMOZIONE DELLA CINTURA PELVICA CONTOUR CRADLE

La cintura pelvica Contour Cradle e la fascia di fissaggio possono essere usati solo con le sedute "Basic" o "Split", non con la seduta "Contoured".

Per applicare la fascia di fissaggio della cintura pelvica Contour Cradle rimuovere prima lo schienale (vedere la Sezione "Montaggio e rimozione dello schienale") e rilasciare gli elementi di serraggio a scatto che si trovano sulla parte anteriore del cuscino della seduta. Aprire la fascia di fissaggio della cintura pelvica Contour Cradle in modo che la parte da afferrare sia rivolta verso l'alto **A**. Sistemare la sezione diritta della fascia sotto il cuscino della seduta **B**.

Avvolgere la fascia attorno al cuscino della seduta e fissarla all'imbottitura con Velcro della parte laterale del cuscino della seduta. Accertarsi che la sagoma ovale del profilo sia centrata sulla seduta **C** e riapplicare lo schienale. Posizionare la fascia in modo che il suo bordo posteriore si trovi a circa 25 mm dalla sezione sacrale dello schienale. Riapplicare i dispositivi di fissaggio a scatto alla parte anteriore del cuscino della seduta.

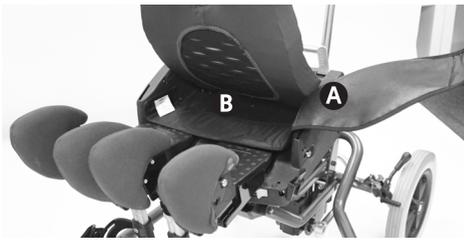

Posizionare la base con Velcro **D** della cintura pelvica Contour Cradle sulla fascia di fissaggio **C** e assicurarsi che il Velcro della cintura pelvica Contour Cradle non tocchi il rivestimento del cuscino della seduta. Fare scorrere la cinghia nera attraverso le fibbie a camma di entrambi i lati anteriori della seduta, **E**, e chiudere le fibbie a camma. Fare scorrere la cinghia grigia nelle fibbie a camma di entrambi i lati del retro della seduta **F** e chiudere le fibbie a camma.



In caso di schienale “Moderate” e “Complex” infilare il lembo in eccesso sotto l'imbottitura toracica **G**. Agganciare la fibbia **H** sul davanti per trattenere l'utente. Per un'impostazione di tipo clinico si rimanda alla Sezione “Regolazione della cintura pelvica Contour Cradle”.



Prima di procedere con qualsiasi altra regolazione allacciare sempre la cintura pelvica.



Prima di allacciare altre cinture di sicurezza o fibbie, allacciare sempre per prime le cinture pelviche o la cintura pelvica Contour Cradle. Regolare l'imbragatura in modo che il bambino non possa scivolare in avanti sulla seduta.

Per rimuovere la cintura pelvica Contour Cradle e la fascia di fissaggio procedere in modo inverso.

SEZIONE 17.11: APPLICAZIONE E RIMOZIONE DEI RIVESTIMENTI IMBOTTITI PER LE ANCHE

Per applicare le imbottiture sui supporti per il bacino staccare il componente di Velcro e fare scorrere il rivestimento sulla parte sagomata con il Velcro orientato verso l'esterno. Fissare in posizione con il Velcro. L'etichetta interna aiuterà a identificare correttamente il lato destro e sinistro.





Per rimuovere il rivestimento imbottito dei supporti per il bacino eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 17.12: APPLICAZIONE E RIMOZIONE DELLE IMBRAGATURE TORACICHE/DYNAMIC BUTTERFLY

Per applicare l'imbragatura Dynamic Butterfly è prima necessario individuare le fibbie a camma della parte posteriore e superiore dello schienale **A**, visibili attraverso aperture delle imbottiture. Fare scorrere le cinghie attraverso la fibbia a camma e fissarle in posizione bloccandole verso il basso **B**.



I punti di connessione inferiori si trovano sul retro della base della seduta **C**. Fare scorrere le cinghie attraverso la fibbia a camma e fissarle in posizione bloccandole verso il basso **D**.

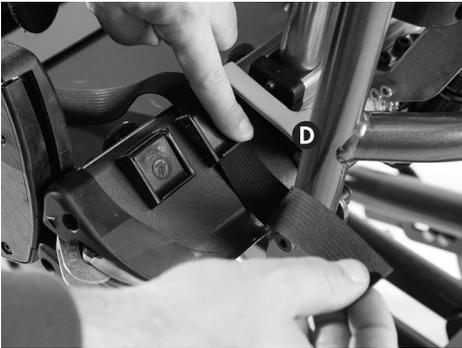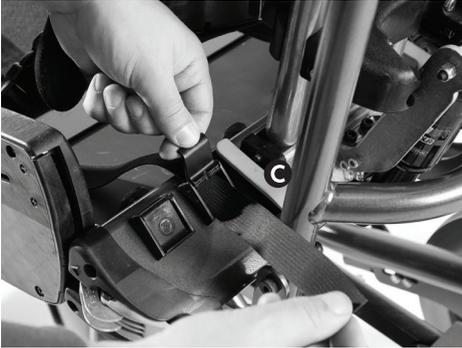

Per le imbragature toraciche eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 17.13: APPLICAZIONE E RIMOZIONE DELLE IMBOTTITURE PER I SUPPORTI LATERALI DEL TRONCO – SLIMLINE

Per applicare le imbottiture laterali aprire la parte in Velcro e infilare il rivestimento sull'imbottitura di plastica **A** con il Velcro rivolto verso il basso. Fissare in posizione con il Velcro **B**.



Per rimuovere l'imbottitura laterale Slimline eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 17.14: APPLICAZIONE E RIMOZIONE DEI RIVESTIMENTI LATERALI – CON CERNIERA


Per applicare i rivestimenti laterali aprire la parte in Velcro e infilare il rivestimento sulla sagomatura di plastica, **A**, con il Velcro rivolto in basso e l'occhiello verso l'alto. Fissare in posizione con il Velcro **B**.



Per rimuovere il rivestimento laterale con cerniera eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 17.15: APPLICAZIONE E RIMOZIONE DEI RIVESTIMENTI LATERALI – FLESSIBILE WRAPAROUND

Per applicare i rivestimenti laterali flessibili aprire la parte in Velcro e infilare il rivestimento sull'imbottitura di plastica **A**, con il Velcro rivolto verso il basso e la superficie con le cinghie nere rivolte verso l'esterno. Fissare in posizione con il Velcro **B**.

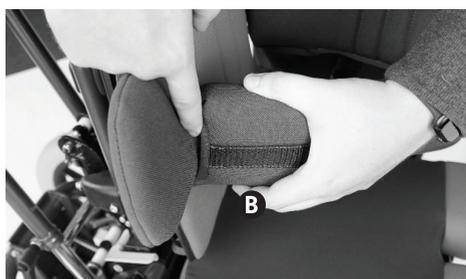

Per rimuovere il rivestimento laterale flessibile eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 17.16: APPLICAZIONE E RIMOZIONE DEL RIVESTIMENTO DELL'APPOGGIATESTA

Per applicare il rivestimento dell'appoggiatesta, allineare il rivestimento alla parte anteriore della sagomatura e infilarlo per coprire entrambe le estremità **A** e fissarlo in posizione con le cerniere lampo **B**. Accertarsi di allineare il rivestimento in modo che la cerniera lampo sia il più vicino possibile al bordo inferiore.



Per rimuovere il rivestimento dell'appoggiatesta, eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 17.17: APPLICAZIONE E RIMOZIONE DEL RIVESTIMENTO DELLA PEDANA

Per applicare il rivestimento alla pedana è prima necessario rimuovere componenti o cinturini applicati alla pedana. Infilare il rivestimento sulla superficie superiore della pedana, contro la parte posteriore **A**. Posizionare il rivestimento sulla superficie superiore della pedana in modo che le estremità rivolte verso l'alto siano allineate alla parte posteriore e laterale della pedana. Fissare alla parte inferiore con le fasce in Velcro **B**.



Per rimuovere il rivestimento della pedana eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 17.18: APPLICAZIONE E RIMOZIONE DEL RIVESTIMENTO DEL CUNEO DIVARICATORE

Per applicare il rivestimento del cuneo divaricatore aprire le parti in Velcro e infilarlo **A** sulla sagomatura di plastica **B**, con il Velcro rivolto in basso e l'imbottitura orientata in modo da adattarsi ai contorni della sagomatura. Fissare in posizione con il Velcro **C**.



Per rimuovere il rivestimento del cuneo divaricatore eseguire la procedura in ordine inverso.



SEZIONE 17.19: APPLICAZIONE E RIMOZIONE DEL RIVESTIMENTO IMBOTTITO PER IL SUPPORTO




Per applicare aprire le parti in Velcro e infilare il rivestimento imbottito **A** sul supporto piastra **B**, con il Velcro orientato verso l'alto e l'imbottitura orientata in modo che il lato di tessuto grigio pieno sia rivolto verso la parte anteriore della seduta. Fissare in posizione con il Velcro e inserire la parte estesa nel rivestimento laterale **C**.



Per rimuovere il rivestimento del supporto laterale eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 17.20: APPLICAZIONE E RIMOZIONE DEL RIVESTIMENTO DELLA STAFFA LATERALE

Per applicare il rivestimento della staffa laterale, aprire le parti in Velcro e avvolgere il rivestimento **A** sulla piastra **B**, con il Velcro orientato in basso e l'imbottitura in modo che il prolungamento di stoffa **C** sia orientato verso l'imbottitura laterale e rivolta verso l'esterno. Fissare in posizione con il Velcro **D** e inserire il prolungamento di stoffa nel rivestimento laterale **E**.

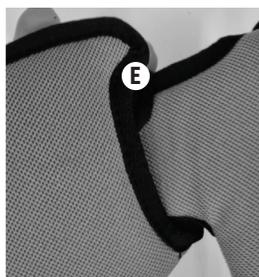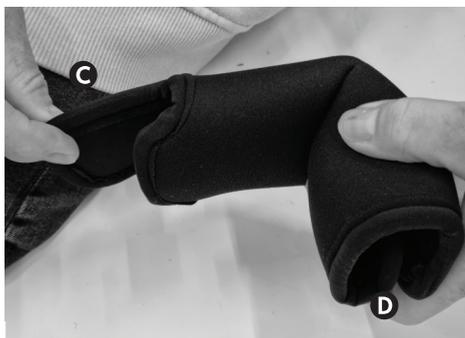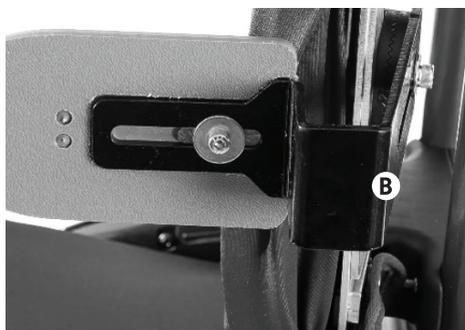

Per rimuovere il rivestimento della staffa laterale eseguire la procedura in ordine inverso.

SEZIONE 18: CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

La configurazione del prodotto deve essere effettuata da una persona tecnicamente e clinicamente competente e debitamente formata sull'uso del prodotto. Sunrise Medical raccomanda di stilare e conservare un rapporto scritto di tutte le impostazioni cliniche adottate per questo prodotto. Prima di posizionare il bambino sulla seduta, impostare l'altezza dello schienale, la profondità della seduta e l'altezza della pedana. Dopo aver fatto sedere il bambino sarà possibile procedere con altre regolazioni di precisione.

SEZIONE 18.1: REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DELLA SEDUTA DEL SISTEMA DI SEDUTA BASIC

Per regolare la profondità della seduta di un sistema di seduta Basic, allentare i bulloni destro e sinistro **A** posti sotto la base della seduta e spostare la seduta in avanti o indietro fino a raggiungere la posizione desiderata. Fissare la seduta in posizione serrando di nuovo i bulloni.




SEZIONE 18.2: REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DELLA SEDUTA E ANGOLAZIONE DELLE GAMBE (ABDUZIONE E ADDUZIONE) DEL SISTEMA DI SEDUTA SPLIT

Per regolare la profondità della seduta e l'angolazione delle gambe della seduta Split, allentare i bulloni destro e sinistro **A** posti sotto la base della seduta e spostare singolarmente ogni componente per le gambe fino a raggiungere la posizione desiderata. Le pedane possono essere spostate in avanti, indietro e con un'abduzione/adduzione di 15°. Fissare la seduta in posizione serrando di nuovo i bulloni.




SEZIONE 18.3: REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI UNA SEDUTA CONTOURED

Per regolare la profondità di una seduta Contoured, prima rimuovere dalla base della seduta la struttura centrale della seduta Contoured **A** e, quindi, rimuovere il rivestimento e la schiuma. Allentare i bulloni **B** su ogni lato della piastra e farla scivolare in avanti o indietro fino a raggiungere la posizione desiderata. Fissare la posizione serrando di nuovo i bulloni.

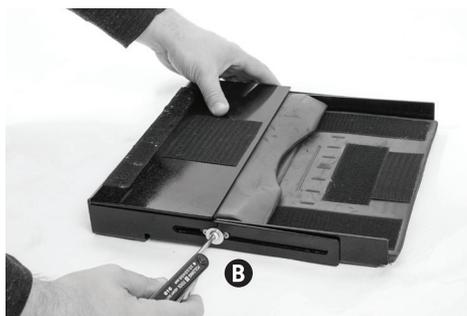

Per ottenere la profondità massima della seduta la parte anteriore deve essere orientata come mostrato sopra. Per ottenere la profondità minima della seduta rimuovere i bulloni **B** da entrambi i lati della seduta e ruotare la parte anteriore in modo che il bordo corto sia rivolto verso l'alto **C**. Riapplicare la sezione anteriore in modo che il cursore **D** e il binario di scorrimento **E** possano di nuovo agganciarsi su entrambi i lati. Riapplicare i bulloni con le rondelle su entrambi i lati della seduta, regolare la posizione e serrare i bulloni per fissare la posizione della seduta.

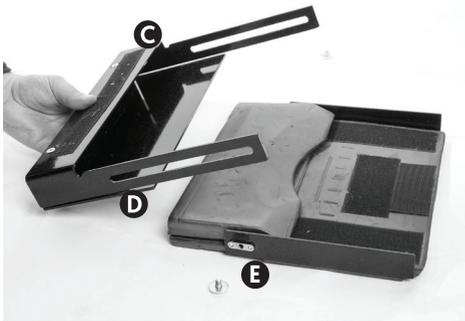


Reimpostare l'elemento di schiuma anteriore della base **F** in modo che si appoggi sulla superficie anteriore interna della piastra. Sistemare l'elemento anteriore di schiuma sagomata **G** in posizione, allineando la schiuma alla parte anteriore della piastra.



Per evitare che la piastra sagomata della seduta sporga, è anche possibile regolare la profondità della base della seduta. Per regolare la profondità della seduta sulla piastra del sistema di seduta allentare i bulloni destro e sinistro posti sotto la base della seduta e spostare la seduta in avanti o indietro fino a raggiungere la posizione desiderata. Fissare in posizione serrando di nuovo i bulloni (per le figure si rimanda alle Sezioni 18.1 o 18.2).

SEZIONE 18.4: REGOLAZIONE DELLA LARGHEZZA DEI SUPPORTI PER IL BACINO SU SEDUTA CONTOURED

Per regolare la larghezza dei supporti per il bacino di una seduta Contoured è possibile riposizionare le imbottiture destra e sinistra **A** sulla base di Velcro **B** sulla quale sono presenti delle linee tratteggiate **C** per aiutare le operazioni di posizionamento e di allineamento. Allineare il bordo posteriore delle imbottiture al bordo posteriore della piastra.

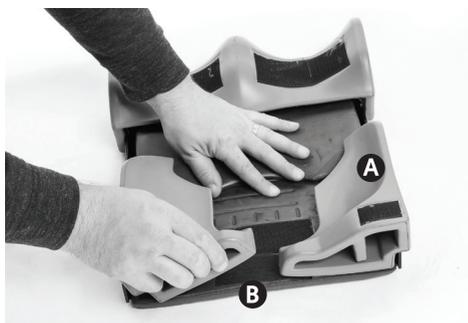

SEZIONE 18.5: REGOLAZIONE DELLA LARGHEZZA DEI SUPPORTI PER IL BACINO SU SEDUTA BASIC E SPLIT (SCHIENALE BASIC)

Per regolare la larghezza dei supporti per il bacino di uno schienale Basic aprire i bottoni automatici dell'imbottitura dello schienale per poter accedere al bullone di regolazione **A**. Allentare il bullone e apportare le regolazioni verso l'interno o l'esterno fino a raggiungere la posizione desiderata. Fissare in posizione serrando di nuovo i bulloni.



SEZIONE 18.6: REGOLAZIONE DELLA LARGHEZZA DEI SUPPORTI PER IL BACINO SU SEDUTE BASIC E SPLIT (SCHIENALI MODERATE E COMPLEX 3D)

Per regolare la larghezza dei supporti per il bacino su schienali Moderate e Complex 3D individuare il bullone di regolazione **A** posto sul retro della sagomatura. Allentare il bullone e apportare le regolazioni verso l'interno o l'esterno fino a raggiungere la posizione desiderata. Fissare in posizione serrando di nuovo i bulloni.




SEZIONE 18.7: REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA E DELL'ANGOLAZIONE DEI SUPPORTI PER IL BACINO

Per regolare l'angolazione dei supporti per il bacino allentare il bullone centrale **A** e posizionarli all'angolo desiderato. Fissare in posizione serrando di nuovo i bulloni.



Per regolare l'altezza dei supporti per il bacino scambiare il supporto di sinistra **B** con quello di destra **C**.

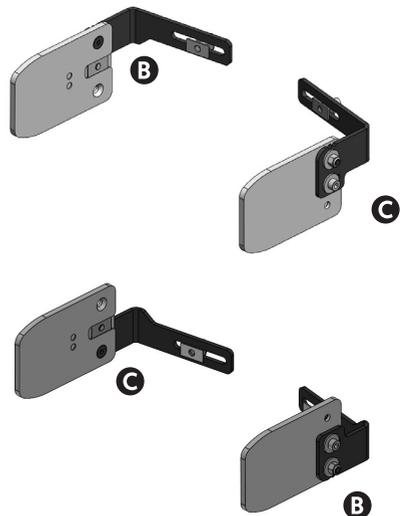

SEZIONE 18.8: REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLO SCHIENALE


Per regolare l'altezza dello schienale allentare i bulloni del morsetto per la regolazione dell'altezza dello schienale **A** e spostare in alto o in basso i bracci telescopici dello schienale fino a raggiungere l'altezza desiderata. Per abbassare lo schienale dalla sua posizione più alta premere il dispositivo di fissaggio automatico **B** situato sui lati dei tubi e spingere verso il basso lo schienale. Fissare in posizione serrando i bulloni del morsetto per la regolazione dell'altezza dello schienale **A**.




SEZIONE 18.9: REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLE SINGOLE IMBOTTITURE SU SCHIENALI MODERATE O COMPLEX 3D

Le imbottiture degli schienali Moderate o Complex 3D prevedono due tipo di morsetto: Basic o Complex.

Per regolare l'altezza con il morsetto Basic allentare i bulloni **A** e fare scorrere in alto o in basso i montanti dello schienale fino a raggiungere la posizione desiderata. Fissare in posizione serrando di nuovo i bulloni.

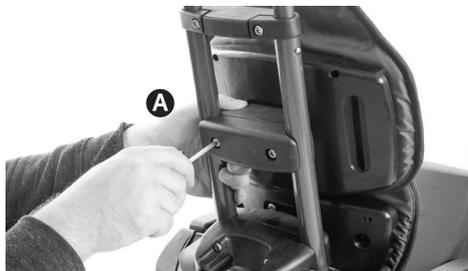


Per regolare l'altezza con un morsetto Complex allentare i bulloni **B** e fare scorrere in alto o in basso i montanti dello schienale fino a raggiungere la posizione desiderata. Fissare in posizione serrando di nuovo i bulloni.

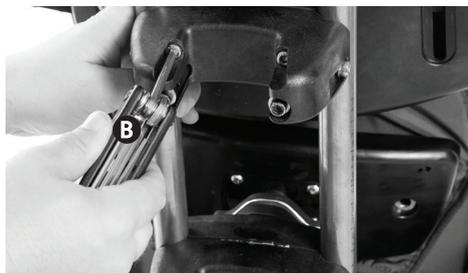

SEZIONE 18.10: REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DEL SUPPORTO LOMBARE (SOLO VERSIONI MODERATE O COMPLEX 3D)

I supporti lombare, toracico e spalle dello schienale Complex 3D e quello lombare dello schienale Moderate sono dotati di morsetti Complex.

Per regolare la profondità del morsetto Complex allentare il bullone **A** presente su entrambi i lati del morsetto. Regolare la profondità spostando in avanti o indietro la sezione dello schienale fino a raggiungere la posizione desiderata **B**. Fissare in posizione serrando di nuovo i bulloni.

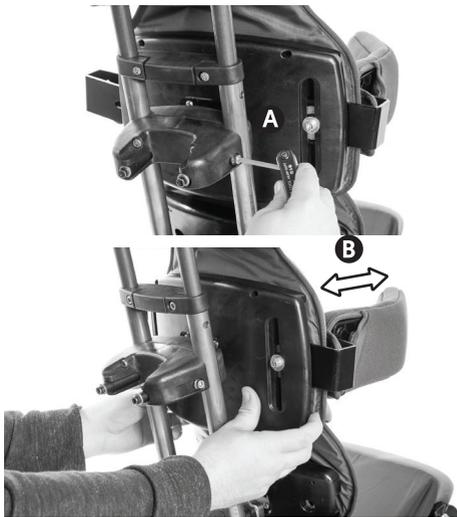


Per la regolazione della profondità potrebbe essere necessario allentare i bulloni per la regolazione dell'angolazione, come indicato indicati nella Sezione 18.11. Dopo la regolazione, accertarsi di fissare la posizione serrando entrambe le serie di bulloni

SEZIONE 18.11: REGOLAZIONE DELL'ANGOLAZIONE DEL SUPPORTO LOMBARE (SOLO VERSIONE MODERATE O COMPLEX)

I supporti lombare, toracico e spalle dello schienale Complex 3D e quello lombare dello schienale Moderate sono dotati di morsetti Complex.


Per regolare l'angolazione del morsetto Complex allentare i bulloni **A** del morsetto. Regolare l'angolazione ruotando la sezione dello schienale su tutti gli assi fino a raggiungere la posizione desiderata. Fissare in posizione serrando di nuovo i bulloni.

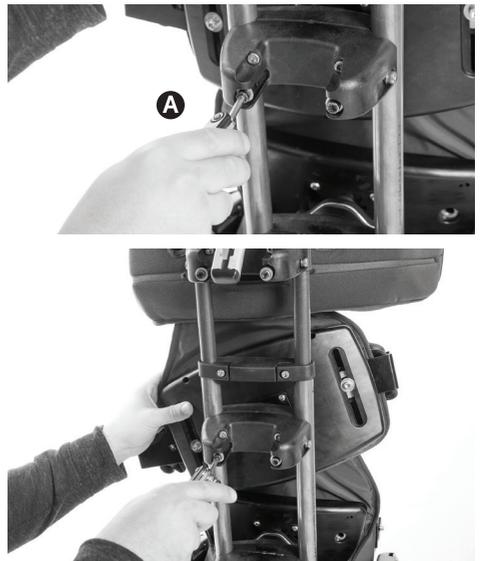

SEZIONE 18.12: REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DELLA SEZIONE TORACICA DELLO SCHIENALE (SOLO VERSIONE COMPLEX 3D)

I supporti lombare, toracico e spalle dello schienale Complex 3D e quello lombare dello schienale Moderate sono dotati di morsetti Complex.

Per regolare la profondità del morsetto Complex allentare il bullone **A** presente su entrambi i lati del morsetto. Regolare la profondità spostando in avanti o indietro la sezione dello schienale fino a raggiungere la posizione desiderata **B**. Fissare in posizione serrando di nuovo i bulloni.

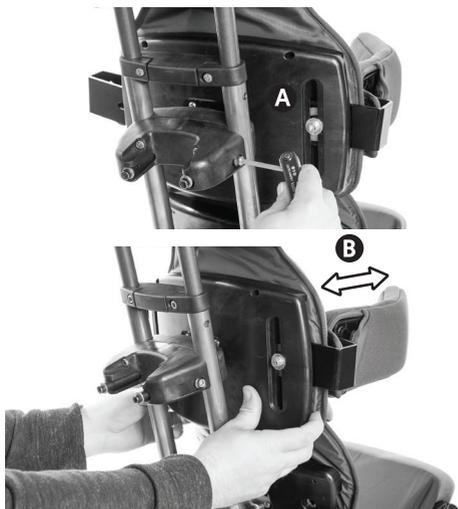


Per la regolazione della profondità potrebbe essere necessario allentare i bulloni per la regolazione dell'angolazione, come indicato indicati nella Sezione 18.11. Dopo la regolazione, accertarsi di fissare la posizione serrando entrambe le serie di bulloni

SEZIONE 18.13: REGOLAZIONE DELL'ANGOLAZIONE DELLA SEZIONE TORACICA DELLO SCHIENALE (SOLO VERSIONE COMPLEX 3D)

I supporti lombare, toracico e spalle dello schienale Complex 3D e quello lombare dello schienale Moderate sono dotati di morsetti Complex.


Per regolare l'angolazione del morsetto Complex allentare i bulloni **A** del morsetto. Regolare l'angolazione ruotando la sezione dello schienale su tutti gli assi fino a raggiungere la posizione desiderata. Fissare in posizione serrando di nuovo i bulloni.

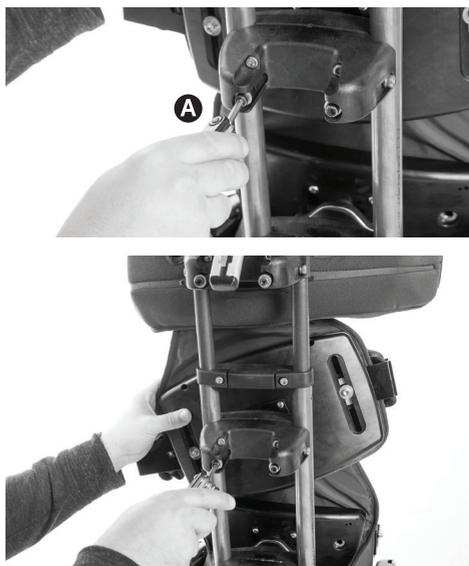

SEZIONE 18.14: REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DELLA SEZIONE PER LE SPALLE (SOLO VERSIONE COMPLEX 3D)

I supporti lombare, toracico e spalle dello schienale Complex 3D e quello lombare dello schienale Moderate sono dotati di morsetti Complex.

Per regolare la profondità del morsetto Complex allentare il bullone **A** presente su entrambi i lati del morsetto. Regolare la profondità spostando in avanti o indietro la sezione dello schienale fino a raggiungere la posizione desiderata **B**. Fissare in posizione serrando di nuovo i bulloni.

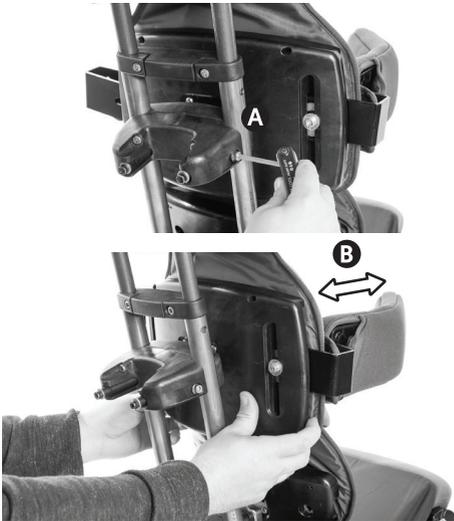


Per la regolazione della profondità potrebbe essere necessario allentare i bulloni per la regolazione dell'angolazione, come indicato indicati nella Sezione 18.11. Dopo la regolazione, accertarsi di fissare la posizione serrando entrambe le serie di bulloni

SEZIONE 18.15: REGOLAZIONE DELL'ANGOLAZIONE DELLA SEZIONE PER LE SPALLE (SOLO VERSIONE COMPLEX 3D)

I supporti lombare, toracico e spalle dello schienale Complex 3D e quello lombare dello schienale Moderate sono dotati di morsetti Complex.

Per regolare l'angolazione del morsetto Complex allentare i bulloni **A** del morsetto. Regolare l'angolazione ruotando la sezione dello schienale su tutti gli assi fino a raggiungere la posizione desiderata. Fissare in posizione serrando di nuovo i bulloni.

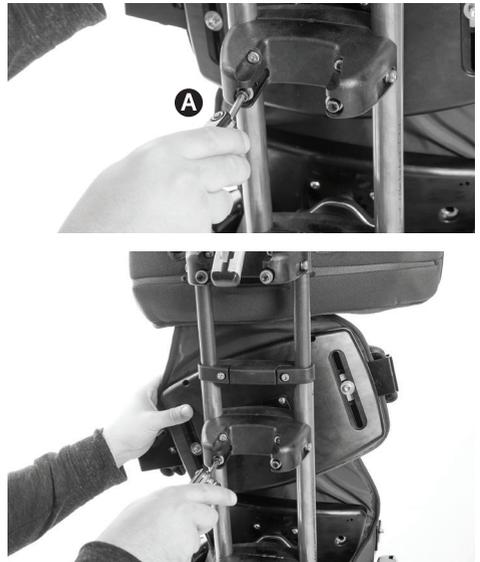

SEZIONE 18.16: REGOLAZIONE DELL'ANGOLAZIONE DEI SUPPORTI PER LE SPALLE (SOLO VERSIONI MODERATE E COMPLEX 3D)

Per regolare l'angolazione dei supporti per le spalle aprire la cerniera lampo del rivestimento su entrambi i lati per poter accedere dall'alto al bullone di regolazione. Allentare il bullone **A** e spostare i supporti per le spalle fino a raggiungere la posizione desiderata. Fissare in posizione serrando di nuovo il bullone e chiudere la cerniera lampo del rivestimento.




SEZIONE 18.17: REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA PEDANA

Per regolare la lunghezza della pedana allentare il bullone **A** e aumentare o diminuire la lunghezza fino a raggiungere la posizione desiderata. Fissare in posizione serrando di nuovo il bullone. Le pedane separate possono essere regolate in lunghezza in modo indipendente una dall'altra. In presenza di una pedana unica, per la regolazione della lunghezza è necessario allentare contemporaneamente i bulloni.




SEZIONE 18.18: REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DEL TUBO DELLA PEDANA (ANGOLO DEL GINOCCHIO)

Per regolare l'angolo del tubo della pedana allentare il bullone **A** e ruotare il tubo fino a raggiungere la posizione desiderata. Fissare in posizione serrando di nuovo il bullone. Le pedane separate possono essere regolate in angolazione in modo indipendente una dall'altra. In presenza di una pedana unica, per la regolazione della lunghezza è necessario allentare contemporaneamente i bulloni.

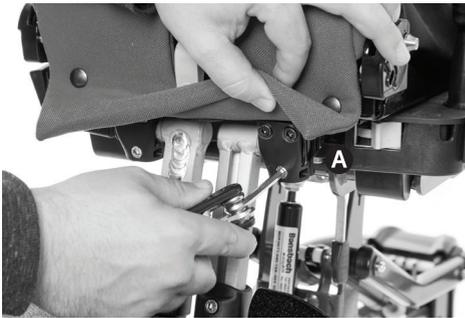


SEZIONE 18.19: REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DELLA PEDANA (DORSIFLESSIONE E FLESSIONE PLANTARE)

Per regolare l'angolo delle pedane separate per adattare a esigenze di dorsiflessione e di flessione plantare, allentare o serrare la manopola **A** posta sotto le pedane fino a raggiungere la posizione desiderata.

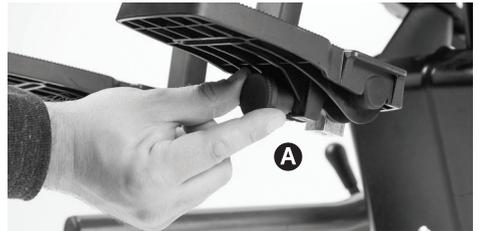


Per regolare l'angolo della pedana unica per adattare a esigenze di dorsiflessione e flessione plantare allentare o serrare il bullone **B** situato sulla superficie superiore della pedana fino a raggiungere la posizione desiderata.

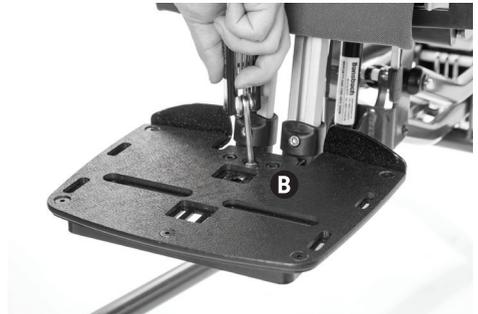


SEZIONE 18.20: REGOLAZIONE DEI SANDALETTI

Per posizionare e mantenere i piedi del bambino in posizione nei sandaletti, utilizzare i cinturini di Velcro forniti. I cinturini devono essere posizionati sopra il collo **A** e le dita **B** del piede. Il cinturino anteriore può essere fatto scorrere in una delle due fessure laterali dei sandaletti per adattarli alla dimensione del piede del bambino.

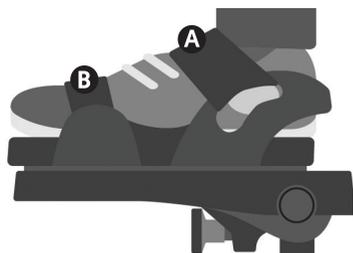

Se il bambino indossa sandali o altre calzature leggere, verificare che i cinturini non possano causare irritazioni della pelle.

Per regolare la posizione dei sandaletti sulla pedana allentare la manopola **C** e spostarli nella posizione desiderata. Quindi serrarla per bloccarli in posizione.

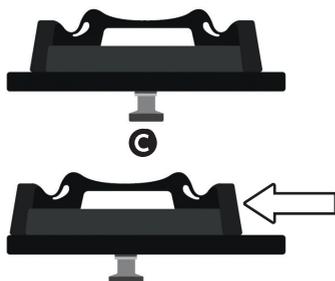

SEZIONE 18.21: REGOLAZIONE DEI CINTURINI PER LE CAVIGLIE

Per regolare i cinturini per le caviglie agire sulle parti in Velcro sistemandoli attorno alla caviglia **A** e regolare la lunghezza del cinturino attraverso la fibbia Tri-Glide **B**.




SEZIONE 18.22: REGOLAZIONE DELLE CAVIGLIERE

Per regolare le cavigliere agire sui cinturini di Velcro sistemandoli sul collo del piede **A** e attorno alle caviglie **B**.



SEZIONE 18.23: REGOLAZIONE DEI SANDALETTI A STIVALE MORBIDI

Per regolare i sandaletti a stivale morbidi regolare la posizione dei cinturini di Velcro attorno al collo del piede, **A**, il cinturino di Velcro attorno alla caviglia **B**, e la lunghezza del cinturino nella fibbia Tri-Glide **C**.

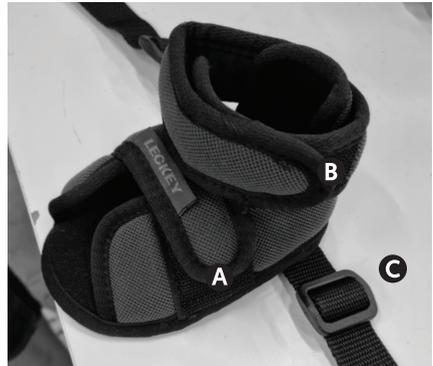

SEZIONE 18.24: REGOLAZIONE DEI SUPPORTI LATERALI PER IL TRONCO (LARGHEZZA, ALTEZZA E ANGOLAZIONE)

Per regolare l'altezza, la larghezza e l'angolazione dei supporti laterali allentare il bullone posto dietro lo schienale Basic **A** o dello schienale Moderate o Complex 3D **B**. Regolare l'altezza, la larghezza e l'angolazione fino a raggiungere la posizione desiderata e serrarlo di nuovo per fissare la posizione.




SEZIONE 18.25: REGOLAZIONE DEI SUPPORTI LATERALI PER IL TRONCO (PROFONDITÀ)

Per regolare la profondità dei supporti laterali aprire il Velcro del rivestimento per poter accedere al bullone di regolazione **A**. Allentare il bullone e spostare in avanti o indietro il supporto fino a raggiungere la posizione desiderata. Fissare in posizione serrando di nuovo i bulloni. Richiudere il rivestimento con Velcro.





SEZIONE 18.26: REGOLAZIONE DEI SUPPORTI LATERALI PER IL TRONCO CON CERNIERA E AD ABBRACCIO WRAPAROUND

L'hardware per i supporti laterali con cerniera e ad abbraccio Wraparound si regola come quello per i supporti laterali Slimline. Per regolare la tensione dei supporti laterali con cerniera regolare la lunghezza delle cinghie della fascetta anteriore del supporto laterale **A**.

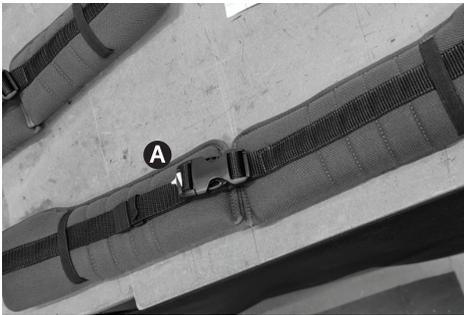

SEZIONE 18.27: REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL BRACCIOLO

Il bracciolo può essere regolato a diverse altezze. Per regolare l'altezza del bracciolo allentare il bullone **A** situato, in posizione decentrata rispetto all'asse mediano della piastra. Con l'estremità dello strumento ancora inserito nella testa del bullone fare scorrere il bullone sul lato opposto della linea dell'asse mediano, **B**, per consentire di regolare l'altezza del bracciolo spostandolo in alto o in basso. Per fissare la posizione fare scorrere la testa del bullone dalla sua posizione decentrata originaria, **C**, in una delle altre posizioni di altezza incrementale e serrare il bullone.

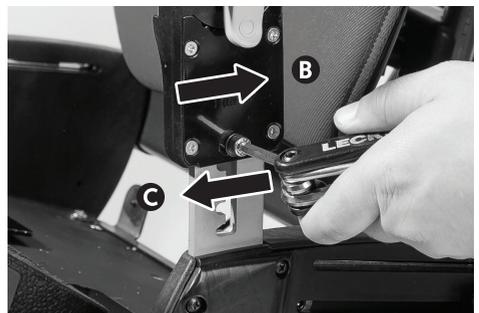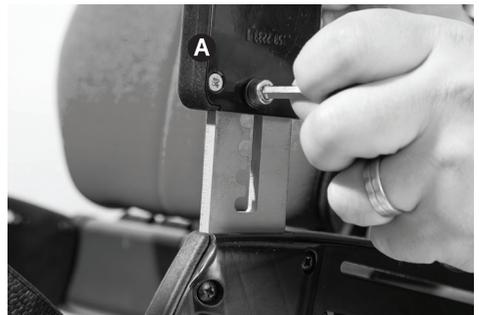



SEZIONE 18.28: REGOLAZIONE DELL'ANGOLAZIONE DEL BRACCIOLO

Per regolare l'angolazione del bracciolo agire sulla leva a camma **A** al centro del bracciolo. Sollevarla per sbloccare e modificare l'angolazione del bracciolo **B** fino a raggiungere la posizione desiderata. Fissare l'angolazione abbassando la leva a camma in posizione bloccata **C**.




SEZIONE 18.29: REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DEL BRACCIOLO

Per regolare la profondità del bracciolo rimuovere i bulloni **A** per separare l'imbottitura di poliuretano (PU) **B** dalla piastra **C**. Riposizionare l'imbottitura in una delle tre posizioni e inserire di nuovo i bulloni. Fissare la posizione serrando di nuovo i bulloni.

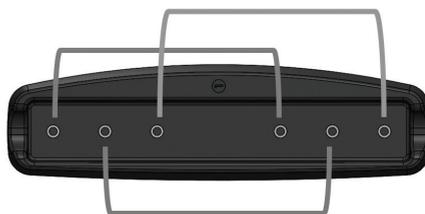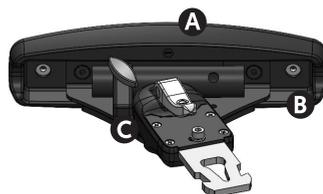

SEZIONE 18.30: REGOLAZIONE DELL'IMBRAGATURA DYNAMIC BUTTERFLY

Per regolare l'imbragatura Dynamic Butterfly modificare la lunghezza delle cinghie che attraversano le fibbie a camma sul retro della base della seduta **A** o della parte superiore dello schienale **B**, oppure regolare la lunghezza di una cinghia delle cinture dell'imbragatura in corrispondenza di uno dei quattro angoli dell'imbragatura stessa **C**.

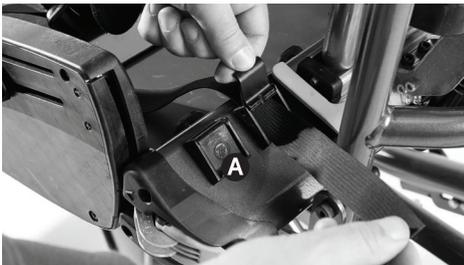

SEZIONE 18.31: REGOLAZIONE DELL'APPOGGIATESTA

Per regolare l'appoggiatesta allentare i bulloni **A**, **B** e **C**. Regolare l'altezza, la profondità e l'angolazione dell'appoggiatesta fino a raggiungere la posizione desiderata. Fissare in posizione serrando i bulloni **A**, **B** e **C**.




SEZIONE 18.32: REGOLAZIONE DELL'ANGOLAZIONE DEL SUPPORTO LATERALE DELL'APPOGGIATESTA

Per regolare l'angolazione dei supporti laterali dell'appoggiatesta aprire la cerniera lampo del rivestimento su entrambi i lati per poter accedere dall'alto al bullone di regolazione. Allentare il bullone **A** e spostare il supporto laterale dell'appoggiatesta fino a raggiungere la posizione desiderata. Fissare in posizione serrando di nuovo il bullone e chiudere la cerniera lampo del rivestimento.



SEZIONE 18.33: REGOLAZIONE DELL'ANGOLAZIONE DEL TAVOLINO

Per regolare l'angolazione del tavolino individuare la leva a camma, **A**, della parte centrale del bracciolo. Sollevarla per sbloccare e modificare l'angolazione del bracciolo/tavolino **B** fino a raggiungere la posizione desiderata. Fissare l'angolazione abbassando la leva a camma in posizione bloccata **C**.

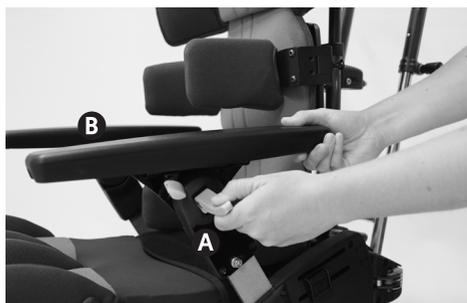

Quando si inserisce il tavolino, fare attenzione a non intrappolare le mani o le braccia del bambino.

Non usare mai il tavolino per far girare o spingere il sistema di seduta.

Non appoggiare sul tavolino oggetti con una temperatura superiore a 40 °C.

Tenere presente che il tavolino è a uso esclusivo del bambino. Non appoggiarsi o depositare sul tavolino oggetti di peso superiore a 8 kg.

SEZIONE 18.34: REGOLAZIONE DELLA POSIZIONE DEI SUPPORTI BLOCCA GOMITI

Per regolare i supporti blocca gomiti allentare i dadi **A** fare scorrere l'imbottitura lungo le scanalature fino a raggiungere la posizione desiderata. Fissare la posizione serrando di nuovo i bulloni.



SEZIONE 18.35: APPLICAZIONE, RIMOZIONE E REGOLAZIONE DELLA CINTURA PELVICA A 4 PUNTI

Per applicare la cintura pelvica a 4 punti fare scorrere la cinghia grigia **attraverso la fessura superiore** della struttura della seduta **A** e, quindi, attraverso la fibbia a camma **B**. Fare scorrere la cinghia nera attraverso la fibbia a camma anteriore **C**. Tirare la cinghia e assicurare le fibbie a camma. Verificare che la cintura sia orientata con l'imbottitura rivolta verso il bambino.



Agganciare la fibbia **D** sul davanti per assicurare il bambino.



Prima di procedere con qualsiasi altra regolazione allacciare sempre la cintura pelvica.

Per rimuovere la cintura pelvica a 4 punti, ripetere la procedura in ordine inverso.



Avvisi di sicurezza: Quando si usa la cintura a 2 punti accertarsi sempre di passare la cinghia nella fessura della struttura della seduta (non sopra la struttura della seduta). Lo stesso vale anche per la cintura pelvica a 4 punti.



SEZIONE 18.36: APPLICAZIONE, RIMOZIONE E REGOLAZIONE DELLA CINTURA A 2 PUNTI

Per applicare la cintura a 2 punti fare scorrere la cinghia grigia attraverso la fessura superiore della struttura della seduta **A** e, quindi, attraverso la fibbia a camma **B**. Tirare la cinghia e assicurare le fibbie a camma. Verificare che la cintura sia orientata con l'imbottitura rivolta verso il bambino.



Agganciare la fibbia **C** sul davanti per assicurare il bambino.



Prima di procedere con qualsiasi altra regolazione allacciare sempre la cintura pelvica.

Per rimuovere la cintura a 2 punti, ripetere la procedura in ordine inverso.



Avvisi di sicurezza: Quando si usa la cintura a 2 punti accertarsi sempre di passare la cinghia nella fessura della struttura della seduta (non sopra la struttura della seduta). Lo stesso vale anche per la cintura pelvica a 4 punti.




SEZIONE 18.37: REGOLAZIONE DELLA CINTURA PELVICA CONTOUR CRADLE

Per regolare la cintura pelvica Contour Cradle modificare la lunghezza delle cinghie che attraversano le fibbie a camma ai lati della base **A** o sul retro della seduta **B**. Oppure, regolare la lunghezza delle cinghie delle cinture anteriori **C** su entrambi i lati.



SEZIONE 18.38: REGOLAZIONE DELLE GUIDE FEMORALI (LARGHEZZA E ANGOLAZIONE)

Per regolare la larghezza e l'angolazione delle guide femorali sollevare la parte anteriore del cuscino della seduta, **A**, per poter accedere ai bulloni **B**. Su una seduta Basic le guide femorali sono applicate solo all'esterno della base della seduta. Una seduta Split, invece, prevede quattro serie di guide femorali. Allentare i bulloni e spostare le guide nella posizione desiderata. Fissare i bulloni per bloccarle in posizione.

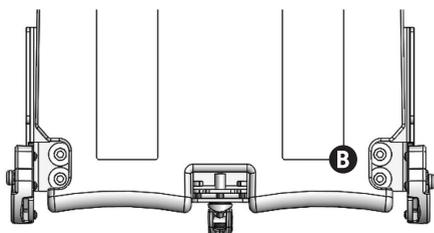


SEZIONE 18.39: REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DELLO SCHIENALE

L'angolazione dello schienale può essere regolata in due modi: con il meccanismo di reclinazione dello schienale o tramite l'interfaccia alla base dello schienale.


Per regolare l'angolazione dello schienale con il meccanismo di reclinazione dello schienale individuare le leve di blocco, **A**, situate nella parte posteriore della seduta. Ruotare simultaneamente verso l'esterno entrambe le leve **B** per liberare il meccanismo di reclinazione e spostare lo schienale nella posizione desiderata. Per fissare la posizione, riportare le leve nella posizione di blocco **A**.




Per regolare l'angolazione dello schienale tramite l'interfaccia che lo collega alla seduta posta alla base dello schienale, individuare il bullone **D** presente sull'interfaccia.

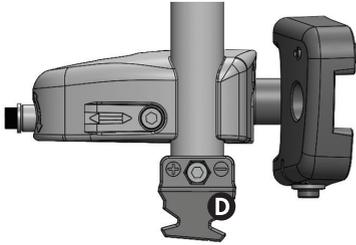

Rimuovere completamente il bullone, separare il componente di interfaccia **E**, e i cappellotti terminali **F** dai montanti verticali e ruotarlo di 180°. Reinserrare i montanti verticali nell'interfaccia e i cappellotti terminali **G** e inserire di nuovo il bullone. Fissare in posizione serrando di nuovo il bullone con il dado.

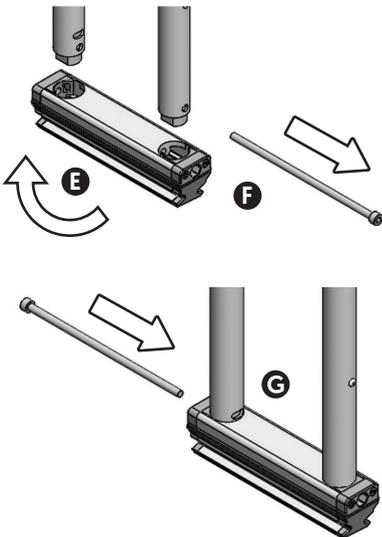

Il meccanismo di reclinazione dello schienale prevede sei posizioni, con incrementi di 5°, segnalate da indicatori grafici **H** riportati sul lato della seduta. L'interfaccia dello schienale prevede invece due posizioni, con incrementi di 5°, segnalati dagli elementi grafici **I** riportati sul fianco dei cappellotti terminali dell'interfaccia. Da +10° a -15°.

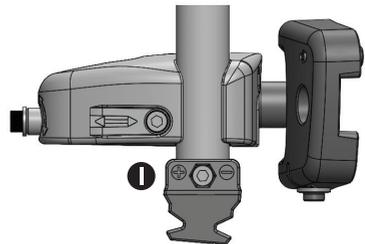

I gradi di angolazione qui riportati si possono ottenere con le combinazioni seguenti.

Meccanismo di reclinazione dello schienale.	Interfaccia dello schienale (simbolo rivolto in avanti)	Angolo seduta-schienale (°)	Range di reclinazione (°)
		90	0 -25
		90	+10 -15

SEZIONE 18.40: REGOLAZIONE DELLA RESISTENZA DINAMICA DELLO SCHIENALE

La resistenza viene impostata modificando la pressione dell'aria in base al peso del bambino, alla posizione di seduta, al design della seduta e alle preferenze personali del bambino.

La pressione dell'aria viene regolata da una pompa pneumatica **A** (fornita con lo schienale dinamico) applicata alla valvola dell'aria principale del sistema dinamico **B**.



Per aumentare la pressione dell'aria pompare aria nella valvola fino al raggiungimento della pressione desiderata. Per diminuire la pressione premere la valvola di sfiato dell'aria sulla pompa fino a raggiungere la pressione desiderata.



Avvertenza: Il range di pressione va da 50 a 250 psi [3,45-17,24 bar]. In un sistema di ammortizzazione non compresso, non superare mai la pressione di 250 psi [17,24 bar]. Il superamento della pressione massima dell'aria oltre 250 psi [17,24 bar] potrebbe provocare lesioni gravi.



Distributore per l'Italia

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 - Montale
29100 Piacenza - Italia

Tel.: +39 0523 573111

Fax: +39 0523 570060

e-mail: info@sunrisemedical.it

Per l'elenco completo dei distributori Leckey
accedere a leckey.com.



James Leckey Design Limited
19 Ballinderry Road
Lisburn, BT28 2SA
Irlanda del Nord

leckey.com

{+44} 28 9260 0750

hello@leckey.com

