

Nabtesco

Speed Control- **CONPAL** Enh

Bruksanvisning

NCB-8C-SR



[För brukare]

1	Säkerhetsföreskrifter för brukare	3
1.1	Försiktighetsåtgärder	3
1.2	Före användning	3
1.3	Platser (situationer)	4
1.4	Under användning	4
1.5	Vid reparation och kontroll	5
1.6	Vid lagring	5
2	Enhetsfunktioner och komponentnamn	6
2.1	Enhetsfunktioner	6
2.2	Komponentnamn	7
3	Dagliga inspektioner och skötsel	8
3.1	Kontrollera när däck ska bytas	8
3.2	Dagliga inspektioner	9
3.3	Skötsel och rengöring	10
4	Om du hittar en avvikelse	11
4.1	Om du hittar en avvikelse under användning	11
5	Specifikationer	11
5.1	Produktspecifikationer	11
6	Information för distributörer	12
6.1	Varningar och försiktighetsåtgärder	12
6.2	Installation av produkten på rollatorn	12
6.3	Justering av bromskraften	14
6.4	Byte av däck	16
7	Garanti och service efter försäljning	20
7.1	Garantivillkor	20
7.2	Friskrivning	20
7.3	Försiktighetsåtgärder	20

Den här bruksanvisningen beskriver CONPAL-enheten (Speed Control-enheten). Bruksanvisningen beskriver inte varningar, försiktighetsåtgärder eller liknande relaterade till själva rollatorn. Förbered en separat bruksanvisning för den rollator som CONPAL-enheten ska installeras på när produkten ska levereras till brukaren.

Den första halvan (sidorna 3-11) i den här bruksanvisningen är avsedd för brukaren och den andra halvan (sidorna 12-21) är för distributören.

Den första halvan för brukaren beskriver information som vi vill att du ska vidarebefordra till brukaren. Vi ber dig att inkludera informationen i bruksanvisningen till rollatorhuvuddelen och se till att vidarebefordra informationen till brukaren.

[För brukare]

1 Säkerhetsföreskrifter för brukare

1.1 Försiktighetsåtgärder

För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten bör du läsa den här bruksanvisningen och förstå alla varningar och försiktighetsåtgärder som rör produkthantering, produktfunktioner och liknande.

Nedanstående säkerhetssymboler används för att varna dig för potentiella risker vid hantering av produkten.

	VARNING	Anger att felaktig hantering kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada .
	VIKTIGT	Anger att felaktig hantering kan orsaka skada och/eller egendomsskada .

1.2 Före användning

VARNING

- Ta inte bort CONPAL-enheten för att installera den på en annan rollator eller enhet. Om du gör det kan det orsaka en oväntad olycka.
- Använd inte produkten om den tappats eller inte fungerar som den ska eller om den avger ett onormalt ljud efter installationen. Användning av produkten under sådana förhållanden kan orsaka en oväntad olycka.
- Använd inte produkten om några skruvar eller muttrar är lösa.
Lös skruvar eller muttrar kan göra att delarna lossnar, vilket kan leda till att de faller av.
- Ta inte isär eller modifiera produkten.
Om översyn krävs, se till att kontakta din Hjälpmedelscentral eller distributör.
- Smörj inte CONPAL-enheten med fett eller olja.
Om du gör det kan bromskraften bli otillräcklig, vilket kan leda till fall.
- Innan du använder produkten ska du se till att bromsarna aktiveras automatiskt.
Om du inte gör det kan det orsaka ett oväntat fall.
- Innan du använder produkten ska du bekräfta uppgifter om dagliga inspektioner (sidan 9).
Om en avvikelse upptäcks ska du omedelbart sluta använda produkten och kontakta din Hjälpmedelscentral eller återförsäljare.

VIKTIGT

- Kontrollera om en något är intrasslat i CONPAL-enheten.
Om så är fallet tar du bort det från CONPAL-enheten innan du använder den samtidigt som du ser till att du inte klämmer fingrarna.
- Innan du använder produkten ska du kontrollera dina fysiska förhållanden för att säkerställa säker användning.
En oväntad olycka som t.ex. fall kan inträffa, beroende på dina fysiska förhållanden.
- Lyft inte huvudenheten (rollatorn) i CONPAL-enheten.
Om du gör det kan fingrarna klämmas mellan CONPAL-enheten och ramen, vilket kan leda till personskador.

1.3 Platser (situationer)



VARNING

Använd inte produkten på följande platser.

- Snöiga ytor
- Isiga ytor
- Rulltrappor
- Branta sluttningar
- Hala underlag



VIKTIGT

Använd produkten försiktigt på följande platser och i följande situationer.

- Sluttningar
- Trafikerade gator
- över mellanrum, höga steg, trottoarkanter
- och ojämna ytor
- Sandlåda
- Trånga platser
- Lera och pölar
- På natten
- Mörka platser där du inte kan se dina fotspår

1.4 Under användning



VARNING

- Gå med rollatorn medan du ser till att CONPAL-enheten inte fastnar i en skåra eller ränna, såsom ett spår vid en järnvägs korsning, en skåra i en rulltrappa eller en ränna vid en hiss. Ett hjul som fastnat kan orsaka fall.
- Se till att du använder produkten med mittkåpan installerad. Om smuts eller vatten tränger in kommer den förutbestämda bromskraften inte att uppnås, vilket resulterar i fall. Om mittkåpan lossnar, kontakta din hjälpmedelscentral eller distributör.
- Försök inte justera bromskraften. Om bromsverkan behöver justeras, kontakta din hjälpmedelscentral eller distributör, bromskraft som inte matchar din fysiska aktivitetsnivå kan orsaka ett oväntat fall.
- Rengör ytan på CONPAL-enheten före användning.
Om den är smutsig kan handbromsens prestanda försämrast.
- Dra/släp inte CONPAL-enheten samtidigt som du använder bromsarna.

1.5 Vid reparation och kontroll

VARNING

- Lossa, ta isär eller modifiera inte delar som är anslutna med bultar och muttrar. Om översyn krävs, se till att kontakta din hjälpmedelscentral eller distributör.

VIKTIGT

- Ta inte bort mittkåpan. Om smuts eller vatten tränger in kommer den förutbestämda bromskraften inte att uppnås, vilket resulterar i fall.
- Vid byte av däck, byt ut vänster och höger däck samtidigt. Byte av endast ett däck resulterar i ojämnbromskraft mellan vänster och höger.
- Smörj inte CONPAL-enheten med fett eller olja. Om du gör det kan bromskraften bli otillräcklig, vilket kan leda till fall.

1.6 Vid lagring

Förvara produkten inomhus.

Torka av fukt innan förvaring. Om du inte gör det kan det orsaka rost.

VARNING

- Förvara inte produkten på en plats där den utsätts för vatten, vind eller regn. Om du gör det kan det orsaka funktionsfel och/eller fel på enheten, vilket kan leda till en olycka.
- Om vatten kommer in i produkten, testa bromsarna på en säker plats genom att bromsa fem eller sex gånger för att kontrollera att bromsarna fungerar.
Om bromsarna inte fungerar upprepar du testet tills bromsarna fungerar och använder sedan produkten.
- Förvara inte produkten i bagageutrymmet på en bil eller någon plats som når höga temperaturer. Om du gör det kan det orsaka funktionsfel och/eller fel på enheten, vilket kan leda till en olycka.

VIKTIGT

- Lyft inte huvudenheten (rollatorn) i CONPAL-enheten.
Om du gör det kan fingrarna klämmas mellan CONPAL-enheten och ramen, vilket kan leda till personskador.



2 Enhetsfunktioner och komponentnamn

2.1 Enhetsfunktioner

När CONPAL-enheten (Speed Control-enheten) är installerad på en rollator aktiveras bromsarna automatiskt vid plötslig acceleration, vilket förhindrar fall när du använder rollatorn.

Till skillnad från ett vanligt bromssystem aktiverar CONPAL-enheten bromsarna endast vid plötsliga accelerationer, vilket gör det möjligt för brukaren att gå smidigt utan att bromsarna används under normal gång.

CONPAL-enheten (Speed Control-enheten) är ett bromssystem som kan bromsa accelerationen. Den kan inte stoppa rollatorn helt. Var försiktig eftersom du kan falla när du går för långt bakom rollatorn och förlorar greppet.

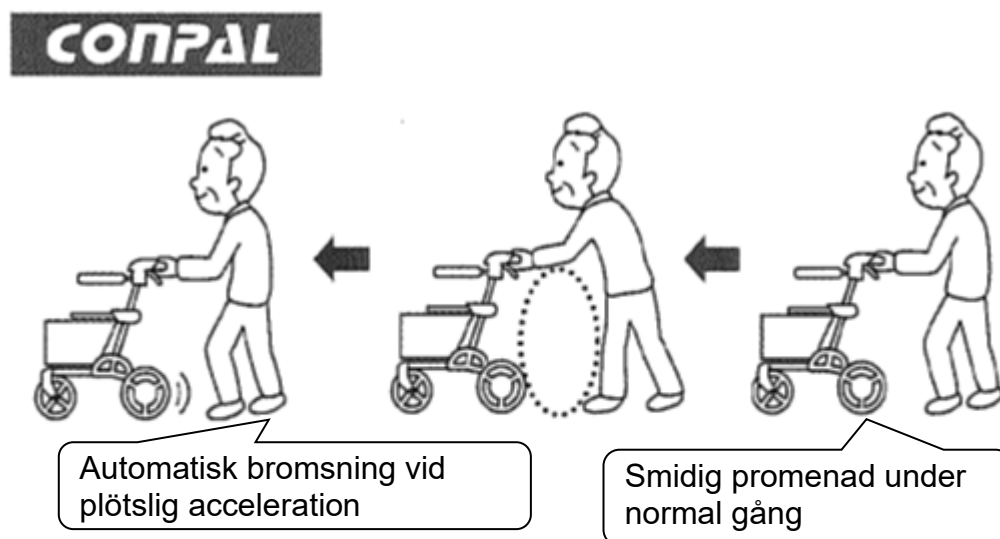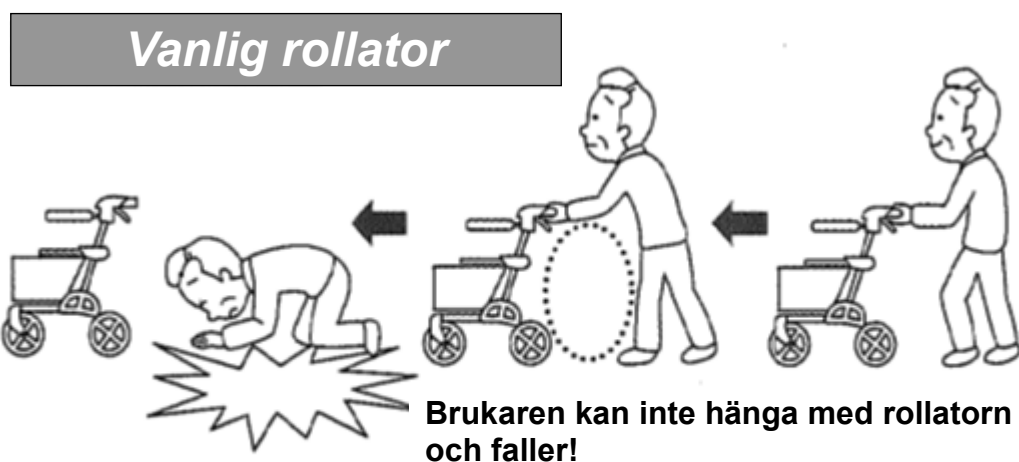

Bromsarna aktiveras endast vid plötsliga accelerationer, vilket förhindrar fall!

2.2 Komponentnamn



Yttre vy



Inre vy

Nr	Namn	Anmärkningar
1	Mittkåpa	
2	Däck	
3	Hjul (yttre)	
4	Hjul (inre)	
5	Hjulmonteringsbult	3 delar (M8 x 25)
6	Adapter	
7	Bussning	
8	Fästmutter till huvuddel	(Kapselmutter, M8)

3 Dagliga inspektioner och skötsel

3.1 Kontrollera när däckerna ska bytas

Kontrollera att däckerna inte är slitna och fundera på om de ska bytas ut.

Varje däck har spår på gummiytan enligt figuren till höger. (på tre ställen)

Om något av dessa spår är slitet ner till en plan yta, behöver däcket bytas ut.

Sluta omedelbart använda produkten och kontakta din hjälpmedelscentral eller återförsäljare.

Om spåren på dina däck slits ned inom två eller tre månader (för tidigt slitage) kan det ha orsakats av att du drar/släpar CONPAL-enheten. Vidta de korrigerande åtgärderna nedan för att lösa problemet.

Korrigerande åtgärder

Om däckerna är slitna i förtid

- Justering av bromskraft
Bromskraften kan vara för hög. Minska bromskraften något samtidigt som säkerheten bibehålls.
Om bromsverkan behöver justeras, **kontakta din hjälpmedelscentral eller distributör.**
 - Långsam gång
När du går snabbare, är däckerna mer benägna att släppa från underlaget.
Det rekommenderas att gå på en betong- eller asfaltstrottoar med en hastighet av 3,5 km per timme.
Gå mycket långsamt på ojämna ytor som kullersten.
- Obs: Gånghastighet på 3,5 km per timme motsvarar en gånghastighet på ca 1 m per sekund.**
- Periodisk inspektion
Om en avvikelse upptäcks **ska du omedelbart sluta använda produkten och kontakta din hjälpmedelscentral eller distributör.**
Även om det inte finns något onormalt rekommenderar vi att produkten inspekteras en gång om året.

Fig. 2



VIKTIGT

- **Byt ut vänster och höger däck samtidigt.**
Byte av endast ett däck resulterar i ojämnbromskraft mellan vänster och höger

3.2 Dagliga inspektioner

VARNING

- Om en avvikelse upptäcks under inspektion ska du omedelbart sluta använda produkten och kontakta din hjälpmedelscentral eller distributör.
Om du använder produkten när det finns en onormal funktion kan det orsaka en olycka, till exempel fall.
- För att säkerställa säker användning av produkten, utför daglig inspektion och låt även produkten inspekteras en gång om året.
Om någon av förbrukningsdelarna är utslitna, byt ut oavsett användningstiden.
- Om du inte utför inspektion eller använder slitna delar kan det orsaka en oväntad olycka eller fel på enheten.

VIKTIGT

- Lossa, ta isär eller modifiera inte delar som är anslutna med bultar och muttrar. Om översyn krävs, se till att kontakta din hjälpmedelscentral eller distributör.
- Håll inte vatten över produkten när du rengör den. Torka av produkten med en fuktig trasa.
- Smörj inte CONPAL-enheten med fett eller olja.
Om du gör det kan bromskraften bli otillräcklig, vilket kan leda till fall.
- Använd inte tvålatten eller oljebaserade rengöringsmedel för att rengöra produkten.
Om du gör det kan vätska tränga in i produkten eller fästa på däckytorna, vilket kan leda till att den faller på grund av otillräcklig bromskraft.

Genom att utföra inspektioner med jämna mellanrum säkerställs ökad säkerhet vid användning av produkten.

Grundläggande inspektionsuppgifter

Kontrollera följande:

- Sprickor eller deformationer i däcken eller inner-/ytterhjul
- Slitna spår på däcken (ett tecken på byte)
- Bromsprestanda
- Onormalt ljud, t.ex. gnissel-/gnidljud, som uppstår när CONPAL-enheten används
- Kraftig skakning/vibration som uppstår vid användning av CONPAL-enheten
- Lösa fästmuttrar till huvuddel
- Lös mittkåpa
- Vinkelhake för inställning av CONPAL-enheten (inte lutande)

3.3 Skötsel och rengöring

VARNING

- Om vatten kommer in i CONPAL-enheten följer du stegen nedan.
 1. Kör snabbt produkten fram och tillbaka fem eller sex gånger.
 2. Kontrollera att bromsarna aktiveras automatiskt.

VIKTIGT

- Håll inte vatten över produkten när du rengör den. Torka av produkten med en fuktig trasa.
- Smörj inte CONPAL-enheten med fett eller olja.
Om du gör det kan bromskraften bli otillräcklig, vilket kan leda till fall.
- Använd inte tvålatten eller oljebaserade rengöringsmedel för att rengöra produkten.
- Vätska som tränger in i CINPAL-enheten eller fäster på dess yta kan orsaka otillräcklig bromskraft, vilket kan leda till fall.

4 Om du hittar en avvikelse

4.1 Om du hittar en avvikelse under användning

VARNING

- Använd inte produkten om något onormalt upptäckts.
- Om du upptäcker något onormalt när du använder produkten ska du omedelbart sluta använda den och kontakta din hjälpmedelscentral eller distributör.
- Ta inte isär eller modifiera produkten. Om översyn krävs, se till att kontakta din hjälpmedelscentral eller distributör.
- Smörj inte CONPAL-enheten med fett eller olja. Om du gör det kan bromskraften bli otillräcklig, vilket kan leda till fall.

Utför undersökningar enligt varje villkor, enligt beskrivningarna nedan. Om felet kvarstår kontaktar du din hjälpmedelscentral eller distributör.

Problem	Undersökning	Åtgärd
CONPAL-enheten förblir låst.	Är rollatorns parkeringsbroms fortfarande aktiverad?	• Lossa rollatorns parkeringsbroms.
	-	• Sluta omedelbart använda produkten och kontakta din hjälpmedelscentral eller distributör.
Bromsarna fungerar inte bra eller bromsverkan skiljer sig åt mellan vänster och höger.	-	• Sluta omedelbart använda produkten och kontakta din hjälpmedelscentral eller distributör.
Produkten avger ett onormalt ljud.*	Har något fastnat i hjulaxeln?	• Ta bort eventuella föremål som fastnat. • Om felet kvarstår kontaktar du din hjälpmedelscentral eller distributör.
CONPAL-enheten skakar/vibrerar mycket.	Är en bult eller mutter lös?	• Sluta omedelbart använda produkten och kontakta din hjälpmedelscentral eller distributör.

* Bromsens vanliga ljud:
Denna bromsmekanism är en friktionsmekanism och ger därmed ett lätt gnisslande/gnidande ljud.
Ljudet förändras beroende på miljön, till exempel atmosfärens temperatur, luftfuktighet etc.

5 Specifikationer

5.1 Produktspecifikationer

Dimensioner	Yttre hjuldiameter 200 mm, hjulbredd: 35 mm
Vikt	1,2 kg (exklusive insexnyckel för justeringar)
Max brukarvikt	100 kg (inklusive lastade föremål, t.ex. påsar)
Bromskraft	1,5 km/h eller lägre (konvergenshastighet vid 8 graders fri nedstigning)
Hastighetsjustering	3 nivåer

* För förbättringsändamål kan informationen, specifikationerna och liknande som beskrivs i den här bruksanvisningen ändras utan föregående meddelande.

[För distributörer]

Den första halvan av den här bruksanvisningen beskriver information för brukare. Se till att läsa den informationen tillsammans med den information som beskrivs för distributörer.

6 Information för distributörer

6.1 Varningar och försiktighetsåtgärder

VARNING

- Dra åt bultarna ordentligt. Annars kommer CONPAL-enheten att lösgöras, vilket kan leda till att brukaren faller.
- Kontrollera att stoppet är säkrat i det förutbestämda läget. Om du inte gör det kan det leda till att hjulen kopplas ur, vilket kan leda till att brukaren faller.
- Justera bromskraften enligt brukarens fysiska aktivitetsnivå.
Bromskraft som inte matchar brukarens fysiska aktivitetsnivå kan orsaka ett oväntat fall.
- För inte in fingrarna i justeringsfönstret. Om du gör det kan det leda till personskador.

VIKTIGT

- Se till att produkten är installerad i rätt riktning.
- Försök inte justera bromskraften bortom tillåtet intervall. Om du gör det kan bromsen skadas.
- När justeringen är klar tar du bort insexnyckeln. Förvara den på en säker plats för framtida användning.

6.2 Installation av produkten på rollatorn

VARNING

- Stryk på gänglåsvalska på huvudhusets fästmuttrar och dra åt dem till föreskrivet moment.
Otillräcklig åtdragning kan orsaka spel i installationsområdet eller frångkoppling av CONPAL-enheten, vilket kan leda till att brukaren faller.
- Sätt i adaptern på CONPAL-enheten ordentligt i rollatorns indragna sektioner.
Otillräcklig installation kan orsaka glapp i installationsområdet eller frångkoppling av CONPAL-enheten, vilket kan leda till att brukaren faller.
- Ta inte bort CONPAL-enheten för att installera den på en annan rollator eller enhet. Om du gör det kan det orsaka en oväntad olycka.
- Använd inte produkten om den tappats, inte fungerar som den ska eller om den avger ett onormalt ljud.
Om du gör det kan det orsaka en oväntad olycka.

VIKTIGT

- Se till att produkten är installerad i rätt riktning. Om du inte gör det kan det leda till att bromsarna kopplas ur, vilket kan leda till att brukaren faller.

- (1) Kontrollera de vänstra/högra identifieringsmärkena på de inre hjulen för monteringsorientering. (Fig. 3)
(Installationsorienteringen kan också kontrolleras med identifieringsnumren inuti mittkåpan.) (Fig. 4))
- (2) För in bussningen från ramens insida. (Fig. 3)
- (3) Sätt i adaptern på CONPAL-enheten ordentligt i rollatorns indragna sektioner från utsidan.
(Fig. 5)
- (4) Stryk på Loctite 243 (eller 248) på gängorna på en ny mutter för montering av huvuddelen. Montera muttern på axeln som sticker ut från rollatorn inuti och dra åt den till föreskrivet moment (15 ± 10 % Nm).
- (5) Torka bort överflödigt Loctite.

Fig. 3


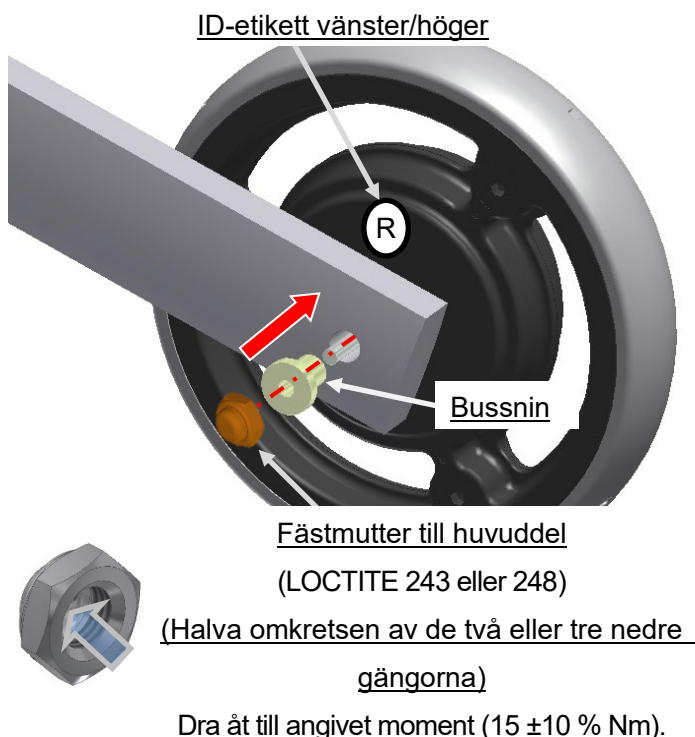


Fig. 4

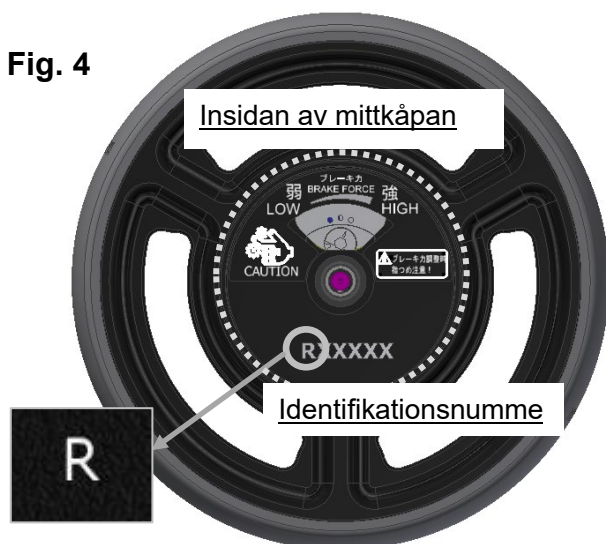

Teckenkod och installationsorientering

Om H (R):

Montera på "höger" (right) sett från baksidan av rollatorn.

Om V (L):

Montera på "vänster" (left), sett från baksidan av rollatom.

Installationsexempel: Fig. 3

Montera på "höger" (right) sett från baksidan av rollatorn.



VIKTIGT


Stryk på Loctite på mutterns gängor och fördela jämnt. Loctite som appliceras på mutterns främre ände kommer att sippra ut, vilket resulterar i dålig anti-lossande prestanda.

Sätt i adaptorn i de
indragna sektionerna.

Obs:

Ramen och cirkeln i figuren är endast avsedda som referens och kan skilja sig från de faktiska formerna.

Fig. 5

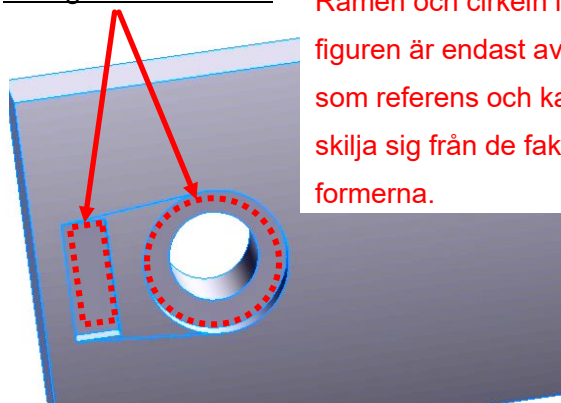

! VARNING

Återanvänd inte muttrarna för montering av huvuddelen.
Använd nya muttrar.
Använd endast särskilda muttrar.
Om du inte gör det kan CONPAL-enheten stängas av.

6.3 Justering av bromskraften

⚠ VARNING

- För inte in fingrarna i justeringsfönstret. Om du gör det kan det leda till personskador.
- När justeringen är klar, se till att sätta tillbaka mittkåpan. Om du inte gör det kan damm eller vatten tränga in, vilket kan leda till funktionsfel.
- Hjälpmedelscentralen, distributören eller fysioterapeuten måste justera bromskraften enligt brukarens fysiska aktivitetsnivå. Bromskraft som inte matchar brukarens fysiska aktivitetsnivå kan orsaka ett oväntat fall.

⚠ VIKTIGT

- Ta bort mittkåpan med hjälp av ett mynt eller en spårskruvmejsel. Använd inte naglarna som verktyg. Om du gör det kan det leda till personskador.
- Det finns tre justeringsnivåer. Om justeraren vrids för hårt skadas justeraren. Försiktighet krävs.
- Vrid inte CANPAL-enheten med insexnyckeln isatt. Om du gör det kan justeraren skadas.
- Ställ in vänster och höger bromskraft på samma nivå. Ojämn bromskraft kan orsaka oväntade fall.

- (1) Ta bort mittkåpan med CONPAL-enheten fortfarande installerad på rollatorn. (Fig. 9)
- (2) Vrid på CONPAL-enheten och rikta in justeringsfönstret och justeraren. (Fig. 10)
- (3) Sätt i den medföljande insexnyckeln i justerarens sexkantiga hål.
- (4) Justera bromskraften genom att vrida insexnyckeln och ställa in pilen på justerare till önskat läge. (Fig. 10)
För respektive inställningsläge för låga, medelhöga och höga bromskrafter, se figur 11-13.
- (5) När justeringen är klar tar du bort insexnyckeln och sätter tillbaka mittkåpan.
- (6) Kontrollera att samma nivå av bromskraft används på vänster och höger sida.

Fig. 9


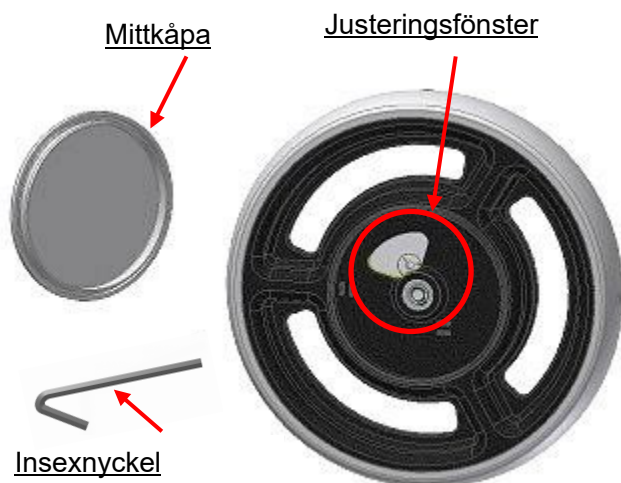



Fig. 10

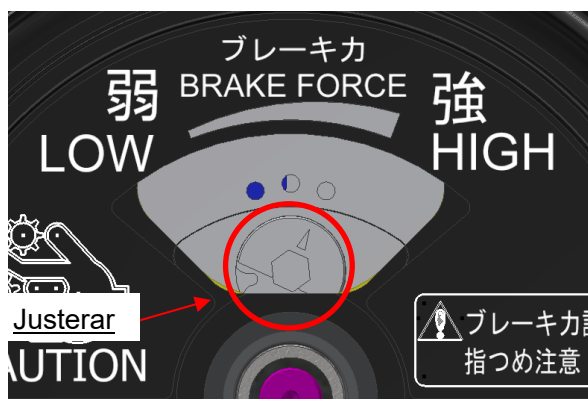

⚠ VIKTIGT

- Justeringsmekanismen kan skadas om du vrider insexnyckeln med ett för stort vridmoment utanför inställningsområdet. Därför är insexnyckeln böjd avsiktligt så att endast det längre benet kan sättas in.
- När du använder en egen insexnyckel sätter du in dess längre ben i justeringshålet och vrider den för att justera bromskraften inom det tillåtna intervallet.


Fig. 11

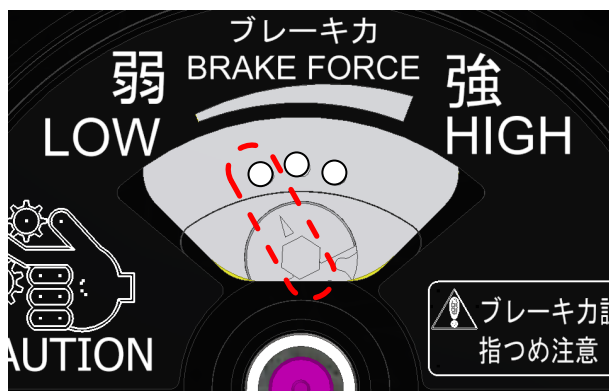

Bromskraft: Låg

(Gånghastighet: 2,5 till 3,5 km/h)


Fig. 12

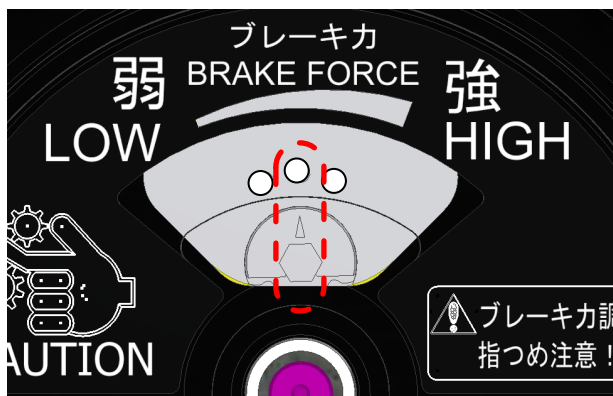

Bromskraft: Medelhögt

(Gånghastighet: 1,5 till 2,5 km/h)

Fig. 13

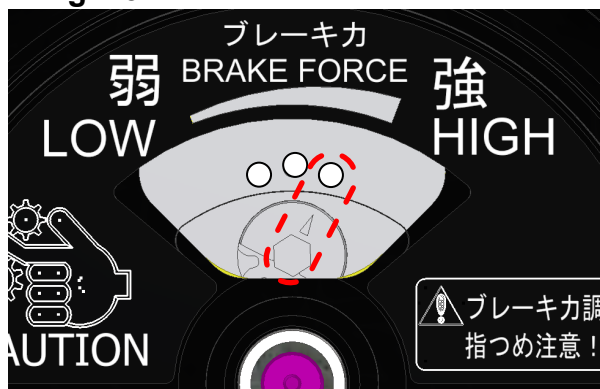

Bromskraft: Hög

(Gånghastighet: Upp till 1,5 km/h)

⚠ VARNING

- Dra/släp inte CONPAL-enheten samtidigt som du använder bromsarna. Om du gör det kan det orsaka ett oväntat funktionsfel på enheten, vilket kan leda till en olycka.
Om det uppstår en oväntad skada ändrar du bromsinställningarna eller går långsamt. (Se sidan 8.)

6.4 Byte av däck

VARNING

- För inte in fingrarna i justeringsfönstret när du byter däck. Om du gör det kan det leda till personskador. Ta inte isär andra sektioner. Om du gör det kan bromsen sluta fungera, vilket kan leda till en allvarlig olycka.
- Kontrollera alltid att bromsarna fungerar före användning efter däckbyte.


VIKTIGT

- Dra åt hjulbultarna ordentligt. Otillräcklig åtdragning kan orsaka glapp i monteringsområdet eller att däckets kopplas ur.

Byte av däck(1)

- (1) Med CONPAL-enheten monterad på rollatorn, lossa de tre hjulmonteringsbultarna och ta bort det yttre hjulet och däck. (Fig. 14)
- (2) Montera ett nytt däck samtidigt som du riktar in däckets korrekt i fälgens skåror. (Fig. 15)
- (3) Montera det yttre hjulet samtidigt som det riktas in mot det inre hjulet.
- (4) Dra åt de tre nya hjulmonteringsbultarna som medföljer utbytesdäcket till föreskrivet moment ($6 \pm 10 \%$ Nm).
- (5) Kontrollera att bromsarna på vänster och höger CONPAL-enheter fungerar.


Fig. 14

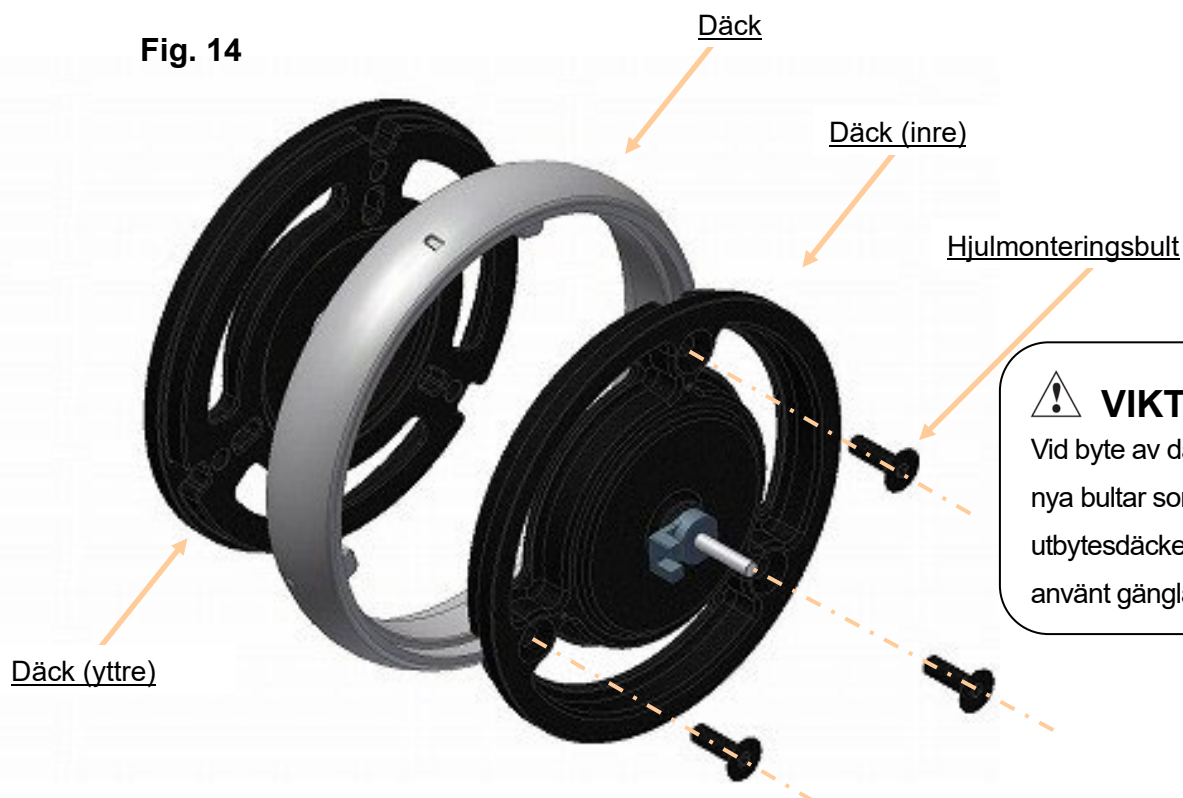

VIKTIGT

Vid byte av däck, använd nya bultar som medföljer utbytesdäcket när du har använt gänglåsning.

Fig. 15

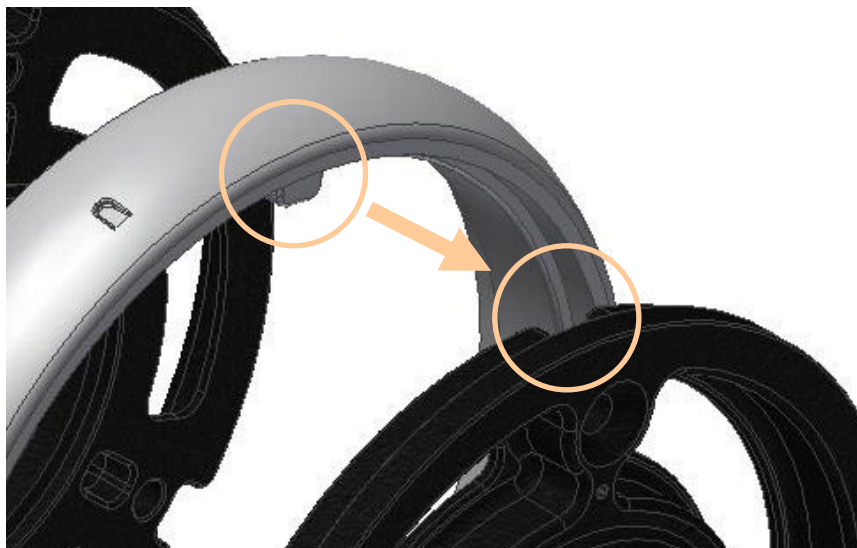

Byte av däck (2)

⚠ VARNING

- Se till att byta ut däck mot den CONPAL-enhet som är installerad på ramen. Annars faller delarna av och orsakar funktionsfel.

⚠ VIKTIGT

- När du byter däck ska du vara försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan bromsbelägget och CONPAL-enheten.
Var också noga med att inte få fingrarna klämda mellan ramen och CONPAL-enheten.

(1) Lyft däck från hjulet. (Fig. 16)

(2) När du lyfter upp utsprånget inne i däck vrider du hjulet och tar endast bort däck från hjulet. (Fig. 17, 18)

(3) Rikta in det nya däck i fälgens skåror (Fig. 19). Roter hjulet på liknande sätt som vid borttagningen och montera däck i hjulet. (Fig. 20)

Obs: Med hjälp av en spatel eller ett liknande verktyg kan du enkelt ta bort och montera däck.

(4) Kontrollera att däck sitter tätt i hjulet. (Fig. 21-24)

(5) När installationen är klar kontrollerar du att bromsen fungerar.

Fig. 16



Däcket passar i de tre fördjupningarna på fälgen.



Fig. 17



Obs! Med hjälp av en spatel eller ett liknande verktyg kan du enkelt ta bort och montera däcket.

Fig. 18



Dra däcket utåt för att ta bort det från hjulet.

Fig. 19




Fig. 20



VIKTIGT

Passa in det nya däcket i fälgens urtag och montera däcket på hjulet (på tre ställen).

- Sidovy

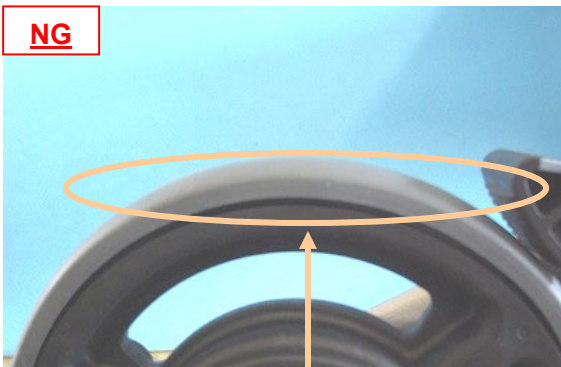Fig. 21**OK****Fig. 22****NG**

Det finns ett mellanrum mellan däcket och hjulet.

- Vy ovanifrån

Fig. 23**OK****Fig. 24****NG**

Däckets sidovägg är inte i jämnhöjd med hjulet.

7 Garanti och service efter försäljning

7.1 Garantivillkor

Garantiperioden för en ny produkt och produkten som repareras och installeras av Nabtesco ska fastställas beroende på relevanta avtal.

Om ett fel uppstår vid normal användning under garantiperioden kommer produkten att repareras kostnadsfritt.

Den här garantin täcker inte följande händelser, även inom garantiperioden.

- a. Fel orsakade av felaktig hantering
- b. Fel eller skador som orsakas av att produkten faller ned, eller belastning eller påverkan på produkten
- c. Fel som orsakas av felaktigt underhåll
- d. Fel som orsakas av demontering eller modifiering av produkten
- e. Fel eller skador orsakade av användning av icke-specifika delar
- f. Fel eller skador orsakade av force majeure (naturkatastrof)
- g. Fel eller skador orsakade av slitna eller skadade delar
- h. Fel som orsakas av användning under förhållanden som överskrider gränsen

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
7.2 Friskrivning

- Nabtesco Corporation ansvarar INTE för eventuella oförutsedda skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till skador på produkten, dödsfall, personskador eller andra skador på egendom som orsakats på grund av oaktsamhet att läsa säkerhetsinstruktionerna i denna bruksanvisning eller allmänna säkerhetsregler.


7.3 Försiktighetsåtgärder

- Läs och förstå alla varningar och försiktighetsåtgärder i den här handboken innan du använder produkten och följ alla instruktioner.
- Nabtesco Corporation ansvarar inte för olyckor som orsakas av en plötslig förändring av användarens fysiska tillstånd, användarens omständigheter eller missbruk.
- Nabtesco Corporation är inte ansvarigt för eventuella fel eller oförutsedda förluster eller följdskador.
- I grund och botten kommer vi inte att kunna erbjuda någon form av ersättning eller återbetalning när du har använt den.


[PM]



[PM]

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

[PM]

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

Nabtesco

Tillverkad av:

Assistive Products Department

Nabtesco Corporation

Service Center

35 Uozakihamamachi, Higashinada-ku,

Kobe, Hyogo 658-0024

TEL: +81-78-413-2724, FAX: +81-78-413-2725

URL: <http://welfare.nabtesco.com>

* För förbättringsändamål kan informationen, specifikationerna och liknande som beskrivs i den här bruksanvisningen ändras utan föregående meddelande.

Nabtesco Corporation