

Nytt armlene på gammel Nova



Beskrivelse	Art.nr.
Armlene stol oppreis Nova 20/30 stoff skiffergrå hø	12775015
Armlene stol oppreis Nova 20/30 stoff skiffergrå ve	12775016
Armlene stol oppreis Nova 20/30 hud sort hø	12785015
Armlene stol oppreis Nova 20/30 hud sort ve	12785016

Start med å demontere utløsermekanismen fra armlenestålet på det gamle armlenet/de gamle armlenearmlene. Demonter plasthåndtaket. Ta vare på skruer og mutrer.



Bruk en skarp tapetkniv og gjør et snitt inne i knappehullet.
Vær nøye så du ikke skjærer på utsiden av sømmen,
da vil stoffet begynne å rakne.



Etter at du har laget snittet trer du utløsermekanismen inn under trekket fra undersiden.



Tre utløserhendelen ut gjennom
snittet du laget i trekket.



Skru fast utløsermekanismen til armlenestålet og
plasthåndtaket til utløserhendelen.



Monter armlenet på Nova stolen.





Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no