



ATTITUDE JUNIOR

ENTDECKE DEINE WELT

FÜR KLEINE ENTDECKER

ERKUNDE DEINE WELT, ERLEBE
ABENTEUER, GENIESSE DIE FREIHEIT
SELBSTSTÄNDIG ZU SEIN.

Mit Freunden unterwegs zum Spielplatz, selbständig zur Schule fahren oder Ausflüge mit der Familie machen. Mit dem ATTITUDE Junior können Kinder und Jugendliche ihrem Wunsch nach Bewegung und Freiheit gerecht werden.

// Empulse Attitude Junior
mit Zippie Youngster 3

ATTITUDE
Junior

BIKEN IST IDEAL FÜR KINDER

- Es gehört zur natürlichen Entwicklung beim Heranwachsen
- Mehr Selbstbewusstsein durch Partizipation und Unabhängigkeit
- Fördert die Entwicklung von Koordination und Körperbewusstsein
- Stärkt das Herz-Kreislauf-System




AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS...

Einfach selbstständig. Mit dem einfachen Andockmechanismus wird das ATTITUDE in Sekundenschnelle an einen Rollstuhl an- und abgedockt. Ideal für Entdecker, die schnell die Welt erobern wollen.



Nach dem Andocken verbleiben nur zwei kleine Pins (170 g) am Rollstuhl.

Der Andockmechanismus ist unkompliziert, rastet einfach und sicher an der Vorderseite des Rollstuhls ein – ohne zusätzliche Teile oder unpraktische Kabel, die die Beinfreiheit einschränken.

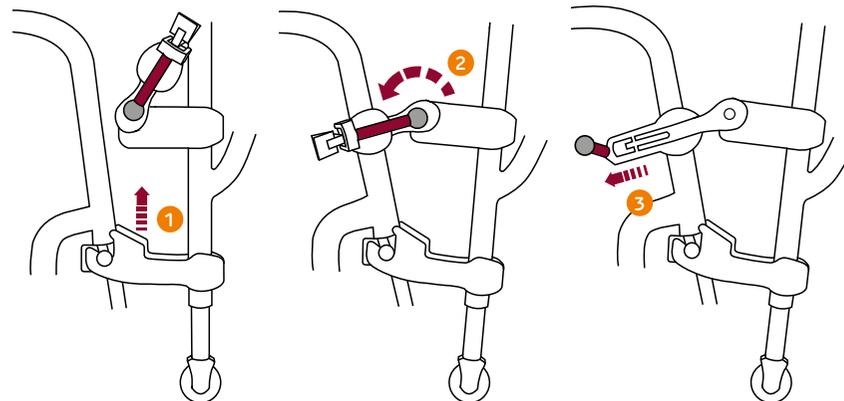

- 1 Die untere Halterung in die Pins einrasten lassen.
- 2 Das Attitude am Handgriff etwas von sich wegdrücken und die oberen Klemmen nach unten schwenken.
- 3 Die Verbindung arretieren indem man den Hebel zieht.

EIN TEAM, DAS ZUSAMMEN WÄCHST

Gemeinsam unterwegs – gemeinsam wachsen. Ein andockbares Bike, das mitwächst und sich den individuellen Bedürfnissen anpasst. Das ATTITUDE Junior ist das jüngste Mitglied unserer Bike-Familie und für Kinder ab einer Körpergröße von 120 cm geeignet. Sowohl Kurbelposition als auch Kurbellänge sind mit wenigen Handgriffen einstellbar – unerlässlich für ergonomisches Kurbeln und Freude am Biken.



EINFACH KINDGERECHT

Die horizontalen Griffe sorgen für eine ergonomische Handposition. Die 8-Gang-Nabenschaltung mit Drehgriffschalter und die integrierte Rücktrittbremse sind intuitiv zu bedienen und bieten ein Höchstmass an Sicherheit.



ATTITUDE Junior



// NABENSCHALTUNG

8 Gänge, intuitiv bedienbar mit einem Drehgriffschalter und integrierter Rücktrittbremse.



// HORIZONTALE GRIFFE

Die horizontale Position sorgt für eine optimale, ergonomische Handposition.



// LÄNGENEINSTELLBARE KURBEL

In zwei Positionen – auf unterschiedliche Armlängen anpassbar.



// PARKBREMSE

Eine einfach zu bedienende Parkbremse mit Einrastfunktion gehört bei allen Attitude-Modellen zur Standardausstattung.

TECHNISCHE DATEN

ATTITUDE JUNIOR // Andockbike für Kinder

Max. Benutzergewicht	100 kg	Breite der V-Kurbel	240 mm
Rahmenbreite vorne (+20 mm verstellbar)	260 - 460 mm	Länge der Kurbel	110 mm / 130 mm / 150 mm
Gewicht der Adapter am Rollstuhl	170 g	Tiefenverstellung der Kurbelposition	100 mm
Gewicht der Adapter am Rollstuhl	14,5 kg	Winkelverstellung der Kurbelposition	28°
Radgrösse	16"	Bremse	Rücktrittbremse
Schalthebel	Drehgriff	Parkbremse	ja
Schaltung	Nabenschaltung mit 8 Gängen	Rahmenfarbe	31



Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon: 031 958 38 38
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellblatt. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical.

Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.ch zur Verfügung.



Rev. 03/2023