

LECKEY®

Squiggles
Sitzsystem

~~Squiggles~~
Squiggles



LECKEY^o

Gemeinsam stark.

Unser Ziel ist es, Produkte mit dem bestmöglichen therapeutischen Nutzen, hoher Alltagstauglichkeit und ansprechendem Design zu entwickeln. Aus diesem Grund arbeiten wir eng mit den Nutzern, Therapeuten, Betreuern und Eltern zusammen. Zusätzlich beziehen wir die neuesten Forschungsergebnisse und klinische Studien in diesen Prozess mit ein. Hieraus entwerfen wir praktische Lösungen, die problemlos in den Alltag und das Familienleben integriert werden können.

Der Fortsch zählt

Unterstützung
für Babies, Kinder
und Erwachsene rund
um die Uhr. Hilfen beim
Schlafen, Sitzen, Stehen,
Gehen, Bewegen
und Baden.



ritt



Unser Anliegen ist es, Kindern die bestmögliche Unterstützung zu bieten, um ihren Alltag mit Bravour zu meistern, und folgen dabei unseren wichtigsten Gestaltungsprinzipien:

- 1 Kindgerecht & klinisch fundiert
- 2 Einfache Handhabung & geringes Gewicht
- 3 Langlebig & zuverlässig
- 4 Ansprechend & beliebt
- 5 Wiedereinsetzbar




Squiggles



Das Squiggles Sitzsystem für Kinder von 1 bis 5 Jahren verfügt über zahlreiche praktische Funktionen und Einstellmöglichkeiten, welche die Nutzung und Anpassung vereinfachen.

Praktisch und Nützlich

Abnehmbare, waschmaschinenfeste Bezüge, waschbar bei 40°

Zuverlässig und Beständig

Verschraubungen mit zusätzlichen Sicherungsscheiben für zusätzliche Sicherheit im alltäglichen Gebrauch. Einstellungen können mit dem mitgelieferten Leckey Tool einfach vorgenommen werden.

Komfort und Design

Das 30 mm starke Sitzpolster sorgt für eine komfortable Sitzposition und ist in 4 ansprechenden Bezugfarben erhältlich.



**Und wir bieten
noch vieles mehr!**

Kopf

Die breite, konturierte Kopfstütze bietet eine große seitliche Unterstützung.

Rumpf

Durch das konturierte Schulterpolster erhöht sich die Rückenhöhe um 75 mm.

Die Arretiervorrichtung des Therapietisches ist einfach zu bedienen.

Der gepolsterte Haltebügel kann bei Buggies anstelle des Therapietisches verwendet werden.

Becken

Die Befestigungspunkte für den Beckengurt sowie das Gurtband wurden verstärkt für eine angemessene Versorgung von Kindern mit stark extensorischen Bewegungsmustern.

Breitenverstellung der Hüftpelotten von bis zu 260 mm.

Beine & Füße

Zusätzlich gepolsterte Lateralpelotten am Knie, bis zu 30 mm auf beiden Seiten, helfen die Abduktion von Kinderbeinen mit niedrigem Tonus zu verhindern – nur als Zubehör erhältlich.

Untergestell

Die Sitzkantelung auf dem absenkbaaren Untergestell ermöglicht eine Neigung um 30°.



Mit seinen hellen Farben und dem klinischen Schwerpunkt dreht sich beim Squiggles Sitzsystem immer alles darum, die erforderliche Haltungsunterstützung zu gewährleisten und die emotionalen Bedürfnisse kleiner Kinder und ihrer Familien zu erfüllen. Das Squiggles Sitzsystem unterstützt Kinder mit unterschiedlichsten Anforderungen bei der Bewältigung von Alltagsaktivitäten, egal ob zu Hause, in der Schule oder unterwegs.







1. Das flexible Sakralkissen, das an den unteren Rücken des Kindes angepasst werden kann, unterstützt die untere Wirbelsäule in ihrer gewünschten Position, indem eine Vorwärtsneigung des Beckens und Streckung des unteren Rumpfes angeregt wird.
2. Eine gepolsterte Sitzrampe verhindert ein Vorrutschen des Kindes.
3. Der verstellbare 4-Punkt-Beckengurt gewährleistet eine sichere, stabile Unterstützung der Sitzhaltung und ist gepolstert, um dem Kind mehr Komfort zu gewähren.
4. Auch die Beckenführung ist verstellbar und bietet eine optimale Unterstützung der Sitzhaltung.
5. Die konturierte Rückenlehne kann an die Größe des Kindes angepasst werden.
6. Die gepolsterten Seitenpelotten bieten eine seitliche Unterstützung und gewährleisten eine sichere, aufrechte Sitzhaltung.
7. Der Brustgurt kann als zusätzliche Unterstützung angebracht werden, ohne das Kind dabei zu behindern, sich unbeschwert und frei zu bewegen.
8. Die Brust-Schulterführung dient dazu, dem Kind durch Unterstützung von der Seite, von vorne und an der Schulter den optimalen Halt zu geben.
9. Die konturierte Schulterführung ist im Winkel verstellbar und sorgt für eine Schulterprotraktion, wodurch Kopf und Rumpf über dem Becken ausbalanciert werden.
10. Die Kopfstütze ist kompatibel mit verschiedenen Kopfstützpelotten: Ottobock und anderen führenden Marken.
11. Die verstellbare Fußraste, die im gewünschten Winkel kippbar ist, gewährleistet eine gute Unterstützung der Füße, wodurch eine sichere Basis für die maximale Funktionalität des Oberkörpers geschaffen wird. Die Fußraste kann weggeklappt werden, um ein einfaches Umsetzen zu ermöglichen.
12. Mit Hilfe der Fußschalen können die Füße sicher positioniert werden.
13. Durch die mechanische Rückenwinkelverstellung wird die Position der Kopfstütze und Lateralpelotten beibehalten, wenn der Rückenwinkel geändert wird.
14. Der Therapietisch ermöglicht eine Reihe von Aktivitäten. Darüber hinaus kann, falls erforderlich, ein Haltebügel zur Unterstützung des Kindes angebracht werden.
15. Das höhenverstellbare Untergestell kann von Bodenhöhe bis auf Tischhöhe eingestellt werden und ermöglicht dem Kind die Teilnahme an einem breiten Spektrum von Aktivitäten, angefangen bei Stuhlkreisen bis hin zum gemeinsamen Essen mit der Familie. Das Untergestell verfügt über eine Winkelverstellung zur Sitzkantelung und unterstützt somit zahlreiche Sitzhaltungen. Alle Einstellungen können auch dann sicher vorgenommen werden, wenn sich das Kind im Sitz aufhält.
16. Mit Hilfe der Schiebegriffe kann der Stuhl zu Hause oder im Klassenzimmer einfach bewegt werden.



1. Flexibles Lumbal- und Sakralkissen



2. Gepolsterte Sitzrampe



7. Brustgurt (optional)



8. Brust-Schulterführung



14. Therapietisch



Das Squiggles Sitzsystem

Das Standardprodukt umfasst:
Sitzereinheit: Rückenlehne, Sakralpelotte, Oberschenkelauflage,
Arretiervorrichtung für Untergestell-Verbindungsadapter.

Squiggles Sitzsystem Produktgrößen

Alter (ca.)	1 - 5	
Max. Benutzergewicht	22kg	
Körpergröße des Benutzers	Min 750mm	Max 1100mm
Sitzbreite (Abstand zwischen den Beckenführungen)	Min 160mm	Max 260mm
Sitztiefe (Rückenpelotte zur Kniekehle)	Min 190mm	Max 290mm
Kniebreite (Abstand zwischen Abduktionskeil und Sitzseitenwand)	Max 90mm	
Fußraste	Plantarflexion 10°	Dorsalflexion 10°
Brustbreite (Abstand zwischen Lateralpelotten)	Min 160mm / 6.3 inches	Max 220mm
Rückenlehnenhöhe (Schulterhöhe im Sitzen)	Min 320mm / 12.6 inches	Max 380mm
Rückenlehnenhöhe (mit Schulterpelotte)	Min 420mm / 16.5 inches	Max 480mm
Neigung der Rückenlehne	Liegen 10°	Zurücklehnen 25°
Sitz zur Fußraste (Fußsohle zur Kniekehle)	Min 122.5mm	Max 270mm
Sitzkantelung – Hi-Low-Untergestell	Liegen 10°	Zurücklehnen 30°
Sitzkantelung – Basic-Untergestell	Liegen 20°	Zurücklehnen 20°
Sitzoberkante zum Boden (Basic-Untergestell)	Min 280mm	Max 380mm
Sitzoberkante zum Boden (Hi-Low-Untergestell)	Min 270mm	Max 650mm
Tischhöhe (Sitz zur Tischoberkante)	Min 115mm	Max 170mm
Tischgröße	460mm x 560mm	
Sitzeinheit (Mindestmaße für Lagerung)	Gewicht 6kg Breite 370mm	Länge 370mm Höhe 400mm
Hi-Low-Untergestell (außer Schiebebügel; Mindestmaße für Lagerung)	Gewicht 9kg Breite 540mm	Länge 640mm Höhe 315mm
Basic-Untergestell (außer Schiebebügel; Mindestmaße für Lagerung)	Gewicht 4.5kg Breite 525mm	Länge 630mm Höhe 265mm

Optionen Untergestell

Hi-Low-Untergestell
Zimmeruntergestell
Fußpedal



Basic-Untergestell
Manuelle
Einstellung



Squiggles Sitz auf Sitzschalen-Untergestell
zum Beispiel
Otto Bock
Discovery



Squiggles Sitz auf Kimba Kinderwagen-Untergestell
Zum Beispiel Otto Bock
Kimba



Schiebebügelgriff
Wie Basic- und Hi-Low-
Untergestell abgebildet

Sitzschale


Farboptionen Sitzbezüge



Sitzsystem: Sitzschale



Grün

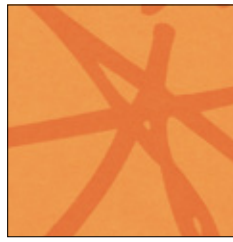

Orange



Blau



Pink


Zubehör



Feste Seitenpelotten




Konturiertes Kopfstützenpolster
Rahmen nicht enthalten

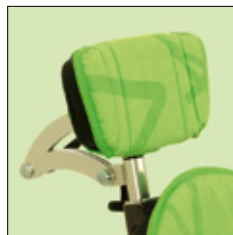

Kopfstützenpolster flach
Rahmen nicht enthalten



Seitenführung für Kopfstütze

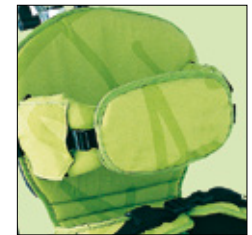

Brustgurt



Beckengurt



Abklappbare Seitenpelotten



1 Zoll Abstandspolster & Pelotten
sowie 1 Zoll Abstandspolster
separat



Fußschalen



Brust-Schulter-Pelotte



Gepolsterter
Therapietischeinsatz



Abduktionskeil




Fußstütze



Regenschutz (nur für
Kinderwagen)




Kopfstütze - ohne Polster.
Nur Rahmen.

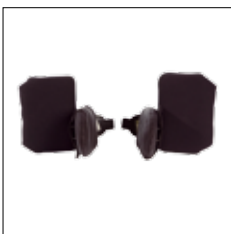

Oberarmführung




Haltebügel

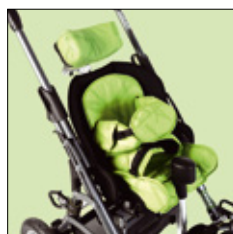

Schutzpolster für Rehawagen



Schulterführung

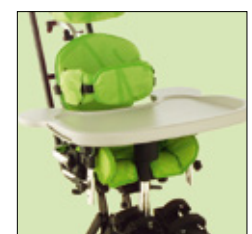

Therapietisch



Sonnendach

LECKEY^o

Gegründet im Jahr 1983,
ist Leckey ein weltweit
anerkannter Pionier in
der Erforschung und
Entwicklung von Hilfsmitteln
für Kinder und Erwachsene.

Unsere Produkte
ermöglichen es den
Nutzern, aktiv zu sein,
sich zu integrieren und
am alltäglichen Leben
teilzuhaben.

Wir verfolgen in hohem Maße einen klinischen Ansatz bei Produktdesign und Entwicklung. Durch tiefgreifende klinische Forschungsstudien mit führenden Universitäten sowie umfangreiche Testreihen mit Therapeuten, Nutzern und deren Familien, entwickeln wir fortlaufend haltungsunterstützende, familienfreundliche Produkte für die tägliche Pflege in jedem Lebensabschnitt.


Das Leckey Team arbeitet bei der Entwicklung von neuen Produkten eng mit Ärzten, Therapeuten und Technikern zusammen. Durch die langjährige Erfahrung mit den Bedürfnissen von Kindern und Erwachsenen gelingt es uns so, Produkte herzustellen, welche den Anforderungen der Nutzer gerecht werden und weltweite Anerkennung genießen.





sleepfym

Distributed by

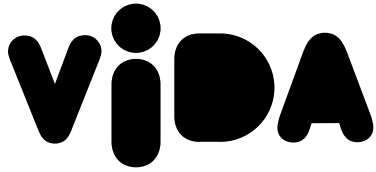

Vertreiber

VIDA Global GmbH
Klingholzstr. 18
65189 Wiesbaden
Germany

T: (+49) 0611 – 710 294 20
F: (+49) 0611 – 710 294 23
E: info@vidaglobal.de
W: www.vidaglobal.de



Unterstützung
für Babies, Kinder
und Erwachsene rund
um die Uhr. Hilfen beim
Schlafen, Sitzen, Stehen,
Gehen, Bewegen und
Baden sowie beim
Toilettengang.