

LECKEY[®]

DER NEUE

EVERYDAY THERAPIE- STUHL



LECKEY^o

Der Everyday Therapiestuhl wurde speziell für Kinder und junge Erwachsene mit Haltungsschwächen oder Wahrnehmungsstörungen entwickelt. Er bietet hohen Komfort sowie eine gute Beckenstabilität und bietet genügend Bewegungsfreiheit für Arme und Oberkörper.

DER EVERYDAY THERAPIESTUHL

DEN ALLTAG NEU ENTDECKEN



Pal



Everyday



Squiggles



Mygo



Kit

GMFCS

II-III

III-IV

III-V

IV-V

IV-V



Leckey's komplettes Hilfsmittelangebot bietet Sitzlösungen für alle Entwicklungsstufen und begleitet das Kind vom Kindergarten, über die Schule bis hin zum Erwachsenenalter.

Die für den Everyday Therapiestuhl erhältlichen Bezugvarianten zeichnen sich durch ein Höchstmaß an Komfort, Langlebigkeit und Funktionalität sowie einen modernen, schnittigen Look aus. Sie können zwischen weichem Stoff und Vinyl und aus einer breiten Palette leuchtender Farben wählen: Blau, Grün, Himbeere, Schwarz und Grau, hier ist für jeden Geschmack und jede Persönlichkeit etwas dabei – ob klassische Optik oder lieber ein Design, das alle Blicke auf sich zieht.

EVERYDAY

FARBEN

HAUPTMERKMALE!

- Helle, leuchtende Farben
- Bezüge für höchsten Komfort
- Robuste, strapazierfähige Bezüge
- Leicht zu reinigen
- Beständig gegen die häufigsten Flecken im Alltag
- Antibakteriell
- Wasserabweisend
- Schwer entflammbar
- Die Bezugsets enthalten Sitzkissen mit Bezug, Rückenlehnenkissen mit Bezug und Sakralpelotteneinsätze



VINYL

Erhältlich in Blau, Grün,
Himbeere und Schwarz
(auf Anfrage)



STOFF

Erhältlich in Blau, Grün,
Himbeere und Grau

COMPUTERSPIELE
NACH DER
SCHULE!

ABENDESSEN MIT
DEN ELTERN AM
SONNTAG!

MATHE UND
FILM MIT
ELTERN AM
TAG

OB LESEN,
KOMMUNIZI,
SPIELEN...
EVERYDAY THE
IST ALLES GA





FÜR KINDER UND
JUGENDLICHE,
DIE EINE MÄSSIGE
HALTUNGSUNTER-
STÜTZUNG
BENÖTIGEN MODERATE

EVERYDAY – EIN
SITZ FÜR
ALLE FÄLLE

**LERNEN,
EREN ODER
MIT DEM
REGNERSTUHL
EINFACH.**

BRETTSPIELE AN
EINEM REGNERISCHEN
DONNERSTAG

EVERYDAY AUF EINEN BLICK



ALLE OPTIONEN ABGEDECKT

Die verfügbaren Optionen sind: Drei Größen mit einer Auswahl an vier Untergestellen (Basic, Hi-Low, hydraulisch oder elektrisch), zwei Untergestellfarben (Schwarz oder Weiß), zwei Bezugvarianten (weicher Stoff oder Vinyl), fünf Farboptionen (Blau, Himbeere, Grün, Grau und Schwarz) sowie eine breite Zubehörpalette.

EINFACH ZU BEDIENEN

Bei der Entwicklung des Therapiestuhls wurde sowohl den Bedürfnissen des Nutzers als auch jenen des Betreuers Rechnung getragen. Sitz, Untergestell und Zubehör lassen sich einfach einstellen, die Bezüge sind leicht zu reinigen und die Grundfläche des Sitzes ist gering – ideal für den Einsatz zu Hause oder im Klassenzimmer.

GROSSE UNTERSTÜTZUNG

Dank 4-Punkt-Gurt, einteiliger Sitzfläche und geteilter Rückenlehne mit Sakralpelotten bietet er eine optimale Haltungsunterstützung für Nutzer mit mäßigen Bedürfnissen, damit diese ihre Aktivitäten zu Hause, in der Schule oder in den Ruhepausen in vollen Zügen genießen können.

SELBSTSTÄNDIGES UMSETZEN

Der Therapiestuhl stellt sich auf die Fähigkeiten des Nutzers ein, da er sich zum eigenständigen Umsetzen oder Transfer mit dem Lifter eignet. Die einteilige Fußplatte lässt sich hochklappen und arretieren. Die längeren Armlehnen geben Halt beim selbständigen Umsetzen oder sind bei Verwendung eines Lifters leicht abnehmbar. Der Neigungswinkel kann eingestellt werden, während sich der Nutzer im Sitz befindet.





EVERYDAY

THERAPEUTISCHE VORTEILE

OPTIMALE HALTUNG UND STABILITÄT EVERYDAY



WARUM

Kinder, die bei der Kontrolle ihrer Haltung eine mittlere Unterstützung benötigen, profitieren von der zusätzlichen Stütze im Beckenbereich. Das Becken bildet die Grundlage für die gesamte Haltungsverstärkung.

WIE

Der Everyday Therapiestuhl sorgt mit einem 4-Punkt-Beckengurt für eine optimale Stellung des Beckens. Im Kopf-, Rumpf-, Bein- und Fußbereich gibt es zusätzliche, perfekt auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe abgestimmte Verstellmöglichkeiten. Dadurch bietet der Everyday ein Höchstmaß an Haltungsverstärkung.



OPTIMALE KOMFORT EVERYDAY





Hi-Low-Untergestell in Bodennähe, um mit dem kleinen Bruder zu spielen.



Mittlere Einstellung auf Höhe des Fernsehers.

ALLTÄGLICHE AKTIVITÄTEN



Kaffeepause am Tisch (Armlehnen können bei Bedarf schnell abgenommen werden)



Maximale Höhe, um das Waschbecken zum Händewaschen zu erreichen.

MALER FORT YDAY

WARUM

Ohne entsprechenden Komfort ist es nicht möglich, eine optimale Haltung einzunehmen. Der Grund: Unbehagen wirkt sich negativ auf die Haltung aus.

WIE

Beim Design des Everyday Therapiestuhls wurde der Komfort des Nutzers in jedem Detail berücksichtigt. Von den weichen, atmungsaktiven Sitzbezügen bis hin zu den geformten Armlehnen gewährleistet der Everyday Therapiestuhl Benutzerkomfort und somit Haltungsverstärkung.

OPTIMALE FUNKTIONALITÄT EVERYDAY

WARUM

Funktionalität, d. h. die Fähigkeit, alltägliche Aufgaben zu erledigen, hängt von der Kombination aus Haltungsverstärkung und Komfort ab.

WIE

Eine optimale Haltungsverstärkung und ein perfekter Komfort sorgen dafür, dass die Nutzer ihre Arme und Hände effektiv und ohne große Einschränkung bewegen können. Durch die Höhenverstellbarkeit des Everyday Therapiestuhls vom Boden bis zur Tischhöhe (Hi-Low-Untergestell) gestalten sich Aktivitäten einfacher und weniger anstrengend – beispielsweise Spielen, Essen, Lesen, Schreiben und Plaudern mit Freunden.





1. Die gepolsterte Kopfsütze mit Höhen- und Tiefenverstellung sorgt für die richtige Kopf- und Nackenunterstützung und verfügt über einfach zu reinigende Bezüge. Größe 3 ist nur mit einer Konturkopfsütze erhältlich, die besser für die Bedürfnisse älterer Nutzer geeignet ist.
2. Die Bezüge sind in weichem Stoff oder Vinyl sowie in jeweils vier Farbvarianten verfügbar. Der Stoffbezug ist in den Farben Himbeere, Grün, Blau und Ebony mit grauen Akzentflächen erhältlich. Der Vinyl-Bezug ist in den Farben Schwarz, Himbeere und Grün mit grauen Akzentflächen und in Blau mit schwarzen Akzentflächen verfügbar. Die Stoffbezüge sind abnehmbar und maschinenwaschbar bei 40 °C. Die Vinyl-Bezüge können zur Reinigung einfach abgewischt werden. Der Sitzbezug ist für zusätzlichen Komfort unter der Vorderseite der Sitzfläche befestigt.
3. Es gibt eine breite Auswahl an winkelund höhenverstellbaren Thoraxpelotten in Standard-, wegklappbarer oder komplexer Ausführung, die für eine variable seitliche Rumpfunterstützung verwendet werden können.
4. Zusätzlich kann ein Sakralkissen angebracht werden, das eine neutrale oder nach vorn geneigte Beckenposition (nicht abgebildet) unterstützt.
5. Der 4-Punkt-Beckengurt sorgt durch die Polsterung für mehr Komfort und kann einfach von der Mitte aus eingestellt werden, um eine zentrierte Körperhaltung und Beckenstabilität zu ermöglichen.
6. Die höhen- und winkelverstellbaren Armlehnen sind für mehr Komfort aus weichem Polyurethan gefertigt. Sie wurden etwas länger ausgeführt, um das eigenständige Umsetzen zu unterstützen, können jedoch bei Verwendung eines Lifters auch leicht abgenommen werden.
7. Der weiche, gepolsterte Abduktionskeil sorgt, falls erforderlich, für die Abduktion der Beine.
8. Die Fußschalen auf der Fußplatte sind winkel- und tiefenverstellbar, wodurch asymmetrische Körperpartien ausgeglichen und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung sichergestellt wird. Fußschalenerhöhungen (nicht abgebildet) sind ebenso erhältlich.
9. Die höhen- und winkelverstellbare, einteilige Fußplatte aus Metall lässt sich hochklappen und arretieren, um ein Umsetzen in aufrechter Position zu erleichtern. Sie bietet bei korrekt eingestellter Höhe bis zu 18 % mehr Unterstützung für das Körpergewicht des Nutzers. Die Fußplatte der Größe 3 wurde mit zwei Wadenstützen versehen, um ein höheres maximales Belastungsgewicht zu erzielen.
10. Die steuer- und feststellbaren Rollen lassen sich zu Hause, in der Schule oder in Therapieeinrichtungen mühelos über den Boden schieben. Alle Rollen haben eine Größe von 100 mm bis auf das hydraulische Untergestell (nur Größe 3) mit 125 mm.
11. Das über ein Fußpedal betätigte Hi-Low-Fahrgestell verfügt über einen großen Verstellbereich. Auf diese Weise kann eine niedrige, mittlere oder hohe Sitzposition eingenommen werden, um Alltagsaktivitäten wie das Abhalten von Stuhlkreisen in der Schule, Fernsehen oder das Mithelfen in der Küche zu ermöglichen.
12. Die einteilige Sitzfläche verfügt über eine Tiefenverstellung. Die Breite kann über die Seitenpelotten eingestellt werden. Das weiche, bequeme Keilkissen bietet maximale Unterstützung für die Oberschenkel, verteilt das Körpergewicht und sorgt für Komfort und Stabilität.
13. Die weichen, gepolsterten Seitenpelotten ermöglichen die Weitenverstellung der Sitzfläche und sorgen für zusätzliche Seitenstabilität. Die Größen 2 und 3 sind mit seitlichen Abduktionspelotten erhältlich, die zusätzliche Seitenunterstützung bei maximaler Tiefeneinstellung des Sitzes bieten.
14. Der Neigungswinkel kann eingestellt werden, während sich der Nutzer im Sitz befindet. Über die Einstellung des Winkels können verschiedene Stellungen eingenommen werden, etwa eine nach hinten geneigte Position zum Entspannen ohne Beeinträchtigung der gewünschten Haltung oder eine nach vorn geneigte Position, um den Transfer in den Stand zu erleichtern.
15. Durch die Schiebegriffe lässt sich der Sitz einfach bewegen und sie erleichtern das Handling bei der Höhenverstellung.
16. Die Rückenlehne verfügt über eine Höhen- und Winkelverstellung. Der Rückenwinkel kann vergrößert werden, um die Sitzposition bei verspannter, hinterer Oberschenkelmuskulatur anzupassen, oder verkleinert werden, um die Auswirkungen von Streckbewegungen zu verringern.
17. Die Position des Therapietisches kann durch die Höhen- und Tiefeneinstellung an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden. Sie ist auf Ellbogenhöhe für eine verbesserte Funktionalität oder höher einstellbar, um Kinder mit niedrigem Muskeltonus oder Ermüdungserscheinungen im vorderen Bereich besser zu unterstützen. Der Therapietisch ist in Kunststoff oder Holz erhältlich.
18. Der Höhenverstellbereich des Basic-Untergestells ist dann geeignet, wenn der Sitz bei den Aktivitäten des Nutzers oder beim Transfer nicht auf Bodenhöhe verstellbar muss. Bitte beachten Sie, dass die Höhenverstellung nicht vorgenommen werden kann, während sich der Nutzer im Sitz befindet.
19. Das hydraulische Untergestell verfügt über einen großen Höhenverstellbereich, wobei die Höhenverstellung vorgenommen werden kann, während sich der Nutzer im Sitz befindet. Der Mechanismus wurde dafür ausgelegt, den Betreuer beim Anheben eines hohen Körpergewichts zu unterstützen.
20. Das elektrische Untergestell verfügt über den gleichen Höhenverstellbereich wie das hydraulische und das Hi-Low-Untergestell. Die Betätigung erfolgt allerdings komplett elektrisch und kann mit Hilfe der mitgelieferten Bedieneinrichtung vom Betreuer oder Nutzer gesteuert werden, während sich der Nutzer im Sitz befindet.



EVERYDAY AUSSTATTUNG

EVERYDAY

TECHNISCHE

DATEN

Größe	1	2	3
	mm/kgs	mm/kgs	mm/kgs
Max. Benutzergewicht	30 kg	50 kg	100 kg
Gewicht Sitzeinheit mit Basic-Untergestell	22,5 kg	27 kg	35,9 kg
Gewicht Sitzeinheit mit Hi-Low-Untergestell	29,5 kg	34 kg	49 kg
Sitzhöhe – Basic-Untergestell	450 – 600	450 – 600	450 – 600
Sitzhöhe – Hi-Low-Untergestell	250 – 600	320 – 600	450 – 600
Sitzbreite	160 – 280	260 – 380	340 – 500
Sitztiefe (Standard)	150 – 280	230 – 380	330 – 480
Sitztiefe (verlängert)	n/a	300 – 450	n/a
Brustkorbbreite	150 – 220	170 – 240	240 – 370
Rückenhöhe	300 – 400	400 – 520	450 – 630
Rückenwinkel	0° nach hinten 10° nach vorn	30° nach hinten 10° nach vorn	30° nach hinten 10° nach vorn
Armlehnenhöhe	150 – 250	200 – 300	180 – 325
Unterschenkellänge	150 – 250	250 – 450	250 – 450
Kniewinkelverstellung	-10° bis +50°	-10° bis +50°	-10° bis +50°
Fußplattenwinkel	-15° bis +10°	-15° bis +10°	-15° bis +10°
Sitzkantelung	30° nach hinten 10° nach vorn	30° nach hinten 10° nach vorn	30° nach hinten 10° nach vorn

Sitzschale und Untergestell

Das Standardprodukt umfasst eine einteilige Sitzfläche, eine geteilte Rückenlehne mit Schiebegriff und ein Untergestell (der Sitz ist mit dem Untergestell verschraubt und kann nicht abgenommen werden).



Everyday Therapiestuhl auf Basic-Untergestell



Everyday Therapiestuhl auf Hi-Low-Untergestell mit Gasdruckfeder



Everyday Therapiestuhl auf hydraulischem Untergestell



Sitzschale auf Basic-Untergestell mit 100-mm-Rollen (Größen 1, 2 und 3)



Sitzschale auf Hi-Low-Untergestell mit 100-mm-Rollen (nur Größen 1 und 2)



Sitzschale auf hydraulischem Hi-Low-Untergestell mit 125-mm-Rollen (nur Größe 3)




Sitzschale auf elektrischem Hi-Low-Untergestell mit 100-mm-Rollen (nur Größe 2)

EVERYDAY ZUBEHÖR



Konturkopfstütze mit Befestigungsteilen und Bezug (Neopren Schwarz nur Größe 3)

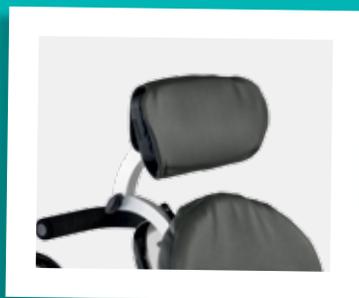

Flache Kopfstütze (inklusive Bezug: Größe 1 und Größe 2)




Flache Kopfstütze mit Seitenführung



Feste Seitenpelotten aus Polyurethan (inklusive Bezug)



Abklappbare Seitenpelotten aus Polyurethan (inklusive Bezug)

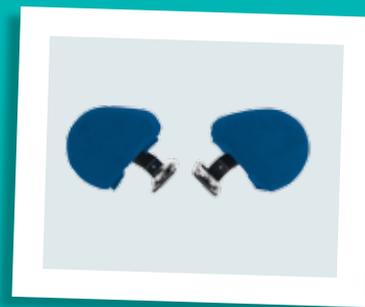

Feste Seitenpelotten Basic-Version (inklusive Bezug)



Komplexe abklappbare Seitenpelotten



Oberarmführung (inklusive Bezug)



Brustgurt (Größe 3 mit Neopren-Bezug)



Brustgurt (Größe 1 und Größe 2 mit Bezug)



Brust-Schultergurt (Schwarz)




4-Punkt-Beckengurt



Beckenpelotten
(Paar, Abbildung mit Bezügen)



Abduktionskeil (inklusive Bezug)

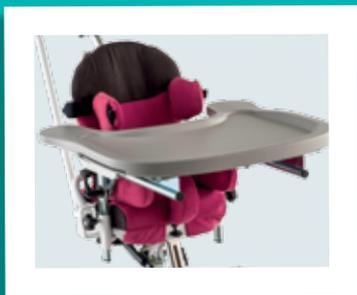


Therapietisch (Kunststoff, Grau)



Therapietisch für Größe 3
(Kunststoff, Schwarz)



Fußplatte Metall
(Größe 1 und Größe 2)

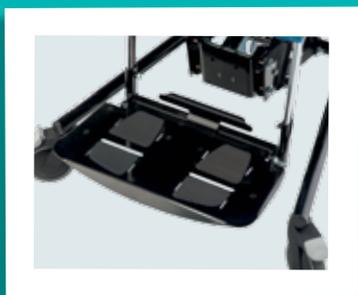

Fußplatte Metall (Größe 3)



Armlehnen



Fußschalen (einschließlich Gurte)

LECKEY^o

Gegründet im Jahr 1983,
ist Leckey ein weltweit
anerkannter Pionier in
der Erforschung und
Entwicklung von Hilfsmitteln
für Kinder und Erwachsene.

Unsere Produkte
ermöglichen es den
Nutzern, aktiv zu sein,
sich zu integrieren und
am alltäglichen Leben
teilzuhaben.

Wir verfolgen in hohem Maße einen klinischen Ansatz bei Produktdesign und Entwicklung. Durch tiefgreifende klinische Forschungsstudien mit führenden Universitäten sowie umfangreiche Testreihen mit Therapeuten, Nutzern und deren Familien, entwickeln wir fortlaufend haltungsunterstützende, familienfreundliche Produkte für die tägliche Pflege in jedem Lebensabschnitt.

Das Leckey Team arbeitet bei der Entwicklung von neuen Produkten eng mit Ärzten, Therapeuten und Technikern zusammen. Durch die langjährige Erfahrung mit den Bedürfnissen von Kindern und Erwachsenen gelingt es uns so, Produkte herzustellen, welche den Anforderungen der Nutzer gerecht werden und weltweite Anerkennung genießen.





Distributed by



Vertreiber

VIDA Global GmbH
Klingholzstr. 18
65189 Wiesbaden
Germany

T: (+49) 0611 – 710 294 20
F: (+49) 0611 – 710 294 23
E: info@vidaglobal.de
W: www.vidaglobal.de



Unterstützung
für Babies, Kinder
und Erwachsene rund
um die Uhr. Hilfen beim
Schlafen, Sitzen, Stehen,
Gehen, Bewegen und
Baden sowie beim
Toilettengang.