

splashy

Benutzeranleitung

Zum Baden und Spielen, für
Zuhause und Unterwegs

Die französische, italienische, spanische, deutsche,
portugiesische, polnische und schwedische Version dieser
Anleitung finden Sie auf unserer Website unter

www.fireflyfriends.com

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Nutzung des Splashy beginnen. Sie können diese ebenfalls, nebst Videos, Diagrammen und anderen nützlichen Downloads, unter **www.fireflyfriends.com** herunterladen.

Inhalt

01 Verwendungszweck/Indikation	S .03
02 Konformitätserklärung	S .04
03 Gewährleistungsbedingungen	S .04
04 Sicherheitsinformationen	S .05
05 Reinigungs- und Pflegehinweise	S .06
06 Produktprüfung und Reparatur	S .08
07 Wichtige Nutzungsrichtlinien	S .08
08 Die Wiederausgabe von Firefly-Produkten	S .09
09 Nutzungsrichtlinien	S .10
10 Größeninformationen	S .29

Abschnitt 01: Verwendungszweck/Indikation

Der Splashy Badewannensitz wurde entwickelt, um Kindern mit besonderen Bedürfnissen beim Baden eine Stützung des Rumpfes sowie des Kopfes zu bieten. **Für eine optimale Sicherheit und korrekte Stützung ist die unbedingte Nutzung der Floorsitter Plattform als Basis unerlässlich.**

Splashy ist für Kinder mit Haltungsschwächen und cerebralen Bewegungstörungen (GMFCS III-V) zwischen etwa 1 - 8 Jahren und einem Maximalgewicht von 30 kg bestimmt.

Splashy setzt sich aus 3 Hauptkomponenten zusammen: Der Rückenstütze, der Sitzbasis und der Floorsitter Plattform. Zusätzlich liefern wir ein Stützset, das sich aus einem 5-Punkte-Verschlussgurt sowie vier Schaumpolsterpuffern, die als zusätzliche Stütze (z. B. als Knauf oder als Kopfstütze) flexibel am Sitz befestigt werden können, zusammensetzt.

Rückenlehne, Sitzbasis und Floorsitter Plattform sollten mühelos und sicher miteinander verbunden werden. Bitte lesen Sie hierzu Abschnitt 09 dieser Benutzeranleitung.



Kinder sollten unter keinen Umständen unbeaufsichtigt im Splashy Badewannensitz gelassen werden, da sie sonst ertrinken oder sich verletzen könnten.

Wir empfehlen, das Produkt vor der Nutzung, entsprechend der Anleitung

in Abschnitt 06, zu prüfen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Im Falle, dass das Produkt außerhalb des dafür bestimmten, sicheren Gebrauchs verwendet wird, können Firefly Friends Ltd. und James Leckey Design Ltd. keine Verantwortung übernehmen. Sollten Sie etwaige Zweifel haben, nehmen Sie bitte telefonisch Kontakt mit dem Kundenservice von Firefly auf: Vereinigtes Königreich: +44 (0)800 318265 oder Irland: +353 1800 626020.

Folgende Aktivitäten wurden von Firefly by Leckey für die tägliche Nutzung getestet und anerkannt:

1. In Badewanne oder Dusche
2. Für etwaige Wasserspiel-Aktivitäten

Die Nutzung des Splashy außerhalb des Badezimmers (beispielsweise im Garten oder am Strand) sollte vorab wohl überlegt sein. Beachten Sie, dass die Floorsitter-Splashy-Verbindung durch kleine Partikel und/oder Rückstände (wie z. B. Erde, Gras oder Sand) beeinträchtigt oder beschädigt werden kann. Falls der Splashy mit jedweden Substanzen in Berührung kommt, die die Funktion der Floorsitter-Splashy-Verbindung beeinflussen könnten, spülen Sie diesen bitte nach der Nutzung gründlich ab (siehe Abschnitt 04 für Sicherheitsinformationen und Abschnitt 05 für weitere Reinigungs- und Pflegehinweise).

Abschnitt 02: Konformitätserklärung

James Leckey Design Ltd. erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung für die Marke Firefly, dass der Splashy Badewannensitz den Anforderungen der Richtlinien 93/42/EEC Technischen Hilfen für Personen mit Behinderungen entspricht. Der Splashy ist, als medizinisches Gerät der Klasse 1, CE gekennzeichnet.

Abschnitt 03: Gewährleistungsbedingungen

Gewährleistungen für den Splashy greifen nur, wenn das Produkt unter den vom Hersteller angegebenen spezifischen Bedingungen und für den entsprechenden Verwendungszweck eingesetzt wurde. Für dieses Produkt von James Leckey Design Ltd. gilt eine Gewährleistungsfrist von einem Jahr.

Waren können innerhalb der Gewährleistungsfrist, zur Reparatur oder zum Umtausch, innerhalb von 12 Monaten nach Empfang, an uns zurückgeschickt werden. Sobald Sie mit uns Kontakt aufnehmen, veranlassen wir die Abholung der Waren zu unseren Kosten. Bei Ankunft der Waren werden diese entweder von uns repariert oder umgetauscht. Anschließend schicken wir die Waren innerhalb von 14 Tagen an Sie zurück. In allen Fällen obliegt es dem Kunden, die zurückgeschickte Ware angemessen, vorzugsweise in der Originalverpackung, zu verpacken.

Abschnitt 04: Sicherheitsinformationen

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch stets die gesamte Anleitung durch.
2. Kinder sollten in keinem Fall in diesem Produkt unbeaufsichtigt bleiben
3. Lassen Sie ihr Kind während der Nutzung des Splashy am Strand in Wassernähe nie unbeaufsichtigt.
4. Stellen Sie vor der Verwendung des Splashy stets sicher, dass alle Komponenten gemäß der vorliegenden Anleitung montiert wurden. Der Splashy muss in jedem Falle an der Floorsitter-Plattform befestigt werden. Der Floorsitter sollte auf einem soliden, rutschfesten Untergrund stehen. Nutzen Sie den Splashy in keinem Falle auf rutschigem, instabilen Untergrund.
5. Das maximale Nutzergewicht von 30kg darf in keinem Falle überschritten werden.
6. Der Splashy verfügt über Kleinteile, die von Kleinkindern verschluckt werden könnten. Stellen Sie daher vor der Nutzung sicher, dass alle Komponenten, inklusive Knöpfe und Gurte, sicherheitsgemäß befestigt wurden.
7. Der Splashy verfügt über Kleinteile, die von Kleinkindern verschluckt werden könnten. Stellen Sie daher vor der Nutzung sicher, dass alle Komponenten, inklusive Knöpfe und Gurte, sicherheitsgemäß befestigt wurden.
8. Sollten Sie den Splashy in Umgebungen nutzen, die Erde, Sand, Grass oder andere Kleinkomponenten aufweisen, reinigen Sie die Verbindung zwischen dem Splashy und dem Floorsitter nach jeder Nutzung um eine Blockierung zu vermeiden. Für weitere Informationen zur Montage des Floorsitters an den Sitz, lesen Sie bitte Abschnitt 09.2.6 dieser Anleitung.
9. Lassen Sie den Splashy nach jeder Nutzung vollständig trocknen, bevor Sie ihn gewissenhaft verstauen. Der Splashy sollte vor jedweden Hitzequellen, wie z. B. Zigaretten, elektronischen und gasbetriebenen Herden und offenen Flammen ferngehalten werden.
10. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig, entsprechend der Anleitungen in Abschnitt 05 dieser Anleitung.
11. Kontrollieren und warten Sie das Produkt regelmäßig, um sicherzustellen, dass es einwandfrei funktioniert. Der Splashy sollte nicht verwendet werden, wenn etwaige Teile beschädigt oder fehlerhaft sind.
12. Bei Zweifeln an der Sicherheit des Splashy oder der Floorsitter-Plattform, oder beim Versagen von Teilen, stellen Sie die Benutzung bitte umgehend ein und nehmen Kontakt mit dem Firefly Kundendienst auf: Vereinigte Nationen: 0800318265 oder Irland 1800 626020
12. Mit dem Splashy gelieferte Werbeartikel sollten niemals unbeaufsichtigt verwendet werden.



Die Nichtbefolgung dieser Anleitungen kann Sie oder Ihr Kind in Gefahr bringen.

Abschnitt 05: Reinigungs- und Pflegehinweise

Pflegehinweise

- Zur Reinigung des Splashy empfehlen wir die Verwendung von warmen Wasser und scheuermittelfreiem Reinigungsmittel. Nutzen Sie niemals organische Lösungsmittel oder Trockenreinigungsmittel.
- Die Schaumstoffkomponenten des Splashy sind nicht für die Waschmaschine geeignet, da diese an Form verlieren und sich verdrehen könnten.
- Wir empfehlen, die Nutzung von verschreibungspflichtigen medizinischen Badezusätzen im Badewasser, während des Badens mit dem Splashy, zu vermeiden, da diese die Materialien des Splashy beschädigen können.
- Reinigen Sie die Oberfläche der Badewanne vor Rückständen oder Schmutz, bevor Sie die Floorsitter-Plattform anbringen. So können die Gummifüße des Floorsitter gut an der Badewannenfläche haften.
- Zur Entfernung von Erde, Sand, Grass oder anderen kleinen Partikeln, die sich in der Floorsitter-Sitzverbindung befinden können, hilft ein leichtes Klopfen der Verbindung. Spülen Sie die Verbindung ausgiebig, um sicherzustellen, dass sich keine Partikel darin festsetzen. Bei hartnäckigen Festsetzungen am Floorsitter kann das Zurückschnellen des

Schnappverschlusses mit dem Daumen Rückstände lockern und entfernen.

- Sollte Ihr Badewannensitz mit Salzwasser in Kontakt kommen, spülen Sie alle Teile sorgfältig mit frischem, sauberen Wasser ab.

5-Punkte-Verschlussgurt

Der Splashy 5-Punkte-Verschlussgurt kann abgenommen und mit Seifenwasser gereinigt werden.

Die Floorsitter-Plattform


1. Stellen Sie sicher, dass die Floorsitter-Plattform nach jedem Gebrauch gereinigt wird, um einen optimalen Griff am Badewannenboden zu gewährleisten.
 2. Seife und Wasser sind für die tägliche Reinigung geeignet.
 3. Verwenden Sie keine Lösungsmittel zur Reinigung der Floorsitter-Plattform.
-

Splashy Schaumstoff-Sitzbasis, -Rückenlehne und Stützen


1. Seife und Wasser sind für die tägliche Reinigung geeignet.
2. Die EVA Schaumstoffbezüge können abgenommen und regelmäßig gewaschen werden, um Schmutz sowie Rückstände zu entfernen.

Die EVA Schaumstoffbezüge können abgenommen und alle paar Monate gewaschen werden.



1. Die EVA-Bezüge werden mithilfe von acht Häkchen befestigt. Zwei an der Rückseite des Sitzes und sechs an der Sitzbasis.
2. Lösen Sie alle Häkchen per Hand (nutzen Sie kein Werkzeug).
3. Verwenden Sie Seifenwasser zur Reinigung.
4. Die Bezüge sollten bei Wiederanbringung vollständig getrocknet sein.
5. Stellen Sie sicher, dass alle Häkchen bei der Wiederanbringung der Bezüge miteinander verbunden sind.

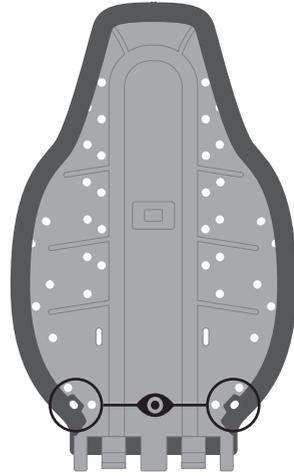

Position der Häkchen

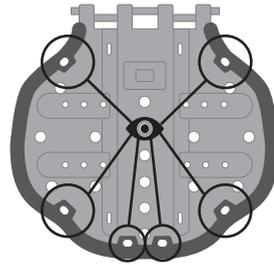

 Nach Verwendung des Splashy außerhalb des Badezimmers (beispielsweise am Strand oder im Garten) sollte dieser immer abgespült werden, um die Festsetzung von Partikeln und eine damit verbundene Einschränkung von Funktionen und Mechanismen des Splashy zu vermeiden. Für weitere die Anleitung zwecks Anschluss der Floorsitter-Plattform an den Sitz lesen Sie bitte Abschnitt 09.2.6

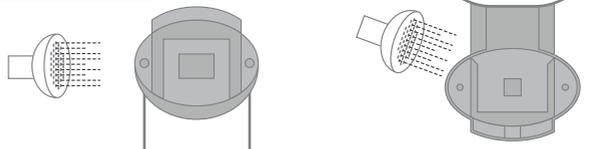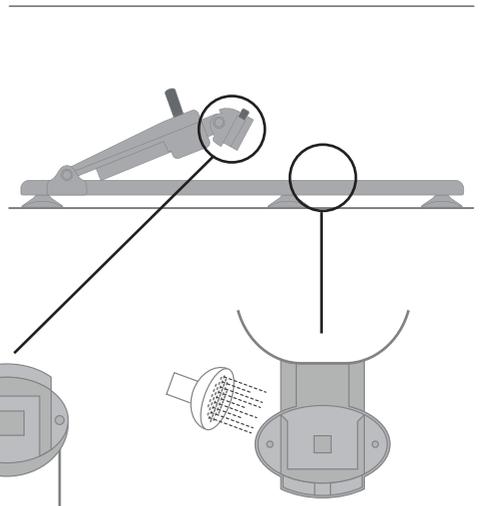

Abschnitt 06: Produktprüfung und Reparatur

Bevor Sie den Splashy verwenden, empfehlen wir Ihnen diesen zu prüfen, um die Sicherheit des Produktes zu gewährleisten.

Wir empfehlen folgende Schritte zur korrekten Überprüfung:

1. Stellen Sie sicher, dass die Rückenlehne und die Sitzbasis des Splashy sicher miteinander verbunden werden können (siehe Abschnitt 09).
2. Prüfen Sie, ob der Splashy korrekt an der Floorsitter Plattform befestigt werden kann und stellen Sie sicher, dass die Plattform sicher und stabil in der Badewanne steht, bevor Sie das Kind hineinsetzen.
3. Stellen Sie sicher, dass der 5-Punkte-Verschlussgurt sowie die Pufferstützen mithilfe der Knebelknöpfe am Splashy befestigt sind.



Bei Zweifeln an der Sicherheit Ihres Firefly Produktes oder beim Versagen von Teilen stellen Sie die Benutzung bitte umgehend ein. Nehmen Sie schnellstmöglich Kontakt mit dem Firefly Kundendienst auf.

4. Prüfen Sie den 5-Punkte-Verschluss und die Pufferstützen auf Schäden oder Verschleiß.
5. Prüfen Sie die Verschlüsse und Knebelknöpfe auf Risse oder Beschädigungen.

Wir stehen Ihnen für alle servicebedingten Belange unter www.fireflyfriends.com oder customer.enquiries@fireflyfriends.com zur Verfügung.

Abschnitt 07: Wichtige Nutzungsrichtlinien

Sorgen Sie dafür, dass der Splashy sicher in der Badewanne steht, Für Kinder, die beim Hineinsetzen mithelfen können, stellen Sie die Rückenlehne in die mittlere Position. Siehe hierzu Abschnitt 09.5.

Eine vollständig zurückgeklappte Rückenlehne erleichtert Kindern, die in die Badewanne gehoben werden, das Hineinsetzen.

die Polsterpuffer anzupassen, bevor Sie das Kind in den Sitz setzen. In jedem Falle können diese bei Bedarf nachjustiert werden, sobald Ihr Kind in der Wanne sitzt. Gehen Sie während der Einstellung des Badewannensitzes vorsichtig vor und achten Sie dabei genau auf Ihr Kind.

Das Hinein- oder Herausheben des Kindes aus der Badewanne ist eine Bewegung, die Ihren Rücken belasten kann. Daher **empfehlen wir Ihnen, sich von Ihrem Therapeuten** bezüglich sicherer Hebetechniken **beraten zu lassen**. Diese erleichtern Ihnen, Ihr Kind in die Badewanne und wieder heraus zu heben.

Abschnitt 08: Die Wiederausgabe von Firefly-Produkten





Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß Abschnitt 5 dieses Handbuchs gründlich gereinigt wurde. Stellen Sie sicher, dass eine Kopie des Benutzerhandbuchs mit dem Produkt mitgeliefert wird. Falls Sie jedwede Zweifel an der weiteren sicheren Nutzung Ihres Firefly Produkts haben oder falls irgendwelche Teile versagen, stellen Sie bitte die Benutzung ein und nehmen Sie schnellstmöglich Kontakt mit unserer Kundendienstabteilung auf: Vereinigtes Königreich 0800 318265 oder Irland: 1800 626020.

Abschnitt 09: Nutzungsrichtlinien

09.1 Die Teile des Splashy



Die Splashy-Ente sollte nur unter Aufsicht genutzt werden

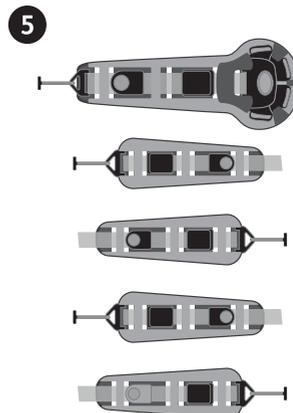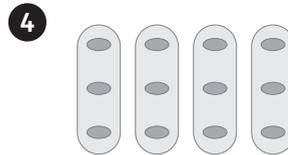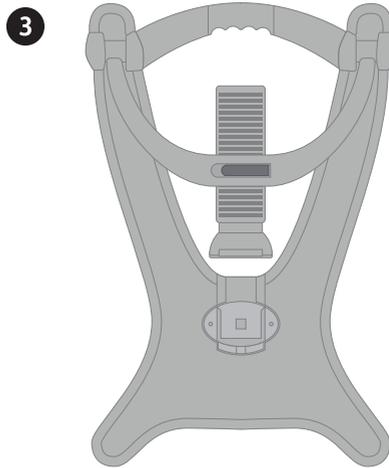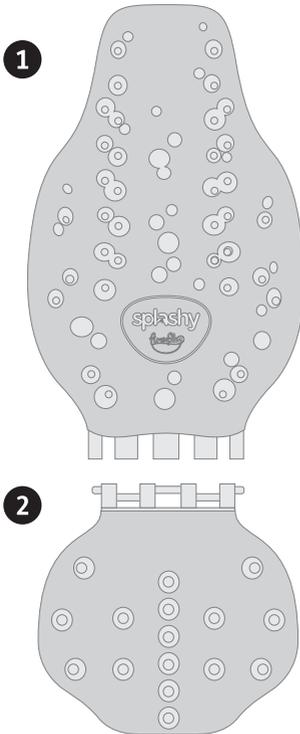

Ihr Splashy wird mit folgenden Teilen geliefert:



- 1x Rückenlehne
- 1x Sitzbasis
- 1x Floorsitter-Plattform
- 4x stützende Puffer
- 1x Leistenteil & 4x Gurte

09.2 Zusammenbau des Splashy

- Wir empfehlen Ihnen, vorab eine Trockenübungsrunde in leichter Kleidung mit ihrem Kind im Splashy zu durchlaufen, um so eine korrekte Platzierung der Gurte und Puffer zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Badewanne vor der Platzierung der Floorsitter-Plattform frei von Schmutz und Rückständen ist.
- Ihr Splashy **MUSS VOR** der Befüllung der Badewanne mit Wasser, zusammengebaut sein. Wir empfehlen Ihnen, die Wanne mit einer Mischung aus warmen und kaltem Wasser zu befüllen, um Schäden am Splashy zu vermeiden.
- Siehe Abschnitt 09.5 für weitere Anleitung zur Anbringung des Rückenlehnenarms.

09.2.1 Korrekte Platzierung der Floorsitter-Plattform

Die Floorsitter-Plattform sollte ausschließlich auf festem, soliden und ebenmäßigen Untergrund stehen. Beim Platzieren des Floorsitters auf dem gewünschten Untergrund ist es zwingend erforderlich, dass sich alle GummifüÙe in Kontakt mit dem Untergrund befinden.

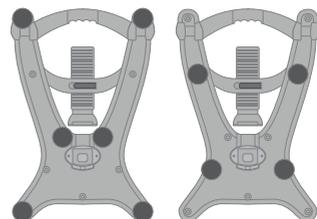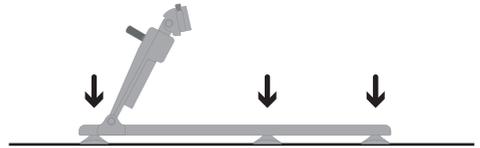


Die GummifüÙe sind verstellbar und können sich der Form der Badewanne anpassen. Sie verstellen die GummifüÙe, indem Sie diese, entsprechend der gewünschten Einstellung, entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Die GummifüÙe können in den schmaleren Bereich des Floorsitter bewegt werden und sich so der Breite Ihrer Badewanne anpassen. Stellen Sie sicher, dass die FüÙe gegenüber voneinander platziert werden.

09.2.1 Korrekte Platzierung der Floorsitter-Plattform


Stellen Sie, sobald der Floorsitter platziert wurde, sicher, dass der Rückenlehnenarm in höchster Position eingestellt ist.

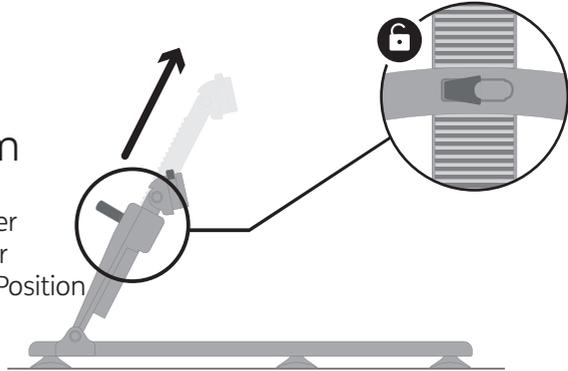

09.2.2 Montage des Splashy Badewannensitzes

1

Bevor Sie den Splashy am Floorsitter befestigen, sollten sowohl Rückenlehne als auch Sitzbasis montiert sein.

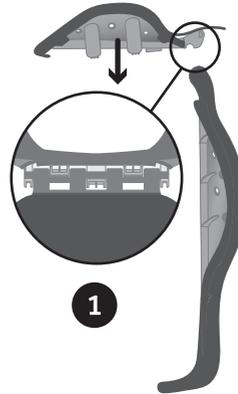


1

2

Halten Sie die Rückenlehne des Splashy vertikal hoch, sodass sich die Rillen oben befinden. Schieben Sie mit der anderen Hand die Sitzbasis in die Rillen der Rückenlehne.


Drehen Sie die Sitzbasis in die entgegengesetzte Richtung um die Verbindungen einrasten zu lassen. Wenn verbunden, setzen Sie das Schaumstoffscharnier unter den Bezug der Schaumstoff-Rückenlehne.

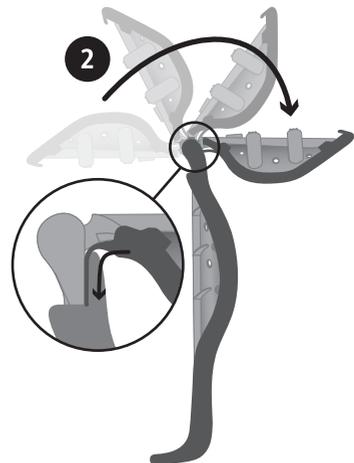


2

09.2.3 Anbringen und Verstellen des Gurtes und der Puffer


- 1** Um Stützstreifen und Puffer an Sitzbasis und Rückenlehne des Splashy anzubringen, drücken Sie den entsprechenden Knebelverschluss durch die Öffnung.
- 2** Zum Verschließen drehen Sie den Knebelknopf unterhalb des Sitzes zur Seite.

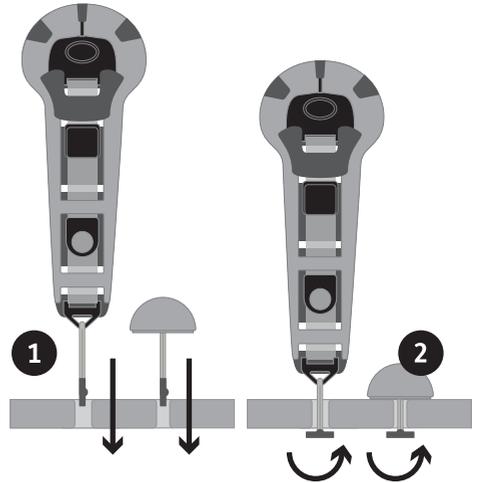

Zur Befestigung der Schulter- und Seitengurte folgen Sie bitte dieser Abbildung.

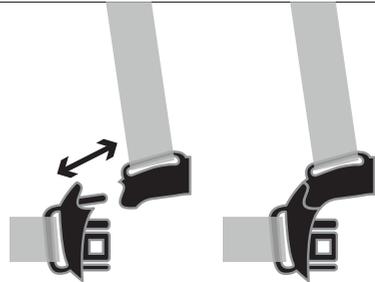


Sie haben die Gurte auf der richtigen Seite des Splashy befestigt, wenn die Schnalle wie folgt aussieht.

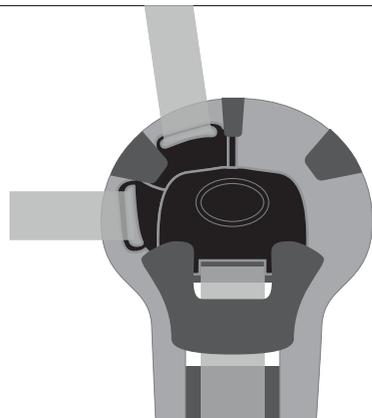


09.2.4 Einstellen des 5-Punkte-Verschlussgurtes

- 1 Drücken Sie den Knebelverschluss des Leistenteils durch die Sitzbasis des Splashy.
- 2 Drücken Sie den Knebelverschluss des linken Schultergurtes durch das der korrekten Größe entsprechende Loch.
- 3 Drücken Sie den Knebelverschluss des linken Seitengurtes durch ein Loch an der Seitenwand der Rückenlehne.
- 4 Wiederholen Sie diese Vorgänge mit den Schulter- und Seitengurten auf der rechten Seite.
- 5 Sobald alle Gurte sicher angebracht sind, verbinden Sie diese, mithilfe des Verschlusses, zu einem 5-Punkte-Verschlussgurt.

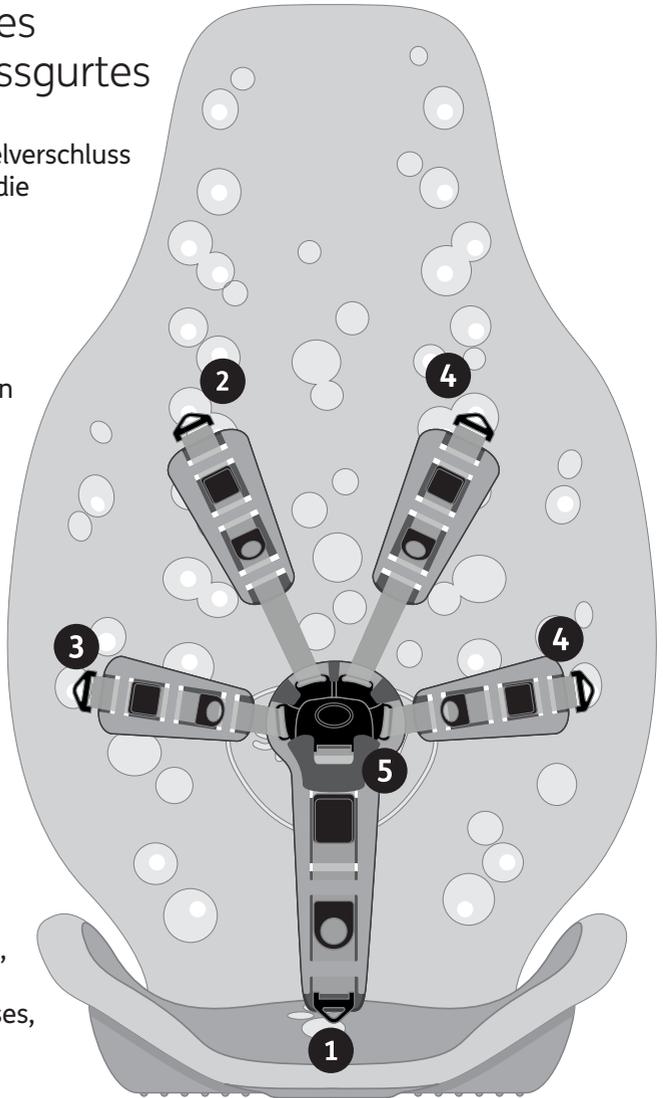


Tipp – So bald Sie die Einstellung beendet haben, können Sie den überschüssigen Teil des Gurtes im Schaumstoff des Verschlussgurtes verstauen.

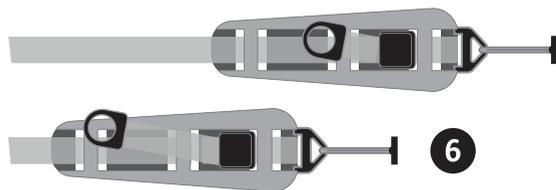

- 6** Mittels Lösen der Klammern können die Gurte flexibel, durch Lockern oder Festziehen, eingestellt werden. Stellen Sie sicher, dass die Klammer bei Abschluss der Einstellung, verschlossen ist.

09.2.5 Einstellen des 3-Punkte Verschlussgurts


- 1** Drücken Sie den Knebelverschluss des linken Seitengurtes durch ein Loch an der Seitenwand der Rückenlehne.
- 2** Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem rechten Seitengurt.
- 3** Sobald alle Gurte sicher angebracht sind, verbinden Sie diese, mithilfe des Verschlusses, zu einem 3-Punkte-Verschlussgurt.

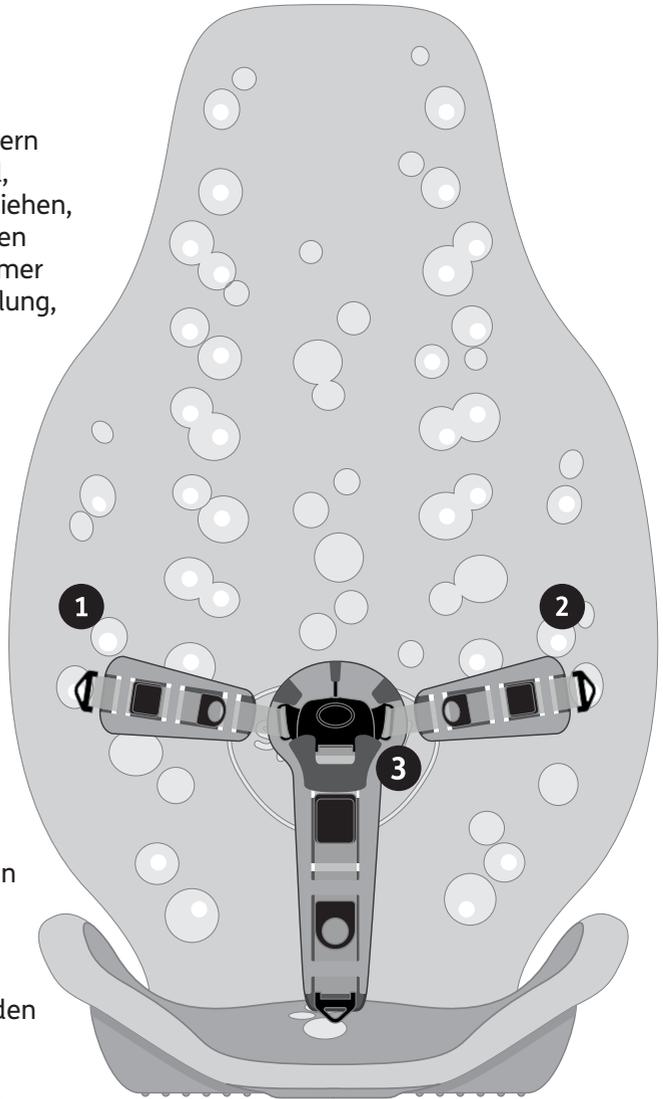


Verstellen Sie den 5-Punkte-Verschlussgurt auf keinen Fall in einen 3-Punkte-Verschlussgurt, während sich das Kind in dem Badewannensitz befindet.

09.2.6 Montage des Splashy an die Floorsitter-Plattform

- 1 Stellen Sie den Splashy mit der Sitzbasis auf den Floorsitter.
- 2 Um sicherzustellen, dass der Splashy mittig auf dem Floorsitter ausgerichtet ist, bewegen Sie die Sitzbasis des Splashy leicht vorwärts, sodass diese in den Schließkanal einrasten kann.
- 3 Sobald die Sitzbasis korrekt in den Floorsitter einrastet, hören Sie ein Klicken.

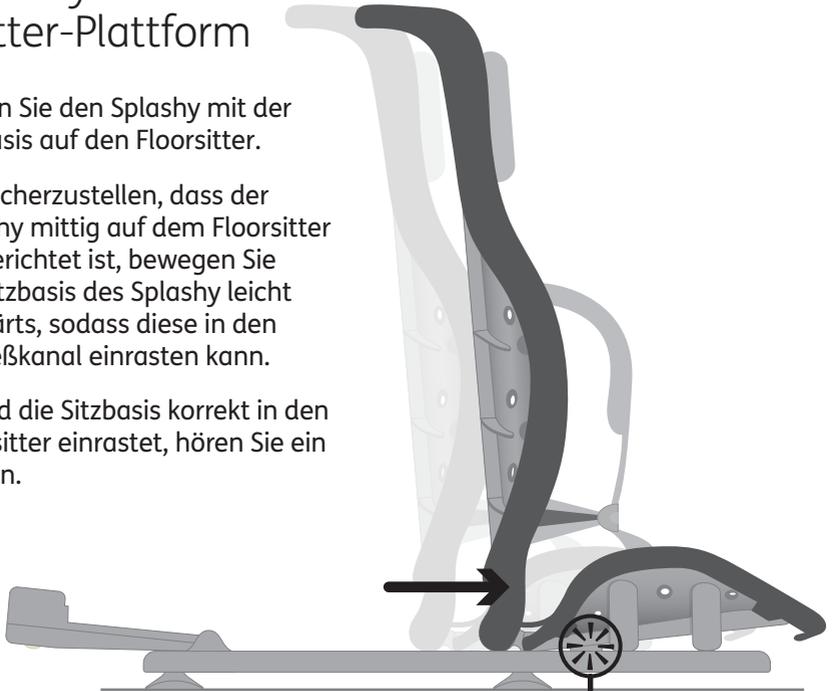


Achten Sie auf ein deutlich vernehmbares Klicken, wenn Sie die Sitzbasis des Splashy mit der Floorsitter-Plattform verbinden.

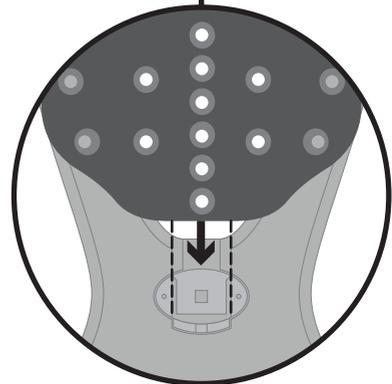

Bevor Sie den Rückenlehnenarm an die Rückenlehne anbringen stellen Sie bitte sicher, dass dieser auf höchster Stufe eingestellt ist.


Während Sie mit einer Hand den Splashy festhalten, drücken Sie mit der anderen den hervorgehobenen Knopf und schieben Sie den Aufsatz in die Rückenlehne.

Bei korrekter Anbringung hören Sie ein Klick.

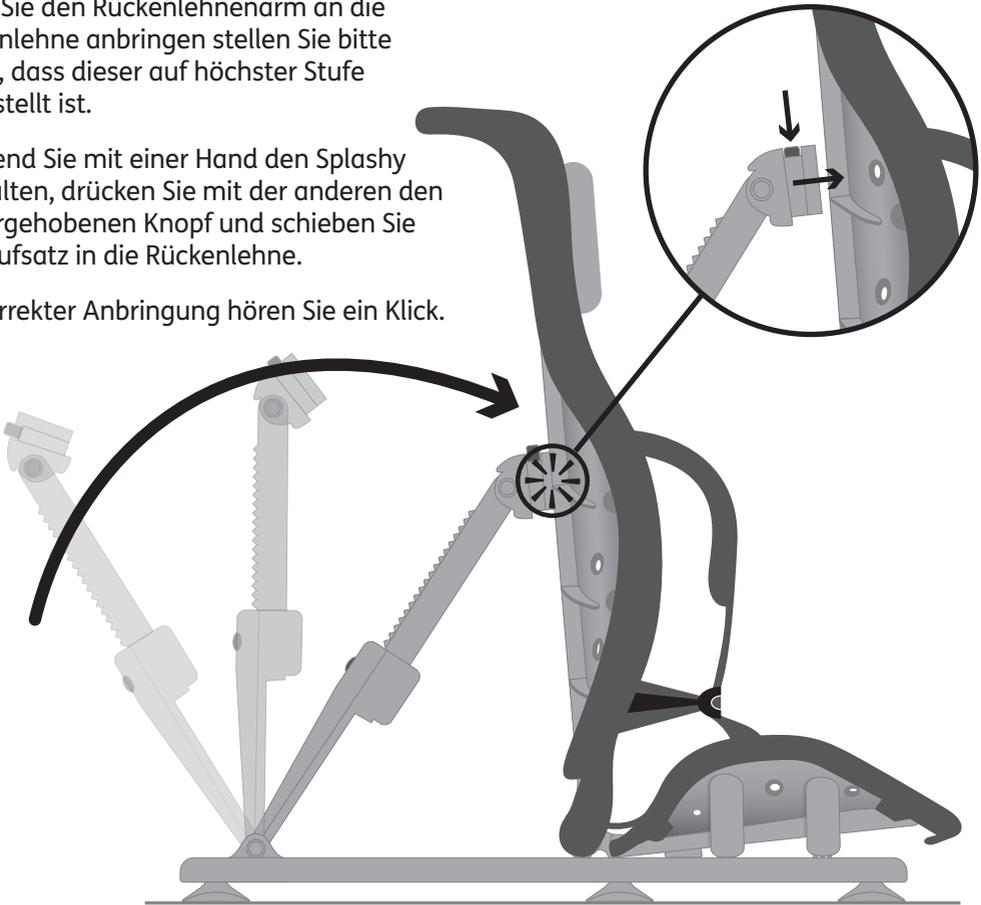

Folgendes Bild zeigt den vollends montierten Badewannensitz.

Sie können Ihr Kind nun in Splashy setzen.

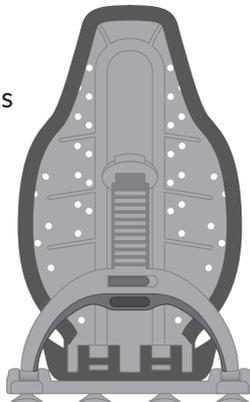


09.3 Pufferstützen

So bald Ihr Kind mithilfe des Verschlussgurtes sicher im Splashy sitzt, können Sie zur zusätzlichen Stützung die Puffer befestigen.

Auf diesem Bild dienen die Puffer zur Stützung des Kopfes; diese können aber zudem als Knauf, als Anti-Rutsch-, oder Beinstütze verwendet werden.

Falls Ihr Kind mehr Stützhilfe im Splashy benötigt, können Sie auf unserer Firefly-Webseite, im Bereich Zubehör, weitere Puffer erwerben.

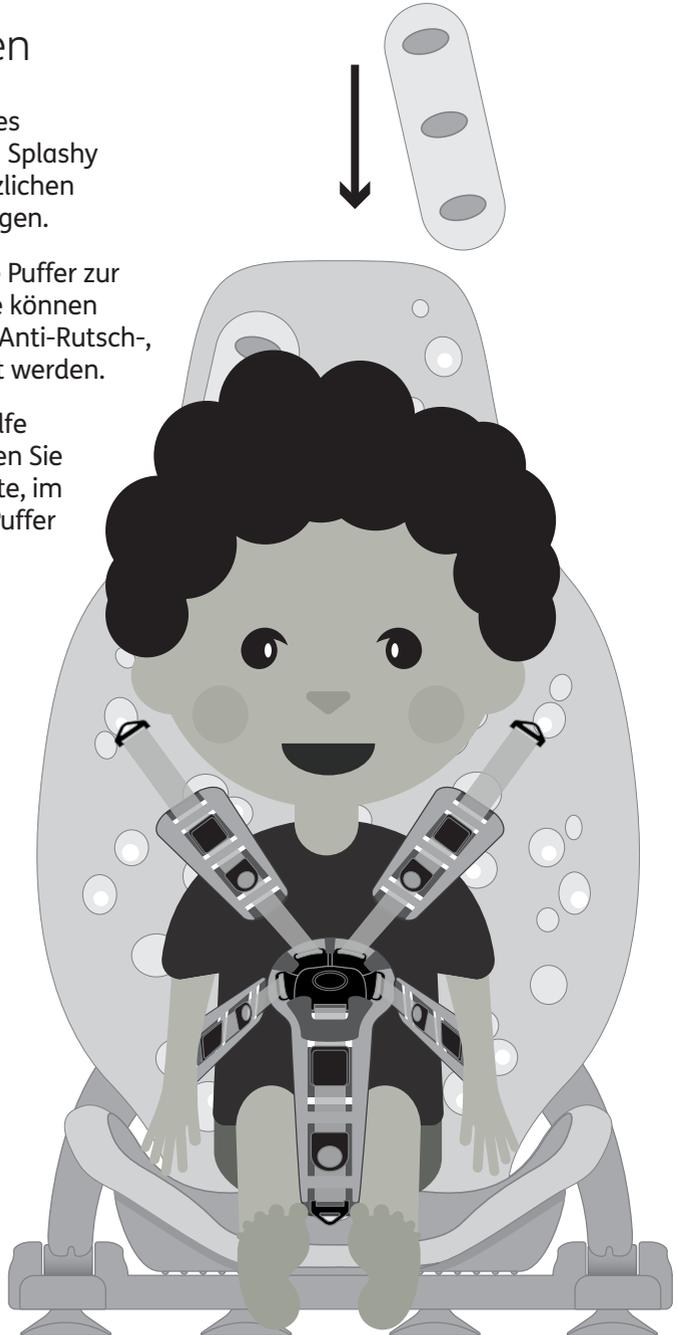


09.3.1 Anbringung der Puffer als Stütze an diversen Stellen

Die Puffer können wie folgt verwendet werden:

1. Als Kopfstütze – platzieren Sie jeweils einen Puffer an die linke und rechte Seite des Kopfes.




2. Als Nackenstütze – platzieren Sie einen Puffer längs an den Nackenansatz.

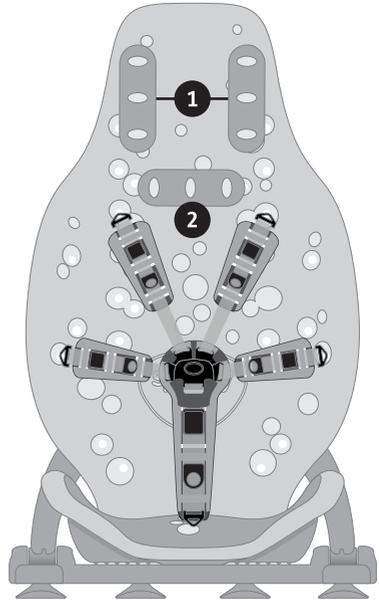

3. Als Knauf – platzieren Sie einen Puffer zwischen die Beine Ihres Kindes (um ein Überkreuzen zu verhindern).

4. Als Beinstütze – platzieren Sie einen Puffer jeweils an die äußere Seite des rechten und linken Beines (hilft, das seitliche Wegkippen aus dem Badewannenstuhl zu vermeiden).

5. Anti-Rutsch-Hilfe – platzieren Sie einen Puffer längs an die Sitzbasis des Badewannenstuhles, vor dem Po Ihres Kindes (hilft dabei, ein Vorrutschen des Kinderpos im Sitz zu vermeiden). Für manche Kinder ist es bequemer, wenn ein Puffer vor dem Leistenteil angebracht ist.

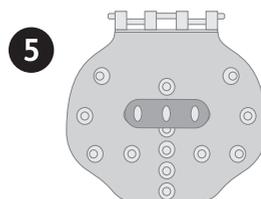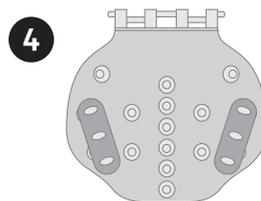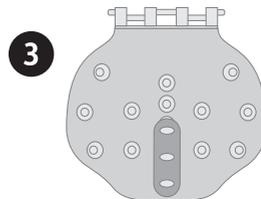

09.4 Verstellen der Gurte zur sicheren Wäsche

Stellen Sie für die Wäsche einen 4-Punkte-Gurt ein, indem Sie die Schulterriemen entfernen.

Um den Schulterriemen zu entfernen, lösen Sie den Knebelverschluss von der Rückseite der Rückenlehne.




Zur Wäsche der unteren Körperhälfte stellen Sie einen 4-Punkte-Gurt ein, indem Sie den Seitenriemen entfernen.

Um den Seitenriemen zu entfernen, lösen Sie den Knebelverschluss von der Rückenseite der Rückenlehne.




09.5 Kürzen der Seiten- und Schulterriemen

Falls ein kleineres Kind den Splashy nutzen sollte, mag es vonnöten sein, die Seiten- und Schulterriemen zu verkürzen

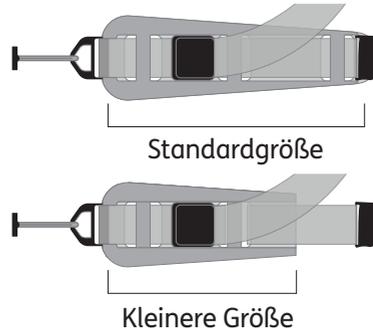


- 1** Bei Lieferung Ihres Splashy sehen die Riemen aus wie auf der Abbildung. Um die Riemen zu verkürzen, befolgen Sie bitte diese Anweisungen.
- 2** Entfernen Sie die hervorgehobene Sektion des Riemens vom Schaumstoffmaterial.
- 3** Falten Sie das dünnere Ende des Schaumstoffes zurück und stellen Sie sicher, dass die Öffnungen übereinanderliegen.
- 4** Fädeln Sie den Riemen durch die erste Öffnung des gedoppelten Schaumstoffes.
- 5** Sobald er komplett durchgezogen ist, fädeln Sie den Riemen durch die zweite Öffnung und ziehen Sie ihn fest.

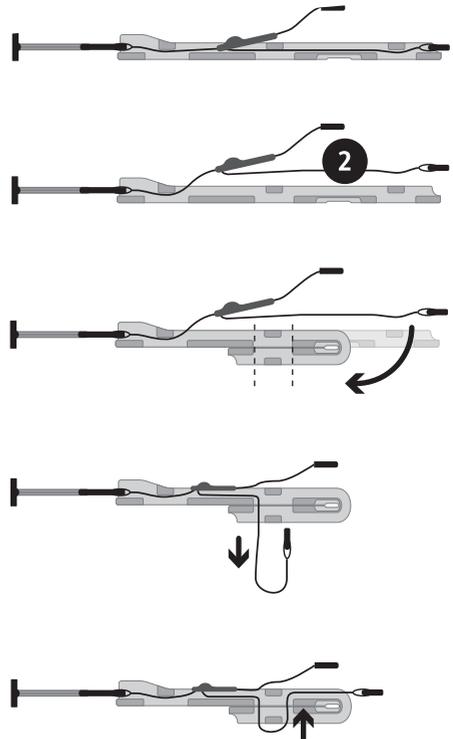


09.5.1 Verkleinerung des Leistentails

Falls ein kleineres Kind den Splashy nutzt, ist es in manchen Fällen notwendig, das Leistenteil zu verkleinern.

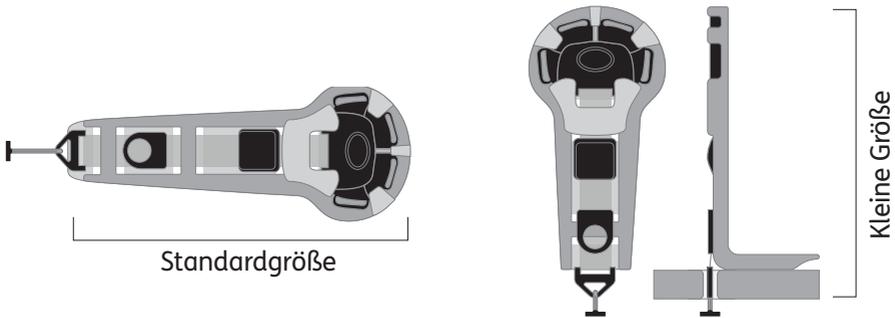

- 1** Das Leistenteil sieht bei Lieferung wie folgt aus. Zur Verkleinerung des Leistentails befolgen Sie bitte folgende Anleitung.
- 2** Lösen Sie den hervorgehobenen Bereich des Gurtes vom Schaumstoff.
- 3** Klappen Sie den Schaumstoff um, um das Leistenteil zu verkleinern. Stecken Sie den Knebelverschluss zurück in das Loch der Sitzbasis.

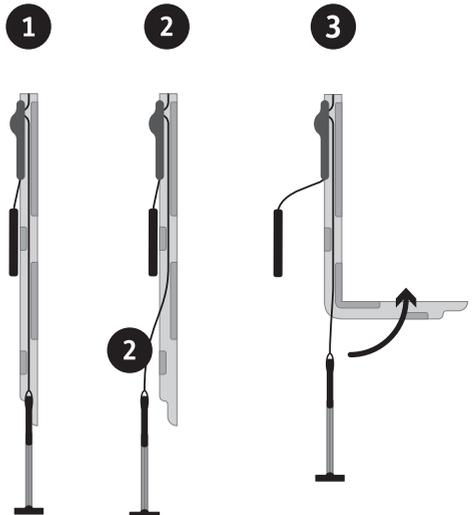

09.6 Empfohlene Positionen der Rückenlehne

Aufrechte Position – Wenn Ihr Kind eine gute Sitztoleranz besitzt sowie über Rumpfkontrolle verfügt, ist eine aufrechte Sitzposition möglich.



Mittlere Sitzposition – wir empfehlen Ihnen, während des Hineinhebens Ihres Kindes in den Sitz, die mittlere Sitzposition einzustellen.



Zurückgelehnte Position – Falls Ihr Kind in den Badewannensitz gehoben werden muss, empfehlen wir, die Lehne in die komplett zurückgelehnte Position zu stellen.




09.6.1 Nutzung der Neigefunktion der Rückenlehne

So bald ihr Kind sicher und gestützt im Splashy sitzt, kann die Neigung der Rückenlehne eingestellt werden.


Gehen Sie bei der Veränderung der Neigung umsichtig vor. Führen Sie diese Bewegung so sanft wie möglich aus, um eventuelle Ängstlichkeit des Kindes zu vermeiden.

Um den Splashy in eine aufrechtere Position zu bringen, legen Sie Ihre Hand auf den Splashy Griff **A** oberhalb der Rückenlehne; die andere Hand legen Sie auf den grünen Klipp an der Armlehne des Floorsitters **B**

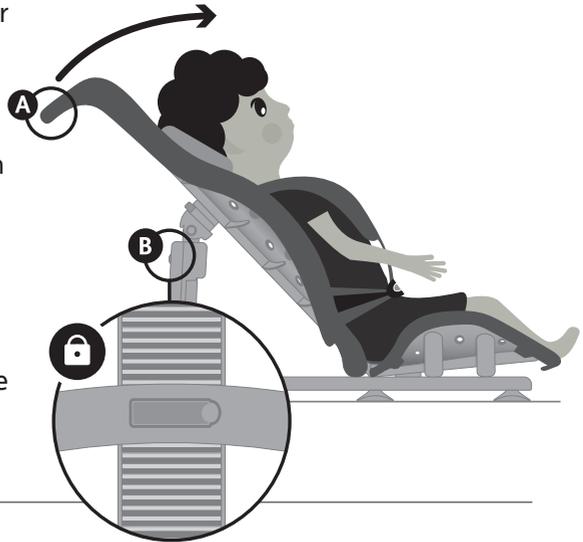

Lösen Sie den Klipp und bringen Sie den Badewannensitz in die gewünschte, dem Kind entsprechende, aufrechte Position **A**

Befestigen Sie den Klipp am Floorsitter. Sobald Sie ein Klick hören, ist der Klipp befestigt.

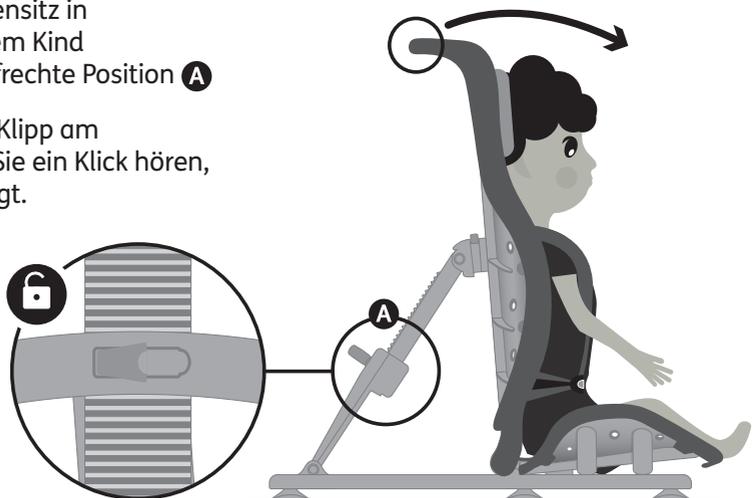


09.7 Entfernung des Splashy aus der Badewanne nach dem Baden sowie Demontage

Öffnen Sie die Gurte und heben Sie das Kind aus dem Splashy. Lassen Sie das Badewasser ab.





Mehr Anleitung zur sicheren Nutzung finden Sie unter Abschnitt 7.

Um den Splashy vom Floorsitter zu lösen, drücken Sie den grünen Knopf und drücken Sie die Rückenlehne leicht nach vorne.

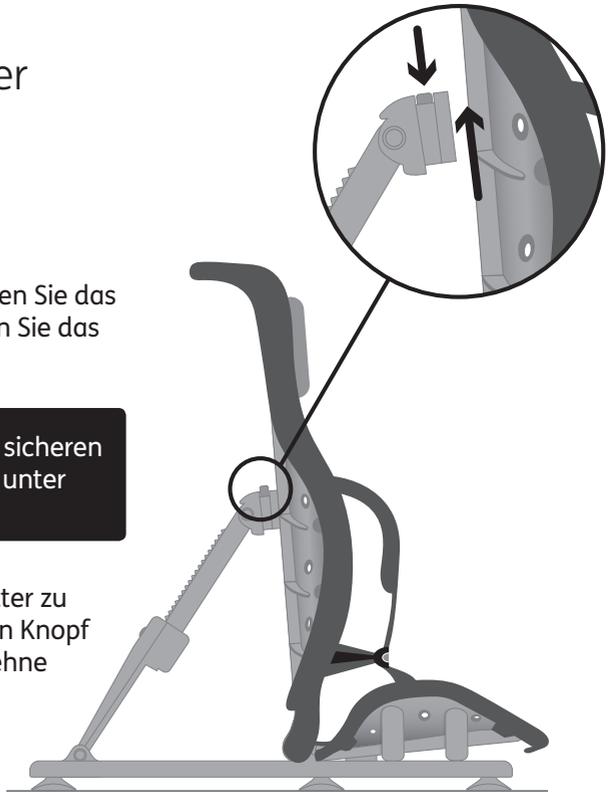


Zur Lösung der Sitzbasis, ziehen Sie am grünen Plastikstreifen **A** und gleiten Sie zurück. Zuletzt heben Sie den Splashy aus der Floorsitter-Plattform heraus **B**

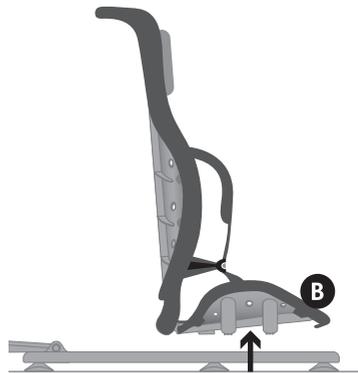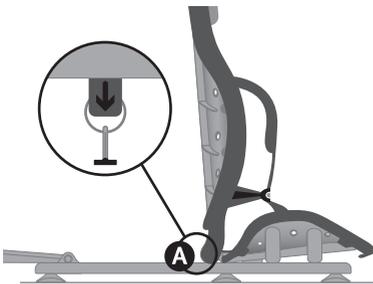


Zur Ablösung der Floorsitter-Plattform von der Badewanne, heben Sie den Rahmen leicht an, um die GummifüÙe abzulösen.

Falls die GummifüÙe sich beim ersten Versuch nicht lösen sollten, wenden Sie bitte keine Kraft an, um diese von der Badewanne zu lösen.

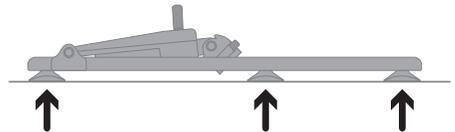

Schieben Sie ihre Hand sanft unter die GummifüÙe und sie werden sich lösen (verwenden Sie kein Werkzeug).

Legen Sie den Splashy seitwärts vor sich und lösen Sie die Sitzbasis von der Rückenlehne, indem Sie durch Zurückklappen der Sitzbasis den Scharniermechanismus lösen.

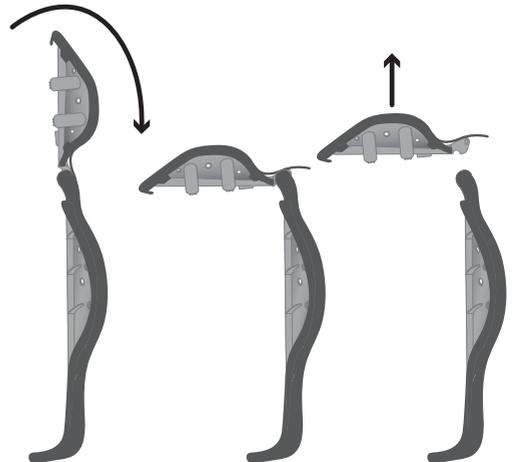


09.8 Abtropfen und Trocknen

Bitte wischen und spülen Sie den Splashy ab, bevor Sie ihn abtropfen lassen und verstauen.



Der Floorsitter kann trockengewischt werden (siehe Abschnitt 05).

Die Trocknung geht leichter vonstatten, wenn Sie den letzten Schritt in Abschnitt 09.6 auslassen, d. h., die Sitzbasis, die Rückenlehne und den Floorsitter, entsprechend dem Beispiel unten, in einem Stück belassen.


Drücken Sie den grünen Knopf oberhalb des Rückenlehnenarms und drücken Sie die Rückenlehne nach vorne um den Sitz abzulösen.

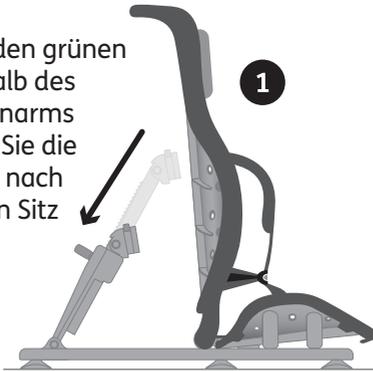

Klappen Sie den Rückenlehnenarm, entsprechend des Pfeiles auf der Abbildung, nach vorne.

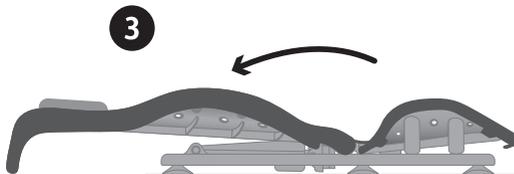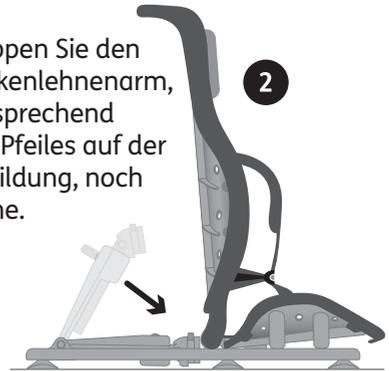

Legen Sie die Rückenlehne wie abgebildet auf dem Floorsitter ab.

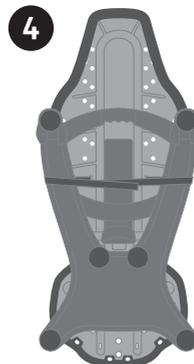

Verwenden Sie die Klettänder um den Floorsitter am Splashy zu befestigen.

10: Größeninformationen

Splashy Badewannensitz - technische Informationen	
Breite Rückenlehne	385mm
Höhe Rückenlehne	610mm
Tiefe Sitzbasis	300mm
Breite Sitzbasis	350mm
Breite Floorsitter-Plattform	420mm
Länge Floorsitter Plattform	630mm
Nutzer Maximalgewicht	30kg (66lbs)
Alter (ca.)	1- 8 Jahre
Produktgewicht	3,9kg



Firefly by Leckey,
19c Ballinderry Road,
Lisburn,
Northern Ireland,
BT28 2SA

Vereinigtes Königreich:

0800 318 265

www.fireflyfriends.com

