

LECKEY

Leckey BeMe

一人ひとりに見合ったサポート
「ビー・ミー」

子どもに必要なサポートを提供する



シーティングがどのように子どもの生活に影響を与えるのか？



姿勢と
快適性



機能性
と遊び




発達と
帰属性

LECKEY

BeMe ビー・ミーの誕生

全商品ライナップの開発に動員されている革新技術と30年間シーティングに関わってきた経験を全て統合して、子どものための最適なシートが誕生しました。

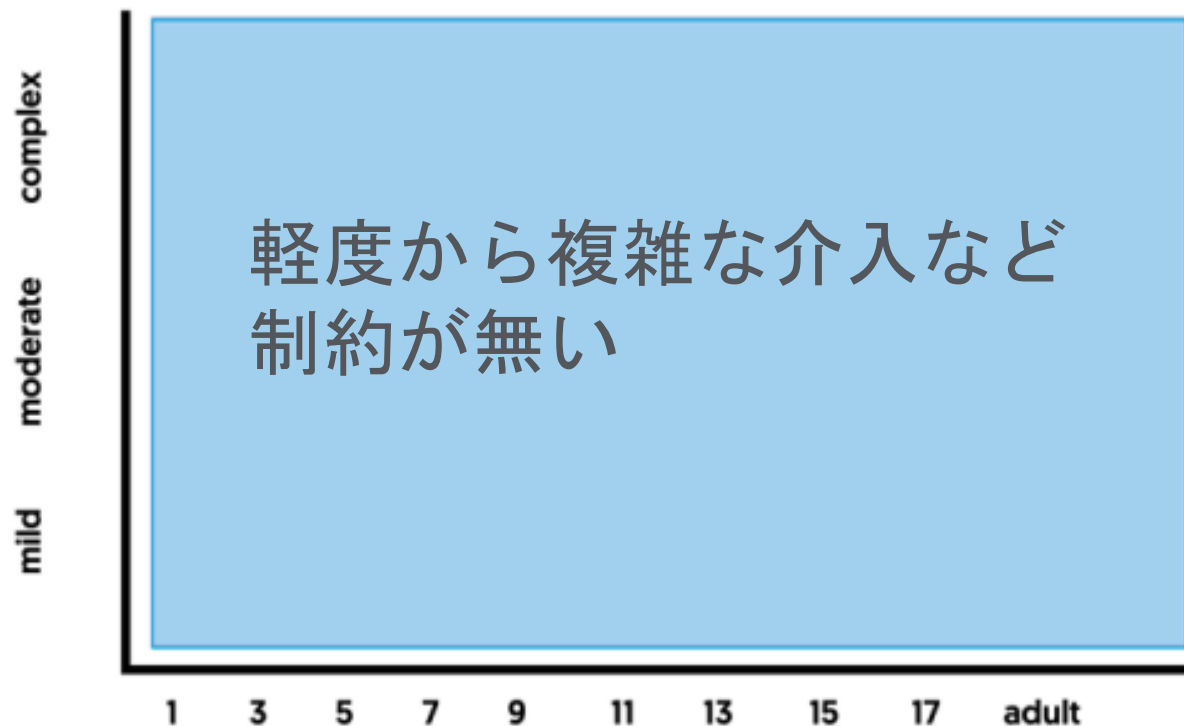

LECKEY

ビー・ミーのシー
ティングでワクワク
しよう！



LECKEY

LECKEY BeMe

ビー・ミーとは？

- ビー・ミーはモジュラー型のシーティングシステムです。各児のニーズに対応できるように3つのシートと 3つのバックサポート選択があります。
- ビー・ミーは新しいシーティングシステムであり、幅広い変更可能オプションと特徴的な機能が 付帯しています。



座面オプショ設定



コントゥアシート



ベーシックシート



分割シート




LECKEY


バックサポートオプション



ベーシック

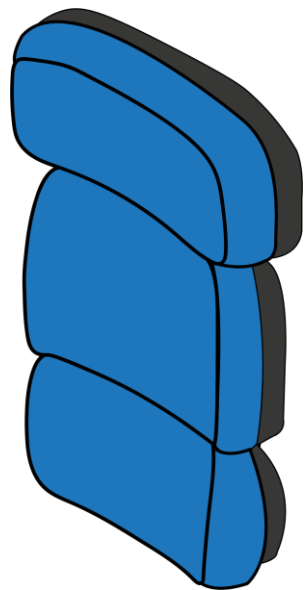

モデレート
(中等度)

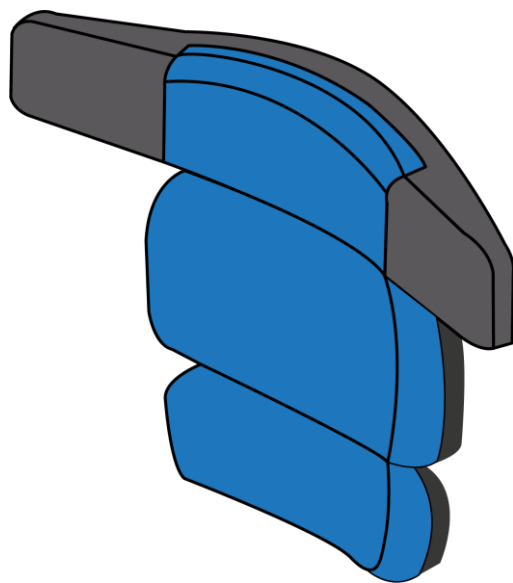

コンプレックス 3D



LECKEY

一人ひとりの個性に対応

ビー・ミーは制約無く個々に見合った最適な調整が可能です。

ビー・ミーは子どもの発達と体験を視野に開発されています。

子ども自身が
「自分らしく（ビー・ミー）」
過ごせ


る様に。

LECKEY



世界初、“真”の成長対応クッション

- ・ 特別に開発された高い伸張性のあるフォームや 素材を用いている革新的な成長対応クッションです。
- ・ 子どもの骨盤を包み込む形状は十分な沈み込みによる快適なポジショニングを提供するとともに圧の 分散と機能を促進させます。
- ・ ポメル（内転防止）やヒップガイドの様なパーツの必要性が減少します。

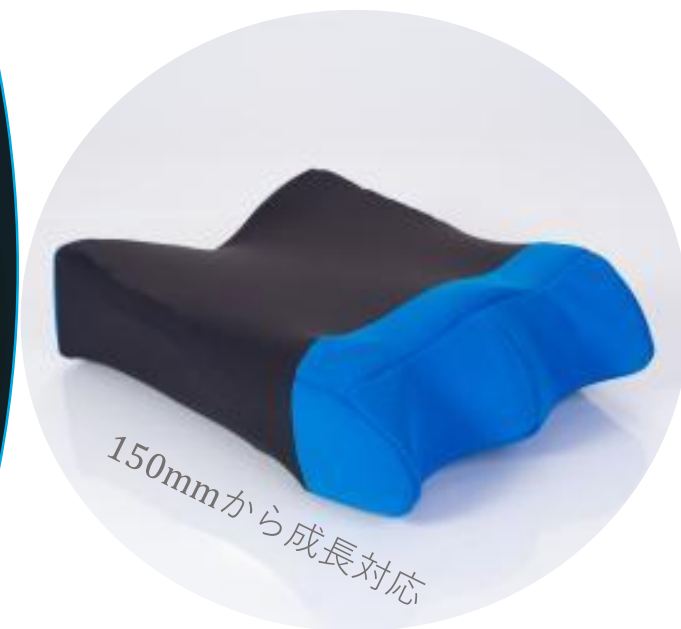

ビー・ミーは、サポート（支持）力を妥協せず
子どもがセンターステージ（主役）となる生活を提供します。

LECKEY



IMMERSIVE
COMFORTABLE
POSITIONING

簡易にパーツが取り替えできる

ビー・ミーではパーツの取り外しや取り付けがすぐに簡単に行えるため、日常の取り回し負担が 少ないです。

- ビー・ミーは直観的にパーツを楽に調整できます。
- 座奥、座幅や背高などの調整も、子どもが座ったままの状態でも 実施することが可能です。
- アームレスト、ポメル（内転防止）や大腿部サポートは非常に簡易に取り外しが できるため、移乗操作が今まで以上に負担なく行えます。

LECKEY





特殊な動的機構

ビー・ミーには特殊な動的な機構が
付帯しています

動的機構が何故必要なのか？

- 筋緊張管理が行えたまま、最適な座位姿勢が維持される。
- 伸展パターンの力学的負荷を吸収することで前すべりと仙骨座りを予防するため。
- 感覚入力のため。
- ある程度の動的な可動機構を必要とする子どものため。






スムーズで制御された動き

- 背面の可動性は空気圧を用いて制御されています。
- バックサポートの可動速度は使用する子どものニーズや快適性を考慮して調節することが可能です。
- 子どもの骨格と筋力の成長や変化に合わせて、最適な動的機構のスプリング強度が調整できます。
- 摂食、移乗、移動や遊びの際は、簡易にオフに設定することができます。

特殊な動的機構

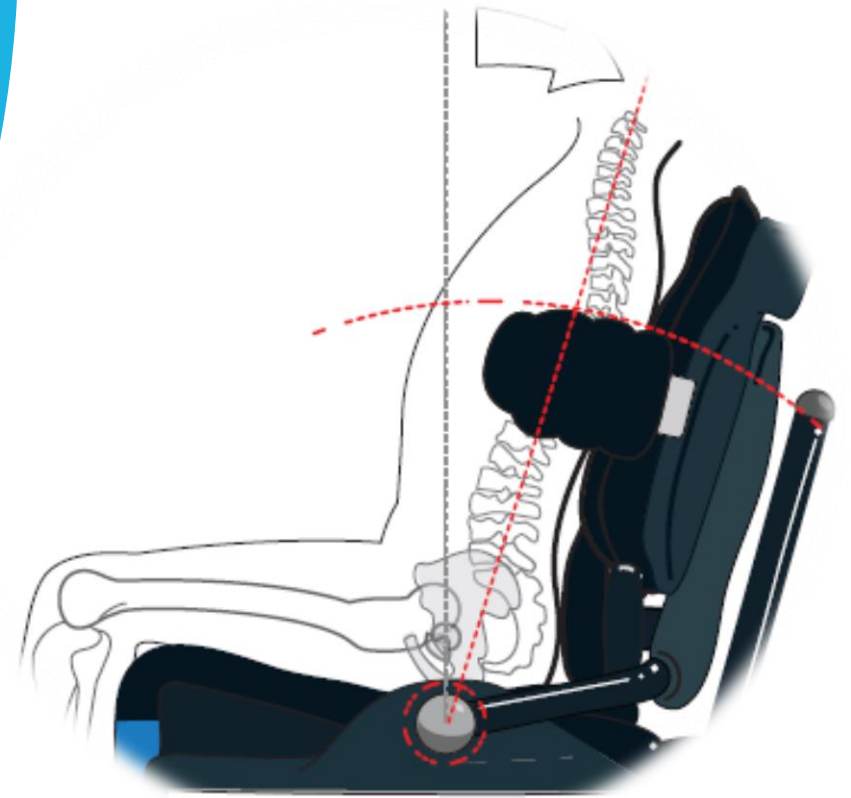

背面の動的機構は座骨結節を基点として、回転軸で動く様に設計されているため、座位時の体幹の動きに連動しています。そのため、本機構ではラテラルやヘッドサポート位置が子どもの背面とアライメントが維持されたまま可動することが可能になります。

感覚入力を取り入れる作業のための付属パーツ

- 三つの選択オプションがあります；ショルダーウィング、トレイ肘ブロックやラテラル延長パッドを使用して上肢が機能的な中間位 保持をできる様に個別にセットアップが可能です。
- ショルダーウィングバックサポートパーツは肩甲骨の安定性を保持し、トレイ肘ブロックは高い緊張に誘発される上肢の可動性制御に 作用し、ラテラル延長パッドはトレイを用いた作業動作時の中間位保持を促進させられる機能があります。
- 特に電動制御機能が付帯されるの車椅子、コミュニケーション エイドやデジタルデバイス使用時に有効です。



臨床的な優位性について

シーティング介入では、小さな項目でも大きな革新的な機能項目と同様に 重要であり、座る方に影響を及ぼしています。

製品紹介内で触れるビー・ミーの臨床的に特異なポイント：

コントゥア
クッション

スライディング
移乗可能

複数種類の
バックサポート

六角ボルトでの
現場調整の簡易さ

サイズ交換と
成長への対応力

特殊な骨盤
クレイドル

四方向に調整
可能なラテラル

クレイドル付き
ヘッドサポート

感覚入力が必要な子
どものためのパッド
やオプション

速度、強度とロック
解除可能な動的背面
機構

ネオプレンストレッ
チ
材質のハーネス

高コントラスト
トレイテーブル



LECKEY

臨床で導入・試験実施

- 通算、3年間で120人の子どもに試験導入済みです。
- 改良を加えた試験機関の後半の導入ケースで良好な介入結果が見られました。
- ビー・ミーの調整機能や汎用性に対して療法士、介助者や技術者から高い賞賛が得られています。

「車いすに子どもが適合するのではなく、
子どもに車いすが適合してい

る！」
※車いすへの取付けも選択できます



高いサポート力

子どもに関わる全ての方々への充実したサポート

子どもの生活に深く関わるご両親、療法士や購入者に対する幅広いサポート：

- 冊子
- 臨床ワークブック – 詳細に臨床ガイドが記載
- 症例紹介
- 臨床適応の論拠資料
- How-to（ハウツー）動画
- 技術的仕様情報やガイド
- 画像付き付属品リスト
- オーダーフォーム
- スペアパーツ

leckey.com（英語）を閲覧頂くか、メーリングリストに登録して頂けますと最新情報を受けることができます。



ビー・ミーは、シーティング業界
へ 真のイノベーションをも
たらしています

革新性と個別性を実現します

一人ひとりの個性をサポート



製品紹介 シートコア

LECKEY



製品紹介



シャシーとインターフェイス

LECKEY



製品紹介 シートタイプ

LECKEY

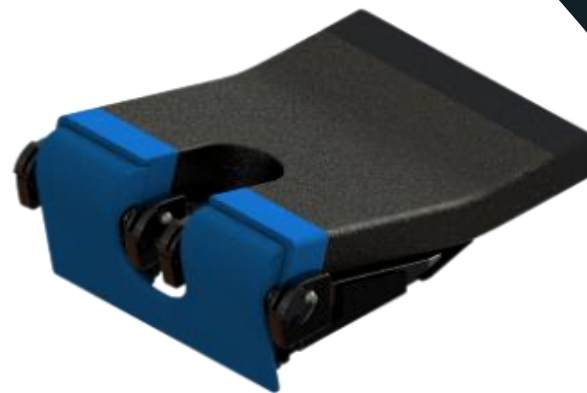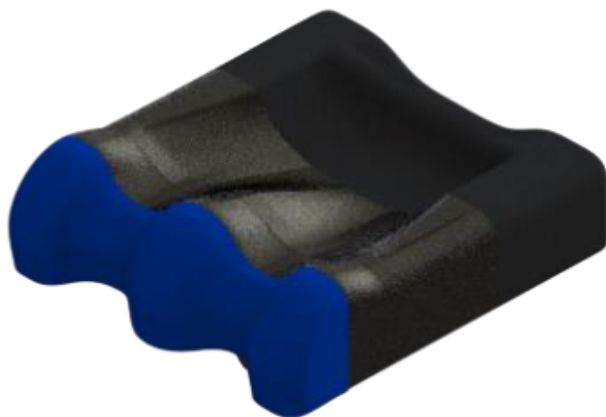

製品紹介 バックサポート

LECKEY



製品紹介 動的機構（ダイナミック）

LECKEY




製品紹介 骨盤ベルト

LECKEY



製品紹介 ヒップサポート

LECKEY

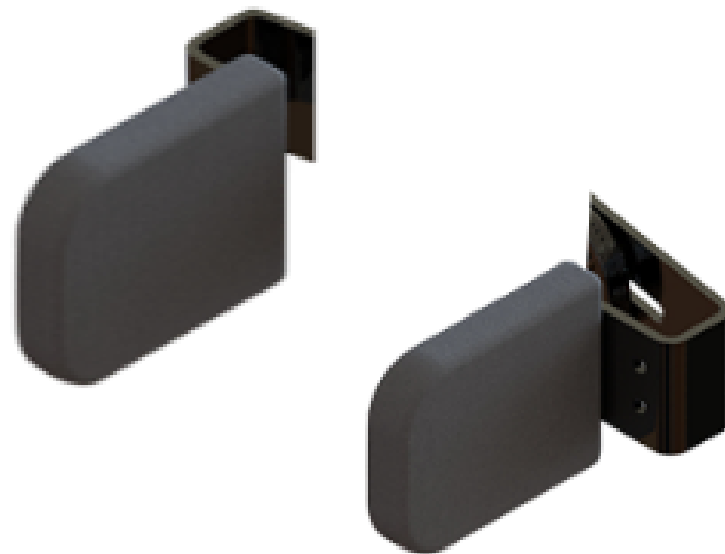

製品紹介
大腿部サポート/
ポメル（内転防止）

LECKEY




製品紹介 胸部ベルト

LECKEY



製品紹介 胸部ラテラル（体幹） パッド

LECKEY

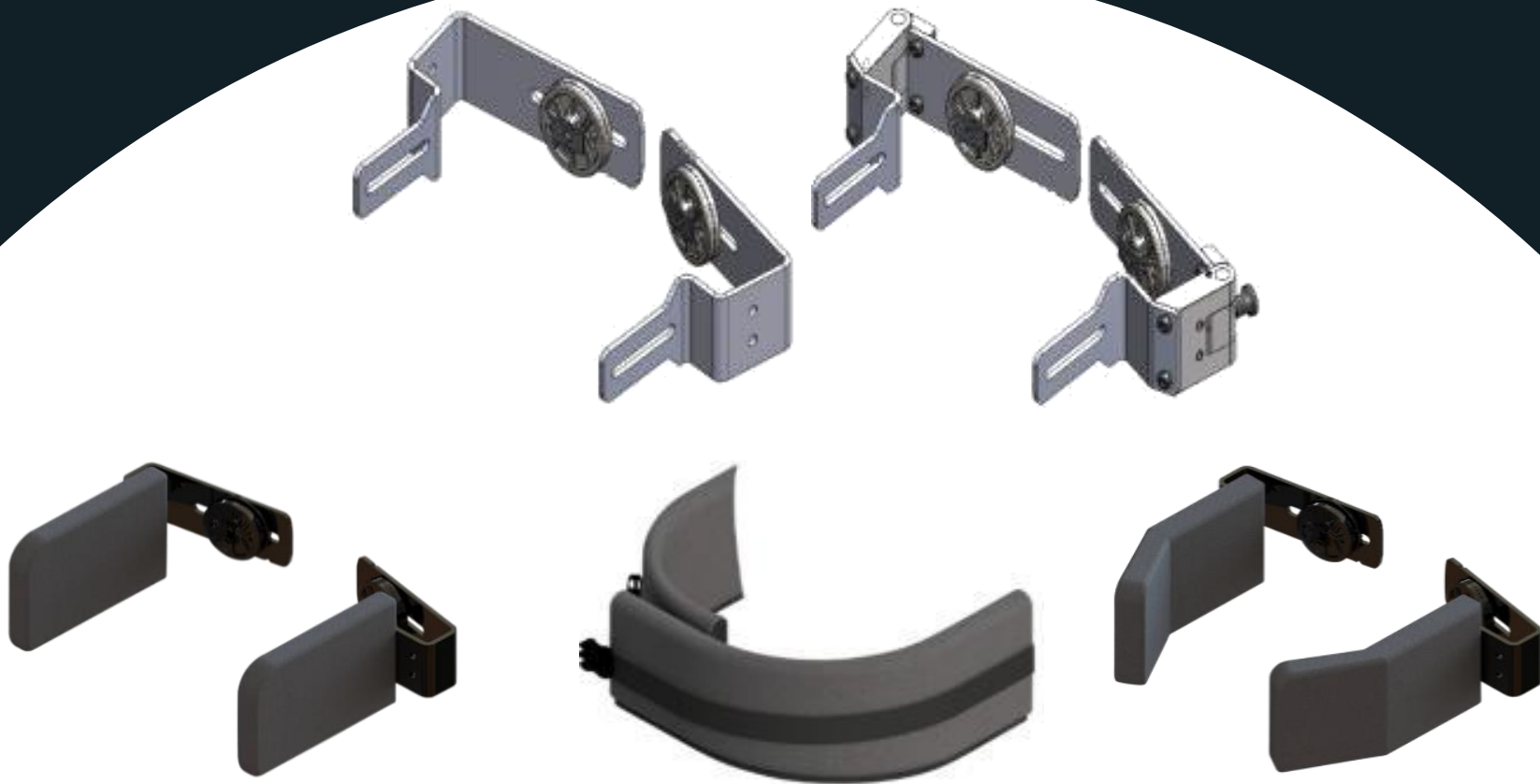

製品紹介 延長パッド

LECKEY



製品紹介 アームレスト

LECKEY



製品紹介 トレイテーブル

LECKEY



製品紹介 レッグサポート

LECKEY



製品紹介 フットサポート

LECKEY



製品紹介 ヘッドサポート

LECKEY





製品紹介 日よけ

LECKEY



製品紹介 カラーオプション と材質

LECKEY

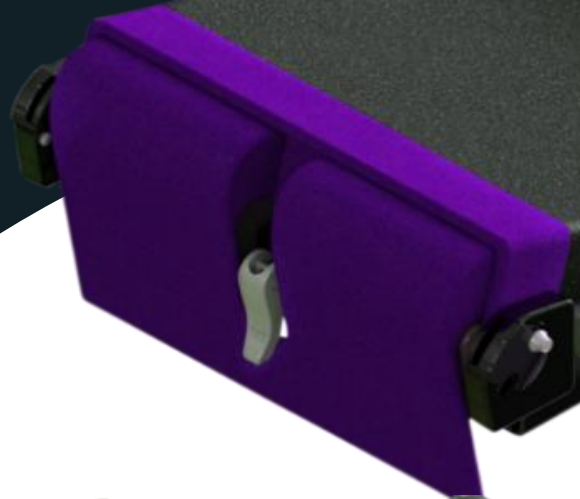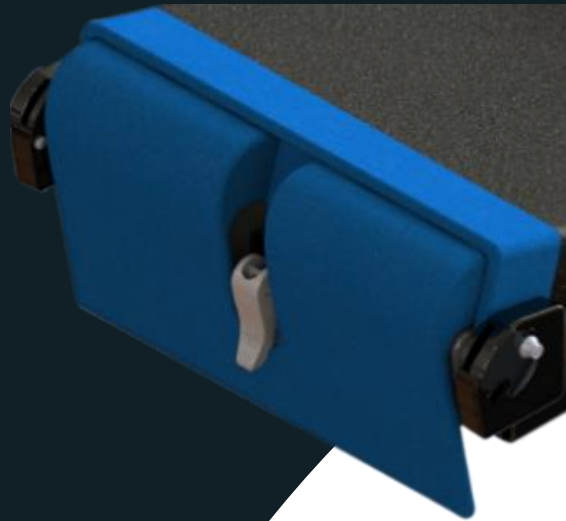

A blue motorized wheelchair is positioned in a bright, modern interior space. The room features large glass doors and windows that let in natural light. A tall potted plant stands near the windows. The wheelchair is facing away from the camera, towards the left side of the frame.

LECKEY BeMe

Support as individual
as you are