

# NITRUM

## ニトロム

Launch Presentation  
新発売 説明資料

2021年2月



# 販売メッセージ



## 車いすの乗り心地を全く新しいレベルへ！

Quickieニトロムは、効率的にエネルギーを運動に変換し、最小限の力で漕げるように設計されています。


- 36以上のフレーム構成により、フィットとパフォーマンスの最高の組み合わせが可能です
- 非常に軽量 - 少ない力で最高の力を発揮
- キャスターリンクメカニズム(特許出願中) - 耐久性とパフォーマンスが向上
- オプションのツイストロック・バックレストリリース - シンプル、簡単、効率的



# なぜニトロム

## か？

- 次世代テクノロジー満載のリジッドチェア(固定車)
- クイッキー技術革新の成果
- より強い/より軽いアルミニウム
- よりパーソナルでカスタマイズされたオプション類

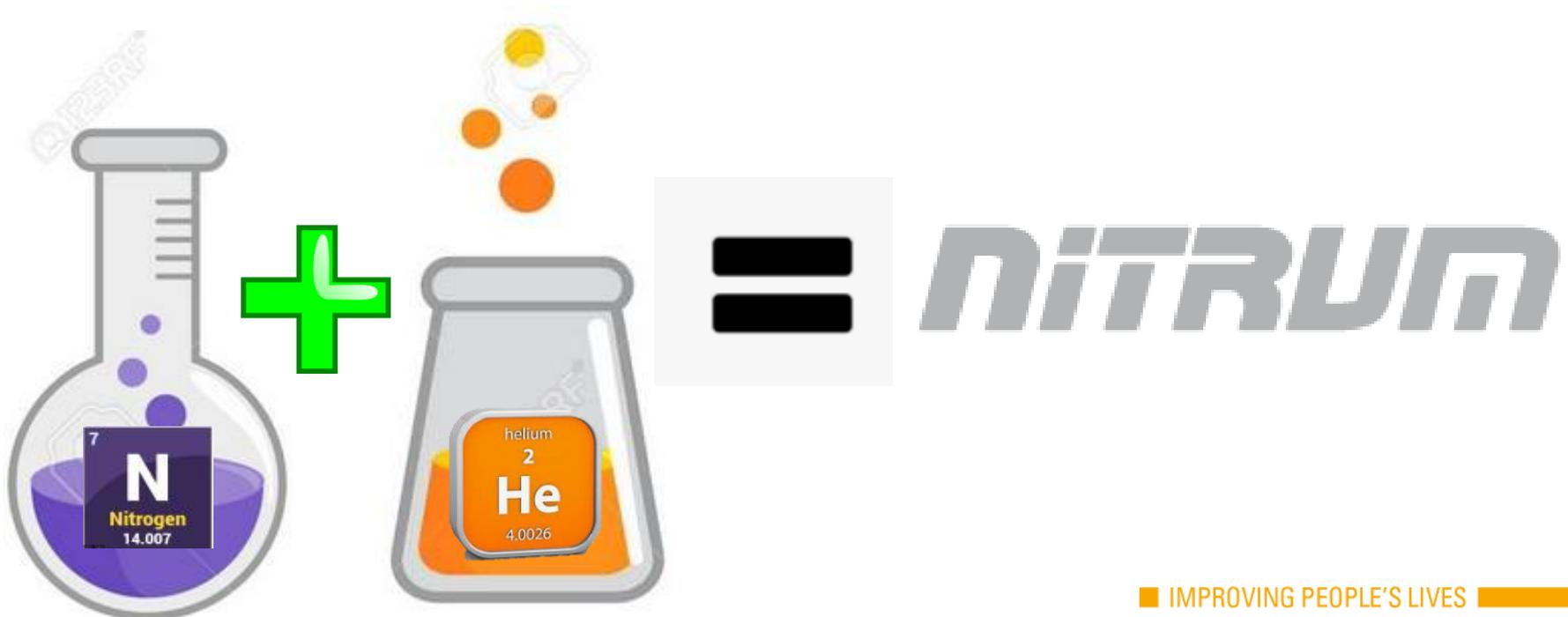

- ① 軽量
- ② 操作性
- ③ 機能性



## ① 軽量

- ・ 軽量だから持ち上げるのが楽
- ・ 軽量であるほど推進力は容易
- ・ 軽量であれば輸送も楽



**NITRUM**  
ニトロム

# ニトロム - 軽量



- すべてのユーザーに最適な車いす:
- なぜ重量が重要なのか:  
車いすの重量が軽い=こぐ力が少なくて済む
- 車いす重量+ 2lbs ↑ = 必要な推進トルク2% ↑  
(2lbs = 907.2g)
- 可搬性: 重量が自立の鍵となる可能性があります
- 軽量化には高レベルの素材が必要  
その結果耐久性が向上します



## ニトロム- 軽量



- 身体機能に制限のあるユーザーの場合、±1kgが、車いすを車に自分で載せられるか、介助が必要かの分岐点になることも
- ニトロムは、クラス最軽量。標準構成8.3 kg(ホイールを含む)、輸送重量4.9 kg(ホイールを除く)から入手できます。
- クイッキーニトロムはクイッキー7Rより3%軽量です

Weight Comparison	QTY	Nitrum		7R		Delta (g)
		Each (g)	Total (g)	Each (g)	Total (g)	
Frame	1	1274	1274	1473	1473	199
Backrest	1	908	908	688	688	-220
Caster Stem Assembly	2	122	244	108	216	-28
Frame Plug	2	36	72	102	204	132
		<b>Total</b>	<b>2498</b>		<b>2581</b>	<b>83</b>

# ニトロム- 軽量

- 日常の使用に適した重量8.3kgモデル 仕様:成人サイズ(16”x16”・40x40cm)、軽量背もたれ、標準タイプ背布、コンパクト・ホイールロック、24”ライトスポークホイール、ローポリキャスター、チューブラーフットレスト
- 他社の同タイプ車いすの重量(計量後、実質的に同等の仕様に変換済)および利用可能なフレーム構成:



Quickie ニトロム 

重量: 8.3 kg  
フレーム角度: 3  
フレームインセット: 3  
固定溶接: あり



TiLite エアロ Z

重量: 8.9 kg  
フレーム角度: 5  
フレームインセット: 3  
固定溶接: なし



Kueschall K-シリーズ:

重量: 8.4 kg  
フレーム角度: 2  
フレームインセット: 2 (V-フレーム)  
固定溶接: あり (KSL)



Motion Composites Apex A

重量: 8.7 kg  
フレーム角度: 5  
フレームインセット: 3 (V-フレーム, 実際のテーパーではない)  
固定溶接: なし

## ② 操作性

- ・ より強く・剛性が高い
- ・ 楕円7020アルミ
- ・ キャスター機構




**NITRUM**  
ニトロム

# ニトロム- 操作性



ニトロムの重量と剛性の比率の鍵となるのがフレームチューブです。高レベルの素材と楕円形のチューブにより、フレームの剛性と効率に影響を与えることなく、重量を1/3に減らすことを実現。


- 7020アルミ合金は、高負荷の構造用途向けの高強度、溶接・熱処理可能なアルミニウム合金です。代表的応用例は、航空宇宙関連、オートバイ、高性能自転車です。
- 特許取得済みのシェイプロック (ShapeLoc) 楕円フレームチューブ：  
フレームチューブとクロスバーは圧搾された楕円形です：
  - 垂直フレーム剛性の増加
  - 楕円形のチューブ形状がクランプの形状にぴったり合うので、クランプ（アクスルシステム、サイドガード）の軽量化が可能になりました（クランプは楕円形のチューブ上で回転できません）

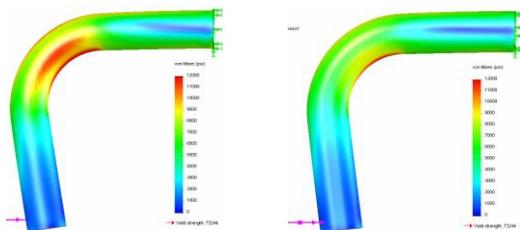

Round Tubing

Oval Tubing

- 赤はストレスの最高点を示します
- 青は最低点です。

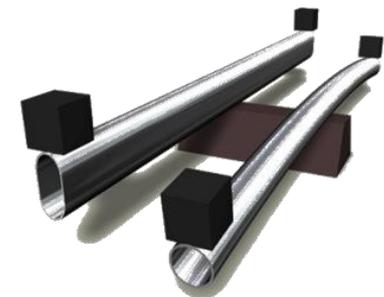

■ IMPROVING PEOPLE'S LIVES

# ニトロムー 操作性


- フレームはフレスノ工場でおオーダーメイドされます。メインフレーム(フレームチューブ、キャスターリンク、クロスチューブ)は溶接されており、(他の多くのメーカーのように)クランプ留めされていないため、剛性が高く、軽量化が実現しました。
- フレームは溶接後に熱処理され、アルミの硬度と強度が向上します。

## ハイドロフォーミング:

金属管を軽量で構造的に硬くて強い形状に成形する技術。

ハイドロフォーミングでは、高い油圧を使用して室温のチューブ内を膨張させ、金型内に押し込みます。


ハイエンドのスポーツカー業界やハイエンドの自転車で特に人気がある製造方法です。

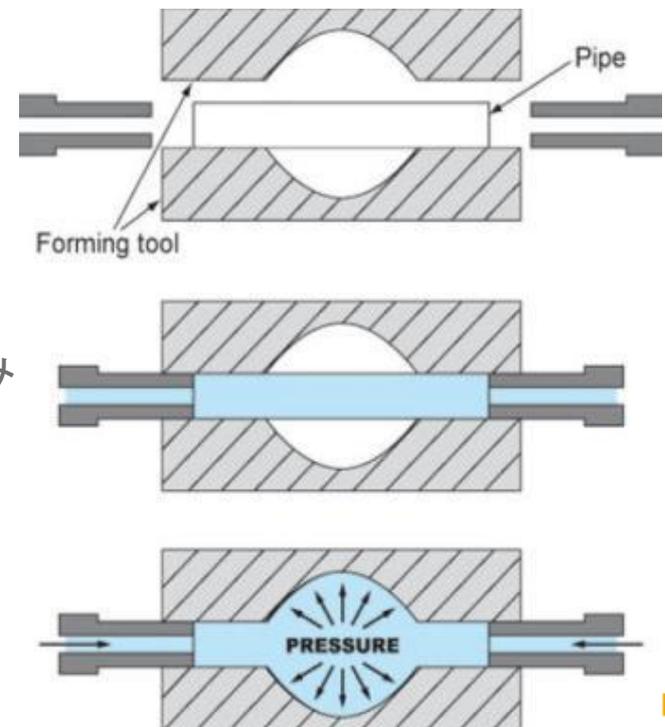

# ニトロム- 操作性

## 新しいキャスターリンクデザイン(意匠特許および特許)

- 高強度: ワンピース、中空鍛造アルミニウム
- キャスター機構の強化設計
- 3方向調整: 角度、直進、高さ (フローティングキャスターが生じません)
- 1" - 2" インセットで最適化されるキャスター位置 - 全フレーム角度/インセット/キャスターサイズに対して、ハンドリングと推進効率が向上します。  
(1"=2.54cm, 2"=5.08cm)
- 0インチ・インセットで使用可能なキャスター位置設定オプション。狭い場所に適した(ナロウ=狭い)または前部の安定性を増した(ワイド=広い)が選択可能

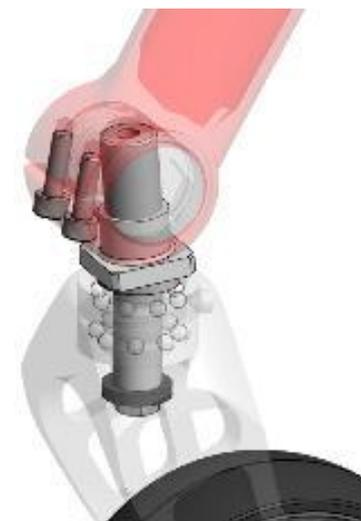

# ニトロム- 操作性

## 新しいキャスターリンクデザイン - 角度調整

- 工具:
  - トルクレンチ
  - 4mm六角レンチ
  - 90° 直角定規
- ステップ 1. - キャスターリンク下部にある2本の六角ボルトを緩めます
- ステップ 2. - キャスターフォークの角度を前方または後方に移動します
- ステップ 3. - 直角定規を使用して、キャスターフォークが床に対して直角90°であることを確認します
- ステップ 4. - 六角ボルトを7Nm (71.379Kgcm) まで締め直します。




SMAビデオをご参照ください

# ニトロム- 操作性

## 新しいキャスターリンクデザイン - 高さ調整

- 工具:
  - トルクレンチ用専用ツール (P/N66009203) 右図右側
  - 19mmフラットスパナ (P/N66009205) 右図左側
  - 3/8インチトルクレンチ
- ステップ 1. -レンチツール (P/N 6009203)とトルクレンチを使用して、フォークとキャスターの間の丸ナットを緩めます。
- ステップ 2. -フラットスパナを使用して、キャスターシステムを時計回りまたは反時計回りします。360度完全に回転するたびに、高さが1mm移動します。キャスターが地面に触れていることを確認してください。

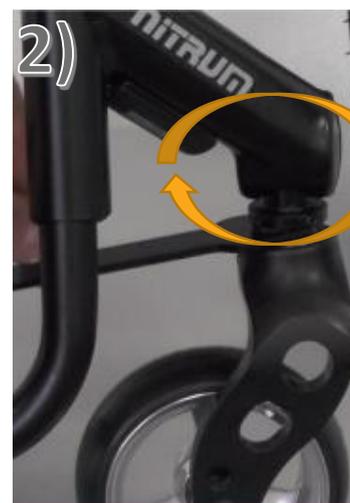

SMAビデオをご参照ください

# ニトロム- 操作性

## 新しいキャスターリンクデザイン - 高さ調整

- ステップ 3. - スパナレンチを使用して、丸ナットとフォークの間のキャスターアクスルをつかみ、90° まで回転させます。
- ステップ 4. - スパナを保持しながら、トルクレンチを使って丸ナットを28Nm (285.516Kgcm) まで締めます。



SMAビデオをご参照ください

### 3 機能性

- ・ 高度に設定可能
- ・ ツイストロック・リリース
- ・ LEDライト
- ・ さらなるオプション

**NITRUM**  
ニトロム




# ニトロム- 高度に設定可能

## フレームオプション

- フレーム角度:
  - ユーザーのポジショニングに不可欠
  - 角度3種: 75° / 80° / 85°
- フレームインセット
  - ユーザーのポジショニングに重要
  - インセット3種: 0" / 1" / 2"
- フレーム長:
  - 標準 または クラシック
  - クラシック: +1.5インチで前部の安定性を向上 (1.5"=3.81cm)
- シート幅と奥行き:
  - 12"~20"(30.5~50.8cm)まで1"(2.54cm)刻みで注文可能
  - シートの幅と奥行きの組み合わせは81種

Angle	0" ins	1" ins	2" ins
75°	X	X	X
80°	X	X	X
85°	X	X	X

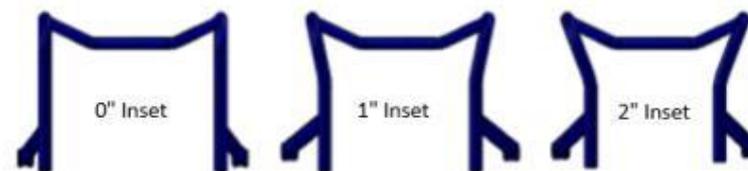

# ニトロム- 高度に設定可能

## フレーム・オプション

- キャスター設定:

- 1” - 2”インセットでキャスターポジションを最適化 - すべてのフレーム角度/インセット/キャスターサイズで、操作性と推進効率が向上します。(1”=2.54cm, 2”=5.08cm)
- キャスターポジション設定オプションが、0”インセットで利用可能です。狭い通路等の環境に適したポジション1(ナ로우=狭い)またはフロントの安定性をさらに向上したポジション2(ワイド=広い)が選択できます。



# ニトロム- 高度に設定可能

## フレーム・オプション

### 3つのバックレスト・オプション

- アルミニウム高さ調整式バックサポート
  - 鍛造アルミ、頑丈で遊びがない
  - 角度調整と折りたたみ機構を分離
  - 前方(-)18° から後方(+) $10^{\circ}$ 、3度刻みの9つの穴
  - 高さは10"~20" (25.4~50.8cm)
- ウルトラライトウェイトアルミニウム固定式バックサポート
  - リリースバー(引き上げると折りたたむ)とツイストロック付き
  - 高さ(固定)8"~19" (20.3~48.3cm)
  - 重量は 136g 減
- フリースタイル バックサポート
  - JAY J3(アルミまたはカーボンLT)バックシェル
  - 標準ブラックまたはフレームカラーと同色



# ニトロム- 高度に設定可能

## フレーム・オプション

### 2つのバックリリース・オプション

- プッシュバーリリース
  - リリースバー付き (引き上げて折りたたむ)
  - 1”(2.54cm)刻みで高さ調節可能
  - ダブルロック
  - すべての車いすに標準装備
- ツイストロックリリース(特許取得済み)
  - 片手の同じ動きで背もたれを折りたたみ、開くことができる直感的で人間工学に基づいたハンドル
  - ツイストして折りたたむ「ツイストロックハンドル」と「ダブルショット」ハンドルによりグリップが向上
  - ダブルロック
  - フリースタイル・バックレストおよび10”～13”(25.4～33.0cm)バックレスト高では使用できません。
  - ユニークな片手操作: 乗降時に超迅速で簡単な折りたたみ→ 片手操作は体幹の安定性がないユーザーに役立ちます。



# ニトロム- オプション

## キャスターリンクに付けるLEDライト (\*バッテリー登録出願中)

- 暗闇での視界と視認性を向上させます。
- 快適機能-暗い状況で外部光源は必要ありません  
- 屋内外！
- 一体型デザイン、防水&耐衝撃性ハウジング
- 片側4個のLEDがキャスターホイール周辺を照らします。
- 3つのモード:高、低、点滅
- コントロールボックスを含む。カーフストラップに取り付け(充電時は簡単に取り外し可能)
- リチウムイオン電池、4時間の実行時間



# ニトロム- オプション

## 新型コンパクト・ホイールロック

- 強化ハウジング:遊びが少なく、耐久性が向上
- ブレーキ力と操作性の向上
- ホイールを動かしてもロックされたまま
- 以前のモデルと比較して軽量化(-58.9g)
- 移乗時にじゃまにならないデザイン
- SHOXと高圧タイヤに対応
- 直付けとして利用可能  
(-175.9gの軽量化)



# ニトロム- オプション

## 新しいホイールロックオプション

- 標準 - プッシュ
- ニーレバー
- コンパクト
- 直付けコンパクト
- 延長ハンドルは、ニーレバー・ホイールロック  
でのみ使用できます。



# ニトロム- オプション

- スピナジー SPOX / LX カラースポーク
  - ブルー/レッド/ホワイト/グリーン/  
ピンク/パープル/イエロー/オレンジ
  - 追加料金なし



- 新型スピナジー CLXカーボンファイバーホイール

- 新しいステンレス・ライトホイール・ハンドリム

- 新しいタブマウント・ハンドリム・オプション:
  - 標準タブ
  - ナロウ(狭い)タブ (¥5,000)
  - スピナジー、プロトン、ウルトラライトホイールで利用可能



# ニトロム- オプション

## 革新的な張り調節式シート(座布)

- ストラップを張る際に必要な力が少なくて済みます
- 「ブロック・タックル」(滑車による2倍の力の張り調整)は、50%少ない力で張りを保ちます
- 片手でも調整が簡単
- 通気性のある生地
- あらゆるポジショニングに最適な土台となります



# ニトロム- オプション

## さらなるパーソナル・カラーオプション

- フレームグラフィック(タトゥー)  
色付きドットパターン
- EXO カラー縁取り
- アルミキャスト カラーオプション
  - アノダイズ・パッケージ
  - フレーム色とマッチ



# ニトロム- オプション

さらなるパーソナル・カラーオプション

- 新しいフレームデカール・カラーオプション
- アルミハンドリムのパウダーコートカラー・オプション



**Quickie Nitrum**  
2020年12月

クイッキー ニトロム

サンライズメディカルジャパン 株式会社 〒346-1145 埼玉県加須市加須450番地 TEL: 0488-31-6488  
 注文番号: orna@sunrise-medical.jp  
 問い合わせ先: info@sunrise-medical.jp

販売店様ご記入欄

販売店名: \_\_\_\_\_ 所在地: \_\_\_\_\_  
 店名: \_\_\_\_\_ 支店名: \_\_\_\_\_  
 〒(〒) 番地 (〒) 番地 (〒) 番地  
 法人名 (法人) 代表者氏名 (代表者) 姓 名  
 法人名 (法人) 代表者氏名 (代表者) 姓 名  
 法人名 (法人) 代表者氏名 (代表者) 姓 名

1. 基本仕様

Frame Model: ベースモデル  
 Weight capacity 225 lbs for Open Frame, 270 lbs for the Quickie Nitrum - Open Frame  
 1120R01 Quickie Nitrum - Open Frame ¥448,000  
 1120R02 Quickie Nitrum - Open Frame ¥448,000

2. 背座高調整

Backrest Frame Type: バックレストフレーム種類  
 1120R03 Adjustable 調整式 ¥C 調整式 ¥140  
 1120R04 Fixed 固定式 ¥C 固定式 ¥140

3. フレームカラー

Frame Color: フレームカラー  
 1120R05 750 ¥C 調整式 ¥140  
 1120R06 800 ¥C 調整式 ¥140  
 1120R07 850 ¥C 調整式 ¥140

4. 脚座高調整

Foot Seat Height: 足座高  
 See Figure 27. Measure from the front of seat and up to the top of the foot plate.  
 1120R08 18.5" NC  1120R09 19" NC  
 1120R10 19.5" NC  1120R11 20" NC  
 1120R12 20.5" NC  1120R13 21" NC  
 1120R14 21.5" NC  1120R15 22" NC

5. Center Fork and Suspension

Center Fork and Suspension: センターフォークとサスペンション  
 1120R16 Multiple Position 6ヶ所調整 ¥C 調整式 ¥140  
 1120R17 Multiple Position Single Shock Fork ¥C 調整式 ¥140  
 1120R18 Frog Legs 180 lbs, 200 lbs フロッグ ¥403,750  
 1120R19 Frog Legs 200 lbs, 250 lbs フロッグ ¥403,750

6. 脚座調整

Foot Seat Adjustment: 足座調整  
 1120R20 180 lbs, 200 lbs フロッグ ¥403,750  
 1120R21 200 lbs, 250 lbs フロッグ ¥403,750

7. 背座高調整

Backrest Frame Type: バックレストフレーム種類  
 1120R03 Adjustable 調整式 ¥C 調整式 ¥140  
 1120R04 Fixed 固定式 ¥C 固定式 ¥140

8. 背座高調整

Backrest Frame Type: バックレストフレーム種類  
 1120R03 Adjustable 調整式 ¥C 調整式 ¥140  
 1120R04 Fixed 固定式 ¥C 固定式 ¥140

9. 背座高調整

Backrest Frame Type: バックレストフレーム種類  
 1120R03 Adjustable 調整式 ¥C 調整式 ¥140  
 1120R04 Fixed 固定式 ¥C 固定式 ¥140

10. 背座高調整

Backrest Frame Type: バックレストフレーム種類  
 1120R03 Adjustable 調整式 ¥C 調整式 ¥140  
 1120R04 Fixed 固定式 ¥C 固定式 ¥140

11. 背座高調整

Backrest Frame Type: バックレストフレーム種類  
 1120R03 Adjustable 調整式 ¥C 調整式 ¥140  
 1120R04 Fixed 固定式 ¥C 固定式 ¥140

12. 背座高調整

Backrest Frame Type: バックレストフレーム種類  
 1120R03 Adjustable 調整式 ¥C 調整式 ¥140  
 1120R04 Fixed 固定式 ¥C 固定式 ¥140

13. 背座高調整

Backrest Frame Type: バックレストフレーム種類  
 1120R03 Adjustable 調整式 ¥C 調整式 ¥140  
 1120R04 Fixed 固定式 ¥C 固定式 ¥140

14. 背座高調整

Backrest Frame Type: バックレストフレーム種類  
 1120R03 Adjustable 調整式 ¥C 調整式 ¥140  
 1120R04 Fixed 固定式 ¥C 固定式 ¥140

15. 背座高調整

Backrest Frame Type: バックレストフレーム種類  
 1120R03 Adjustable 調整式 ¥C 調整式 ¥140  
 1120R04 Fixed 固定式 ¥C 固定式 ¥140

16. 背座高調整

Backrest Frame Type: バックレストフレーム種類  
 1120R03 Adjustable 調整式 ¥C 調整式 ¥140  
 1120R04 Fixed 固定式 ¥C 固定式 ¥140

17. 背座高調整

Backrest Frame Type: バックレストフレーム種類  
 1120R03 Adjustable 調整式 ¥C 調整式 ¥140  
 1120R04 Fixed 固定式 ¥C 固定式 ¥140

18. 背座高調整

Backrest Frame Type: バックレストフレーム種類  
 1120R03 Adjustable 調整式 ¥C 調整式 ¥140  
 1120R04 Fixed 固定式 ¥C 固定式 ¥140

19. 背座高調整

Backrest Frame Type: バックレストフレーム種類  
 1120R03 Adjustable 調整式 ¥C 調整式 ¥140  
 1120R04 Fixed 固定式 ¥C 固定式 ¥140

20. 背座高調整

Backrest Frame Type: バックレストフレーム種類  
 1120R03 Adjustable 調整式 ¥C 調整式 ¥140  
 1120R04 Fixed 固定式 ¥C 固定式 ¥140

21. 背座高調整

Backrest Frame Type: バックレストフレーム種類  
 1120R03 Adjustable 調整式 ¥C 調整式 ¥140  
 1120R04 Fixed 固定式 ¥C 固定式 ¥140

# オーダーフォーム

フレームカラー、パウダーコート・ハンドリムカラー、フレームラベルカラーオプションのすべてを提供する車いすはクイッキー初です

**Standard Frame Color 標準フレームカラー**

Handrim color option only available if Aluminum Coated colored option was selected.

Black not available as base w/Zebra. ハンドリムの色は、アルミコーティングオプションが選択された時のみ選択可能。ゼブラのベース色にブラック不可。

				Handrim ハンドリム
<input type="checkbox"/>	112C140	Aztec Gold	アズテックゴールド	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C118	Bead Blast	ビーズブラスト	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C2	Black (NA w/Zebra)	ブラック(ゼブラ選択不可)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C141	Black Cherry	ブラックチェリー	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C10	Black Opal	ブラックオパール	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C38	Blue Opal	ブルーオパール	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C36	Candy Blue	キャンディーブルー	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C14	Candy Purple	キャンディーパープル	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C35	Candy Red	キャンディーレッド	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C142	Electric Blue	エレクトリックブルー	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C143	Evergreen	エバーグリーン	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C44	Glossy White	グロッシーホワイト	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C126	Glow	グロウ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C144	Green Apple	グリーンアップル	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C147	Hot Sparkle Pink	ホットスパークルピンク	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C148	Mauve Pink	モーヴピンク	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C103	Rootbeer	ルートビア	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C114	Sparkle Silver	スパークルシルバー	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C145	Sunrise Orange	サンライズオレンジ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C113	Titanium Color Paint	チタンカラーペイント	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C8	Yellow	イエロー	<input type="checkbox"/>




Quickie固定車では初めて車いすに下腿長のオプションがあります

### Lower Leg Length (LLL) フットレスト高

Lower Leg Length standard clearance must be minimum of 2" less than Front Seat Height. **Measured from seat sling to the top - rear of the footrest.** See Appendix on Page 7. Available lower leg length is dependant on frame selection including adapter spacers. **フットレスト高は、前座高より最低限2" 短くなければなりません。シートスリング上部からフットサポート後方までを測定。7 ページ別表参照。フットプレートスペーサーを含む、フレーム選択により可能な下腿長が変わります。**

<input type="checkbox"/> 6"	<input type="checkbox"/> 8"	<input type="checkbox"/> 10"	<input type="checkbox"/> 12"	<input type="checkbox"/> 14"	<input type="checkbox"/> 16"	<input type="checkbox"/> 18"	<input type="checkbox"/> 20"
<input type="checkbox"/> 6.5"	<input type="checkbox"/> 8.5"	<input type="checkbox"/> 10.5"	<input type="checkbox"/> 12.5"	<input type="checkbox"/> 14.5"	<input type="checkbox"/> 16.5"	<input type="checkbox"/> 18.5"	<input type="checkbox"/> 20.5"
<input type="checkbox"/> 7"	<input type="checkbox"/> 9"	<input type="checkbox"/> 11"	<input type="checkbox"/> 13"	<input type="checkbox"/> 15"	<input type="checkbox"/> 17"	<input type="checkbox"/> 19"	
<input type="checkbox"/> 7.5"	<input type="checkbox"/> 9.5"	<input type="checkbox"/> 11.5"	<input type="checkbox"/> 13.5"	<input type="checkbox"/> 15.5"	<input type="checkbox"/> 17.5"	<input type="checkbox"/> 19.5"	

- ・ 1/2インチ刻み
- ・ 標準クリアランスのため、下腿長はフロントシート高より2インチ以上短くする必要があります
- ・ シートからフットレストの後部の上部までを測定

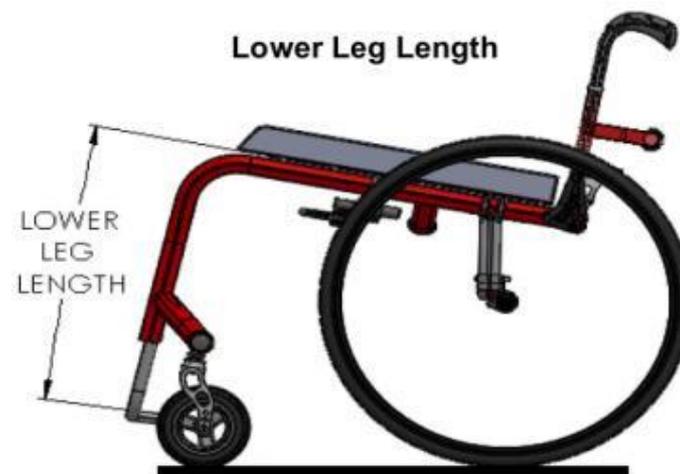

# オーダーフォーム



アルミハンドリムに新しいカラーオプションがあります。希望される際は必ずオーダーフォームのフレームカラーでフレーム色とハンドリム色を選択してください。

P.4

Handrim ハンドリム			
See APPENDIX in page 7 for availability. See Page 6 for color handrim option.			
7 ページの別表参照。6 ページの色付きハンドリムオプション参照。			
<input type="checkbox"/>	112HR1	Aluminum Anodized アルミニウム アノダイズド	NC無料オプション
<input checked="" type="checkbox"/>	112HR29	AlumPowderCoatedColored アルミニウムパウダーコート色付き	¥11,000
<input type="checkbox"/>	112HR4	Plastic Coated N/A w/ 25" & 26" Lite Spoke プラスチックコート 25" & 26" ライトスポーク不可	¥14,250
<input type="checkbox"/>	112HR35	Stainless Steel Lite ステンレススチールライト	¥15,000
<input type="checkbox"/>	112HR22	Natural Fit - Std Grip ナチュラルフィット標準グリップ	¥59,250
<input type="checkbox"/>	112HR23	Natural Fit-SuperGrip ナチュラルフィットスーパーグリップ	¥63,750
<input type="checkbox"/>	112HR25	NaturalFit-NoThumbGrip ナチュラルフィットサムガード無し	¥56,250
<input type="checkbox"/>	112HR30	NaturalFitLT-Std Grip ナチュラルフィットLT標準グリップ	¥62,250
<input type="checkbox"/>	112HR31	NaturalFitLT-SuperGrip ナチュラルフィットLTスーパーグリップ	¥71,250
<input type="checkbox"/>	112HR32	NaturalFitLT-NoThumbGrip ナチュラルフィットLTサムガード無し	¥56,250
<input type="checkbox"/>	112HR26	Surge-Oval w/Gription Strip サージ 楕円グリップション付	¥57,750
<input type="checkbox"/>	112HR27	SurgeLT-Oval w/Gription サージLT楕円グリップション付	¥62,250
<input type="checkbox"/>	112HR28	Q-Grip Neoprene Coated Qグリップネオプレンコート	¥48,750
<input type="checkbox"/>	112HR24	Spinergy Flex Rim Only avail on Spinergy LX wheel 24" & 26" スピナジーフレックスリム 24" & 26" スピナジーLXのみ可	¥97,500
<input type="checkbox"/>	112HR7	Omit Handrim N/A w/ Ultra Lightweight Wheels. ハンドリムなし ウルトラライトホイール不可	NC無料オプション



P.6

Standard Frame Color 標準フレームカラー			
Handrim color option only available if Aluminum Coated colored option was selected.			
Black not available as base w/Zebra. ハンドリムの色は、アルミコーティング			
オプションが選択された時のみ選択可能。ゼブラのベース色にブラック不可。			
<input type="checkbox"/>	112C140	Aztec Gold アステックゴールド	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C118	Bead Blast ビーズブラスト	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C2	Black (NA w/Zebra) ブラック(ゼブラ選択不可)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C141	Black Cherry ブラックチェリー	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C10	Black Opal ブラックオパール	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C38	Blue Opal ブルーオパール	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C36	Candy Blue キャンディーブルー	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C14	Candy Purple キャンディーパープル	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C35	Candy Red キャンディーレッド	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C142	Electric Blue エレクトリックブルー	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C143	Evergreen エバーグリーン	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C44	Glossy White グロッシーホワイト	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C126	Glow グロウ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C144	Green Apple グリーンアップル	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C147	Hot Sparkle Pink ホットスパークルピンク	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C148	Mauve Pink モーヴピンク	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C103	Rootbeer ルートビア	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C114	Sparkle Silver スパークルシルバー	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C145	Sunrise Orange サンライズオレンジ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C113	Titanium Color Paint チタンカラーペイント	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C8	Yellow イエロー	<input type="checkbox"/>

Matte Frame Colors マットフレームカラー			
Handrim color option only available if Aluminum Coated colored options was selected.			
ハンドリムの色は、アルミコーティングオプションが選択された時のみ選択可能。			
<input checked="" type="checkbox"/>	112C116	Matte Black マットブラック	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C151	Matte Black Cherry マットブラックチェリー	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C150	Matte Electric Blue マットエレクトリックブルー	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C149	Matte Evergreen マットエバーグリーン	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	112C152	Matte Purple マットパープル	<input type="checkbox"/>

