

QUICKIE 200 R カスタム

次世代型 - すべてのエントリーレベル電動車いすユーザー
向けのソリューション




Q200 R 標準

- **コンパクト** – 幅580mm、長さ1070mm
- **優れた安定性** – 安全最大登坂角度8°
- **優れた屋外パフォーマンス**
 - 14”ドライブホイール
 - 9”前輪キャスター
 - 標準速度 – 6km/h (車いすスポーツ用として10km/hあり)
- **軽量** - 98kg
- **耐荷重136kg** - 体重の重いユーザーにも対応



Q200 R はよい電動車いすだが、ユーザーの要望は

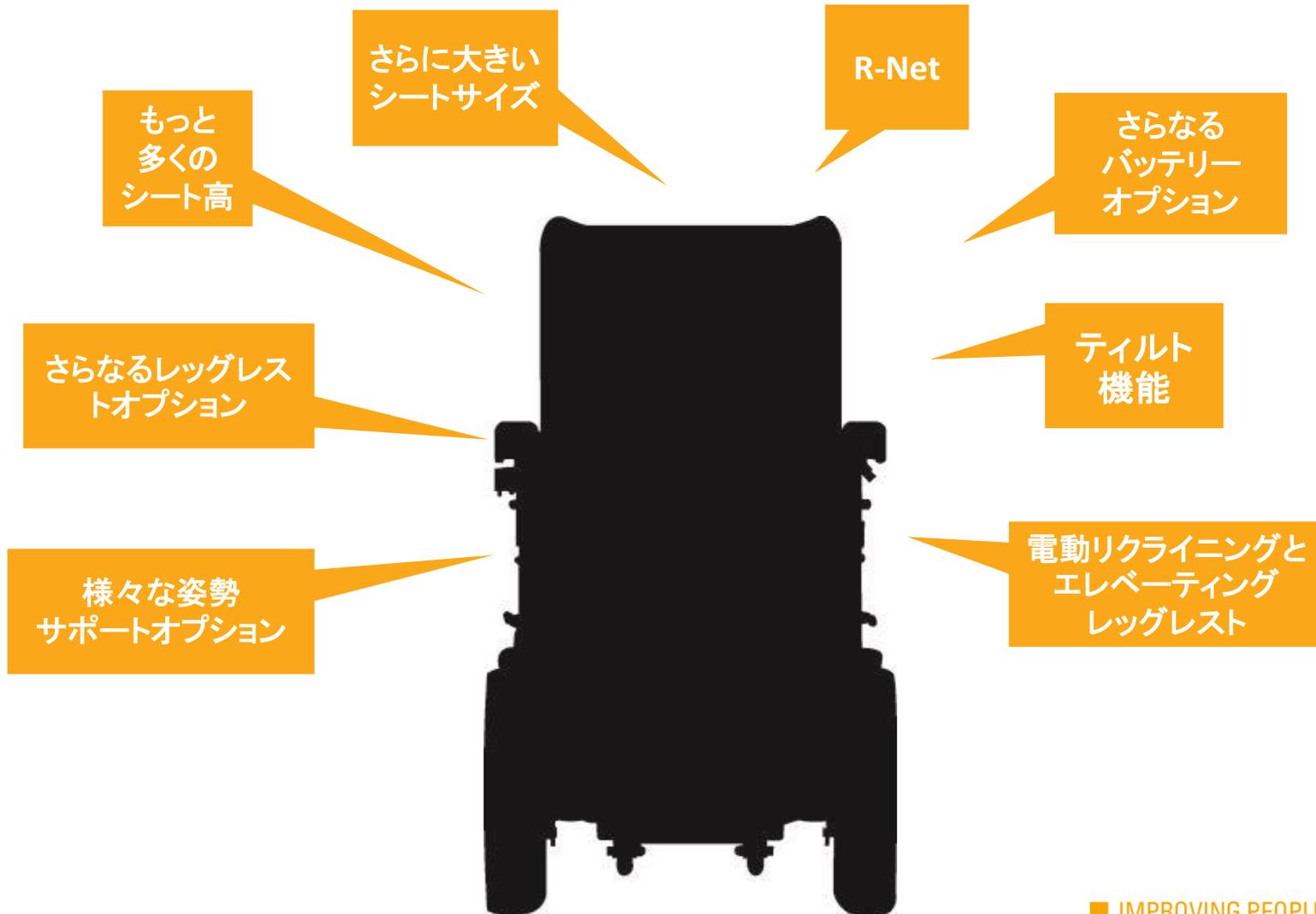

クイッキー®電動車いすラインナップ

臨床ニーズ



Q100

SEATING
SLING SEAT

BASES
RWD



Q200

SEATING
SLING SEAT

BASES
RWD



Q400

SEATING
SEDEO PRO
SEDEO LITE

BASES
MWD
FWD
RWD



Q500

SEATING
SEDEO PRO
SEDEO LITE

BASES
MWD
FWD
RWD
HWD



Q700

SEATING
SEDEO ERGO
SEDEO PRO

BASES
MWD
FWD
RWD



Q700 UP

SEATING
SEDEO ERGO UP

BASES
MWD
FWD

RWD: Rear-Wheel Drive
 MWD: Mid-Wheel Drive
 FWD: Front-Wheel Drive
 HWD: Hybrid-Wheel Drive

ベース・パフォーマンス

QUICKIE Q200 R

カスタム

最小幅のティルト機能付き
ハイパフォーマンス電動車いす



より複雑なユーザーのニーズを満たすためにQ200 Rを豊富なシートオプションを備えた、屋内 / 屋外の高いパフォーマンスを実現できる最もコンパクトなティルト機能付き電動車いすとして開発

QUICKIE Q200 R カスタム

特長

- コンパクト・シャーシ
 - ✓ 580mm幅シャーシ (Q100比較値+40mm)
 - ✓ 1070mm長 (Q100比較値+60mm)

効果

- 屋外でのパフォーマンスを向上させる
- すべての場所での安定性の向上
- ティルト機能には高い安定性が不可欠



QUICKIE Q200 R カスタム

特長

- より狭い幅のオプション
 - ✓ 12インチのドライブホイール利用で、幅を570mmまで縮小
(Q200 比較値-10mm、Q100 比較値+30mm)
 - ✓ 入手可能な最小幅の後輪駆動
ティルト機能付きベース

効果

- 屋内での操作性の向上
- 優れた屋外性能
- ティルト機能使用にはベースに高い安定性が不可欠

Q200 R	
<input type="radio"/> QJR070084	Drive Wheel, 12", Solid, Knobbly, Black
<input type="radio"/> QJR070034	Drive Wheel, 14", Pneumatic, Knobbly, Black
<input type="radio"/> QJR070033	Drive Wheel, 14", Solid, Knobbly, Black



QUICKIE Q200 R カスタム

特長

• 2つのシートフレーム

- ✓ 420mm シートフレーム
 - 調整可能シート幅 440-480mm
 - In-Rig Kit (アームレストによる調整キット) – 38または 400mm
- ✓ 新 480mmシートフレーム
 - 幅調整 – 480-540mm
 - In-Rig Kit (アームレストによる調整) – 440 または 460mm



効果

- エントリーレベルの電動車いすを必要とするより多くのユーザーに対応
 - 狭い幅を必要とするユーザーから広い幅が必要なユ

In-Rig シート幅42~48cm (アームレストによる調整); 38 cm幅は幅調節アームレストで利用可能

Seat Frame Width

- QJR020128 420 mm Frame Width – Seat Width Range With Armrest Adjustment 420-480 mm (380 mm Available With In-Rig Armrest)
- QJR020129 480 mm Frame Width – Seat Width Range With Armrest Adjustment 480-540 mm (440 mm Available With In-Rig Armrest)

QUICKIE Q200 R カustom

特長

- 3つのシート高オプション
 - ✓ 新 450mm
 - ✓ 470mm
 - ✓ 490mm

効果

- ユーザーのニーズに合わせて高さを増やす
 - 立位移乗を容易に
 - 背の高いまたは低いユーザーに対応
 - 車いす対応車両へのより簡単なアクセス



Seat Heights

<input type="radio"/>	SH45	450 mm (2)
<input type="radio"/>	SH47	470 mm (2)
<input type="radio"/>	SH49	490 mm (2)

(2) 3° Seat Angle

QUICKIE Q200 R カスタム

特長

- 2つのシートパン・オプション
 - ✓ 座布 (既存)
 - ✓ 新登場 - ソリッドシートパン



効果

- 快適性のためにスリングシートを好むユーザー
- Jay クッション使用簡単



QUICKIE Q200 R カスタム

特長

- 2つのバックレスト高

- ✓ 500mm (20") 高 – 既存オプション
- ✓ 新 – 570mm 高 (22.5") オプション

効果

- 背の高いユーザーや厚いシートクッションを使用しているユーザーの背面サポートを強化します。
(例) J2ディープクッション



Backrest Height

<input type="radio"/>	BH50	500 mm
<input type="radio"/>	BH57	570 mm

QUICKIE Q200 R カスタム

特長

- 豊富なバックレストチョイス
 - ✓ 標準張り調整式バックレスト
 - ✓ 新 SEDEO ライト コンフォートバック

効果

- 軽度から中等度の姿勢サポートが必要なユーザーに、新しいバックサポートオプションを提供します



- **新登場** SEDEOライト コンフォート バックレスト
 - ✓ コントウア形状の柔らかいフォームによる快適性と強化されたサポート
 - ✓ 2つのコントウア形状 – ローコントウア (浅い) または ディープコントウア (深さ140mm)
 - ✓ 張り調節用ストラップ
 - ✓ 2つの高さ

2つのタイプの SEDEOライト・バックレスト:

- ローコントゥア張り調節ストラップ 最小限の一体型ラテラルサポート
 - 追加のラテラル体幹サポートと共に使用可能
- ディープコントゥア・アクティブ張り調節ストラップ 腰から肩甲骨下までのラテラル体幹サポート



QUICKIE Q200 R カスタム

特長

- **新** UNI 手動エレベーターティングレッグレスト (スイングアウト式)
- **新** 切断者用サポートオプション
- **新** SEDEOライト・スイングアウト式レッグレスト
 - 70°
 - 手動エレベーターティングレッグレスト
 - 電動エレベーターティングレッグレスト
- SEDEOプロ 70° スイングアウト式レッグレスト



効果

- 様々なユーザーの肢位に対応する豊富なレッグレスト・サポートオプション
- 様々な足の位置をサポートするためのフットプレート調整可能範囲

QUICKIE Q200 R カスタム

特長

- 2つのヘッドレスト・タイプ
 - ✓ 新 SEDEOパッド (カバー付き)
 - ✓ 新 Whitmyerブラッシュヘッドレスト



効果

- 一般的な頭部サポートから複雑な頭部保持まで可能にする様々なオプション
 - さらなる快適性
 - 優れた頭部保持
 - 優れた側方サポート
 - 高い適応性



QUICKIE Q200 R カスタム

特長

- **さらなる姿勢保持オプション**
 - ✓ **新 SEDEOラテラルサポート**
 - ✓ **新 フリップダウン式ポメル (内転防止サポート)**
 - ✓ **新 スイングアウト式トレイテーブル**



効果

- 様々な体幹、上肢、脚部の姿勢保持オプションによりユーザーの機能を最大限に発揮する最適な姿勢を実現



QUICKIE Q200 R カスタム

特長

速度オプション

6 km/h – 標準

10km/h – スポーツ用オプション



効果

- ユーザーの求めるパフォーマンスのための様々なオプション
- 低速 – 高い安全性のため 屋内や高齢者施設での使用
- 設定簡便化のため事前にプログラム済み – セットアップが簡単迅速にできます

QUICKIE Q200 R カustom

特長

- 新バッテリーオプション
 - ✓ 50Ah (29km / 17 miles) *
 - ✓ 55Ah (31km / 19 miles)

*電動ティルトを選択した場合に必要

効果

- ユーザーのニーズに合わせた様々なオプション
 - 大容量バッテリーにより、継続走行距離が延び、電動ポジショニング機能の活用が可能



QUICKIE Q200 R カスタム

特長

- 拡張電子コントロールシステム・オプション
 - ✓ VR2
 - ✓ 新 R-Net LED
 - ✓ 新 R-Net LCD (液晶ディスプレイ)
 - スイッチ類 - 手に障害のあるユーザー用
 - ✓ 新 R-Net LCD 高機能統合型赤外線コントロール付き
 - ✓ 新 R-Net ジャイロ



効果

- ユーザーが電動車椅子をコントロールする能力を向上
- エントリーレベルの電動車いすながら高度なプログラミングが可能 - 病状や障害の進行に対
- ジャイロ - 進化した進行方向制御 - 手や上肢機能の低下に対応し起伏の多い地形と傾斜にも対応

QUICKIE Q200 R カスタム

特長

- ライトと方向指示器
- ✓ エネルギー効率の高いLED
- ✓ シュラウド後部に統合された後方ライト



効果

- 様々な状況下でもさらなる自立性と安全性を可能にします
- Qシリーズのモジュラー性 - メンテナンスを容易にするために同じライトをすべての機種使用
- 進化した外見 - Qシリーズファミリー全体で一貫したスタイリング




LED Lights & Indicators

QJR110201 LED Light And Indicator StVZO Approved

QUICKIE Q200 R カスタム

特長

- 2二つの介助者用コントロール・オプション
- 新 VR2 / R-Net介助者用コントロール /デュアルコントロール
 - パームパッドのデザイン – 手を安定させる
- 新 – VR2 / R-Net介助者用ティラーコントロール
 - 直感的に操作できる介助者用コントロール

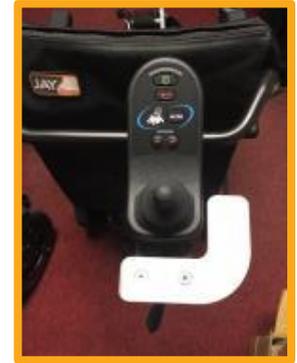

効果

- 介助者が自分の能力に合わせて電動車いすを自在にコントロールできます



QUICKIE Q200 R カスタム

特長

- 新 22° COG 電動ティルト機能
 - ✓ 一体型シングル・ピボット・アクチュエータ
 - ✓ 70mm (3") COG 重心移動

効果

- 定期的な体位(姿勢)変換は以下に役立ちます
 - ✓ 除圧をアシスト
 - ✓ 疲労の管理が可能
 - ✓ 進化した姿勢管理
- ティルト時およびティルト状態で運転時のユーザーの安定性の向上
- 安全性の向上 - 統合されたデザインにより脚を挟んだりぶついたりする危険性が軽減されました
- 簡単なメンテナンス



Q200 R

● QJR130013 Posterior Tilt, Powered, 0° - 22° (With 7 cm Centre Of Gravity Movement)

QUICKIE Q200 R カスタム

特長

- **新 電動リクライニングバック 90-120°**
 - ✓ フリップダウン機能

効果

- リクライニングバックは以下に役立ちます
 - ✓ 痛みの軽減
 - ✓ 除圧 – ティルトとエレベーターティング
レッグレストと併用すると最大の
除圧が可能
 - ✓ 疲労対応
 - ✓ 改善された姿勢保持
- メンテナンスが容易
- 輸送と保管が簡単



Q200 R

 QJR030160 Backrest, Powered Recline, 90° - 120°, Flip Down

Q200 R カスタム

- 生産ラインで製造 - 代理店が組み立てる必要はありません
- より複雑なユーザーのニーズに対応する新しいオプションが含まれています
 - ✓ 狭い幅
 - ✓ 電動ティルト
 - ✓ バッテリーオプション
 - ✓ 電動リクライニング
- Qシリーズのモジュラー性 - デモ機や在庫の保守管理も容易

QUICKIE Q200 R

カスタム

ありがとうございました。

