

MONTERINGSANVISNING

Q50 R Carbon

Montering av batteri



Benämning	Artikelnummer
Batteri	<input type="checkbox"/> N0600025
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>



MONTERINGSANVISNING

På Q50 R Carbon finns det utrymme för två batterier, se A och B på bilden nedan.

Var uppmärksam på följande:

Utrymme A ska användas till ett extra batteri

Utrymme B ska användas till det batteri som är inkopplat.



MONTERINGSANVISNING

Plasthaken i cirkeln nedan är batterilåset.



Sätt i batteriet i utrymme B, se till att haken fäster och att batteriet är låst på plats.

För att ta av batteriet från Q50 R Carbon:
Kläm åt plasthaken så att den löser ut och ta sedan ut batteriet.





Sunrise Medical AB
Neogatan 5
431 53 Mölndal
Sverige

T: +46 (0) 31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se