

Q50 R Carbon

Montering av färginsatser



Benämning	Artikelnummer	
Färginsats/accentfärg blå	☐	D0101501
Färginsats/accentfärg röd	☐	D0101502
Färginsats/accentfärg orange	☐	D0101503
Färginsats/accentfärg gul	☐	D0101504
Färginsats/accentfärg Lila	☐	D0101505



MONTERINGSANVISNING

Framhjul:

Ta fram önskad färginsats till framhjul (det är olika storlekar till fram- och bakhjul).



Leta fram stället där färginsatsen är delad. Håll isär delarna (en sida ska vara längre fram än den andra). Placera färginsatsen på framhjulet med öppningen vid hjulgaffeln och vrid moturs.



Placera de tre stiften på färginsatsen i förhållande till motsvarande fästen på hjulet.



Tryck fast stiften för hand, vid behov kan man slå försiktigt med en liten hammare. Se till att färginsatsen sitter jämnt och snyggt på hjulet.




MONTERINGSANVISNING

Bakhjul:

Ta fram önskad färginsats till bakhjul (det är olika storlekar till fram- och bakhjul).



Placera de tre stiften på färginsatsen i förhållande till motsvarande fästen på hjulet.

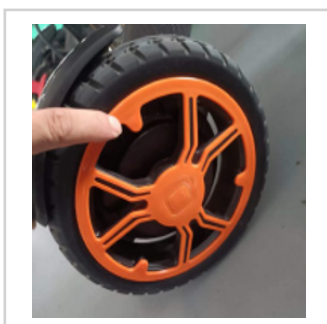

Tryck fast stiften för hand, vid behov kan man slå försiktigt med en liten hammare. Se till att färginsatsen sitter jämnt och snyggt på hjulet.





Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sverige

T: +46 (0) 31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se