

VERRIEGELUNG E-ROLLSTÜHLE

Siehe auch in der jeweilige Gebrauchsanweisung...

pba
12.11.2019

PG DRIVE PILOT+



Wegfahrsperr ein-schalten:


- Stecken Sie bei eingeschaltetem Rollstuhl den 3-poligen Schlüsselstecker in die Ladebuchse
- und ziehen Sie ihn anschliessend wieder heraus.
- Die Betriebsanzeige erlischt.
- Damit ist der Rollstuhl gegen unbefugtes Benutzen gesichert.

Wegfahrsperr aus-schalten:

- Drücken Sie den grünen Ein/Aus Schalter.
- Die Geschwindigkeitsanzeige für die Voreinstellung beginnt zu blinken.
- Stecken Sie jetzt den 3-poligen Schlüsselstecker in die Ladebuchse und ziehen Sie ihn anschliessend wieder heraus.
- Die normale Betriebsanzeige auf dem Bedienpult erscheint wieder.
- Damit sind alle Funktionen wieder freigeschaltet.



PG DRIVE VR2

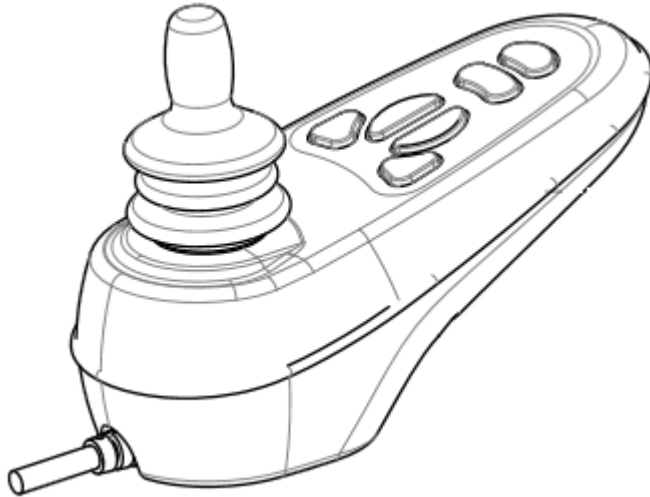


So sperren Sie die Steuerung;

- Halten Sie bei eingeschaltetem Steuersystem die Ein/Aus-Taste gedrückt.
- Nach 1 Sekunde ertönt ein Piepton. Lassen Sie die Ein/Aus-Taste jetzt los.
- Schieben Sie den Joystick nach vorne, bis ein Piepton ertönt.
- Schieben Sie den Joystick rückwärts, bis ein Piepton ertönt.
- Lassen Sie den Joystick los. Es ertönt ein langer Piepton.
- Der Rollstuhl ist nun gesperrt.

So lösen Sie die Sperrung der Steuerung;

- Wenn das Steuersystem ausgeschaltet ist, drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
- Schieben Sie den Joystick nach vorne, bis ein Piepton ertönt.
- Schieben Sie den Joystick rückwärts, bis ein Piepton ertönt.
- Lassen Sie den Joystick los. Es ertönt ein langer Piepton.
- Die Sperrung des Rollstuhls ist nun aufgehoben.

PG DRIVE R-NET

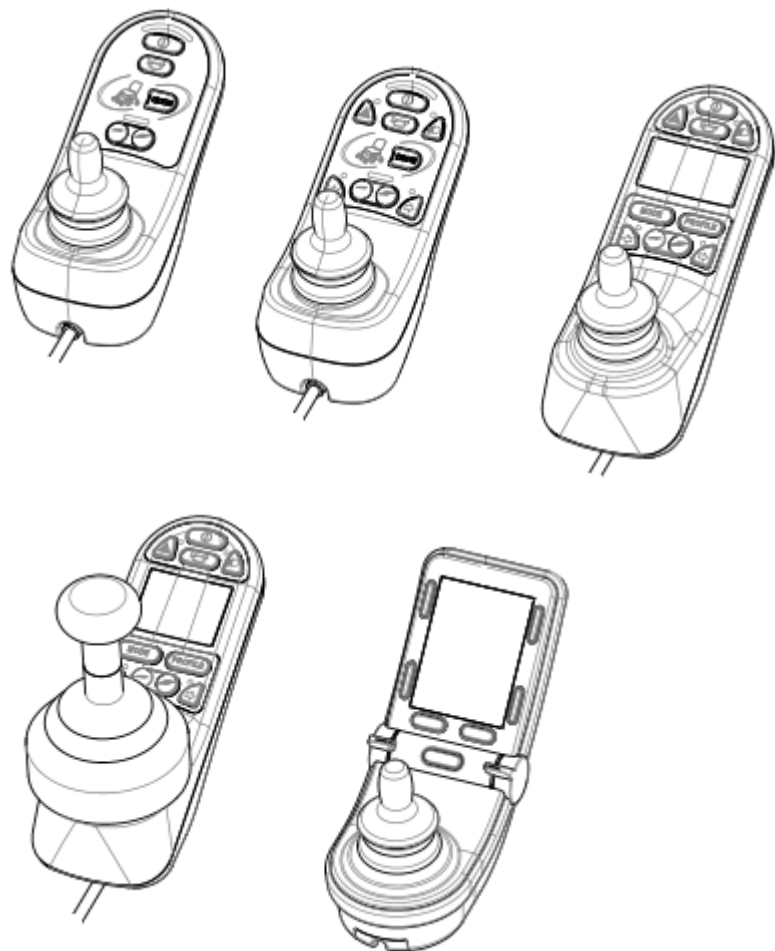

- Bei eingeschaltetem Steuersystem (Fig. 4.26) die Ein-/Aus-Taste drücken und halten.
- Nach 1 Sekunde piepst das Steuersystem und die Anzeige erlischt (Fig. 4.27). Lassen Sie jetzt die Ein-/Aus-Taste los
- Bewegen Sie den Joystick nach vorne, bis das Steuersystem piepst.
- Bewegen Sie den Joystick nach hinten, bis das Steuersystem piepst.
- Lassen Sie den Joystick los, es ertönt ein langer Piepston.
- Der Rollstuhl ist jetzt gesperrt.
- Das folgende Symbol wird angezeigt (Fig. 4.28), wenn das Steuersystem wieder eingeschaltet wird.
- Wenn ein Joystick-Modul mit LED-Anzeige eingebaut ist, findet an den LEDs für die Geschwindigkeitsanzeige ein Lichtlauf statt.
- So heben Sie die Sperre wieder auf:
- Wenn das Steuersystem ausgeschaltet ist, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Das Symbol "Gesperrt" wird angezeigt (Fig. 4.28).
- Bewegen Sie den Joystick nach vorne, bis das Steuersystem piepst.
- Bewegen Sie den Joystick nach hinten, bis das Steuersystem piepst.
- Lassen Sie den Joystick los. Ein langer Piepston ertönt und die Anzeige wird beleuchtet (Fig. 4.29).
- Die Sperre des Rollstuhls ist jetzt aufgehoben.

DYNAMIC SHARK DX

2.2 Wegfahrsperr

Mit der Fahrpultsperr verhindern Sie, dass der Rollstuhl von unbefugten Personen genutzt wird.

2.2.1 Fahrpult sperren



So sperren Sie das Fahrpult:

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste **4 Sekunden** lang.



Die Fahrprofilanzeige und die Anzeige Fahrpultsperr leuchten auf.

Das Fahrpult ist gesperrt.

2.2.2 Fahrpultsperr aufheben



So heben Sie die Fahrpultsperr auf:

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

Die Anzeige Fahrpultsperr blinkt.

Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden zweimal auf die Hupetaste.

Die Fahrpultsperr ist aufgehoben.

Wird die Hupetaste nicht innerhalb von 10 Sekunden gedrückt, schaltet sich das Fahrpult wieder aus.

