

# Riktlinjer för laddning av elrullstol och scooter

Detta dokument omfattar produkter med batteriladdare JA Classic 8A (art.nr 13310.10010 samt 90146):

Q100 R	Q400 F Sedeo Lite
Q200 R	Q400 M Sedeo Lite
Q300 M Mini Kids	Q500 F Sedeo Pro
Q300 M Mini Teens	Q500 M Sedeo Pro
Q300 M Mini Sedeo Lite	Q700 M HD
Q300 M Mini Sedeo Pro	Sterling Elite <sup>2</sup> Plus (90146)
Q300 R Sedeo Lite	Sterling Elite <sup>2</sup> Mini (90146)

Detta kompletterande dokument ersätter inte befintlig bruksanvisning till laddare eller hjälpmedel. Detta dokument förtydligar vilken typ av miljö samt vilka riktlinjer som möjliggör längst livslängd på elrullstolens batterier samt minimerar de risker som kan uppstå i samband med laddning av batterier.

## Övergripande:

- Ladda enbart med den laddare du fick tillsammans med ditt hjälpmedel, du får inte använda någon annan laddare då laddare och batterier är testade tillsammans med elrullstolens/scooterns kablage. Avvikande från detta kan leda till skador på ditt hjälpmedel och/eller dess omgivning.
- Vid misstänkt eller bekräftat fel kontakta omgående din hjälpmedelscentral eller leverantör.

## Laddningsfrekvens beroende på användning:

- Ladda ditt hjälpmedel varje dag om det används dagligen oavsett hur mycket det är urladdat.
- Elrullstolen/scootern kan med fördel laddas över natten för att garanterat vara fulladdad.
- "Småladda" inte. Ladda en lång period över flera timmar i stället för ladda lite då och då.
- Ladda inte ur batterierna helt, detta kan skada batterierna.
  - Vid totalt urladdat batteri måste batterierna laddas i minst 16 timmar innan användning.
- Ladda elrullstolen minst en gång i veckan minst 12 timmar om hjälpmedlet används sporadiskt under veckan i stället för dagligen.

## Laddningsmiljö:

- Området där laddning utförs fungerar optimalt när följande efterlevs:
- Inomhus
- Väl ventilerat
- Temperaturintervall mellan +10° till +30°
- Relativ luftfuktighet mellan 30 % och 75 %
- Atmosfäriskt tryck mellan 700hPa och 1060hPa
- Skydda laddaren från yttre påverkan genom att placera den så att inget riskerar att tappas på den eller att man råkar kliva på den eller stöta i den
- Det får inte förekomma gnistbildning eller öppen låga i närheten av hjälpmedlet eller laddaren
- Laddaren skall ligga plant och på en hård yta uppåtvänd med gummifötterna nedåt
- Laddaren får inte vistas i direkt solljus
- Laddaren skall vara ren
- Placera inga föremål på laddaren och täck inte över laddaren

Vid laddning blir laddaren varm, vid +55° aktiveras säkerhetsfunktionen i laddaren och laddspänningen sänks.