



JAY J3 RYGGAR
WE'VE GOT YOUR BACK



FÖRDELAR MED FASTA RYGGSTÖD

Jay® presenterar stolt ett revolutionerande fast ryggstöd för rullstolar. Våra produktspecialister har spenderat många år på forskning, utveckling och testning av våra fasta ryggar vilket lett till att vi nu erbjuder en komplett fast ryggstödslösning som passar till en stor del av brukarna.

KLINISKA FÖRDELAR MED FAST RYGGSTÖD

- Ger optimalt posturalt stöd
- Ger en bättre tryckfördelning
- Förbättrar stabiliteten
- Förbättrar positionering
- Förbättrar komforten
- Förbättrar funktionen

FÖRDELAR MED FAST RYGGSTÖD FÖR BRUKAREN

- Stil – snygg design
- Självförtroende – brukaren känner sig säker
- Komfort – ryggen ger brukaren stöd för att kunna sitta bra med minimal ansträngning



ÖVERSIKT STORLEKAR & FORMER

FYRA KONTURDJUP

J3 ryggen erbjuder 4 typer av konturdjup:

Standard kontur (SC) med 50 mm djup, Mellan kontur (MC) med 80 mm djup, Djup kontur (DC) & Rib kontur (MDC) med 150 mm djup.

Ryggarna med MDC & DC konturer finns också i en extra djup version med 180 mm djup.

Standard kontur
Måttlig lateral support

50 mm



Mellan kontur
Medium lateral support

80 mm



Djup kontur
Full lateral support

150 mm



Djup kontur, extra djup
Full lateral support

180 mm



Rib kontur
Full lateral support

150 mm



Rib kontur, extra djup
Full lateral support

180 mm





MÅTT BREDD & HÖJD

J3 RYGGEN ...

... finns också i olika bredder och höjder som väljs beroende på brukarens bredd och höjd och även rullstolens bredd. Detta för att säkerställa att ryggen passar både brukaren och rullstolen.

J3 Ryggssystem kan monteras på rullstolar med sittbredd från ca 300 mm till 560 mm beroende på rullstolsmodell. I beställningsunderlaget framgår vilka rullstolsbredder som respektive rygg kan monteras på.



UTBUD HÖJD

FYRA NIVÅER AV STÖD

Brukaren kan välja mellan fyra olika nivåer av stöd beroende på behov.

Skulderhöjd	(SH)	530-610 mm
Hög thorakal höjd	(UT)	420-500 mm
Mellan thorakal höjd	(MT)	300-380 mm
Låg thorakal höjd	(LT)	170-240 mm

TRE OLIKA RYGGSTÖDSHÖJDER

Två individer kan behöva stöd på samma ställe men på grund av skillnader i hur långa de är behöver de olika höjder på ryggen. Detta är anledningen till att det finns tre olika höjder.




Låg (Small)



Medium (Medium)



Hög (Tall)

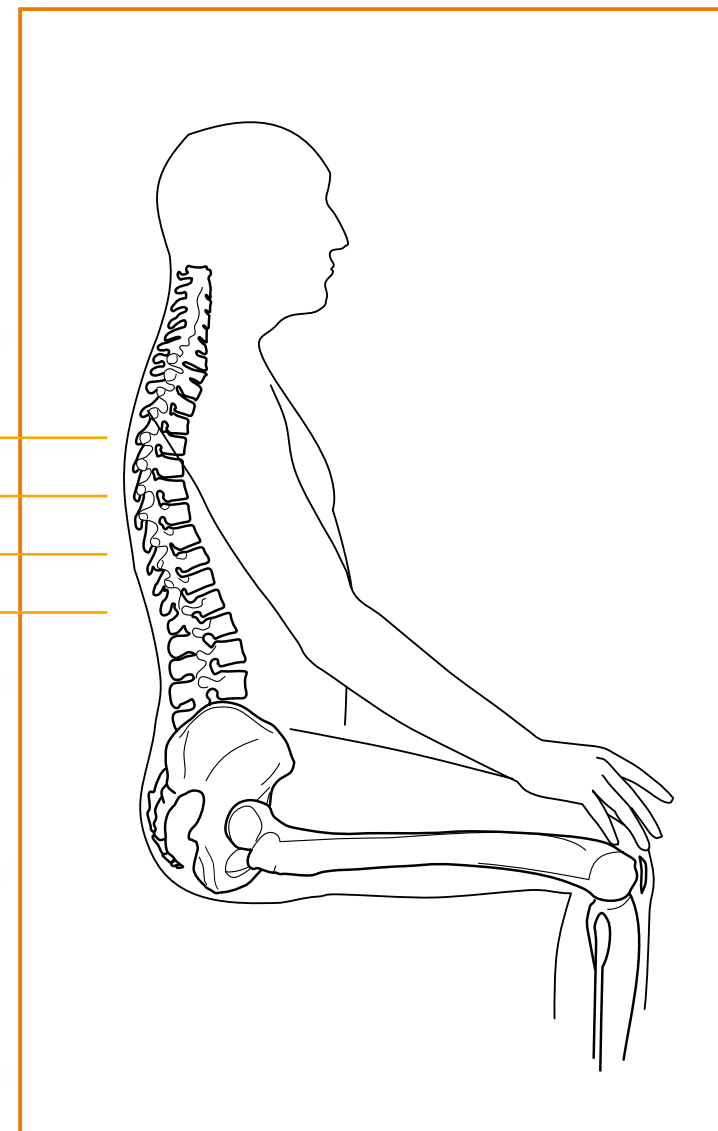

POSITIONERINGS- SYSTEM

FÖR MAXIMAL TRYCKFÖRDELNING, RÄTT STÖD OCH OPTIMAL KOMFORT BEHÖVER ETT FAST RYGGSTÖD FÖLJA BRUKARENS FORM. MED DETTA I ÅTANKE ÄR J3-RYGGENS POSITIONERINGSDELAR DESIGNADE FÖR ATT GE FÖRSKRIVAREN MÖJLIGHET ATT FASTSTÄLLA, ANPASSA OCH FINJUSTERA FORMEN PÅ J3-RYGGEN.

POSITIONERINGSDELARNA

- Ger maximal tryckfördelning
- Ger optimalt stöd och komfort
- Ger otaliga möjligheter av anpassade former
- Ger flera positioneringsmöjligheter

Positioneringsboxen innehåller alla nödvändiga delar för att anpassa J3 ryggen till brukaren. Boxen består av 32 olika delar. Alternativt finns det två mindre positioneringskit.



HUVUDSTÖD & TILLBEHÖR

JAY J3 RYGGEN ERBJUDER HUVUDSTÖD FRÅN WHITMYER SAMT ETT STORT UTBUD AV TILLBEHÖR FÖR ATT MÖJLIGGÖRA OPTIMAL POSITIONERING.


POSITIONERINGSKOMPONENTER

- Whitmyer huvudstöd
- Bålstöd
- Bröstsele

WHITMYER®



Alla J3 ryggar som kan utrustas med huvudstöd har krocktestats enligt gällande ISO standard.

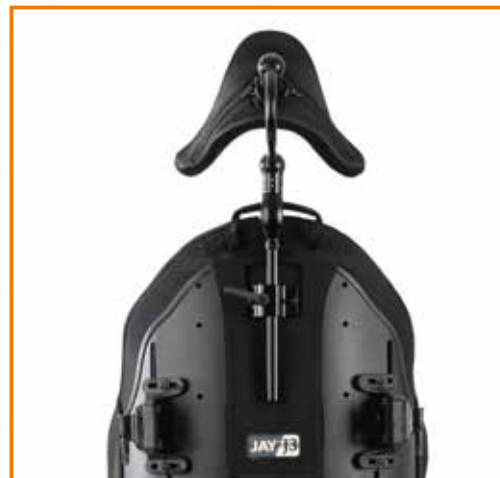

Whitmyer Huvudstöd Cobra Cradle Pad



Whitmyer huvudstöd AXYS med Plush Pad



Bröstsele



Sidosvängbart dubbelledat bålstöd



Fast bålstöd

MONTERING & BESLAG

MONTERINGSBESLAGEN TILL JAY RYGGARNA ÄR ENKLA ATT MONTERA OCH ATT TA AV. STORLEKEN ÄR KOMPAKT OCH BESLAGET KOMMER MED ETT FLERTAL JUSTERINGSMÖJLIGHETER SÅSOM BREDD, HÖJD, DJUP OCH VINKEL. DU KAN TILL OCH MED JUSTERA RYGGEN SAMTIDIGT SOM BRUKAREN SITTER I RULLSTOLEN.

**KOMPAKT
MONTERINGSBESLAG** – för aktiva brukare, 25% lättare än standardbeslag.



**KOMPAKT HEAVY DUTY
MONTERINGSBESLAG** – för den mer passiva brukaren med fokus på stabilitet.




KOMPATIBELT MED ANDRA RYGGRÖR

JAY monteringsbeslag har en klämdesign som passar 19 mm profilrör samt 25 mm & 28 mm runda ryggstöd. Med en klämma som är kompatibel med 90% av rullstolarna på marknaden och eftersom det inte behövs ytterligare tillbehör är hela beställnings- och monteringsprocessen mycket enkel.

MONTERINGSBESLAGETS LÄGE

Ofta tvingas man göra kompromisser p.g.a av hinder såsom t. ex armstöd. För att maximera kompatibiliteten upptar den unika infästningen av J3's kompakta monteringsbeslag så lite utrymme som möjligt och monteras utan att det påverkar användarens passform.

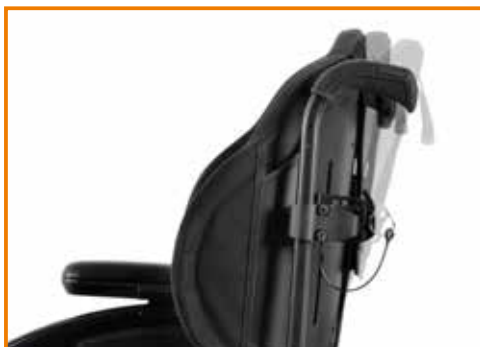

VINKELJUSTERBART

Monteringsbeslagen designades för att minimera förlust av sittdjup. När J3 ryggen är tillbakalutad förblir det lägre ryggsläget konstant och ger därmed ingen förlust av sittdjup.

JUSTERBART I BREDD

Ibland kan det vara så att en rygg passar rullstolen men inte brukaren. För att lösa sådana situationer är ryggstödet designat med en inbyggd justeringsmöjlighet på 50 mm.

PERFEKT PASSFORM

ENKELT ATT MONTERA

Med bara två fixeringspunkter, en otrolig höjdjustering och de multijusterbara klämmorna är det enkelt att montera även i svårare situationer och på andra ryggrör.



ENKELT ATT JUSTERA

Finjusteringar såsom ryggbredd, höjd, djup och vinkel kan alla utföras när brukaren sitter i rullstolen och säkerställer en perfekt passform. Alla justeringar kan göras med det två verktyg som du får tillsammans med produkten.

Justering av höjd och bredd



Justering av djup och vinkel



Justering av vinkel



ENKEL ATT MONTERA & TA AV

Att montera J3 ryggen är enkelt. Skjut helt enkelt in den i fästena så kommer den automatiskt att klicka på plats. Det är självklart också enkelt att ta av den, även för brukare med begränsad handfunktion.



RYGGAR

ÖVRIGT SORTIMENT

J3 CARBONRYGG

Kolfiber är ett starkt lättviktsmaterial och därför är det ett idealiskt material för detta ryggstöd. Kolfiber är lika starkt som aluminium (men 60% lättare) och minskar vikten som en brukare måste orka varje dag. Ryggstödet har också en snygg finish och elegant design.



FAQ

Jag har en brukare med en bålbredd på 330 mm men över höfterna är han 440 mm. Jag hittar inget ryggstöd som fungerar. Vad skall jag göra?

Lösning: Använd ett 460 mm brett ryggstöd och smalna av med utfyllnadsplattor.

Hur är relationen mellan bålstödens position, på den djupa ryggen, och brukarens bålhöjd?

Den djupa ryggens bålstöd är framtagna för att stödja bröstkorgen i relation till brukarens bålhöjd (S,M,L). Ju högre ryggstödet är desto mer blir avståndet från ryggens lägsta del till bålstöden.

Är max brukarvikt olika beroende på ryggtyp och storlek?

Nej, alla J3 ryggar oberoende av typ och storlek har en max brukarvikt på 136 kg.

Vi vet att vi kan använda en 410 mm bred rygg på en 460 mm bred rullstol men kan man använda en 460 mm bred rygg på en 410 mm bred rullstol?

Nej. Monteringsbeslagen tillåter inte att man använder bredare ryggar.

Var skall monteringsbeslagen monteras?

En av fördelarna med monteringsbeslagen till J3 är att de i stort sett kan monteras var som helst. Vi rekommenderar att man monterar fästena från mitten och uppåt i förhållande till ryggen.

Är det tum eller metriska mått?

Metriska mått

Kan J3 ryggen användas i transport?

J3 ryggen är krocktestad och godkänd enligt den senaste ISO standarden, inklusive huvudstöd och tillbehör.

Kan J3 ryggen användas på en elrullstol med 50 graders ryggfällning?

J3 ryggen kan användas på rullstolar med tilt och/eller ryggfällning men får inte överskrida 60 graders lutning från vertikalplanet.

Hur kan jag vara säker på att två fästpunkter är lika starkt som fyra fästpunkter?

Alla produkter i J3 sortimentet, inkl huvudstöd och tillbehör, har blivit hårt testade och godkända i upp till 100 000 cykler med max vikt.



För ytterligare information kring den fulla specifikationen och alternativ och tillbehör, var god se beställningsunderlaget. All information kan ändras utan föregående meddelande. Var god kontakta Sunrise Medical om du har några frågor. Om du är synskadad kan detta dokument visas i PDF-format via SunriseMedical.se.



Sunrise Medical AB

Neogatan 5
435 41 Mölndal
Tel.: 031-748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se