


# MONTERINGSANVISNING

## Transportfäste Levo Summit El

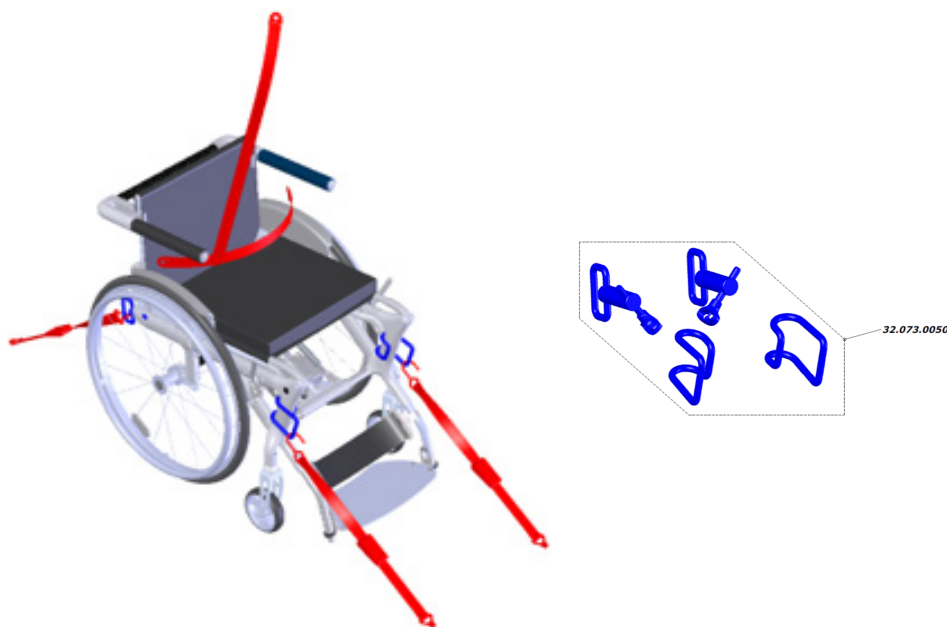

**Benämning**

Transportfäste

**Artikelnummer**

32.073.0050



# MONTERINGSANVISNING

Montering av transportfästen på Levo Summit El

Transportfästena (32.073.0050) monteras enligt bilderna nedan.

De bakre fästena monteras i rullstolens bakre ram i de förborrade hålen och låses fast genom att föra in de medföljande Quick-release pinnarna inifrån i hålen.

De främre fästena läggs vid transport runt den främre delen av ramen enligt bilden nedan.





LEVO AG  
Anglikerstrasse 20  
CH-5610 Wohlen  
Switzerland

T: +41 (0)56 618 44 11  
E: office@levo.ch  
www.levo.ch



Sunrise Medical AB  
Neongatan 5  
431 53 Mölndal  
Sverige

T: +46 (0) 31 748 37 00  
E: post@sunrisemedical.se  
www.sunrisemedical.se