

Verrouillage sans clé

Voir aussi manuel d'utilisation...

7.4. Verrouillage sans clé

Lorsque celui-ci est activé, le fauteuil roulant ne fonctionne pas. Cette fonction peut vous être utile lorsque vous devez laisser votre fauteuil roulant sans surveillance.



7.4.1. Activation du verrouillage sans clé

1. Assurez-vous que le boîtier de commande est éteint.
2. Poussez le manipulateur à fond vers l'avant et, tout en la maintenant dans cette position. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt pendant plus de 5 secondes.
3. La télécommande émettra un bip, indiquant que le système est maintenant verrouillé. Tous les voyants lumineux sont éteints.



7.4.2. Reconnaître quand le système est verrouillé

1. Pour voir si le système est verrouillé, allumez le bouton Marche/Arrêt de la télécommande. Si le système est verrouillé, tous les indicateurs lumineux de la batterie clignoteront deux fois, puis s'éteindront.

7.4.3. Désactivation du verrouillage sans clé

1. Assurez-vous que le boîtier de commande est éteint.
2. Poussez le manipulateur à fond vers l'arrière et, tout en la maintenant dans cette position. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt pendant plus de 5 secondes.
3. La télécommande émettra trois bips, indiquant que le système est maintenant déverrouillé.
4. Votre fauteuil est désormais prêt à rouler.



Pour verrouiller le fauteuil :

- Alors que le système de commande est activé, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé.
- Au bout d'une seconde, le système de commande émet un bip et plus rien n'est affiché à l'écran.
- Relâchez le bouton Marche/Arrêt.
- Actionnez le joystick vers l'avant jusqu'à ce que le système de commande émette un bip.
- Actionnez le joystick vers l'arrière jusqu'à ce que le système de commande émette un bip.
- Relâchez le joystick. Un long bip se fait entendre.
- Le fauteuil est maintenant verrouillé.
- La prochaine fois que le système de commande est allumé, le symbole de verrouillage s'affiche.
- Si un module de joystick avec affichage LED est branché, les voyants LED de l'indicateur de vitesse s'allument en cascade de gauche à droite.



Pour déverrouiller le fauteuil :

- Si le système de commande est éteint, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
- Le symbole de verrouillage s'affiche.
- Actionnez le joystick vers l'avant jusqu'à ce que le système de commande émette un bip.
- Actionnez le joystick vers l'arrière jusqu'à ce que le système de commande émette un bip.
- Relâchez le joystick. Un long bip est alors émis et l'écran s'allume.
- Le fauteuil est maintenant déverrouillé.

**Activation de l'antidémarrage :**

Après avoir allumé votre fauteuil, branchez la fiche du connecteur à 3 broches dans la prise de charge, puis débranchez-la. Le témoin de commande est éteint. Votre fauteuil est à présent protégé contre toute utilisation impropre.

Désactivation de l'antidémarrage :

Appuyez sur l'interrupteur on/off vert. Le témoin de vitesse se met à clignoter. Branchez à présent la fiche du connecteur à 3 broches dans la prise de charge, puis débranchez-la. Le témoin de commande en mode normal s'allume sur la console de commande. Votre fauteuil est activé.



Pour verrouiller le fauteuil :

- Alors que le système de commande est activé, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé.
- Au bout d'une seconde, le système de commande émet un bip sonore. Relâchez le bouton Marche/Arrêt.
- Actionnez le joystick vers l'avant jusqu'à émission d'un bip sonore.
- Actionnez le joystick vers l'arrière jusqu'à émission d'un autre bip sonore.
- Relâchez le joystick. Un dernier bip se fait entendre.
- Le fauteuil est maintenant verrouillé.



Pour déverrouiller le fauteuil

- Utilisez le bouton Marche/Arrêt pour activer le système de commande. L'indicateur de vitesse maximale/profil s'afficheront en alternance.
- Actionnez le joystick vers l'avant jusqu'à émission d'un bip sonore.
- Actionnez le joystick vers l'arrière jusqu'à émission d'un autre bip sonore.
- Relâchez le joystick. Un dernier bip se fait entendre.
- Le fauteuil est maintenant déverrouillé.