

improving people's lives



*JAY Lite*



# Positionnement au sein de la gamme JAY



## Jay Cushion range



- Cible du coussin
  - Coussin ultraléger avec un maintien modéré pour utilisateur actif
  - Le coussin le plus léger de sa catégorie
- Points forts du produit
  - Répartition optimale des pressions
  - Housse microclimatique dissipant la chaleur et l'humidité
    - Excellente stabilité grâce à la technologie Optiwell™
  - Nettoyage facile
  - Facilité de transfert



## 1 Spécifiquement conçu pour utilisateur actif

- La housse microclimatique à mailles espacées **3DX™** et la mousse réticulée du coussin permettent une meilleure répartition des pressions et une bonne évacuation de la chaleur et de l'humidité.
- L'insert ultraléger et très respirant est constitué de mousse réticulée. Il peut être lavé et remplacé. En option : insert avec mousse PU.
- Base en mousse respirante et légère Oletex®



## 2 Répartition optimale des pressions et maintien modéré


Les cisaillements peuvent être considérablement réduits grâce à l'insert en cuvette et à la découpe sous les ischions.

Insert en mousse réticulée


Découpe ischiatique

Marquage de la région du sacrum pour protéger le coccyx

La découpe de l'insert réduit les pressions sous les ischions pour une meilleure protection de la peau

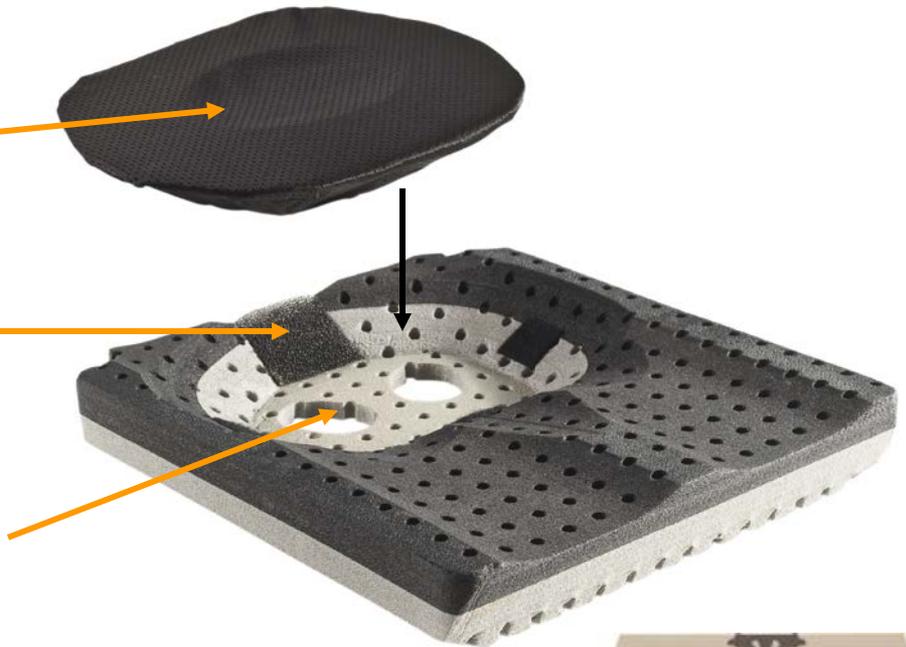

La nouvelle base JAY Lite

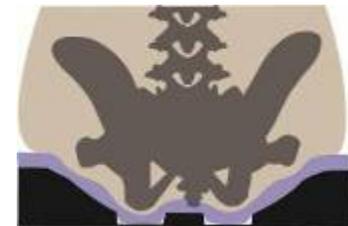

## 2 Répartition optimale des pressions et maintien modéré


- Les cisaillements peuvent être considérablement réduits grâce à l'insert en cuvette et à la découpe sous les ischions. Grâce à la technologie Optiwell™, la pression est répartie de manière optimale des hanches vers les membres inférieurs. L'insert est plus large pour un meilleur maintien du bassin et une posture symétrique de l'utilisateur.
- La cuvette ischiatique (PLA) du nouveau JAY Lite est plus large et réduit efficacement la charge sur les trochanters pour plus de confort.



## 3 Tissu microclimatique haut de gamme

- Evacuation de la chaleur et de l'humidité grâce à un matériau permettant une circulation optimale de l'air
  - Base respirante
  - Housse microclimatique à mailles espacées 3DX™
  - Insert en mousse réticulée (très respirante)

**Microclimatic  
Material**

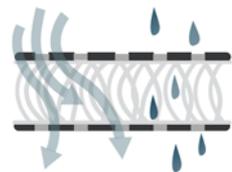


## 4 Entretien facile

Nettoyage facile de la base, l'insert et la housse


Avantages:

- 1) L'insert peut être remplacé
- 2) Forte respirabilité de la PLA (l'humidité se développe le plus souvent au niveau de la cuvette ischiatique)
- 3) L'insert (mousse et housse) peut être entièrement lavé en machine
- 4) Insert ultra léger - seulement 95 g (garniture en mousse et housse)

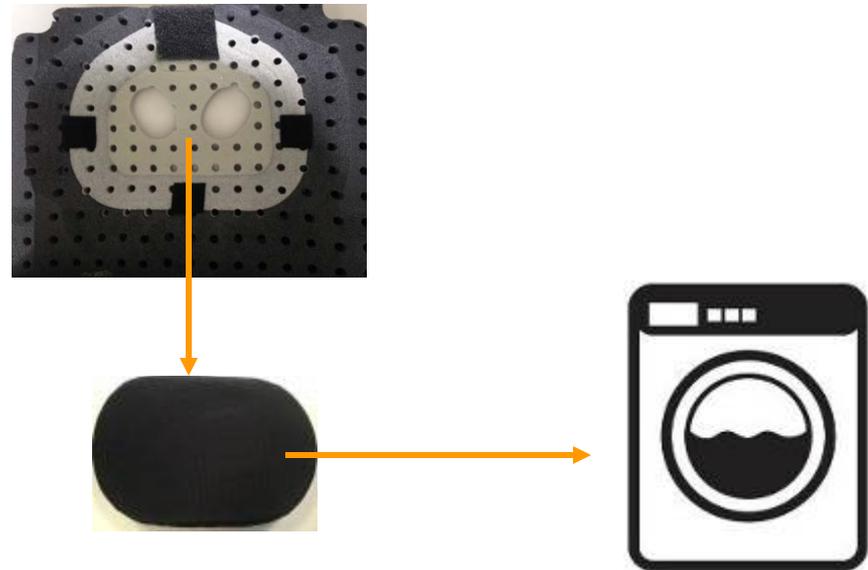


## Ancien coussin Jay Lite

- PLA basée sur des données anthropométriques
- Insert fixe
- Base: 2 couches de mousse, une plus douce et une plus ferme
- Base plate, pas de bords en biseaux

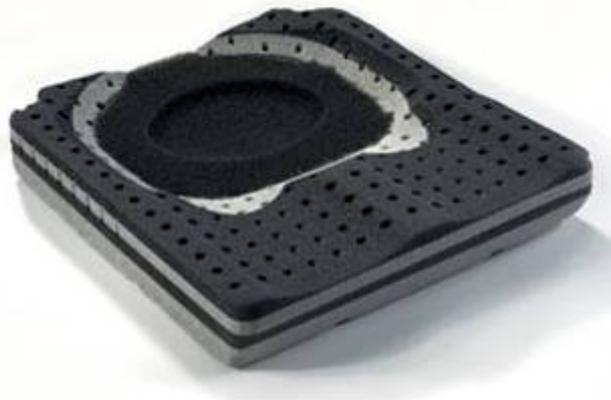

## Nouveau coussin Jay Lite

- PLA basée sur des données anthropométriques, mais plus large
- Insert amovible
- Mousse ferme sur la partie inférieure, mousse douce sur la partie supérieure
- Bords en biseaux

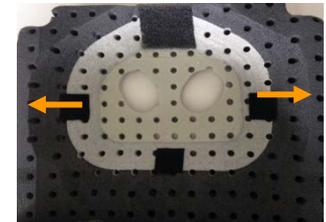

Partie supérieure en mousse douce (noir)

Partie inférieure en mousse ferme (gris)



Bords en biseaux

- Standard

→ **JAY LITE –  
profil bas**  
Procure un support  
modéré des fémurs.



- Coussin avec contour

→ **JAY LITE P –  
version positionnement**  
Positionnement  
optimal des fémurs et  
stabilité accrue grâce à  
3 cales de positionne-  
ment intégrées (1  
butée d'abduction et 2  
cales d'adduction) .



Largeurs coussin:	35 cm – 50 cm
Profondeurs coussin:	35 cm – 50 cm
Hauteur du coussin:	7 cm
Poids max. Utilisateur:	150 kg
Poids du coussin:	à partir de 660 g
Insert:	Insert mousse réticulée avec housse aérée (standard) Insert mousse PU avec housse incontinence (en option)
Housse extérieur:	Housse micro-climat, lavable à 60 °
Variante:	JAY LITE profil bas, JAY LITE P version positionnement
Garantie:	Coussin 2 années, Housse 6 mois
Position tarifaire:	500 208

