

Skool Kat manuelle trehjulssykkkel. Brukerveiledning.

Takk for at du valgte et produkt fra Tomcat™. Vi håper trehjulssykkelen gir deg mange år med glede, nytte og bruk.

Din Tomcat trehjulssykkkel er et medisinsk utstyr i klasse 1 som gjør at barn og voksne med bevegelses- eller funksjonshemninger kan sykle. Regelmessig sykling kan ha en positiv innvirkning på brukerenes styrke, mobilitet og generelle helse og velvære. Formålet med denne brukerinformatjonen er å hjelpe deg å få mest mulig ut av produktet.



Trehjulssykkelen kan være utstyrt med spesielle tilpasninger for å kompensere for visse problemer, slik som redusert mobilitet. Når selvstendig bruk av trehjulssykkelen ikke er mulig eller trygt, kan den leveres med spesielle tilpasninger som gjør det mulig for en bruker å sykle med assistanse og tilsyn fra en gående omsorgsperson.

Advarsel!



- Følg til enhver tid trafikkreglene som gjelder der du sykler.



- Ha alltid på deg hjelm og nødvendig beskyttende plagg.



- Bruk alle sikkerhetsinnretninger som følger med til enhver tid.



- Ikke la andre sitte på sykkelen, for eksempel på bakakselen eller i kurven. Ikke sitt flere på sykkelen, hverken på bakaksel eller i kurven.



- Bruk parkeringsbremsen når du går av/på trehjulssykkelen, eller når du forlater den uten tilsyn.



- På trehjulssykler som er utstyrt med Carer Control, som styres av en ledsager, må brukeren ikke forlates selv om parkeringsbremsen er koblet inn.



- Ikke kjør over fortauskanter (unntatt nedsenkte kanter) eller andre hindringer som kan gjøre sykkelen ustabil, eller skade ledsagerkomponenter eller koblinger.



- Ikke bruk enheten i terreng, bratte brakker, kraftige sidveis hellinger, eller på ujevnt veidekke.



- Sitt **ALDRI** på trehjulssykkelen når den transporteres i kjøretøyer av noe slag. Trehjulssykkelen er ikke kollisjonstestet

Generelt vedlikehold og sikkerhet for trehjulssykler.

Før bruk.

- Kontroller at lys, reflektorer, flagg og varselutstyr er i god stand og virker som de skal.
- Kontroller dekkene og pass på at det er riktig lufttrykk i dem (det riktige lufttrykket er stemplet på siden av dekket).
- Test alle brems- og styrefunksjoner, inkludert ledsagerbremsing.
- Kontroller at alle avtakbare deler er forsvarlig festet, riktig montert i samsvar med instruksjonene i brukerveiledningen, låst sammen der det er hensiktsmessig, og at de virker som de skal.

Under bruk.

- Bruk alltid alle sikkerhetsinnretninger som følger med.
- Overhold nasjonale og lokale forskrifter som gjelder sykling.
- Ha med deg et kommunikasjonsmiddel for bruk i nødtilfeller.
- Bruk en sikker sykkellås når du forlater trehjulssykkelen uten tilsyn.

Etter bruk.

- Vask og tørk trehjulssykkelen før den settes bort.
- Oppbevar den på et tørt sted uten ultrafiolett (UV) lys.
- Utfør vedlikehold på trehjulssykkelen i samsvar med informasjonen i brukerveiledningen, samt etter langvarig oppbevaring.

Regelmessig

- Kontroller dekktrykket (trykk på selve dekket), samt dekkets tilstand. Bytt ut alle dekk som viser tegn til slitasje, buling, sprekker eller svekkelse.
- Sjekk at bremsene fungerer effektivt, at de ikke viser tegn til rustne ledninger, og at de er riktig justert for å passe brukeren. Se brukerveiledningen (tilgjengelig på Internett) for ytterligere informasjon.
- Sjekk at sikkerhetsinnretninger som reflekser, lys, ringeklokke og lysende overflater er i god stand og ikke tildekte.

Årlig kontroll og kontroll før oppbevaring om vinteren

- Foreta en visuell kontroll av smøringen på kjedet gjennom inspeksjonsluken. Hvis kjedet ser tørt eller rustent ut, smør det godt med sykkelolje eller kjedesmøring.

Merknad 1 Med riktig vedlikehold er kjedet garantert å være vedlikeholdsfritt i fem år fra kjøpsdatoen (gjelder kun for den opprinnelige kjøperen). Riktig vedlikehold inkluderer beskyttelse mot tukling, feil bruk, uautoriserte endringer eller reparasjoner; forhold som forårsaker rust som fuktighet og salt, samt oppbevaring i våte eller fuktige omgivelser; forhold som forårsaker slitasje som sand, skitt eller støv; eller langvarig eksponering til vær og vind.

Merknad 2 Ved bruk av en høytrykkspyler, må den ikke brukes i nærheten av inspeksjonsluken. Kjedet må alltid smøres etter bruk av en høytrykkspyler.

Generell veiledning om kroppsholding under bruk av trehjulssykkelen


- Med en pedal i sin laveste posisjon, juster setehøyden slik at det utstrakte beinet er lett bøyd.
- Juster setet fremover eller bakover (tre posisjoner) til du oppnår en behagelig sittestilling/pedalstilling.
- Juster ryggstøtten (hvis montert) slik at rumpeballene sitter på den bredeste delen på setet.
- Juster høyden på styret. Når det er riktig justert, vil underarmene være i horisontal stilling.
- Juster rekkevidden på styret. Når det er riktig justert, vil ryggen være rett og siktlinjen være horisontal.
- Juster bredden mellom sidestøttene (hvis montert) så de sitter tett inntil kroppen og brukers klær. Unngå store avstander.
- Juster tilbehøret (fotstøtter, sele, bencalipere, hansker, hodestøtte, osv.) i henhold til råd fra fysioterapeut eller helsepersonell.

Justere funksjoner på trehjulssykkelen (hvis montert)

Merk! Med mindre noe annet er angitt, betyr remontering eller låsing det motsatte av å fjerne eller låse opp.

Svinge sete.

- Skyv den svarte knappen (under setet) ned.
- Vri setet mot høyre eller venstre, og frigjør deretter knappen. Setet låses automatisk når det er helt rotert.

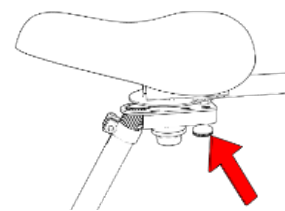


Justere setet

- Fjern festeboltene (2).
- Sett setet i den nye stillingen og sett tilbake festeboltene.
- Stram boltene til setet er forsvarlig festet, men ikke stram for mye.


Bytte mellom "fast" kjøring og "frakoblet kjøring" (Dual Drive™)

- For å aktivere fast kjøring, vri tappen (1) til den faller ned i sporet. Drei på pedalene eller skyv trehjulssykkelen til du hører et tydelig "klikk".
- For å aktivere frakoblet kjøring, trekk tappen ut av sporet og roter en kvart omdreining.

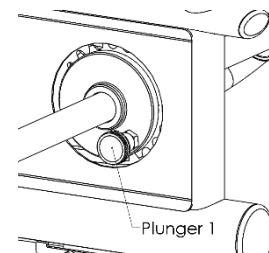

Montere kjørehåndtak

- Fest tappen (1) i sporet på kamplaten (2).
- Vri krankplaten (3) til sporet i krankplaten (3) (to valg) er justert med støtfangerstangen (4).
- Skyv støtfangerstangen (4) helt inn til den festes i sporet på krankplaten (3).
- Stram boltene (5) for å feste støtfangerplaten (4).
- Fest kjørehåndtaket (6) til kontrollkontakten (7).
- Stram skruen (8) forsvarlig med kontrollhåndtaket på samme linje som sykkelrammen, men ikke stram for mye.

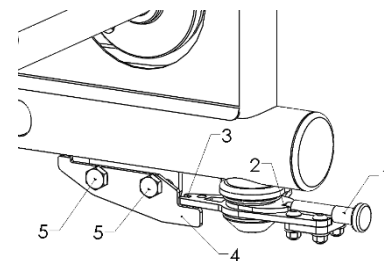

Merk 1. Når du velger sporet i krankplaten (4), juster tappen med akslen på trehjulssykler med kurv. Juster tappen med rammen på trehjulssykler uten kurv. (Vist)

Merk 2. Koble fra tappen (1) for å legge ned kontrollhåndtaket mot rammen (når sykkelen skal oppbevares eller transporteres), eller bruk kontrollhåndtaket "ulåst".


Sette opp og justere "ledsagerkontrollen"

- Fest tappen (1) i sporet på kamplaten (2).
- Vri krankplaten (3) til sporet i krankplaten (3) (to valg) er justert med støtfangerplaten (4).
- Skyv støtfangerplaten (4) helt inn til den festes i sporet på krankplaten (3), slik at styremekanismen kan låses i den midtre stillingen.
- Juster kontrollhåndtaket (6) med rammen og stram skruen (8) godt, men ikke stram for mye.
- Løsne boltene (9) for å heve eller senke håndtaket. Stram forsvarlig, men ikke stram for mye.
- Løsne boltene (5) og skyv støtfangerplaten (4) bort fra krankplaten (3). Stram boltene på nytt.

Merk 1. Når du velger sporet i krankplaten (4), juster tappen med akslen på trehjulssykler med kurv. Juster tappen med rammen på trehjulssykler uten kurv. For å bytte mellom alternativer, se instruksjoner i servicehåndboken.

Merk 2. For å bruke skyvestangen i Carer Control™-modus (styring og bremsing), koble inn tappen (1). For å bruke skyvestangen kun i Carer Braking™-modus, koble ut tappen (1).

Merk 3. Koble fra tappen (1) når trehjulssykkelen skal oppbevares eller transporteres.

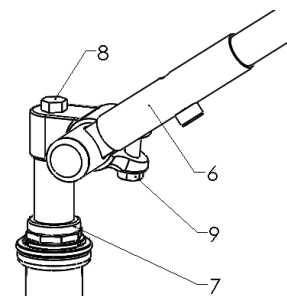



For ytterligere informasjon om hvordan du trygt setter opp og bruker trehjulssykkelen, gå til www.tomcatuk.org

Standard sykkeldeler og slitasjedeler/tilbehør/funksjoner

Merk! Bremsespaker, girskiftmekanismer, indikatorer, lys, reflektorer, sykkelhjelmer, pedaler, kabler, klemmer, håndtak, seter, pumper, reparasjonssett osv. er standard og velkjente sykkeldeler som er godt kjent innen sykkelindustrien, og som bør brukes på den måten som er tiltenkt av produsenten. Hvis du er usikker på hvordan du bruker eller vedlikeholder noen av standarddelene til sykkelen, bør du søke råd fra en sykkeltekniker før sykkelen brukes.



Tomcat SNI Ltd
Unit 13/7 The Gloucester Business Park
Hucclecote
Gloucester
GL3 4AA, UK
Tel +44(0)1452 616900
E-post info@tomcatuk.org
Nettside www.tomcatuk.org

EC REP

Advena Limited.
Tower Business Centre, 2nd Floor
Tower Street,
Swatar, BKR 4013
Malta.
Tel +356 2546 6689
E-post info@advena.mt
Nettside www.advena.mt