



# WeGo

Uživatelská příručka





**VYROBENO SPOLEČNOSTÍ**  
IBELIEVE SPORTS LTD PRO  
JAMES LECKEY DESIGN LTD

TEL.: +44 (0)28 9260 0750  
MODEL: KOČÁREK WEGO

MĚSÍC A ROK VÝROBY  
: 2018/11

IMPLEMENTACE  
NOREM: ISO 7176

---

**REGISTROVANÝ OBCHODNÍ NÁZEV  
A ADRESA**  
JAMES LECKEY DESIGN LIMITED

19C BALLINDERRY ROAD, LISBURN  
BT28 2SA, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

TEL.: +44 (0)28 9260 0750  
MODEL: KOČÁREK WEGO

MĚSÍC A ROK VÝROBY  
: 11/2018

IMPLEMENTACE  
NOREM: ISO 7176




**VAROVÁNÍ:** Abyste  
předešli vážnému  
zranění v důsledku pádu  
nebo vyklouznutí, vždy

používejte bezpečnostní postroj.  
Nikdy nenechávejte dítě bez  
dozoru. **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:**  
Tento návod si uschovejte pro  
budoucí použití. Zodpovídáte  
za bezpečnost dítěte. Tento  
kočárek je vhodný pro jedno dítě.

**VAROVÁNÍ:** Tento výrobek není  
vhodný pro děti mladší 6 měsíců.

**SPLŇUJE BEZPEČNOSTNÍ  
NAŘÍZENÍ BS 1021 – ODDÍL 1: 2014  
PRO VZNÍČENÍ OD CIGARET**

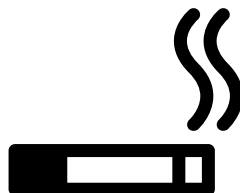

**NEDBALOST  
JE PŘÍČINOU POŽÁRU**

Firefly WeGo je lehký kočárek, který je plně skládací a umožňuje snadné cestování a každodenní aktivity.

## Obsah

01	Zamýšlené použití .....	4
02	Prohlášení o shodě .....	5
03	Varování a upozornění .....	5
04	Záruční podmínky .....	7
05	Bezpečnostní informace .....	8
06	Bezpečnostní opatření a kontraindikace .....	10
07	Čištění a údržba .....	11
08	Servis výrobku .....	11
09	Důležité pokyny .....	11
10	Kontrola výrobku .....	12
11	Opětovné použití výrobků Firefly .....	13
12	Sestavení kočárku WeGo .....	14
13	Změna nastavení kočárku WeGo .....	20
14	Použití sedačky GoTo s kočárkem WeGo .....	22
15	Nastavení postroje WeGo .....	25
16	Rozměry kočárku WeGo .....	26
17	Tabulka symbolů .....	27

## ODDÍL 01:

# Zamýšlené použití

### Zamýšlené použití

Kočárek WeGo je určen pro pohyb dětí, které nemohou samostatně chodit, a to až do maximální hmotnosti 30 kg. Je vhodný i pro děti, které potřebují dodatečnou oporu horní části těla a nemohou sedět bez pomoci.

### Indikace pro použití

Kočárek WeGo je určen pro předepsané i nepředepsané použití u dětí, které vyžadují mírnou úroveň posturální podpory nebo které mají potíže s pohybem.

Kočárek WeGo je primárně volně prodejné zařízení, které je k dispozici přímo rodičům/pečovatelům. Mezi uživatele mohou patřit mimo jiné nepohyblivé děti s nervosvalovou, vrozenou nebo chromozomální poruchou, poraněním míchy nebo globálním vývojovým opožděním. Tyto stavy obvykle ovlivňují schopnost dítěte sedět bez opory.

Kočárek WeGo je navržen tak, aby byl kompatibilní se sedačkou GoTo; přenosným sedacím zařízením vyráběným společností Leckey a navrženým tak, aby poskytovalo vyšší úroveň krátkodobé posturální podpory dětem s postižením. U dětí, které vyžadují tuto vyšší úroveň posturální opory, výrobce uvádí, že s kočárkem WeGo je nutné dodatečné použití sedačky GoTo.



**Varování:** Dítě by mělo být vždy připoutáno pětibodovým

bezpečnostním pásem a nikdy by nemělo být ponecháno v kočárku bez dozoru.

**Varování:** Pokud kočárek WeGo stojí, doporučujeme, aby byla brzda plně zatažená, aby se zabránilo nechtěnému pohybu.

Kočárek WeGo je určen pouze pro krátkodobé použití a neposkytuje vhodnou dlouhodobou podporu držení těla pro dítě s dalšími potřebami. Výrobek je určen k podpoře začlenění do komunity a k usnadnění přepravy pečovatelům.

Vzhledem k intimitě osobní péče spojené s dětmi je tento výrobek navržen tak, aby se s ním mohla dostat do kontaktu kůže a tělesné tekutiny dítěte, včetně moči a výkalů. Všechna zařízení byla navržena s ohledem na tuto skutečnost a jsou k nim přiloženy pokyny k čištění, aby bylo zajištěno, že zdraví dítěte nebo dospělého nebude ohroženo.

## ODDÍL 02: Prohlášení o shodě

WeGo je klasifikováno jako zdravotnické zařízení třídy I podle nařízení EU a UK. Společnost James Leckey Design Ltd jako výrobce s výhradní odpovědností prohlašuje, že zařízení Firefly WeGo splňuje požadavky směrnice 93/42/EHS, nařízení o zdravotnických prostředcích z roku 2017, nařízení Spojeného království o zdravotnických prostředcích z roku 2002 a normy EN 12182 Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením a metody zkoušení.

**Upozornění pro uživatele a/nebo pacienta: Jakákoli závažná nehoda, ke které dojde v souvislosti s tímto zařízením, by se měla oznámit výrobci a kompetentnímu orgánu členského státu, ve kterém se uživatel nebo pacient nachází.**

### UPOZORNĚNÍ:

**Všeobecné uživatelské informace. Následkem nedodržení těchto pokynů může dojít k fyzickému zranění, poškození výrobku nebo poškození okolního prostředí.**

## ODDÍL 03: Varování a upozornění

### Varování před nebezpečím převrácení:

- Kočárek WeGo nikdy nenechávejte na nerovném povrchu.
- Nikdy nenechávejte dítě v kočárku WeGo bez dozoru, například když spí.
- Před přemístěním uživatele do kočárku vždy zkontrolujte, zda jsou systém sklápění, bezpečnostní přezky sedačky GoTo a stříška zajištěny. Pripneďte pětibodový postroj nebo pětibodový postroj sedačky GoTo hned, jak je uživatel umístěn do kočárku.
- Ujistěte se, že je brzda plně zatažená a zajištěná (slyšitelné „cvaknutí“).
- Na rukojeti kočárku nepřipevňujte těžké tašky.
- Před použitím zkontrolujte, zda je správně upevněna korba kočárku, sedací jednotka nebo autosedačka.

### Varování před nebezpečím zachycení prstů:

- Dávejte pozor, aby prsty obsluhy nebo dítěte nebyly zachyceny v mezerách mezi sedačkou a rámem.

### Varování před nebezpečím pro uživatele:

- Kočárek WeGo není vhodný pro děti mladší 6 měsíců.
- Před umístěním uživatele do kočárku WeGo nastavte výrobek do terapeutické polohy a zkontrolujte jeho stabilitu a to, zda je rám

kočárku plně zajištěný a parkovací brzda plně zatažená.

- Přesunov užívatel do výrobku a z něj musí být prováděny příslušným personálem a zařízením.
- Před umístěním užívatel do výrobku se ujistěte, že je k dispozici dostatečný přístupový prostor a že jsou všechny spony a přezky zajištěny (např. bezpečnostní přezky sedačky GoTo). Nedoporučuje se posunovat užívatel vsedě nebo provádět jakékoli úpravy sedačky, když užívatel sedí.
- Před použitím kočárku WeGo se ujistěte, že jsou všechny pětibodové bezpečnostní postroje pro užívatel zapnuty a nastaveny tak, aby bezpečně držely užívatel na místě. Nikdy nenechávejte dítě v kočárku WeGo bez dozoru. Pokud se užívatel zachytí v částech kočárku, hrozí nebezpečí uškrcení nebo udušení.
- Pokud je užívatel vystaven jakékoliv formě nepohodlí, co nejdříve ho bezpečně přesuňte z výrobku.
- Aby nedošlo ke zranění, dbejte na to, aby se dítě při rozkládání a skládání tohoto výrobku zdržovalo v bezpečné vzdálenosti.
- Nenechte dítě, aby si s tímto výrobkem hrálo.
- Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo bruslení.
- Tento kočárek nikdy nepoužívejte pro více než jedno dítě.

### **Pozor Nebezpečí skřípnutí prstů:**

- Při montáži nebo seřizování polohy součástí sedačky buďte opatrní, abyste si vy nebo užívatel neskrípili prsty při polohování součástí sedačky a utahování montážních prvků.
- Pečovatel se nesmí dotýkat žádného pohyblivého spoje nebo kloubu, které nejsou zajištěné.
- Při montáži, rozkládání a skládání rámu kočárku dávejte pozor, abyste si nepřiskrípili prsty, stejně jako při nastavování sklonu opěradla.

### **Pozor Každodenní kontrola:**

- Kočárek WeGo musí být každý den kontrolován, než ho začnete používat. Ujistěte se, že všechny postroje, sedací prvky a součásti rámu jsou řádně upevněné.
- Před použitím výrobek vždy vizuálně zkontrolujte. V případě pochybností výrobek NEPOUŽÍVEJTE. Pokud máte podezření nebo víte, že je výrobek (nebo díl) vadný, NEPOUŽÍVEJTE JEJ. Obráťte se co nejdříve na naše zákaznické oddělení nebo na místního prodejce.

### **Pozor Čištění:**

- Pravidelně výrobek čistěte, aby nedocházelo k hromadění nečistot. Nahromaděné nečistoty mohou způsobit předčasné opotřebení látkových součástí a vyvolat korozi výrobku. Používejte pouze neabrazivní domácí čističe a vlhčené utěrky, nepoužívejte na čalounění tekoucí vodu, když je součástí výrobku. Před použitím se ujistěte,

že výrobek je suchý. Viz informace o čištění a údržbě v návodu k použití.

**Pozor Čištění tlakovými čističi/hadicemi:**

- Nepoužívejte hadice ani tlakové čističe na součásti rámu, protože rám není utěsněný proti tekoucí vodě a může být poškozen vodou.

**Upozornění pro skladování:**

- Výrobek musí být uschován mimo dosah přímých zdrojů tepla včetně otevřeného ohně, cigaret, elektrických a plynových topidel.

**Pozor Likvidace:**

- Výrobek WeGo odevzdávejte pouze na komunální skládce v rámci správné recyklační kategorie.

**Tento výrobek je vhodný pro dítě, které se nedokáže samo posadit, přetočit a nedokáže se zvednout na ruce a kolena. Maximální hmotnost dítěte: 30 kg.**

## **ODDÍL 04:**

### **Záruční podmínky**

Záruka na výrobek WeGo platí pouze v případě, že je výrobek používán v souladu s jeho určením a při dodržení všech specifikací výrobce. Na tento výrobek vyrobený společností James Leckey Design Ltd. je poskytována dvouletá záruka.

Zboží nám můžete vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. Jakmile nás kontaktujete, zajistíme vyzvednutí zboží na naše náklady a po jeho vrácení vám zboží opravíme nebo vyměníme a do 30 dnů vám ho vrátíme. Ve všech případech je povinností zákazníka zajistit, aby bylo vrácené zboží vhodně zabaleno, nejlépe v původním obalu.

## ODDÍL 05: Bezpečnostní informace

1. Před použitím si vždy důkladně přečtěte uživatelské pokyny.
  2. Před umístěním dítěte do kočárku WeGo vždy zkontrolujte, zda je pro něj vhodný.
  3. Při používání tohoto výrobku by děti neměly být ponechány nikdy bez dozoru.
  4. Maximální přípustná hmotnost uživatele výrobku WeGo je 30 kg. Tato hodnota by nikdy neměla být překročena.
  5. V žádném případě výrobek WeGo neupravujte a nepoužívejte s ním jiné než společnostmi Firefly schválené komponenty. To může ohrozit vaše dítě a také zrušit platnost záruky.
  6. Kočárek WeGo nebyl podroben crash testům, proto jej nelze používat pro přepravu v motorových vozidlech.
  7. Tento kočárek byl navržen pro přepravu jednoho dítěte. Nepřevázejte další předměty ani děti, kromě případů doporučených v tomto návodu. V opačném případě může dojít k poškození kočárku nebo k jeho nestabilitě.
  8. Přetížení nebo nesprávné složení mohou způsobit poškození kočárku.
  9. Pokud používáte sedačku GoTo s kočárkem WeGo, vždy se ujistěte, že je pevně připevněna ke kočárku pomocí tří černých popruhů.
- Další pokyny naleznete v oddíle 14.**
10. Při používání kočárku s dítětem, které je zcela položeno dozadu, dbejte zvýšené opatrnosti, protože se může zvýšit riziko převrácení.
  11. Přední kola vždy zvedejte přes obrubníky nebo schody zatlačením na rukojeť.
  12. Výrobek WeGo musí být uschován mimo dosah přímých zdrojů tepla včetně otevřeného ohně, cigaret, elektrických a plynových topidel.
  13. Tento kočárek není vhodný pro běhání nebo bruslení.
  14. Nikdy nedovolte dětem, aby kočárek skládaly, sestavovaly nebo rozebíraly.
  15. Nikdy nedovolte, aby byl kočárek používán jako hračka nebo aby se v něm děti vozily s ostatními.
  16. Pokud máte jakékoli pochybnosti o bezpečném používání tohoto kočárku nebo pokud dojde k selhání některé z jeho součástí, okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte zákaznické služby Firefly na adrese **customer.enquiries@fireflyfriends.com**.





**Varování: Nedodržení těchto pokynů může ohrozit vás nebo dítě.**

**Varování: Plastový kryt uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení.**

- **Pro zvýšení bezpečnosti** doporučujeme mít neustále na ruce poutko nebo zápěstní pásek, aby se kočárek nerozjel.
- Když kočárek stojí, je nutné brzdu pevně stisknout, dokud se neozve cvaknutí. Toto cvaknutí signalizuje, že **brzda je plně zatažená**.
- Před rozjezdem nezapomeňte brzdu uvolnit. Červený pruh by se měl vrátit do původní polohy, aby se zámek odjistil.
- Nikdy nenechávejte dítě v sedačce bez dozoru.
- Před použitím zkontrolujte, zda je správně upevněna korba kočárku, sedací jednotka nebo autosedačka.
- Ujistěte se, že je dítě připoutáno pětibodovým zádržným postrojem, aby nemohlo vypadnout ze sedačky.
- Při skládání a rozkládání kočárku dbejte na to, aby se dítě nenacházelo v jeho těsné blízkosti. Předjete tak zranění.

## **Varování:**

1. Sedačku chraňte před zdroji ohně nebo vznícení. Tím se zabrání deformaci nebo poškození plastových nebo textilních materiálů.
2. Ujistěte se, že hmotnost dítěte je nižší než uvedená maximální hmotnost uživatele 30 kg, aby nedošlo k poškození sedačky.
3. Nikdy nedovolte dětem, aby kočárek skládaly, sestavovaly nebo rozebíraly.
4. Nikdy nedovolte, aby byl kočárek používán jako hračka nebo aby se v něm děti vozily s ostatními.
5. Kočárek nikdy nepoužívejte pro více než jedno dítě.
6. Kočárek WeGo nebyl podroben crash testům, proto jej nelze používat pro přepravu v motorových vozidlech.
7. Tento kočárek není vhodný pro běhání nebo bruslení.
8. Plastový kryt uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení.
9. Přetížení nebo nesprávné složení mohou způsobit poškození kočárku.

**Nedodržení těchto pokynů může ohrozit vás nebo dítě.**

## **ODDÍL 06:**

# **Bezpečnostní opatření a kontraindikace**

### **Bezpečnostní opatření:**

- Trvalé deformace páteře, jako jsou skolióza nebo kyfóza.
- Vážné svalové kontraktury.
- Vážné svalové nebo kosterní asymetrie včetně vykloubení kyčle.
- Progresivní a svalová atrofie.
- Vysoké riziko zlomenin kostí nebo nedávné zlomeniny.
- Vysoké riziko otlačenin nebo otevřených ran.
- Silné nekontrolované pohyby.
- Špatně kontrolované záchvaty.
- Děti závislé na používání perkutánní endoskopické gastrostomie.
- Zdravotní labilita včetně oslabených dýchacích nebo kardiovaskulárních funkcí.
- Závislost na zařízení na podporu životních funkcí třetích výrobců, jako jsou kyslíkové přístroje.
- Významné poruchy učení anebo problémy s chováním.

### **Kontraindikace:**

- Dítě je mladší než 6 měsíců.

**Pro používání výrobku WeGo nebyly zjištěny žádné kontraindikace.**

**Na základě rozhodnutí klinického lékaře nebo rodiče musí být přijata veškerá bezpečnostní opatření a zohledněny kontraindikace. Společnost Leckey a Firefly doporučuje, aby úvodnímu posouzení, nastavení, konfiguracím a odstraňování problémů byl přítomen vyškolený a zkušený klinický lékař.**

## ODDÍL 07:

### Čištění a údržba

1. Kočárek lze čistit studenou vodou (300) s jemným pracím prostředkem.
2. Podšívku je možné vyjmout a prát v pračce ve studené vodě s jemným pracím prostředkem. Nesušte v sušičce na prádlo.
3. Před složením a uložením nechte výrobek vždy uschnout.
4. Rám čistěte vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
5. Na kočárek nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

#### Tip:

Jeden z nejlepších čisticích prostředků na čalounění na vodní bázi si snadno vyrobíte doma. Do misky nalijte jeden šálek teplé (ne horké) vody a přidejte 1/4 šálku biologicky rozložitelného mýdla na mytí nádobí. Směs šlehejte elektrickým mixérem na střední otáčky, dokud se tekutina nezmění v hustou pěnu. Tato pěna odstraní nahromaděné nečistoty a většinu skvrn od jídla nebo pití. Tento čisticí prostředek je nejen jednoduchý na výrobu a levný, ale je také netoxický a šetrný k životnímu prostředí.

## ODDÍL 08:

### Servis výrobku

Veškeré záležitosti týkající se servisu naleznete na webových stránkách Firefly

[www.medicco.cz](http://www.medicco.cz) nebo kontaktujte tým zákaznických služeb Firefly na [info@medicco.cz](mailto:info@medicco.cz).

## ODDÍL 09:

### Důležité pokyny

1. Při rozkládání a skládání rámu dávejte pozor, abyste si neporanili prsty.
2. Před umístěním dítěte do kočárku WeGo se ujistěte, že jsou všechny pojistné prvky zajištěny.
3. Dítě připoutejte, jakmile jej vložíte do kočárku.

#### Umístění dítěte do sedačky GoTo

1. Před umístěním dítěte do sedačky GoTo musí být sedačka bezpečně připevněna na místě určeném pro její použití.
2. Ujistěte se, že pásy postroje nebrání umístění dítěte do sedačky GoTo. Ramenní popruhy a boční podpůrné popruhy by měly být velmi volné.
3. Zavřete středovou přezku a nastavte boční podpůrné popruhy tak, aby bylo dítě bezpečně připoutáno v postroji sedačky.

Délku ramenního popruhu je třeba nastavit tak, aby dítěti bezpečně seděl.

4. Délku pásu v oblasti třísel lze nastavit pomocí nastavovacího prvku pod polstrovaným krytem. U modelu GoTo Size 2 lze umístění pásu v oblasti třísel posunout směrem ven, abyste dítěti poskytli více prostoru, až vyroste.

### **Vyjmutí dítěte ze sedačky GoTo**

1. Uvolněte ramenní popruhy a boční podpurné popruhy.
2. Odjistěte středovou přezku pomocí uvolňovacího tlačítka na postroji.
3. Stáhněte ramenní popruhy z ramen dítěte a opatrně vyjměte ruce dítěte z popruhů.
4. Po bezpečném provlečení nohou opatrně provlečte ruce dítěte ramenními popruhy – ramenní popruhy by měly být velmi volné. Ujistěte se, že polstrovaná část ramenních popruhů je na ramenou dítěte.

## **ODDÍL 10: Kontrola výrobku**

Doporučujeme, abyste před každým použitím provedli různé kontroly výrobku, abyste se ujistili, že je výrobek bezpečný.

1. Zkontrolujte opotřebení veškerého čalounění.
2. Zkontrolujte, zda jsou všechny přezky plně funkční.
3. Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny skládací prvky zajištěny a správně fungují.
4. Před použitím se ujistěte, že jsou všechna blokovací zařízení zajištěna.
5. Zkontrolujte, zda jsou brzdy plně funkční.
6. Nepoužívejte kočárek, pokud je některá jeho součást poškozená nebo chybí.

## **ODDÍL 11:**

# **Opětovné použití výrobků Firefly**

Než výrobek předáte k dalšímu používání, doporučujeme jej desinfikovat jednou z následujících metod:

**Upozornění:** Než budete výrobek desinfikovat, vždy z něj nejprve odstraňte usazené nečistoty.


1. Pokud je to možné, doporučujeme použít automatický „aerosolový“ desinfekční systém, který pokryje všechny povrchy desinfekčním prostředkem. Před použitím je třeba si důkladně přečíst pokyny výrobce vybraného systému a následně je dodržovat.
2. Pokud automatický desinfekční systém není k dispozici, všechny povrchy výrobku se musí utřít desinfekčními ubrousky nebo tekutou desinfekcí na měkkém hadříku. Vhodnými přípravky jsou 70% IPA, 70% alkohol nebo naředěný bělicí prostředek. Při použití je třeba dodržovat pokyny výrobce vybraného přípravku. Čalounění a tkaniny výrobku by se měly důkladně vyčistit podle pokynů v kapitole o čištění a údržbě v této příručce.

Předejte kopii tohoto návodu k obsluze společně s výrobkem. Pokud máte pochybnosti o bezpečném používání výrobku Firefly od Leckey nebo pokud dojde k závadě jakékoliv jeho součásti, přestaňte výrobek používat a co nejdříve kontaktujte zákaznické služby Firefly na adrese: **info@medicco.cz** .

## ODDÍL 12:


### Sestavení kočárku WeGo

1. Rozložte rám kočárku WeGo tak, že vytáhnete rukojeť nahoru a položíte nohu na trubku zadní osy, jak je znázorněno. **A**
2. Zvedejte rukojeť **B**, dokud neuslyšíte cvaknutí, což znamená, že je rám zajištěn. **C**
3. Zkontrolujte, zda jsou oba bezpečnostní zámky zajištěné.
4. Chcete-li kočárek WeGo složit, zatáhněte za pojistné páčky na obou stranách směrem nahoru. **D**

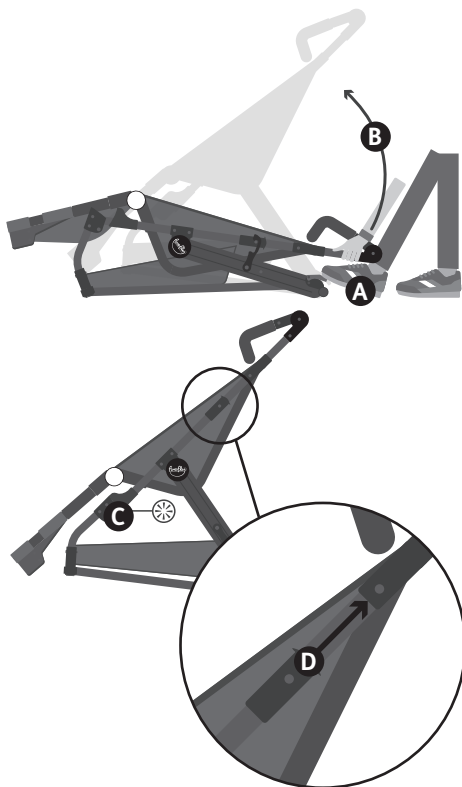




### 12.1 Montáž zadních kol

1. Zvedněte trubku zadní osy kočárku a zasuňte osu zadního kola, dokud neuslyšíte cvaknutí, což znamená, že je kolo zajištěno v požadované poloze. Opakujte tyto kroky u druhého kola.
2. Před použitím kočárku WeGo se ujistěte, že jsou kola správně namontována. Pro kontrolu zatáhněte za kolo a ujistěte se, že je zajištěno ve správné poloze.

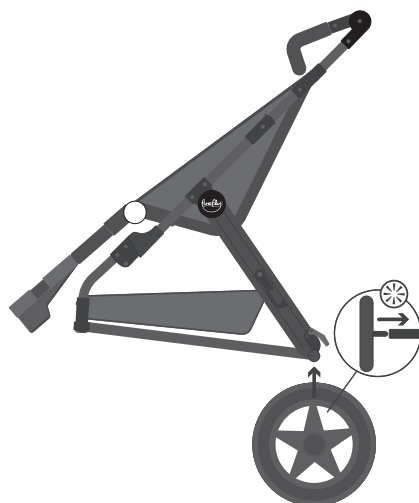


## 12.2 Montáž předních kol

1. Zvedněte trubku přední osy kočárku a zasuňte osu předního kola, dokud neuslyšíte cvaknutí, což znamená, že je kolo zajištěno v požadované poloze. Opakujte tyto kroky u druhého kola. **A**
2. Před použitím kočárku WeGo se ujistěte, že jsou kola správně namontována. Pro kontrolu zatáhněte za kolo a ujistěte se, že je zajištěno ve správné poloze.
3. Chcete-li přední kola zablokovat, nastavte je do přímé polohy a posuňte vodítko aretace předních kol dolů. **B**
4. Chcete-li přední kola odblokovat, posuňte vodítko aretace předních kol nahoru.
5. Uslyšíte cvaknutí, které signalizuje, že je brzda plně zatažená.

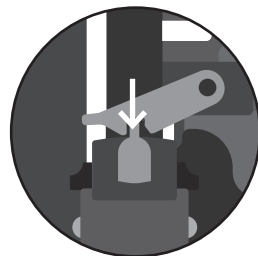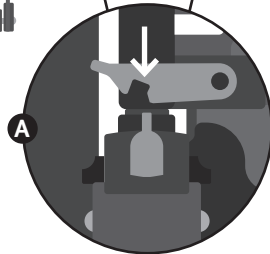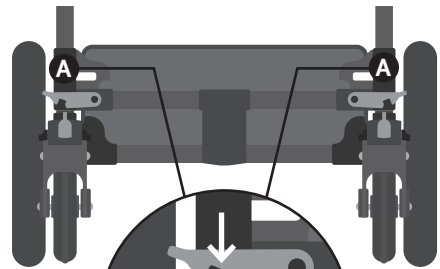


## 12.3 Seřízení polohy rukojeti

1. Chcete-li nastavit rukojeť, stiskněte černá tlačítka na vnitřní straně sestavy rukojeti a nastavte ji do požadované polohy. **A**

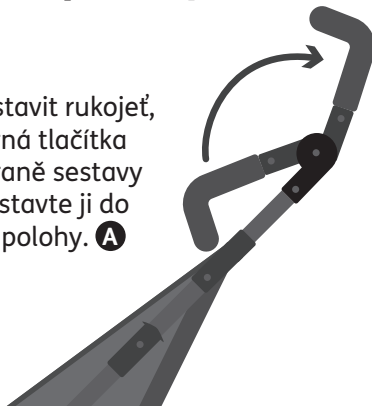


## 12.4 Použití brzdy

1. Pro zajištění brzdy sešlápněte nohou červenou brzdovou tyč, dokud se kola nezablokují. Uслыšíte cvaknutí, které signalizuje, že je brzda plně zatažená.

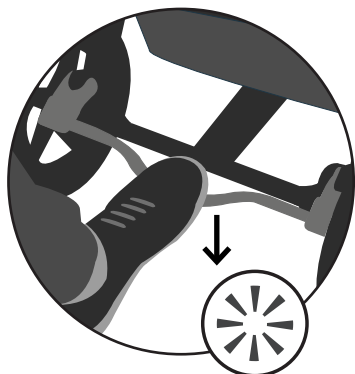


2. Pro uvolnění brzdy přitáhněte červenou brzdovou tyč zpět do původní polohy.

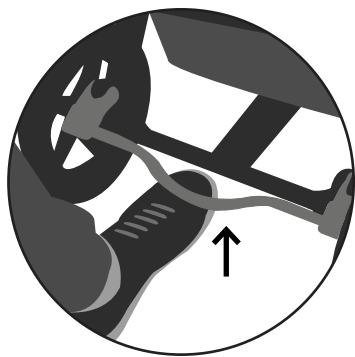


## 12.5 Připevnění korby

1. Plastový hrot připevněte ke kočárku zasunutím do vyobrazeného úchyty. **A**

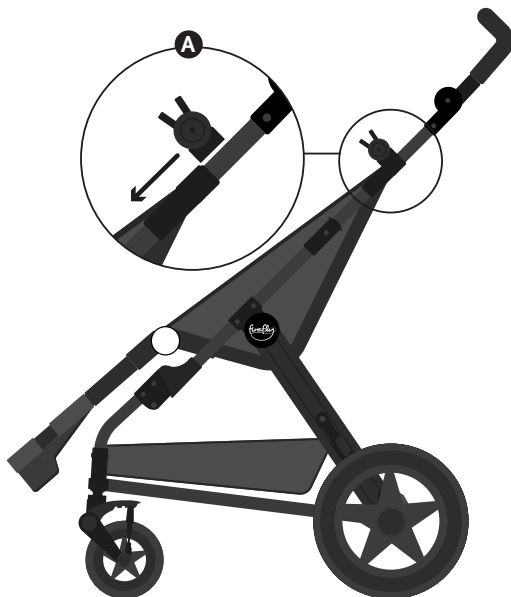


2. Plastové tyče protáhněte materiálem korby, jak je znázorněno na obrázku.

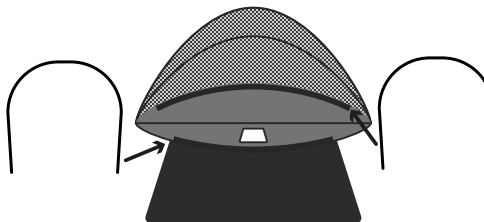




3. Vložte tyče do plastových výstupků na obou stranách kočárku a zatlačte je dolů. **B**
4. Otočte černé gumičky kolem háčků na zadní straně rámu kočárku.
5. Připojte suchý zip na korbu, abyste zajistili její bezpečné upevnění. **C**

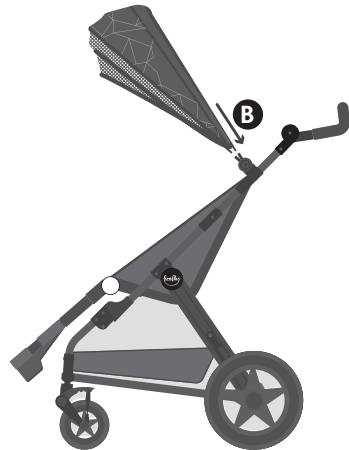

## 12.6 Připevnění pláštěnky

1. Začněte u opěrky nohou, přetáhněte pláštěnku přes kočárek a vytáhněte ji nahoru přes korbu a zase dolů po zadní straně kočárku WeGo.
2. Stáhněte dolů křídélka a zajistěte je uvnitř rámu. **A**
3. Obtočte černé gumičky kolem háčků na zadní straně rámu kočárku. **B**

**Užitečný tip:** Chcete-li opěradlo nastavit do zcela vzpřímené polohy, před připevněním korby jej přitáhněte dopředu a co nejvíce utáhněte.

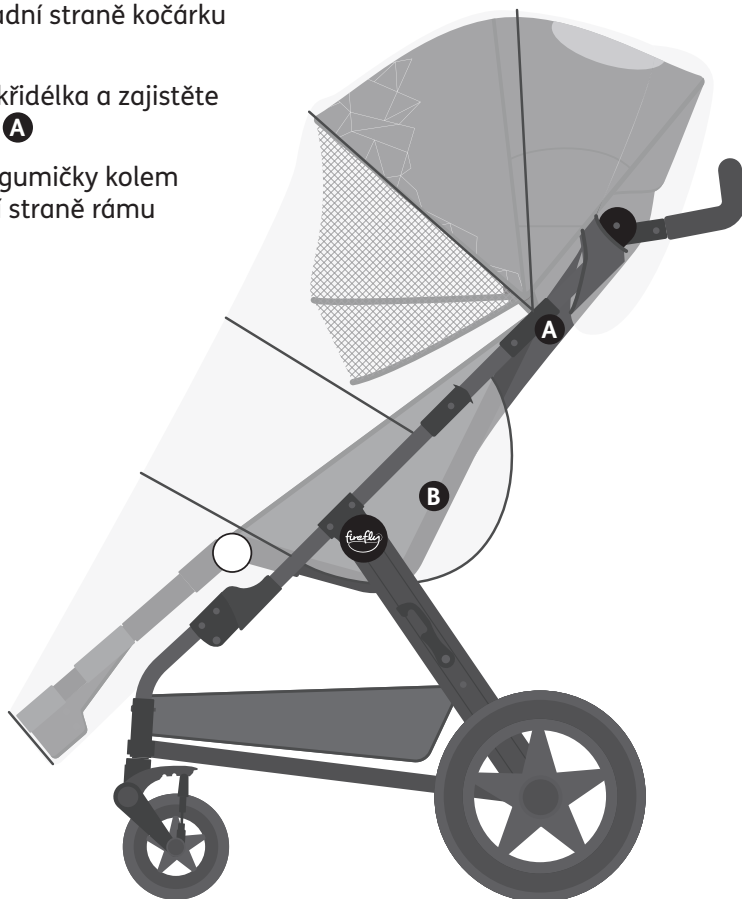

## 12.7 Připevnění nánožníku


1. Přetáhněte nánožník přes opěrku nohou a provlékněte sponky přes poutka na obou stranách kočárku.

**A**



Při používání tohoto výrobku by děti neměly být ponechány nikdy bez dozoru.

Zajistěte, aby všechny prvky pro nastavení nánožníku byly mimo dosah dítěte.

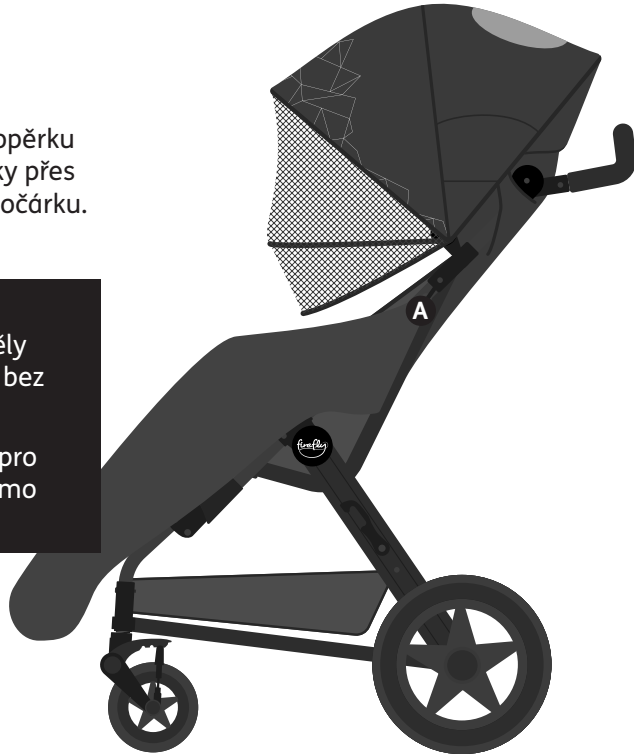

## 12.8 Připevnění moskytiéry


1. Umístěte moskytiéru na kočárek a připevněte ji pomocí sponek – provlékněte je poutky na obou stranách kočárku.



Varování: V držáku nápojů používejte pouze studené nápoje.

## 12.9 Připevnění držáku nápojů


1. Zasuňte držák nápojů do upevňovacího prvku na pravé straně rámu kočárku.

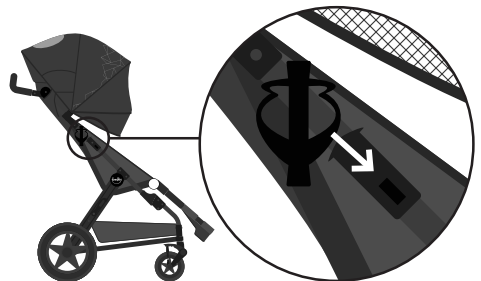



## ODDÍL 13: Změna nastavení kočárku WeGo

### 13.1 Nastavení opěradla

1. Chcete-li nastavit opěradlo dozadu, zatáhněte za šedou plastovou páčku směrem k sobě pro nastavení do požadovaného úhlu. **A**
2. Chcete-li nastavit opěradlo do vzpřímené polohy, zatáhněte za šedé plastové D-kroužky pro nastavení do požadovaného úhlu. **B**
3. Chcete-li sedačku nastavit do zcela vzpřímené polohy, zatlačte opěradlo nahoru za rám a utáhněte jej tahem za plastové D-kroužky.


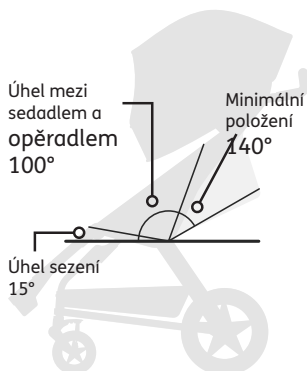


**Varování:** Nikdy se nepokoušejte nastavovat kočárek WeGo, když v něm sedí dítě

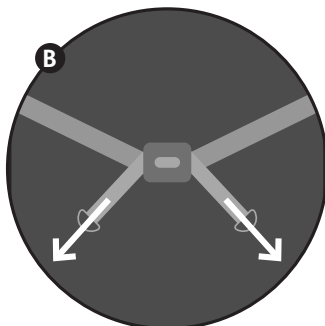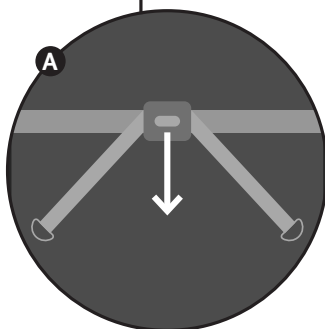


## 13.2 Nastavení opěrky nohou

1. Chcete-li opěrku nohou upevnit v nejkratším nastavení, zatlačte ji nahoru tak daleko, jak to půjde, a zajistěte horní patentku na každé straně na tkanině. Ujistěte se, že patentky jsou plně zajištěny.
2. Chcete-li opěrku nohou upevnit v nejdelším nastavení, uvolněte patentky a táhněte opěrku dolů, dokud pojistný kolík nezacvakne a nezapadne do spodních patentek na obou stranách.

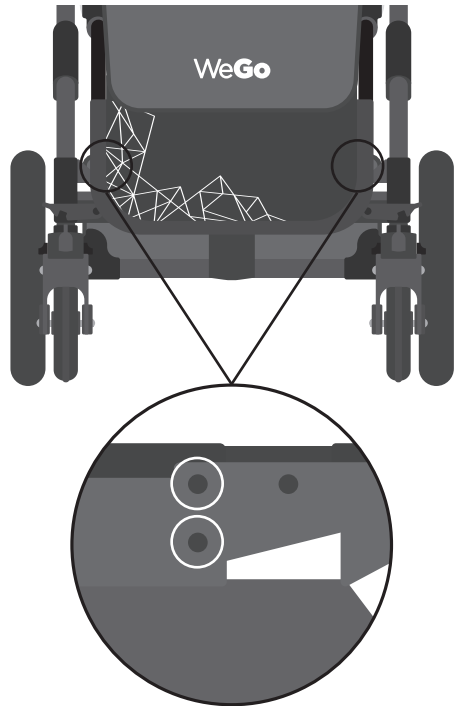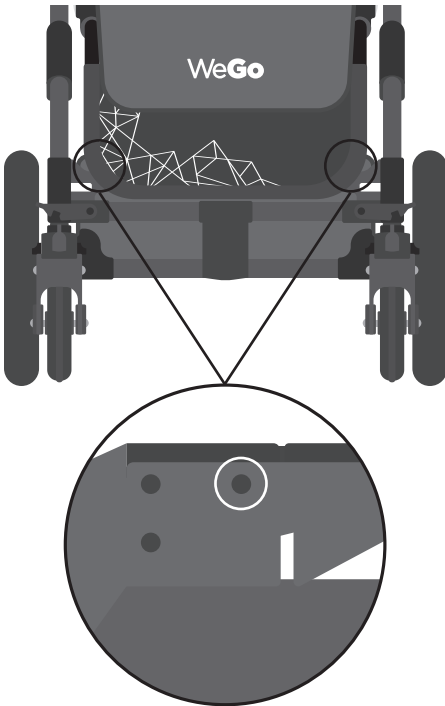


3. Opěrku nohou lze naklonit do požadovaného úhlu stisknutím bílého tlačítka na bočním závěsu opěrky nohou.

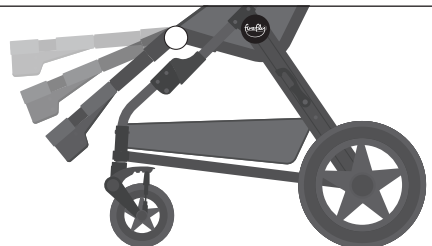


## ODDÍL 14: Použití sedačky GoTo s kočárkem WeGo


1. Ujistěte se, že jsou všechny popruhy na sedačce GoTo volné a nejsou k sobě připevněny. Umístěte sedačku GoTo do kočárku.

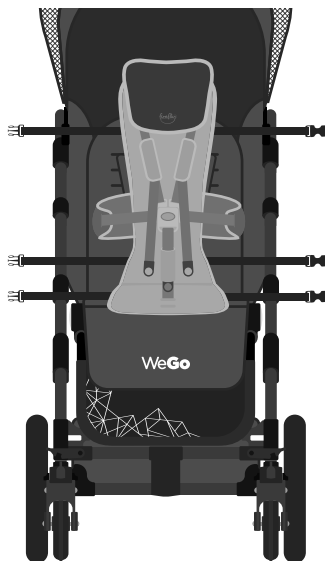

2. Prostrčte popruhy vyobrazenými otvory a upevněte je na obou stranách.

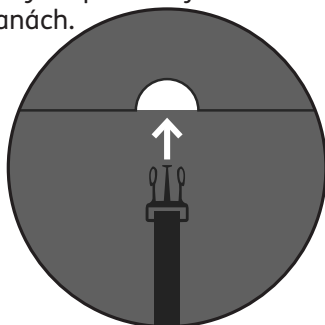

3. Zatáhněte za popruhy směrem ven a utáhněte je. **A**
4. Přečnávající popruhy zavažte do smyček a upevněte je do spon. **B**
5. Před umístěním dítěte do sedačky GoTo se ujistěte, že jsou všechny černé popruhy bezpečně upevněny kolem kočárku a pětibodová přezka vpředu je rozepnutá.

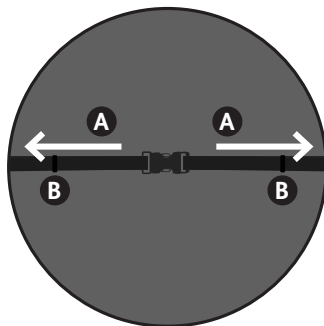


## 14.1 Otevírání a zavírání pětibodové přezky

Nejprve se ujistěte, že jsou ramenní popruhy, boční podpůrné popruhy a popruhy v oblasti třísel volné a rozepnuté.

Přípevněte dva upevňovací prvky bočních podpůrných popruhů ze strany do středové přezky. **A**

Po upevnění nastavte ramenní popruhy, boční podpůrné popruhy a popruh v oblasti třísel tak, že je utáhnete. **B**

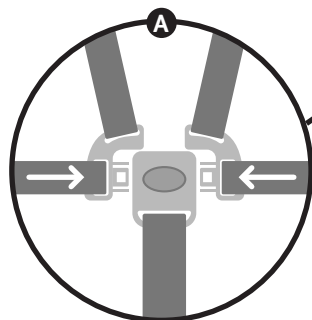

Ujistěte se, že popruhy nejsou při zavírání přezky zkroucené.

U modelu GoTo Size 2 lze místo uchycení popruhu v oblasti třísel posunout dozadu nebo dopředu, aby vyhovovalo potřebám dítěte. Ujistěte se, že je pevně připevněn k plastové základně sedačky GoTo. **C**




## 14.2 Nastavení opěrky hlavy a boční podpěry

Vyšroubujte knoflík na opěrce hlavy proti směru hodinových ručiček a vyjměte opěrku hlavy ze základny sedačky GoTo. Posuňte opěrku hlavy nahoru nebo dolů, abyste dosáhli požadované polohy. **A**

Po nastavení opěrky hlavy do požadované výšky zašroubujte knoflík zpět do základny sedačky GoTo otáčením ve směru hodinových ručiček. **B**

Otáčením knoflíku proti směru hodinových ručiček odpojte boční podpěru. Posuňte boční podpěru nahoru nebo dolů, abyste dosáhli požadované polohy. Jakmile je boční podpěra v požadované výšce, opět ji zajistěte otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček. **C**

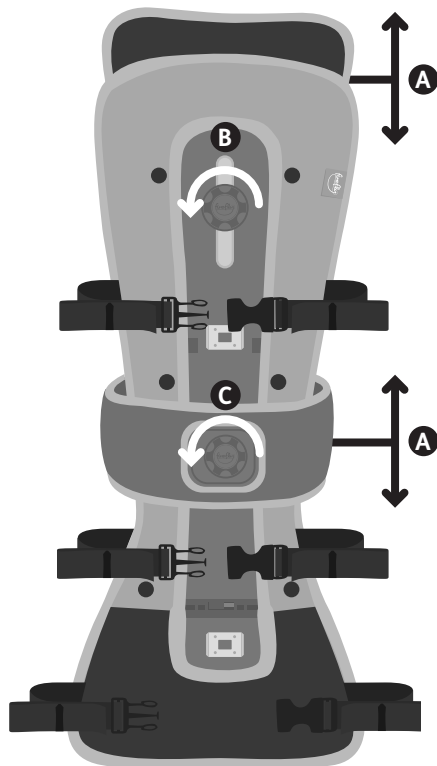




## ODDÍL 15: Nastavení postroje WeGo

Chcete-li nastavit ramenní popruhy na kočárku WeGo, zasuňte koncovou přezku na zadní straně opěradla do zadního otvoru. **A**

Poté přezku protáhněte drážkou v požadované výšce. **B**

Popruhy můžete utáhnout nebo povolit nastavením přezek na popruzích.

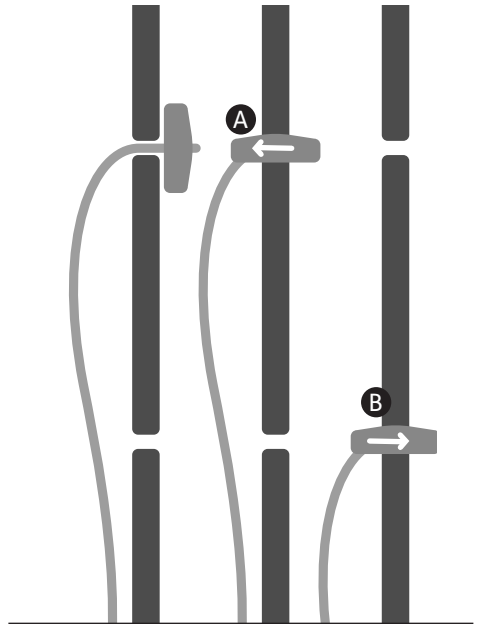


## ODDÍL 16:

### Rozměry kočárku WeGo

Délka (ve složeném stavu)	116 cm
Výška (ve složeném stavu)	38 cm
Výška kočárku WeGo	122 cm
Hloubka sedu	26 cm
Výška sedadla	50 cm
Šířka sedadla	35 cm
Nejkratší délka opěrky nohou	25 cm
Nejdelší délka opěrky nohou	33 cm
Hmotnost kočárku WeGo	11 kg
Hmotnost kočárku WeGo se sedačkou GoTo	13 kg





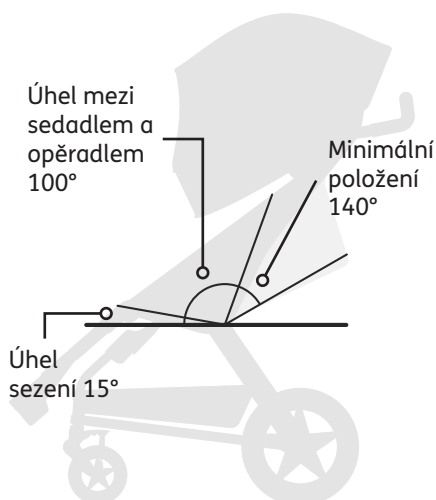







Upozornění: Ne všechny děti, které používají sedačku GoTo Size 2, jsou vhodné pro umístění do kočárku WeGo.

Více informací najdete v našem průvodci velikostí.



## ODDÍL 17:

### Tabulka symbolů

Symbol	Čištění
	Výrobce
	Maximální hmotnost uživatele
	Výrobní číslo
	Kód výrobku
	Přečtěte si návod k použití
	CE značka
	UKCA značka
	Zdravotnické zařízení
	Varování
	Datum výroby
	Neobsahuje latex
	Jedinečná identifikace zařízení



#### **Distributor v USA**

Sunrise Medical (US) LLC  
2842 N Business Park Avenue  
Fresno, CA 93727

**T:** 1-800-333-4000  
**F:** 1-800-300-7502  
**E:** customseating@sunmed.com

[sunrisemedical.com](http://sunrisemedical.com)

#### **Distributor v Kanadě**

Sunrise Medical  
237 Romina Drive, Unit 3,  
Concord, ON, L4K 4V3

**T:** +1.800.263.3390  
**F:** +1.800.561.5834  
**E:** mkt.canada@sunmed.com

[sunrisemedical.ca](http://sunrisemedical.ca)

---

Fireflyfriends Ltd  
19c Ballinderry Road  
Lisburn BT28 2SA  
Severní Irsko

**T: (+44) 28 9267 8879**  
**E: hello@fireflyfriends.com**



[fireflyfriends.com](http://fireflyfriends.com)

