



GoTo Seat

Návod k použití



Family Freedom



Firefly GoTo Seat je lehká přenosná sedačka, která zlepšuje životy dětí prostřednictvím jejich participace. Je to bezpečná, podpůrná víceúčelová sedačka vhodná pro použití doma i na cestách.

Před použitím GoTo Seat si pozorně přečtěte veškeré návody a pokyny pro uživatele. Tyto lze stáhnout společně s videi, vyobrazeními a dalšími užitečnými materiály z našich webových stránek **www.fireflyfriends.com**.

Obsah

1. Účel použití	p.03
2. Osvědčení	p.04
3. Varování a upozornění	p.05
4. Bezpečnostní informace	p.07
5. Opatření a Kontraindikace	p.08
6. Informace ohledně čištění a péče	p.09
7. Servis	p.11
8. Důležitá upozornění pro používání sedačky	p.11
9. Prohlídka sedačky	p.12
10. Instalace sedačky GoTo Seat	p.13
11. Používání sedačky GoTo Seat na židli s tvrdým opěradlem	p.15
12. Používání sedačky GoTo Seat na nákupním vozíku	p.19
13. Připojení sedačky GoTo Seat k podstavci Floorsitter	p.20
14. Doporučené reklnační polohy	p.22
15. Rozložení GoTo Seat a sejmutí potahu	p.25
16. Nasazení potahu a montáž GoTo Seat	p.29
17. Technické údaje	p.32

SEKCE 01: Účel použití

Určeno pro

GoTo Seat je přenosné sedací zařízení určené k poskytování posturální podpory dětem s lehce složitějšími posturálními potřebami. GoTo Seat je primárně určeno k připojení na další zařízení, jako je standardní židle, sedadla v letadle, houpačky v parku. Lze jej také použít samostatně s připojením k zařízení na uchycení k podlaze. Sedačka GoTo Seat není určena k použití jako náhrada dětské autosedačky.

Indikace pro použití

Sedací zařízení GoTo Seat bylo navrženo tak, aby poskytovalo dodatečnou posturální podporu horní části těla dětem se zdravotním postižením. Z důvodu stability a bezpečnosti musí být sedací zařízení vždy připevněno k židli nebo podobné nosné konstrukci. Sedačka GoTo Seat je určena pro příležitostné použití z důvodu omezené podpory a odlehčení tlaku, a proto není určena k použití jako primární systém sezení pro dítě se zdravotním postižením. Sedadlo GoTo Seat je k dispozici ve 2 velikostech. Velikost 1 je určena pro děti ve věku přibližně 1–3 roky s maximální hmotností 15 kg / 33 liber * a velikost 2 je určena pro děti ve věku přibližně 3–8 let a maximální hmotností 30 kg / 60 liber *.

Odmítáme převzít odpovědnost v případě používání produktu mimo určenou oblast použití. Každodenní aktivity otestované a schválené firmou Firefly by Leckey pro použití sedačky GoTo Seat jsou:

1. Sedačka je připojená k židli s pevnou zádivou opěrou za účelem společného jídla s rodinou a přáteli.
2. Pro použití v nákupním vozíku umožňujícím rodiči/asistentovi snadnější nákup.
3. Jako sedačka pro sezení na podlaze s podlahovým podstavcem Floorsitter.

Bud'te si vědomi toho, že i když dítě bude používat podstavec Floorsitter pro sezení na podlaze, musí být stále pod kontrolou. V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte zákaznický servis Firefly prostřednictvím e-mailu: customer.enquiries@fireflyfriends.com



*Mějte však na zřeteli, abyste při posazování dítěte do sedačky standardního nákupního vozíku nepřekročili limit nosnosti vozíku, který je max. 13kg.

SEKCE 02: Osvědčení

GoTo Seat je klasifikován jako zdravotnický prostředek třídy I podle předpisů EU a Velké Británie. Jako výrobce, James Leckey Design Limited, prohlašuje, že tento výrobek odpovídá předpisům o zdravotnických prostředcích (2017/745), předpisům pro zdravotnické prostředky z Velké Británie z roku 2002, směrnici o zdravotnických prostředcích (93/42 EEC) a EN 12182: 2012 Pomocné výrobky pro osoby se zdravotním postižením, obecné požadavky a zkušební metody.

Upozornění pro uživatele a / nebo pacienta: Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti se zařízením, by měl být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel nebo pacient obyvatelem.

POZNÁMKA:

Obecné rady pro uživatele.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek fyzické zranění, poškození produktu nebo poškození životního prostředí!

SEKCE 03: Varování a upozornění

Před použitím si vždy si řádně přečtete všechny pokyny pro uživatele.

1. VAROVÁNÍ: RIZIKO PŘEVŘÁCENÍ

- Nikdy nepoužívejte výrobek na svažitém povrchu se sklonem větším než 5 stupňů.

2. VAROVÁNÍ: RIZIKO SEVŘENÍ PRSTŮ

- Zajistěte, aby se uživatel nebo pečovatel nedotkl žádného pohyblivého kloubu nebo čepu, který není zajištěn.
- Když je uživatel ve výrobku, pečovatel by se měl snažit nastavovat a upravovat produkt jen minimálně.

3. VAROVÁNÍ: BEZPEČNOST UŽIVATELE

- Přesuny uživatelů dovnitř a ven z produktu musí být prováděny s vhodným vybavením a personálem.
- Zajistěte, aby byly všechny fixační pásy bezpečně připojeny.
- Pokud uživatel vykazuje jakoukoli

formu úzkosti, co nejdříve jej bezpečně vyjměte z produktu.

- Během používání zařízení Leckey by uživatelé neměli být nikdy ponecháni bez dozoru.
- Zajistěte dostatečný odstup všech popruhů od krku uživatele během používání produktu a přepravy, abyste předešli riziku uškrtní.

4. UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ ZACHYCENÍ PRSTŮ

- Když je uživatel ve výrobku, pečovatel by se měl snažit nastavovat a upravovat produkt jen minimálně.
- Při montáži nebo seřizování polohy komponentů produktu buďte opatrní, aby se vám při utahování nezachytily prsty.
- Během montáže a seřizování produktu by pečovatel měl zabránit riziku zachycení prstů v kloubech nebo čepch produktu.
- Během přesunů a úprav by se pečovatel měl vyvarovat rizika zachycení prstů.

5. UPOZORNĚNÍ: DENNÍ KONTROLY

- Výrobek je třeba před použitím denně kontrolovat, aby bylo zajištěno, že všechny součásti jsou

bezpečně připevněny a bezpečné pro použití.

6. UPOZORNĚNÍ: ČIŠTĚNÍ

- Produkt pravidelně čistěte, abyste zabránili hromadění nečistot. Nahromaděné nečistoty mohou předčasně opotřebovat textilní části a podporovat korozi výrobku. Používejte pouze neabrazivní čisticí prostředky pro domácnost a vlhké hadry, nepoužívejte tekoucí vodu na čalounění, je-li stále připevněno k výrobku. Viz informace o čištění a péči v uživatelské příručce.

7. UPOZORNĚNÍ: VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ / OSTŘÍKOVÁNÍ HADICÍ

- K čištění produktu se nesmí používat vysokotlaké čističe a hadice. Viz informace o čištění a péči v uživatelské příručce.

8. UPOZORNĚNÍ: LIKVIDACE

- Při likvidaci produktu do komunálního odpadu by měly být komponenty roztříděny a podle potřeby zlikvidovány odděleně.

9. UPOZORNĚNÍ: UVEDENÍ DO PROVOZU

- Před použitím nechejte produkt 2 hodiny se aklimatizovat na pokojovou teplotu.

SEKCE 04: Bezpečnostní informace

1. Před použitím si vždy si řádně přečtěte všechny pokyny pro uživatele.
2. Děti by neměly být ponechány bez dozoru, když jsou posazeny do pomůcky.
3. Před připojením GoTo Seat sedačky vždy posuďte židli/vozik/z hlediska vhodnosti a stability.
4. Před použitím GoTo Seat sedačky vždy zajistěte, aby byla řádně zajištěna a aby byly pásy utažené.
5. GoTo Seat sedačka nebyla podrobena crash testu a nelze ji tudíž používat při přepravě. Některé letecké přepravní společnosti však schválily GoTo Seat k použití v letadle. Před cestou si toto ověřte.
6. Nikdy nepoužívejte GoTo Seat sedačku v nákupním vozíku na svažitém povrchu větším než 10°, abyste zabránili riziku přepadnutí.
7. Nejprve připevňujte podstavec Floorsitter na podlahu a nastavte ho do požadovaného úhlu předtím, než dítě umístíte do GoTo Seat.
8. Floorsitter by se měl používat výhradně na pevném, rovném povrchu.
9. GoTo Seat sedačka obsahuje části, které by pro malé dítě mohly představovat riziko udušení. Před použitím zkontrolujte, zda jsou veškeré části pevně a bezpečně upevněny – včetně knoflíků a pásků.
10. Neprovádějte na sedačce GoTo Seat žádné změny. Nedodržování pokynů může představovat pro dítě určité riziko. Nedodržování pokynů může vést také ke ztrátě záruky na GoTo Seat.
11. Sedačku GoTo Seat je nutné řádně skladovat a neměla by se používat, pokud jsou některé její části vadné. GoTo Seat by se měla skladovat složené, aby se předešlo poškození.
12. Sedačku GoTo Seat je nutno umisťovat v dostatečné vzdálenosti od zdrojů přímého tepla včetně otevřeného ohně, cigaret, elektrických a plynových hořáků.
13. V případě jakýchkoli pochybností ohledně bezpečného používání sedačky GoTo Seat přestaňte produkt používat a kontaktujte zákaznický servis Firefly by Lecky na adrese: customer.enquiries@fireflyfriends.com.

Kombinace zdravotnických prostředků

Je možné kombinovat tento zdravotnický prostředek s jedním či více jinými zdravotnickými prostředky nebo jinými výrobky. Informace o možných kombinacích najdete na leckey.com. Všechny uvedené kombinace byly ověřeny, aby splňovaly obecné požadavky na bezpečnost a výkon, oddíl 16.1 nařízení o zdravotnických prostředcích 2017/745.

Pokyny ke kombinaci, jako je například montáž, naleznete na leckey.com

SEKCE 05: Opatření a Kontraindikace

Opatření

- Fixní deformity páteře, jako je skolióza nebo kyfóza
- Silné svalové kontraktury
- Těžká svalová nebo kosterní asymetrie včetně dislokace kyčle
- Progresivní ztráta svalové hmoty
- Vysoké riziko nebo nedávná anamnéza zlomenin kostí
- Vysoké riziko dekubitů nebo otevřených vředů
- Silné, nekontrolované pohybové vzorce
- Špatně kontrolovaná záchvatová aktivita
- Děti závislé na použití perkutánní endoskopické gastrostomie
- Léčebná nestabilita včetně

zhoršené respirační nebo kardiovaskulární funkce

- Závislost na život udržujících zařízeních jiných výrobců, jako jsou dýchací přístroje
- Významné poruchy učení nebo problémy s chováním

Kontraindikace

S používáním přenosného sedacího zařízení GoTo Seat nejsou spojeny žádné kontraindikace.

Všechna preventivní opatření a kontraindikace jsou přijímána na základě uvážení předepisujícího lékaře nebo rodiče. Leckey a Firefly doporučuje, aby byl při všech počátečních zaměřeních, nastavováních, konfiguracích a opětovných vydáních přítomen vyškolený a zkušený lékař, aby se minimalizovalo riziko.

SEKCE 06: Informace ohledně čištění a péče

Plastová základna sedačky

1. Při čištění plastové základny sedačky doporučujeme, abyste používali pouze vlažnou vodu a neabrazivní saponáty jako např. saponát na nádobí.
2. Pro čištění plastových částí je vhodné používat dezinfekční roztok alkoholu jako např. etanol a izopropanol.
3. Nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla ani chemické čisticí kapaliny.

Čalounění a látky


1. Čištění a péči o látky provádějte pravidelně. Jednoduše vyluxujte pomocí nástavce na čalounění za účelem odstranění prachu a celkově je otřete vlhkým hadrem.
2. Látky z mikrovlákna se dobře čistí bez použití mýdla, které by navíc ulpělo v látce.
3. Potahy sedaček lze odstranit z plastové základny sedačky a vyprat v pračce při teplotě 40°C.
4. Sušte v rozloženém stavu, ne v sušičce.
5. Čalounění lze prát v pračce, pokud je neporušené, po sejmutí pásů, přezek a zapínání. Sejmuté části uložte bezpečně mimo dosah dětí.

6. Potah lze čistit také ručně, když je nasazený. V případě větších nečistot, jako je jídlo, jej nejprve odstraňte vhodným nástrojem. Látku očistěte pomocí vodního roztoku (pěny) jemného saponátu a pak jej odstraňte z látky pomocí ručnicku nebo houby.
7. Pro úspěšné čištění čalounění bez nadměrného namočení látky, nebo aby se zabránilo vyblednutí barev, se musí používat produkty a nástroje určené pro péči o čalounění.
8. Dojde-li k potřísnění látky, okamžitě jej odstraňte. Čím déle jej necháte být, tím obtížněji jej lze odstranit. Může tak dojít také k trvalé ztrátě barev.
9. K odstranění běžné špíny a menšího znečištění se osvědčilo pravidelné otření houbičkou namočenou v mýdlovém roztoku vlažné vody. Neodstraňujte nečistoty usilovným třením znečištěného místa, protože by tak mohlo dojít k poškození látky. Nenamáčejte také čištěné místo příliš, aby nedošlo k rozšíření skvrny na látce. Čištění provádějte směrem od vnějších okrajů skvrny dovnitř, aby se zabránilo dalšímu rozšíření skvrny.
10. Na silně ulpělé skvrny lze použít antiseptické čisticí prostředky. Pro použití na GoTo Seat jsou vhodné dezinfekční čisticí kapaliny jako např. izopropyl alkohol. Dbejte na to, aby byl pak čisticí prostředek zcela odstraněn. Nechte produkt uschnout na vzduchu tak, aby se veškerý alkohol před použitím zcela odpařil.

11. Nenatahujte potah na plastovou základnu, když je ještě mokrá. Nechte ho řádně usušit.
12. Potah ani pásy nežehele.
13. Nebělte žádné části GoTo Seat.

Tip:

Jeden z nejlepších čisticích prostředků na čalounění na bázi vody si snadno sami vyrobíte doma. Do misky nalijte šálek vlažné vody a poté přidejte 1/4 šálku biologicky odbouratelného saponátu na mytí nádobí. Rozmíchejte směs mixerem při střední rychlosti, dokud se z kapaliny nestane hustá pěna. Tato pěna odstraní vzniklou špínu a většinu skvrn od potravin nebo nápojů. Takto jednoduše vyrobíte levný čistič, který je navíc netoxický a šetrný k životnímu prostředí.

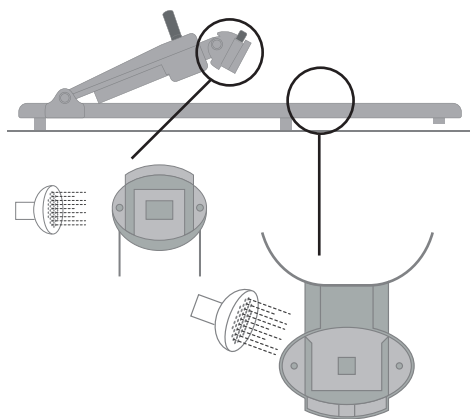

Podstavec Florsitter

1. Před každým použitím zkontrolujte, zda je spodní strana podstavce Florsitter čistá.
2. Pro každodenní čištění můžete použít mýdlovou vodu.
3. Nepoužívejte k čištění podstavce rozpouštědlo.
4. Chcete-li odstranit písek/zem/trávu nebo drobné částice, které mohou být ve spojích Florsitteru mezi podlahou a sedačkou, můžete dostat nečistoty ven poklepáním. Důkladně jej vymyjte, aby nedošlo k hromadění částic uvnitř spojů. Pokud je špína na Florsitteru silně ulpělá, je případně nutné vytlačit nečistoty ze západky prstem.
5. Pokud přijde Florsitter do styku se slanou vodou, všechny části řádně umyjte čistou vodou.



Jestliže používáte Florsitter venku (na pláži nebo na zahradě), je důležité jej

po každém použití zbavit nečistot/částic, které

by mohly ovlivnit funkci mechanismu.

SEKCE 07: Servis

Ohledně veškerých otázek servisu viz webové stránky **www.fireflyfriends.com** nebo kontaktujte oddělení zákaznického servisu Firefly Customer na adrese: **customer.enquiries@fireflyfriends.com**

SEKCE 08: Důležitá upozornění pro používání sedačky

Posazení dítěte do sedačky GoTo Seat

1. Před posazením dítěte do sedačky se musí sedačka GoTo Seat řádně upevnit na místě.
2. Floorsitter pro sezení na podlaze by se měl používat pouze na pevném, rovném povrchu. Měkký povrch jako např. koberec s dlouhým vlasem může snížit stabilitu Floorsitteru a při jeho použití je nutné dbát zvýšené opatrnosti.
3. Dbejte na to, aby popruhy neomezovaly správné posazení dítěte do sedačky GoTo Seat. Ramenní pásy a pásy laterálního vedení by měly být nasazené volně.
4. Při umístění do nákupního vozíku: dítě posadte opatrně tak, aby prostrčilo nohy mezerami v nákupním vozíku; neprostrkujte mu nohy mezerami ve vozíku násilím.

5. Jakmile jsou nohy prostrčené mezerami vozíku, opatrně nasadte dítěti ramenní pásy – měly by být nasazený velmi volně. Dbejte na to, aby dítě mělo peloty ramenních pásů na ramenou.
6. Zapněte středovou přezku a nastavte pásy laterálního vedení tak, aby dítě sedělo bezpečně v popruzích sedačky. Délka ramenního pásu by měla být nastavena tak, aby pás dítěti dobře dosedal. Viz pokyny v kap. 11(b).
7. Délku tříselného pásu lze nastavit pomocí seřizovacího mechanismu umístěného pod polstrovaným potahem. U GoTo Seat vel. 2 lze tříselný pás posunout směrem ven, aby dítě mělo více místa, když povyroste. Viz pokyny v kap. 11(b).

Vyjmutí dítěte ze sedačky GoTo Seat

1. Uvolněte ramenní pásy a pásy laterálního vedení.
2. Rozepněte středovou přezku stisknutím uvolňovacího tlačítka na pásech.
3. Sejměte dítěti z ramen pásy a opatrně dítěti vyprostěte paže z popruhů.
4. Pouze u vel. 1, pokud je sedačka umístěna v nákupním vozíku: Zvedněte dítě opatrně tak, že mu vyprostíte nohy z mezer vozíku.

Nesnažte se vyjmout dítě z vozíku, když je ještě připoutané k sedačce.

SEKCE 09: Prohlídka sedačky

Aby bylo zajištěno bezpečné používání sedačky, doporučujeme provádět před použitím jeho prohlídku.

Níže jsou popsány doporučené kontroly.

1. Zkontrolujte správné nasazení pruhů.
2. Zkontrolujte, zda není čalounění optřebené nebo roztržené.
3. Zkontrolujte, zda jsou všechny přezky zapnuté a pásy řádně připevněné k plastovému základně.
4. Zkontrolujte, zda nejsou plastové části sedačky prasklé nebo poškozené.
5. Dbejte na to, aby všechny otočné knoflíky byly řádně utažené.
6. Před posazením dítěte do sedačky GoTo Seat zkontrolujte bezpečnost sedačky.
7. Jestliže používáte sedačku s podstavcem Floorsitter, zkontrolujte, zda je bezpečně připojený k sedačce GoTo Seat. Viz **pokyny v kap. 10.**

V případě jakýchkoli pochybností ohledně bezpečného používání vašeho produktu Firefly nebo selhání některé jeho části přestaňte produkt používat a spojte se co nejdříve s naším oddělením zákaznického servisu.


Před opětovným vydáním produktu se doporučuje jej dezinfikovat jedním z následujících postupů:

Poznámka: Před dezinfekcí / hygienickým vyčištěním produkt vždy nejprve očistěte, abyste odstranili nahromaděné nečistoty.

1. Pokud je to možné, doporučujeme použít automatizovaný dezinfekční systém „fogger“, který se používá k úplnému pokrytí povrchu výrobku dezinfekčním prostředkem. Před použitím je třeba se řídit pokyny výrobce pro zvolený systém a přesně je dodržovat.
2. Pokud není k dispozici automatický dezinfekční systém, všechny povrchy produktu by se měly otřít dezinfekčním povrchem nebo tekutým dezinfekčním prostředkem na měkký hadřík. Vhodnými produkty jsou 70% IPA, 70% alkohol nebo zředěné bělidlo. Je třeba dodržovat pokyny výrobce pro zvolený produkt. Čalounění produktu a textilie by měly být důkladně vyčištěny v souladu s částí této příručky, Informace o čištění a péči.

SEKCE 10: Instalace sedačky GoTo Seat

10(a) Seřízení laterálního vedení

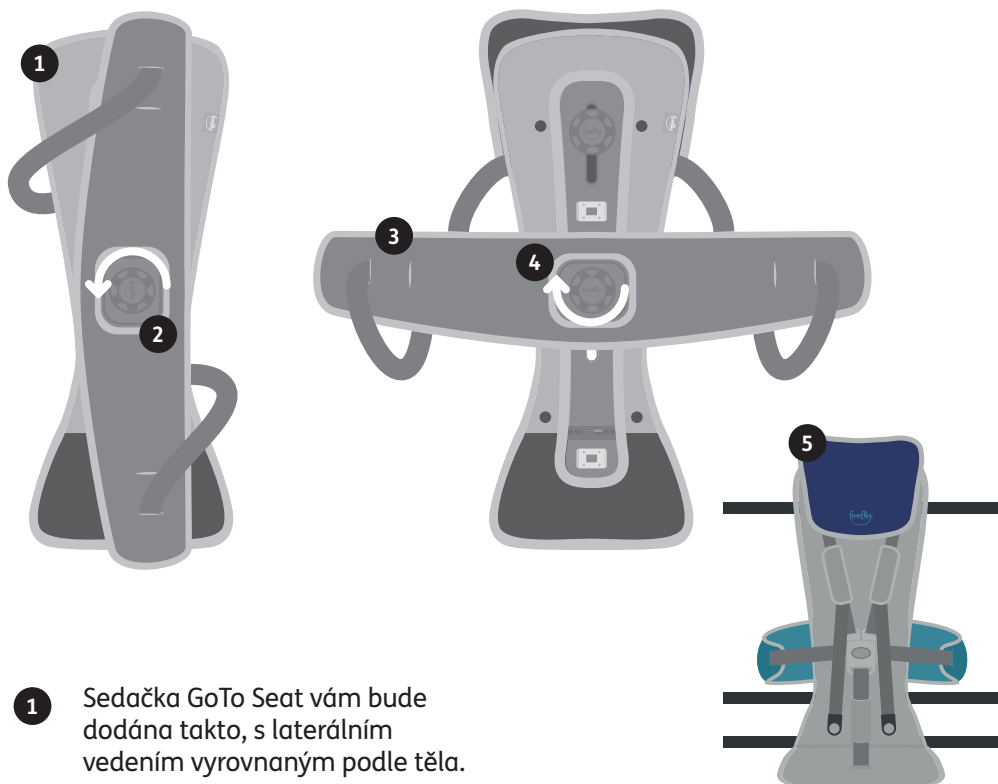

1 Sedačka GoTo Seat vám bude dodána takto, s laterálním vedením vyrovnaným podle těla.

2 Povolte otočný knoflík tak, abyste mohli laterálním vedením otáčet.

3 Otočte laterálním vedením proti směru hodinových ručiček do požadované polohy.


4 Zkontrolujte, zda je laterální vedení ve výchozí poloze v centrální části zádové opěry, a utáhněte otočný knoflík.

5 Obráťte sedačku GoTo Seat a zapněte sponu pásů laterálního vedení do středové přezky. **Pokyny viz kap. 11(b).**


Zkontrolujte, zda jsou po zapnutí pásů laterálního vedení všechny pásy správně uspořádány dle vyobrazení.

10 (b) Instalace podstavce Floorsitter (pokud byl k sedačce GoTo Seat zakoupen)

Příslušenství Floorsitter by mělo být vždy umístěno na pevné, tvrdé, statické ploše. Když je Floorsitter umístěn na zvolenou plochu, je nezbytně nutné, aby gumové patky byly v kontaktu s plochou.

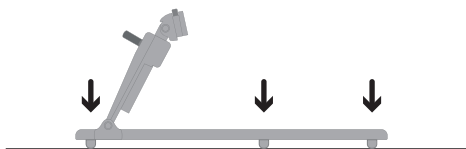


Jakmile je Floorsitter na svém místě, zajistěte, aby bylo reklinační rameno nastaveno do nejvyšší polohy.

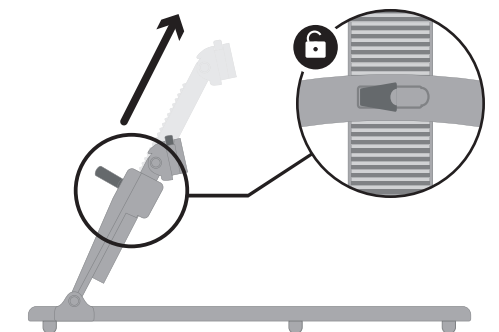


SEKCE 11: Používání sedačky GoTo Seat na židli s pevnou zádovou opěrou

11(a) Připojení GoTo Seat k židli s pevnou zádovou opěrou

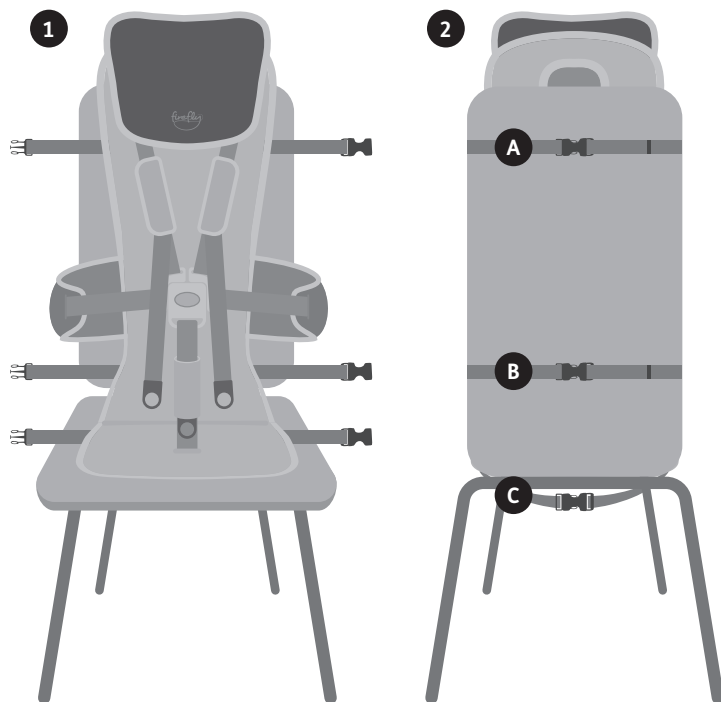


- 1 Zkontrolujte, zda jsou všechny pásy volné a nejsou vzájemně k sobě připojené. Umístěte GoTo Seat na židli s pevnou zádovou opěrou.
- 2 Zapněte pásy **A** sobě bezpečně kolem zádové opěry židle. Totéž opakujte u pásů **B**. Zapněte pásy **C** pod židli.

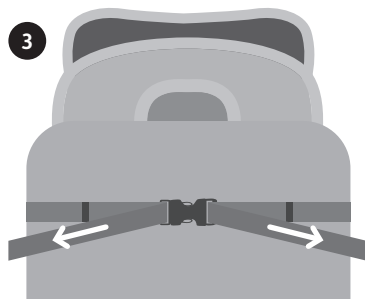

3 Vytáhněte pásy ven tak, aby byly napnuté.



4 Přebytečné pásy sviňte do smyček a zajistěte do spon.


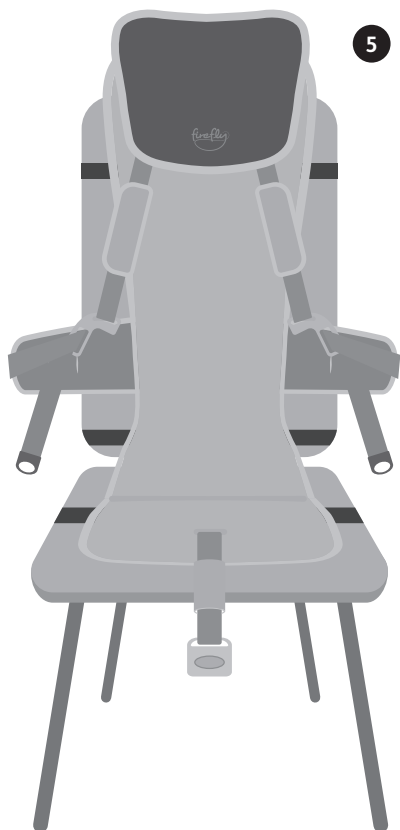


5 Před posazením dítěte do sedačky GoTo Seat zkontrolujte, zda jsou všechny černé pásy bezpečně zapnuté k židli s pevnou zádivou opěrou a zda je přezka pětibodového pásu na přední straně rozepnutá.

11(b) Rozepnutí a zapnutí 5bodové přezky

Nejprve zajistěte, aby byly ramenní, laterální a tříslové pásy volné a rozepnuté.


- 1 Připojte ke stranám středové přezky dva úchyty laterálního vedení.
- 2 Po zapnutí nastavte ramenní pásy, pásy laterálního vedení a tříslový pás zatažením páسů tak, aby se napnuly.

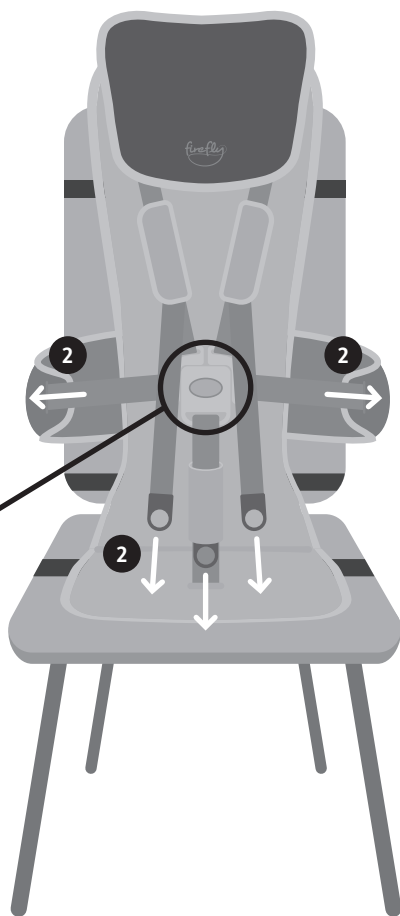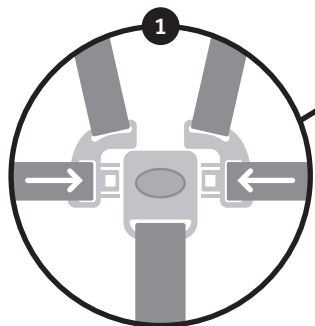

Zkontrolujte, zda nejsou pásy překroucené, když je přezka zapnutá.


3

U sedačky GoTo Seat vel. 2 lze úchyt tříslového pásu posunout dozadu nebo dopředu a přizpůsobit tak potřebám dítěte. Zkontrolujte, zda je dobře připevněn k plastové základně GoTo Seat.

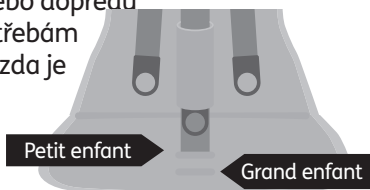

11(c) Seřízení opěrky hlavy a laterálního vedení

- 1** Odšroubujte otočný knoflík na opěrce hlavy proti směru hodinových ručiček a sejměte opěrku hlavy ze základny sedačky GoTo Seat. Posuňte opěrku hlavy nahoru nebo dolů do požadované polohy.
- 2** Po dosažení požadované výšky hlavové opěrky našroubujte knoflík zpět na základnu sedačky GoTo Seat.
- 3** Uvolněte laterální vedení otáčením knoflíku proti směru hodinových ručiček. Posuňte laterální vedení do požadované polohy nahoru, nebo dolů. Po dosažení požadované výšky zajistěte laterální vedení utažením knoflíku ve směru hodinových ručiček.

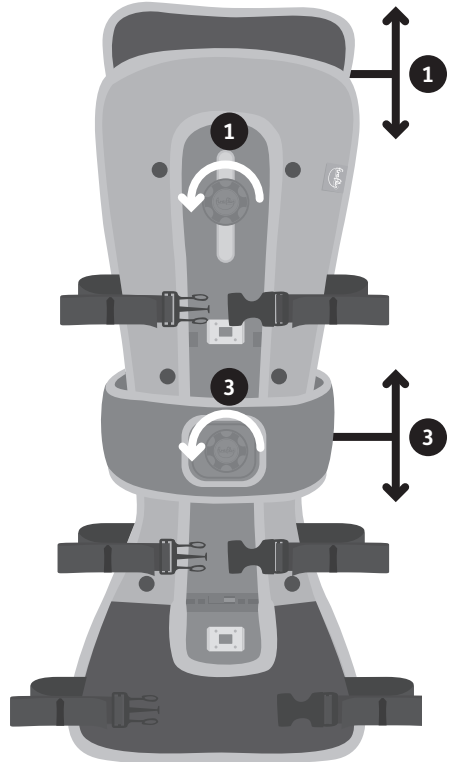


SEKCE 12: Použití sedačky GoTo Seat na nákupním vozíku

- 1 Zajistěte, aby byly všechny pásy volné a rozepnuté. Umístěte GoTo Seat do sedačky nákupního vozíku. Proveďte pásy **A** skrze mřížku nákupního vozíku a zapněte je. Zatáhněte pásy a napněte je.
- 2 Proveďte pásy **B** smyčkou v sedačce nákupního vozíku, připojte je a utáhněte.



Není-li na sedačce nákupního vozíku žádná smyčka, připojte pásy B ke stejnému rámu.

- 3 Zapněte pásy **C** pod sedačkou nákupního vozíku a tahem je napněte. Přesahující pásy sviňte do smyčky a zajistěte ve sponách.
- 4 Před posazením dítěte do sedačky nákupního vozíku zajistěte, aby byla pětibodová přezka vpředu rozepnutá a pásy uvolněné.1v

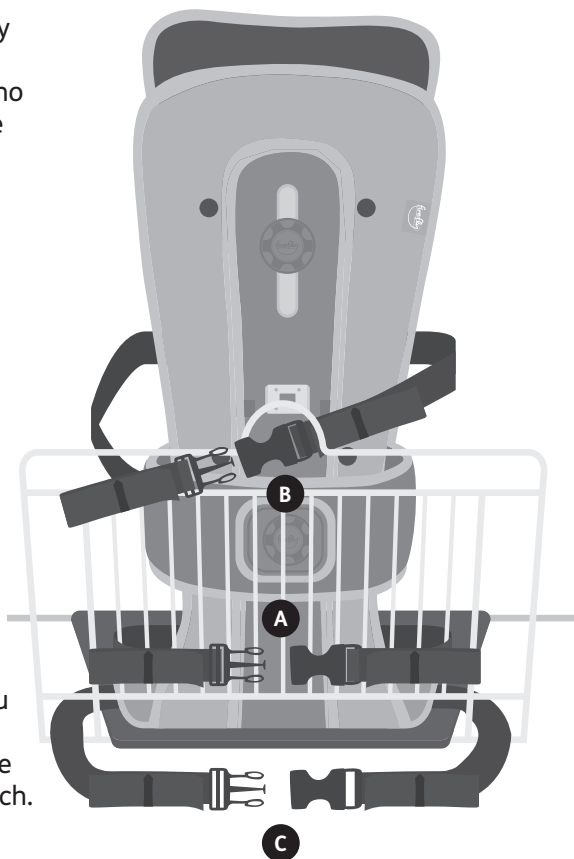


SEKCE 13: Připojení sedačky GoTo Seat k podstavci Floorsitter




**Před připojením
sedačky GoTo
Seat k podstavci
Floorsitter
postupujte podle
kroků v kap. 10(b)**


- 1** Položte sedačku GoTo Seat tak, aby základna dosedla na Floorsitter.

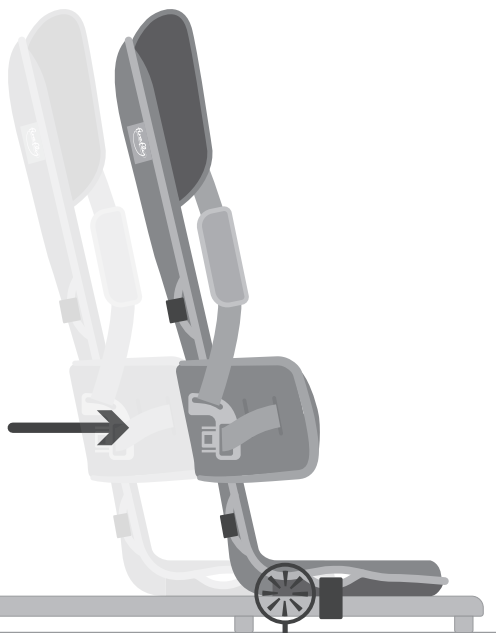

- 2** Zajistěte, aby základna sedačky byla vyrovnána středově s podstavcem Floorsitter a posuňte základnu sedačky dopředu, aby se zasunula do aretačního kanálu.
- 3** Když se základna sedačky zaaretuje do Floorsitteru, uslyšíte cvaknutí, což znamená, že je aretace zapnutá.

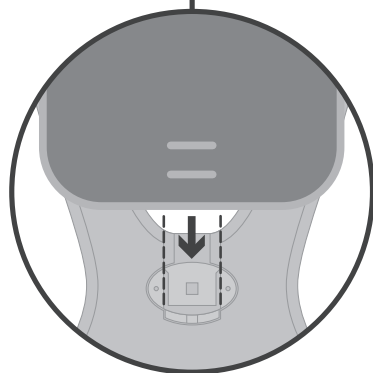

SEKCE 13: Připojení sedačky GoTo Seat k podstavci Floorsitter (pokračování)

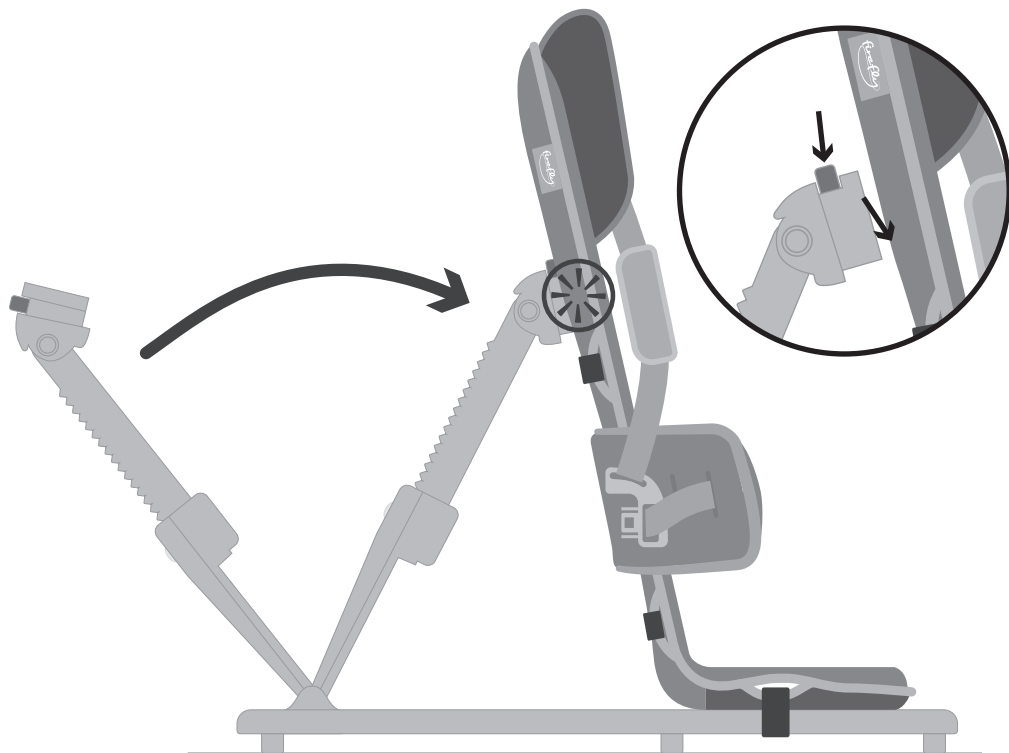

Před připojením reklinačního ramena k zádové opěře zajistěte, aby bylo v nejvyšší poloze.

Jednou rukou přidržujte GoTo Seat, druhou rukou zmáčkněte zvýrazněné tlačítko a nasadte příslušenství drážkou do zádové opěry.

Když je správně připojené, je slyšet kliknutí.



Dbejte na to, aby bylo slyšet dvojitý kliknutí, když dojde k aretaci základny sedačky a následně zádové opěry do Floorsitteru

SEKCE 14: Doporučené reklianační polohy

Vzpřímená poloha –

pokud má vaše dítě dobrou toleranci sedu a ovládnání trupu, může být schopné udržet se v poloze vzpřímeného sedu.




Střední reklianační poloha –

doporučujeme umístit GoTo Seat do střední reklianační polohy, jestliže je dítě zvedáno do sedačky.



Plně reklianační poloha –


doporučujeme, aby bylo GoTo Seat umístěno do plně reklianační polohy u dětí, které mají minimální schopnosti kontroly hlavy.

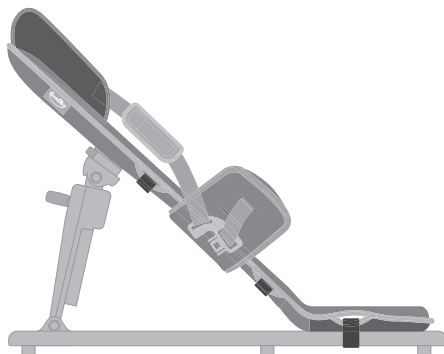

14(a) Použití reklnační funkce Floorsitteru GoTo Seat


Když je dítě plně zajištěné a podporované, lze použít funkci reklnace GoTo Seat/Floorsitter. Při změně reklnačního úhlu je nutné postupovat opatrně. Měli byste přitom postupovat co nejjemněji, abyste zamezili případným obavám dítěte.

Pro uvedení GoTo Seat do vzpřímenější polohy položte jednu ruku na GoTo Seat **A** na vrchol zádové opěry pro podporu a druhou ruku na zelenou sponu na reklnačním rameni Floorsitteru. **B**

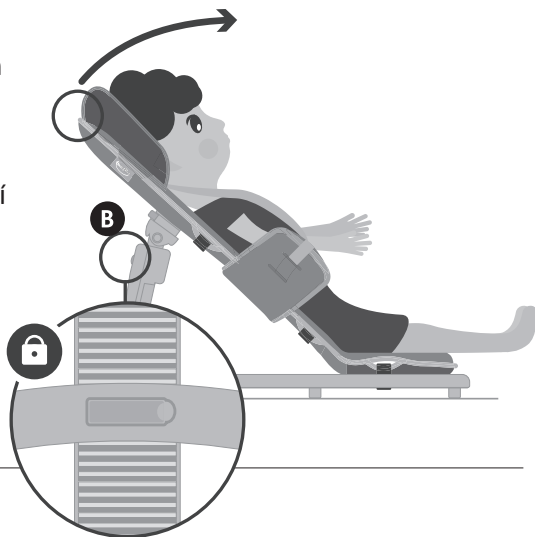


Uvolněte sponu a uveďte sedačku do vzpřímené polohy, která je vhodná pro vaše dítě. **A**

Upevněte sponu na Floorsitteru. Jakmile dojde k plné aretaci, uslyšíte cvaknutí.

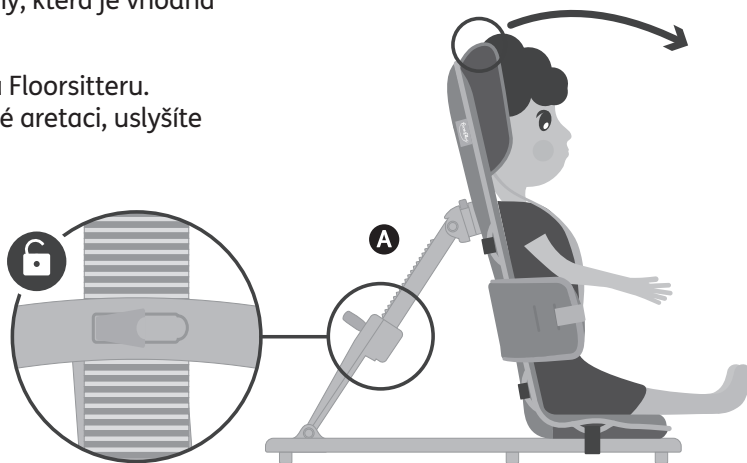


14(b) Sejmутí GoTo Seat z Floorsitteru

Pro uvolnění GoTo Seat z Floorsitteru stiskněte zelené tlačítko na reklinačním rameni a zatáhněte záďovou opěru dopředu.

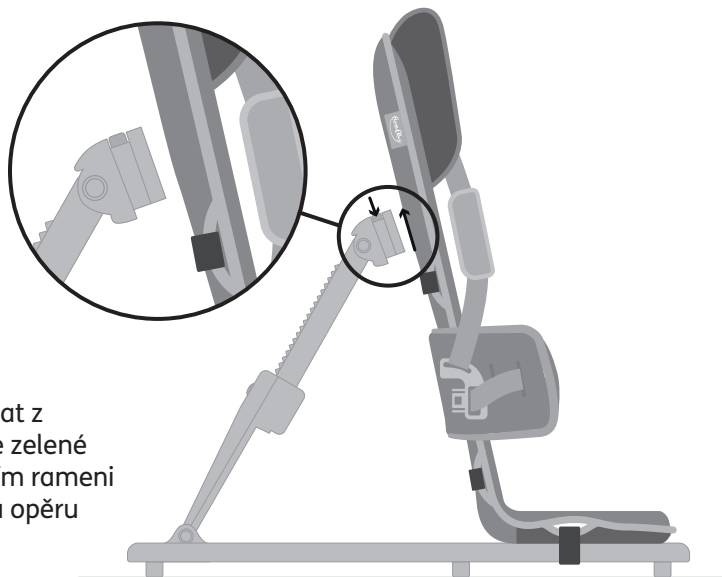


Pro uvolnění základny sedu zatáhněte za zelený plastový **A** výstupek, posuňte sedačku dozadu a potom zvedněte GoTo Seat z Floorsitteru. **B**

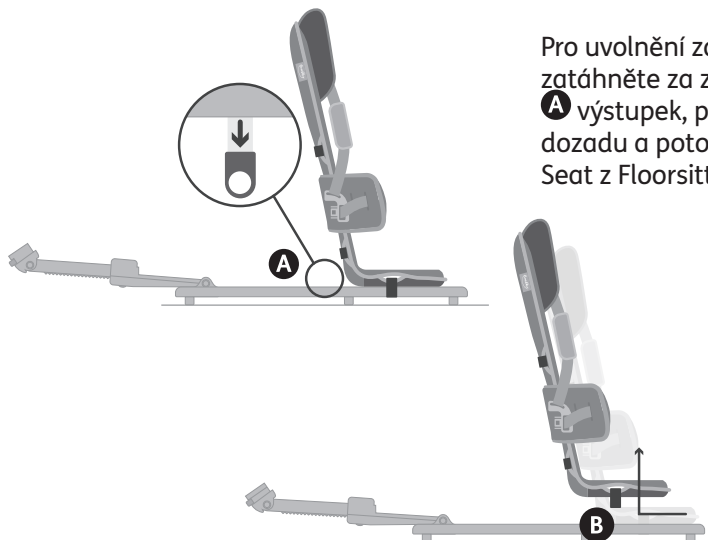


SEKCE 15: Rozložení GoTo Seat a sejmutí potahu

15(a) Opěrka hlavy


- 1 Pro sejmutí hlavové opěrky odšroubujte knoflík na opěrci hlavy proti směru hodinových ručiček.

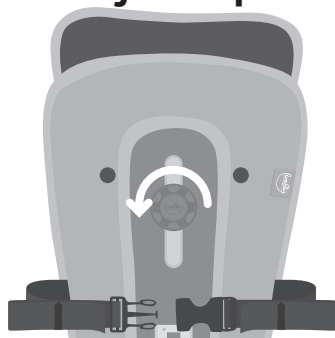

- 2 Zašroubujte knoflík na zadní stranu odejmuté opěrky hlavy tak, aby dobře držel.
- 3 Rozepněte knoflíky potahu opěrky hlavy po obou stranách.
- 4 Vysuňte vnitřní plast opěrky hlavy dolů z potahu.

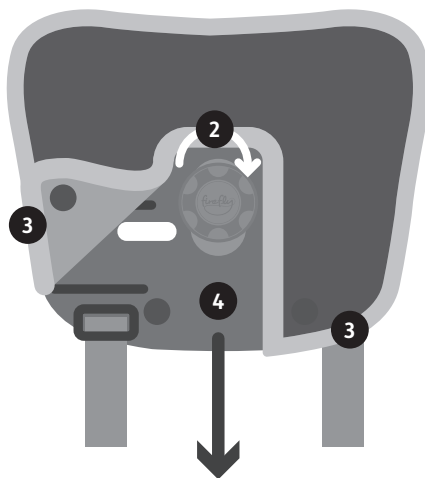

- 5 Odpojte zcela opěrku hlavy ze základny GoTo Seat sejmutím přezek ramenních pásů z opěrky hlavy.

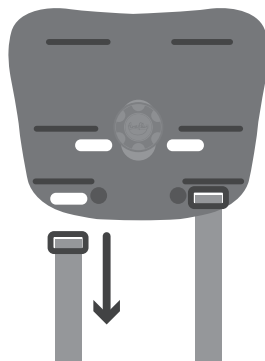



15(b) Laterální vedení

Začněte všemi pásy připojenými k přezce dle vyobrazení.

- 1 Odpojte laterální vedení otáčením knoflíku proti směru hodinových ručiček.
- 2 Stáhněte laterální vedení přes zádivou opěru GoTo Seat. Našroubujte knoflík zpět na kluzný pás, aby se předešlo jeho ztracení.
- 3 Obraťte sedačku GoTo Seat a položte laterální vedení nahoru na GoTo Seat.
- 4 Uvolněte pásy laterálního vedení co nejvíce, ale tak, **aby byly přezky stále připojené.**
- 5 Vytáhněte jednu stranu plastové vložky z potahu.

Sejměte pás provlečením plastové přezky skrze díry a pak skrze potah.

Totéž opakujte na druhé straně laterálního vedení. Když je potah sejmutý z laterálního vedení, může se vyprat.

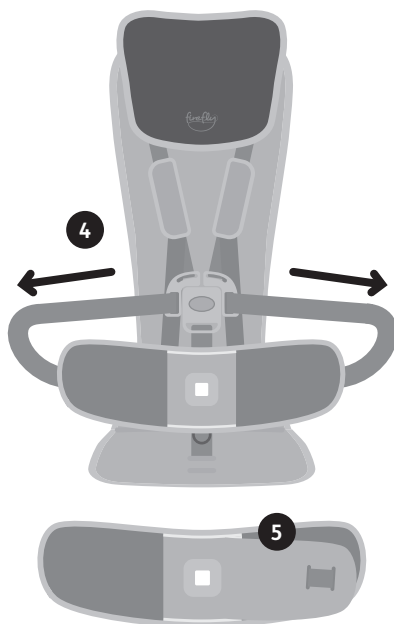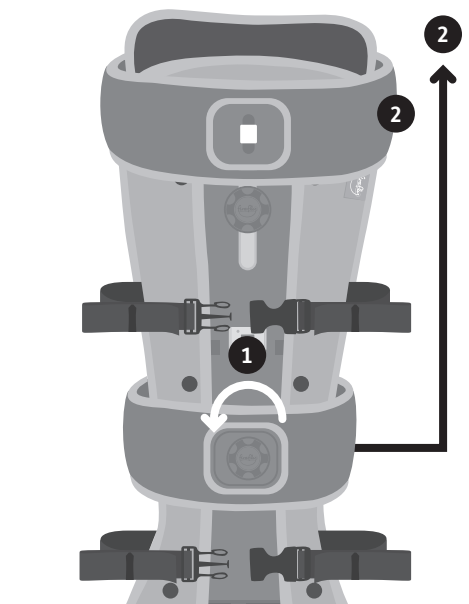

15(c) Pásy

- 1 Položte základnu sedačky GoTo Seat přední stranou dolů a rozeptejte potah.

Sejměte pásy z peloty sedačky GoTo Seat provlečením přezek skrze díry v potahu a v plastové základně.




Spojte pásy do párů a odložte je na bezpečné místo.

Mějte na paměti, že pásy **A** jsou delší než ostatní a musí se umístit zpět do základny sedačky.


Pásy **A** mají odlišné výstražné štítky, které slouží k jejich identifikaci.

- 2 Stejně jako u výše uvedených pásů provlékněte přezku tříselného pásu příslušnou dírou v základně sedačky GoTo Seat na spodku peloty sedačky a následně potahem.

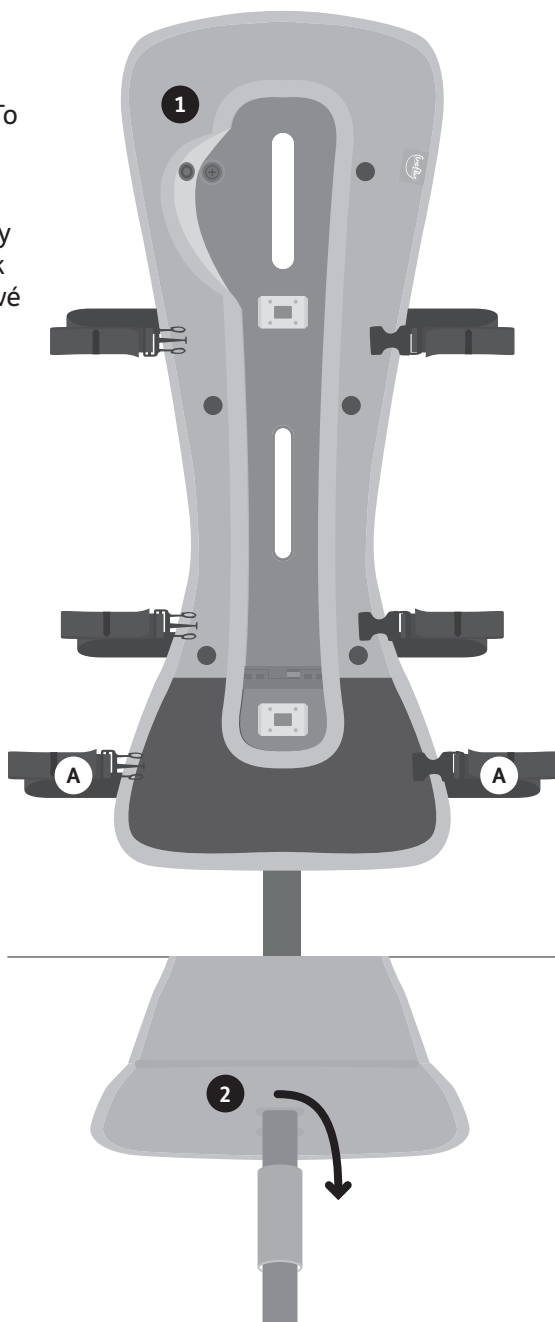

15(d) Potah



- 3 Vyměňte vložku z potahu. U GoTo Seat vel. 1 rozepněte suchý zip na základně sedačky a vložku vyjměte.

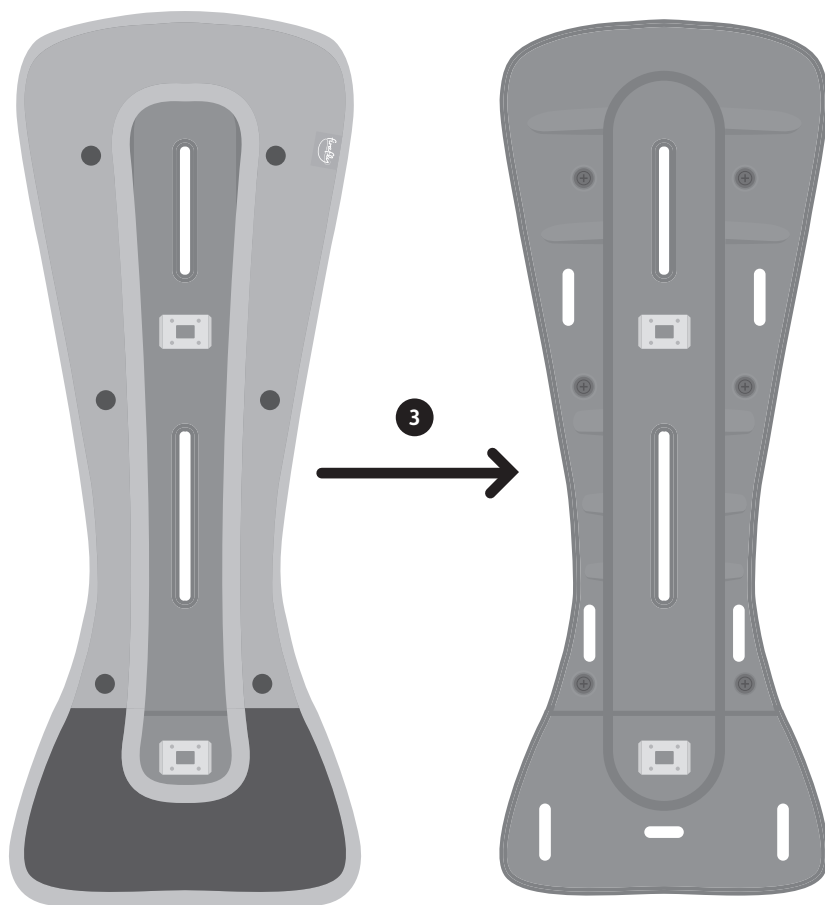

SEKCE 16: Nasazení potahu zpět a montáž GoTo Seat

16(a) Pásy a potah

- 1 Vyberte pásy pro vložku GoTo Seat s pásy **B** a **C** na zádovou opěru základny GoTo Seat a pásy **A** (nejdelší pásy) na desku sedačky.
- 2 Proveďte sponu jednotlivých černých pásů (nezapínejte), nejprve dírami v potahu a poté dírou ve vložce.
- 3 Stejně jako u výše uvedených pásů proveďte přezku příslušnou dírou v čalounění na spodku desky sedačky a poté plastovou základnou.
- 4 Když jsou všechny pásy vloženy, nasadte vložku do potahu.

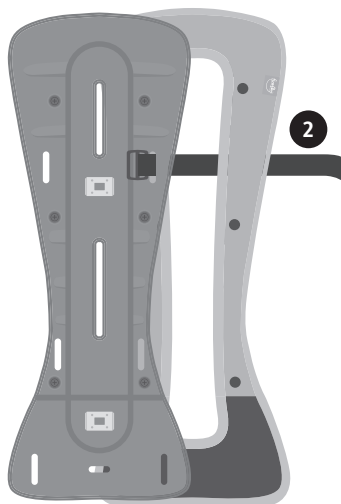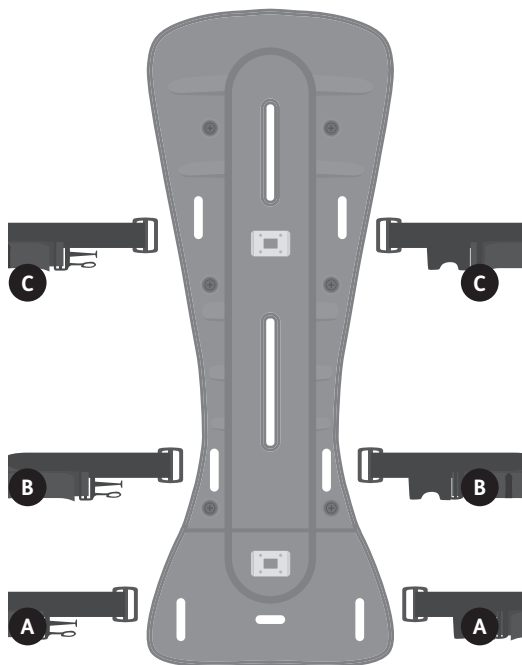

Nejprve nasuňte nejširší část základny GoTo Seat do potahu. U vel. 1 předtím nejprve rozepněte suchý zip základny sedačky.

16(b) Laterální vedení



Před zahájením naplňujte, jaký pás laterálního vedení se má připojit na jakou stranu čalounění za účelem zapnutí přezky.






- 1 Uvolněte co nejvíce pásy laterálního vedení na středové přezce. Vyrovnajte čalouněný potah, plastovou vložku laterálního vedení a pásy dle vyobrazení.
- 2 Vložte pás laterálního vedení do čalounění laterálního vedení.
- 3 Vytáhněte pás skrze čalounění.



Pro děti menšího věku provlečte přezku skrze vnitřní díru čalounění.

- 4 Provlečte pás vložkou laterálního vedení (přezka tak zůstane na vnější straně laterálního vedení, aby se zabránilo podráždění pokožky během používání). Za účelem změny šířky laterálního vedení pro přizpůsobení vašemu dítěti můžete způsob provlékání změnit.




- 5 Umístěte plastovou vložku laterálního vedení do potahu a zatáhněte za pás, aby se vložka laterálního vedení zatáhla do konce.

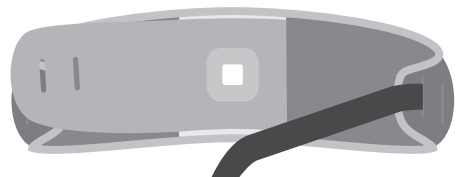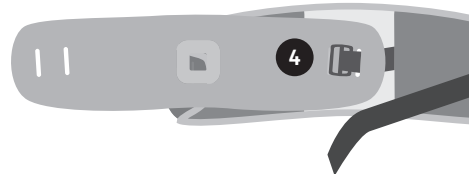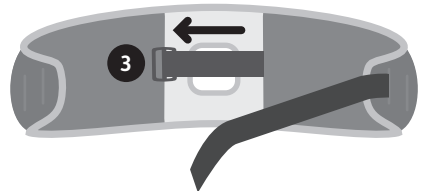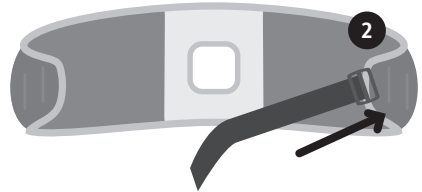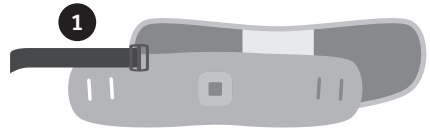

Stejný postup provedte i na druhé straně.

16(c) Opěrka hlavy

- 1 Vložte přezku ramenního pásu přímo skrze přední stranu opěrky hlavy a zajistěte ji na zadní straně.
- 2 Nasuňte vložku opěrky hlavy do potahu a zapněte na druky.
- 3 Připojte opěrku hlavy k základně GoTo Seat tak, aby byla díra šroubu vyrovnaná s mezerou. Upevněte ji našroubováním knoflíku ve směru hodinových ručiček.

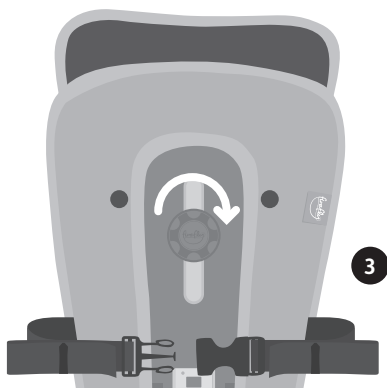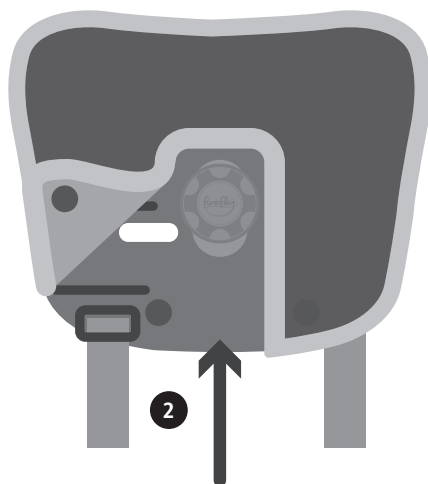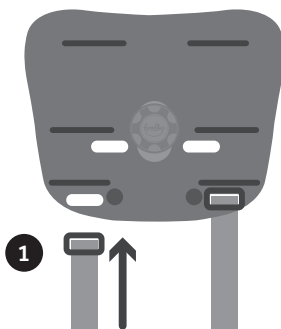


















SEKCE 17: Technické údaje

	Velikost 1	Velikost 2
Max. vzdálenost od základny sedu k vrcholu opěrky hlavy	540 mm	680 mm
Min. vzdálenost od základny sedu k vrcholu opěrky hlavy	380 mm	510 mm
Max. šířka laterálního vedení	260 mm	300 mm
Min. šířka laterálního vedení	190 mm	210 mm
Hloubka sedu	157 mm	244 mm
Max. hmotnost dítěte	15 kg*	30 kg*
Věk dítěte (cca)	1-3 roky	3-8 let

*Pokud dítě váží více než 13kg, nelze GoTo Seat používat na nákupním vozíku.

Seznam symbolů

Symbol	Význam
	Zdravotní zařízení
	Viz návod k použití
	CE značka
	Upozornění
	Výrobce
	Kód produktu
	Výrobní číslo
	Maximální hmotnost uživatele
	Datum výroby
	Bez latexu
	Jedinečná identifikace zařízení
	Možnost prát v pračce- teplota vody 40°C
	Nesušit v sušičce
	Nežehlit
	Nebělit
	Nečistit chemicky
	Neprat v pračce



Fireflyfriends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland

fireflyfriends.com

UK 0800 318 265
hello@fireflyfriends.com



LS1090-01