

# E | F35

## STEP-BY-STEP DOCKING

- Bevor Sie das Empulse F35 an- oder abdocken vergewissern Sie sich, dass das Zuggerät ausgeschaltet ist.
- Ziehen Sie immer die Rollstuhl-Bremsen an.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass der Rollstuhl vollständig mit dem Zuggerät verbunden ist.
- Wie bei allen beweglichen Teilen besteht die Gefahr, dass Finger und/oder Kleidung eingeklemmt werden können
- Seien Sie beim Anziehen der Andockklemmen besonders sorgfältig.



1

Führen Sie den Zwischenrahmen in die Andockklemmen ein.



2

Drehen Sie nun die Knebschrauben der Klemmen im Uhrzeigersinn, bis sie handfest angezogen sind und der Zwischenrahmen sicher in den Klemmen fixiert ist.



3

Nehmen Sie das Zuggerät und führen Sie die Andockstifte in die zentrale Halterung des Zwischenrahmens ein.

4

Drücken Sie den Lenker nach vorne/oben, bis der Verriegelungsbolzen automatisch einrastet. Lösen Sie die Bremsen des Rollstuhls erst, wenn das Zuggerät eingerastet ist.




Scannen Sie den QR-Code, um die Service-Videos zu sehen

# E | F35

## STEP-BY-STEP UNDOCKING

- Bevor Sie das Empulse F35 an- oder abdocken vergewissern Sie sich, dass das Zuggerät ausgeschaltet ist.
- Ziehen Sie immer die Rollstuhl-Bremsen an.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass der Rollstuhl vollständig mit dem Zuggerät verbunden ist.
- Wie bei allen beweglichen Teilen besteht die Gefahr, dass Finger und/oder Kleidung eingeklemmt werden können
- Seien Sie beim Anziehen der Andockklappen besonders sorgfältig.

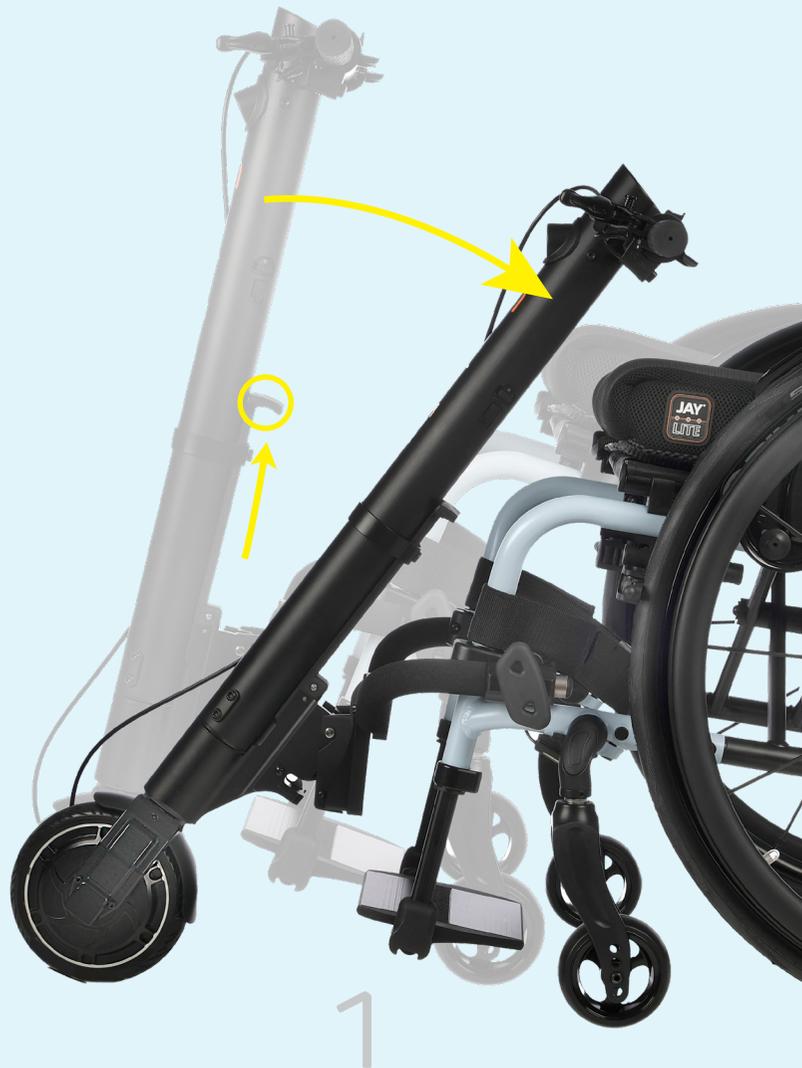

1 Ziehen Sie den Entriegelungshebel an der Lenksäule und halten Sie ihn gezogen. Ziehen Sie nun den Lenker vorsichtig nach hinten/unten.



Scannen Sie den QR-Code, um die Service-Videos zu sehen



2 Senken Sie nun das Zuggerät ab, bis die Lenkräder des Rollstuhls den Boden berühren. Um das F35 nur vom Zwischenrahmen abzunehmen, können die Schritte 1 und 2 unabhängig von den Schritten 3 und 4 durchgeführt werden.



3 Lösen Sie die Knebelschrauben der Klemmen auf beiden Seiten und ziehen Sie den Zwischenrahmen ab, bis die Rohre des Zwischenrahmens vollständig aus den Klemmen herausgezogen sind.



4 Entfernen Sie den Zwischenrahmen aus den Andockklappen.