



Kinetic Balance Ankelbæpænding, Sideudløsning
Art.nr. **Størrelse**

8.70002.0	XS
8.70002.1	S
8.70002.2	M
8.70002.3	L

Kinetic Balance

Ankelbæpænding Sideudløsning

BRUGERVEJLEDNING



KINETIC BALANCE

Produkt

KB Ankelbespænding, Sideudløsning
8.70002.x

Indhold

4 monteringsbeslag
4 bæltespænder
2 ankelseler
1 brugervejledning

Brug

Positioneringsudstyr til anklerne. Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt før brug.

Advarsel

Brug altid ankelselerne sammen med en hoftesele! Åbn altid ankelselerne, før du åbner hofteselen.

Montering

Montering og justering må kun udføres af autoriserede personer.

Monteringsvejledning

1. Sørg for at bruge det rigtige produkt i den rigtige størrelse.
2. Læs instruktionerne i pakken omhyggeligt.
3. Kontroller, at produktet er komplet.
4. 4. Bestem og marker derefter den bedste position for fødderne.
5. 5. Bestem den bedste placering for metalbeslagene og fastgør dem til bundpladen.
6. Fastgør ankelstropperne.
7. Fastgør ankelstropperne med spænderne.
8. Undgå ubehageligt tryk, og aflast trykket med jævne mellemrum. Hvis brugeren lider af hjerte-/karsygdomme eller nedsat følsomhed, bør selen ikke bruges, eller konsulter en læge.
9. Kontroller regelmæssigt produktet for slid på stropper, seler og polstrede dele. Kontroller, at stropperne er korrekt fastgjort og strammet dagligt.
10. Brug altid fod- og ankelbespændinger sammen med en hoftesele! Åbn altid ankelstropperne, før du åbner hofteselen.

Vedligeholdelse

Skal vaskes i hånden i max. 30°C. Må ikke tørretumbles. Kontroller produktet for slid på stropper, seler og polstrede dele ugentligt. Kontroller, at stropperne er korrekt fastgjort og strammet dagligt.



Sunrise Medical ApS
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
T: 70 22 43 49
E: info@sunrisemedical.dk
www.sunrisemedical.dk