


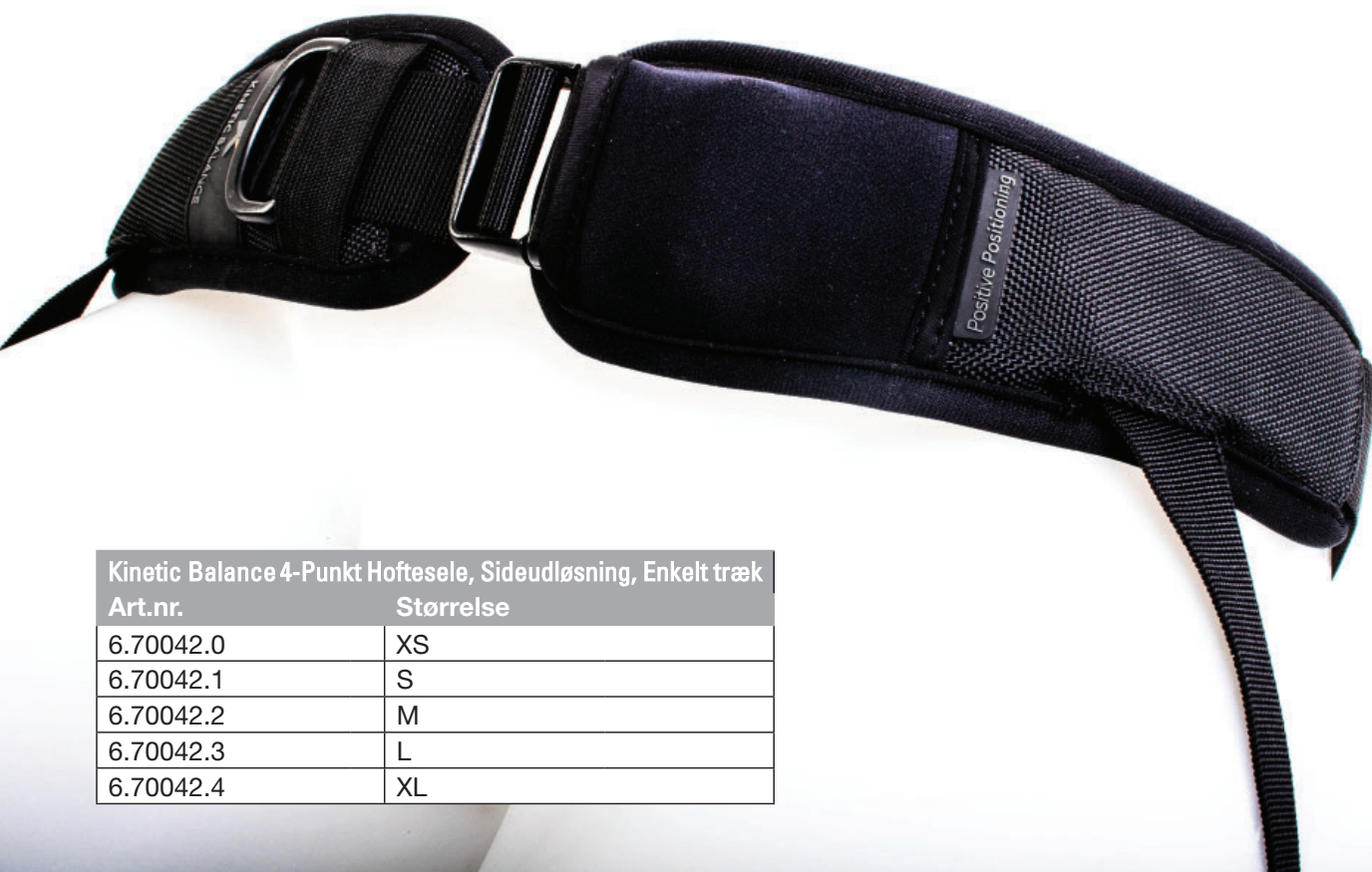

Kinetic Balance 4-Punkt Hofteseje, Sideudløsning, Enkelt træk

Art.nr.	Størrelse
6.70042.0	XS
6.70042.1	S
6.70042.2	M
6.70042.3	L
6.70042.4	XL

Kinetic Balance

4-Punkt Hofteseje Sideudløsning, Enkelt Træk

BRUGERVEJLEDNING



KINETIC BALANCE

Produkt

KB 4-Punkt Hoftese, Sideudlønning, Enkelt træk
6.70042.x

Indhold

4 rørklemmer
4 stropholdere
4 klemmespænder
4 bæltespænder
1 hoftese
1 brugervejledning

Brug

Sele til bækkenpositionering. Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt før brug. Dette er ikke en sikkerhedssele!

Advarsel

Dette er ikke en sikkerhedssele! Dette produkt bør ikke bruges som sikkerhedssele under transport.

Montering

Montering og justering må kun udføres af autoriserede personer.

Monteringsvejledning

1. Sørg for at bruge det rigtige produkt i den rigtige størrelse.
2. Læs instruktionerne i pakken omhyggeligt.
3. Kontroller, at produktet er komplet.
4. Juster klemmernes position.
Bemærk: ikke alle stole er udstyret med fastgørelsespunkter. Brug evt. rørklemmerne. Dette produkt skal installeres af en autoriseret person.
4a. Rørklemmen er velegnet til runde rør med en diameter på 19 til 15 mm. Brug indsatsgummiet for at opnå den korrekte diameter. Fastgør klemmen til røret samtidig med fastgørelse af klemmen.
5. Fastgør klemmerne med de korrekte værktøjer og materialer.
6. Sørg for at fastgøre klemmerne i den retning, selen trækkes.
7. Lad brugeren sidde i den ønskede position i stolen. Sørg for, at begge dele af selen er åbne og løse i forhold til brugeren.
8. Luk selen.
9. Juster klemmerne.
10. Brug finjustering for at opnå den korrekte trykfordeling mellem brugeren og selen.
11. Undgå ubehageligt tryk, og aflast trykket med jævne mellemrum. Hvis brugeren lider af hjerte-/karsygdomme eller nedsat følsomhed, bør selen ikke bruges, eller konsulter en læge. Undgå at trykke katetre eller brugerens mave ind.
12. Brug stropholderne til at holde stropenderne på plads. Sørg for, at stropperne ikke er i vejen for bevægelige dele af sædet eller kørestolen. Kontroller regelmæssigt produktet for slid på stropper, bæltter og polstrede dele. Kontroller, at stropperne er korrekt fastgjort og strammet dagligt.
13. Åbn selen, mens du trykker på det elastiske materiale på spænderne med tommel- og pegefingre.

Vedligeholdelse

Skal vaskes i hånden i max. 30°C. Må ikke tørretumbles. Kontroller produktet for slid på stropper, seler og polstrede dele ugentligt. Kontroller, at stropperne er korrekt fastgjort og strammet dagligt.



Sunrise Medical ApS
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
T: 70 22 43 49
E: info@sunrisemedical.dk
www.sunrisemedical.dk