



Kinetic Balance 2-Punkt Hoftelesele, Med kappe, Dobbelt træk

Art.nr.	Størrelse
6.70005.0	XS
6.70005.1	S
6.70005.2	M
6.70005.3	L
6.70005.4	XL

KINETIC BALANCE

2-Punkt Hoftelesele

Med kappe, Dobbelt træk

BRUGERVEJLEDNING



KINETIC BALANCE

Produkt

KB 2-Punkt Hoftese, med Kappe, Dobbelt træk
6.70005.x

Indhold

4 rørklemmer
4 stropholdere
4 klemmespænder
4 bæltespænder
1 hoftese
1 brugervejledning

Brug

Sele til bækkenpositionering. Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt før brug. Dette er ikke en sikkerhedssele!

Advarsel

Dette er ikke en sikkerhedssele! Dette produkt bør ikke bruges som sikkerhedssele under transport.

Montering

Montering og justering må kun udføres af autoriserede personer.

Monteringsvejledning

1. Sørg for at bruge det rigtige produkt i den rigtige størrelse.
2. Læs instruktionerne i pakken omhyggeligt.
3. Kontroller, at produktet er komplet.
4. Bestem positionen af 40 mm klemmerne.
Bemærk: ikke alle stole er udstyret med fastgørelsespunkter. Brug evt. rørklemmerne. Dette produkt skal installeres af en autoriseret person.
4a. Rørklemmen er velegnet til runde rør med en diameter på 19 til 15 mm. Brug indsatsgummiet for at opnå den korrekte diameter. Fastgør klemmen til røret samtidig med fastgørelse af klemmen.
5. Fastgør klemmen med de korrekte værktøjer og materialer.
6. Sørg for at fastgøre clipsen i den retning, selen trækkes.
7. Lad brugeren sidde i den ønskede position i stolen. Sørg for, at begge dele af hofteselen er åbne og løse i forhold til brugeren.
8. Luk selen.
9. Juster klemmerne.
10. Brug finjustering for at opnå korrekt trykfordeling mellem brugeren og hofteselen.
11. Undgå ubehageligt tryk, og aflast trykket med jævne mellemrum. Hvis brugeren lider af hjerte-/karsygdomme eller nedsat følsomhed, bør selen ikke bruges. Undgå at katetre eller brugerens mave trykkes ind.
12. Brug strop-holderne til at holde stropenderne på plads. Sørg for, at stropperne ikke er i vejen for bevægelige dele af sædet eller kørestolen.
13. Kontroller regelmæssigt produktet for slid på stropper, seler og polstrede dele. Kontroller, at stropperne er korrekt fastgjort og strammet dagligt.
14. Åbn spændet ved at trykke på det med en kuglepen eller en anden stump genstand, der har en diameter på mindre end 7 mm.

Advarsel

I en nødsituation kan hofteselen til enhver tid fjernes hurtigt ved at åbne klemmespænderne på den ene eller begge sider.

Vedligeholdelse

Skal vaskes i hånden i max. 30°C. Må ikke tørretumbles. Kontroller produktet for slid på stropper, seler og polstrede dele ugentligt. Kontroller, at stropperne er korrekt fastgjort og strammet dagligt.



Sunrise Medical ApS
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
T: 70 22 43 49
E: info@sunrisemedical.dk
www.sunrisemedical.dk