



Kinetic Balance Abduktionssele
Art.nr. Størrelse

9.70001.0	XS
9.70001.1	S
9.70001.2	M
9.70001.3	L

Kinetic Balance

Abduktionssele

BRUGERVEJLEDNING



KINETIC BALANCE

Produkt

KB Abduktionssele
9.70001.x

Indhold

4 rørklemmer
4 stropholdere
4 klemmespænder
4 bæltespænder
1 abduktionssele
1 brugervejledning

Brug

Sele til bækkenpositionering.

Læs og følg disse instruktioner omhyggeligt før brug. Dette er ikke en sikkerhedssele!

Advarsel

Dette er ikke en sikkerhedssele! Dette produkt bør ikke bruges som sikkerhedssele under transport.

Montering

Montering og justering må kun udføres af autoriserede personer.

Monteringsvejledning

1. Sørg for at bruge det rigtige produkt i den rigtige størrelse.
2. Læs instruktionerne i pakken omhyggeligt.
3. Kontroller, at produktet er komplet.
4. Fastgør placeringen af klemmerne på hver side for stropperne 1 og 2. Fastgør stropperne 3 og 4 til bagsiden af stolen ved at trække dem gennem klemmerne.
Bemærk: ikke alle stole er udstyret med fastspændingspunkter. Brug evt. rørklemmerne. Dette produkt skal installeres af en autoriseret person.
Fastgør klemmerne med de rigtige værktøjer og materialer.
- 4a. Rørklemmen er velegnet til runde rør med en diameter på 19 til 15 mm. Brug indsatsgummiet for at opnå den korrekte diameter.
Fastgør klemmen til røret samtidig med fastgørelse af klemmen.
- 4b. Placer sædet i den ønskede position i stolen på denne måde at ischial-leddene hviler i midten af sædet. Vær opmærksom på retningen angivet på sædet. Indikationen skal være synlig og pege fremad.
5. Lad brugeren sidde i sædedelen af stolen.
6. Træk stropperne 1 og 2 gennem klemmerne, og fastgør dem i den rigtige retning.
7. Juster stropperne 1 og 2. Undgå ubehageligt tryk, og aflast trykket med jævne mellemrum. Hvis brugeren lider af hjerte-/karsygdomme eller nedsat følsomhed, bør selen ikke bruges, eller konsulter en læge. Undgå at trykke katetre eller brugerens mave ind.
8. Brug stropholderne til at holde stropenderne på plads. Sørg for, at stropperne ikke er i vejen for bevægelige dele af sædet eller (kørestolen).
9. Tjek regelmæssigt produktet for slid på stropper, seler og polstrede dele. Kontroller, at stropperne er korrekt fastgjort og strammet dagligt.
10. Under brug kan abduktionsåbningen åbnes og sikres ved hjælp af spænderne med sideudløser på strop 1 og 2.

Vedligeholdelse

Skal vaskes i hånden i max. 30°C. Må ikke tørretumbles. Kontroller produktet for slid på stropper, seler og polstrede dele ugentligt. Kontroller, at stropperne er korrekt fastgjort og strammet dagligt.



Sunrise Medical ApS
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
T: 70 22 43 49
E: info@sunrisemedical.dk
www.sunrisemedical.dk