

E | F35

FIXATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

- Veillez toujours à ce que l'assistance soit éteinte avant de l'accrocher ou de la décrocher
- Toujours serrer les freins du fauteuil roulant
- Assurez-vous que le fauteuil soit entièrement fixé avant d'utiliser votre assistance F35
- Comme pour toutes les pièces mobiles, il existe un risque de coincement des doigts et/ou des vêtements
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez les pinces d'arrimage



1

Glissez les deux extrémités de la barre de liaison dans les pinces d'arrimage installées sur le fauteuil.



2

Tournez les vis à tête cylindrique de chacune des pinces dans le sens des aiguilles d'une montre. Serrez-les à la main jusqu'à ce que la barre de liaison soit solidement maintenue dans les pinces.



3

Prenez l'assistance de traction et insérez les deux goupilles fixes de l'interface dans le support central de la barre de liaison.

4

Poussez le guidon vers l'avant/le haut jusqu'à ce que le mécanisme de verrouillage s'enclenche automatiquement. Ne desserrez les freins du fauteuil roulant qu'une fois l'assistance verrouillée.

Empulse




Scannez le QR code pour regarder les vidéos de mise en service!

E | F35

RETRAIT ÉTAPE PAR ÉTAPE

- Veillez toujours à ce que l'assistance soit éteinte avant de l'accrocher ou de la décrocher
- Toujours serrer les freins du fauteuil roulant
- Assurez-vous que le fauteuil soit entièrement fixé avant d'utiliser votre assistance F35
- Comme pour toutes les pièces mobiles, il existe un risque de coincement des doigts et/ou des vêtements
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez les pinces d'arrimage

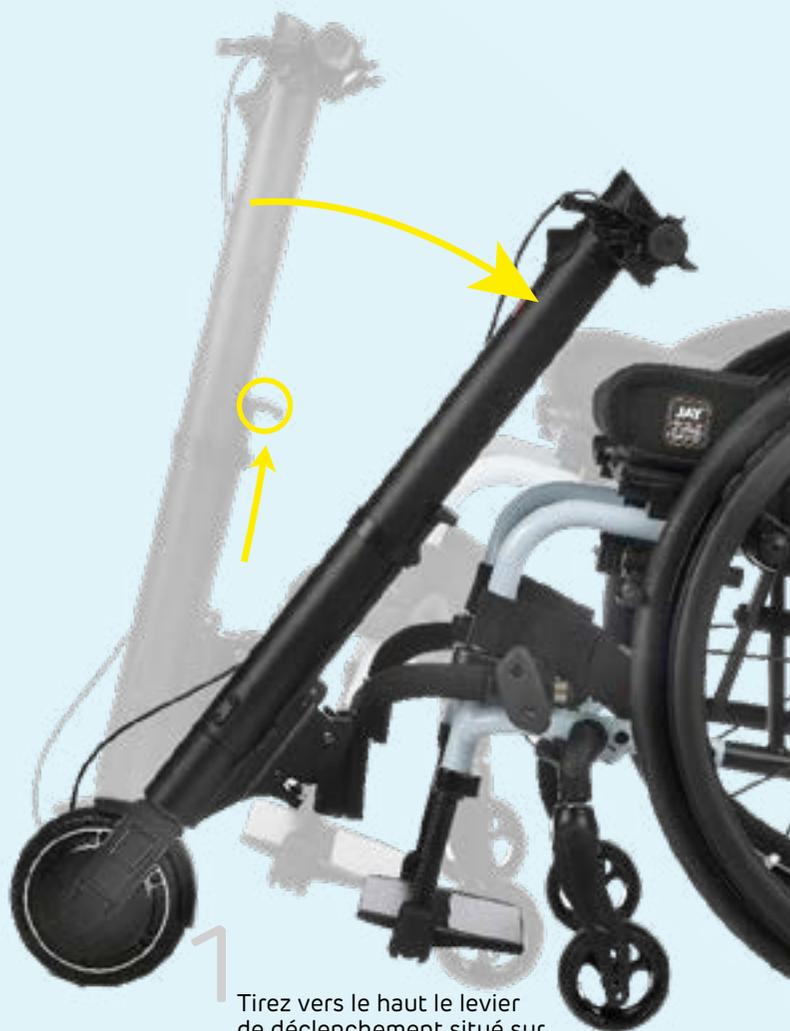

1
Tirez vers le haut le levier de déclenchement situé sur la colonne de direction et maintenez-le. Tirez ensuite doucement le guidon vers l'arrière/le bas.



2
Abaissez lentement l'assistance jusqu'à ce que les roues avant du fauteuil touchent le sol.
Pour retirer uniquement la F35 de la barre de liaison, les étapes 1 et 2 peuvent être effectuées indépendamment des étapes 3 et 4.



3
Dévissez les pinces de chaque côté et tirez l'interface centrale jusqu'à ce que les tubes de liaison soient complètement sortis des pinces.



4
Retirez l'ensemble des pinces d'arrimage.



Scannez le QR code pour regarder les vidéos de mise en service!