

E | F35

MONTAGEM - PASSO A PASSO

- Assegure-se que a handbike está desligada antes de a montar ou desmontar.
- Lembre-se de aplicar sempre os travões da cadeira de rodas antes de realizar qualquer ação.
- Verifique que a handbike está corretamente montada na cadeira de rodas antes da sua utilização.
- Tal como acontece com todas as peças móveis, existe o risco de prender os dedos ou a roupa.
- Dedique especial atenção ao manusear as abraçadeiras do tubo.



1 Introduza a estrutura inferior nas abraçadeiras do tubo.



2 Rode os parafusos das abraçadeiras no sentido horário até que estejam bem fixas, segurando firmemente os tubos da estrutura inferior.



3 Pegue na handbike e introduza o pino de travamento no suporte central da estrutura inferior.



4

Empurre o guidão para a frente e cima até que o pino de travamento esteja firmemente na posição. Assim que a handbike esteja totalmente bloqueada, pode soltar os travões da cadeira de rodas.




Leia o código QR para assistir aos vídeos de preparação para a marcha e ajustes.

E | F35

DESMONTAGEM - PASSO A PASSO

- Assegure-se que a handbike está desligada antes de a montar ou desmontar.
- Lembre-se de aplicar sempre os travões da cadeira de rodas antes de realizar qualquer ação.
- Verifique que a handbike está corretamente montada na cadeira de rodas antes da sua utilização.
- Tal como acontece com todas as peças móveis, existe o risco de prender os dedos ou a roupa.
- Dedique especial atenção ao manusear as abraçadeiras do tubo.

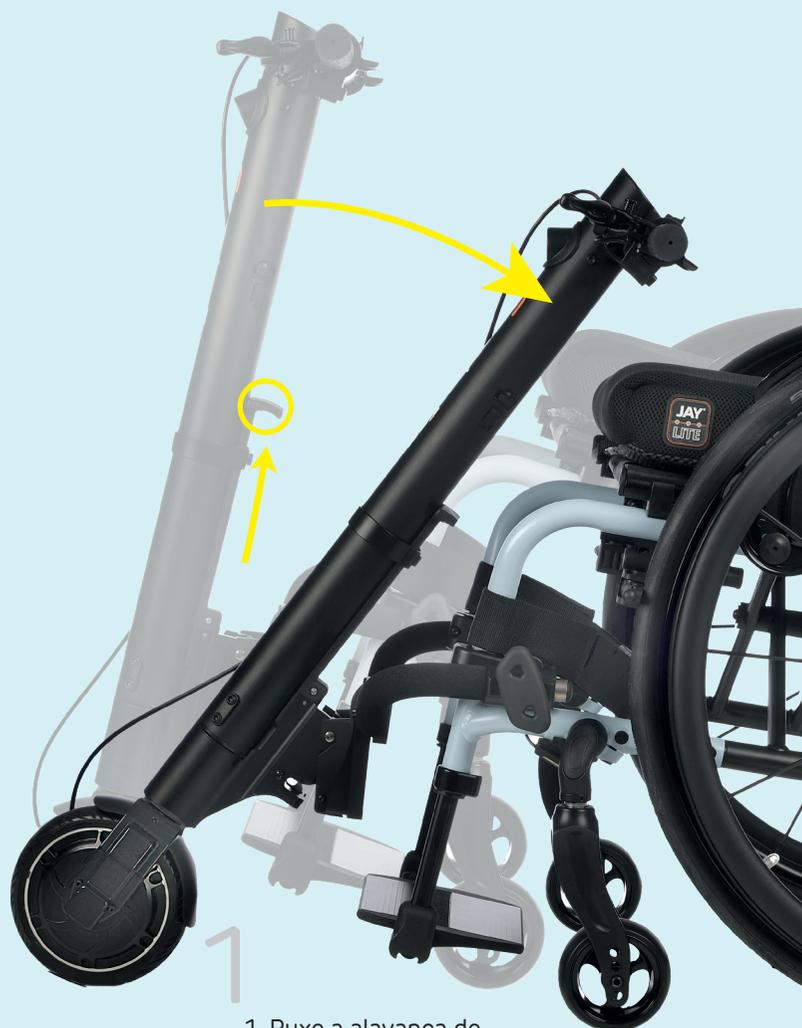

1. Puxe a alavanca de libertação localizada no guiador e empurre suavemente o guiador para trás e baixo.



2. Baixe lentamente a handbike até que as rodas da cadeira toquem no solo. Se pretender remover a estrutura inferior, siga os passos 3 e 4.



3. Afrouxe os parafusos das abraçadeiras do tubo em ambos os lados da armação e retire da estrutura inferior até que os tubos fiquem completamente fora das abraçadeiras.



4. Remova a estrutura inferior das abraçadeiras do tubo.



Leia o código QR para assistir aos vídeos de preparação para a marcha e ajustes.