

MONTERINGSVEJLEDNING

Sterling Elite2 stokkeholder, Sædemonteret



Beskrivelse

Sterling Elite2 stokkeholder, Sædemonteret

Varenummer

2537

MONTERINGSVEJLEDNING - Sterling Elite2 stokkeholder, Sædemonteret



1. Løsn boltene på armlænet med en 13 mm nøgle og afmonter armlænet.



2. Stokkeholderen sættes mod scooterens ryg hvorefter armlænet monteres udenpå stokkeholderens beslag, så stokkeholderen og armlæn fastgøres sammen.

Det er armlænets oprindelige bolte der anvendes.